

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Бергус»

Р.М. Гурбанов



» Октябрь 2019 г.

Инструкция
по применению
(взамен инструкции от 09.01.2017 г.)

Лейкопластырь фиксирующий
по ТУ 9393-004-01716953-2017

производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО«Бергус»),
Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово,
ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru.com, www.bergus24.ru

НАИМЕНОВАНИЕ:

«Лейкопластырь фиксирующий» по ТУ 9393-004-01716953-2017

Варианты исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий

- на тканевой основе белого цвета, размеры в см: 1х250, 1х500, 2х250, 2х500, 3х250, 3х500, 4х250, 4х500, 5х250, 5х500;

- на тканевой основе телесного цвета, размеры в см: 1,25х500, 2,5х500, 5х500.

Производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголобово, ул. Ленина, д.14.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для фиксации повязок или закрепления предметов медицинского назначения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Потребителями являются люди всех возрастных групп.

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА: Кратковременный, в отдельных случаях длительный контакт с неповрежденной кожей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для оказания помощи в лечебно-профилактических учреждениях, на производстве и в быту.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№	Наименование	Основа	Цвет основы	Клей	Размеры лейкопластыря
1	Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе	Тканевая	Белый	гипоаллергенный клей на основе	1х250, 1х500, 2х250, 2х500, 3х250, 3х500, 4х250, 4х500, 5х250, 5х500
			Телесный	синтетического каучука	1,25х500, 2,5х500, 5х500

Примечание: Допускаются отклонения от размеров, указанных на этикетке, не более 10 %

СОСТАВ: Тканевая основа, гипоаллергенный клей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Изделия используются при фиксации повязок или закрепления предметов медицинского назначения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Извлечь лейкопластырь фиксирующий из потребительской упаковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.

УСЛОВИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия - прекратите использование лейкопластыря фиксирующего и обратитесь к врачу.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Отсутствуют.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °С до 28 °С и влажности воздуха 60 - 80%.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования в диапазоне температур от - 50 до + 50 °С и влажности воздуха 60 - 80%.

Транспортирование изделий следует проводить в закрытом транспорте в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием изделий необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.

Изделия эксплуатируют при температуре от +10 °С до +35 °С и влажности воздуха 60 - 80%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании осуществляется обычным путем совместно с бытовыми отходами.

Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322.

Допускается утилизация отходов материалов на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Образующиеся отходы относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Не подлежащие использованию лейкопластыри фиксирующие относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок службы – 5 лет со дня изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Бергус», Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.14.

Генеральный директор

ООО «Бергус»

"14" октября 2019 г.



Гурбанов Рза Мамедага оглы

(Подпись)

ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5

листа (ов)

Генеральный директор

«31»

сентября

2020 года

Губанов Р. М.

