


Пластыри медицинские гидроколлоидные EXTRAPLAST Для лечения ожоговых ран, 10x10см

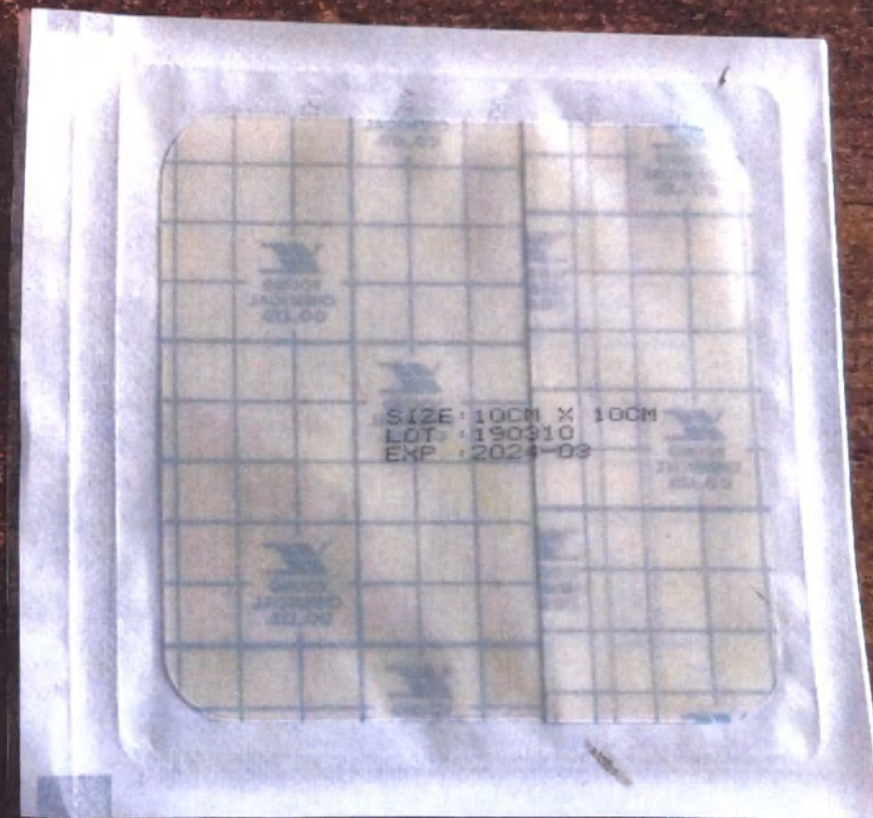

extraplast®

Пластыри медицинские
гидроколлоидные
Для лечения ожоговых ран,
3 шт., 10×10 см

www.extraplast.org

Пластыри медицинские гидроколлоидные EXTRAPLAST Для лечения ожоговых ран.

Назначение: Пластыри предназначены для создания на ране влажной среды и оптимальных условий для заживления ран, защиты раны от дополнительного травмирования кожей воздухом, попадания воды, грибов и бактерий.

Принцип действия: Пластырь от ожогов состоит из гидроколлоидного слоя, который вступает в реакцию с раневой поверхностью образуя влажную среду на поверхности раны. Это способствует эффективному процессу заживления раны — поддержанию необходимого уровня влажности в ране, защите от инфицирования, обеспечения охлаждения и очищения обожженного участка от продуктов некроза, снижение болевых ощущений. При этом гидроколлоидный пластырь не пересыхает и не приклеивает к ране.

Показания к применению: Используются для оказания первой помощи при ожогах 1, 2 степени.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Подготовка к применению:

- Промыть травмированную кожу под струей холодной воды в течение 10-15 минут;
- Промыть кожу чистыми руками;
- Не использовать противопролежневые маты совместно с пластырем.

Способ применения:

- Вскрыть индивидуальную упаковку с пластырем, снять защитный бумажный слой;
- Расположить пластырь таким образом, чтобы ожоговая поверхность была полностью закрыта, перекрывая края раны примерно на 1 см;
- Приклеить пластырь, слегка прижимая его для равномерной фиксации;
- Менять пластырь каждые 2-3 дня или по мере необходимости;
- При наклеивании пластыря сначала слегка отслаивать один его угол, а затем осторожно снять весь пластырь. На ране может возникнуть гидроколлоидный гель, который не мешает процессу заживления раны и улавливает выходящую влагу;
- Использовать пластырь вплоть до полного заживления ожоговой раны.

Меры предосторожности:

- Не использовать пластырь для глаз, участков тела с открытыми костями, сухожилиями, мышцами, при инфицированных ранах, грибах, сиктах, 3, 4 степени, а также, если площадь ожога больше чем размер пластыря;
- Не закрывать самостоятельно волдыри;
- При возникновении зуда, покраснения и сильной боли в области ожога немедленно обратиться к врачу;
- При возникновении двоения глаз, приклеивании пластыря проконсультироваться с врачом;
- При попадании в глаза промывать их под проточной водой, открытые глаза, в течение не менее 15 минут;
- При попадании в желудок проглотить горсть и выпить большое количество воды.

Условия хранения: Хранить в упаковке и в недоступном для детей месте.


Срок годности: 5 лет.


Регистрационное удостоверение №

от

Производитель: Young Chemical Co., Ltd., 89-89, Golden road-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.

Уполномоченная организация/ Импортёр в России: ООО «БОЛГАР»,
Россия, 115291, г. Москва, Каширский проезд, д. 19, помещение XIV

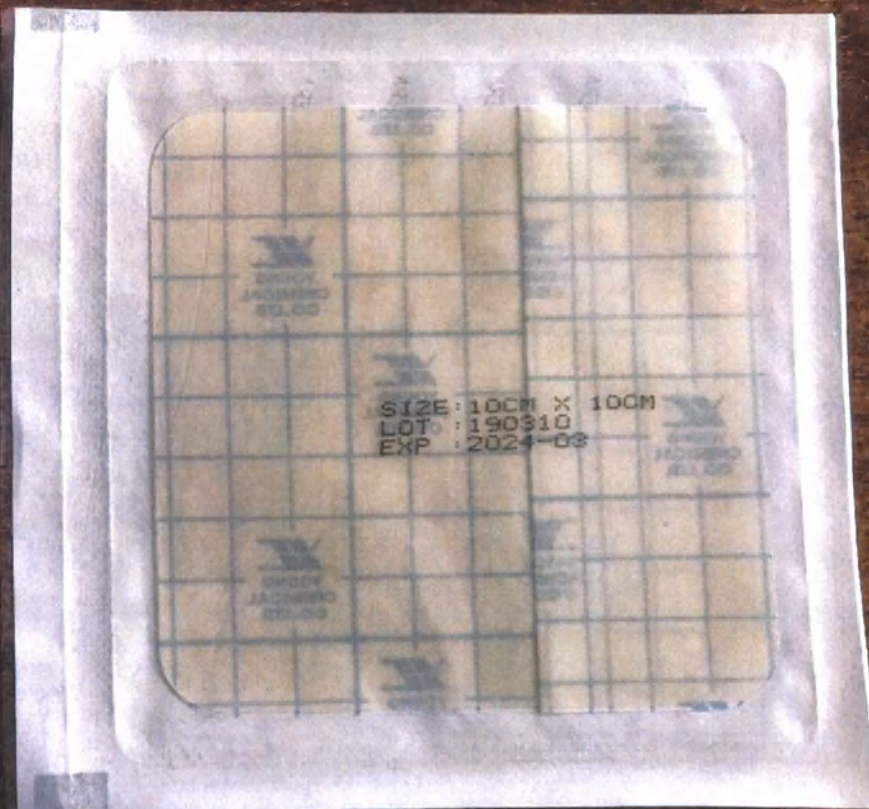

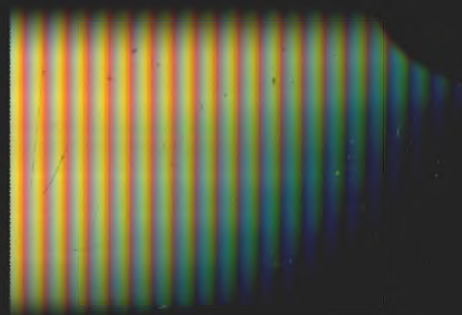

пластыри гидроколлоидные 7,5х7,5 см 1шт.





SIZE: 7.5CM X 7.5CM
LOT : 190310
EXP : 2024-03

extraplast®

Пластыри медицинские
гидроколлоидные
Для лечения ожоговых ран,
3 шт., 7,5х7,5 см

www.extraplast.org

Пластыри медицинские гидроколлоидные EXTRAPLAST Для лечения ожоговых ран.

Назначение: Пластырь предназначен для создания на ране влажной среды и оптимальных условий для заживления ран, защиты раны от дополнительной травматизации кожи извне, попадания воды, грязи и бактерий.

Принцип действия: Пластырь от ожогов состоит из гидроколлоидного слоя, который действует в реакции с раневой поверхностью: образует влажную среду на поверхности раны. Это способствует эффективному процессу заживления раны — поддержанию необходимого уровня влажности в ране, защиты от инфицирования, обеспечения охлаждения и очищения обожженного участка от продуктов некроза, снижению болевых ощущений. При этом гидроколлоидный пластырь не пересыхает и не прилипает к ране.

Показания к применению: Используется для оказания первой помощи при ожогах 1, 2 степени.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Подготовка к применению:

- Промыть травмированную зону под струей холодной воды в течение 10-15 минут;
- Просушить кожу естественным путем;
- Не использовать противожоговые мази совместно с пластырем.

Способ применения:

- Открыть индивидуальную упаковку с пластырем, снять защитный бумажный слой;
- Разложить пластырь таким образом, чтобы ожоговая поверхность была полностью закрыта, перекрывая края раны примерно на 1 см;
- Приклеить пластырь, слегка прижимая его для равномерной фиксации;
- Менять пластырь каждые 2-3 дня или по мере необходимости;
- При замене пластыря сначала слегка отсоединить один его угол, а затем осторожно снять весь пластырь. На ране может присутствовать гидроколлоидный гель, который не мешает процессу заживления раны и удаляется водой;
- Использовать пластырь вплоть до полного заживления ожоговой раны.

Меры предостережения:

- Не использовать пластырь для глаз, участков тела с открытыми костями, сухожилиями, мышцами, при инфицированных ранах, грибах, ожогах 3, 4 степени, а также, если площадь ожога больше чем размер пластыря;
- Не вскрывать самостоятельно волдыри;
- При возникновении отека, покраснения и сильной боли в области ожога немедленно обратиться к врачу;
- При сахарном диабете перед применением пластыря проконсультироваться с врачом;
- При попадании в глаза промыть их под проточной водой, открыв веки, а течение не менее 15 минут;
- При попадании в желудок прополоскать горло и выпить большое количество воды.

Условия хранения: Хранить в упакованном виде в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Регистрационное удостоверение №

01

Производитель: Young Chemical Co., Ltd., 80-35, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, помещение XIV



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 4 (четыре) листа (ов)
Исполнительный директор
ООО «БОЛЕАР»
О.И. Шабров

