

по печати

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ФАКТОР-МЕД»


В.Г. Малышев

«08» ноября 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Полоска для иммунохроматографического определения хорионического
гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности (БИ-
ШУР-С) по ТУ 9398-027-51062356-2016**

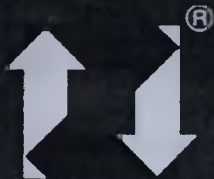

BEE-SURE-S®

БИ-ШУР-С

IN VITRO TEST

**ТЕСТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Способ применения:

1. Открыть пакет и достать полоску.
2. Поместить в ёмкость с мочой полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 1-5 минут, но не позднее 10 минут.

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 2-30°C



БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ



БЕРЕМЕННОСТЬ ЕСТЬ

Производитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", 425011, Россия, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Ленина, д. 64, помещение 3, тел.: 8(495) 956-75-85,

www.faktor.ru info@faktor.ru

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная, д. 2.

Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче
для ранней диагностики беременности (БИ-ШУР-С)
по ТУ 9398-027-51 062356-2016


Для профессионального применения и самотестирования.

РУ № от г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в электронном виде
(на сайте производителя).

Состав:

- Полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1 шт.

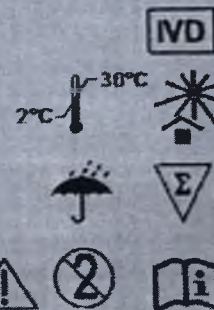

Срок годности 24 мес
Серия № 27111
Годен до: 2021



Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent
НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги
DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «ФАКТОР-МЕД»

На 3 листах (трех)

Генеральный директор:


/Малышев В.Г./

подпись



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ФАКТОР-МЕД»

В.Г. Малышев


« 08 » ноября 2019 г.



Макеты маркировки медицинского изделия

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности (БИ-ШУР-С)

по ТУ 9398-027-51062356-2016

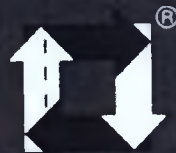

BEE-SURE-S

БИ-ШУР-С

IN VITRO TEST

**ТЕСТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Способ применения:

1. Вскрыть пакет и достать полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 1-5 минут, но не позднее 10 минут.

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 2-30°C



БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ



БЕРЕМЕННОСТЬ ЕСТЬ

Производитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", 425011, Россия, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Ленина, д. 64, помещение 3, тел.: 8(495) 956-75-85,
www.faktor.ru info@faktor.ru

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д.2.

Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче
для ранней диагностики беременности (БИ-ШУР-С)
по ТУ 9398-027-51062356-2016


Для профессионального применения и самотестирования.

РУ № от г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в электронном виде
(на сайте производителя).

Состав:

- Полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1шт.

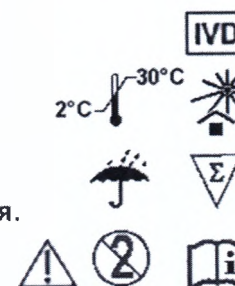

Срок годности 24 месяца

Серия №

Годен до:

Групповая упаковка



Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности (БИ-ШУР-С)

по ТУ 9398-027-51062356-2016

РУ № от 20.. г.

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Кол-во:

шт.

Срок годности: 24 месяца



4 607024 582077



Масса нетто -
Масса брутто -
Масса нетто
изделия -

Транспортная упаковка



Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности (БИ-ШУР-С)

по ТУ 9398-027-51062356-2016

РУ № от 20.. г.

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Кол-во:

шт.

Срок годности: 24 месяца



1 46 07024 58207 4



Масса нетто -
Масса брутто -
Масса нетто
изделия -

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «ФАКТОР-МЕД»

На 3 листах (трех)

Генеральный директор:

/Малышев В.Г./

подпись

