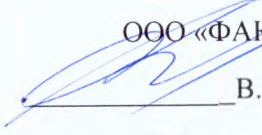


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ФАКТОР-МЕД»

 В.Г. Малышев

« 08 » ноября 2019 г.



Макеты маркировки медицинского изделия

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина
(ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности
ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Производитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Ленина, д. 64, п. 3, тел.: 8(495) 956-75-85, www.faktor.ru info@faktor.ru
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, Троицк, ул. Промышленная, д.2.

Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней
диагностики беременности ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Вариант исполнения 1.

Для профессионального применения и самотестирования.

РУ № от г.

Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде
(на сайте производителя).

Состав: Полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1 шт.

Способ применения:

1. Вскрыть пакет и достать полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой полоску стрелками вниз
до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую горизонтальную
поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально
через 1- 5 минут, но не позднее 10 минут.



Беременности нет



Беременность есть




Срок годности 24 месяца.

Серия №

Годен до:



Вера
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

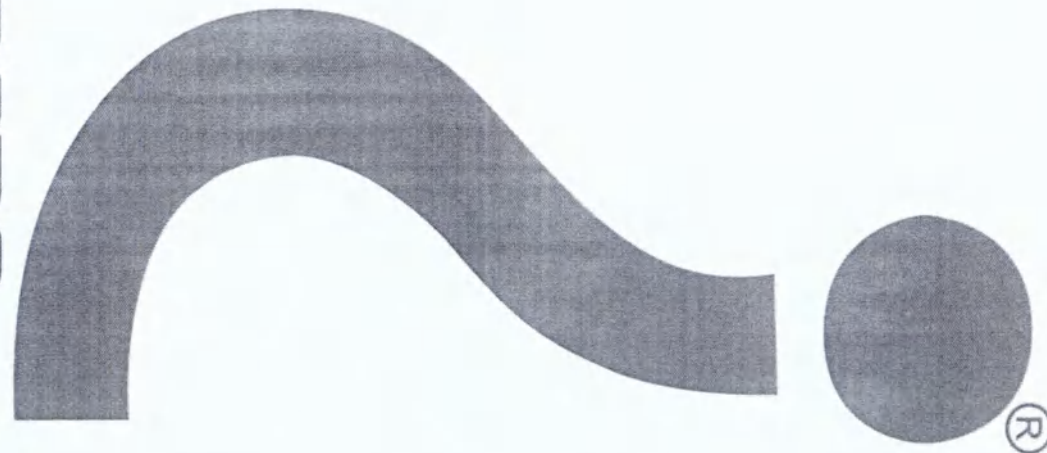

Групповая упаковка



® Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Вариант исполнения 1

РУ № от 20.. г.

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Кол-во:

шт.

Срок годности: 24 месяца



4 607024 581988

Масса нетто -

Масса брутто -

Масса нетто
изделия -

Транспортная упаковка



® Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Вариант исполнения 1

РУ № от 20.. г.

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Кол-во:

шт.

Срок годности: 24 месяца



1 46 07024 58198 5

Масса нетто -

Масса брутто -

Масса нетто
изделия -

Производитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Ленина, д. 64, п. 3, тел.: 8(495) 956-75-85, www.faktor.ru info@faktor.ru
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, Троицк, ул. Промышленная, д.2.



Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней
диагностики беременности ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Вариант исполнения 2.

Для профессионального применения и самотестирования.

РУ № от г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде
(на сайте производителя).

Состав: Полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1 шт.

Способ применения:


1. Вскрыть пакет и достать полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 1- 5 минут, но не позднее 10 минут.



Беременности нет



Беременность есть

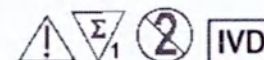


Срок годности 24 месяца.

Серия №

Годен до:



Вера
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

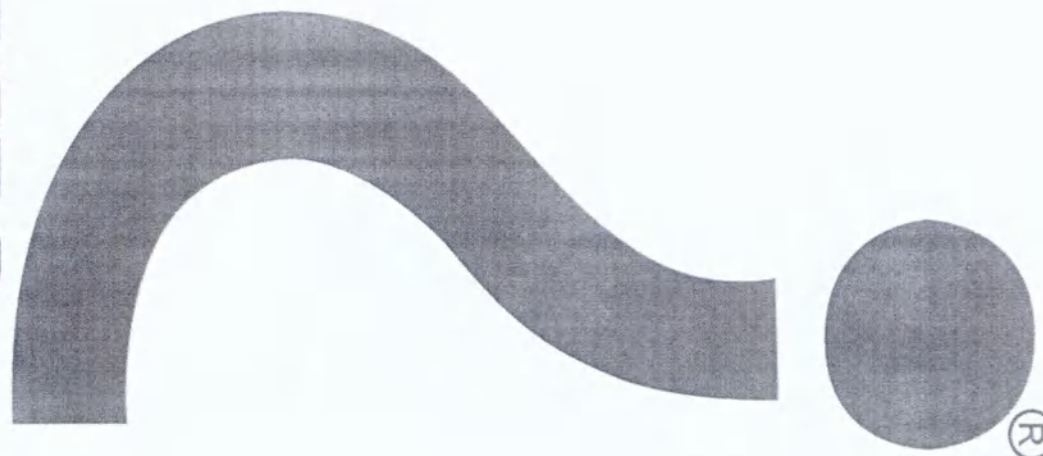



Групповая упаковка



Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Вариант исполнения 2

РУ № от 20.. г.

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Кол-во: шт.

Срок годности: 24 месяца



4 607024 582015



Масса нетто -
Масса брутто -
Масса нетто
изделия -

Транспортная упаковка



Производитель: ООО «ФАКТОР-МЕД», Россия,
425011, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Ленина, дом 64, помещение 3.
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru. тел.: 8(495)956-75-85
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Вариант исполнения 2

РУ № от 20.. г.

Серия №

Дата изготовления:

Годен до:

Кол-во:

Срок годности: 24 месяца



1 46 07024 58201 2



Масса нетто -
Масса брутто -
Масса нетто
изделия -

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «ФАКТОР-МЕД»

На 6 листах (шесть)

Генеральный директор:

подпись


/Малышев В.Г./



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ФАКТОР-МЕД»

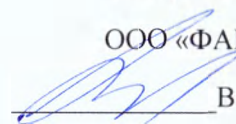
 В.Г. Малышев

« 08 » ноября 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия


Полоска для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина
(ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности
ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

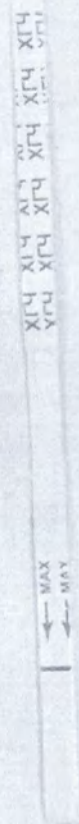

Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

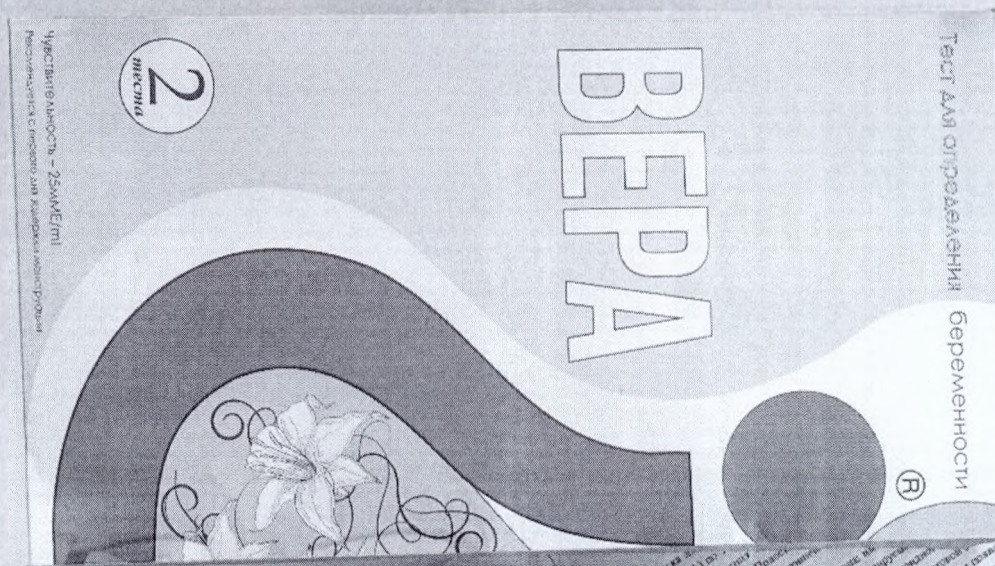

Полоска для определения беременности (ХГЧ-ИХА-БЕРА) состоит из двух зон: тестовой и контрольной. Тестовая зона предназначена для определения наличия ХГЧ в моче. Контрольная зона предназначена для определения наличия антител к ХГЧ. При наличии антител к ХГЧ в моче тестовая зона окрашивается в розовый цвет, что свидетельствует о беременности. При отсутствии антител к ХГЧ в моче тестовая зона остается белой, что свидетельствует об отсутствии беременности.

Полоска ХГЧ-ИХА-БЕРА предназначена для определения наличия ХГЧ в моче. При наличии антител к ХГЧ в моче тестовая зона окрашивается в розовый цвет, что свидетельствует о беременности. При отсутствии антител к ХГЧ в моче тестовая зона остается белой, что свидетельствует об отсутствии беременности.

Чувствительность определения (минимальное количество ХГЧ, при котором тест дает положительный результат): 25 мМЕ/мл.

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Чувствительность определения (минимальное количество ХГЧ, при котором тест дает положительный результат): 25 мМЕ/мл.

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

Производитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Ленина, д. 64, п. 3, тел.: 8(495) 956-75-85, www.faktor.ru info@faktor.ru
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, Троицк, ул. Промышленная, д. 2.



Полоска для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней
диагностики беременности ХГЧ-ИХА-ВЕРА по ТУ 9398-391-51062356-2016

Вариант исполнения 1.

Для профессионального применения и самотестирования.


РУ № от г. Не принимать внутрь!

Инструкция по применению в бумажном или электронном виде
(на сайте производителя).


Состав: Полоска в индивидуальном пакете с осушителем - 1 шт.

Способ применения:


1. Вскрыть пакет и достать полоску.
2. Опустить в ёмкость с мочой полоску стрелками вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд.
3. Положить полоску на сухую горизонтальную поверхность тестовой зоной вверх.
4. Оценить результат реакции визуально через 1-5 минут, но не позднее 10 минут.

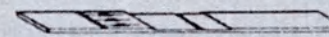

Беременности нет

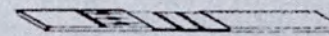


Беременность есть

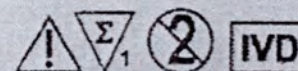

Срок годности 24 месяца.

Серия № 011019

Годен до: 2021.10

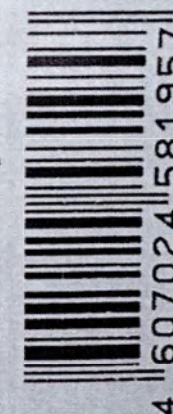

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «ФАКТОР-МЕД»

На 4 листах (без шрифта)

Генеральный директор:



/Малышев В.Г./

подпись

