

Инструкция по применению медицинской иглы для инъекций.

При внутримышечном введении лекарственных препаратов и растворов

1. Перед инъекцией необходимо вымыть руки с применением дезинфицирующих средств.
2. Убедиться в целостности индивидуальной упаковки.
3. Вынуть из упаковки одну иглу, надеть ее на шприц, убедиться в плотности соединения, и снять с иглы защитный колпачок.
4. Удалить воздух из шприца и иглы, держа шприц вертикально, осторожно продвигая поршень вверх.
5. Протереть кожу в месте инъекции смоченной спиртом ватой. Большим и указательным пальцем взять кожу в складку. Ввести иглу под кожу. После необходимой манипуляции быстро вынуть иглу и прижать место укола стерильной сухой ватой, закрыть место инъекции лейкопластырем.
6. После применения утилизировать иглу согласно действующим инструкциям по утилизации использованных медицинских изделий.

При внутривенном введении лекарственных препаратов и отборе крови

1. Для выполнения процедуры венопункции в области локтевой ямки необходимо наложить жгут в средней трети плеча.
2. Обработать область локтевого сгиба салфеткой или ватным шариком с кожным антисептиком.
3. Зафиксировать вену пальцем, натянув кожу над местом венопункции.
4. Пунктировать вену иглой надетой на шприц или присоединенной к инфузионной-трансфузионной системе, при появлении крови в канюле иглы ослабить жгут.
5. Произвести необходимые процедуры.
6. Извлечь иглу из вены, прижать место пункции на несколько минут салфеткой или ватным шариком с кожным антисептиком.
7. Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области венопункции, наклеить лейкопластырь
8. Утилизировать иглу и использованные материалы.

Меры предосторожности

1. Обращайтесь со всеми биологическими образцами и острыми предметами (Иглами - адаптерами) в соответствии с правилами, принятыми в вашем медицинском учреждении
2. Обратите особое внимание на все случаи контакта с биологическими образцами (например, при случайном уколе иглой во время венопункции), поскольку при этом возможна передача возбудителей опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты и др.).
3. Сбрасывайте все острые предметы, используемые в процедурах взятия крови (Иглы - адаптеры) в специальные контейнеры для последующей утилизации.
4. В целях снижения риска заражения проводите процедуру взятия крови в специальных перчатках.
5. Не используйте стерильную медицинскую иглу с истекшим сроком годности или нарушенной стерильной упаковкой.



© SF Medical Products GmbH • Kurfürststrasse 84 • DE-10787 Berlin

Меры профилактики

1. Проверяйте медицинскую иглу для инъекций перед использованием.
2. Не используйте поврежденную медицинскую иглу для инъекций.
3. Запрещается повторное надевание на иглу снятого защитного футляра.
4. После окончания процедуры сбросьте иглу в контейнер для утилизации.

для получения дальнейшей информации обращайтесь напрямую к производителю продукции:

СФ Медикал Продактс ГмбХ

Кurfürstengasse 84, 10787 Берлин - Германия

тел.: +49 30/26 39 97 95, факс: +49 30/26 39 97 96, info@sfmedical.de

Postanschrift
SF Medical Product GmbH
Kurfürststrasse 84
10787 Berlin
GERMANY

Kontakt
Telefon: +49 (0) 30 / 26 39 97 95
Telefax: +49 (0) 30 / 26 39 97 96
E-Mail: info@sfmedical.de
Web: www.sfmedical.de

Bankverbindung Deutsche Bank
Kontokorrent: 344 79 76 00
Bankleitzahl: 100 700 24
IBAN: DE79 48 1007 0024 0344 7976 00
SWIFT-BIC: DEUTDE33HAN

Handelsregister
HRB 103242 B
AG Charlottenburg
USt-ID-Nummer: DE246306968
St. Nr.: 20466/12423

Geschäftsführung
Natalia Sauerwein
Geschäftssitz: Berlin - Germany

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
2/дво /

