

Инструкция по применению

Капли увлажняющие Опти-Фри® (Opti-Free rewetting drops)

Регистрационное удостоверение №
от 2011 г.

- Капли увлажняющие Опти-Фри® используются для увлажнения любых типов мягких (гидрофильных) контактных линз при их применении. Снятие линз не требуется!
- Капли увлажняющие Опти-Фри® не содержат тиомерсала и сорбиновой кислоты.
Капли увлажняющие Опти-Фри® являются безопасными и эффективными для пациентов с повышенной чувствительностью к тиомерсалу.
- Используйте капли согласно рекомендациям Вашего специалиста по контактной коррекции.

ОПИСАНИЕ

Капли увлажняющие Опти-Фри® представляют собой стерильный стабилизированный водный раствор, 1 мл которого содержит декстран 70 1,0 мг; натрия хлорид 6,0 мг; натрия борат 3,5 мг; калия хлорид 1,2 мг; поликватерний-1 раствор, эквивалентно поликватерния-1 (polyquaternium-1) 0,01 мг; гидроксипропилметилцеллюлоза (3550 мПа.с) 3,0 мг; натрия гидроксид и/или концентрированная хлористоводородная кислота для доведения pH; вода очищенная до 1 мл.

ДЕЙСТВИЕ

Капли увлажняющие Опти-Фри® увлажняют Ваши линзы и способствуют удалению веществ и частиц, способных вызвать раздражение и/или дискомфорт.

ПОКАЗАНИЯ

Капли увлажняющие Опти-Фри® облегчают раздражение, дискомфорт и затуманивание зрения, которые могут быть вызваны подсыханием линзы в процессе применения.

Капли увлажняющие Опти-Фри® могут использоваться с любыми типами мягких (гидрофильных) контактных линз: дневного применения, длительного применения и одноразовыми.

- Увлажнение линз дневного применения по мере необходимости в течение дня.
- Увлажнение линз длительного применения и одноразовых после сна и по мере необходимости в течение дня.
- Увлажнение линз длительного применения и одноразовых линз перед сном.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность к любому из компонентов данного препарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь кончиком пипетки к каким-либо поверхностям во избежание бактериального загрязнения раствора.

- Закрывайте флакон после использования.
- Мойте руки перед тем, как снимать или надевать контактные линзы.
- Проблемы с контактными линзами и средствами по уходу за ними могут приводить к серьезным повреждениям глаз.

ПРОБЛЕМЫ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ И СРЕДСТВАМИ ПО УХОДУ ЗА НИМИ МОГУТ ПРИВОДИТЬ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ГЛАЗ. Строго следуйте указаниям Вашего специалиста по контактным линзам и инструкции по применению контактных линз и средств по уходу за ними. **ПРОБЛЕМЫ С ГЛАЗАМИ, ВКЛЮЧАЯ ЯЗВУ РОГОВИЦЫ, МОГУТ РАЗВИТЬСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ. ПОЭТОМУ ЕСЛИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ ПОСТОЯННЫЙ ДИСКОМФОРТ, ЧРЕЗМЕРНОЕ СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗРЕНИЯ, ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ, НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ЛИНЗЫ И ОБРАТИТЕСЬ К ОФТАЛЬМОЛОГУ.**

- Лица, использующие контактные линзы, должны регулярно посещать специалиста.
- Беречь от детей.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В результате использования контактных линз могут возникнуть следующие проблемы:

- зуд, жжение, раздражение глаз
- слезотечение
- необычные выделения из глаз
- покраснение глаз
- снижения остроты зрения
- затуманивание зрения
- повышенная чувствительность к свету (фотофобия)
- сухость глаз

Если Вы ощущаете дискомфорт, сильное слезотечение, изменения зрения или покраснение глаз немедленно снимите линзы и обратитесь к специалисту.

Если после снятия линз эти симптомы прошли и линзы выглядят неповрежденными - тщательно очистите и продезинфицируйте их, затем снова наденьте. Если симптомы сохраняются, **НЕМЕДЛЕННО** обратитесь к офтальмологу. Не надевайте вновь поврежденные линзы.

Любое из перечисленных выше состояний может быть проявлением серьезных заболеваний глаз, таких как инфекция, язва роговицы, неоваскуляризация или ирит. Для выявления причины появления симптомов, обратитесь к врачу – это позволит избежать серьезных повреждений глаз.

ПРИМЕНЕНИЕ

Капли увлажняющие Опти-Фри® следует использовать по мере необходимости в течение дня - 1-2 капли закапать в глаз и поморгать 2-3 раза. Если после применения данного препарата симптомы раздражения не прошли, немедленно снимите линзы и обратитесь к врачу.

УПАКОВКА

Капли увлажняющие Опти-Фри® выпускаются в стерильных пластиковых флаконах. Дата изготовления, номер партии и срок годности указаны на упаковке. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия /
s.a. Alcon-Couvreur n.v.
2870 Puurs, Belgium

Владелец регистрации на территории Российской Федерации
ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:
109004, Москва, ул. Николоямская, 54
Тел. (495) 961-13-33



ВСЕГО
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
2 ЛИСТА

