

**Общество с ограниченной ответственностью
«Мебельный Комбинат №7»**

**Набор мебели модульной Dr.DOORS™ для медицинских
кабинетов по ТУ 32.50.30-001-81645316-2019**

Руководство по эксплуатации
Первоначальный выпуск

**Россия, 156001, Костромская область,
г. Кострома, ул. Московская, д.105**

1. Введение

1.1. Меры безопасности. К сборке и эксплуатации изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее руководство по эксплуатации и конструкцию изделия.

1.2. Варианты исполнения изделий представлены в Таблице 1.

1.3. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с содержанием разделов «Технические характеристики», «Устройство», «Правила эксплуатации и требования по технике безопасности», «Комплект поставки» и «Гарантии изготовителя».

2. Назначение

2.1 Набор мебели модульной Dr.DOORS™ для медицинских кабинетов по ТУ 32.50.30-001-81645316-2019 (далее – мебель, изделия) предназначена для создания функционального рабочего места и мест для хранения, а также для разделения пространства на удобные отдельные рабочие зоны для персонала, для хранения оборудования, расходных материалов, медицинских изделий, записей, образцов и других предметов.

Нестерильные изделия для многократного применения.

Изделия применяют в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений. Потенциальные пользователи: медицинский персонал и пациенты.

Показания к применению:

Изделия применяются по назначению медицинским персоналом и пациентами в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений с целью создания комфорта для пользователей в медицинских кабинетах ЛПУ.

Побочное действие и противопоказания: Не выявлены.

3. Технические характеристики

3.1 Описание изделий

3.1.1 Тумба для материалов (при необходимости): ТМ-1; ТМ-2; ТМ-3; ТМ-4; ТМ-5; ТМ-6; ТМ-7; ТМ-8; ТМ-9; ТМ-10; ТМ-11; ТМ-12; ТМ-13; ТМ-14; ТМ-15; ТМ-16; ТМ-17; ТМ-18; ТМ-19; ТМ-20; ТМ-21.

Тумбы для материалов изготовлены: корпус из ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм, столешница ламинированная или из искусственного камня толщиной 38 мм, фасад/фасады из МДФ толщиной 19 мм с покрытием "эмаль" или алюминиевая рама со стеклом, ручка-скоба, опоры регулируемые алюминиевые Ø32 мм высотой 100 мм, полка каркасная из ЛДСП толщиной 16 мм или стекло толщиной 6 мм, ящик выдвижной с доводчиком, сетка выдвижная алюминиевая, столешница выдвижная с фиксатором.

Основные параметры и габаритные размеры вариантов исполнения тумбы указаны в таблице 1.

3.1.2 Модуль с мойкой (при необходимости): ТМм-1; ТМм-2; ТМм-3; ТМм-4; ТМм-5; ТМм-6; ТМм-7; ТМм-8; ТМм-9.

Модуль с мойкой изготовлен: корпус из ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм, столешница ламинированная или из искусственного камня

толщиной 38 мм, фасад/фасады из МДФ толщиной 19 мм с покрытием «эмаль», ручка-скоба, опоры регулируемые алюминиевые Ø32 мм высотой 100 мм, полка каркасная ЛДСП толщиной 16 мм, ящик выдвижной с сеткой алюминиевой, мойками из нержавеющей стали: круглой с одной чашей Ø460 мм глубиной 165 мм и с двумя прямоугольными чашами (ДхШхГ) мм – 780х500х170, поддон гигиенический, ведро мусорное (при необходимости).

Основные параметры и габаритные размеры вариантов исполнения модуля указаны в таблице 1.

3.1.3 Шкаф навесной (при необходимости): ШН-1; ШН-2; ШН-3; ШН-4; ШН-5; ШН-6; ШН-7.

Шкаф навесной изготовлен: корпус из ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм, фасад/фасады из МДФ толщиной 19 мм с покрытием «эмаль», или алюминиевая рама со стеклом, ручка-скоба, полка каркасная из ЛДСП толщиной 16 мм или из стекла толщиной 6 мм.

Основные параметры и габаритные размеры вариантов исполнения шкафа навесного указаны в таблице 1.

3.1.4 Шкаф для медикаментов (при необходимости): ШМ-1; ШМ-2; ШМ-3; ШМ-4; ШМ-5; ШМ-6

Шкаф для медикаментов изготовлен: корпус из ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм, фасад/фасады из МДФ толщиной 19 мм с покрытием «эмаль», или алюминиевая рама со стеклом, ручка-скоба, опоры регулируемые алюминиевые Ø32 мм высотой 100 мм, полка каркасная ЛДСП толщиной 16 мм или стекло толщиной 6 мм, ящик выдвижной с доводчиком.

Основные параметры и габаритные размеры вариантов исполнения шкафа для медикаментов указаны в таблице 1.

3.1.5 Шкаф для документов (при необходимости): ШД-1; ШД-2; ШД-3.

Шкаф для документов изготовлен: корпус из ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм, фасад/фасады из МДФ толщиной 19 мм с покрытием «эмаль», ручка-скоба, опоры регулируемые алюминиевые Ø32 мм высотой 100 мм, полка каркасная ЛДСП толщиной 16 мм, ящик выдвижной с доводчиком.

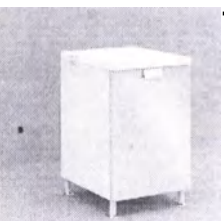
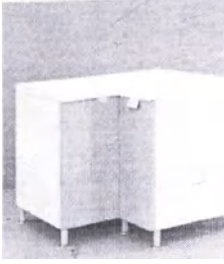
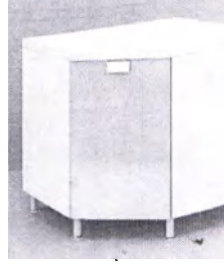
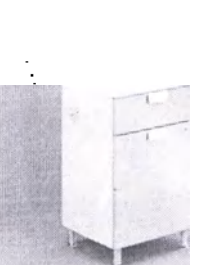
Основные параметры и габаритные размеры вариантов исполнения шкафа для документов указаны в таблице 1.

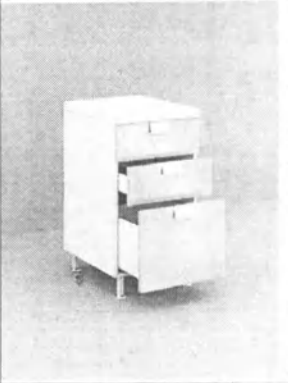
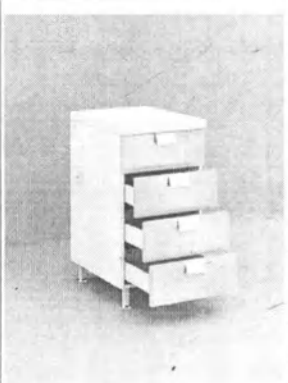
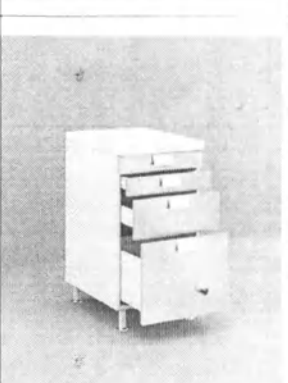
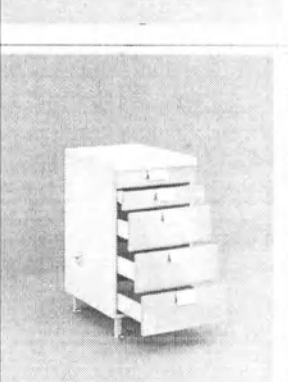
3.1.6 Стол врача мобильный (при необходимости): СМ-1.

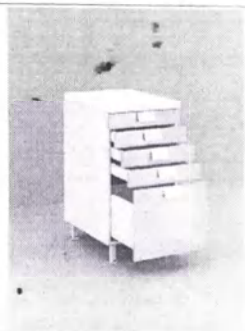
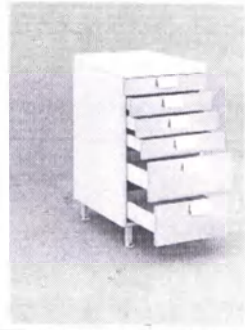
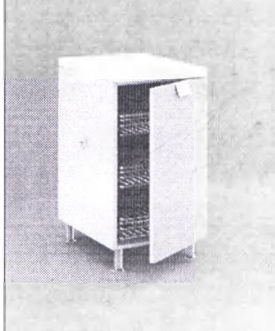
Стол врача мобильный изготовлен: корпус из ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм, фасад/фасады из МДФ толщиной 19 мм с покрытием «эмаль», ручка-скоба, подстолье стальное окрашенное на колесах.

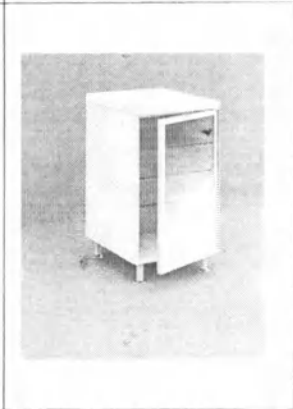
Основные параметры и габаритные размеры стола указаны в таблице 1.

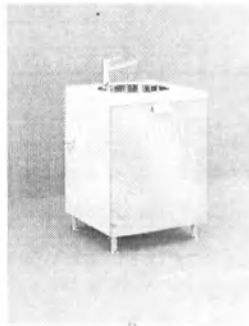
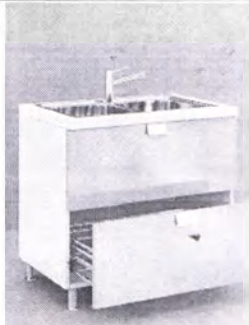
Таблица 1 Технические характеристики

№ п.п.	Описание	Артикул	Внешний вид
1	Тумба для материалов с одним распашным фасадом с покрытием «эмаль». Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, опор алюминиевых, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х860 Масса не более 42кг	TM-1	
2	Тумба для материалов с двумя распашными фасадами с покрытием «эмаль». Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х556х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х600х860 Масса не более 58 кг	TM-2	
3	Тумба для материалов угловая со складным фасадом с покрытием «эмаль». Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х556х868 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, опор алюминиевых, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х900х860 Масса не более 85 кг	TM-3	
4	Тумба для материалов угловая со скошенным фасадом с покрытием «эмаль». Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х556х868. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, опор алюминиевых, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х900х860 Масса не более 74 кг	TM-4	
5	Тумба для материалов с распашным фасадом и выдвижным ящиком фасадом с покрытием «эмаль». Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Ящик (ШхГхВ) мм - 600х500х180 1 шт. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х540 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х860. Масса не более 52кг	TM-5	

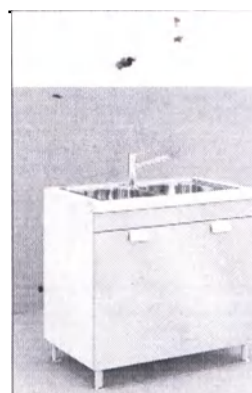
6	Тумба для материалов с двумя выдвижными ящиками с покрытием «эмаль». Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х360 – 2 шт. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 59 кг	TM-6	
7	Тумба для материалов с тремя выдвижными ящиками с покрытием «эмаль». Ящики (ШхГхВ) – 600х500х180 мм– 2 шт Ящик (ШхГхВ) – 600х500х360 мм– 1 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) – 600х600х860 мм Масса не более 64 кг	TM-7	
8	Тумба для материалов с четырьмя выдвижными ящиками с покрытием «эмаль». Ящики (ШхГхВ) мм– 600х500х180 – 4 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 68 кг	TM-8	
9	Тумба для материалов с четырьмя выдвижными ящиками с покрытием «эмаль». Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 2 шт. Ящик (ШхГхВ) мм– 600х500х180 – 1 шт Ящик (ШхГхВ) мм– 600х500х360 – 1 шт. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 72 кг	TM-9	
10	Тумба для материалов с пятью выдвижными ящиками с покрытием «эмаль». Ящики (ШхГхВ) мм– 600х500х90 – 2 шт. Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 3 шт. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 76 кг	TM-10	

11	Тумба для материалов с пятью выдвижными ящиками с покрытием «эмаль». Ящики (ШхГхВ) мм– 600х500х90 – 4 шт Ящики (ШхГхВ) мм– 600х500х360 – 1 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 78 кг	ТМ-11	
12	Тумба для материалов с шестью выдвижными ящиками с покрытием «эмаль». Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 4 шт Ящики (ШхГхВ) мм– 600х500х180 – 2 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 83 кг	ТМ-12	
13	Тумба для материалов с распашным фасадом с покрытием «эмаль» и выдвижными сетками (3 шт). Внутри установлены выдвижные сетки (ШхГхВ) мм – 568х470х160 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х860 Масса не более 61 кг	ТМ-13	
14	Тумба для материалов с выдвижной столешницей, распашным фасадом с покрытием «эмаль» и фальш-панелью. Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Фальш-панель (ШхГхВ) мм – 600х19х90 Выдвижная столешница (ШхГхВ) мм– 600х500х90 Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х540 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 55 кг	ТМ-14	
15	Тумба для материалов с выдвижной столешницей и двумя выдвижными ящиками с покрытием «эмаль» и фальш-панелью. Фальш-панель (ШхГхВ) мм – 600х19х90 Выдвижная столешница (ШхГхВ) мм – 600х500х90 Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 1 шт Ящики (ШхГхВ) мм– 600х500х360 – 1 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 64 кг	ТМ-15	

16	Тумба для материалов с выдвижной столешницей и тремя выдвижными ящиками с покрытием «эмаль» и фальш-панелью. Фальш-панель (ШхГхВ) мм – 600х19х90 Выдвижная столешница (ШхГхВ) мм – 600х500х90 Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 3 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 69 кг	TM-16	
17	Тумба для материалов с выдвижной столешницей и ящиками (три ящика) с покрытием «эмаль» и фальш-панелью. Фальш-панель (ШхГхВ) мм – 600х19х90 Выдвижная столешница (ШхГхВ) мм – 600х500х90 Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 2 шт Ящик (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 1 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 71 кг	TM-17	
18	Тумба для материалов с выдвижной столешницей и ящиками (четыре ящика) с покрытием «эмаль» и фальш-панелью. Фальш-панель (ШхГхВ) мм – 600х19х90 Выдвижная столешница (ШхГхВ) – 600х500х90 Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 2 шт Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 2 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 75 кг	TM-18	
19	Тумба для материалов с распашным фасадом из анодированного алюминия со стеклом и стеклянными полками. Внутри установлены четыре полки из стекла. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок, опор алюминиевых, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х860 Масса не более 53 кг	TM19	
20	Тумба для материалов с распашным фасадом из анодированного алюминия со стеклом и выдвижными сетками Внутри установлены три сетки (ШхГхВ) мм 568х470х160 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х860 Масса не более 59 кг	TM-20	

21	Гумба для материалов с выдвижным ящиком с покрытием «эмаль», распашным фасадом из анодированного алюминия со стеклом и стеклянными полками. Внутри установлены две полки из стекла. Ящик (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 1 шт. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х540 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм – 600х600х860 Масса не более 57 кг	TM-21	
22	Модуль с мойкой с распашным фасадом с покрытием «эмаль» и гигиеническим поддоном. Комплектуется круглой мойкой из нержавеющей стали с одной чашей Ø460 мм глубиной 165 мм. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки, мойки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х860 Масса не более 36 кг	TMм-1	
23	Модуль с мойкой с двумя распашными фасадами с покрытием «эмаль» и гигиеническим поддоном. Комплектуется мойкой из нержавеющей стали с двумя чашами (ДхШхВ) мм – 780х500х170. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х556х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек, мойки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х600х860 Масса не более 46 кг	TMм-2	
24	Модуль с мойкой с двумя выдвижными сетками. Комплектуется мойкой из нержавеющей стали с двумя чашами (ДхШхВ) мм – 780х500х170. Выдвижные сетки (ШхГхВ) мм - 864х510х195 – 2 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки, мойки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х600х860 Масса не более 60 кг	TMм-3	
25	Модуль с мойкой с фальшпанелью, распашным фасадом с покрытием «эмаль» и гигиеническим поддоном. Комплектуется круглой мойкой из нержавеющей стали с одной чашей Ø460 мм глубиной 165 мм Фальш-панель с покрытием «эмаль» высотой 90 мм Фасад с покрытием «эмаль» высотой 630 мм. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х614 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки, мойки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х860 Масса не более 36 кг	TMм-4	

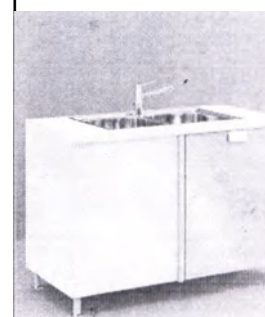
- Модуль с мойкой с фальшпанелью, двумя распашными фасадами с покрытием «эмаль» и гигиеническим поддоном.
Комплектуется мойкой из нержавеющей стали с двумя чашами (ДхШхВ) мм 780х500х170. Фальш-панель с покрытием «эмаль» высотой 90 мм. Фасады с покрытием «эмаль» высотой 630 мм.
26. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х556х614
Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручек, мойки осуществляется по месту установки.
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х600х860
Масса не более 46 кг
- Модуль угловой с мойкой с фальшпанелью и распашным фасадом с покрытием «эмаль».
Комплектуется мойкой из нержавеющей стали с двумя чашами (ДхШхВ) мм 780х500х170. Фальш-панель с покрытием «эмаль» высотой 90 мм. Фасады с покрытием «эмаль» высотой 630 мм.
27. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 1068х556х614
Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки, мойки осуществляется по месту установки.
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 1200х600х860
Масса не более 54 кг
- Модуль угловой с мойкой с распашным фасадом с покрытием «эмаль».
Комплектуется мойкой из нержавеющей стали с двумя чашами (ДхШхВ) мм 780х500х170. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 1068х556х688
28. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки, мойки осуществляется по месту установки.
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 1200х600х860
Масса не более 60 кг
- Модуль угловой с мойкой со складным фасадом с покрытием «эмаль».
Комплектуется круглой мойкой из нержавеющей стали с одной чашей Ø460 мм глубиной 165 мм. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х868х688
29. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки, мойки осуществляется по месту установки.
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х900х860
Масса не более 70 кг



TMm-5



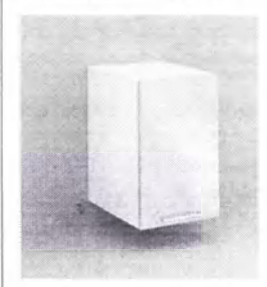
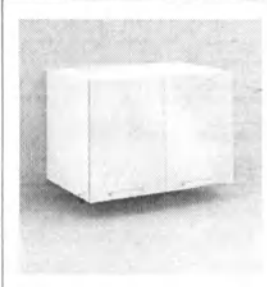
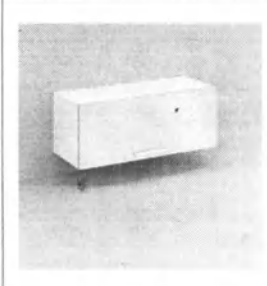
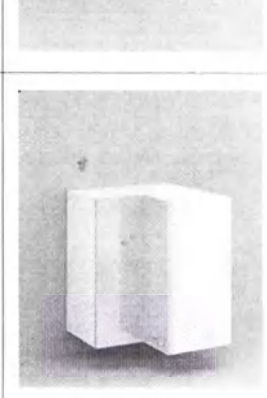
TMm-6

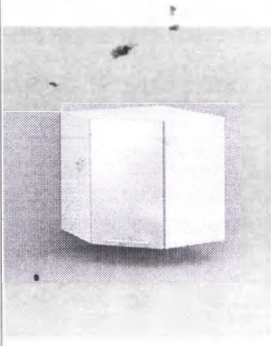
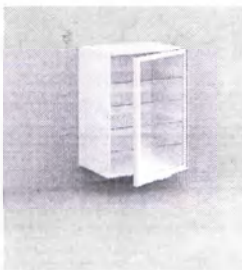
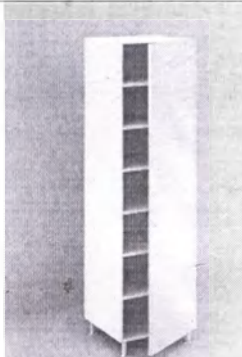
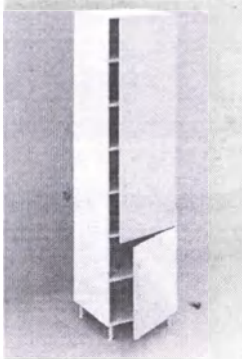
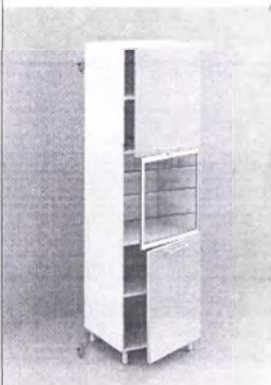


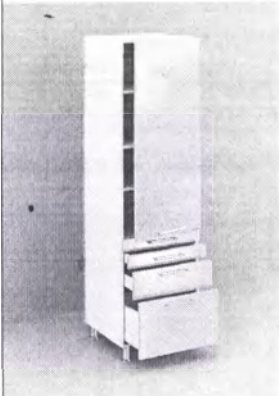
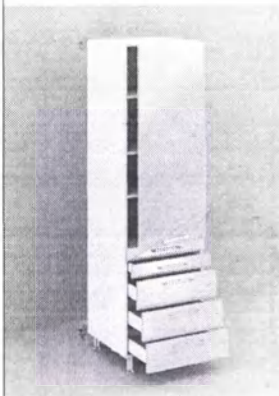
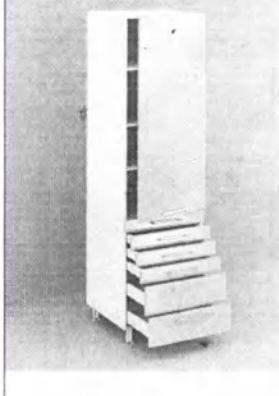
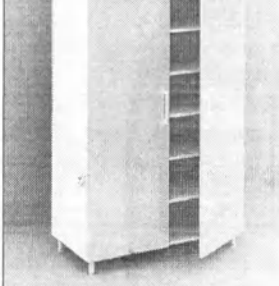
TMm-7

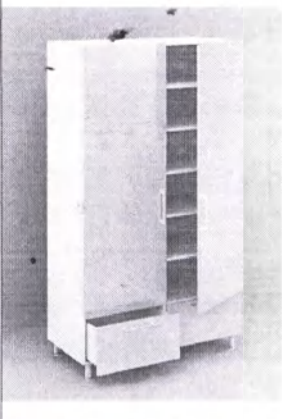
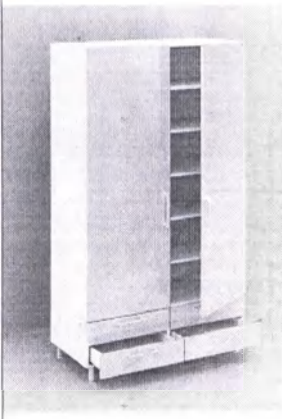


TMm-8

30	Модуль с мойкой со скошенным фасадом с покрытием «эмаль». Комплектуется круглой мойкой из нержавеющей стали с одной чашей Ø460 мм глубиной 165 мм. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х868х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка опор алюминиевых, ручки, мойки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х900х860 Масса не более 63 кг	ТМм-9	
31	Шкаф навесной с распашным фасадом с покрытием «эмаль» и одной полкой ДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х326х688. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х349х720 Масса не более 22 кг	ШН-1	
32	Шкаф навесной с двумя распашными фасадами с покрытием «эмаль» и одной полкой ДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х326х688. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х349х720 Масса не более 31 кг	ШН-2	
33	Шкаф навесной с откидным фасадом с покрытием «эмаль». Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х326х328. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х349х360 Масса не более 20 кг	ШН-3	
34	Шкаф навесной со складным откидным фасадом с покрытием «эмаль». Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 868х326х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 900х349х720 Масса не более 33 кг	ШН-4	
35	Шкаф навесной угловой со складным распашным фасадом с покрытием «эмаль» и полками ДСП. Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х568х688. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х720 Масса не более 39 кг	ШН-5	

36	Шкаф навесной угловой со скошенным фасадом с покрытием «эмаль» и полками ДСП. Внутри установлена одна полка каркасная из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х568х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полки каркасной, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х600х720 Масса не более 28 кг	ШН-6	
37	Шкаф навесной с распашным фасадом из анодированного алюминия со стеклом и стеклянными полками. Внутри установлены четыре полки из стекла. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х326х688 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х349х720 Масса не более 26 кг	ШН-7	
38	Шкаф для медикаментов напольный с распашным фасадом с покрытием «эмаль» и полками ДСП. Внутри установлены шесть полок каркасных из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х2008 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручки осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х560х2140 Масса не более 84 кг	ШМ-1	
39	Шкаф для медикаментов с двумя распашными фасадами с покрытием «эмаль» и полками ДСП. Внутри установлены шесть полок каркасных из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х2008 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х560х2140 Масса не более 84 кг	ШМ-2	
40	Шкаф для медикаментов с двумя распашными фасадами с покрытием «эмаль», одним распашным фасадом из анодированного алюминия со стеклом, полками из ДСП и стекла. Внутри отделений для хранения установлены две полки каркасных из ЛДСП и две полки из стекла. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х2008. Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х560х2140 Масса не более 85 кг	ШМ-4	

41	Шкаф для медикаментов с одним распашным фасадом с покрытием «эмаль» и четырьмя выдвижными ящиками. Внутри отделения для хранения установлены три полки каркасных из ЛДСП. Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 2 шт Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 1 шт Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х360 – 1 шт Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) 568х556х1288 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х560х2140 Масса не более 108 кг	ШМ-5	
42	Шкаф для медикаментов с распашным фасадом с покрытием «эмаль» и пятью выдвижными ящиками. Внутри установлены три полки каркасных из ЛДСП. Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 2 шт Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 3 шт Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х1288 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х560х2140 Масса не более 113 кг	ШМ-6	
43	Шкаф для медикаментов с распашным фасадом с покрытием «эмаль» и шестью выдвижными ящиками. Внутри установлены три полки каркасных из ЛДСП. Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 – 4 шт Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 – 2 шт Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 568х556х1288 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 600х560х2140 Масса не более 118 кг	ШМ-7	
44	Шкаф для документов с распашными фасадами с покрытием «эмаль» и полками ДСП. Внутри установлены шесть полок каркасных из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 1168х556х2008 Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 1200х560х2140 Масса не более 150 кг	ШД-1	

45	Шкаф для документов с двумя распашными фасадами с покрытием «эмаль», полками ДСП и двумя выдвижными ящиками. Внутри установлены пять полок каркасных из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 1168х556х1616 Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х360 – 2 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 1200х560х2140 Масса не более 166 кг	ШД-2	
46	Шкаф для документов с распашными фасадами с покрытием «эмаль», полками ДСП и четырьмя выдвижными ящиками. Внутри установлены пять полок каркасных из ЛДСП. Внутренние размеры отделения для хранения (ШхГхВ) мм 1168х556х1616 Ящики (ШхГхВ) – 600х500х180 – 4 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка полок каркасных, опор алюминиевых, ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 1200х560х2140 Масса не более 176 кг	ШД-3	
47	Стол врача мобильный с фальш-панелью и тремя ящиками с покрытием «эмаль» на металлическом подстоле и колесах. Фальш-панель (ШхВ) мм– 540х90 Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х90 - 2 шт Ящики (ШхГхВ) мм – 600х500х180 - 1 шт Корпус изделия поставляется в собранном виде. Монтаж и регулировка металлического подстоля, колес и ручек осуществляется по месту установки. Габаритные размеры (ШхГхВ) мм - 1200х560х2140 Масса не более 44 кг	СМ-1	

*Предельные отклонения от функциональных размеров не должны превышать:

±4,0 мм – при размерах до 2000 мм включительно;

±5,0 мм – при размерах свыше 2000 мм

3.2 Материалы, контактирующие с организмом человека:

- 1) Древесноволокнистая плита марки МДФ-МВ Е1 СЕ (ГОСТ 32274-2013) следующего состава: древесина и карбамидная смола; покрытая пленкой из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем белого цвета марки 11898-I White PE MB, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) – фасады, лицевые панели ящиков;
- 2) Древесноволокнистая плита марки МДФ-МВ Е1 СЕ (ГОСТ 32274-2013) следующего состава: древесина и карбамидная смола; покрытая пленкой из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем синего цвета марки 16900-вмс, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) – фасады, лицевые панели ящиков;
- 3) Древесноволокнистая плита марки МДФ-МВ Е1 СЕ (ГОСТ 32274-2013) следующего состава: древесина и карбамидная смола; покрытая пленкой из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем черного (прозрачный) цвета марки RL 126962, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) – фасады, лицевые панели ящиков;
- 4) Древесно-стружечная плита марки EURODEKOR (ГОСТ 32289-2013) следующего состава: древесина и карбамидо-формальдегидная смола; покрытая пленкой из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем белого цвета марки 11898-I White PE MB, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США), склеенная акриловым клеем марки Hanex® производства фирмы «JKC Corporation» (Корея) с кромкой, изготовленной из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем белого цвета марки 11898-I White PE MB, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) – фасады, лицевые панели ящиков, боковые стенки, полки, столешницы;
- 5) Древесно-стружечная плита марки EURODEKOR (ГОСТ 32289-2013) следующего состава: древесина и карбамидо-формальдегидная смола; покрытая пленкой из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем синего цвета марки 16900-вмс, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США), склеенная акриловым клеем марки Hanex® производства фирмы «JKC Corporation» (Корея) с кромкой, изготовленной из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем синего цвета марки 16900-вмс, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) – фасады, лицевые панели ящиков, боковые стенки, полки, столешницы;
- 6) Древесно-стружечная плита марки EURODEKOR (ГОСТ 32289-2013) следующего состава: древесина и карбамидо-формальдегидная смола; покрытая пленкой из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем черного (прозрачный) цвета марки RL 126962, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США), склеенная акриловым клеем марки Hanex® производства фирмы «JKC Corporation» (Корея) с кромкой, изготовленной из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем черного (прозрачный) цвета марки RL 126962, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США), склеенная акриловым клеем марки Hanex® производства фирмы «JKC Corporation» (Корея) с кромкой, изготовленной из поливинилхлорида (CAS № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем черного (прозрачный) цвета марки RL 126962, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) – фасады, лицевые панели ящиков, боковые стенки, полки, столешницы;

Corporation» (Корея) с кромкой, изготовленной из поливинилхлорида (CAS: № 9002-86-2), производства фирмы «Shenzhen Diyuan New Materials Technology Co., Ltd.» (Китай), окрашенным красителем черного (прозрачный) цвета марки RL 126962, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) – фасады, лицевые панели ящиков, боковые стенки, полки, столешницы;

7) Стекло бесцветное марки Planibel Clear (СТО 11765852-01-2016) - вставки в фасады, полки;

8) Искусственный акриловый камень белого цвета марки Hanex® производства фирмы «Hanwha L@C Corporation» (Корея) следующего состава: тригидроксид алюминия, полиметилметакрилат, метилметакрилат; окрашенный белым красителем марки 11898-I White PE MB, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) - столешница;

9) Искусственный акриловый камень серого цвета марки Hanex® производства фирмы «Hanwha L@C Corporation» (Корея) следующего состава: тригидроксид алюминия, полиметилметакрилат, метилметакрилат; окрашенный смесью черного (прозрачный) красителя марки RL 126962, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) и белого красителя марки 11898-I White PE MB, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) - столешница;

10) Искусственный акриловый камень синего цвета марки Hanex® производства фирмы «Hanwha L@C Corporation» (Корея) следующего состава: тригидроксид алюминия, полиметилметакрилат, метилметакрилат; окрашенный синим красителем марки 16900-вмс, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) - столешница;

11) Искусственный акриловый камень черного цвета марки Hanex® производства фирмы «Hanwha L@C Corporation» (Корея) следующего состава: тригидроксид алюминия, полиметилметакрилат, метилметакрилат; окрашенный черным (прозрачный) красителем марки RL 126962, производства фирмы «Ampacet Corporation» (США) - столешница;

12) Алюминиевый сплав марки AW-6060, производства фирмы «Aluminum Corporation of China Limited» (Китай) следующего состава: алюминий, кремний, железо, медь, марганец, магний, хром, цинк, титан; покрытый серноокислотным анодированием оксидом алюминия, производства фирмы «Aluminum Corporation of China Limited» (Китай) - рамы фасадов, ручки, сетка выдвижная, опоры;

13) Сталь марки AISi304, производства фирмы «Jiangsu Steel Group Co., Ltd.» (Китай) – мойки.

3.3 Номинальная распределенная нагрузочная способность

При эксплуатации мебели не допускается превышение статической вертикальной нагрузки (в особенности с приложением усилия к одной точке) на дно ящиков – более 5 кг, на каркасные полки (шкафов, стеллажей) – не более 10 кг, на стеклянные полки, полки на полкодержателях и консольные полки – не более 5 кг. Нормальное усилие открывания распашных дверей – до 3 кг, усилие выдвижения ящиков – не более 5 кг.

3.3.1 Номинальная нагрузка на тумбы для материалов: ТМ-1; ТМ-5; ТМ-6; ТМ-7; ТМ-8; ТМ-9; ТМ-10; ТМ-11; ТМ-12; ТМ-13; ТМ-14; ТМ-15; ТМ-16; ТМ-17; ТМ-18; ТМ-19; ТМ-20; ТМ-21 составляет: 100 ± 1 кг.

Номинальная нагрузка на тумбы для материалов: ТМ-2; ТМ-3; ТМ-4 составляет: 200 ± 1 кг.

3.3.2 Номинальная распределенная нагрузочная способность модуля с мойкой: ТМм-1; ТМм-2; ТМм-3; ТМм-4; ТМм-5; ТМм-6; ТМм-7; ТМм-8; ТМм-9 составляет 195 ± 1 кг.

3.3.3 Номинальная распределенная нагрузочная способность шкафа навесного: ППН-1; ППН-2; ППН-3; ППН-4; ППН-5; ППН-6; ППН-7. составляет: 50 ± 1 кг.

3.3.4 Номинальная распределенная нагрузочная способность шкафа для медикаментов: ПММ-1; ПММ-2; ПММ-3; ПММ-4; ПММ-5; ПММ-6 составляет: 150 ± 1 кг.

3.3.5 Номинальная распределенная нагрузочная способность шкафа для документов ПД-1; ПД-2; ПД-3 составляет: 150 ± 1 кг.

3.3.6 Номинальная распределенная нагрузочная способность стола врача мобильного СМ-1 составляет 150 ± 1 кг.

3.4 Поверхности изделий устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами - 3% раствор хлорамина, 6% раствор перекиси водорода.

3.5 Средний срок службы изделий до списания не менее 10 лет. За критерий предельного состояния изделий принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4. Комплектация

Набор мебели модульной Dr.DOORS™ для медицинских кабинетов по ТУ 32.50.30-001-81645316-2019,

варианты исполнения:

1. Гумба для материалов в вариантах исполнения (при необходимости)*:

1) ГМ-1, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

2) ГМ-2, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

3) ГМ-3, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

4) ГМ-4, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

5) ГМ-5, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

6) ГМ-6, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

7) ГМ-7, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

8) ГМ-8, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

9) ГМ-9, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

10) ГМ-10, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

11) ГМ-11, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

12) ГМ-12, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

13) ГМ-13, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

14) ГМ-14, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

15) ГМ-15, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

16) ГМ-16, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шурш 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

17) ГМ-17 в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

18) ТМ-18, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

19) ТМ-19, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

20) ТМ-20, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

21) ТМ-21 в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

2. Модуль с мойкой в вариантах исполнения (при необходимости)*:

1) ТМм-1, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

2) ТМм-2, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

3) ТМм-3, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

4) ТМм-4, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

5) ТМм-5, в составе:

-ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

6) ТМм-6, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

7) ТМм-7, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.
- шуруп 4x15 мм - 22 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

8) ТМм-8, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.
- шуруп 4x15 мм - 22 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

9) ТМм-9, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.
- шуруп 4x15 мм - 22 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Шкаф навесной в вариантах исполнения (при необходимости)*:

1) ШН-1, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- шуруп 4x15 мм - 4 шт.
- шуруп 4x20 мм - 6 шт.
- подвес - 2 шт.
- рамный анкер - 8 шт.
- шина - 2 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

2) ШН-2, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- шуруп 4x15 мм - 4 шт.
- шуруп 4x20 мм - 6 шт.
- подвес - 2 шт.
- рамный анкер - 8 шт.
- шина - 2 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

3) ШН-3, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- шуруп 4x15 мм - 4 шт.
- шуруп 4x20 мм - 6 шт.
- подвес - 2 шт.
- рамный анкер - 8 шт.
- шина - 2 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

4) ШН-4, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- шуруп 4x15 мм - 4 шт.
- шуруп 4x20 мм - 6 шт.
- подвес - 2 шт.
- рамный анкер - 8 шт.
- шина - 2 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5) ШН-5, в составе:

- ручка - скоба - 1-6 шт. (в зависимости от комплектации)
- шуруп 4x15 мм - 4 шт.
- шуруп 4x20 мм - 6 шт.
- подвес - 2 шт.
- рамный анкер - 8 шт.

-шина - 2 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

6) ПНН-6, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-шуруп 4x15 мм - 4 шт.

-шуруп 4x20 мм - 6 шт.

-подвес - 2 шт.

-рамный анкер - 8 шт.

-шина - 2 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

7) ПНН-7, в составе:

-ручка - скоба -1-6 шт. (в зависимости от комплектации)

-шуруп 4x15 мм - 4 шт.

-шуруп 4x20 мм - 6 шт.

-подвес - 2 шт.

-рамный анкер - 8 шт.

-шина - 2 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Шкаф для медикаментов в вариантах исполнения (при необходимости)*:

1) ПМ-1, в составе:

-ручка - скоба - 1-7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

2) ПМ-2, в составе:

-ручка - скоба -1-7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

3) ПМ-3, в составе:

-ручка - скоба - 1-7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

4) ПМ-4, в составе:

-ручка - скоба -1-7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

5) ПМ-5, в составе:

-ручка - скоба -1-7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

6) ПМ-6, в составе:

-ручка - скоба - 1 -7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Шкаф для документов в вариантах исполнения (при необходимости)*:

1) ПД-1, в составе:

-ручка - скоба -1-7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

2) ПИД-2, в составе:

-ручка - скоба -1-7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

3) ПИД-3, в составе:

-ручка - скоба - 1 -7 шт. (в зависимости от комплектации)

-опоры регулируемые Ø30 мм высотой 100 мм - 4 шт.

-шуруп 4x15 мм - 22 шт.

-руководство по эксплуатации -1 шт.

6. Стол врача мобильный (при необходимости)*:

1) СМ-1, в составе:

-ручка - скоба - 4 шт.

-подстолье сварное стальное окрашенное - 1 шт.

-свертывающиеся 6,3x4 мм - 6 шт.

-шуруп 4x15 мм - 24 шт.

-колесо диаметром 50 мм со стопором - 4 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

* Требуемое количество изделий по согласованию с заказчиком

Комплектация изделий должна соответствовать чертежам предприятия.

5. Сборка

5.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой изделия необходимо выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов. Сборка осуществляется сотрудниками компании Производителя.

5.2 Сборщик распаковывает комплектующие изделия, проверяет целостность покрытия и комплектность.

5.3 Далее осуществляет сборку, согласно технической документации производителя и схем.

Схема сборки тумб для материалов: ТМ-1; ТМ-2; ТМ-3; ТМ-4; ТМ-5; ТМ-6; ТМ-7; ТМ-8; ТМ-9; ТМ-10; ТМ-11; ТМ-12; ТМ-13; ТМ-14; ТМ-15; ТМ-16; ТМ-17; ТМ-18; ТМ-19; ТМ-20; ТМ-21;

Установить опоры регулируемые, как указано на рис.1, установить полку каркасную, установить ручки, как указано на рис.2.

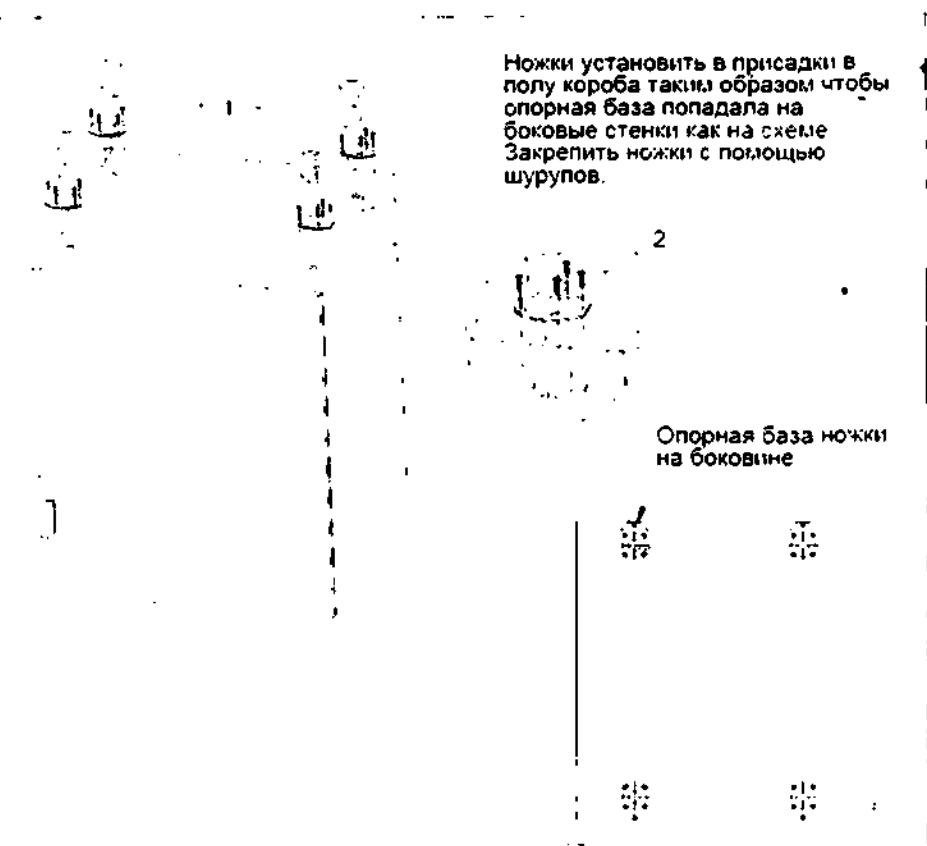
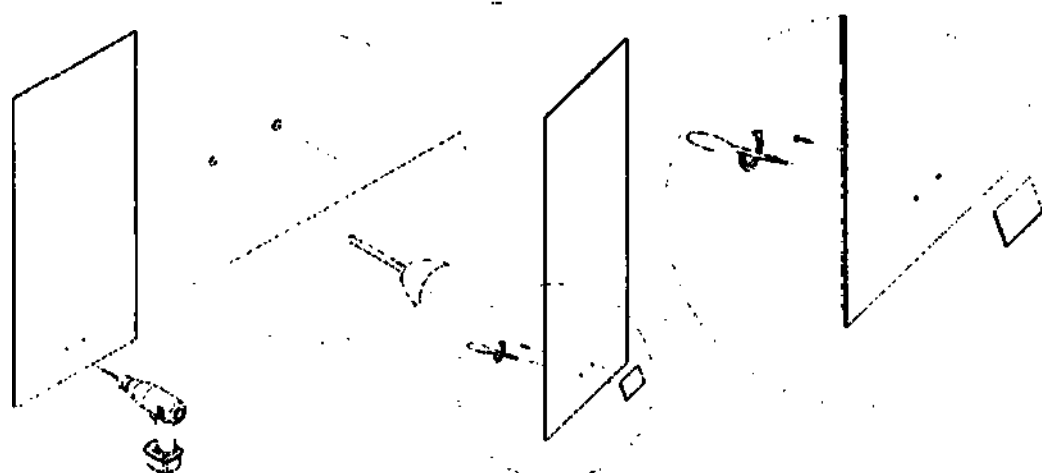


Рис.1

Тумбы выставить по уровню, отрегулировав положение с помощью выкручивания или вкручивания опор регулируемых.

Полку каркасную установить в подготовленные отверстия.

Порядок установки



- 1 Разметить отверстия на фасаде под установку ручки
- 2 Просверлить отверстия с лицевой стороны фасада
- 3 Укоротить винт переменной длины в зависимости от толщины фасада
- 4 Установить ручку на винты переменной длины

Рис.2

Схема сборки Модулей с мойкой (при необходимости): ТМм-1; ТМм-2; ТМм-3; ТМм-4; ТМм-5; ТМм-6; ТМм-7; ТМм-8; ТМм-9;

Установить опоры регулируемые, как указано на рис.1, установить полку каркасную, установить ручки, как указано на рис.2.

Схема сборки Шкафа навесного (при необходимости): ШН-1; ШН-2; ШН-3; ШН-4; ШН-5; ШН-6; ШН-7;

Навесить шкаф, как указано на рис. 3 и 4, установить полку каркасную, установить ручки, как указано на рис.2.



Рис.3

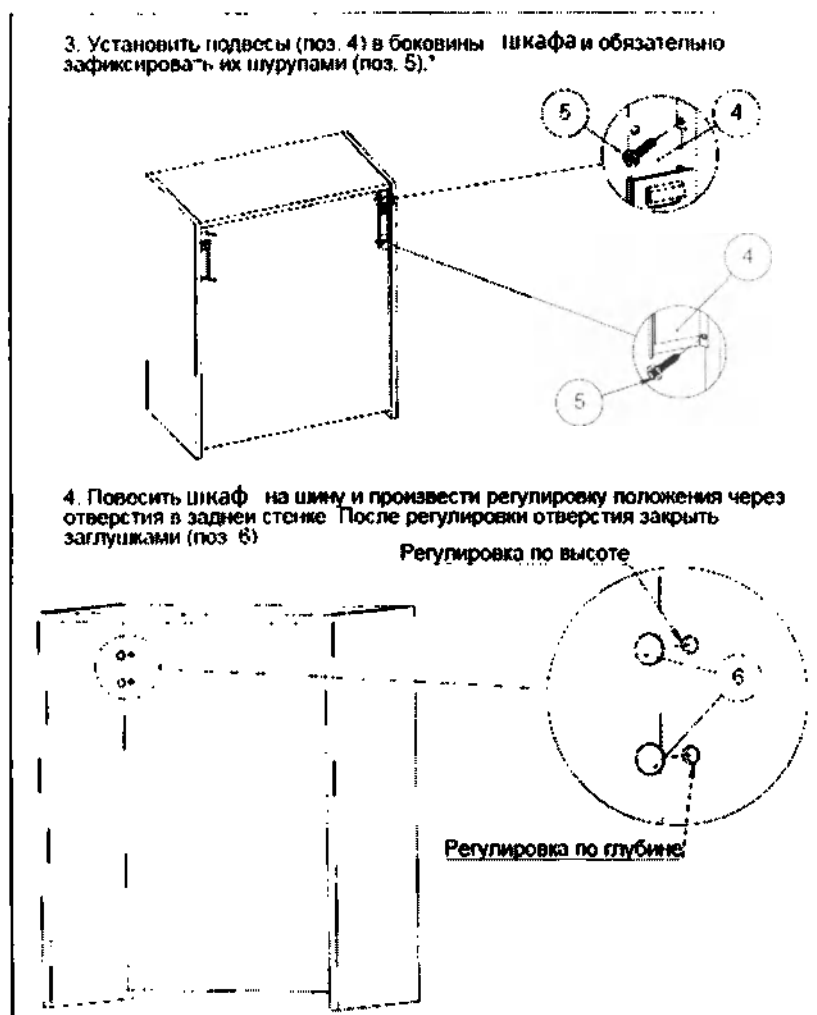


Рис.4.

Схема сборки Шкафа для медикаментов (при необходимости): ШМ-1; ШМ-2; ШМ-3; ШМ-4; ШМ-5; ШМ-6:

Установить опоры регулируемые, как указано на рис.1, установить полку каркасную, установить ручки, как указано на рис.2.

Схема сборки Шкафа для документов (при необходимости): ШД-1; ШД-2; ШД-3:

Установить опоры регулируемые, как указано на рис.1, установить полку каркасную, установить ручки, как указано на рис.2.

Схема сборки Стола врача мобильного СМ-1:

Перевернуть корпус тумбы, совместить отверстия в основании тумбы с отверстиями во фланцах металлического подстоля, закрепить евровинтами 6,3х4, закрепить колеса шурупами 4*15 мм, установить ручки, как указано на рис.2

6. Правила эксплуатации и требования по технике безопасности

6.1 Эксплуатация изделий должна происходить в соответствии с назначением.

6.2 Изделия предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 25°C. После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой изделия необходимо выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.3 Для долговечной работы:

- не рекомендуется подвергать поверхности ударам и значительному локальному нагреву;

- содержать в чистоте все поверхности.

При загрязнении поверхностей необходимо произвести влажную уборку и обработать дезинфицирующими средствами (п. 3.4).

6.4 Мебель нельзя устанавливать близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла (к радиаторам отопления и другим отопительным приборам), а также располагать мебельный комплект в непосредственной близости к системам кондиционирования, вентиляции и увлажнения воздуха.

- а) мебель с ламинированной поверхностью или с элементами, облицованными декоративной пленкой ПВХ, нужно располагать на расстоянии не меньше 15 см от отопительных приборов;

- б) мебель, имеющую элементы отделки из натурального дерева, шпона и/или с лакокрасочными поверхностями – на расстоянии не меньше 1 метра.

6.5 При длительном воздействии прямых солнечных лучей на фасады, двери-купе и элементы декора, выполненные с применением отделки натуральным деревом, шпоном, эмалью, меламином или ПВХ, они могут поменять тон, поэтому старайтесь не допускать этого. В случае замены и/или добавления предметов мебели в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое становится менее заметным с течением времени, является совершенно естественным.

6.6 Берегите мебель от механических повреждений. Во избежание царапин и трещин старайтесь не допускать падения острых и тяжелых предметов на поверхность мебели.

6.7 Нагрузка на ящики и полки:

При эксплуатации мебели все тяжелые предметы следует размещать внутри таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

а) Вещи на полках рекомендуется размещать по следующему принципу: более тяжелые – ближе к краям (опора), более легкие – ближе к центру.

б) Высокие предметы мебели (колонки, многоярусные шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости.

6.8 Во избежание перекосов дверей и ящиков предметов мебели, их рекомендуется держать закрытыми.

6.9 Эксплуатация и уход за столешницами и стеновыми панелями.

- 1) Регулярно протирайте рабочие поверхности без применения царапающих и шлифующих средств.
- 2) Нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, кислотосодержащие, порошковые средства.
- 3) Затенения и шероховатости появляются в результате применения органических растворяющих средств, очистки с холодной водой, использования старых грубых тряпок, поэтому после их использования необходимо сполоснуть поверхность тёплой водой и вытереть насухо бумажными полотенцами.
- 4) Жидкость на стыковочных швах должна быть незамедлительно удалена.
- 5) Чистка лёгких загрязнений осуществляется с помощью бумажного полотенца, мягкой ткани, губки и т.п.
- 6) Обычные загрязнения сначала обработайте тряпкой с тёплой водой и бытовыми моющими средствами, после чего они устраняются легко и беспрепятственно.
- 7) Застывшие загрязнения удалите моющим средством (оставьте для воздействия на ночь).
- 8) Жир, масло, смолы, воск устраняются органическими растворяющими средствами.
- 9) Чистящие средства, содержащие воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налёт, поэтому их использование противопоказано.
- 10) После влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте вытереть их насухо.

6.10 Уход за фурнитурой:

- 1) После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, колеса, механизмы выдвижения и т.п.) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебели. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей

или выдвижения ящиков. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки рабочих механизмов. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

6.11 Монтаж шкафа навесного производится только в случае толщины крепежных поверхностей не менее 12 см, состоящих из прочных материалов (бетон, кирпич, блок и т.п.). Установка шкафа навесного на поверхности из гипсокартона не производится.

6.12 Если отдельно стоящее изделие располагается в нише (изделие ограничено по периметру, например стенами, полом и потолком помещения), то между граничащими элементами и изделием может образоваться технологический зазор не менее 16 мм на каждую сторону. Если в помещении установлен натяжной потолок, то минимальный зазор между верхним элементом изделия и потолком составляет 10 см.

7. Правила транспортирования, хранения

7.1 Изделия в упаковке производителя транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, избегая сдавливания изделий.

В пределах одного населенного пункта медицинские изделия допускается перевозить открытым автотранспортом, при условии предохранения их от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

7.2 При транспортировке и складировании изделий необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений, а также предохранять от прямого попадания атмосферных осадков.

7.3 Хранение по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 в сухих складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Гарантийный срок хранения изделий составляет 6 месяцев с момента приобретения.

8. Дезинфекция и утилизация

8.1 Изделия дезинфицируют растворами перекиси водорода или хлорамина, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

8.2 Упаковку нового изделия утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

8.3 Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с

действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

Утилизацию изделий, использованных в инфекционном отделении медицинского ЛПУ, осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

9. Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.30-001-81645316-2019 при соблюдении условий транспортирования, хранения, настоящего руководства по эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 мес с момента приобретения. Гарантийный срок хранения изделий составляет 6 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель по рекламации производит безвозмездный ремонт или замену при выявлении производственного брака. Средний срок службы – 10 лет.

9.3 Изделия имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока медицинского изделия

Набор мебели модульной Dr.DOORS™ для медицинских кабинетов по ТУ 32.50.30-001-81645316-2019:

Номер и дата выпуска _____ (месяц)____ (номер заказа)____ (артикул)

« ____ » _____ 201__ г. (заполняется заводом изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ »

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

Города _____

Руководитель ремонтного предприятия _____
МП (подпись)

11. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей, влияющих на работу Набора мебели модульной Dr.DOORS™ для медицинских кабинетов по ТУ 32.50.30-001-81645316-2019 в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

Россия, 156001, Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.105
ООО «Мебельный Комбинат №7», Тел: +7(495)733-93-80.

Перечень применяемых производителем национальных стандартов:

- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
- ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения;
- ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации;
- ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования;
- ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы;
- ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ;
- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.026-81 Система стандартов безопасности труда. Работы кузнечно-прессовые. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
- ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
- ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования;
- ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования;
- ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения;
- ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения;

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями;

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия;

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия;

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия;

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия;

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки;

ГОСТ 6449.2-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски углов;

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия;

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия;

ГОСТ 7796-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры;

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия;

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов;

ГОСТ 14193-78 Монохлорамин ХБ технический. Технические условия;

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры;

ГОСТ 15961-89 Машины кузнечно-прессовые. Общие требования к условиям и методам измерения точности;

ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия;

ГОСТ 19194-73 Мебель. Метод определения прочности крепления подсадных ножек мебели;

ГОСТ 19195-89 Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения;

ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация;

ГОСТ 19882-91 Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость;

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия;

ГОСТ 28102-89 Мебель корпусная. Методы испытания штанг;

ГОСТ 28105-89 Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и полукорпусов;

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования;

ГОСТ 33781-2016 Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия;

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия;

ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания;

ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;

ГОСТ Р 56432-2015 Система менеджмента качества. Изделия медицинские. Руководство по управлению продукцией и услугами, получаемыми от поставщиков

МУ 287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения;

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов;

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами;

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01» (в ред. Изменений и дополнений N 1 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13);

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту;

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение;

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки;

Р 50.1.043-2003 Общие требования к информации изготовителя, сопровождающей медицинские изделия.

Генеральный директор

В.В. Лукин

Всего прошито.
и прошито
Эти два
"Мебельный
Комбинат №7"
г. Кострома
государство
ООО "Мебельный
комбинат №7"
Мухомов В.В.

