



Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания

«Современная Лаборатория»

191014 г. Санкт-Петербург, пер.Озерной, д.12, пом.1Н,
ИНН 7842452829 КПП 784201001
Телефон/факс: (812) 702-82-00 (многоканальный)
Email: sovlab@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПК «Современная
Лаборатория»



И.С. Иванов

«18» октября 2013 г.

Мебель медицинская
ТУ 9452-006-90879792-2013

Руководство по эксплуатации

2013 г.

Содержание	
Раздел	стр.
1. Введение.	3
2. Состав и габаритные размеры мебели.	3
3. Требования к персоналу.	6
4. Назначение.	6
5. Противопоказания.	6
6. Комплект поставки.	7
7. Предупреждения и предосторожности.	7
8. Правила эксплуатации.	7
9. Уход за мебелью и текущий ремонт.	8
10. Условия транспортирования.	9
11. Условия хранения.	9
12. Порядок утилизации.	9
13. Гарантийные обязательства.	9

1. Введение.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Мебель медицинскую по ТУ 9452-006-90879792-2013.

2. Состав и габаритные размеры мебели.

2.1. Состав и габаритные размеры приведены в таблице 1

Т а б л и ц а 1.

№№ п/п	Наименование	Исполнение	Габаритные Размеры мм ±4мм	Масса, не более кг
1	Тумба лабораторная	МТС3	500x500x750	20
2	Тумба лабораторная	МТС4	500x500x750	18
3	Тумба лабораторная	МТС5	500x500x750	18
4	Тумба лабораторная	МТСп	500x500x750	18
5	Тумба лабораторная	Т-1	400x500x750	17
6	Тумба лабораторная	Т-2	400x500x750	17,5
7	Тумба лабораторная	Т-5	400x500x750	16
8	Тумба лабораторная	ТПр-3	400x500x660	16
9	Тумба лабораторная	ТС-600	600x500x750	22
10	Тумба лабораторная	ТС-900	900x500x750	26
11	Тумба лабораторная	ТС-600-3Я	600x500x750	22
12	Тумба лабораторная	ТС-900-2ДЯ	900x500x750	25
13	Тумба лабораторная	ТС-900-ДЗЯ	900x500x750	25
14	Тумба лабораторная	ТП-600-Д	600x500x660	24
15	Тумба лабораторная	ТП-600-ДЯ	600x500x660	23,5
16	Тумба лабораторная	ТП-600-Д2Я	600x500x660	23,5
17	Тумба лабораторная	ТП-600-4Я	600x500x660	24
18	Тумба лабораторная	ТП-900-Д	900x600x660	26
19	Тумба лабораторная	ТП-900-2ДЯ	900x600x660	26,5
20	Тумба лабораторная	ТП-900-3Я	900x600x660	27
21	Тумба лабораторная	ТП-900-4Я	900x600x660	27,5
22	Тумба лабораторная	ТСП-900	900x500x660	24
23	Тумба лабораторная	ТС-400-Д	400x500x750	18
24	Тумба лабораторная	ТС-400-ДЯ	400x500x750	18,5
25	Тумба лабораторная	ТС-400-Д2Я	400x500x750	19
26	Тумба лабораторная	ТС-400-4Я	400x500x750	19,5
27	Тумба лабораторная	ТП-400-Д	400x500x660	17
28	Тумба лабораторная	ТП-400-ДЯ	400x500x660	17,5
29	Тумба лабораторная	ТП-400-Д2Я	400x500x660	18
30	Тумба лабораторная	ТП-400-4Я	400x500x660	18,5
31	Тумба лабораторная	ТПП-450	450x500x660	16
32	Тумба лабораторная	ТПП-450-Д	450x500x660	16,5
33	Шкаф ламинарный	ЛШ	1300x750x2000	40
34	Шкаф ламинарный	«Ламилаб 1200»	1300x800x1250	35
35	Шкаф ламинарный	«Ламилаб 1500»	1600x800x1250	37
36	Шкаф лабораторный	МШЗ	800x450x1800	29
37	Шкаф лабораторный	МШ5	800x450x1800	30

Т а б л и ц а 1. Продолжение

38	Шкаф лабораторный	Ш-3	800x450x1800	30
39	Шкаф лабораторный	Ш-5	800x450x1800	29
40	Шкаф лабораторный	ШК-900-8Я	900x450x1800	30
41	Шкаф лабораторный	ШО-900	900x450x1800	31
42	Шкаф лабораторный	ШО-600	600x450x1800	25
43	Шкаф лабораторный	ШМ-900	900x450x1800	32
44	Шкаф лабораторный	ШХ-900	900x450x1800	32,5
45	Шкаф лабораторный	ШЛ-900-С	900x450x1800	32
46	Шкаф лабораторный	ШЛ-900-Д	900x450x1800	32,5
47	Шкаф лабораторный	ШМ-500	500x450x1800	23
48	Шкаф лабораторный	ШМ-500-ДС	500x450x1800	22
49	Шкаф лабораторный	ШМ-500-СФ	500x450x1800	23
50	Шкаф лабораторный	ШМН-900-С	900x450x1800	28
51	Шкаф лабораторный	ШМН-900-Д	900x450x1800	27
52	Шкаф лабораторный	ШМНУ-650	650x450x1800	22
53	Шкаф лабораторный	МШ2	800x600x1800	31
54	Шкаф лабораторный	МШ2пп	800x600x1800	30
55	Шкаф лабораторный	МШ8	800x600x1800	30
56	Шкаф лабораторный	Ш-2	1200x600x1800	37
57	Шкаф лабораторный	Ш-9	900x600x1800	31
58	Шкаф навесной	МНШ1	900x300x450	18
59	Шкаф навесной	МНШ2	900x300x450	17,5
60	Шкаф навесной	НШ-2	900x400x450	19
61	Шкаф навесной	НШ-3	900x400x450	19
62	Шкаф навесной	НШ-6	900x400x450	19
63	Стол лабораторный	МС128	1200x600x750	22
64	Стол лабораторный	МС129	1200x600x750	22
65	Стол лабораторный	МС158	1200x600x750	22
66	Стол лабораторный	МС159	1200x600x750	22
67	Стол лабораторный	МС68	1200x600x750	22
68	Стол лабораторный	МС69	1200x600x750	24
69	Стол лабораторный	С-1	1500x600x750	25
70	Стол лабораторный	С-2	1500x600x750	25,5
71	Стол лабораторный	С-3	1500x600x750	25
72	Стол лабораторный	С-4	1500x600x750	25
73	Стол лабораторный	С-5	1500x600x750	25,5
74	Стол лабораторный	С-6	1500x600x750	25,5
75	Стол лабораторный	С-7	1500x600x750	25
76	Стол лабораторный	С-8	1500x600x750	25
77	Стол лабораторный	СМИ-1500	1500x600x750	25
78	Стол лабораторный	СМУ-850	850x600x750	20

Т а б л и ц а 1. Продолжение

79	Стол лабораторный	СО-1500	1500x600x750	25
80	Стол лабораторный	СОМ-1500	1500x600x750	25
81	Стол лабораторный	СМО-2700	2700x600x750	32
82	Стол лабораторный	СМИ-2700	2700x600x750	32
83	Стол лабораторный	СВК-1200-3ТЯ	1200x600x750	22
84	Стол лабораторный	СЖ-750	7500x600x750	24
85	Стол лабораторный	СТО-1600	1600x600x750	24
86	Стол лабораторный	СВУ-1600	1600x600x750	24
87	Стол инструментальный	СИ-3М	580x425x830	18
88	Стол инструментальный	СИ-3С	580x425x830	18
89	Мойка лабораторная	МСМд	800x600x850	21
90	Мойка лабораторная	МСМл	800x600x850	21
91	Мойка лабораторная	МСМм	800x600x850	21,5
92	Мойка лабораторная	МСМп	800x600x850	21,5
93	Мойка лабораторная	ПМ-13	1300x600x850	25
94	Мойка лабораторная	ПМ-15	1500x600x850	27
95	Мойка лабораторная	ПМ-8	800x600x850	20
96	Мойка лабораторная	СМ-1500	1500x600x850	23
97	Мойка лабораторная	СМ-850-У	850x600x850	16
98	Мойка лабораторная	СМ-600	600x600x850	17
99	Мойка лабораторная	СМ-900-2	900x600x850	19
100	Мойка лабораторная	СМ-900	900x600x850	19
101	Мойка лабораторная	СМ-900-ДЯ	900x600x850	19
102	Мойка лабораторная	СМ-900-3Я	900x600x850	19,5
103	Стол весовой	ВС-1	600x400x850	25
104	Стол весовой	ВС-2	800x400x850	28
105	Стол весовой	ВС-3	1200x400x850	32
106	Стол весовой	МВС1	600x400x750	25
107	Стол весовой	МВС2	800x400x750	27
108	Стол весовой	СВг-1200	1200x600x750	33
109	Стол весовой	СВг-800	800x600x850	28
110	Стол весовой	СВГ-600	600x600x850	25
111	Стол врача	СВ-1200	1200x600x750	33
112	Стол врача	СВ-1500	1500x600x750	35
113	Стол врача	СВК-1200	1200x600x750	35
114	Стол врача	СВ-ТДТЗЯ	1500x600x750	37
115	Стол врача	СВУ	1000x600x750	32
116	Стол палатный	СП	800x800x750	15
117	Стол палатный	СТО	1200x800x750	18
118	Стол островной	МОС	1200x1200x750	42
119	Стол островной	ОС-1	1500x1200x750	45

Т а б л и ц а 1. Продолжение

120	Стол островной	ОС-2	1800x1200x750	48
121	Стол островной	ОС-3	2100x1200x750	50
122	Стол островной	ОС-5	2700x1200x750	52
123	Стол пеленальный	СПЛ	820x670x940	15
124	Стойка передвижная для оборудования и приборов	СТПр	800x800x750	10
125	Пост медицинской сестры	ПМС-1	1200x650x1200	22
126	Пост медицинской сестры	ПМС-2	1500x650x1200	25
127	Пост медицинской сестры	ПМС-3	1500x1200x1200	28
128	Шкаф медицинский	ВШ-1	900x600x2170	21
129	Шкаф медицинский	ВШ-2	1200x600x2170	23
130	Шкаф медицинский	ВШ-3	1500x600x2170	25
131	Шкаф медицинский	ВШ-4	1800x600x2170	29
132	Шкаф медицинский	МВШ-1	900x600x2170	21
133	Шкаф медицинский	МВШ-2	1200x600x2170	25
134	Шкаф медицинский	МВШ-3	1500x600x2170	27
135	Шкаф медицинский	МВШ-4	1800x600x2170	28
136	Шкаф медицинский	ШВКП -1200	1200x600x1800	24
137	Шкаф медицинский	ШВКП-900	900x600x1800	21
138	Шкаф медицинский	ШВКП- 1500	1500x600x1800	23
139	Шкаф медицинский	ШВКП-1800	1800x600x1800	27
140	Шкаф медицинский	ШВТР-900	900x600x1800	22
141	Шкаф медицинский	ШВТР-1200	1200x600x1800	24
142	Шкаф медицинский	ШВТР-1500	1500x600x1800	25
143	Шкаф медицинский	ШВТР-1800	1800x600x1800	27

3. Требования к персоналу.

3.1. Персонал лечебно – профилактических учреждений широкого профиля.

4. Назначение.

4.1. Мебель предназначена для оснащения лечебно – профилактических учреждений широкого профиля, а также для размещения лекарственных средств, дезсредств, документации, справочной литературы, одежды персонала, для хранения принадлежностей медицинского персонала и пациента, для размещения медицинских приборов и аппаратов, для хранения инструментов, для хранения перевязочных материалов.

5. Противопоказания.

5.1. Противопоказания отсутствуют.

6. Комплект поставки.

1. Тумбы лабораторные: МТС3, МТС4, МТС5, МТСп, Т-1, Т-2, Т-5, ТПр-3, ТС-600, ТС-900, ТС-600-3Я, ТС-900-2ДЯ, ТС-900-ДЗЯ, ТП-600-Д, ТП-600-ДЯ, ТП-600-Д2Я, ТП-600-4Я, ТП-900-Д, ТП-900-2ДЯ, ТП-900-3Я, ТП-900-4Я, ТСП-900, ТС-400-Д, ТС-400-ДЯ, ТС-400-Д2Я, ТС-400-4Я, ТП-400-Д, ТП-400-ДЯ, ТП-400-Д2Я, ТП-400-4Я, ТПП-450, ТПП-450-Д;
2. Шкафы ламинарные: ЛШ, «Ламилаб 1200», «Ламилаб 1500»;
3. Шкафы лабораторные: МШ3, МШ5, Ш-3, Ш-5, ШК-900-8Я, ШО-900, ШО-600, ШМ-900, ШХ-900, ШЛ-900-С, ШЛ-900-Д, ШМ-500, ШМ-500-ДС, ШМ-500-СФ, ШМН-900-С, ШМН-900-Д, ШМНУ-650; МШ2, МШ2пп, МШ8, Ш-2, Ш-9
4. Шкафы навесные: МНШ1, МНШ2, НШ-2, НШ-3, НШ-6;
5. Столы лабораторные: МС128, МС129, МС158, МС159, МС68, МС69, С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7, С-8, СМИ-1500, СМУ-850, СО-1500, СОМ-1500, СМО-2700, СМИ-2700, СВК-1200-3ТЯ, СЖ-750, СТО-1600, СВУ-1600;
6. Столы инструментальные: СИ-3М, СИ-3С;
7. Мойки лабораторные: МСМд, МСМл, МСМм, МСМп, ПМ-13, ПМ-15, ПМ-8, СМ-1500, СМ-850-У, СМ-600, СМ-900-2, СМ-900, СМ-900-ДЯ, СМ-900-3Я;
8. Столы весовые: ВС-1, ВС-2, ВС-3, МВС1, МВС2, СВг-1200, СВг-800, СВГ-600;
9. Столы врача: СВ-1200, СВ-1500, СВК-1200, СВ -ТДТЗЯ, СВУ;
10. Столы палатные: СП; СТО
11. Столы островные: МОС, ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-5;
12. Столы пеленальные: СПЛ;
13. Стойки передвижные для оборудования и приборов: СТПр;
14. Посты медицинской сестры: ПМС-1, ПМС-2, ПМС-3;
15. Шкафы медицинские: ВШ-1, ВШ-2, ВШ-3, ВШ-4, МВШ-1, МВШ-2, МВШ-3, МВШ-4, ШВКП -1200, ШВКП-900, ШВКП-1500, ШВКП-1800, ШВТР-900, ШВТР-1200, ШВТР-1500, ШВТР-1800.

7. Предупреждения и предосторожности.

7.1. Используйте мебель только в соответствии с ее функциональным назначением. Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от условий эксплуатации. При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

8. Правила эксплуатации (порядок использования по назначению).

8.1. Важно. Сборка и монтаж мебели осуществляется предприятием-изготовителем или уполномоченным аккредитованным представителем предприятия-изготовителя. Не допускается самостоятельный монтаж и сборка потребителем.

8.2. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

8.3. Не проводите по поверхности и не ударяйте мебель острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

8.4. При заполнении шкафов, полок равномерно распределяйте нагрузку. Для высоких шкафов рекомендуется тяжёлые вещи хранить в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости.

8.5. Не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки.

8.6. Не перемещайте изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвижные ящики, снять полки.

8.7. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения

травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь.

8.8. Во избежание опрокидывания изделий запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.

9. Уход за мебелью и текущий ремонт.

9.1. Поверхность мебели рекомендуется протирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

9.2. Очистка лакокрасочных покрытий производится увлажненной махровой или замшевой микроволокнистой салфеткой с использованием специальных полиролей для лакокрасочных покрытий. Допускается использование моющих средств (слабые мыльные растворы), а также слабого раствора этилового спирта. После протирки поверхности моющим средством, необходимо сразу протереть ее мягкой сухой салфеткой.

9.3. Для очистки стекла, декоративного пластика применяются специальные средства, рекомендованные для чистки этих материалов. При необходимости обезжиривания рекомендуется пользоваться водным раствором денатурированного спирта. Протирка осуществляется салфеткой из микроволокна. Не допускается применение абразивных чистящих средств, попадание чистящих растворов в пазы рамок дверей. При попадании сразу же удалить сухой тканью.

9.4. Очистка кожзаменителя производится поролоновой губкой либо мягкой тканью с применением слабого мыльного раствора. Для удаления грязи и жирных пятен рекомендуется применять специальные средства по уходу.

9.5. Ламинированные поверхности и поверхности, облицованные декоративной пленкой ПВХ – это влаго- и износостойкие материалы, поэтому для содержания в чистоте достаточно протирать их влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками. Для придания блеска рекомендуется применять мебельные полироли для пластиков.

9.6. Категорически недопустимо при чистке мебели применение твердых приспособлений (скребков, губок) с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала, а также агрессивных, абразивных материалов и моющих средств на кислотной и щелочной основе.

9.7. Поверхность мебели следует предохранять от попадания агрессивных жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (ацетон, бензин, спирт и др.). Случайно попавшую на поверхность мебели жидкость следует немедленно снять сухой тканью.

9.8. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.

9.9. Рекомендуется как можно скорее очищать любую часть мебели от загрязнения. Если загрязнение остается на поверхности мебели на некоторое время, то это заметно повышает опасность образования разводов, пятен и повреждения предметов мебели.

9.10. Вода не наносит вреда поверхностям мебели, но может отрицательно повлиять на материал основания. Во избежание набухания и отклейки кромочного пластика необходимо сразу вытирать попавшую на поверхность мебели воду, чтобы она не проникла в основание мебели, например, через швы.

9.11. После определённого периода эксплуатации, механические элементы (петли, направляющие, подъёмные механизмы), утрачивают смазку и оптимальную регулировку. Это может проявиться в скрипе, затрудненном открывании дверей или выдвигании ящиков и т.д. Если вы заметили подобные изменения в работе механизмов, не следует прилагать чрезмерных усилий для закрывания. Для надлежащей работы всех механизмов требуется своевременная регулировка петель и смазывание направляющих.

9.12. Обслуживание и гарантийный, а также постгарантийный ремонт осуществляет производитель или уполномоченный (аккредитованный) представитель.

10. Условия транспортирования.

10.1. Транспортирование мебели должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

10.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

10.3. Условия транспортирования мебели должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11. Условия хранения.

11.1. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

12. Порядок утилизации.

12.1. Мебель должна быть собрана и передана специальным лицензированным организациям, занимающимся утилизацией медицинских отходов.

12.2. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

13. Гарантийные обязательства.

13.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с момента поставки.

Прошнуровано
и пронумеровано

55 листов

(пятьдесят пять)

[Signature]

б/в б/в КБ № 122

Я.А. Макаш

