

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 2010г. № _____



Генеральный директор
ОАО «Архангельский опытный
водорослевый комбинат»

Е.М.Бокова

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению "Покрытие на раны и ожоги Альгипор-А"

Альгипор-А оказывает стимулирующее действие на развитие грануляционной ткани и процессы регенерации, способствует эпителизации, ускоряет очищение ран, снижает их инфицированность и способствует благоприятному течению раневого процесса.

Альгипор-А представляет собой стерильный пористый материал в виде листов различных размеров и предназначен для применения в практике стационарных и амбулаторных медицинских учреждений и в домашних условиях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Альгипор-А накладывают на раневую поверхность после ее туалета и фиксируют бинтом или марлевой повязкой. Смену Альгипора-А производят по мере промокания или рассасывания (в среднем 1-3 суток).

При небольшой экссудации и начале эпителизации под Альгипором-А его оставляют на ране до отторжения вместе со струпом.

Возможно сочетание лечения Альгипором-А с общепринятой лекарственной и инфузионной терапией, а также сочетание (чередование) с антибактериальными средствами для местного применения.

Альгипор-А в упаковке предприятия-изготовителя должен быть защищен от влаги и храниться при комнатной температуре.

Главный технолог ОАО «Архангельский
опытный водорослевый комбинат»

Заместитель главного врача по хирургии,
проф. кафедры госпитальной хирургии №1



Малыгина М.А.

И.С.Абрамов