

# СПРАВКА

## об изделии медицинского назначения

### 1. Наименование изделия

Пленка защитная не раздражающая CAVILON NO STING BARRIER FILM

Форма выпуска:

1. Пористый аппликатор
2. Спрей

### 2. Описание изделия

#### 2.1 Назначение

Пленка защитная не раздражающая CAVILON NO STING BARRIER FILM -это раствор полимера, образующий однородную пленку после нанесения его на кожу. Продукт растворен в уникальном нецитотоксическом, не раздражающем и быстровысыхающем растворителе. Пленка защитная не раздражающая CAVILON NO STING BARRIER FILM помогает защитить интактную или поврежденную кожу от раздражения, вызванного мочой и/или каловыми массами при их недержании, пищеварительными соками, раневым отделяемым, адгезивами и трением. Пленка бесцветна, прозрачна и обладает хорошей проницаемостью для кислорода и водяных паров.

#### 2.2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики представлены в таблице

Таблица технических характеристик

| Название                                                                                      | Количество<br>шт в коробке<br>опт/розн | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пленка защитная<br>не раздражающая<br>CAVILON NO STING<br>BARRIER FILM<br>пористый аппликатор | 25/5                                   | -нецитотоксичная;<br>-гипоаллергенная;<br>-в жидкой форме горюча (не<br>использовать вблизи огня и источников<br>воспламенения);<br>-бесцветная;<br>-прозрачная;<br>-обладает хорошей проницаемостью для<br>кислорода и водяных паров;<br>-индивидуальная упаковка для<br>одноразового использования;<br>-аппликатор из полимерной губки на<br>пластмассовой палочке (для объема 1<br>мл аппликатор ранее называли -<br>лопатка);<br>-объем: 1 мл, 3мл; |

|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |      | -стерильность сохраняется до тех пор, пока упаковка не вскрыта или повреждена.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Пленка защитная<br>нераздражающая<br>CAVILON NO STING<br>BARRIER FILM спрей | 12/1 | -нецитотоксичная;<br>-гипоаллергенная;<br>-в жидкой форме горючая (не использовать вблизи огня и источников воспламенения);<br>-бесцветная;<br>-прозрачна;<br>-флакон с пульверизатором;<br>-объем: 28 мл;<br>-обладает хорошей проницаемостью для кислорода и водяных паров;<br>-стерильность сохраняется до первого использования. |

### 2.3. Описание и функции

Помогает защитить интактную или поврежденную кожу от раздражения, вызванного мочой и/или каловыми массами при их недержании, пищеварительными соками, раневым отделяемым, адгезивами и трением.

### 3. Описание принципа действия

Пленка защитная раздражающая CAVILON NO STING BARRIER FILM -это жидкое средство, применяемое как пленкообразующее вещество, которое после нанесения на интактную или неповрежденную кожу, образует пленку- длительный водостойкий барьер, играющий роль защитной среды между кожей и физиологическими выделениями, жидкостями адгезивными веществами, а также защищающей от трения.

### 4. Используемые материалы

Пленки состоят из: гексаметилдисилоксан и изооктан(растворитель), акрилатный триммер(полимер), полифенилметилсилоксан(пластификатор).

### 5. Информация о сфере применения

Предназначен для использования как первичный барьер против раздражения кожи физиологическими жидкостями (предупреждение повреждений кожи мочой и/или каловыми массами при недержании; защита кожи свищей(включая кишечные); защита раны вокруг раны от экссудата; защита под адгезивными пластырями и повязками; защита от повреждения вызванного трением; защита кожи от опрелостей).

Средство может быть использовано для взрослых, детей и младенцев старше 1 месяца.

Специалист по  
сертификации/ регистрации  
отдела Здоровоохранение  
ЗАО «ЗМ Россия»

« 4 » *август* 2011 г.



Солодова М.А.

*(Солодова)*

08.08.2019

ОАО «ЦИРМИ»  
РОССИЯ  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МОСКВА