

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росздравнадзора от

№ _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Закрытое акционерное
общество
«Медком-М»

Копеев С.В.

«01» июня 2007 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ Лейкопластырь Периодый , производимый компанией *Shangzhou Huailan Health Dressing Co., Ltd., Kumai*

Назначение и технические характеристики:

Данное изделие предназначено в качестве вспомогательного средства при ревматических и мышечных, болях, люмбаго, миалгии, артритах, радикулитах, простудных заболеваний. Применяется наружно.

Правила использования:

Наружно. Перед наложением кожу обезжиривают и протирают насухо. Снимают защитную пленку, накладывают на кожу и слегка прижимают. Носят до 2 сут, если нет сильного раздражения

1. Обезжирить и протереть насухо кожу
2. Снять защитную пленку;
3. Наклеить на кожу и слегка прижать.
4. Носить до 2 суток при отсутствии сильного раздражения

Правила хранения:

Хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от солнечного света месте.

Противопоказания к применению:

Гиперчувствительность..

Особые указания:

При появлении жжения пластырь снимают и кожу смазывают вазелином

Должность руководителя
Лаборатории, проводившей
Испытания

_____ / _____
подпись