

10-6  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.  
12 февраля 2012 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Пластырь медицинский стерильный и нестерильный, разных форм и  
размеров**

**Производства Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd., («Чангжоу Хуалиань Хэлс  
Дрессинг Ко., Лтд.»), Китай**

## Инструкция по применению пластыря медицинского:

Пластырь медицинский стерильный и нестерильный, разных форм и размеров:

- на тканевой основе;
- на нетканой основе;
- на полимерной основе.

- Перед применением очистить поврежденный и прилегающий к нему участок кожи.
- Взять пластырь и аккуратно приложить на поверхность кожи.
- Края пластыря надежно зафиксировать, не допуская возникновения складок.
- Рекомендуется менять ежедневно.

### **Меры предосторожности и противопоказания:**

- Предназначены только для наружного применения
- При диабете и кожных заболеваниях перед использованием пластыря обязательна консультация с врачом.
- Проконсультироваться с врачом, если во время ношения пластыря появятся нежелательные проявления (например, сильное покраснение, потепление участка кожи, опухоль, боль, ощущения дискомфорта).
- Не рекомендуется приклеивать на влажную кожу и участки с раздражением кожных покровов.
- Пластыри могут вызывать аллергические реакции или раздражение при наличии индивидуальной непереносимости материалов, при их возникновении прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу; гипоаллергенность означает пониженную вероятность проявления аллергических реакций, но не исключает их возникновение.
- Пластырь не подлежит повторной стерилизации.

**Условия хранения.**

Пластырь следует хранить в сухом прохладном темном месте при температуре ниже 25°C.

Срок годности – 5 лет.

Генеральный директор  
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.