

ОКП 93 9890

«УТВЕРЖДАЮ»

УТВЕРЖДЕН

Закрытое акционерное
общество
«Медком-М»

Приказом Росздравнадзора от

№ _____

ОА

Копеев С.В.

«01» июня 2007 г.

М.п. /

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ Повязки медицинские адгезивные, стерильные и нестерильные,
производства компании *Changzhou Hualian Health Dressing Co. Ltd., Китай*

Назначение и технические характеристики:

Повязки медицинские адгезивные, стерильные и нестерильные Данное изделие предназначено для защиты ран и послеоперационных швов, для фиксации различных медицинских устройств.

Область применения – хирургия.

Комплектация изделия:

Нетканый материал с клеевой пропиткой
Синтетический акрилатный клей
Сорбционная подушка
Защитное покрытие из бумаги
Индивидуальная упаковка- бумажный пакет-саше,
Групповая картонная упаковка

Правила использования:

1. Прозеинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи;
2. Вынуть повязку из упаковки
3. Удалить защитное бумажное покрытие с повязки
4. Наложить повязку на рану, крепко прижимая ее от центра к краям
5. Зафиксировать края повязки, не допуская возникновения складок

Правила хранения:

Хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от солнечного света месте.

Противопоказания к применению:

Отсутствуют.

Должность руководителя
Лаборатории, проводившей
Испытания

_____ /
подпись