



(дискету) или на USB-ФЛЭШ-КАРТУ. На боковой поверхности подставки МОНИТОРА для этих целей расположены два USB-порта.

Сетевой переключатель переменного тока на компьютере следует оставлять в положении включено. Второй переключатель – это кнопка перезагрузки компьютера; обычно она не используется. Этот переключатель запускает принудительную перезагрузку программного обеспечения компьютера. Дисковод для гибких дисков, как правило, не используется. Справа от дисковода для гибких дисков расположен дисковод для CD R/W. Слева находится окошко для вентиляции. Его всегда следует содержать в чистоте.

Компьютер позволяет управлять следующими функциями системы BSD-500.

- *Получает и перерабатывает информацию от температурных датчиков, контролирует мощность на основании данных от датчиков по принципу обратной связи.*
- *Контролирует передачу данных с жесткого и гибкого дисков и на них.*
- *Получает и обрабатывает информацию, поступающую с монитора компьютера.*
- *Обеспечивает управление информацией, отображаемой на мониторе компьютера.*



На рисунке 3-3 представлен полный вид внутренней части главного пульта управления системы BSD-500. За передней дверцей находится генератор МВ, компьютер и полочка для хранения.

В дверцах находятся открытые полочки для хранения температурных датчиков и микроволновых интерстициальных аппликаторов.

Рисунок 3-3: Внутренняя часть главного пульта управления