

ОКПД2 32.50.50.190

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ БИОМИР ХХІ"
МОСКВА

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Осташев А.В.
«04» 07 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов медицинская по
ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями

Версия 1 «04» 07 2019

Москва 2019


Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1	Назначение системы опоры тела.....	4
1.2	Показания к применению СОТ.....	5
1.3	Противопоказания к применению СОТ.....	6
1.4	Побочные эффекты.....	6
1.5	Меры предосторожности.....	6
1.6	Размерный ряд СОТ.....	9
1.7	Упаковка.....	10
2.	СОСТАВ СОТ.....	11
3.	МАРКИРОВКА.....	11
4.	КАТАЛОГ СОТ.....	14
4.1	Варианты подвеса сеток на распорки.....	14
4.1.1	Двухточечный подвес сеток на Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением.....	14
4.1.2	Четырехточечный подвес сеток на Распорку Х-образную/Распорку Н-образную.....	28
4.1.3	Трехточечный подвес сеток на Распорку с использованием крюка на Моторе Системы БМ.....	35
4.1.4	Многоточечный подвес на Распорку для горизонтального перемещения пациента «А»/ Распорку для горизонтального перемещения пациента «В».....	37
4.1.5	Специальный подвес Стула для бассейна «G»/ Стула для бассейна «L».....	41
4.2	Сетка универсальная.....	42
4.2.1	Подъем из положения сидя.....	43
4.2.2	Подъем для перемещения в положение сидя (на стул/кресло- каталку/коляску).....	44
4.2.3	Снятие сетки в положении сидя.....	45
4.2.4	Подъем с кровати.....	45
4.2.5	Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати.....	46
4.2.6	Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.....	47
4.3	Сетка специальная.....	47
4.3.1	Подъем с кровати.....	48
4.3.2	Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.....	48
4.4	Сетка специальная «Н».....	48
4.4.1	Подъем из положения сидя.....	49
4.4.2	Подъем для перемещения в положение сидя (на стул/кресло-каталку/коляску).....	50
4.4.3	Снятие сетки в положении сидя.....	51
4.4.4	Подъем с кровати.....	51
4.4.5	Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати.....	52
4.4.6	Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.....	53
4.5	Сетка для туалета.....	54
4.5.1	Подъем из кресла-каталки/коляски в туалет (из положения сидя).....	54
4.5.2	Возвращение из туалета в кресло-каталку/коляску и снятие сетки в положении сидя.....	55
4.5.3	Подъем с кровати в туалет.....	56
4.5.4	Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати.....	57
4.5.5	Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.....	58
4.5.6	Совет по использованию сеток для посещения туалета.....	58
4.6	Сетка для ампутантов.....	59
4.6.1	Подъем из положения сидя.....	59
4.6.2	Подъем для перемещения в положение сидя (на стул/кресло-каталку/коляску).....	61
4.6.3	Снятие сетки в положении сидя.....	61
4.6.4	Подъем с кровати/пола.....	61

4.6.5 Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати.....	62
4.6.6 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.....	63
4.7 Сетка многофункциональная «AG»/«AL».....	63
4.7.1 Подъем с кровати.....	64
4.7.2 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.....	65
4.8 Сетка смены положения «AG2».....	65
4.8.1 Размещение сетки под пациентом.....	65
4.8.2 Удаление сетки из-под пациента.....	66
4.9 Сетка горизонтальная «AG1»/«BG».....	66
4.9.1 Подъем с кровати/пола.....	67
4.9.2 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.....	68
4.10 Жилет «G».....	69
4.10.1 Размещение пациента в жилете.....	69
4.10.2 Снятие жилета.....	69
4.11 Жилет «H».....	70
4.11.1 Размещение пациента в жилете.....	71
4.11.2 Снятие жилета.....	71
4.11.3 Выполнение упражнений в жилете.....	72
4.12 Жилет «H», детский.....	72
4.12.1 Размещение пациента в жилете.....	73
4.12.2 Снятие жилета.....	73
4.13 Лента смены положения широкая.....	73
4.13.1 Размещение ленты под пациентом.....	74
4.13.2 Удаление ленты из-под пациента.....	74
4.14 Лента смены положения узкая.....	74
4.14.1 Размещение ленты под пациентом.....	74
4.14.2 Удаление ленты из-под пациента.....	74
4.15 Лента поддерживающая широкая.....	75
4.15.1 Размещение ленты поддерживающей, широкой под пациентом.....	75
4.16 Лента поддерживающая узкая.....	75
4.16.1 Размещение ленты, поддерживающей узкой.....	76
4.17 Лента специальная «A»/«B».....	76
4.17.1 Размещение лент под пациентом.....	76
4.18 Стул для бассейна «G»/«L».....	77
4.18.1 Использование стула для бассейна.....	78
5. Принадлежности.....	78
5.1 Распорка/ Распорка для перекида/ Распорка с четырехточечным креплением/ Распорка X-образная/ Распорка H-образная.....	78
5.1.1 Использование Распорки/Распорки для перекида/Распорки с четырехточечным креплением/Распорки X-образная/Распорки H-образная.....	79
5.2 Распорка для горизонтального перемещения пациента «A»/«B».....	79
5.2.1 Использование распорки для горизонтального перемещения «A»/«B».....	80
5.3 Стик.....	80
5.3.1 Использование Стика.....	80
6. Поиск и УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ.....	80
7. Уход и ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	80
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	81
9. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	81
10. УТИЛИЗАЦИЯ.....	82
11. СВЕДЕНИЯ ОБ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.....	82
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	83
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	101
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	104

1. Введение

Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов медицинская по ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями

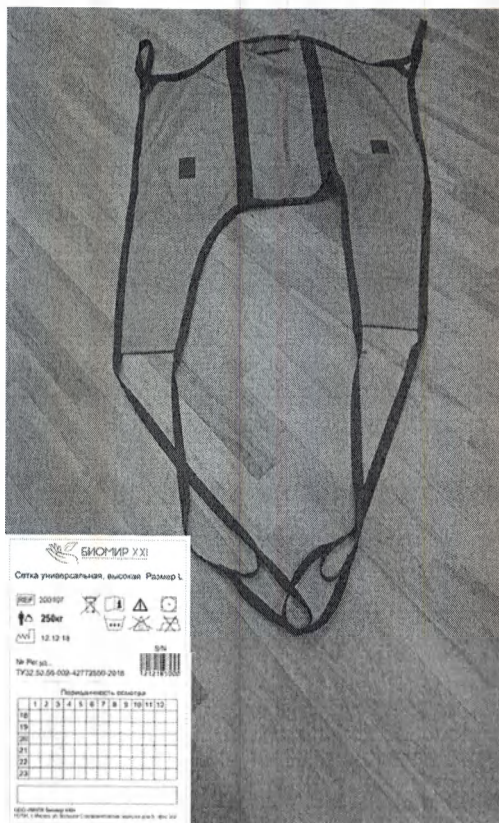

«Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов медицинская по ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями» была спроектирована с учетом обеспечения пациенту максимального удобства при передвижении. Диапазон возможностей Системы опоры тела для подъема и перемещения позволяет найти оптимальное решение и удовлетворить практически любые требования, возникающие при уходе за пациентами.

1.1 Назначение системы опоры тела

«Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов медицинская по ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями» (далее - СОТ) предназначена для обеспечения смены физиологических положений, подъема, удержания и перемещения пациента в условиях больниц и клиник, а также внутри жилых и общественных помещений.

СОТ – общее название сеток, жилетов, лент и стульев вместе с сопутствующими Принадлежностями для удержания пациента на Системе для подъема и перемещения.

Система для подъема и перемещения – устройство, предназначенное для подъёма, удержания и перемещения пациента.

СОТ полностью совместима с «СИСТЕМОЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ РЕЛЬСОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПО ТУ 32.50.50-001-42772550-2017 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ: БМ-01,

БМ-02, БМ-03» (далее - Система БМ). Номер регистрационного удостоверения РЗН2018/6825 от 13 февраля 2018 года.

СОТ может быть совместима с другими Системами для подъема и перемещения, если эти Системы для подъема и перемещения соответствуют требованиям, указанным в **ПРИЛОЖЕНИИ В**.



При использовании СОТ следует применять **Систему БМ или другую Систему для подъема и перемещения**.

Пациент – лицо, которому при помощи СОТ обеспечивают смену физиологических положений, подъема, удержания и перемещения.

Пользователь – лицо, осуществляющее при помощи СОТ смену физиологических положений пациента, подъема, удержания и перемещения.

В зависимости от требований и особенностей пациента, СОТ может быть применена как для одноразового, так и для многократного использования в любых учреждениях, общественных местах, а также для домашнего использования, в частности, для:

- перемещения пациента из одного положения в другое (из положения лежа в положение сидя и обратно, из положения лежа в положение стоя и обратно);
- удержания пациента во время его перемещения из одного положения в другое (фиксация в горизонтальном, вертикальном и сидячем положении);
- перемещения пациента с одного места в другое (по комнате, из комнаты в комнату, палату, туалет и иные помещения).

Условия эксплуатации



Параметр	Ед. измерения	СОТ	
		Мин.	Макс.
Температура воздуха	° С	0	40
Относительная влажность воздуха	%	30	70
Атмосферное давление	гПа	700	1060

1.2 Показания к применению СОТ

Перечень в Таблице 1 содержит наиболее часто встречаемые заболевания и особенности пациента. Также СОТ может использоваться при других заболеваниях, не перечисленных в п. 1.3 Противопоказания к применению СОТ.

Таблица 1 - Наиболее часто встречаемые заболевания и особенности пациента

Диагноз:	Диагноз:
Ампутант	Перелом шейки бедра
Артериовенозные мальформации спинного мозга	Полиартрит
Боковой амиотрофический склероз	Полиостеоартроз

Болезнь Фридрейха	Поражение головного мозга
Болезнь двигательного нейрона (мотонейрона)	Поражение ЦНС
Врожденная структурная миопатия	Рассеянный склероз
Гетропороз	Ревматоидный артрит
Гидроцефалия	Ревматоидный полиартрит
Дегенеративное заболевание позвоночника	Синдром Вивера
Диабет (ампутант)	Системное заболевание скелета
ДЦП	Спиномышечная атрофия
Заболевание ОПД	Усыхание мозжечка
Инсульт	Церебральный артеросклероз
Листериозный менингит	Некроз
Метеохондриальная энцефалопатия	Паралич ног
Миопатия	Паркинсон
Мышечная дистрофия	Острый гнойный периодонтит

1.3 Противопоказания к применению СОР

Относительных противопоказаний при использовании СОР не выявлено. Абсолютные противопоказания к применению СОР указаны в Таблице 2.

Таблица 2 - Абсолютные противопоказания к применению СОР

Диагноз:
Пациенты с выраженным двигательным возбуждением с незафиксированным положением тела
Пациенты с угрозой развития острых осложнений при изменении положения тела

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции пользователя, показаний к применению, противопоказаний к применению.

1.5 Меры предосторожности



Внимание! Состав СОР приведен в паспорте изделия. Все СОР пригодны для использования в пределах «Среды пациента». При эксплуатации и обслуживании СОР необходимо строго выполнять требования настоящей инструкции.



Внимание! Подъем и перемещение человека всегда предполагает риск. Важно ознакомиться с инструкцией пользователя на Систему для подъема и перемещения, с которой вы используете СОР.



Внимание! Оказывая услуги пациенту по перемещению, пользователь несет ответственность за его безопасность и должен знать, разрешено ли по состоянию здоровья использовать данную СОТ. Все СОТ разработаны и протестированы для удовлетворения конкретным потребностям пациента. При возникновении сложностей при использовании СОТ свяжитесь с производителем.



Внимание! При спуске пациента, Мотор Системы для подъема и перемещения должен быть расположен непосредственно над поверхностью, на которую планируется поместить пациента. Подъем или опускание пациента по диагонали или под углом может привести к серьезным травмам, как для пациента, так и для пользователя.



Внимание! После использования все виды одноразовых сеток, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в соответствии с действующими требованиями для отходов класса А. Запрещается повторное использование одноразовых сеток.



Внимание! Запрещается использовать СОТ если они повреждены или имеют какие-либо дефекты.



Внимание! Запрещается использование СОТ вблизи открытого источника огня.



Внимание! Запрещены какие-либо изменения в СОТ без согласования с производителем.



Внимание! Пояснения значений рисунков, символов, предупреждающих знаков, на СОТ, в п. 3 «Маркировка».



Внимание! При использовании СОТ способом, который не рекомендован компанией ООО «МНПК БИОМИР XXI», компания не несет ответственности за травмы или другие несчастные случаи, которые могут произойти. В случае если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с производителем.




Внимание! Продукты компании ООО «МНПК БИОМИР XXI» постоянно обновляются и дорабатываются, поэтому ООО «МНПК БИОМИР XXI» оставляет за собой право улучшать конфигурацию без предварительного уведомления пользователя.



Перед началом процесса подъема и перемещения надо проверить, что:


1. Пользователь прочитал и понял данную инструкцию;
2. Распорка надежно закреплена на Моторе Системы для подъема и перемещения и на ней нет никаких признаков износа или повреждения;
3. Колеса на кресле-каталке/коляске, кровати, каталке и т.д. заблокированы во время подъема и перемещения;

4. На СОТ нет никаких признаков износа или повреждения см. Рис.1;

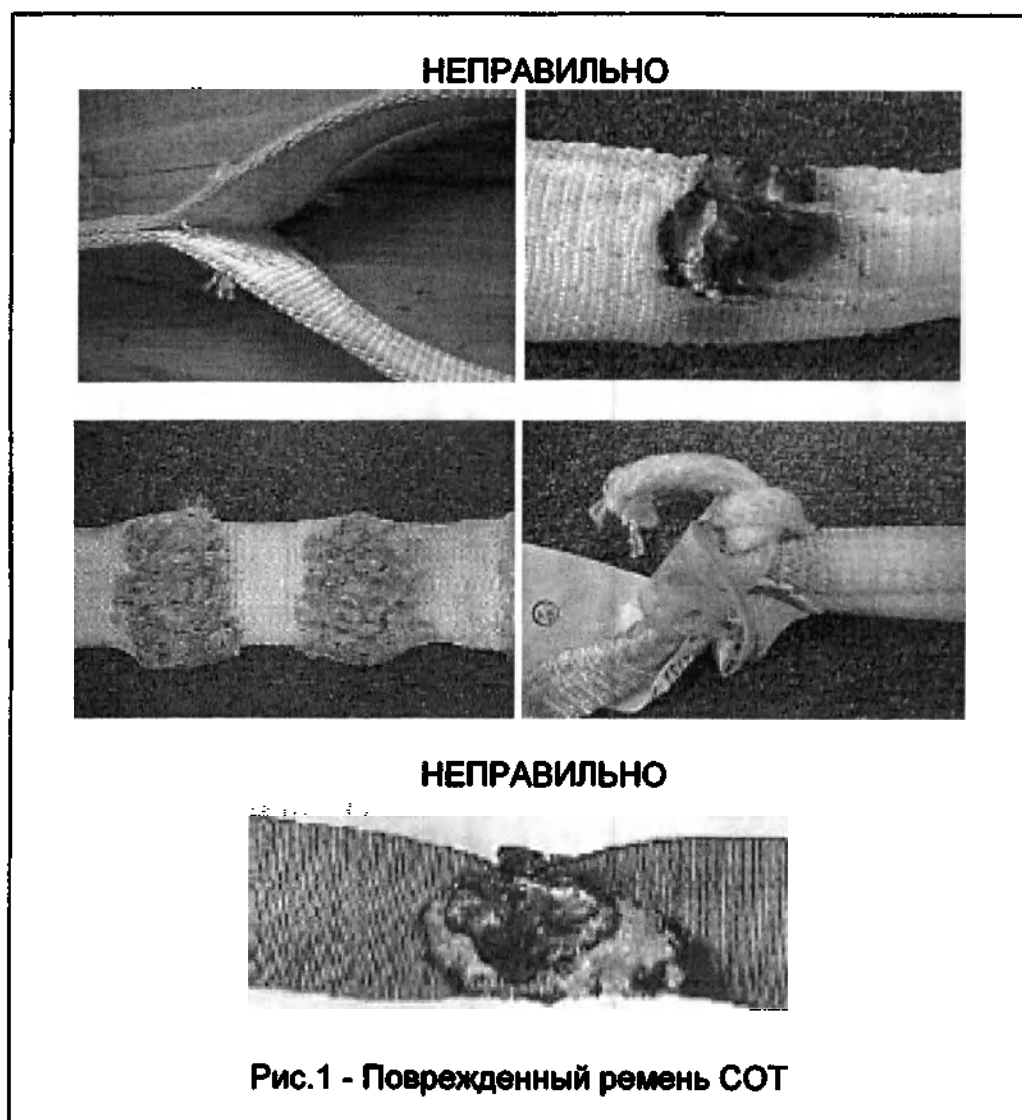

5. Выбран соответствующий вид и размер СОТ с целью удовлетворения потребностей пациента;
6. Пациент надежно сидит в СОТ, перед началом подъема;

7. Ремни правильно закреплены на крюках распорки перед тем, как пациент будет поднят с опорной поверхности, но после того, как ремни COT были полностью натянуты (см. Рис.2,3);

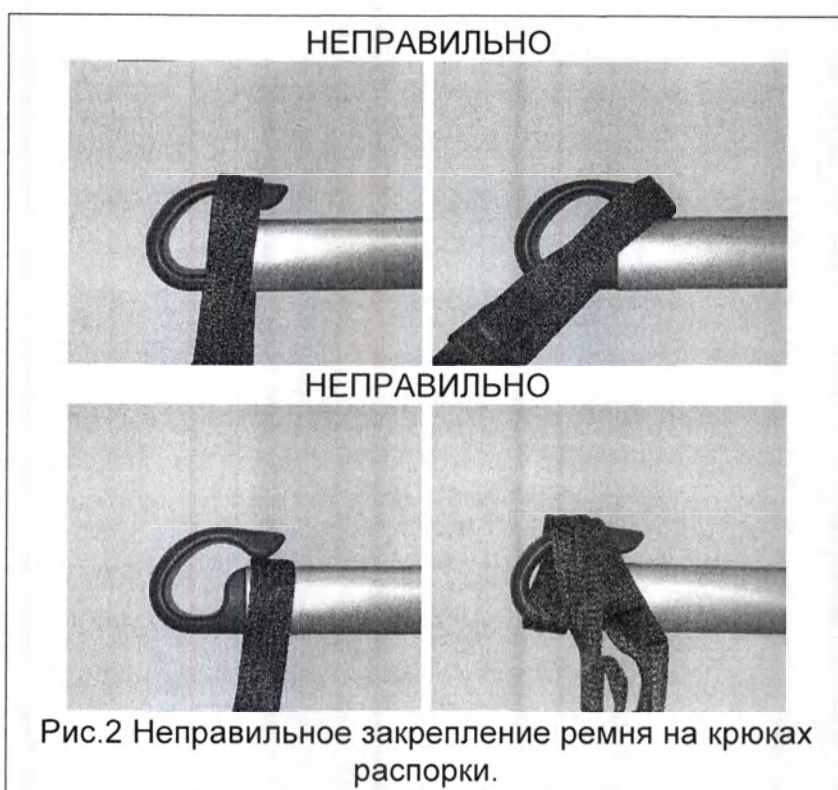

8. Пациента никогда не нужно поднимать с опорной поверхности выше, чем требуется для подъема и перемещения;
9. Пациента никогда не нужно оставлять без присмотра в процессе подъема и перемещения.


1.6 Размерный ряд COT

От правильного выбора COT (сетки, жилета или лент) зависит удобство пользования и комфорт пациента. COT имеет обозначения размеров, указанных в Таблице 3. В Таблице 4 приведено соответствие размеров COT антропометрическим размерам.

Таблица 3 - Обозначения размеров COT

Обозначение	Расшифровка
J	Детский (Junior)
JS	Детский маленький (Junior Small)
JM	Детский средний (Junior Medium)
XS	Экстра-маленький (X- Small)
S	Маленький (Small)
M	Средний (Medium)
L	Большой (Large)
XL	Экстра-большой (X-large)
XXL	2-Экстра-большой (XX-large)
XXXL	3-Экстра-большой (XXX-large)

Таблица 4 - Соответствие размеров COT антропометрическим размерам

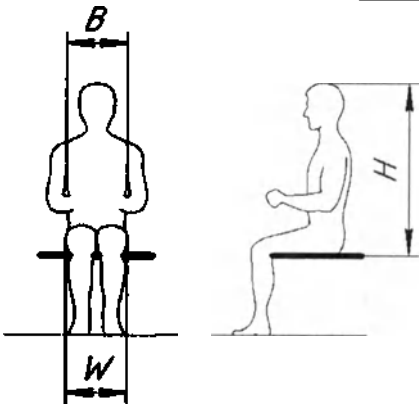										
	J	JS	JM	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
H (см)	45-60	55-70	68-80	75-82	80-87	85-92	90-97	95-102	95-102	95-102
W (см)	25-30	28-35	33-38	33-37	36-40	39-43	42-45	45-49	48-52	54-58
B (см)	-	60-95	65-100	70-105	75-110	80-120	90-130	100-140	110-150	-
Вес (кг)	-	-	-	До 45	30-60	50-90	70-120	100-140	120-250	150-500
	4-6	6-10	10-14	-	-	-	-	-	-	-

При выборе размера COT можно пользоваться следующими параметрами: ростом (см) и весом (кг) человека, а также возрастом (для размеров J, JS, JM)

H – высота сидячего человека от сидения до головы, в см.

W – ширина таза человека в сидячем положении, в см.

B – обхват груди, в см.

1.7 Упаковка

Упаковка COT должна соответствовать требованиям ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 и комплекту конструкторской документации ДНЛА 942819.COT.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

СОТ упаковываются в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с помещенной внутрь этикеткой.

Изделия из текстильного материала (сетки, жилеты, ленты) должны быть упакованы в индивидуальные прозрачные полиэтиленовые пакеты.

Крупногабаритные изделия (Стул для бассейна «G», Стул для бассейна «L») должны быть обмотаны стрейч-пленкой и упакованы в картонные коробки. Допускается применение вкладышей внутри упаковки.

Принадлежности должны быть упакованы в полиэтиленовую или воздушно-пузырьковую пленку и уложены в индивидуальные картонные коробки.

2. Состав СОТ

Количество СОТ, модельный ряд и размеры, а также принадлежности подбираются исходя из пожеланий заказчика, и необходимого количества в зависимости от условий эксплуатации, из Приложении А для СОТ и Приложении Б для Принадлежностей. Затем оформляется Таблица 5 со списком СОТ и Принадлежностей. Данная Таблица включается в паспорт на конкретное исполнение СОТ.

Все СОТ и Принадлежности производятся компанией ООО «МНПК Биомир XXI».

Таблица 5 - Оформление Составы СОТ*

№	Наименование	Артикул	Серийный номер	Количество, шт.
1	Сетка универсальная, высокая: Размер – L	200107	1212185000	1
2	Сетка универсальная, средняя: Размер – L	200207	1212185100	1
3	Распорка: Размер – L	207103	1512183000	1
4	Инструкция пользователя			1
5	Паспорт ДНЛА.942819.020-ПС			1

* Данные в таблице приведены для примера.

3. Маркировка

Информация о изделии размещается на ярлыке в головной части СОТ. На них размещена основная информация о изделии и правилах его эксплуатации. Перед началом использования изделия обязательно ознакомьтесь с этой информацией. Проверяйте информацию в процессе эксплуатации. В Таблице 6 приведен пример маркировки и СОТ, к которым она применяется.

Таблица 6 - Пример маркировки СОТ и принадлежностей

Ярлык

Описание

БИОМИР XXI

ООО «МНПК Биомир XXI»

Сетка универсальная, высокая Размер L

REF 200107

250кг

12.12.18

S/N

1212185000

№ Рег.уд.:

ТУ32.50.50-002-42772550-2018

Периодичность осмотра

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18												
19												
20												
21												
22												
23												

ООО «МНПК Биомир XXI»

115191, г. Москва, ул. Большой Староданиловский переулок дом 5, офис 302

Данная маркировка применима к следующим СОТ:

- Сетка универсальная, высокая
- Сетка универсальная, средняя
- Сетка универсальная, низкая
- Сетка универсальная, высокая (для ванны)
- Сетка универсальная, средняя (для ванны)
- Сетка универсальная, низкая (для ванны)
- Сетка универсальная, высокая (одноразовая)
- Сетка универсальная, средняя (одноразовая)
- Сетка универсальная, низкая (одноразовая)
- Сетка специальная, высокая
- Сетка специальная, высокая (для ванны)
- Сетка специальная "Н", высокая
- Сетка специальная "Н", высокая (для ванны)
- Сетка для туалета, высокая
- Сетка для туалета, средняя
- Сетка для ампутов, высокая
- Сетка для ампутов, средняя
- Сетка для ампутов, высокая (для ванны)
- Сетка для ампутов, средняя (для ванны)
- Сетка многофункциональная «AG»
- Сетка многофункциональная «AG» (для ванны)
- Сетка многофункциональная «AG» (одноразовая)
- Сетка многофункциональная «AL»
- Сетка многофункциональная «AL» (для ванны)
- Сетка многофункциональная «AL» (одноразовая)
- Сетка смены положения «AG2»
- Сетка смены положения «AG2» (одноразовая)
- Сетка горизонтальная «AG1»
- Сетка горизонтальная «AG1» (для ванны)
- Сетка горизонтальная «AG1» (одноразовая)
- Сетка горизонтальная «BG»
- Сетка горизонтальная «BG» (для ванны)
- Сетка горизонтальная «BG» (одноразовая)
- Жилет «G»
- Жилет «G» (для ванны)
- Жилет «Н»
- Жилет «Н» (для ванны)
- Жилет «Н», детский
- Лента смены положения широкая
- Лента смены положения широкая (одноразовая)
- Лента смены положения узкая
- Лента смены положения узкая (одноразовая)
- Лента поддерживающая широкая
- Лента поддерживающая широкая (одноразовая)
- Лента поддерживающая узкая
- Лента поддерживающая узкая (одноразовая)
- Лента специальная «А»
- Лента специальная «В»

 БИОМИР XXI НАДЛЕЖАЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ		Данная маркировка применима к следующим СОТ и Принадлежностям: - Стул для бассейна «G» - Стул для бассейна «L» - Распорка - Распорка для перекида - Распорка с четырехточечным креплением - Распорка Х-образная - Распорка Н-образная - Распорка для горизонтального перемещения «А» - Распорка для горизонтального перемещения «В» - Стик
Распорка Размер L		
REF 207103	  	
 250кг		
 15.12.18	S/N  1512183000	
№ Рег.уд.: ТУ32.50.50-002-42772550-2018 ООО «МНПК Биомир XXI» 115191, г. Москва, ул. Большой Староданиловский переулок дом 5, офис 302		

В Таблице 7 приведены примеры символов, применяемых для маркировки СОТ и Принадлежностей, и их расшифровка.

Таблица 7 - Расшифровка маркировки СОТ и Принадлежностей

№	Знач.	Обозначение
1.	 БИОМИР XXI НАДЛЕЖАЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	Торговый знак
2.	ООО «МНПК Биомир XXI»	Наименование производителя
3.	Сетка универсальная, высокая	Наименование СОТ или принадлежности
4.	115191, г. Москва, ул. Большой Староданиловский переулок дом 5, офис 302	Юр. адрес производителя
5.	ТУ32.50.50-002-42772550-2018	Обозначение технических условий на СОТ
6.	REF	Номер по каталогу
7.	 250кг	Максимальная грузоподъемность
8.	 12.12.18	Дата производства. Рядом указывается дата в формате месяц/год.
9.	S/N	Серийный номер изделия
10.		Обратитесь к инструкции по применению

11.		Не подлежит утилизации, как бытовые отходы
12.		Штрих-код продукта (страна происхождения)
13.		Осторожно, обратитесь к инструкции по применению
14.		Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 80 °С.
15.		Изделие не должно подвергаться отбеливанию средствами, выделяющими хлор
16.		Изделие не должно подвергаться глажению
17.		Запрет на повторное применение
18.		Направление положения тела пациента при использовании Распорки для горизонтального перемещения пациента «А»/«В»

4. Каталог СОР

Перечень СОР приведен в Приложении А

Перечень принадлежностей для СОР приведен в Приложении Б

4.1 Варианты подвеса сеток на распорки

СОТ могут быть использованы с различными вариантами подвеса в зависимости от состояния пациента и предполагаемого использования соответствующей СОТ.

4.1.1 Двухточечный подвес сеток на Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением.

	
Двухточечный подвес сетки на Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением.	Двухточечный подвес Сетки многофункциональной "AL" на Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением.

Рис.4 - Двухточечный подвес сетки на Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением.

Сетка универсальная


По завершении расположения пациента в Сетке универсальной, подведите над пациентом Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением и закрепите петли Сетки универсальной на соответствующие крюки Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением.



Распорка




Распорка для перекида

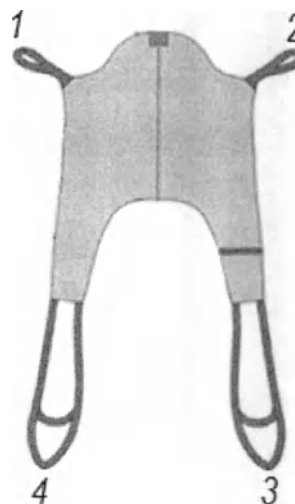

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 1, петлю 4 закрепить на крюке 2.



Распорка с четырехточечным креплением

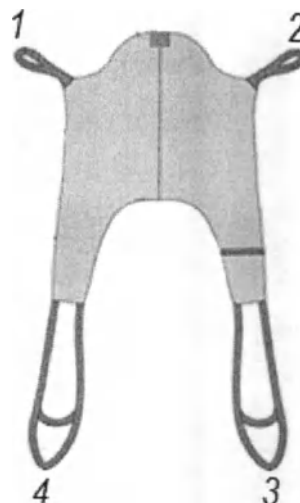

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 4, петлю 4 закрепить на крюке 3.

Рис.5 - Порядок закрепления петель Сетки универсальной на крюках различных распорок

Сетка специальная


По завершении расположения пациента в *Сетке специальной*, подведите над пациентом *Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением* и закрепите петли *Сетки специальной* на соответствующие крюки *Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением*.




Распорка




Распорка для перекида

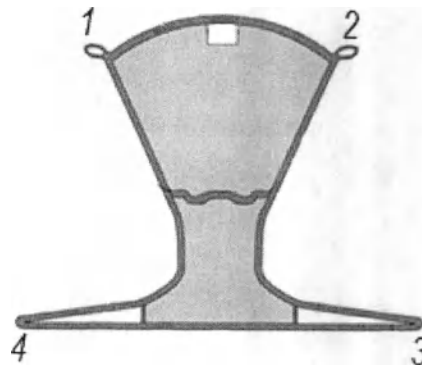

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 4 закрепить на крюке 1

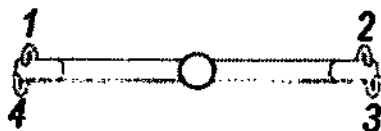

Распорка с четырехточечным креплением

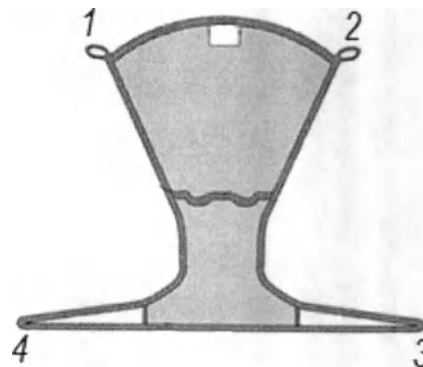


Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 4.


Рис.6 - Порядок закрепления петель Сетки специальной на крюках различных распорок

Сетка специальная «Н»

По завершении расположения пациента в Сетке специальная «Н», подведите над пациентом *Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением* и закрепите петли Сетки специальная «Н» на соответствующие крюки *Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением*.

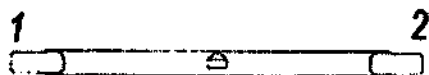


Распорка

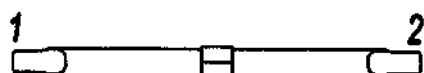


Распорка для перекида

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 6 закрепить на крюке 1, петлю 4 закрепить на крюке 1, петлю 5 закрепить на крюке 2

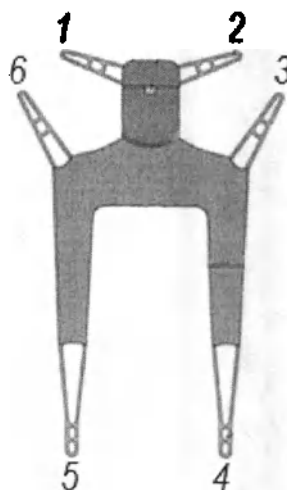

Распорка с четырехточечным креплением

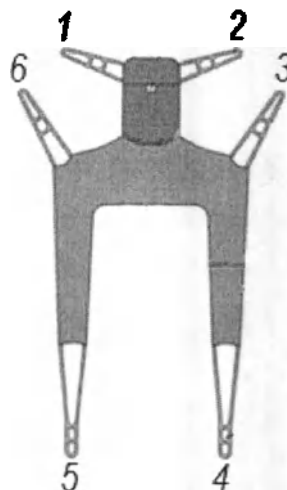

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 6 закрепить на крюке 4, петлю 4 закрепить на крюке 4, петлю 5 закрепить на крюке 3

Рис.7 - Порядок закрепления петель Сетки специальной «Н» на крюках различных распорок

Сетка для туалета

По завершении расположения пациента в **Сетке для туалета**, подведите над пациентом **Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением** и закрепите петли **Сетки для туалета** на соответствующие крюки **Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением**.




Распорка




Распорка для перекида

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 1, петлю 4 закрепить на крюке 1, петлю 5 закрепить на крюке 2, петлю 6 закрепить на крюке 2

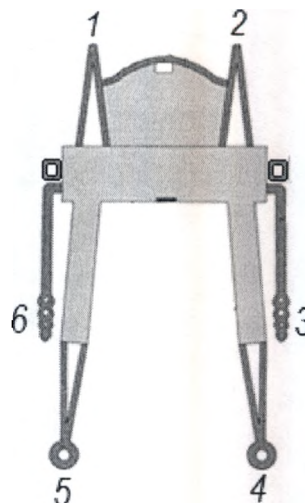

Распорка с четырехточечным креплением

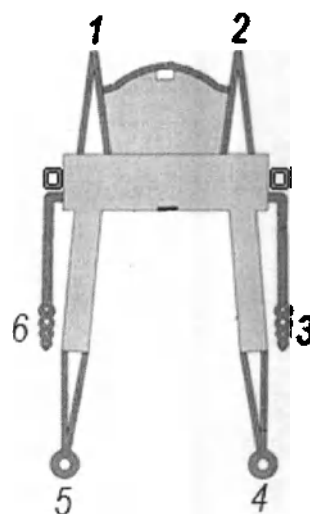

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 4, петлю 4 закрепить на крюке 4, петлю 5 закрепить на крюке 3, петлю 6 закрепить на крюке 3


Рис.8 - Порядок закрепления петель Сетки для туалета на крюках различных распорок

Сетка для ампутантов

По завершении расположения пациента в Сетке для ампутантов, подведите над пациентом Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением и закрепите петли Сетки для ампутантов на соответствующие крюки Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением.





Распорка

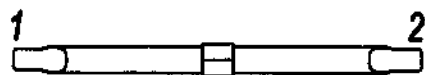


Распорка для перекида

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 1, петлю 4 закрепить на крюке 2

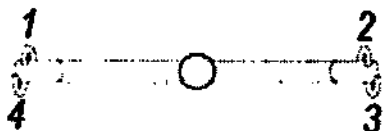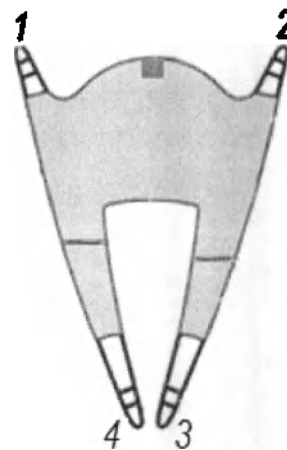

Распорка с четырехточечным креплением

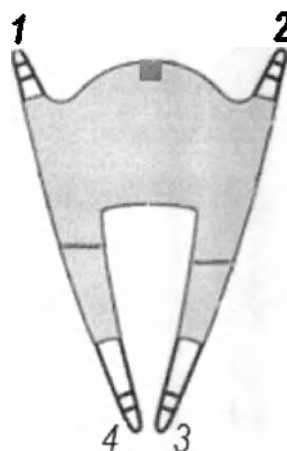

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 4, петлю 4 закрепить на крюке 3

Рис.9 - Порядок закрепления петель Сетки для ампутантов на крюках различных распорок

Сетка многофункциональная «AG»/ Сетка многофункциональная «AL»


По завершении расположения пациента в Сетке многофункциональной «AG»/«AL», подведите над пациентом Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением и закрепите петли Сетки многофункциональной «AG»/«AL» на соответствующие крюки Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением.



Распорка




Распорка для перекида

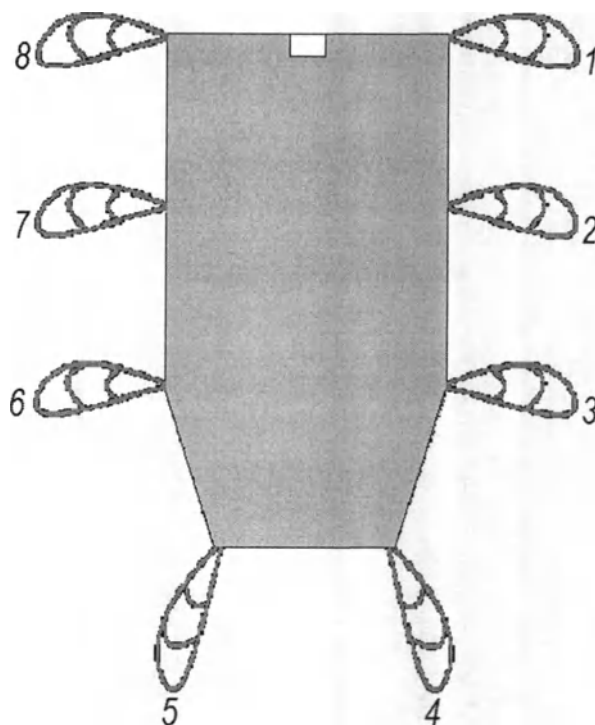


Сетка многофункциональная «AG»

Петлю 1 закрепить на крюке 2, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 4 закрепить на крюке 2, петлю 5 закрепить на крюке 1, петлю 6 закрепить на крюке 1, петлю 7 закрепить на крюке 1, петлю 8 закрепить на крюке 1.

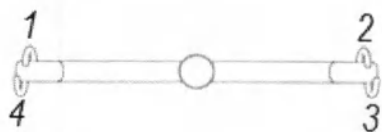


**Распорка с
четырёхточечным
креплением**

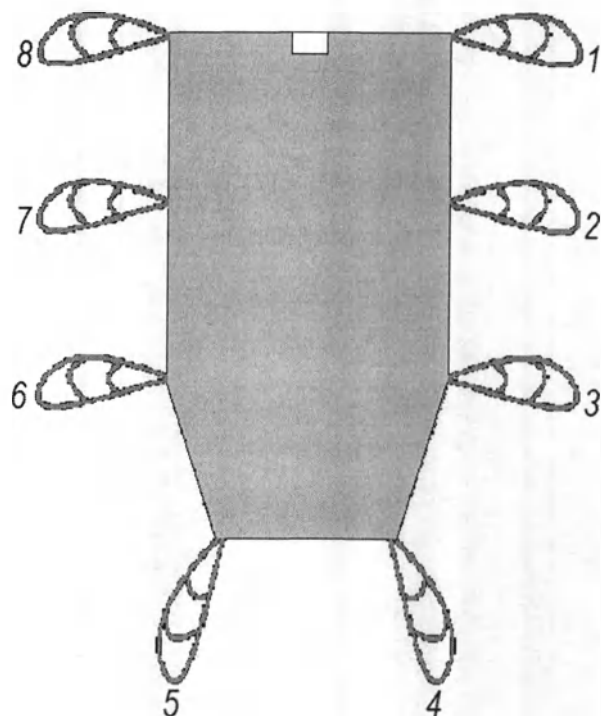


Сетка многофункциональная «AG»

Петлю 1 закрепить на крюке 2, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 3, петлю 5 закрепить на крюке 4, петлю 6 закрепить на крюке 4, петлю 7 закрепить на крюке 1, петлю 8 закрепить на крюке 1.


Рис.10 - Порядок закрепления петель Сетки многофункциональной «AG» на крюках различных распорок

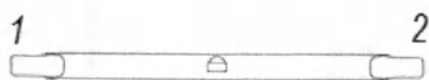

Распорка

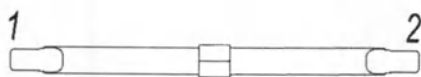


Распорка для перекида

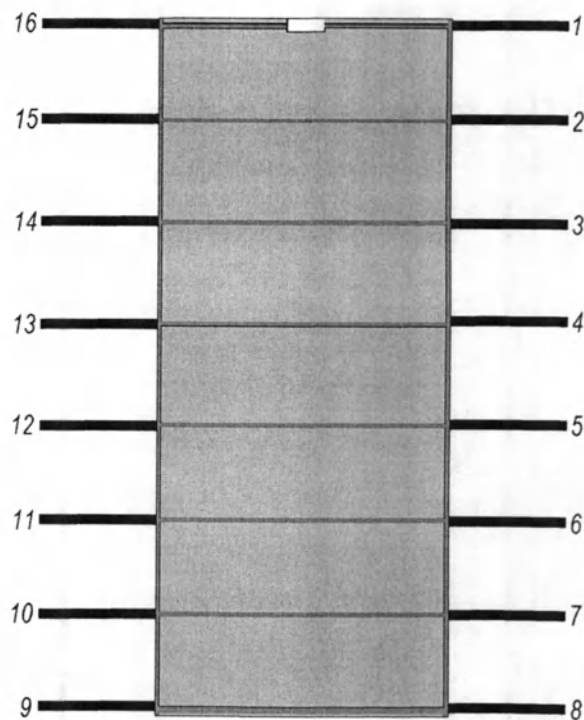


Сетка многофункциональная «AL»

Петлю 1 закрепить на крюке 2, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 4 закрепить на крюке 2, петлю 5 закрепить на крюке 2, петлю 6 закрепить на крюке 2, петлю 7 закрепить на крюке 2, петлю 8 закрепить на крюке 2, петлю 9 закрепить на крюке 1, петлю 10 закрепить на крюке 1, петлю 11 закрепить на крюке 1, петлю 12 закрепить на крюке 1, петлю 13 закрепить на крюке 1, петлю 14 закрепить на крюке 1, петлю 15 закрепить на крюке 1, петлю 16 закрепить на крюке 1.

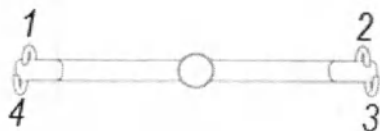

**Распорка с
четырёхточечным
креплением**

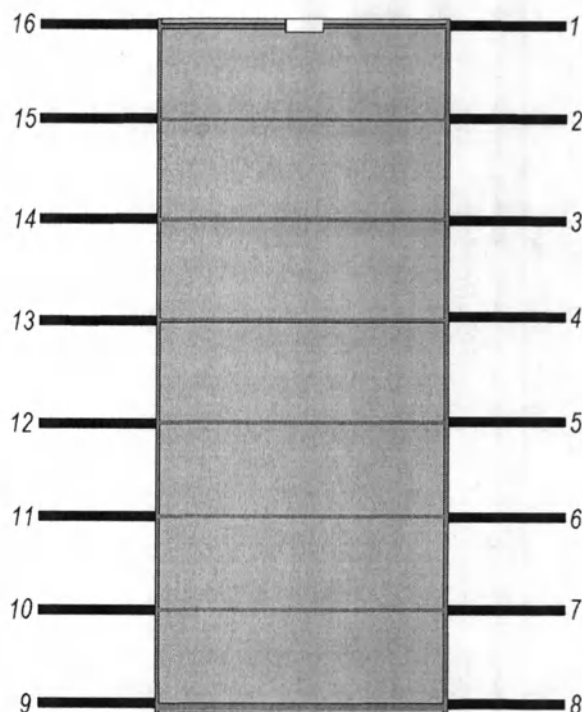

Сетка многофункциональная «AL»

Петлю 1 закрепить на крюке 2, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 4 закрепить на крюке 2, петлю 5 закрепить на крюке 3, петлю 6 закрепить на крюке 3, петлю 7 закрепить на крюке 3, петлю 8 закрепить на крюке 3, петлю 9 закрепить на крюке 4, петлю 10 закрепить на крюке 4, петлю 11 закрепить на крюке 4, петлю 12 закрепить на крюке 4, петлю 13 закрепить на крюке 1, петлю 14 закрепить на крюке 1, петлю 15 закрепить на крюке 1, петлю 16 закрепить на крюке 1.

Рис.11 - Порядок закрепления петель Сетки многофункциональной «AL» на крюках различных распорок

Сетка смены положения «AG2»


По завершении размещения пациента на **Сетке смены положения «AG2»**, подведите над пациентом **Распорку/ Распорку для перекида** и закрепите петли **Сетки смены положения «AG2»** на соответствующие крюки **Распорки/ Распорки для перекида**.



Распорка



Распорка для перекида

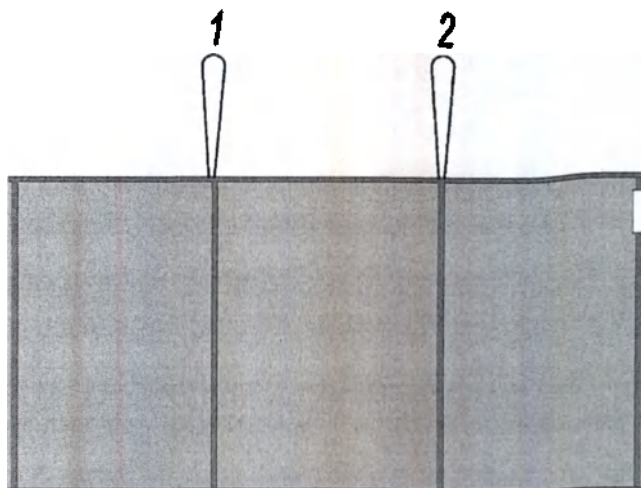


Сетка смены положения «AG2»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2.

Рис.12 - Порядок закрепления петель Сетки смены положения «AG2» на крюках различных распорок

Жилет «G»


По завершении размещения пациента в Жилете «G», подведите над пациентом *Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением* и закрепите петли Жилета «G», на соответствующие крюки *Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением*.

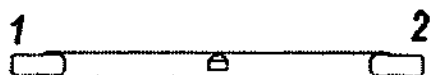

Распорка




Распорка для перекида

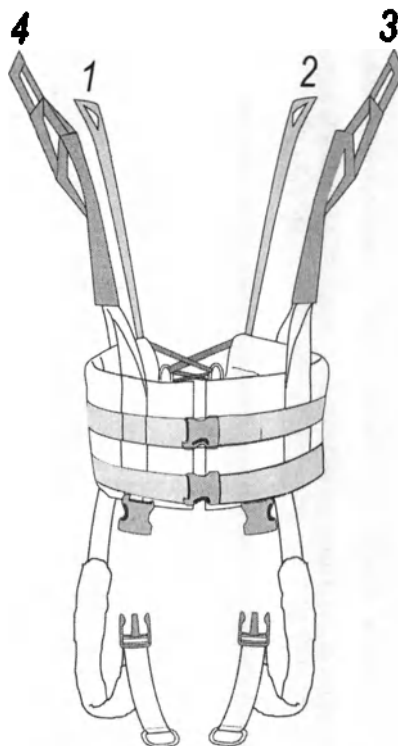


Жилет «G»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 4 закрепить на крюке 1

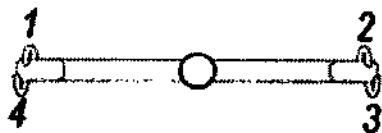

Распорка с четырехточечным креплением

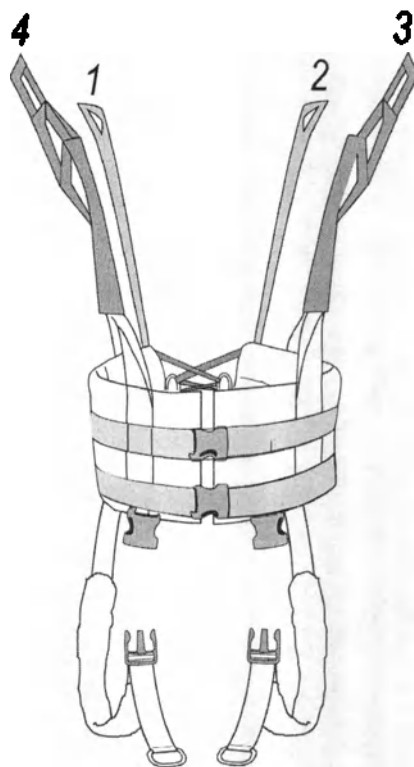

Жилет «Г»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 4

Рис.13 - Порядок закрепления петель Жилета «Г» на крюках различных распорок

Жилет «Н»


По завершении размещения пациента в Жилете «Н», подведите над пациентом *Распорку/ Распорку для перекида/ Распорку с четырехточечным креплением* и закрепите петли Жилета «Н», на соответствующие крюки *Распорки/ Распорки для перекида/ Распорки с четырехточечным креплением*.



Распорка




Распорка для перекида

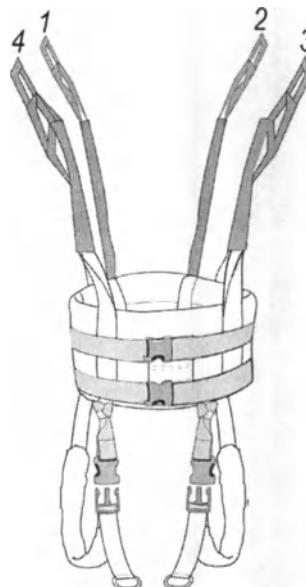


Жилет «Н»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 4 закрепить на крюке 1

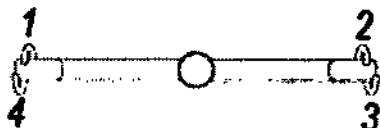

Распорка с четырехточечным креплением

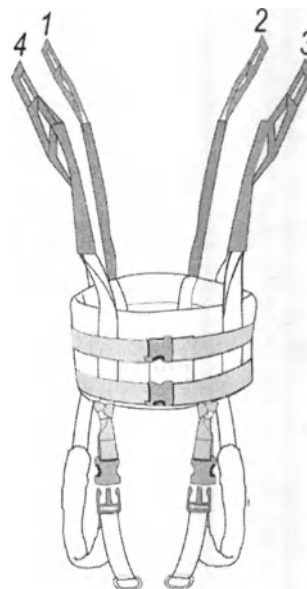


Жилет «Н»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 4

Рис.14 - Порядок закрепления петель Жилета «Н» на крюках различных распорок

Жилет «Н» детский


По завершении размещения пациента в Жилете «Н» детском, подведите над пациентом *Распорку/ Распорку для перекида* и закрепите петли Жилета «Н», детского, на соответствующие крюки *Распорки/ Распорки для перекида*.

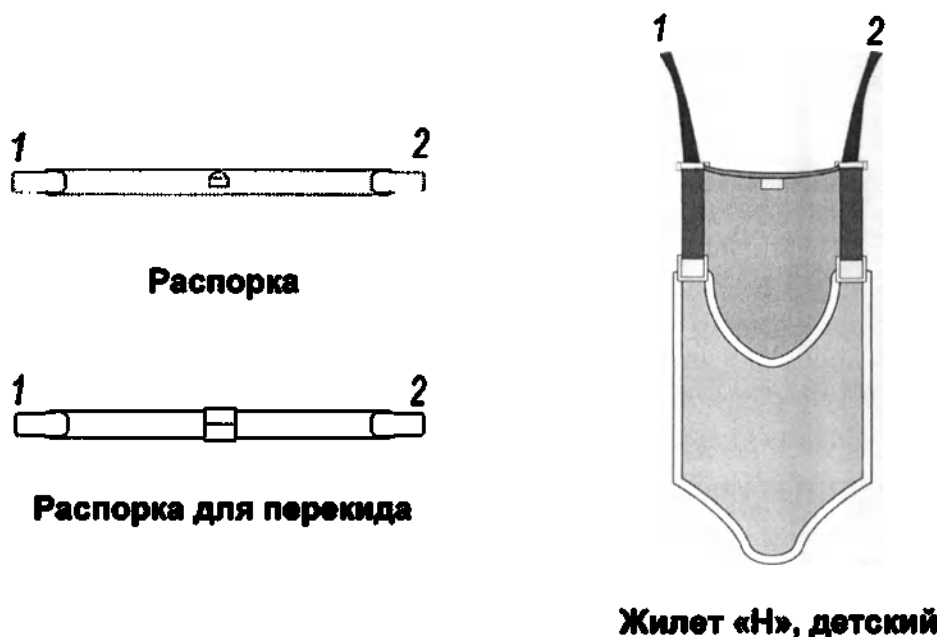

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2.
Рис.15 - Порядок закрепления петель Жилета «Н», детского на крюках различных распорок

Лента смены положения широкая

По завершении размещения пациента на Ленте смены положения, широкой, подведите над пациентом *Распорку/ Распорку для перекида* и закрепите петли Ленты смены положения, широкой на соответствующие крюки *Распорки/ Распорки для перекида*.

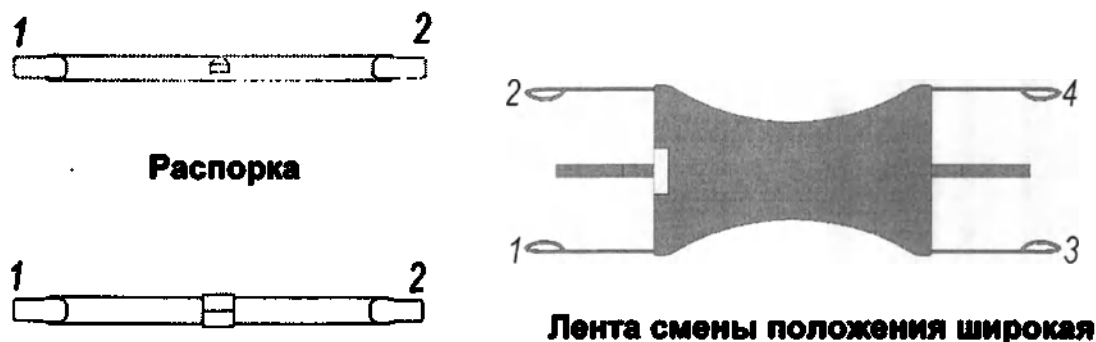

Распорка для перекида

Петлю 1 закрепить на крюке 1 петлю 2 закрепить на крюке 2 или Петлю 3 закрепить на крюке 1 петлю 4 закрепить на крюке 2

Рис.16 - Порядок закрепления петель Ленты смены положения широкой на крюках различных распорок

Лента смены положения узкая

По завершении размещения пациента на **Ленте смены положения, узкой**, подведите над пациентом **Распорку/ Распорку для перекида** и закрепите петли **Ленты смены положения, узкой** на соответствующие крюки **Распорки/ Распорки для перекида**.




Лента смены положения узкая

Петлю 1 закрепить на крюке 1 петлю 2 закрепить на крюке 2

Рис.17 - Порядок закрепления петель Ленты смены положения узкой на крюках различных распорок

Лента поддерживающая широкая

По завершении размещения пациента на **Ленте поддерживающей, широкой**, подведите над пациентом **Распорку/ Распорку для перекида** и закрепите петли **Ленты поддерживающей, широкой** на соответствующие крюки **Распорки/ Распорки для перекида**.

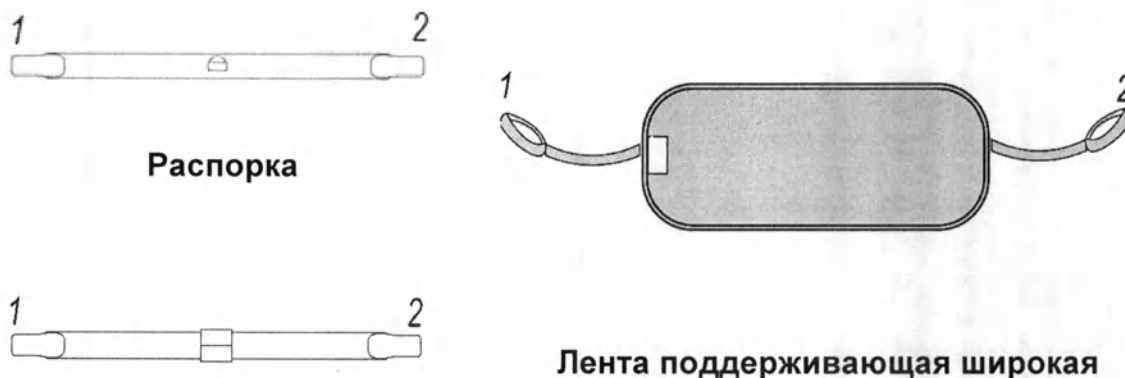

Лента поддерживающая широкая

Распорка для перекида

Петлю 1 закрепить на крюке 1 петлю 2 закрепить на крюке 2


Рис.18 - Порядок закрепления петель Ленты поддерживающей широкой на крюках различных распорок

Лента поддерживающая узкая

По завершении размещения пациента на **Ленте поддерживающей, узкой**, подведите над пациентом **Распорку/ Распорку для перекида** и закрепите петли **Ленты поддерживающей, узкой** на соответствующие крюки **Распорки/ Распорки для перекида**.



Распорка

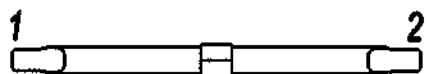


Лента поддерживающая узкая

Распорка для перекида

Петлю 1 закрепить на крюке 1 петлю 2 закрепить на крюке 2

Рис.19 - Порядок закрепления петель Ленты поддерживающей узкой на крюках различных распорок

4.1.2 Четырехточечный подвес сеток на Распорку Х-образную/Распорку Н-образную.

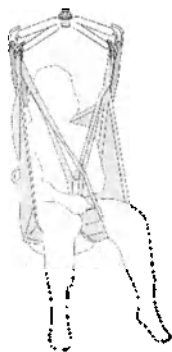

**Четырехточечный подвес сетки на
распорку Х-образную**




**Четырехточечный подвес сетки на
распорку Н-образную**


Рис.20 - Четырехточечный подвес сеток на Распорку Х-образную/ Н-образную

Сетка универсальная


По завершении расположения пациента в **Сетке универсальной**, подведите над пациентом **Распорку Х-образную/ Распорку Н-образную** и закрепите петли **Сетки универсальной** на соответствующие крюки **Распорки Х-образной/ Распорки Н-образной**.

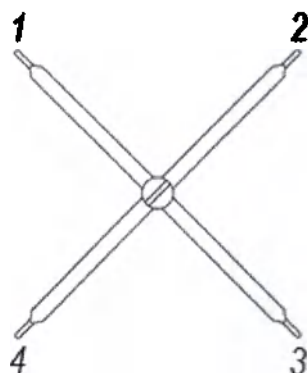

Распорка Х-образная

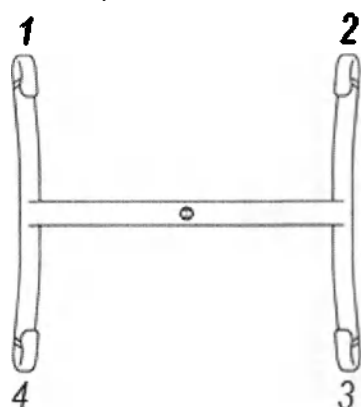

Распорка Н-образная

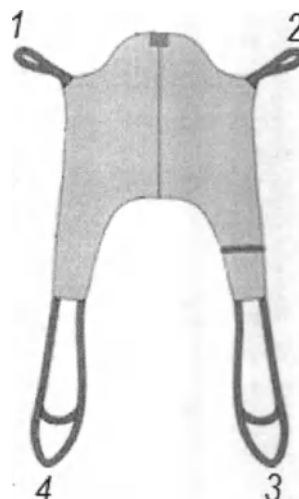


Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 4, петлю 4 закрепить на крюке 3.


Рис.21 - Порядок закрепления петель Сетки универсальной на крюках различных распорок

Сетка специальная


По завершении расположения пациента в **Сетке специальной**, подведите над пациентом **Распорку Х-образную/ Распорку Н-образную** и закрепите петли **Сетки специальной** на соответствующие крюки **Распорки Х-образной/ Распорки Н-образной**.

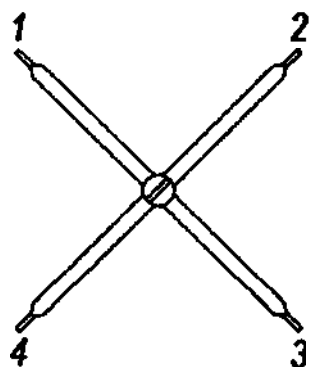

Распорка X-образная

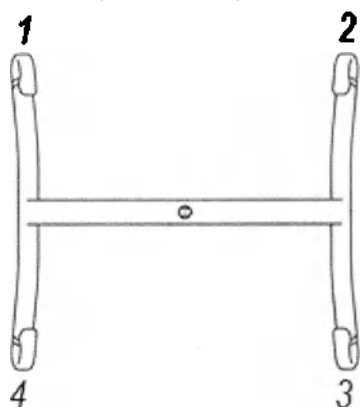


Распорка H-образная

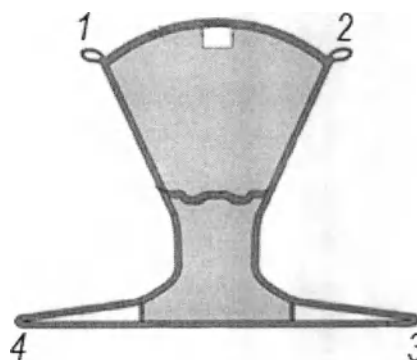


Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 4.
Рис.22 - Порядок закрепления петель Сетки специальной на крюках различных распорок

Сетка многофункциональная «AG»/ Сетка многофункциональная «AL»


По завершении расположения пациента в Сетке многофункциональной «AG»/«AL», подведите над пациентом Распорку Х-образную/ Распорку Н-образную и закрепите петли Сетки многофункциональной «AG»/«AL» на соответствующие крюки Распорки Х-образной/ Распорки Н-образной.

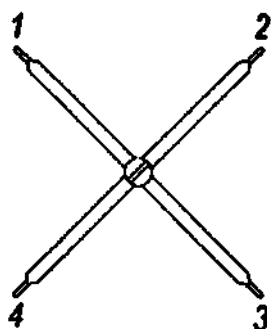

Распорка Х-образная

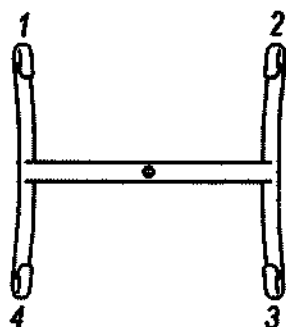

Распорка Н-образная

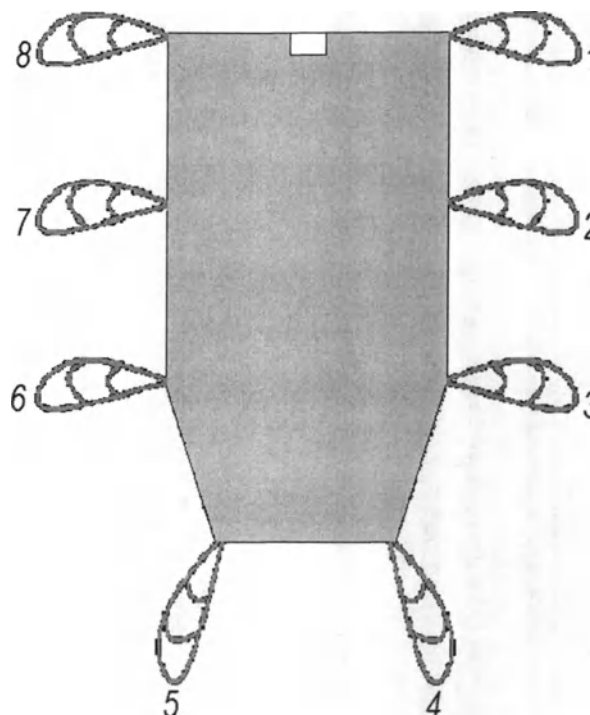

Сетка многофункциональная «AG»

Петлю 1 закрепить на крюке 2, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 3, петлю 5 закрепить на крюке 4, петлю 6 закрепить на крюке 4, петлю 7 закрепить на крюке 1, петлю 8 закрепить на крюке 1.


Рис.23 - Порядок закрепления петель Сетки многофункциональной «AG» на крюках различных распорок



Распорка X-образная



Распорка H-образная

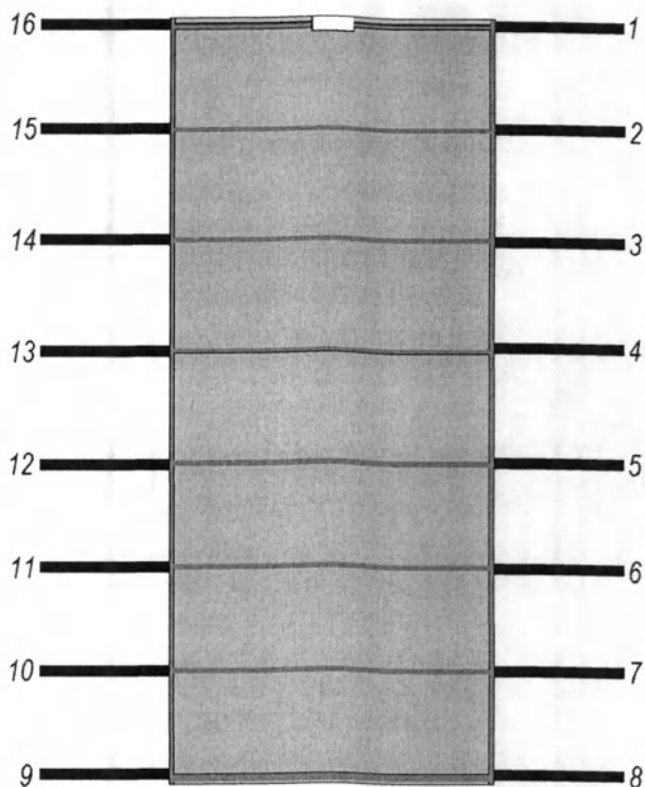


Сетка многофункциональная «AL»

Петлю 1 закрепить на крюке 2, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 2, петлю 4 закрепить на крюке 2, петлю 5 закрепить на крюке 3, петлю 6 закрепить на крюке 3, петлю 7 закрепить на крюке 3, петлю 8 закрепить на крюке 3, петлю 9 закрепить на крюке 4, петлю 10 закрепить на крюке 4, петлю 11 закрепить на крюке 4, петлю 12 закрепить на крюке 4, петлю 13 закрепить на крюке 1, петлю 14 закрепить на крюке 1, петлю 15 закрепить на крюке 1, петлю 16 закрепить на крюке 1.


Рис.24 - Порядок закрепления петель Сетки многофункциональной «AL» на крюках различных распорок

Жилет «G»


По завершении размещения пациента в Жилете «G», подведите над пациентом **Распорку X-образную/ Распорку H-образную** и закрепите петли Жилета «G», на соответствующие крюки **Распорки X-образной/ Распорки H-образной**.

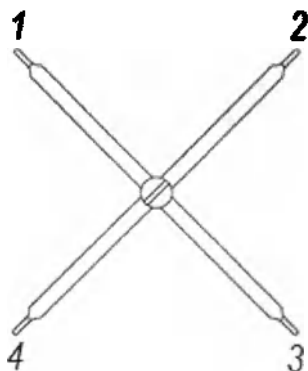

Распорка X-образная

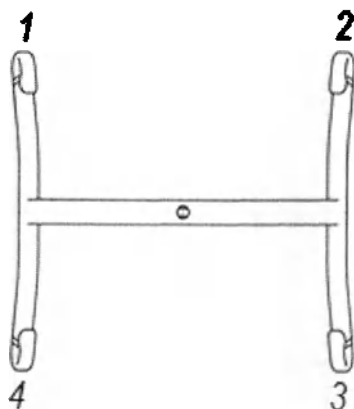

Распорка H-образная

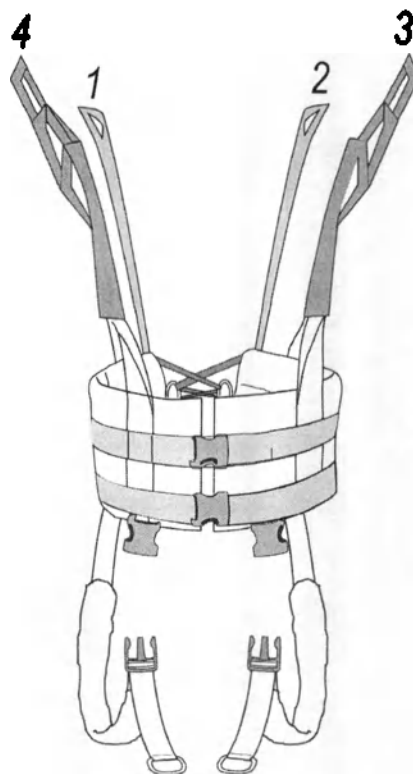


Жилет «G»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 4.


Рис.25 - Порядок закрепления петель Жилета «G» на крюках различных распорок

Жилет «Н»


По завершении размещения пациента в Жилете «Н», подведите над пациентом **Распорку Х-образную/ Распорку Н-образную** и закрепите петли Жилета «Н», на соответствующие крюки **Распорки Х-образной/ Распорки Н-образной**.

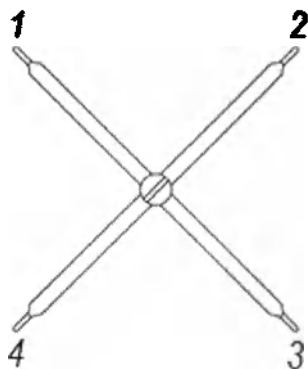

Распорка Х-образная

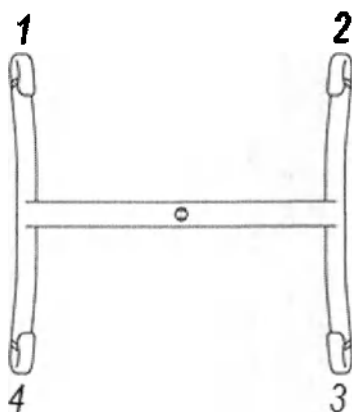

Распорка Н-образная

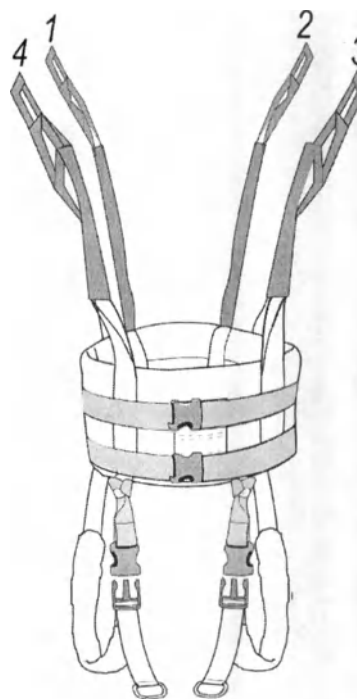

Жилет «Н»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3
закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 4

Рис.26 - Порядок закрепления петель Жилета «Н» на крюках различных
распорок



4.1.3 Трехточечный подвес сеток на Распорку с использованием крюка на Моторе Системы БМ.



Рис.27 - Трехточечный подвес сетки на Распорку с использованием крюка на Моторе Системы БМ.

Сетка универсальная

По завершении расположения пациента в **Сетке универсальной**, подведите над пациентом **Распорку** и закрепите петли **Сетки универсальной** на соответствующие крюки **Распорки** с использованием крюка на **Моторе Системы БМ**.

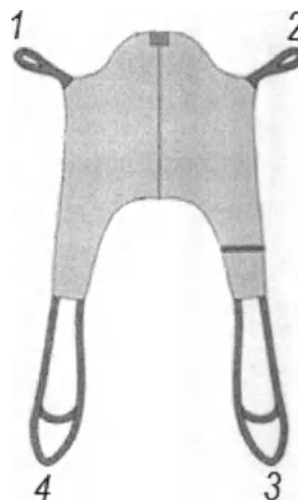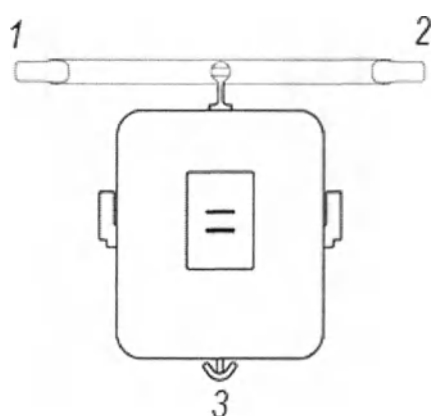


**Распорку с использованием
крюка на Моторе Системы БМ.**

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3
закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 3.

Рис.28 - Порядок закрепления петель Сетки специальной на крюках распорки с использованием крюка на Моторе Системы БМ

Сетка специальная «Н»

По завершении расположения пациента в Сетке специальная «Н», подведите над пациентом Распорку и закрепите петли Сетки специальной «Н» на соответствующие крюки Распорки с использованием крюка на Моторе Системы БМ.

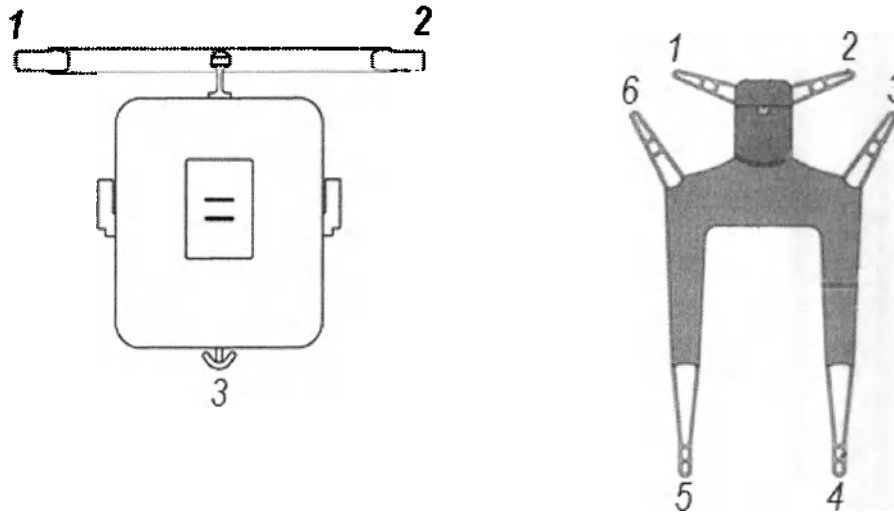


**Распорку с использованием
крюка на Моторе Системы БМ.**

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3
закрепить на крюке 2, петлю 6 закрепить на крюке 1, петлю 4
закрепить на крюке 3, петлю 5 закрепить на крюке 3

**Рис.29 - Порядок закрепления петель Сетки специальной «Н» крюках распорки
с использованием крюка на Моторе Системы БМ**

Жилет «Н»

По завершении размещения пациента в Жилете «Н», подведите над пациентом Распорку и закрепите петли Жилета «Н», на соответствующие крюки Распорки с использованием крюка на Моторе Системы БМ.

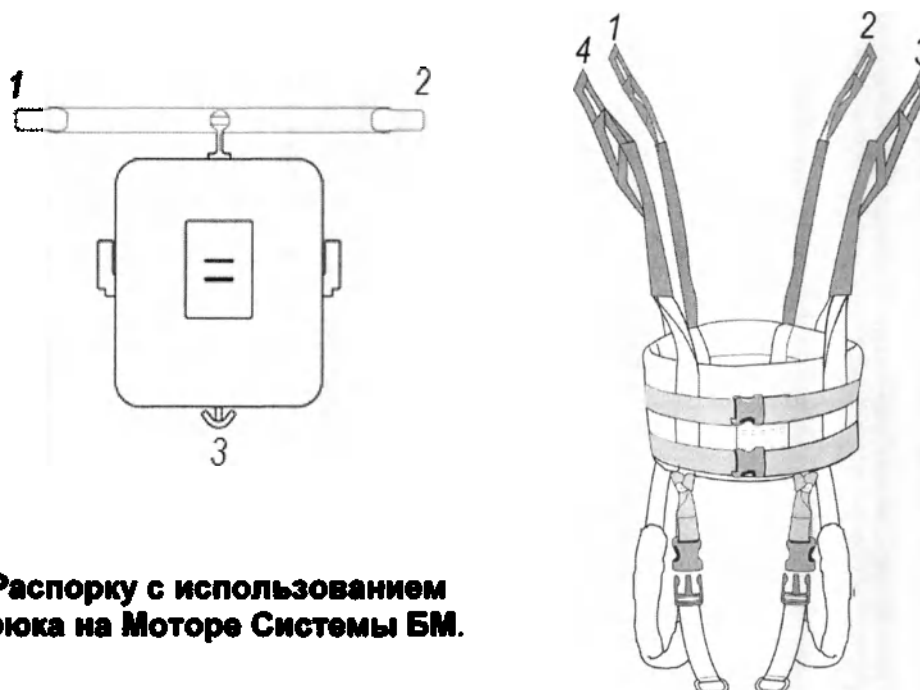


Распорку с использованием крюка на Моторе Системы БМ.

Жилет «Н»

Петлю 1 закрепить на крюке 3, петлю 2 закрепить на крюке 3, петлю 3 закрепить на крюке 1, петлю 4 закрепить на крюке 2


Рис.30 - Порядок закрепления петель Жилета «Н» крюках распорки с использованием крюка на Моторе Системы БМ

4.1.4 Многоточечный подвес на Распорку для горизонтального перемещения пациента «А»/ Распорку для горизонтального перемещения пациента «В»

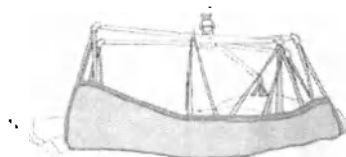

Многоточечный подвес сетки горизонтальной "А" на распорку для горизонтального перемещения "А"


Рис.31 - Многоточечный подвес сетки горизонтальной "А" на распорку для горизонтального перемещения "А"/"В"

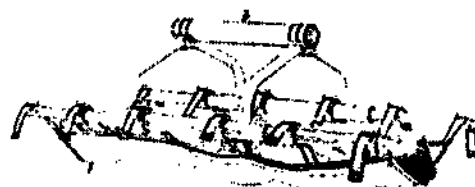


Многоточечный подвес сетки горизонтальной "В" на распорку для горизонтального перемещения "В"

Сетка горизонтальная «AG1»/ Сетка горизонтальная «BG»

По завершении расположения пациента в сетке горизонтальной «AG1»/«BG», подведите над пациентом Распорку для горизонтального перемещения «А»/«В» и закрепите петли/ремни сетки горизонтальной «AG1»/«BG» на соответствующие крюки/замки Распорки для горизонтального перемещения «А»/«В».

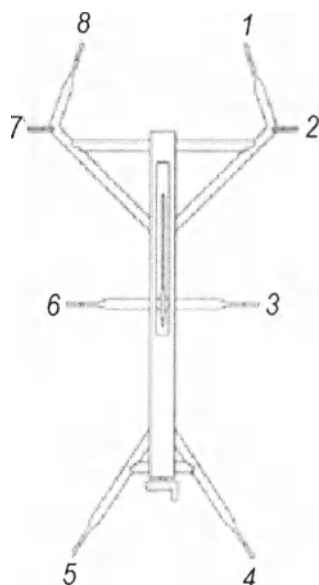



**Распорка для
горизонтального
перемещения «А»**

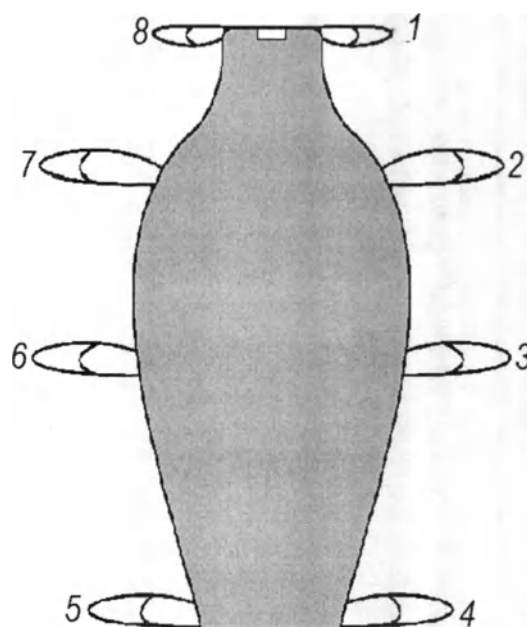

Сетка горизонтальная «AG1»

Петлю 1 закрепить на крюке 1, петлю 2 закрепить на крюке 2, петлю 3 закрепить на крюке 3, петлю 4 закрепить на крюке 4, петлю 5 закрепить на крюке 5, петлю 6 закрепить на крюке 6, петлю 7 закрепить на крюке 7, петлю 8 закрепить на крюке 8.

Рис.32 - Порядок закрепления петель Сетки смены положения «AG1» на крюках Распорки для горизонтального перемещения «А»

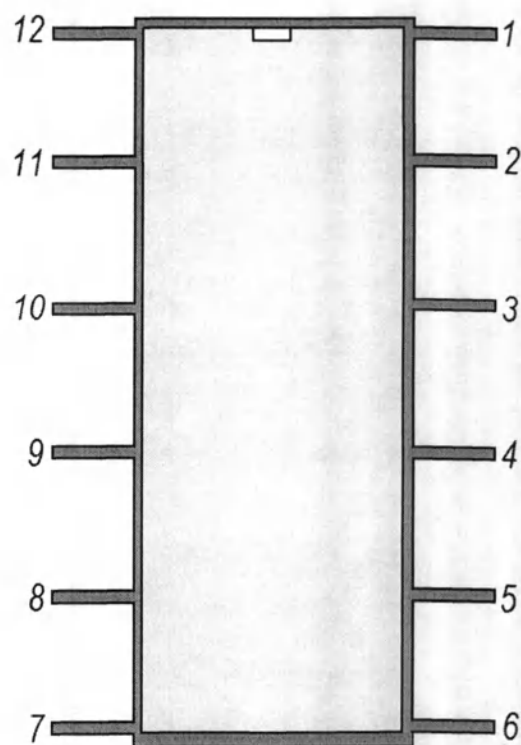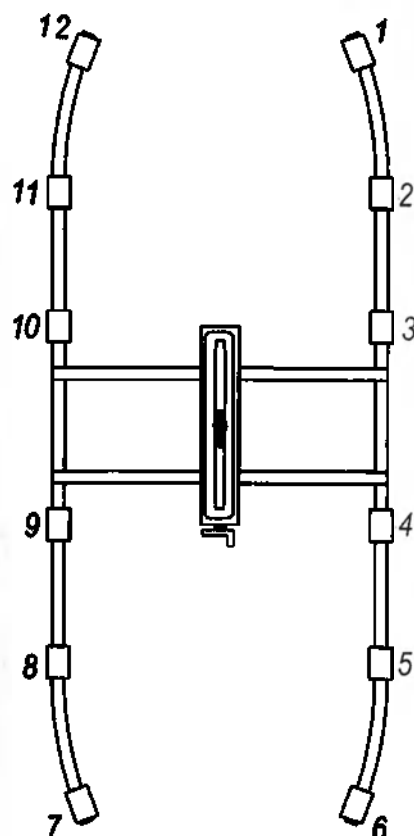

Сетка горизонтальная «BG»


Распорка для горизонтального перемещения «В»

Ремень 1 закрепить на замке 1, ремень 2 закрепить на замке 2, ремень 3 закрепить на замке 3, ремень 4 закрепить на замке 4, ремень 5 закрепить на замке 5, ремень 6 закрепить на замке 6, ремень 7 закрепить на замке 7, ремень 8 закрепить на замке 8, ремень 9 закрепить на замке 9, ремень 10 на замке 10, ремень 11 на замке 11, ремень 12 на замке 12

Рис.33 - Порядок закрепления ремней Сетки смены положения «BG» на замке Распорки для горизонтального перемещения «В»

Лента специальная «А»/ Лента специальная «В»

По завершении расположения пациента на ленте специальной «А»/«В», подведите над пациентом Распорку для горизонтального перемещения «А»/«В» и закрепите петли/ремни ленты специальной «А»/«В» на соответствующие крюки/замки Распорки для горизонтального перемещения «А»/«В».

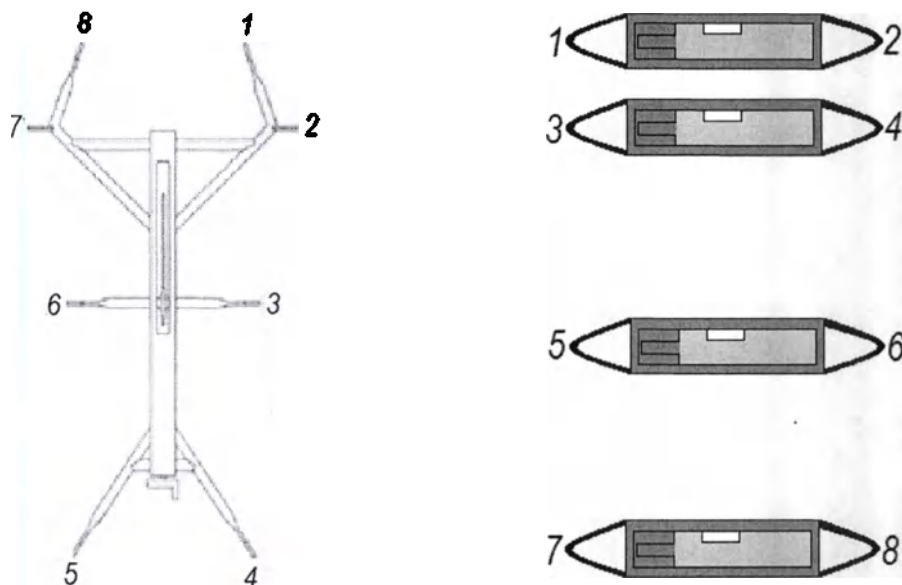


**Распорка для
горизонтального
перемещения «А»**

Лента специальная «А»

Петлю 1 закрепить на крюке 8, петлю 2 закрепить на крюке 1, петлю 3 закрепить на крюке 7, петлю 4 закрепить на крюке 2, петлю 5 закрепить на крюке 6, петлю 6 закрепить на крюке 3, петлю 7 закрепить на крюке 5, петлю 8 закрепить на крюке 4.

Рис.34 - Порядок закрепления петель Ленты специальной «А» на крюках Распорки для горизонтального перемещения «А»

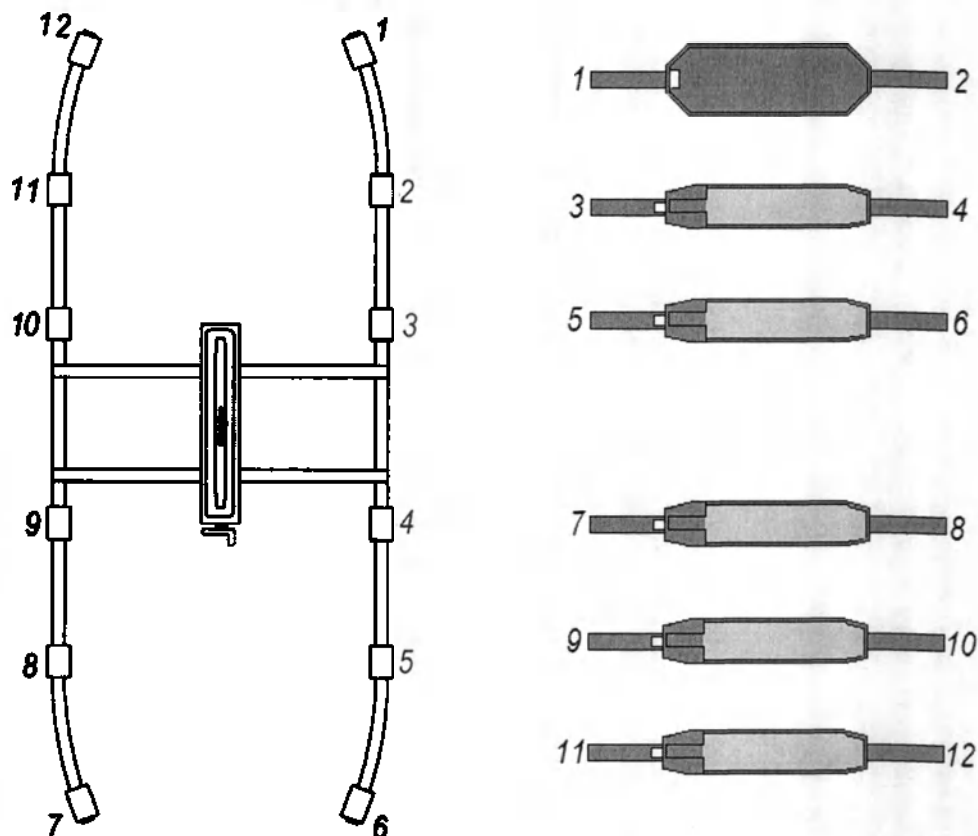

**Распорка для
горизонтального
перемещения «В»**

Лента специальная «В»

Ремень 1 закрепить на замке 12, ремень 2 закрепить на замке 1,
ремень 3 закрепить на замке 11, ремень 4 закрепить на замке 2,
ремень 5 закрепить на замке 10, ремень 6 закрепить на замке 3,
ремень 7 закрепить на замке 9, ремень 8 закрепить на замке 4, ремень
9 закрепить на замке 8, ремень 10 на замке 5, ремень 11 на замке 7,
ремень 12 на замке 6

Рис.34 - Порядок закрепления ремней Ленты специальной «А» на крюках
Распорки для горизонтального перемещения «В»

4.1.5 Специальный подвес Стула для бассейна «G»/ Стула для бассейна «L»




Рис. 35 - Подвес на стуле для бассейна «L»

Стул для бассейна «G»/ Стул для бассейна «L»

По завершении расположения пациента на Стуле для бассейна «G»/»L», подведите над пациентом Мотор Системы БМ и соедините Стул для бассейна «G»/»L» с Мотором Системы БМ через специальную металлическую петлю в верхнем основании Стула для бассейна «G»/»L».

4.2 Сетка универсальная

Сетка универсальная предназначена для комфортного перемещения пациента в положении сидя. В зависимости от требований может быть представлена в трех конфигурациях: с поддержкой всего тела и головы (высокая), поддержкой всего тела до шеи (средняя) и поддержкой тела до плеч (низкая). А также в трех видах использования: многоразовая, для ванны\душа и одноразовые. Данные сетки разработаны для всех вариантов двух-, трех- и четырехточечного подвеса на распорки.

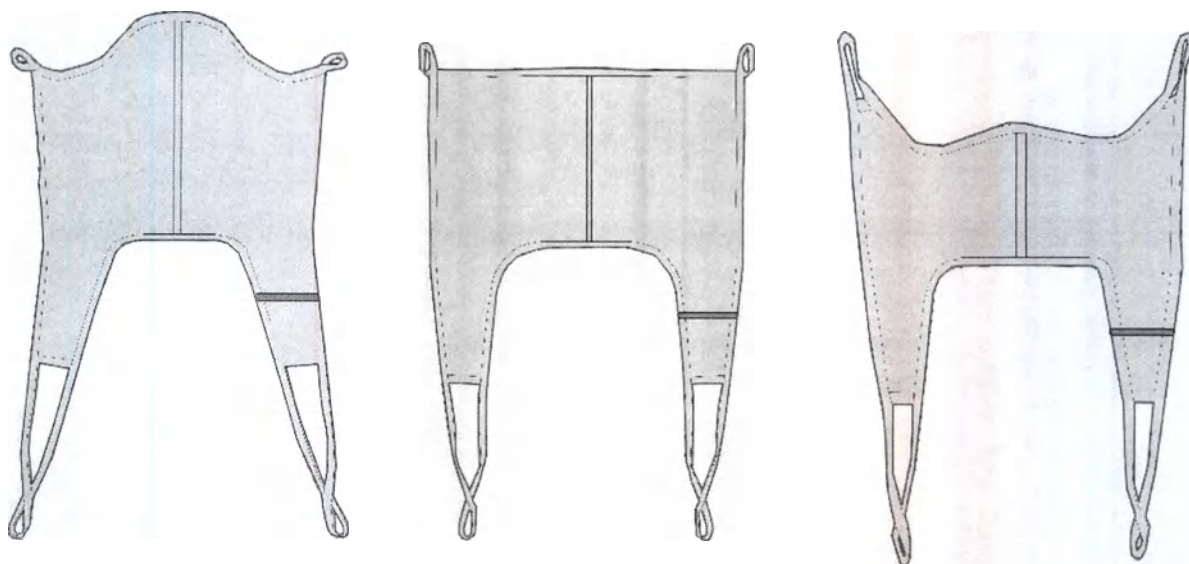

**Сетка универсальная
высокая**

**Сетка универсальная
средняя**

**Сетка универсальная
низкая**

Рис. 35 – Конфигурации Сетки универсальной

- 1- Подголовник
- 2- Ярлык
- 3- Верхние петли
- 4- Центр сетки
- 5- Нижний край
- 6- Опоры для ног
- 7- Специальная петля
- 8- Петли опор для ног

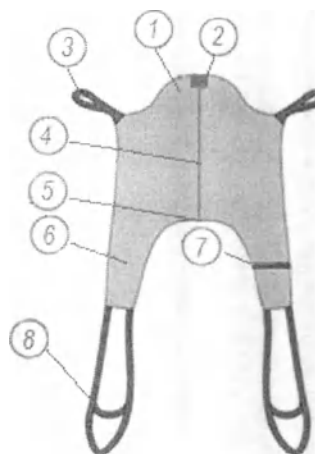



Рис. 36 - Обозначение частей Сетки универсальной, высокой

4.2.1 Подъем из положения сидя

Процедуру помещения сетки под пациента лучше выполнять вдвоем. Для удобства расположения сетки, пациент должен немного наклониться вперед и один санитар должен стоять перед пациентом, чтобы удерживать его/ее от падения вперед.




Поместите сетку между спиной пациента и спинкой кресла (см. рис. А). Следите за ярлыком (2)¹ на сетке (должен быть снаружи наверху). Ладонью руки спустите нижний край (5) сетки до колчика пациента. Подоткните нижний край (5) кончиками пальцев для удобного расположения сетки (см. рис. Б). По очереди протяните опоры для ног (6) вдоль внешних сторон бедер, поместив свою ладонь между коляской и сеткой (см. рис. В, Г). Вытягивайте опоры (6) вверх под колени между ногами пациента до их полного натяжения (см. рис. Д, Е).

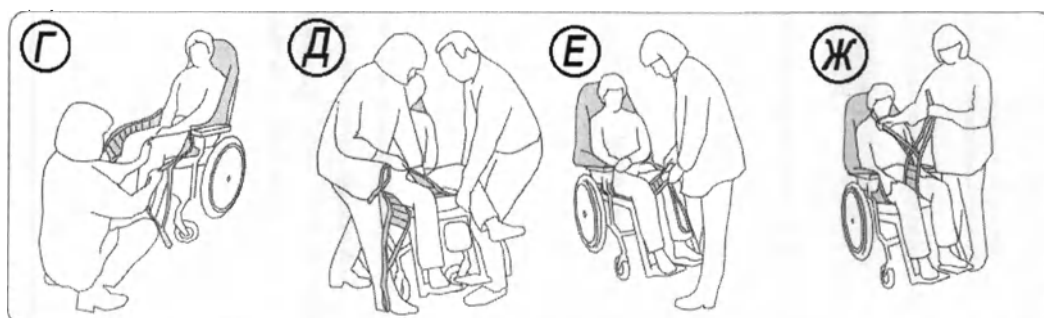

¹ См. Рис.36

Убедитесь, что материал сетки гладко лежит под бедрами и правильно проходит вокруг ног. При использовании двух- или четырехточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (8) продев одну через другую (Ж). В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (3) сетки, а затем петли опор для ног (8) (см. рис. 3, И). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух- и пункте 4.1.2 для четырехточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

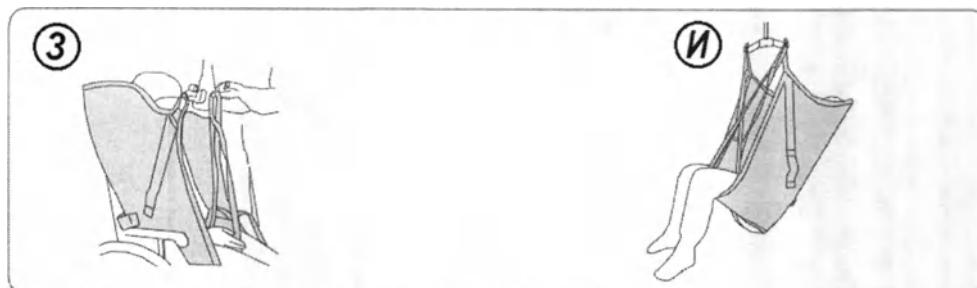


Альтернативный вариант:

При использовании трехточечного подвеса поместите петлю опоры для ног (8) в специальную петлю (7) на противоположной опоре. В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (3) сетки, а затем петли опор для ног (8). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.3. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

4.2.2 Подъем для перемещения в положение сидя (на стул/кресло-каталку/коляску)

При расположении пациента на кресло-коляску/каталку важно удобно усадить его/ее, как можно дальше до спинки сиденья.

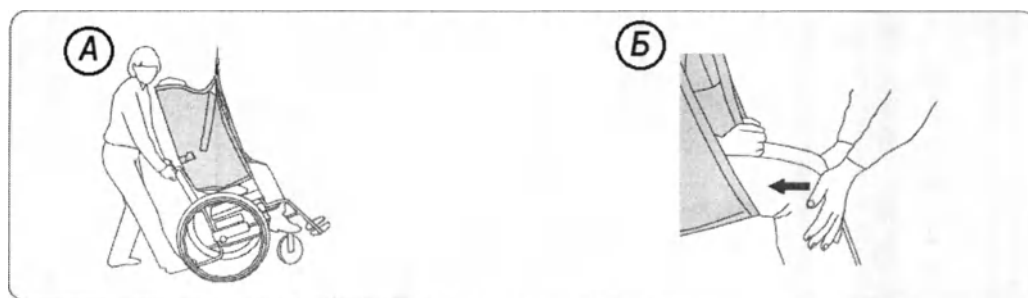


Для облегчения процесса расположения в кресле-каталке/коляске следует немного наклонить кресло назад во время спуска пациента. В конце спуска опустите нижнюю часть тела пациента на спинку сиденья, так чтобы пациент сел как можно глубже в кресло. Контролируйте положение кресла, удерживая его ногой (см. рис. А).

Альтернативный вариант:

Во время спуска слегка надавите ниже колен пациента так, чтобы нижняя часть его тела была направлена по направлению спинки сиденья (см. рис. Б)

4.2.3 Снятие сетки в положении сидя

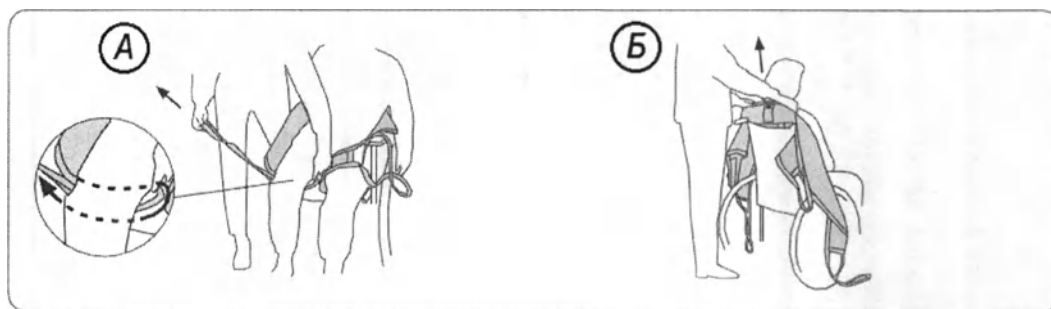


Отрегулируйте положение пациента над креслом. Опустите пациента в сетке на кресло, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног (6)² из-под бедер пациента. Самый удобный способ, это провести петлю (8) под опорой для ног (6) и вытянуть ее из-под бедра (см. рис. А). Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис. Б) Рекомендуется снимать сетку по окончании подъема/перемещения.

4.2.4 Подъем с кровати

В некоторых случаях, например, если пациент не может лежать горизонтально, сетка может быть использована на пациенте, сидящем на кровати (см. Альтернативный вариант размещения сетки ниже)

Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента. При наличии рекомендуем использовать подъемные и спусковые функции кровати.

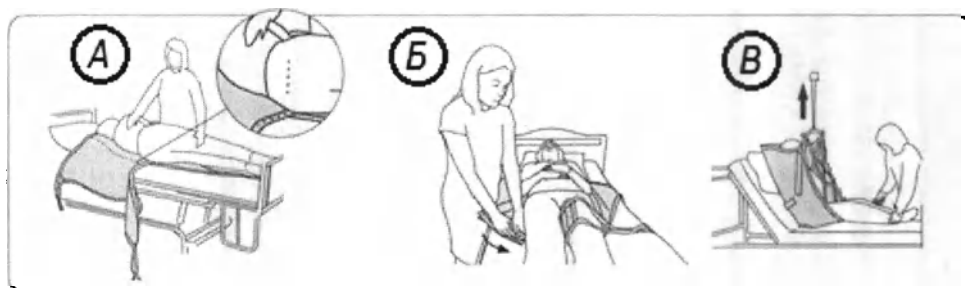

Поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Поместите нижний край сетки (5)³ так, чтобы он находился ниже копчика пациента (см. рис. А). Следите за ярлыком (2) на сетке (должен быть снаружи наверху). Сложите сетку так, чтобы ее центр (4) располагался вдоль позвоночника пациента, затем верните пациента в первоначальное положение. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны. Протащите опоры для ног (6) в соответствующее положение под бедра (см. рис. Б). Легче всего это сделать, просовывая их ладонями под бедрами пациента. Убедитесь, что материя гладкая под бедрами, и она правильно проходит вокруг ног. При использовании двух- или четырехточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (8) продев одну через другую. При использовании трехточечного подвеса поместите петлю опоры для ног (8) в специальную петлю (7) на противоположной опоре. Положите под голову

² См. Рис.36

³ См. Рис.36

пациента маленькую подушку или поднимите верхнюю часть кровати, если это позволяет конструкция кровати (см. рис. В). В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (3) сетки, а затем петли опор для ног (8). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух-, пункте 4.1.2 для четырех- и пункте 4.1.3 для трехточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

Альтернативный вариант:

Поднимите спинку кровати позади пациента. Поместите сетку между спиной пациента и спинкой кровати. Следите за ярлыком (2) на сетке (должен быть снаружи наверху). Ладонью руки спустите нижний край (5) сетки до копчика пациента. Подоткните нижний край (5) кончиками пальцев для удобного расположения сетки. Протащите опоры для ног (6) в соответствующее положение под бедра. Легче всего это сделать, просовывая их ладонями под бедрами пациента. Убедитесь, что материя гладкая под бедрами, и она правильно проходит вокруг ног. При использовании двух- или четырехточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (8) продев одну через другую. При использовании трехточечного подвеса поместите петлю опоры для ног (8) в специальную петлю (7) на противоположной опоре. В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (3) сетки, а затем петли опор для ног (8). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух-, пункте 4.1.2 для четырех- и пункте 4.1.3 для трехточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.


4.2.5 Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати




Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис. А). Опустите пациента в сетке на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног из-под бедер пациента (6)⁴. Самый удобный способ, это провести петлю (8) под опорой для ног и вытянуть ее из-под бедра (см. рис. Б). Легче это сделать, если колени согнуты. Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис В). Рекомендуется снимать сетку по окончании подъема/перемещения.

⁴ См. Рис.36

4.2.6 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати

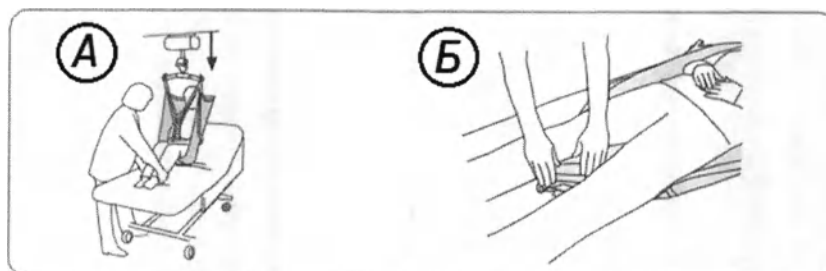

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис. А). Опустите пациента в сетке на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поместите петли опор для ног (8)⁵ под опоры (6) между бедрами пациента (см. рис. Б).

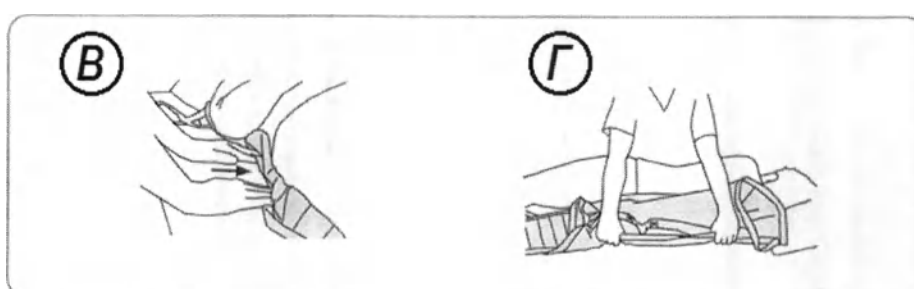

Возьмитесь за край сетки. Протолкните край сетки как можно дальше под пациента (см. рис. В). Осторожно поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Возьмитесь за сетку снизу и аккуратно вытяните ее из-под пациента (см. рис. Г).

Альтернативный вариант:

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение. Опустите пациента в сетке на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытащите сетку.

4.3 Сетка специальная

Сетка специальная снабжена одной неразделенной опорой для ног, для лучшей поддержки бедренных костей и спины. Это означает, что их можно использовать, только когда пациент лежит. Форма и материалы сетки обеспечивает максимальное удобство для пациента, предотвращает накопление тепла между телом и сеткой. Можно применять для длительного нахождения в сетке, а также использовать для пациентов с проблемами нижних конечностей. Данные сетки разработаны для всех вариантов двух- и четырехточечного подвеса на распорки.

⁵ См. Рис.36

- 1- Ярлык
- 2- Верхние петли
- 3- Центр сетки
- 4- Центральный ремень для спины
- 5- Нижний край
- 6- Опора для ног
- 7- Петли опоры для ног


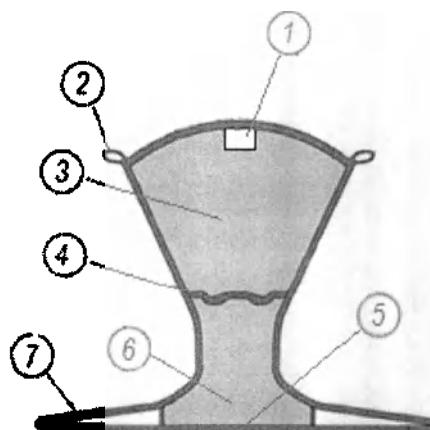


Рис.37 – Обозначение частей Сетки специальной, высокой

4.3.1 Подъем с кровати

Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента. При наличии рекомендуем использовать подъемные и спусковые функции кровати.

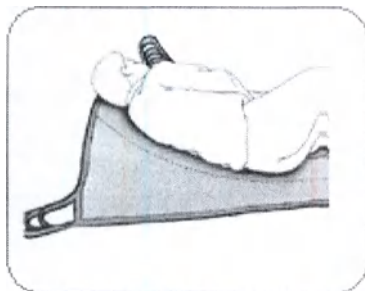

Поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Поместите нижний край сетки (5)⁶ так, чтобы он находился под коленями пациента. Следите за ярлыком (1) на сетке (должен быть снаружи наверху). Сложите сетку так, чтобы ее центр (3) располагался вдоль позвоночника пациента (см. рисунок), затем верните пациента в первоначальное положение. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны.

Поднимите верхнюю часть кровати, если это позволяет конструкция кровати. В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (2) сетки, а затем петли опор для ног (7). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух- и пункте 4.1.2 для четырехточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

4.3.2 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение. Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытащите сетку.

4.4 Сетка специальная «Н»

Сетка специальная «Н» оснащена подголовником для дополнительной поддержки шеи. Отсутствие элементов жесткости, предотвращают образование пролежней при длительной эксплуатации. Сетки этой модели используются для перемещения людей в формованные сидения и узкие кресла-каталки/коляски.

⁶ См. Рис.37

Данные сетки разработаны для всех вариантов двух- и трехточечного подвеса на распорки.

- 1- Подголовник
- 2- Ярлык
- 3- Петли подголовника
- 4- Нижний край
- 5- Ручка
- 6- Средние петли
- 7- Опоры для ног
- 8- Специальная петля
- 9- Петли опор для ног


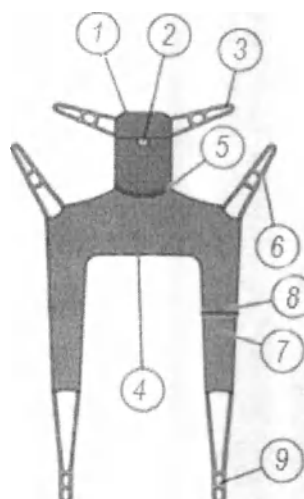


Рис. 38 Обозначение частей Сетки специальной «Н», высокой


4.4.1 Подъем из положения сидя

Процедуру помещения сетки под пациента лучше выполнять вдвоем. Для удобства расположения сетки пациент должен немного наклониться вперед и один санитар должен стоять перед пациентом, чтобы удерживать его/ее от падения вперед.

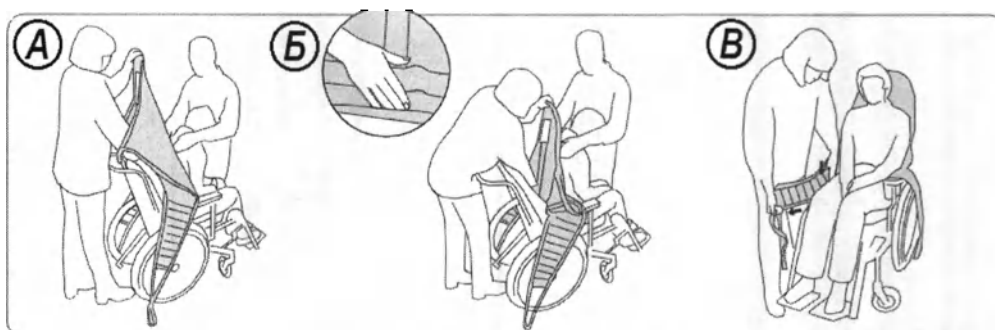


Поместите сетку между спиной пациента и спинкой кресла (см. рис. А). Следите за ярлыком (2)⁷ на сетке (должен быть снаружи наверху). Ладонью руки спустите нижний край (4) сетки до копчика пациента. Подоткните нижний край (4) кончиками пальцев для удобного расположения сетки (см. рис. Б). По очереди протяните опоры для ног (7) вдоль внешних сторон бедер, поместив свою ладонь между коляской и сеткой (см. рис. В, Г). Вытягивайте опоры (7) вверх под колени между ногами пациента до их полного натяжения (см. рис. Д, Е).

⁷ См. Рис. 38

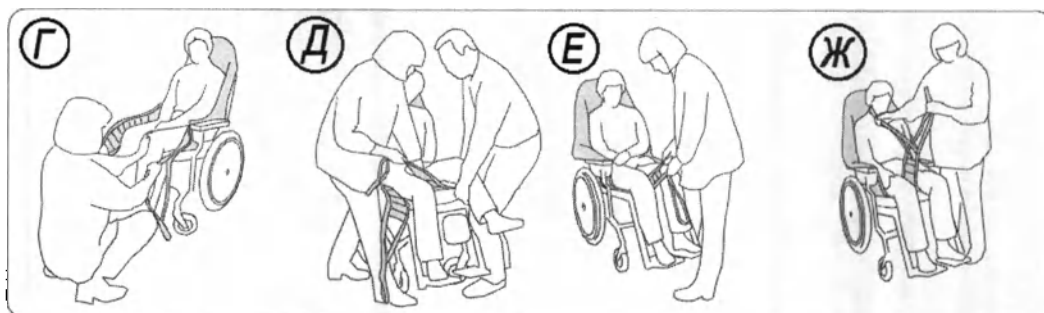

Убедитесь, что материал сетки гладко лежит под бедрами и правильно проходит вокруг ног. При использовании двухточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (9) продев одну через другую (см. рис. Ж). Все петли равномерно (правые на правую, левые на левую) распределяются на две точки подвеса (см. рис. 3, И). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

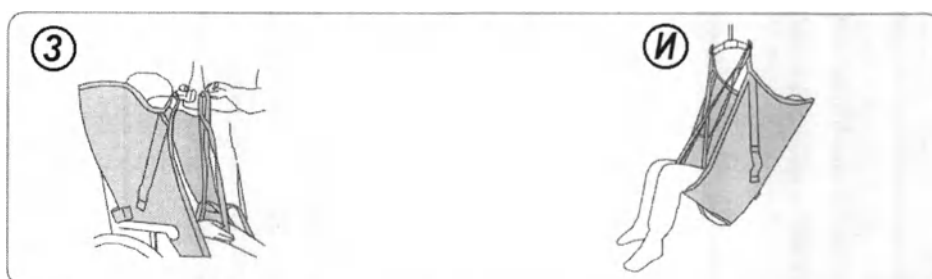


Альтернативный вариант:

При использовании трехточечного подвеса поместите петлю опоры для ног (9) в специальную петлю (8) на противоположной опоре. Присоедините петли опоры для ног (9) к крюку на Моторе Системы БМ. Далее закрепите средние петли (6) и петли подголовника (3) к двум остальным точкам подвеса. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.3. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

4.4.2 Подъем для перемещения в положение сидя (на стул/кресло-каталку/коляску)

При расположении пациента на кресло-коляску/каталку важно удобно усадить его/ее, как можно дальше до спинки сиденья.

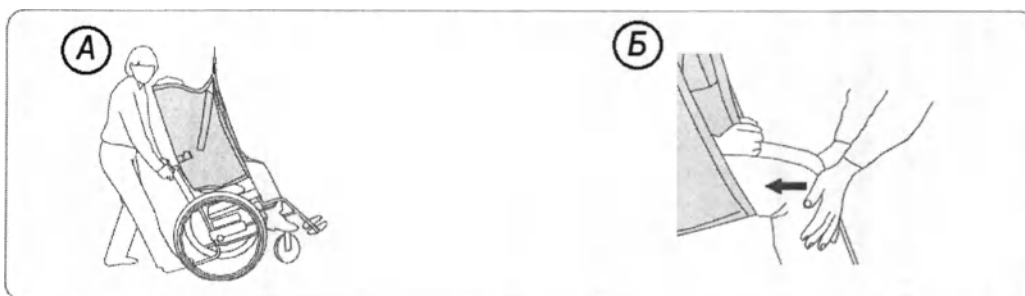


Для облегчения процесса расположения в кресле-каталке/коляске следует немного наклонить кресло назад во время спуска пациента. В конце спуска опустите нижнюю часть тела пациента на спинку сиденья, так чтобы пациент сел как можно глубже в кресло. Контролируйте положение кресла, удерживая его ногой. (см. рис. А).

Альтернативный вариант:

Во время спуска слегка надавите ниже колен пациента так, чтобы нижняя часть его тела была направлена по направлению спинки сиденья (см. рис. Б)

4.4.3 Снятие сетки в положении сидя

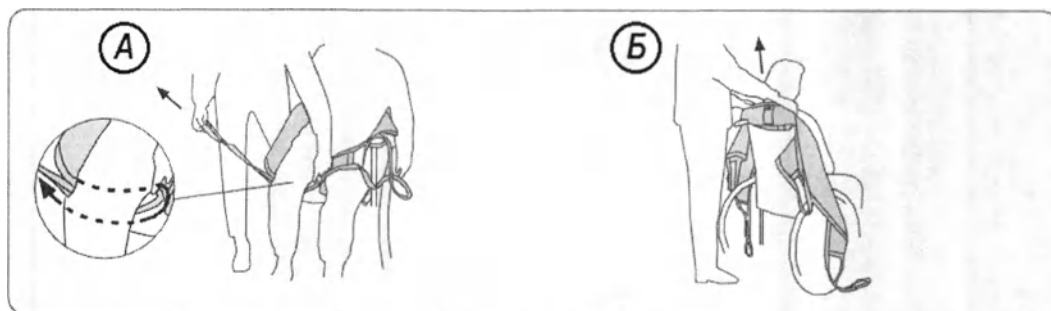


Отрегулируйте положение пациента над креслом. Опустите пациента в сетку на кресло, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног из-под бедер пациента (7)⁸. Самый удобный способ, это провести петлю (9) под опорой для ног и вытянуть ее из-под бедра (см. рис. А). Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис. Б). Рекомендуется снимать сетку по окончании подъема/перемещения.

4.4.4 Подъем с кровати

В некоторых случаях, например, если пациент не может лежать горизонтально, сетка может быть использована на пациенте, сидящем на кровати (см. Альтернативный вариант использование сетки ниже)

Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента. При наличии рекомендуем использовать подъемные и спусковые функции кровати.

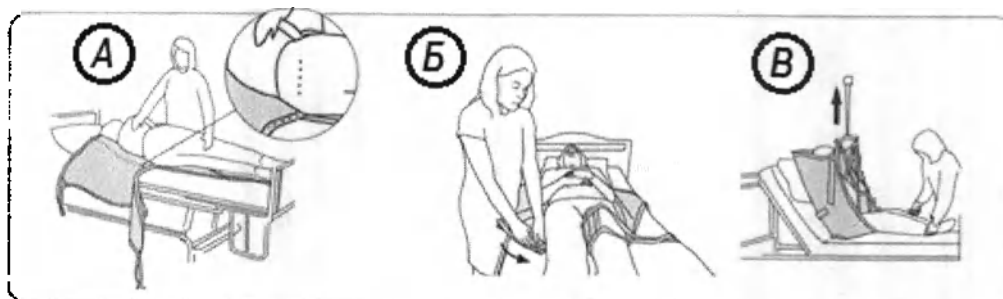

⁸ См. Рис. 38

Поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Поместите нижний край сетки (4)⁹ так, чтобы он находился ниже копчика пациента (см. рис. А). Следите за ярлыком (2) на сетке (должен быть снаружи наверху). Сложите сетку так, чтобы ее центр располагался вдоль позвоночника пациента, затем верните пациента в первоначальное положение. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны. Протащите опоры для ног (7) в соответствующее положение под бедра (см. рис. Б). Легче всего это сделать, просовывая их ладонями под бедрами пациента. Убедитесь, что материя гладкая под бедрами, и она правильно проходит вокруг ног. При использовании двухточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (9) продев одну через другую. При использовании трехточечного подвеса поместите петлю опоры для ног (9) в специальную петлю (8) на противоположной опоре. Положите под голову пациента маленькую подушку или поднимите верхнюю часть кровати, если это позволяет конструкция кровати (см. рис. В). В первую очередь закрепите петли подголовника (3) и средние петли (6) к точкам подвеса, а затем петли опор для ног (9). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух- и пункте 4.1.3 для трехточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

Альтернативный вариант:

Поднимите спинку кровати позади пациента. Поместите сетку между спиной пациента и спинкой кровати. Следите за ярлыком (2) на сетке (должен быть снаружи наверху). Ладонью руки спустите нижний край (4) сетки до копчика пациента. Подоткните нижний край (4) кончиками пальцев для удобного расположения сетки. Протащите опоры для ног (7) в соответствующее положение под бедра. Легче всего это сделать, просовывая их ладонями под бедрами пациента. Убедитесь, что материя гладкая под бедрами, и она правильно проходит вокруг ног. При использовании двухточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (9) продев одну через другую. При использовании трехточечного подвеса поместите петлю опоры для ног (9) в специальную петлю (8) на противоположной опоре. В первую очередь закрепите петли подголовника (3) и средние петли (6) к точкам подвеса, а затем петли опор для ног (9). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух- и пункте 4.1.3 для трехточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.


4.4.5 Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати




⁹ См. Рис. 38

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис. А). Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног из-под бедер пациента (7)¹⁰. Самый удобный способ, это провести петлю (9) под опорой для ног и вытянуть ее из-под бедра (см. рис. Б). Легче это сделать, если колени согнуты. Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис. В). Рекомендуется снимать сетку по окончании подъема/перемещения.

4.4.6 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати

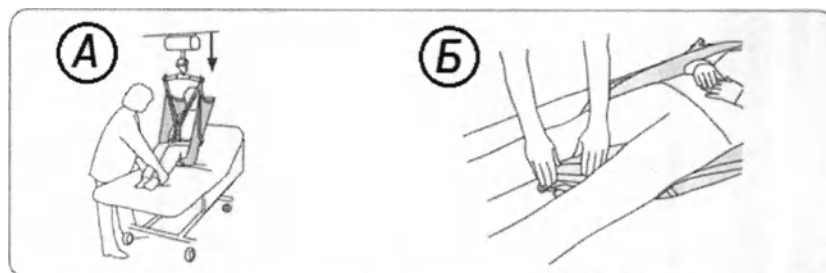

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис. А). Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поместите петли опор для ног (9)¹¹ под опоры (7) между бедрами пациента (см. рис. Б).

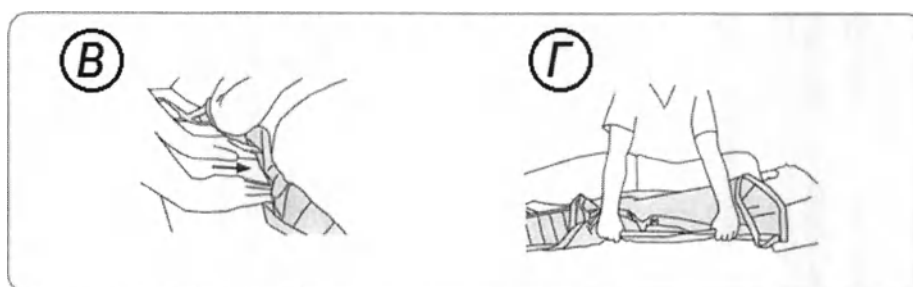

Возьмитесь за край сетки. Протолкните край сетки как можно дальше под пациента (см. рис. В). Осторожно поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Возьмитесь за сетку снизу и аккуратно вытяните ее из-под пациента (см. рис. Г).

Альтернативный вариант:

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение. Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель.

¹⁰ См. Рис. 38

¹¹ См. Рис. 38

Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытащите сетку.

4.5 Сетка для туалета

Сетка для туалета разработана в высокой и средней конфигурациях и дополнительно оборудована усиленной спинной секцией специально для перемещения пациентов в туалет. Благодаря своей форме сетка может находиться на месте на всём протяжении времени нахождения в туалете. Данные сетки разработаны для всех вариантов двухточечного подвеса на распорки.

- 1- Верхние петли
- 2- Ярлык
- 3- Опоры для ног
- 4- Петли опор для ног
- 5- Мягкий бортик
- 6- Ремень безопасности с петлями
- 7- Кольца


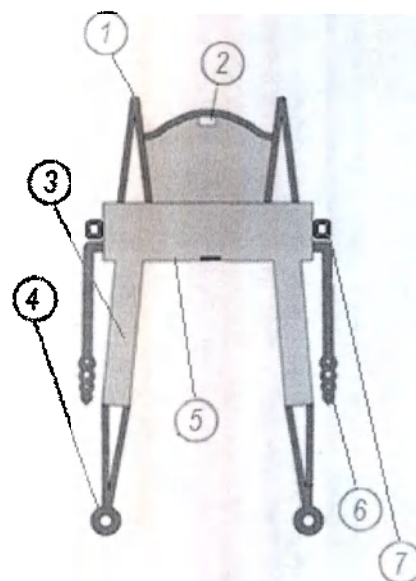


Рис. 39 – Обозначение частей сетки для туалета, высокой

4.5.1 Подъем из кресла-каталки/коляски в туалет (из положения сидя)

Процедуру помещения сетки под пациента лучше выполнять вдвоем. Для удобства расположения сетки пациент должен немного наклониться вперед и один санитар должен стоять перед пациентом, чтобы удерживать его/ее от падения вперед.

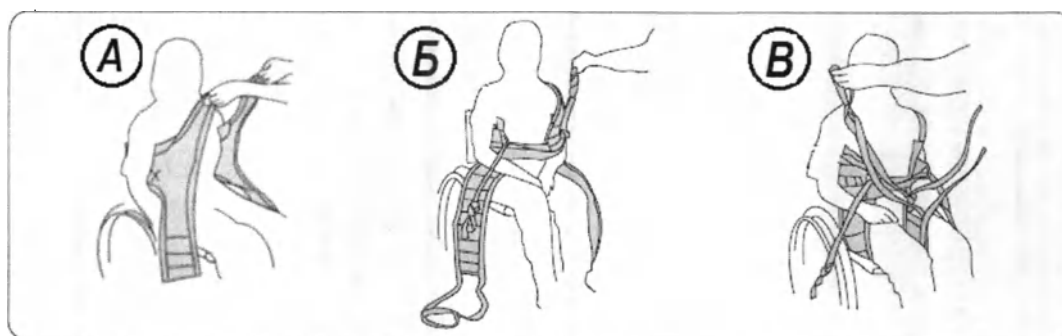


Поместите сетку между спиной пациента и спинкой кресла. Следите за ярлыком (2)¹² на сетке (должен быть снаружи наверху). Уплотненный верхний край должен быть чуть ниже подмышек. Руки должны быть снаружи сетки (см. рис. А). Перекрестите петли ремней безопасности (6) и протяните каждую из петель через кольцо (7) (см. рис Б). Убедитесь, что, петли ремней безопасности (6) достигают уровня высоты верхних петель (1). По очереди протяните опоры для ног (3) вдоль внешних сторон бедер, поместив свою ладонь между коляской и сеткой. Вытягивайте опоры вверх под колени между ногами пациента до их полного натяжения. Убедитесь, что материал сетки гладко лежит под бедрами и правильно проходит вокруг ног. При использовании двухточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (4) продев одну через другую (см. рис. В). В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (1) сетки, затем петли ремней безопасности (6) и петли опор для ног (4). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса.



Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем. Максимально стяните нижнее белье (см. рис. Г). Опустите пациента на туалет. Откиньте опоры для ног (3) и далее стяните нижнее белье для лучшего доступа (см. рис. Д).

4.5.2 Возвращение из туалета в кресло-каталку/коляску и снятие сетки в положении сидя

Ниже следует описание о том, как одеть одежду после осуществленного визита в туалет.

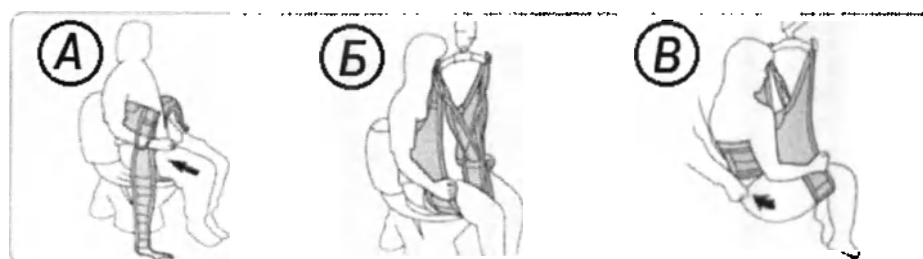


Поднимите нижнее белье, насколько это возможно (см. рис. А). Расположите опоры (3)¹³ под ногами. Руки должны быть снаружи сетки. Вначале присоедините верхние петли ремней (1) к распорке, затем петли ремней безопасности (6) и петли опор для ног (4). Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем (см. рис. Б).

¹² См. Рис. 39

¹³ См. Рис. 39


Снова оденьте нижнее белье на пациента (см. рис. В). Осуществите перемещение.

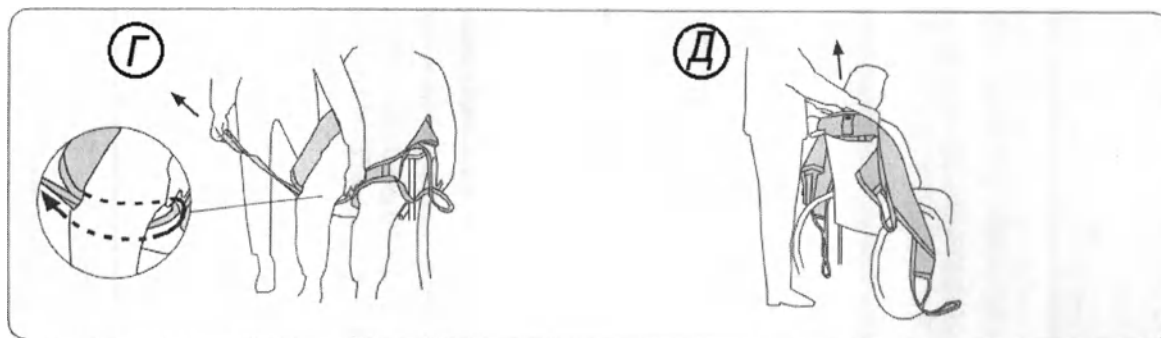

Отрегулируйте положение пациента над креслом. Опустите пациента в сетке на кресло, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног (3) из-под бедер пациента. Самый удобный способ, это провести петлю (4) под опорой для ног и вытянуть ее из-под бедра (см. рис. Г). Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис. Д).

4.5.3 Подъем с кровати в туалет

В некоторых случаях, например, если пациент не может лежать горизонтально, сетка может быть использована на пациенте, сидящем на кровати (см. Альтернативный вариант размещения сетки ниже). Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента. При наличии рекомендуем использовать подъемные и спусковые функции кровати.

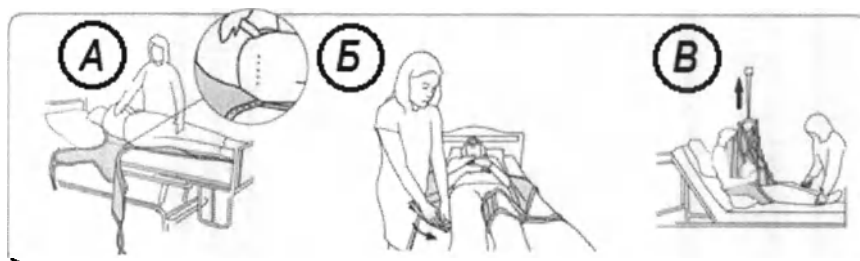

Поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Поместите уплотненный верхний край сетки так, чтобы он находился чуть ниже подмышек (см. рис. А). Следите за ярлыком (2)¹⁴ на сетке (должен быть снаружи наверху). Руки должны быть снаружи сетки. Сложите сетку так, чтобы ее центр располагался вдоль позвоночника пациента, затем верните пациента в первоначальное положение. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны. Протащите опоры для ног (3) в соответствующее положение под бедра (см. рис. Б). Легче всего это сделать, просовывая их ладонями под бедрами пациента. Убедитесь, что материя гладкая под бедрами, и она правильно проходит вокруг ног. При использовании двухточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (4) продев одну через другую. Положите под голову пациента маленькую подушку или поднимите верхнюю часть кровати, если это позволяет конструкция кровати (см. рис. В). В первую очередь закрепите верхние петли ремней (1) на распорке, а затем петли опор для ног (4). Порядок

¹⁴ См. Рис. 39

крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем. Максимально стяните нижнее белье. Опустите пациента на туалет. Откиньте опоры для ног (3) и далее стяните нижнее белье для лучшего доступа.

Альтернативный вариант:

Поместите сетку между спиной пациента и спинкой кресла. Следите за ярлыком (2) на сетке (должен быть снаружи наверху). Уплотненный верхний край должен быть чуть ниже подмышек. Руки должны быть снаружи сетки. Протащите опоры для ног (3) в соответствующее положение под бедра. Легче всего это сделать, просовывая их ладонями под бедрами пациента. Убедитесь, что материя гладкая под бедрами, и она правильно проходит вокруг ног. При использовании двухточечного подвеса, перекрестите петли опоры для ног (4) продев одну через другую. В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (1) сетки, а затем петли опор для ног (4). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем. Максимально стяните нижнее белье. Опустите пациента на туалет. Откиньте опоры для ног (3) и далее стяните нижнее белье для лучшего доступа.


4.5.4 Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати




Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис А). Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног из-под бедер пациента (3)¹⁵. Самый удобный способ, это провести петлю (4) под опорой для ног и вытянуть ее из-под бедра (см рис. Б). Легче это сделать, если колени согнуты. Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис В).

¹⁵ См. Рис. 39

4.5.5 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати

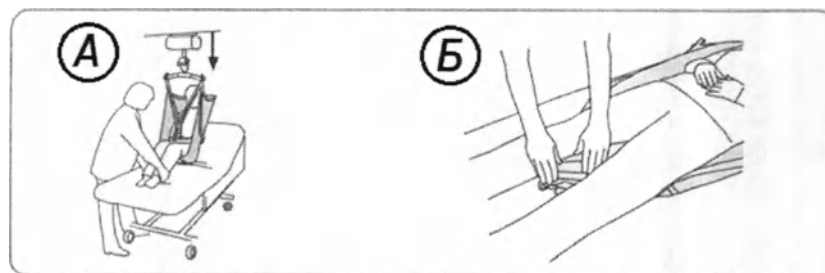

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис. А). Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поместите петли опор для ног (4)¹⁶ под опоры (3) между бедрами пациента (см. рис. Б).

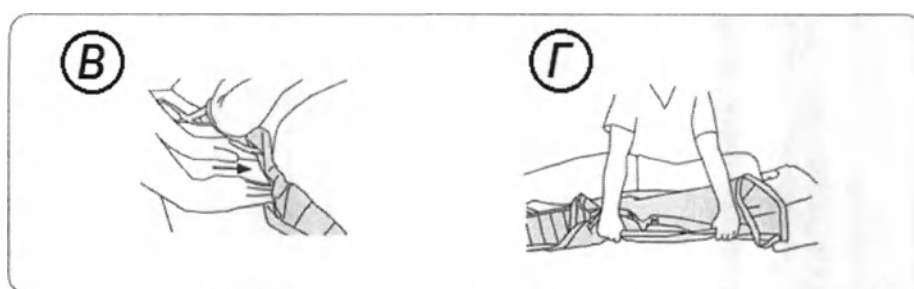

Возьмитесь за край сетки. Протолкните край сетки как можно дальше под пациента (см. рис. В). Осторожно поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Возьмитесь за сетку снизу и аккуратно вытяните ее из-под пациента (см. рис. Г).


Альтернативный вариант:

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение. Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытяните сетку.

4.5.6 Совет по использованию сеток для посещения туалета

Положение пациента зависит от того, где расположены опоры под ногами пациента. Для пациентов со слабым мышечным тонусом они должны находиться ближе к паху, чтобы он/она не сидели слишком низко в сетке (см. рис. А). Пациенты со слабым мышечным тонусом обычно лучше сидят в сетках для туалета меньшего размера. Для пациентов с высоким мышечным тонусом опоры для ног можно разместить ближе к коленам (см. рис. Б). Это облегчает процесс одевания и раздевания и помогает сократить мышечную пластичность. Для такого случая подходит большой размер сетки.

¹⁶ См. Рис. 39

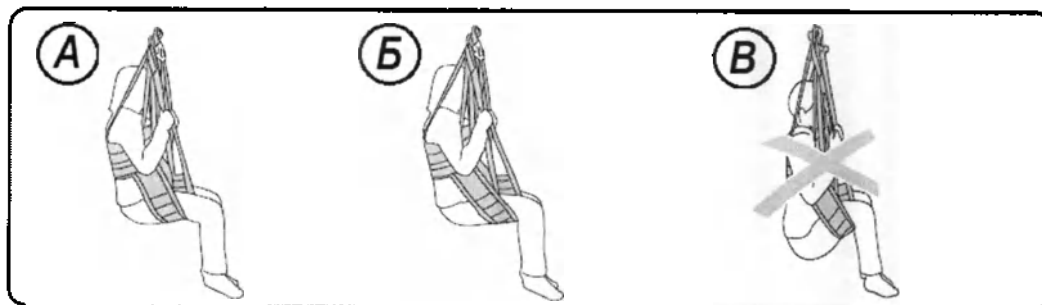

Слишком низкое и неудобное положение сидя вызвано тем, что опоры для ног находятся слишком близко к коленному сгибу, или тем, что выбрана сетка большего размера (см. рис В). Попробуйте меньший размер сетки.

4.6 Сетка для ампутантов

Сетки для ампутантов подходят для пациентов, у которых ампутированы одна либо обе ноги выше коленного сустава. Поддерживает все тело и голову (высокая) или поддерживает все тело до шеи (средняя). Могут быть изготовлены из сетчатого материала для использования в ванне/душе. Данные сетки разработаны для всех вариантов двухточечного подвеса на распорки.


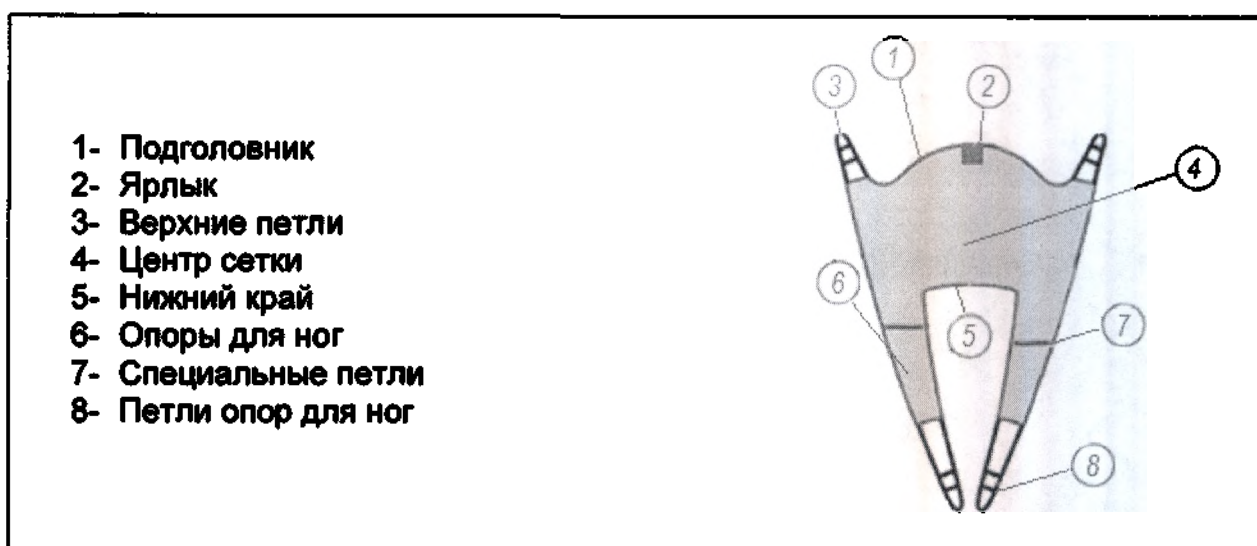



Рис. 40 – Обозначение частей сетки для ампутантов

4.6.1 Подъем из положения сидя


Процедуру помещения сетки под пациента лучше выполнять вдвоем. Для удобства расположения сетки пациент должен немного наклониться вперед и один санитар должен стоять перед пациентом, чтобы удерживать его/ее от падения вперед.

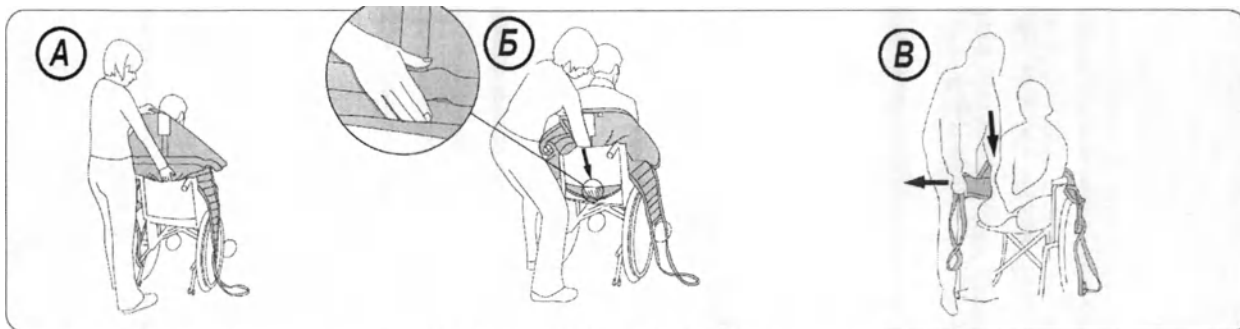

Поместите сетку между спиной пациента и спинкой кресла (см. рис. А). Следите за ярлыком (2)¹⁷ на сетке (должен быть снаружи наверху). Ладонью руки спустите нижний край (5) сетки до копчика пациента. Подоткните нижний край (5) кончиками пальцев для удобного расположения сетки (см. рис. Б).

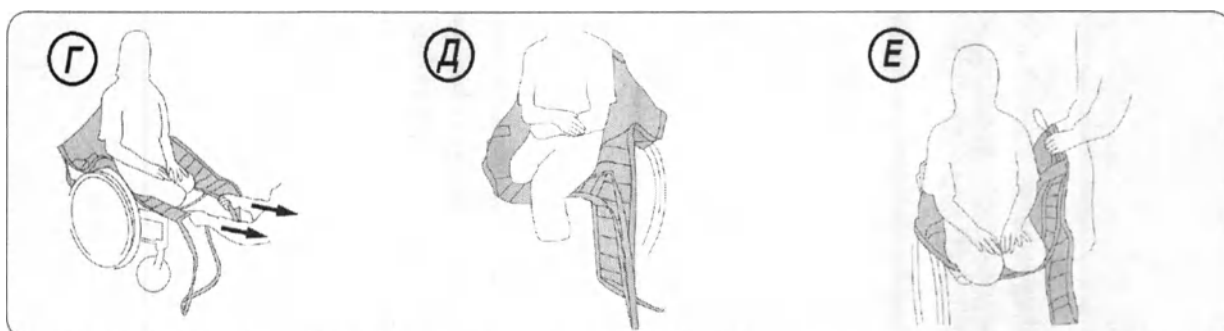

Протяните опоры для ног (6) под обеими ногами пациента так, чтобы они перекрыли друг друга (см. рис. В). Опора для ног (6) сбоку наиболее короткой ампутированной конечности должна быть расположена как можно ближе к телу. Если, например, правая нога короче, вначале необходимо установить опору для правой ноги, а затем для левой, чтобы избежать нагрузки на ампутированную конечность. Убедитесь в том, что опоры для ног (6) располагались соответствующим образом (см. рис Г, Д). Проденьте опоры для ног (6) через специальные петли (7) на внутренней и внешней стороне сетки (см. рис Е).

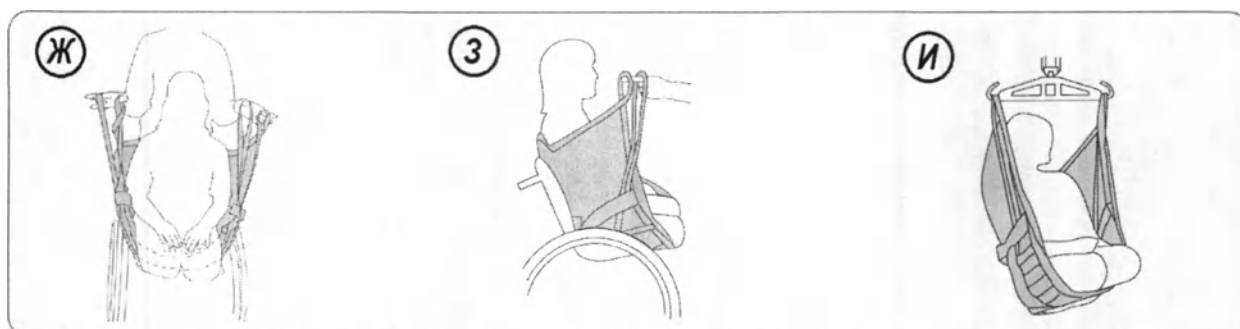

Убедитесь, что, петля опоры для ног (8) достигает уровня высоты верхних петель (3) (см рис. Ж, 3). Если это не так, отрегулируйте положение опоры для ног (6). В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (3) сетки, а затем петли опор для ног (см. рис. И) (8). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного

¹⁷ См. Рис. 40


подвеса. Перед подъемом убедитесь, что пациент сидит удобно и что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.



4.6.2 Подъем для перемещения в положение сидя (на стул/кресло-каталку/коляску)

При расположении пациента на кресло-каталку/коляску важно удобно усадить его/ее, как можно дальше до спинки сиденья. Для облегчения процесса расположения в кресле-каталке/коляске следует немного наклонить кресло назад во время спуска пациента. В конце спуска опустите нижнюю часть тела пациента на спинку сиденья, так чтобы пациент сел как можно глубже в кресло. Контролируйте положение кресла, удерживая его ногой.


4.6.3 Снятие сетки в положении сидя

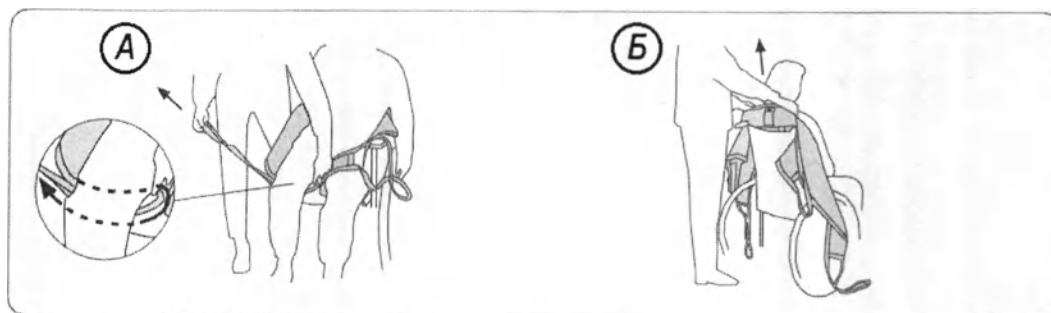

Отрегулируйте положение пациента над креслом. Опустите пациента в сетке на кресло, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног (6)¹⁸ из-под бедер пациента. Самый удобный способ, это провести петлю (8) под опорой для ног (6) и вытянуть ее из-под бедра (см. рис. А). Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис Б). Рекомендуется снимать сетку по окончании подъема/перемещения.

4.6.4 Подъем с кровати/пола

Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента. При наличии рекомендуем использовать подъемные и спусковые функции кровати. Поверните пациента по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Поместите нижний край сетки (5)¹⁹ так, чтобы он находился ниже копчика пациента (см. рис. А). Следите за ярлыком (2) на сетке (должен быть снаружи наверху). Сложите сетку так, чтобы ее центр (4) располагался вдоль позвоночника

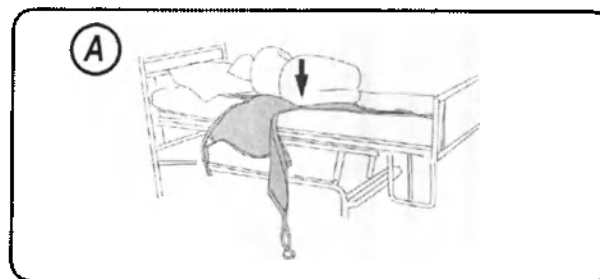


¹⁸ См. Рис. 40

¹⁹ См. Рис. 40

пациента, затем верните пациента в первоначальное положение. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны.

Протяните опоры для ног (6) под обеими ногами пациента так, чтобы они перекрыли друг друга. Опора для ног (6) сбоку наиболее короткой ампутированной конечности должна быть расположена как можно ближе к телу. Если, например, правая нога короче, вначале необходимо установить опору для правой ноги, а затем для левой, чтобы избежать нагрузки на ампутированную конечность. Убедитесь в том, что опоры для ног (6) располагались соответствующим образом. Проденьте опоры для ног (6) через специальные петли (7) на внутренней и внешней стороне сетки. Поднимите спинку кровати. Убедитесь, что, петля опоры для ног (8) достигает уровня высоты верхней петли (3) (см. рис. Б). Если это не так, отрегулируйте положение опоры для ног (6). В первую очередь на крюки подъемной распорки подвешиваются верхние петли ремней (3) сетки, а затем петли опор для ног (8). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что пациент сидит удобно и что все петли правильно и надежно зафиксированы. Проведите подъем.

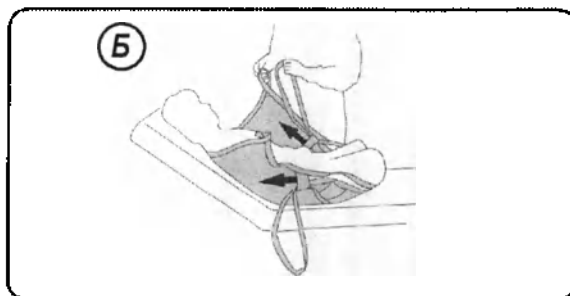


4.6.5 Снятие сетки, когда пациент сидит на кровати




Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис. А). Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Аккуратно вытащите опоры для ног из-под бедер пациента (6)²⁰. Самый удобный способ, это провести петлю (8) под опорой для ног и вытянуть ее из-под бедра (см. рис Б). Снимите сетку, осторожно вытягивая ее вверх (см. рис. В). Рекомендуется снимать сетку по окончании подъема/перемещения.

²⁰ См. Рис. 40

4.6.6 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати

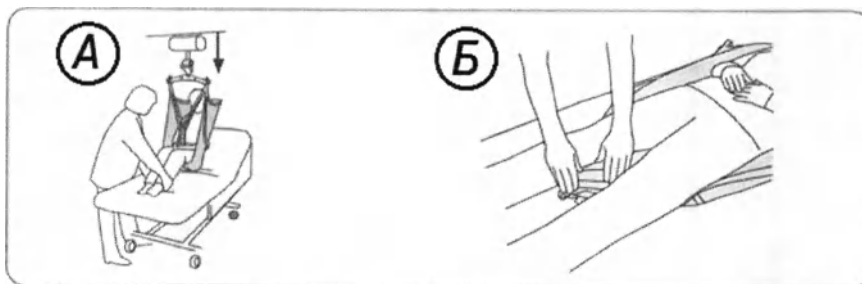

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение (см. рис А). Опустите пациента в сетке на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поместите петли опор для ног (8)²¹ под опоры (6) между бедрами пациента. (см рис. Б)

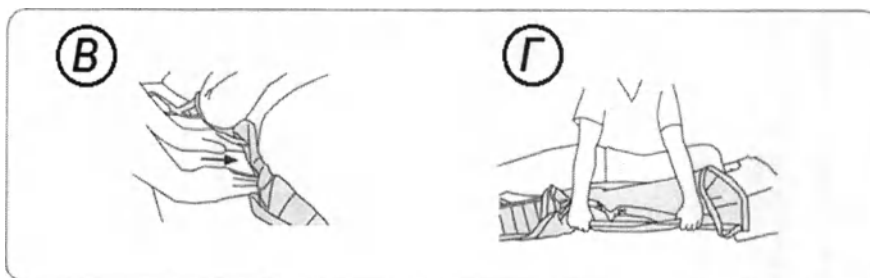

Возьмитесь за край сетки. Протолкните край сетки как можно дальше под пациента (см. рис. В). Осторожно поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Возьмитесь за сетку снизу и аккуратно вытяните ее из-под пациента (см. рис. Г).


Альтернативный вариант:

Отрегулируйте положение пациента над кроватью и поднимите спинку кровати в наиболее удобное для пациента положение. Опустите пациента в сетке на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли от крюков подъемной распорки. Опустите спинку кровати. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытащите сетку.


4.7 Сетка многофункциональная «AG»/«AL»

Сетки многофункциональные «AG»/«AL» разработаны для обеспечения полной или частичной поддержки тела при изменении положения тела или перемещении пациента. Данные сетки позволяют осуществлять подъем и изменение положения тела пациента различными способами, а именно: расположение на боку, регулировка положения сидя, снятие напряжения с ног, перемещение в кровати и подъем с пола. Так же используется для смены белья на кровати пациента, оказания ухода. Данные сетки разработаны для всех видов двух- и четырехточечного подвеса на распорки.

²¹ См. Рис. 40

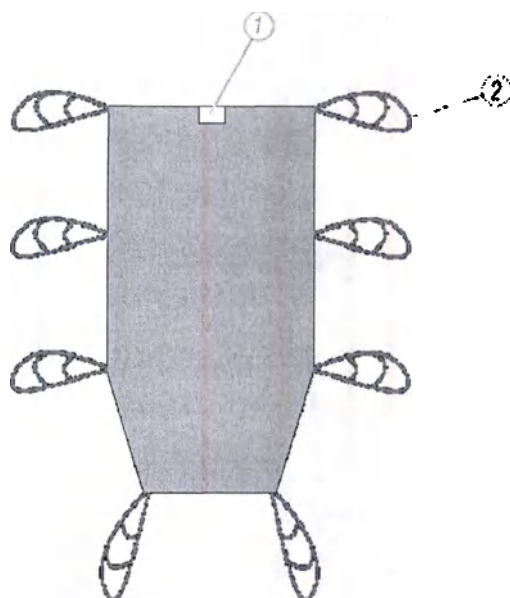

- 1- Ярлык
2- Петли

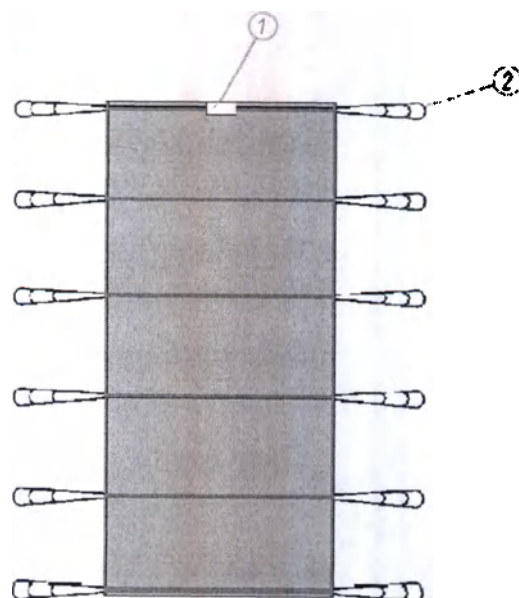


- 1- Ярлык
2- Петли

Сетка многофункциональная «AG» Сетка многофункциональная «AL»
Рис. 41 – Обозначение частей Сетки многофункциональной «AG»/«AL»

4.7.1 Подъем с кровати

Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента.

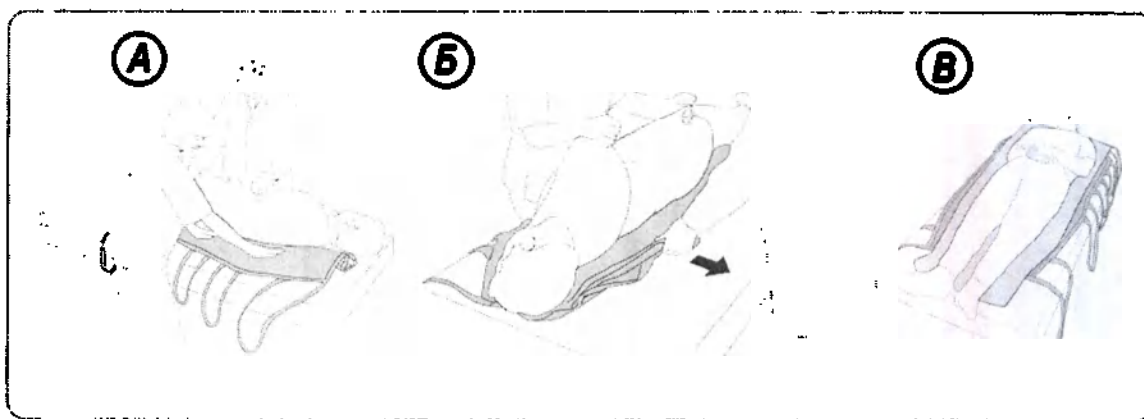

Поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Разместите сетку под пациента. Сложите сетку так, чтобы ее центр располагался вдоль позвоночника пациента (см. рис. А), затем верните пациента в первоначальное положение. Немного поверните пациента в противоположном направлении так, чтобы подъемную сетку можно было развернуть. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны (см. рис. Б). Пациент должен быть расположен по центру подъемной сетки (см. рис. В). По завершении расположения пациента в сетке, закрепите петли сетки на

соответствующие крюки распорки. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух- и пункте 4.1.2 для четырехточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Начните запланированное действие.



Для согласования иных возможных альтернативных вариантов подвеса сеток multifunctional, обратитесь к специалистам ООО «МНПК БИОМИР XXI» (см. п. 11).

4.7.2 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.

Отрегулируйте положение пациента над кроватью. Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли сетки от крюков подъемной распорки. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытащите сетку.

4.8 Сетка смены положения «AG2»

- 1- Петли
- 2- Ярлык



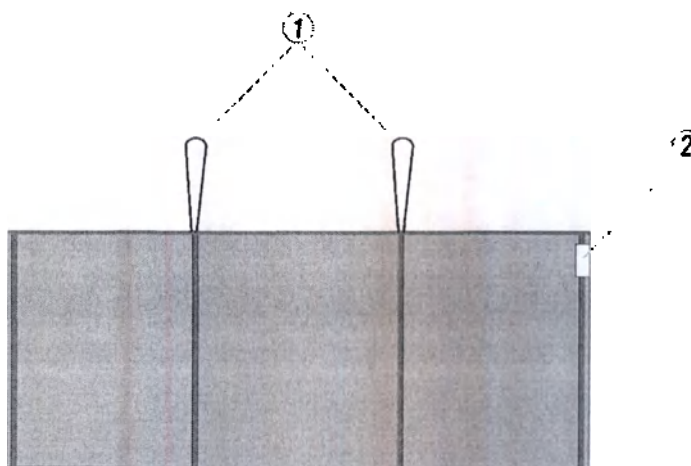


Рис. 41 Обозначение частей сетки смены положения «AG2»

Сетка смены положения предназначена для переворачивания и длительной фиксации пациента в нужном положении. Могут использоваться во время операций. Данные сетки разработаны для всех вариантов двухточечного подвеса на распорки.

4.8.1 Размещение сетки под пациентом

Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента.

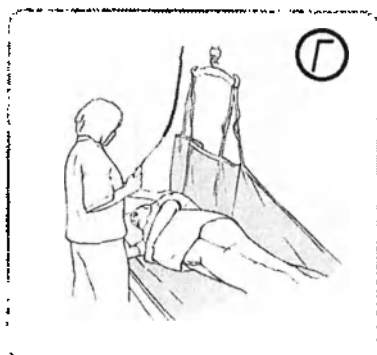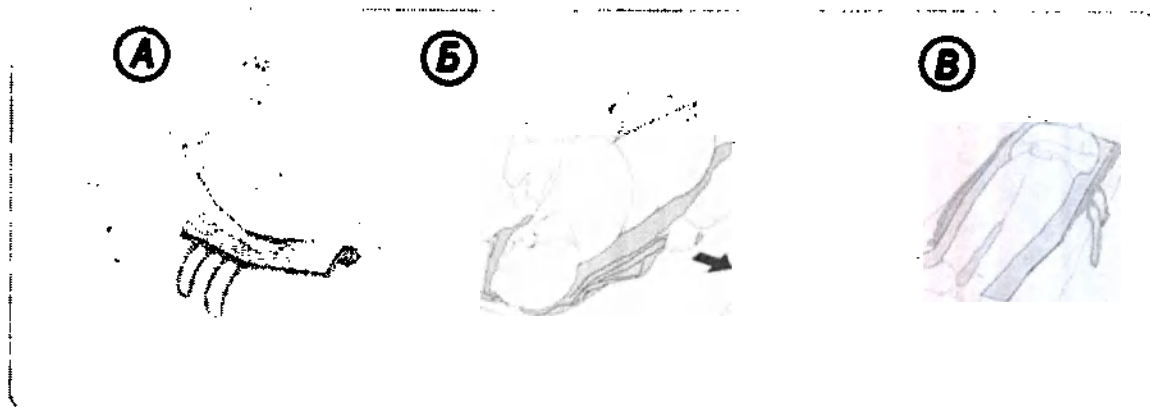

Поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Разместите сетку под пациента. Сложите сетку так, чтобы ее центр располагался вдоль позвоночника пациента (см. рис. А), затем верните пациента в первоначальное положение. Немного поверните пациента в противоположном направлении так, чтобы подъемную сетку можно было развернуть. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны (см. рис. Б). Пациент должен быть расположен по центру подъемной сетки (см. рис. В).


По завершении расположения пациента в сетке, закрепите петли сетки на соответствующие крюки распорки. Начните запланированное действие (см. рис. Г).

4.8.2 Удаление сетки из-под пациента

Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли сетки от крюков подъемной распорки. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытащите сетку.


4.9 Сетка горизонтальная «AG1»/«BG»

Сетка горизонтальные «AG1»/«BG» предназначены для перемещения пациентов в горизонтальном положении в тех случаях, когда не требуется абсолютная ровная подъемная поверхность. Могут использоваться в хирургических палатах, а также в блоках интенсивной терапии и рентгенологических отделениях.

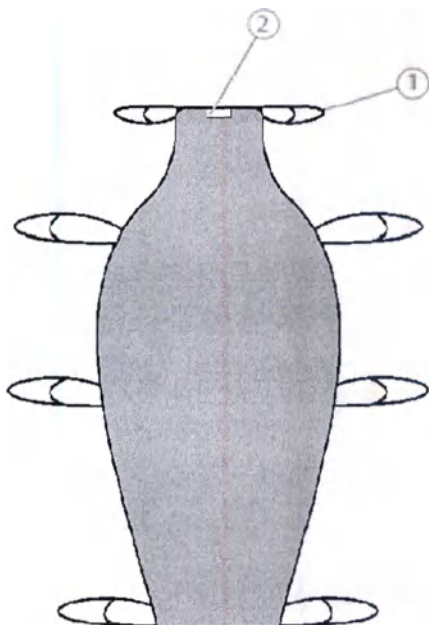

1. Петли/ремни
2. Ярлык

Сетка горизонтальная «AG1»

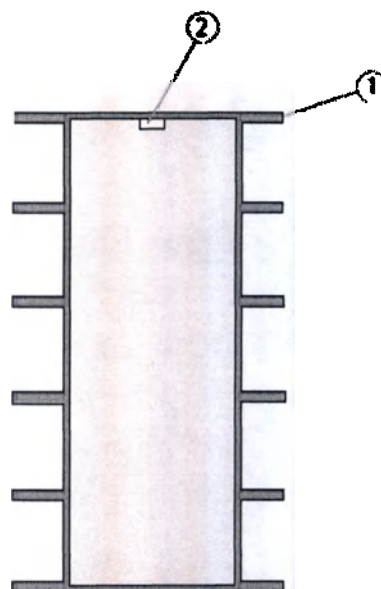

1. Петли/ремни
2. Ярлык

Сетка горизонтальная «BG»

Рис. 42 Обозначение частей Сетки горизонтальной «AG1»/ «BG»

4.9.1 Подъем с кровати/пола




При использовании сеток горизонтальных следует применять распорку для горизонтального перемещения пациента. Данные принадлежности используются только вместе и не могут использоваться по отдельности.

Крепление сетки «AG1» к распорке горизонтального перемещения «А» осуществляется при помощи петель, расположенных на сетке к крюкам, расположенным на распорке горизонтального перемещения «А» и только после расположения пациента на поверхности сетки.

Крепление сетки «BG» к распорке горизонтального перемещения «В» осуществляется при помощи лент, расположенных на сетке к замкам, расположенным на распорке горизонтального перемещения «В» и только после расположения пациента на поверхности сетки. Так же к сеткам «BG» в комплект идут съемные ребра жесткости.

Следует обратить внимание на свое рабочее положение и удобство пациента. Ниже описан способ расположения пациента в сетке и крепления сеток к распоркам горизонтального перемещения.

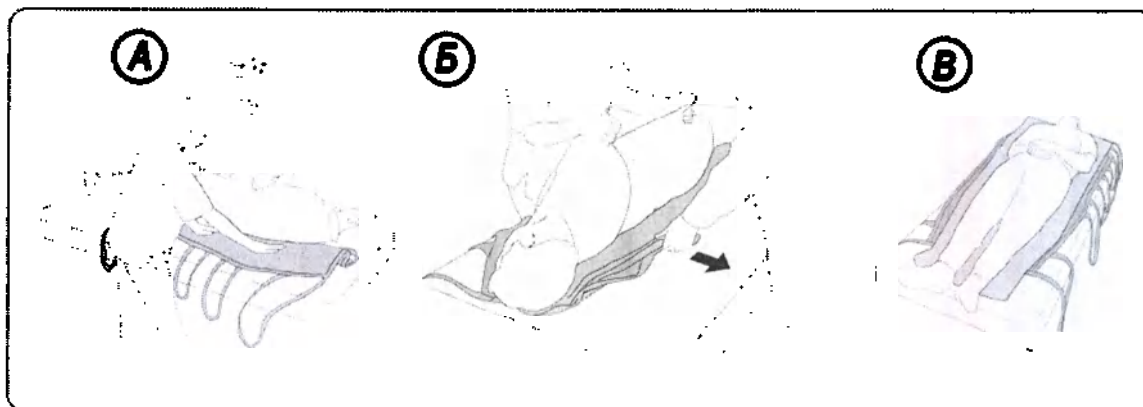

Поверните пациента на бок по направлению к себе для предотвращения риска его падения с кровати. Разместите сетку под пациента. Сложите сетку так, чтобы ее центр располагался вдоль позвоночника пациента (см. рис. А), затем верните пациента в первоначальное положение. Немного поверните пациента в противоположном направлении так, чтобы подъемную сетку можно было развернуть. Аккуратно вытяните сетку с противоположной стороны (см. рис. Б). Пациент должен быть расположен по центру подъемной сетки (см. рис. В). Пациент расположен на сетке для перемещения в горизонтальном положении. По завершении расположения пациента в сетке, подведите над пациентом распорку для горизонтального перемещения «А»/«В» и закрепите петли/ремни сетки на соответствующие крюки/замки распорки. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.4 для многоточечного подвеса. Плавное поднимите пациента, находящегося в сетке на необходимую высоту для перемещения, при подъеме проверяйте положение тела пациента и натяжение крепежных петель/лент сетки. По завершении подъема на необходимую высоту для перемещения и проверки петель/лент, пациента можно перемещать.

4.9.2 Снятие сетки, когда пациент лежит на кровати.

Отрегулируйте положение пациента над кроватью. Опустите пациента в сетку на кровать, опускать следует до момента, пока не ослабнет натяжение петель. Отсоедините петли/ремни сетки от крюков/замков подъемной распорки. Поверните пациента на бок. Соберите сетку за его спиной, осторожно поверните пациента на другую сторону, и вытащите сетку.

4.10 Жилет «G»

- 1- Передние регулируемые ремни
- 2- Задние поддерживающие ремни
- 3- Плечевые ремни
- 4- Ярлык
- 5- Кольца
- 6- Съёмные ремни для ног

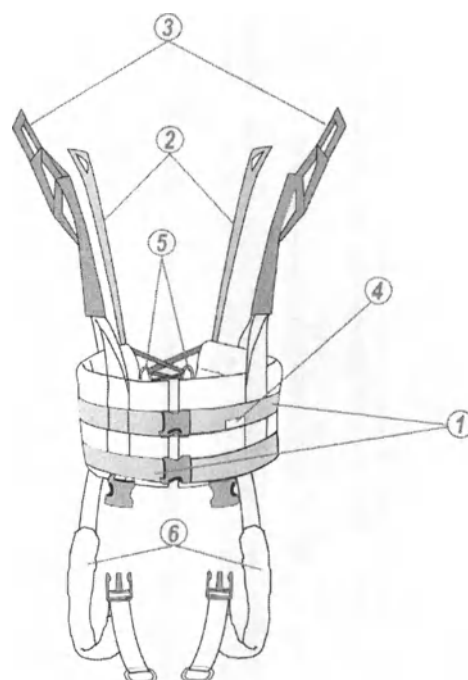


Рис.42 – Обозначение частей Жилета «G»

Жилет «G» - это универсальный жилет для различных целей, например, помощь при вставании, хождении и выполнении упражнений, в том числе в бассейне. Применение жилета требует от пациента способность частично удерживать свой вес. Обеспечивает поддержку в районе груди и плеч. Съёмные ремни для ног обеспечивают поддержку всей области тазобедренного сустава и предотвращают выскальзывание из жилета. Данные жилеты разработаны для всех вариантов двух-, и четырехточечного подвеса на распорки.

4.10.1 Размещение пациента в жилете

Жилет оснащен двумя регулируемыми ремнями (1)²² спереди, двумя поддерживающими ремнями (2) сзади и двумя плечевыми ремнями (3). Наденьте жилет спереди, проденьте руки пациента сквозь плечевые ремни (3). Перекрестите петли поддерживающих ремней (2) на спине и протяните каждую из петель через кольцо (5) с противоположной стороны. Поместив распорку позади пациента закрепите поддерживающие ремни (2) и плечевые ремни (3) на крюках распорки. Затяните регулируемые ремни (1). Для обеспечения мер повышенной безопасности съёмные ремни для ног (6) используются для того, чтобы пациент не выскальзывал из жилета. Порядок крепления петель жилета к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух-, и пункте 4.1.2 для четырехточечного подвеса.

4.10.2 Снятие жилета

Опустите пациента на стул/кровать. Отстегните съёмные ремни для ног (6)²³. Расстегните жилет. Снимите петли жилета с распорки.

²² См. Рис. 42

²³ См. Рис. 42

4.11 Жилет «Н»

- 1- Передние ремни
- 2- Задние ремни
- 3- Ярлык
- 4- Эластичный бондаж
- 5- Нагрудный ремень
- 6- Поддержка паховой области

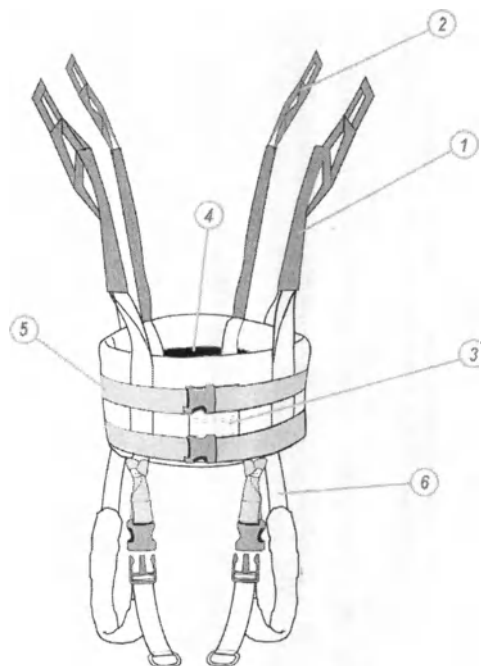


Рис. 43. Обозначение частей жилета «Н»

Жилеты оснащены четырьмя ремнями для подвеса с петлями, по два спереди и два сзади. Требуемое количество точек подвеса жилета определяется индивидуально для каждого пациента, в зависимости от состояния пациента и предполагаемого использования жилета. Основные способы применения жилетов: проведение гигиенических или водных процедур, одевание/раздевание и выполнение упражнений. Примите во внимание, что пациент должен иметь хотя бы частичную способность опираться на свои ноги для использования жилета. Данные жилеты разработаны для всех вариантов двух-, трех- и четырехточечного подвеса на распорки.

4.11.1 Размещение пациента в жилете




Поместите жилет вокруг пояса пациента (см. рисунок). Проденьте эластичный бандаж (4)²⁴ через петли на внутренней стороне жилета. Застегните эластичный бандаж вокруг груди пациента и затяните нагрудный ремень (5). Застегните застежки жилета на нагрудном ремне (5). Это можно сделать, когда пациент находится в лежачем положении или, когда он сидит. Чем туже стянут жилет вокруг груди пациента, тем более устойчив жилет во время подъема и удерживания пациента. Для обеспечения мер повышенной безопасности к нагрудному ремню можно прикрепить поддержку паховой области (6). Такая поддержка также удерживает на месте нагрудный пояс, предотвращая его соскальзывание. Закрепите передние (1) и задние (2) ремни жилета на крюках подъемной распорки. При подвесе жилета на все четыре ремня пациент будет находиться в вертикальном положении. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двух-, пункте 4.1.2 для четырех- и пункте 4.1.3 для трехточечного подвеса.

4.11.2 Снятие жилета

Опустите пациента на стул/кровать. Отстегните ремни поддержки паховой области. Расстегните жилет, расстегните бандаж. Снимите петли жилета с распорки.

²⁴ См. Рис. 43

4.11.3 Выполнение упражнений в жилете

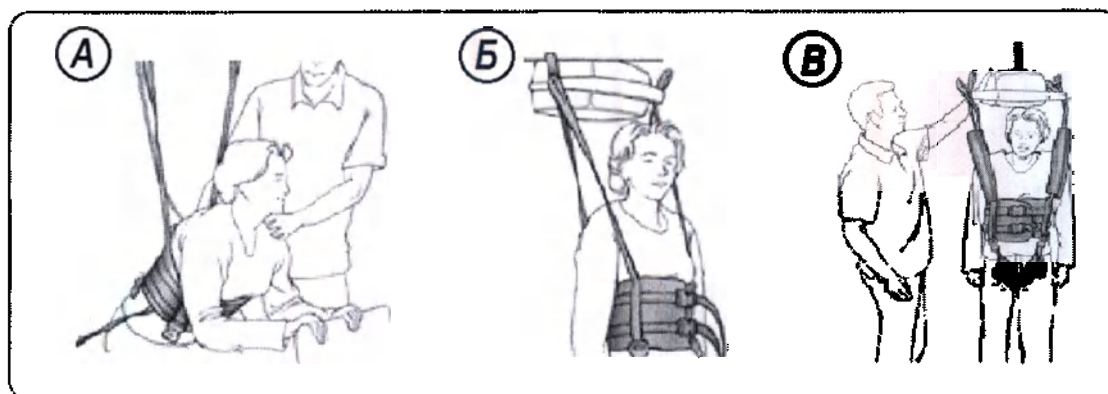

Жилет может использоваться как поддержка пациента во время тренировок ходьбы, обучению стоять и упражнений на баланс. При использовании только задних ремней для подвеса пациент будет наклонен вперед (см. рис. А). При использовании всех четырех ремней пациент будет удерживаться жилетом в вертикальном положении (см. рис. Б). Передние ремни могут быть подвешены либо на те же крюки подъемной распорки, что и задние ремни, либо, если подъемник оборудован тремя крюками для подвеса, задние ремни подвешиваются на крюк на Моторе Системы БМ. Для большей безопасности и удобства пациента можно использовать ремни для ног вместе с жилетом (см. рис. В). Ремни для ног предотвращают выскальзывание пациента из жилета.

4.12 Жилет «Н», детский

- 1- Поддерживающие ремни
- 2- Ярлык
- 3- Верхняя кромка жилета



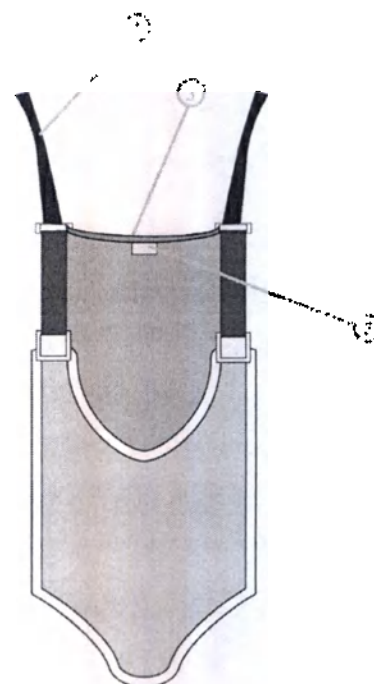


Рис. 44 – Обозначение частей жилета «Н», детского

Жилет «Н», детский оснащен поддержкой для шеи и плеч и эластичными ремнями по бокам для обеспечения максимальной маневренности для подъема и поддержки пациента при обучении навыкам ходьбы. Жилет дает возможность вертикализации пациента и позволяет использовать его с целью физической тренировки способности стоять, ходить, удерживать равновесие, поворачиваться

кругом (в зависимости от индивидуальных возможностей пациента). Жилеты доступны в пяти размерах J, JS, JM, S, M. Данные жилеты разработаны для двухточечного подвеса на распорку.

4.12.1 Размещение пациента в жилете

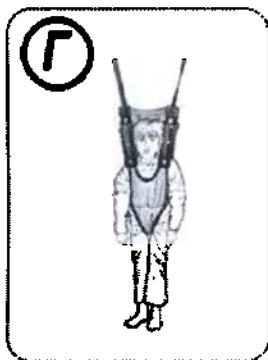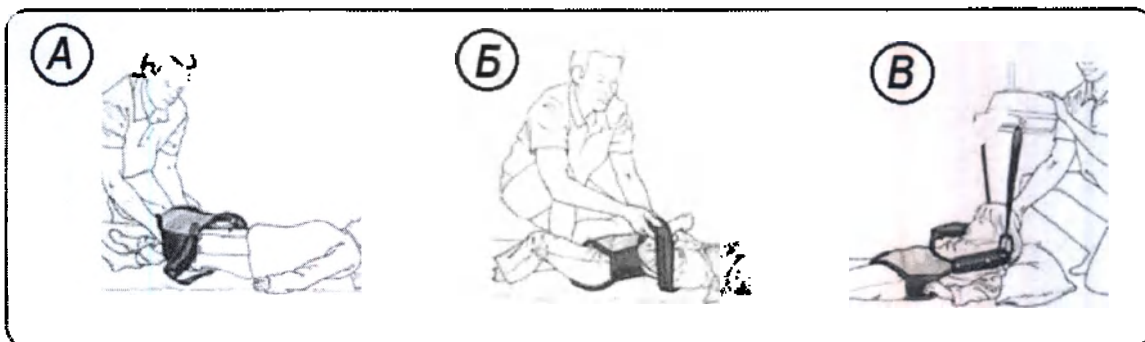

Детский жилет размещается на ребенке, когда тот находится в лежачем положении. Оденьте жилет через ноги ребенка (см. рис А). Поместите руки ребенка в боковые отверстия. Подтяните жилет вверх за спиной, насколько это возможно (см. рис Б). Закрепите ремни на крюках распорки. Поднимите ребенка в вертикальное положение. Придерживайте голову ребенка одной рукой, пока жилет полностью не расправится (см. рис В). Когда ребенок находится в вертикальном положении, верхняя кромка жилета должна находиться выше уровня головы (см рис. Г). Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса.

4.12.2 Снятие жилета

Опустите ребенка в горизонтальное положение. Отцепите петли от распорки. Снимите жилет через ноги ребенка.

4.13 Лента смены положения широкая

- 1- Петли
- 2- Ярлык
- 3- Центральный ремень с липучкой

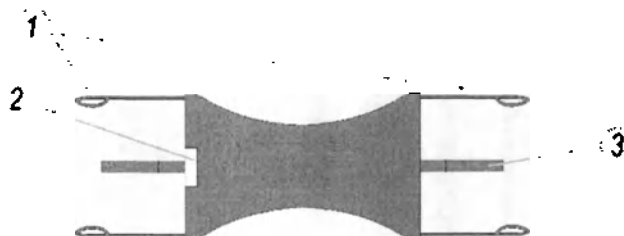


Рис. 45 – Обозначение частей Ленты смены положения широкой

Лента смены положения широкая позволяет переворачивать пациента в обе стороны, не снимая самой Ленты. Небольшая площадь поверхности материала Ленты позволяет получить доступ к коже пациента при обследовании,

лечении и уходе. Данные Ленты разработаны для всех видов двухточечного подвеса на распорки.

4.13.1 Размещение ленты под пациентом

Сложите две петли под полотном ленты во избежание повреждения кожи пациента. Протяните ленту под поясицей пациента используя центральный ремень. Закрепите ремень используя липучку на раме кровати на той стороне, на которую пациент будет повернут. Закрепите петли ленты на соответствующие крюки распорки. Поверните пациента. Для поворота пациента на другой бок произведите все описанные действия используя другую сторону ленты. Убедитесь, что при помещении ленты под пациента и при ее удалении не происходит трения материала сетки о кожу пациента. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса.

4.13.2 Удаление ленты из-под пациента

Отсоедините петли ленты от крюков подъемной распорки. Вытяните ленту, из-под пациента.

4.14 Лента смены положения узкая

- 1- Петли
- 2- Ярлык
- 3- Центральный ремень

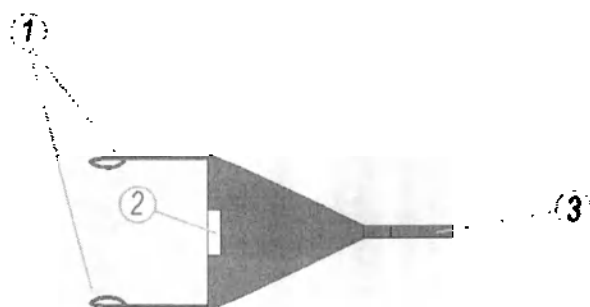


Рис. 46 – Обозначение частей ленты смены положения узкой

Лента смены положения узкая позволяет переворачивать пациента. Небольшая площадь поверхности материала Ленты позволяет получить доступ к коже пациента при обследовании, лечении и уходе. Данные ленты разработаны для всех вариантов двухточечного подвеса на распорки.

4.14.1 Размещение ленты под пациентом

Протяните ленту под поясицей пациента используя центральный ремень. Закрепите ремень используя липучку на раме кровати. Закрепите петли ленты на соответствующие крюки распорки. Поверните пациента. Убедитесь, что при помещении ленты под пациента и при ее удалении не происходит трения материала сетки о кожу пациента. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в пункте 4.1.1 для двухточечного подвеса.

4.14.2 Удаление ленты из-под пациента

Отсоедините петли ленты от крюков подъемной распорки. Вытяните ленту, из-под пациента.

4.15 Лента поддерживающая широкая

- 1- Петли
- 2- Ярлык

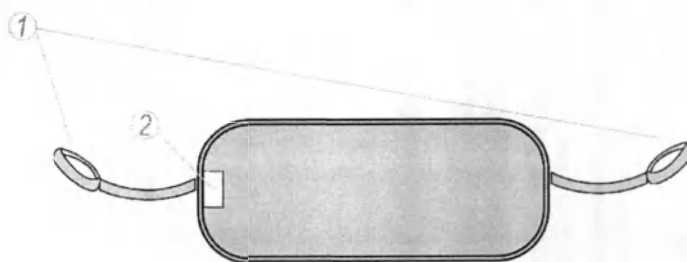


Рис. 47 – Обозначение частей ленты поддерживающей широкой

Лента поддерживающая широкая используется, когда необходимо поднимать и поддерживать определенную часть тела пациента (плечи, ноги, пояс и пр.). Так же используется для проведения гигиенических процедур. Данные ленты разработаны для всех вариантов двухточечного подвеса на распорки.

4.15.1 Размещение ленты поддерживающей, широкой под пациентом

Поверните пациента на бок. Убедитесь, что на поверхности есть достаточно места для пациента во избежание риска падения. Расположите ленту под пациента. Сверните большую часть ленты так, чтобы пациент лежал в ее центре, после того как он/она повернется на спину. Немного поверните пациента в противоположном направлении так, чтобы ленту можно было развернуть. По завершении расположения пациента на ленте, закрепите петли ленты на соответствующие крюки распорки. Перед подъемом убедитесь, что все петли правильно и надежно зафиксированы. Начните запланированное действие. Рекомендуется снимать ленту по окончании использования, осторожно вытягивая ее вверх. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в **пункте 4.1.1** для двухточечного подвеса.

4.16 Лента поддерживающая узкая

- 1- Петли
- 2- Ярлык

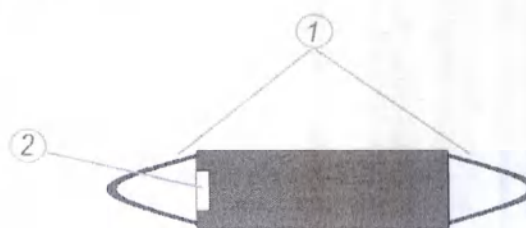



Рис. 48 – Обозначение частей ленты поддерживающей узкой

Лента поддерживающая узкая используется, когда необходимо поднимать и поддерживать определенную конечность тела пациента (руки или ноги). Так же используется для проведения гигиенических процедур. Данные ленты разработаны для всех вариантов двухточечного подвеса на распорки.

4.16.1 Размещение ленты, поддерживающей узкой

Протяните ленту под выбранной конечностью пациента. Закрепите петли ленты на соответствующие крюки распорки. Поднимите конечность пациента на нужную высоту. Порядок крепления петель сетки к крюкам распорок см. в **пункте 4.1.1** для двухточечного подвеса.

4.17 Лента специальная «А»/«В»

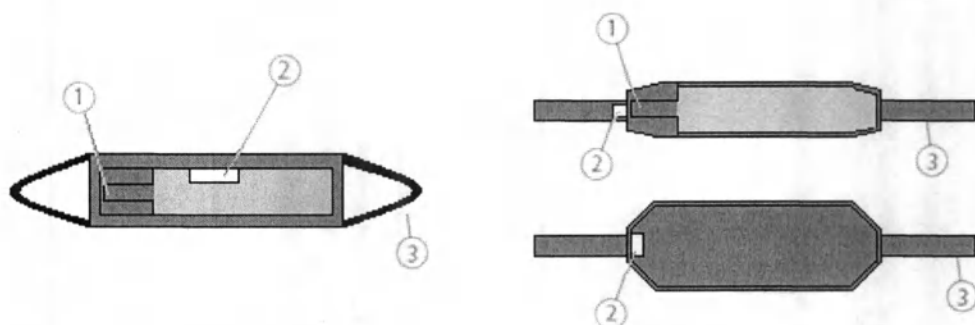

- 1- Карман для «Стика»
- 2- Ярлык
- 3- Петля/Ремень

Лента специальная «А»

- 1- Карман для «Стика»
- 2- Ярлык
- 3- Петля/Ремень

Лента специальная «В» (для тела и подголовник)

Рис. 49 – Обозначение частей ленты специальной «А»/«В»

Лента специальная «А»/«В» предназначены для подъема и перемещения пациентов в горизонтальном положении в тех случаях, когда нет возможности переворачивать пациента.

4.17.1 Размещение лент под пациентом




При использовании лент специальных «А»/«В» следует применять распорку для горизонтального перемещения «А»/«В». Данные принадлежности используются только вместе и не могут использоваться по отдельности.

Крепление ленты «А» к распорке горизонтального перемещения «А» осуществляется при помощи петель, расположенных на лентах к крюкам, расположенным на распорке горизонтального перемещения «А» и только после расположения пациента на лентах.


Крепление ленты специальной «В» к распорке горизонтального перемещения «В» осуществляется при помощи ремней, расположенных на лентах к замкам, расположенным на распорке горизонтального перемещения «В» и только после расположения пациента на лентах.

Размещение лент, которые будут лежать под плечами, спиной, ягодицами и голенями пациента следует производить с помощью специального устройства «Стик». Следует поочередно вставлять наконечник «Стика» в карманы (1)²⁵ на лентах и протягивать их под пациента. По завершении расположения пациента на лентах, закрепите петли/ремни лент на соответствующие крюки/замки распорки. Порядок крепления петель/ремней лент к крюкам распорок см. в пункте 4.1.4 для многоточечного подвеса. Перед подъемом убедитесь, что все петли/ремни правильно и надежно зафиксированы. Начните подъем. Рекомендуется снимать ленты по окончании использования, осторожно вытягивая их вверх.

4.18 Стул для бассейна «G»/«L»

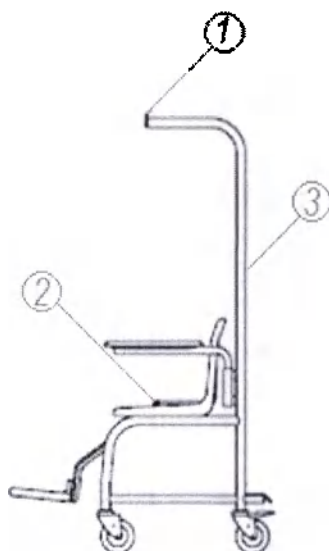

1. Специальная металлическая петля
2. Страховочный ремень
3. Вертикальные стойки

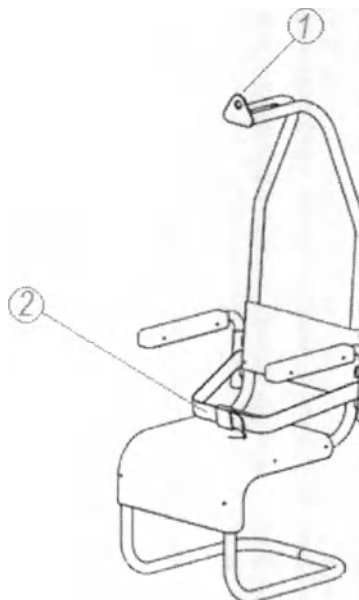

1. Специальная металлическая петля
2. Страховочный ремень
3. Вертикальные стойки

Стул для бассейна «G»

Стул для бассейна «L»

Рис. 50 – Обозначение частей Стула для бассейна «G»/«L»

²⁵ См. Рис. 49

Стула для бассейна «G»/«L» используется для перемещения пациента в бассейн в сидячем положении. Перемещение Стула для бассейна «G» на колесиках предназначено только для удобства транспортировки самого стула, а не пациента. Перемещение Стула для бассейна «G» следует осуществлять, держась за вертикальные стойки (3)²⁶.

4.18.1 Использование стула для бассейна

При использовании Стула для бассейна «G» зафиксируйте колеса. Поместите пациента на Стул для бассейна «G»/«L». Зафиксируйте пациента на стуле с помощью страховочных ремней (2)²⁷. Соедините стул с Мотором Системы для подъема и перемещения через специальную металлическую петлю в верхнем основании стула (1). Придерживая рукой, приподнимите стул до уровня необходимого для перемещения пациента в бассейн. Опустите стул с пациентом в бассейн. По окончании водных процедур поднимите и переместите пациента на ровную поверхность вне бассейна. Расстегните страховочный ремень (2), помогите пациенту подняться и пересечь на иную поверхность для дальнейших процедур или передвижения.


5. Принадлежности

5.1 Распорка/ Распорка для перекида/ Распорка с четырехточечным креплением/ Распорка Х-образная/ Распорка Н-образная


Распорка - жесткая конструкция больше чем с одной точкой соединения, к которой крепится СОТ. Данные виды Распорок предназначены для подъема и перемещения пациентов в сидячем или полулежачем положении при использовании различных вариантов подвеса сеток (см. п. 4.1).



Распорка (S/M/L) - 250 кг.

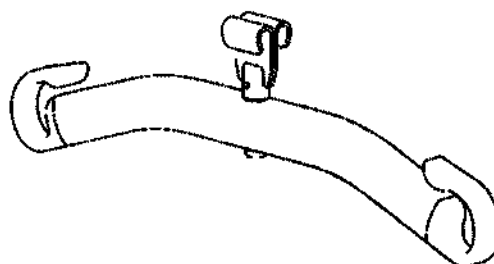


Распорка для перекида (S/M/L) – 250 кг.

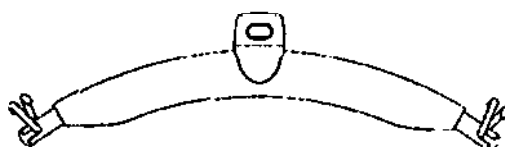


Распорка с четырехточечным креплением (S/M/L) – 350 кг

²⁶ См. Рис. 50

²⁷ См. Рис. 50

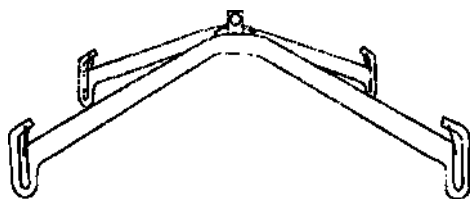

Распорка X-образная (M/L) – 250/500 кг

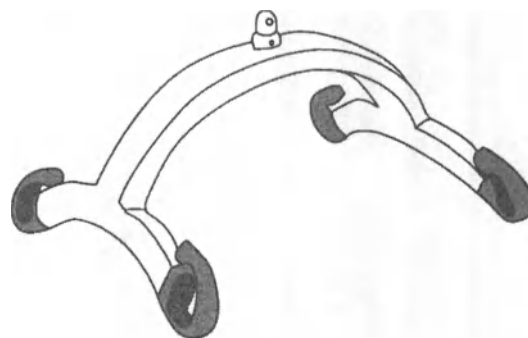


Распорка H-образная – 350 кг

Рис. 51 – Виды распорок

5.1.1 Использование Распорки/Распорки для перекида/Распорки с четырехточечным креплением/Распорки X-образная/Распорки H-образная


Распорка крепится к Мотору Системы для подъема и перемещения, не требуя специальных навыков для установки. Крепление сетки к Распорке осуществляется при помощи петель, расположенных на сетке к крюкам, расположенным на Распорке и только после расположения пациента на поверхности сетки.

5.2 Распорка для горизонтального перемещения пациента «А»/ «В»

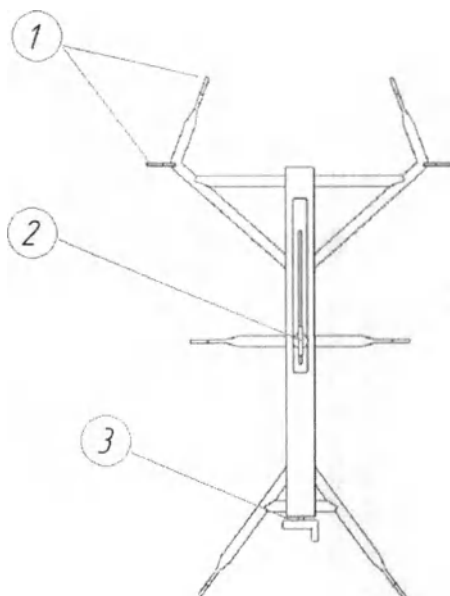

1. Крюки/замки
2. Балансир
3. Рукоятка балансира

Распорка для горизонтального перемещения «А»

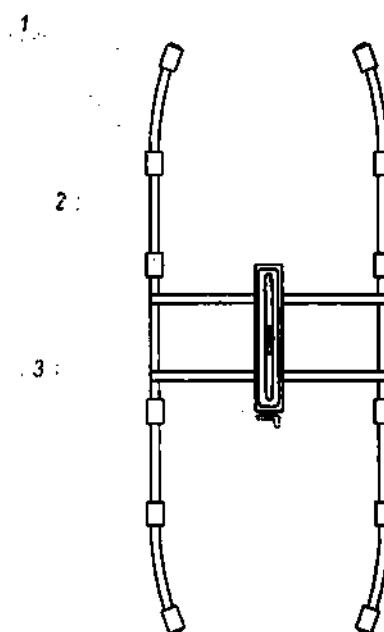

1. Крюки/замки
2. Балансир
3. Рукоятка балансира

Распорка для горизонтального перемещения «В»

Рис. 52 – Виды горизонтальных распорок

Распорка для горизонтального перемещения пациента «А»/«В» предназначена для подъема и перемещения пациентов в горизонтальном положении в тех случаях, когда не требуется абсолютно ровная подъемная поверхность. Обычно используется в хирургических палатах, а также в блоках интенсивной терапии и рентгенологических отделениях. Широко применимо благодаря удобству в использовании и хранении. Распорка «А»/«В» оснащена приспособлением для регулирования баланса, которое позволяет настроить центр тяжести при подъеме.

5.2.1 Использование распорки для горизонтального перемещения «А»/«В»

Распорка крепится к Мотору Системы, не требуя специальных навыков для установки. Крепление сетки к распорке осуществляется при помощи петель/ремней, расположенных на сетке к крюкам/замкам, расположенным на распорке для горизонтального перемещения «А»/«В» и только после расположения пациента на поверхности сетки.

5.3 Стик

Стик – это специальное устройство для размещения под пациента Лент специальных «А»/«В». Представляет из себя полосу из пластика ABS.

5.3.1 Использование Стика

Для использования «Стика» следует обратиться к пункту 4.17.1 «Размещение лент под пациентом».

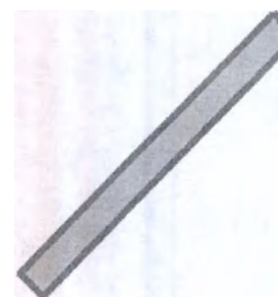


Рис.53 – Стик

6. Поиск и устранение неполадок

У СOT и принадлежностей нет элементов, которые пользователь может ремонтировать или регулировать сам. При возникновении каких-либо неполадок, убедитесь, что при эксплуатации не нарушены меры предосторожности. Если меры предосторожности не нарушены, обратитесь к производителю.

7. Уход и обслуживание

При пользовании СOT и принадлежностей внимательно следите за их состоянием. Не допускайте износа ткани и ремней сеток, жилетов и лент.

Стул для бассейна «G», Стул для бассейна «L» и Принадлежности не имеют частей, требующих особого ухода и обслуживания. Необходимо их поддерживать в чистоте.

Сетки, жилеты ремни и ленты необходимо стирать по мере загрязнения. Информация о режимах стирки указана на ярлыке.

8. Эксплуатация, транспортировка и хранение

Все части СОР должны быть устойчивы к климатическим воздействиям в условиях эксплуатации согласно Таблице 8 и условиям транспортирования и хранения в Таблице 9.

Таблица 8 - Допустимые условия эксплуатации

Параметр	Ед. измерения	СОТ	
		Мин.	Макс.
Температура воздуха	° С	0	40
Относительная влажность воздуха	%	30	70
Атмосферное давление	гПа	700	1060

Таблица 9 - Допустимые условия транспортирования и хранения

Параметр	Ед. измерения	СОТ	
		Мин.	Макс.
Температура воздуха	° С	-50	50
Относительная влажность воздуха	%	30	80
Атмосферное давление	гПа	700	1060

9. Гарантии производителя

Гарантийное обслуживание производится сервисной службой компании ООО «МНПК БИОМИР XXI» по адресу: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 5, пом. 7; телефон: 8-495-228-13-59

Производитель гарантирует соответствие СОТ требованиям ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационных документах.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи СОТ.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с момента выпуска СОТ.

Ожидаемый срок службы СОТ при соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

Использование СОТ с нарушением указаний эксплуатационных документов, а также внесение каких-либо конструктивных изменений без согласования с производителем, не разрешается.

В случае невыполнения указанных условий производитель не несет ответственности перед потребителем.

10. Утилизация

Использованные СОР и Принадлежности могут быть возвращены компании ООО «МНПК БИОМИР XXI» для последующей переработки.

Данный символ (перечеркнутый мусорный бак) означает, что СОР нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры для бытовых отходов, для нее требуется утилизация путем раздельного сбора. По окончании срока службы изделия, оно не должно быть утилизировано как бытовой мусор, необходима раздельная утилизация.



Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А, ФЗ РФ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также иными нормативными актами РФ, Субъектов РФ и органов местного самоуправления РФ, принятых во исполнение вышеуказанных законов. Упаковка нового изделия утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».


Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.




11. Сведения об производителе




Производитель – ООО «МНПК БИОМИР XXI».


Адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 5, офис 302.
Телефон: 8-495-228-13-59 E-mail: info@biomir21.ru. Web: www.biomir21.ru



ПЕРЕЧЕНЬ СОТ

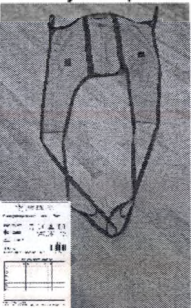
№	СОТ	Размер	Артикул	Масса, кг	Габаритные размеры упаковки, см	Размеры СОТ, см	Материал	Грузоподъемность
1	Сетка универсальная, высокая 	J	200101	0,7	36x55x5	102x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200102	0,8	36x55x5	107x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200103	0,8	36x55x5	112x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200104	0,9	36x55x5	117x84	Полиэстер 100%	250
		S	200105	1,1	36x55x5	122x88	Полиэстер 100%	250
		M	200106	1,1	36x55x5	127x92	Полиэстер 100%	250
		L	200107	1,1	36x55x5	132x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200108	1,2	36x55x5	137x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200109	1,3	36x55x5	142x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200110	1,4	36x55x5	147x108	Полиэстер 100%	500
2	Сетка универсальная, средняя 	J	200201	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200202	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200203	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200204	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200205	1,1	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200206	1,1	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200207	1,1	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200208	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200209	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200210	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500

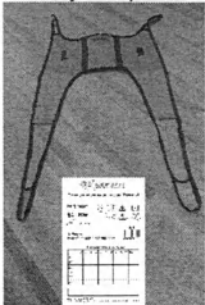
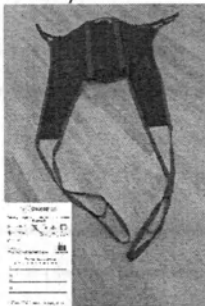
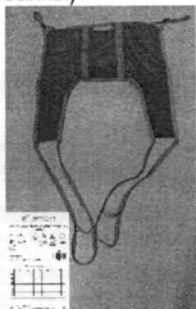
3	Сетка универсальная, низкая 	J	200301	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200302	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200303	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200304	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200305	1,1	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200306	1,1	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200307	1,1	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200308	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200309	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200310	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500
4	Сетка универсальная, высокая (для ванны) 	J	200401	0,7	36x55x5	102x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200402	0,8	36x55x5	107x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200403	0,8	36x55x5	112x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200404	0,9	36x55x5	117x84	Полиэстер 100%	250
		S	200405	0,9	36x55x5	122x88	Полиэстер 100%	250
		M	200406	1,0	36x55x5	127x92	Полиэстер 100%	250
		L	200407	1,0	36x55x5	132x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200408	1,2	36x55x5	137x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200409	1,3	36x55x5	142x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200410	1,4	36x55x5	147x108	Полиэстер 100%	500
5	Сетка универсальная, средняя (для ванны) 	J	200501	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200502	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200503	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200504	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200505	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200506	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200507	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200508	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200509	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200510	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500

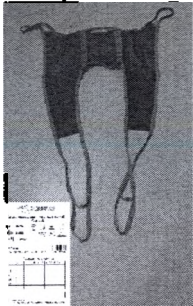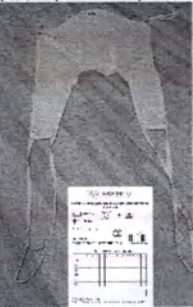
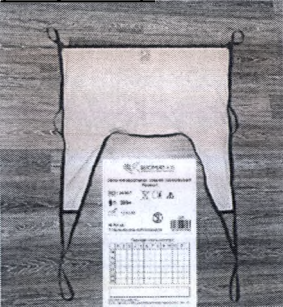
6	Сетка универсальная, низкая (для ванны) 	J	200601	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200602	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200603	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200604	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200605	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200606	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200607	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200608	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200609	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200610	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500
7	Сетка универсальная, высокая (одноразовая) 	J	200701	0,7	36x55x5	102x72	Полиэстер 100%	205
		JS	200702	0,8	36x55x5	107x76	Полиэстер 100%	205
		JM	200703	0,8	36x55x5	112x80	Полиэстер 100%	205
		XS	200704	0,9	36x55x5	117x84	Полиэстер 100%	205
		S	200705	0,9	36x55x5	122x88	Полиэстер 100%	205
		M	200706	1,0	36x55x5	127x92	Полиэстер 100%	205
		L	200707	1,0	36x55x5	132x96	Полиэстер 100%	205
		XL	200708	1,2	36x55x5	137x100	Полиэстер 100%	205
		XXL	200709	1,3	36x55x5	142x104	Полиэстер 100%	205
		XXXL	200710	1,4	36x55x5	147x108	Полиэстер 100%	350
8	Сетка универсальная, средняя (одноразовая) 	J	200801	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	205
		JS	200802	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	205
		JM	200803	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	205
		XS	200804	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	205
		S	200805	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	205
		M	200806	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	205
		L	200807	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	205
		XL	200808	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	205
		XXL	200809	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	205
		XXXL	200810	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	350

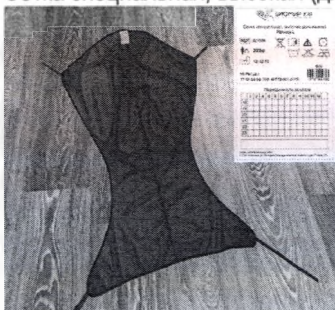
9	Сетка универсальная, низкая (одноразовая) 	J	200901	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	205
		JS	200902	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	205
		JM	200903	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	205
		XS	200904	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	205
		S	200905	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	205
		M	200906	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	205
		L	200907	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	205
		XL	200908	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	205
		XXL	200909	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	205
		XXXL	200910	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	350
10	Сетка специальная, высокая 	XS	201001	0,9	36x55x5	120x90	Полиэстер 100%	200
		S	201002	0,9	36x55x5	125x93	Полиэстер 100%	200
		M	201003	1,0	36x55x5	130x96	Полиэстер 100%	200
		L	201004	1,0	36x55x5	135x99	Полиэстер 100%	200
		XL	201005	1,2	36x55x5	140x102	Полиэстер 100%	300
		XXL	201006	1,3	36x55x5	145x105	Полиэстер 100%	300
		XXXL	201007	1,4	36x55x5	150x108	Полиэстер 100%	300
11	Сетка специальная, высокая (для ванны) 	XS	201301	0,9	36x55x5	120x90	Полиэстер 100%	200
		S	201302	0,9	36x55x5	125x93	Полиэстер 100%	200
		M	201303	1,0	36x55x5	130x96	Полиэстер 100%	200
		L	201304	1,0	36x55x5	135x99	Полиэстер 100%	200
		XL	201305	1,2	36x55x5	140x102	Полиэстер 100%	300
		XXL	201306	1,3	36x55x5	145x105	Полиэстер 100%	300
		XXXL	201307	1,4	36x55x5	150x108	Полиэстер 100%	300

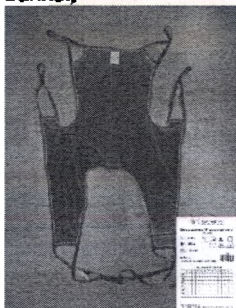
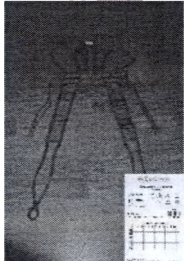
12	Сетка специальная "Н", высокая 	J	201601	0,7	36x55x5	100x60	Полиэстер 100%	250
		JS	201602	0,8	36x55x5	105x65	Полиэстер 100%	250
		JM	201603	0,8	36x55x5	110x70	Полиэстер 100%	250
		XS	201604	0,9	36x55x5	115x75	Полиэстер 100%	250
		S	201605	0,9	36x55x5	120x80	Полиэстер 100%	250
		M	201606	1,0	36x55x5	125x85	Полиэстер 100%	250
		L	201607	1,0	36x55x5	130x90	Полиэстер 100%	250
		XL	201608	1,2	36x55x5	135x95	Полиэстер 100%	250
		XXL	201609	1,3	36x55x5	140x110	Полиэстер 100%	250
		XXXL	201610	1,4	36x55x5	145x115	Полиэстер 100%	250
13	Сетка специальная "Н", высокая (для ванны) 	J	201901	0,7	36x55x5	100x60	Полиэстер 100%	250
		JS	201902	0,8	36x55x5	105x65	Полиэстер 100%	250
		JM	201903	0,8	36x55x5	110x70	Полиэстер 100%	250
		XS	201904	0,9	36x55x5	115x75	Полиэстер 100%	250
		S	201905	0,9	36x55x5	120x80	Полиэстер 100%	250
		M	201906	1,0	36x55x5	125x85	Полиэстер 100%	250
		L	201907	1,0	36x55x5	130x90	Полиэстер 100%	250
		XL	201908	1,2	36x55x5	135x95	Полиэстер 100%	250
		XXL	201909	1,3	36x55x5	140x110	Полиэстер 100%	250
		XXXL	201910	1,4	36x55x5	145x115	Полиэстер 100%	250
14	Сетка для туалета, высокая 	XS	202201	0,9	36x55x5	105x84	Полиэстер 100%	200
		S	202202	0,9	36x55x5	110x88	Полиэстер 100%	200
		M	202203	1,0	36x55x5	115x92	Полиэстер 100%	200
		L	202204	1,0	36x55x5	120x96	Полиэстер 100%	200
		XL	202205	1,2	36x55x5	125x100	Полиэстер 100%	200
		XXL	202206	1,3	36x55x5	130x104	Полиэстер 100%	200
		XXXL	202207	1,4	36x55x5	135x108	Полиэстер 100%	300



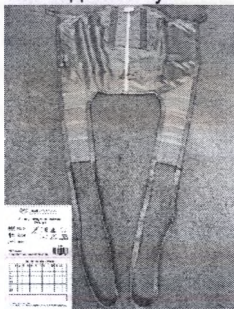
15	Сетка для туалета, средняя 	XS	202301	0,9	36x55x5	105x75	Полиэстер 100%	200
		S	202302	0,9	36x55x5	110x80	Полиэстер 100%	200
		M	202303	1,0	36x55x5	115x90	Полиэстер 100%	200
		L	202304	1,0	36x55x5	120x95	Полиэстер 100%	200
		XL	202305	1,2	36x55x5	125x100	Полиэстер 100%	200
		XXL	202306	1,3	36x55x5	130x105	Полиэстер 100%	200
		XXXL	202307	1,4	36x55x5	135x110	Полиэстер 100%	300
16	Сетка для ампутантов, высокая 	XS	202401	0,9	36x55x5	119x84	Полиэстер 100%	250
		S	202402	0,9	36x55x5	124x88	Полиэстер 100%	250
		M	202403	1,0	36x55x5	129x92	Полиэстер 100%	250
		L	202404	1,0	36x55x5	131x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202405	1,2	36x55x5	139x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202406	1,3	36x55x5	144x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202407	1,4	36x55x5	149x108	Полиэстер 100%	500
17	Сетка для ампутантов, средняя 	XS	202411	0,9	36x55x5	104x84	Полиэстер 100%	250
		S	202412	0,9	36x55x5	109x88	Полиэстер 100%	250
		M	202413	1,0	36x55x5	114x92	Полиэстер 100%	250
		L	202414	1,0	36x55x5	119x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202415	1,2	36x55x5	124x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202416	1,3	36x55x5	129x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202417	1,4	36x55x5	134x108	Полиэстер 100%	500

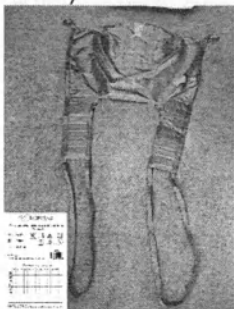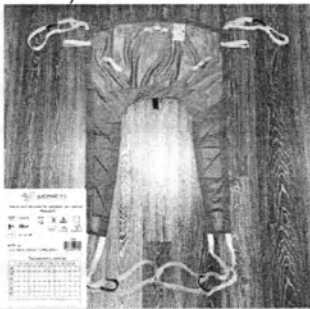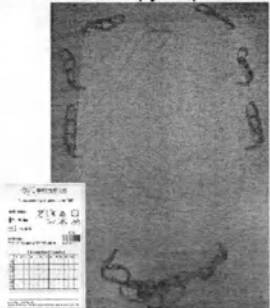
18	Сетка для ампутов, высокая (для ванны) 	XS	202501	0,9	36x55x5	119x84	Полиэстер 100%	250
		S	202502	0,9	36x55x5	124x88	Полиэстер 100%	250
		M	202503	1,0	36x55x5	129x92	Полиэстер 100%	250
		L	202504	1,0	36x55x5	131x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202505	1,2	36x55x5	139x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202506	1,3	36x55x5	144x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202507	1,4	36x55x5	149x108	Полиэстер 100%	500
19	Сетка для ампутов, средняя (для ванны) 	XS	202511	0,9	36x55x5	104x84	Полиэстер 100%	250
		S	202512	0,9	36x55x5	109x88	Полиэстер 100%	250
		M	202513	1,0	36x55x5	114x92	Полиэстер 100%	250
		L	202514	1,0	36x55x5	119x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202515	1,2	36x55x5	124x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202516	1,3	36x55x5	129x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202517	1,4	36x55x5	134x108	Полиэстер 100%	500
20	Сетка многофункциональная "AG" 	-	202611	1,5	36x55x5	202x124	Полиэстер 100%	500

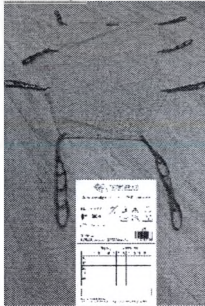
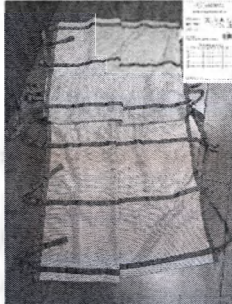
21	Сетка многофункциональная "AG» " (для ванны) 	-	202612	1,2	36x55x5	202x124	Полиэстер 100%	500
22	Сетка многофункциональная "AG" (одноразовая) 	-	202613	0,9	36x55x5	202x124	Полиэстер 100%	500
23	Сетка многофункциональная "AL" 	-	203621	2,2	36x55x5	210x130	Полиэстер 100%	250

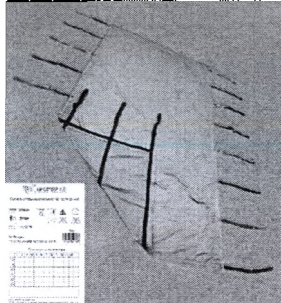
24	Сетка многофункциональная "AL" (для ванны) 	-	203622	1,7	36x55x5	210x130	Полиэстер 100%	250
25	Сетка многофункциональная "AL" (одноразовая) 	-	202623	1,2	36x55x5	210x130	Полиэстер 100%	250
26	Сетка смены положения "AG2" 	-	202631	0,9	36x55x5	210x70	Полиэстер 100%	250

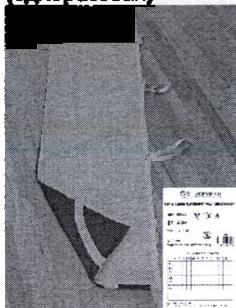
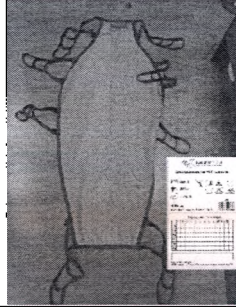
27	Сетка смены положения "AG2" (одноразовая) 	-	202632	0,7	36x55x5	210x70	Полиэстер 100%	250
28	Сетка горизонтальная "AG1" 	-	202641	1,1	36x55x5	178x82	Полиэстер 100%	350
29	Сетка горизонтальная "AG1" (для ванны) 	-	202642	0,9	36x55x5	178x82	Полиэстер 100%	350

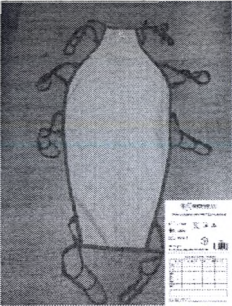
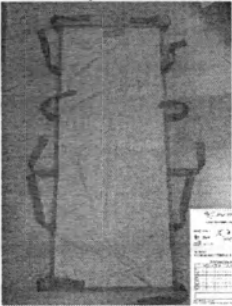
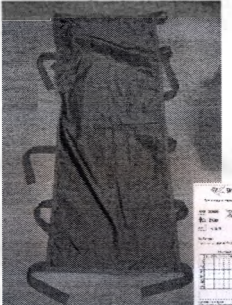
30	Сетка горизонтальная "AG1" (одноразовая) 	-	202643	0,7	36x55x5	178x82	Полиэстер 100%	350
31	Сетка горизонтальная "BG" 	-	202651	1,23	36x55x5	176x72	Полиэстер 100%	250
32	Сетка горизонтальная "BG" (для ванны) 	-	202652	1,0	36x55x5	176x72	Полиэстер 100%	250

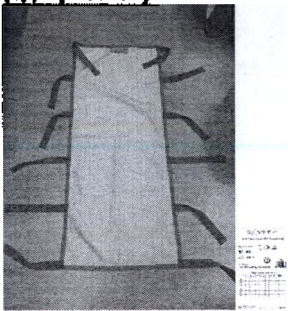
33	Сетка горизонтальная "BG" (одноразовая) 	-	202653	0,8	36x55x5	176x72	Полиэстер 100%	250
34	Жилет "G" 	XS	204001	0,9	36x55x5	30x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204002	0,9	36x55x5	35x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204003	1,0	36x55x5	42x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204004	1,0	36x55x5	45x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204005	1,2	36x55x5	48x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204006	1,3	36x55x5	51x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXXL	204007	1,4	36x55x5	54x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250

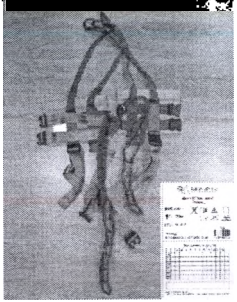
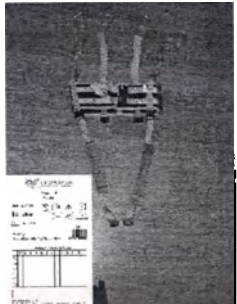
35	Жилет "G" (для ванны) 	XS	204011	0,9	36x55x5	30x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204012	0,9	36x55x5	35x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204013	1,0	36x55x5	42x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204014	1,0	36x55x5	45x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204015	1,2	36x55x5	48x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204016	1,3	36x55x5	51x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXXL	204017	1,4	36x55x5	54x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
36	Жилет "H" 	XS	204101	0,9	36x55x5	32x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204102	0,9	36x55x5	37x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204103	1,0	36x55x5	42x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204104	1,0	36x55x5	47x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204105	1,2	36x55x5	52x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204106	1,3	36x55x5	55x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXXL	204107	1,4	36x55x5	60x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250

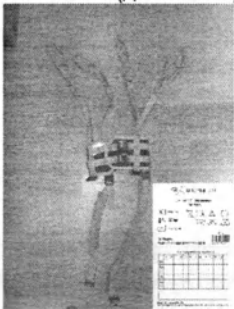37	Жилет "Н" (для ванны) 	XS	204111	0,9	36x55x5	32x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204112	0,9	36x55x5	37x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204113	1,0	36x55x5	42x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204114	1,0	36x55x5	47x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204115	1,2	36x55x5	52x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204116	1,3	36x55x5	55x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXXL	204117	1,4	36x55x5	60x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
38	Жилет "Н", детский 	J	204201	0,7	36x55x5	65x25	Полиэстер 100%	250
		JS	204202	0,8	36x55x5	70x25	Полиэстер 100%	250
		JM	204203	0,8	36x55x5	75x30	Полиэстер 100%	250
		S	204204	0,9	36x55x5	80x35	Полиэстер 100%	250
		M	204205	0,9	36x55x5	85x38	Полиэстер 100%	250

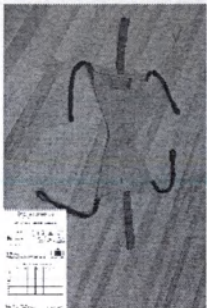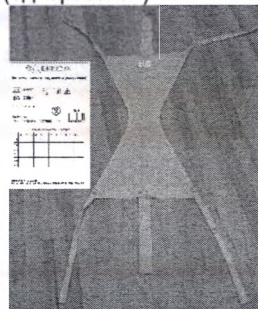
39	Лента смены положения, широкая 	-	205311	0,6	36x55x5	60x40	Полиэстер 100%	250
40	Лента смены положения, широкая (одноразовая) 	-	205312	0,4	36x55x5	60x40	Полиэстер 100%	250
41	Лента смены положения, узкая 	-	205321	0,4	36x55x5	60x20	Полиэстер 100%	250

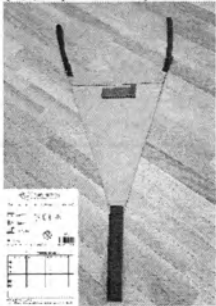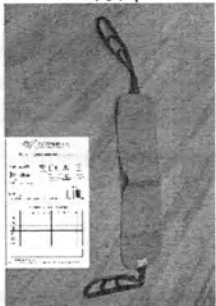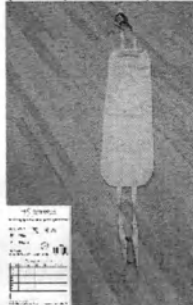
42	Лента смены положения, узкая (одноразовая) 	-	205322	0,3	36x55x5	60x20	Полиэстер 100%	250
43	Лента поддерживающая, широкая 	-	205331	0,6	36x55x5	120x25	Полиэстер 100%	250
44	Лента поддерживающая, широкая (одноразовая) 	-	205332	0,4	36x55x5	120x25	Полиэстер 100%	250



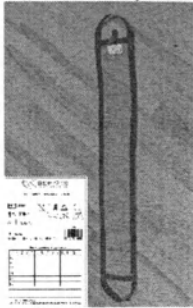
45	Лента поддерживающая, узкая 	-	205341	0,4	36x55x5	120x12	Полиэстер 100%	250
46	Лента поддерживающая, узкая (одноразовая) 	-	205342	0,3	36x55x5	120x12	Полиэстер 100%	250
47	Лента специальная "А" 	-	205351	1,2	36x55x5	57,5x15,5	Полиэстер 100%	250

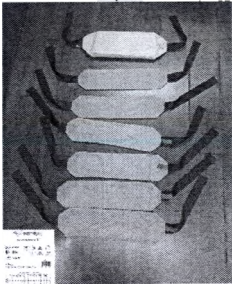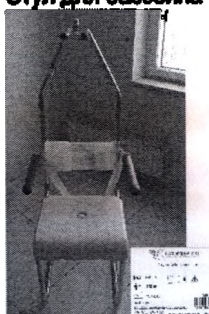48	Лента специальная "В" 	-	205352	1,5	36x55x5	57,5x15,5	Полиэстер 100%	250
49	Стул для бассейна "G" 	-	206111	26	85x65x185	80x60x180	Нержавеющая сталь aisi 304, Пластик ABS, Стеклонаполненный нейлон	250
50	Стул для бассейна "L" 	-	206115	12,4	85x65x185	80x60x180	Нержавеющая сталь aisi 304, Пластик ABS, Стеклонаполненный нейлон	250

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

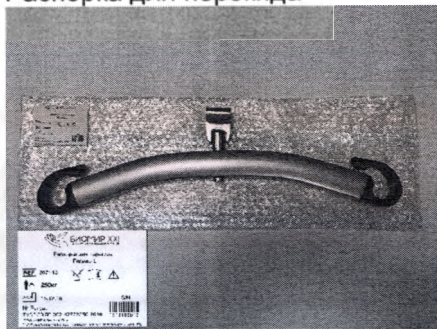№	Наименование	Размер	Артикул	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Материал	Грузоподъемность
1	Распорка 	S	207101	1,35	470x130x120	Алюминий АД31	250
		M	207102	1,6	570x150x120	Алюминий АД31	250
		L	207103	1,8	670x190x120	Алюминий АД31	250
2	Распорка для перекида 	S	207111	1,35	470x130x120	Алюминий АД31	250
		M	207112	1,6	570x150x120	Алюминий АД31	250
		L	207113	1,8	670x190x120	Алюминий АД31	250

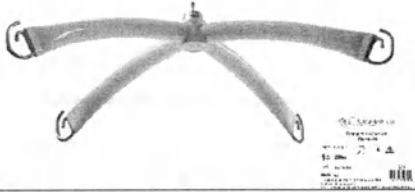3	Распорка с четырехточечным креплением		S	207201	1,5	470x130x120	Нержавею щая сталь aisi 304	350
			M	207202	1,8	570x150x120	Нержавею щая сталь aisi 304	350
			L	207203	2,2	670x190x120	Нержавею щая сталь aisi 304	350
4	Распорка Х-образная		M	207301	6	590x570x220	Нержавею щая сталь aisi 304	250
			L	207302	8,8	930x640x290	Нержавею щая сталь aisi 304	500
5	Распорка Н-образная		-	207401	8	700x700x300	Алюминий АД31	350

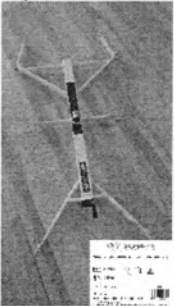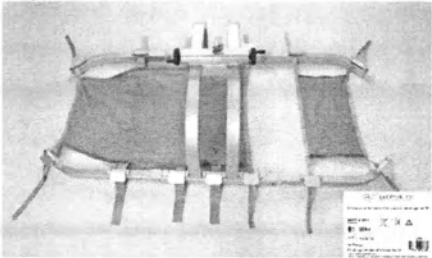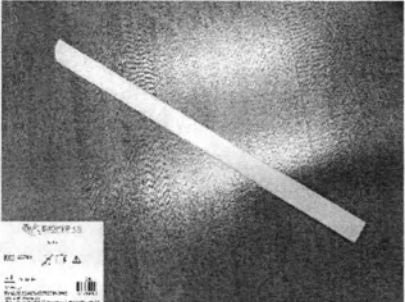6	Распорка для горизонтального перемещения "А" 	-	207501	10,9	1630x930x180	Нержавею щая сталь аісі 304	350
7	Распорка для горизонтального перемещения "В" 	-	207601	11	1645x945x180	Алюминий АД31	350
8	Стик 	-	207701	0,3	50x800x5	Пластик ABS	-

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Требования совместимости СОТ и принадлежностей с различными системами для подъема и перемещения пациентов

№	Требование
1	Распорки используемых систем для подъема и перемещения совместимы с предоставленными вариантами подвеса выбранных СОТ.
2	Распорки и другие устройства для крепления СОТ имеют надежное крепление для лямок, ремней и других соединительных элементов СОТ.
3	При согласованном применении СОТ и принадлежностей с различными системами для подъема и перемещения пациентов максимальная грузоподъемность определяется по наименьшему значению максимальной грузоподъемности применяемых компонентов.
4	Система для подъема и перемещения имеет регистрационное удостоверение, сертификат качества или другой документ, подтверждающий качество и надежность.

При документальном соблюдении вышеизложенных пунктов сотрудники компании ООО «МНПК Биомир XXI» обязаны фактически их подтвердить, чтобы обеспечить полностью безопасную комбинацию. Если все требования выполняются, то можно использовать СОТ и принадлежности с другими системами для подъема и перемещения после согласования с производителем.

Всего прошито и скреплено печатью
104 (сто сорок) листов

Генеральный директор



С. С. Соловьев А. В.



БИОМИР XXI
МЕДИЦИНСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

115191, г. Москва,
Большой Староданиловский пер. д. 5, офис 302.
ИНН/КПП: 7726346643/772601001
Р./с.: 40702810900030002941
К./с.: 30101810300000000600
В ПАО "МИНБанк"
e-mail: info@biomir21.ru,
тел./факс: 8-495-228-13-59

ОКПД2 32.50.50.190

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ БИОМИР XXI"



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

КОМПАНИЯ БИОМИР XXI"

Осташев А.В.

« 04 » 07 2019 г.

ПАСПОРТ

**Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов
медицинская по ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями**

ДНЛА.942819.020-ПС


Москва 2019

Оглавление

1. Описание.....	3
2. Сведения о производителе.....	4
3. Технические характеристики	4
4. Состав СОТ.....	4
5. Указания по эксплуатации	5
6. Утилизация.....	5
7. Гарантии производителя.....	6
8. Условия гарантийного обслуживания	7
9. Классификация.....	7
10. Свидетельство о приёмке	8
11. Свидетельство об улаковывании	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А	12
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	30
ПРИЛОЖЕНИЕ В	33

1. Описание

Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов медицинская по ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями

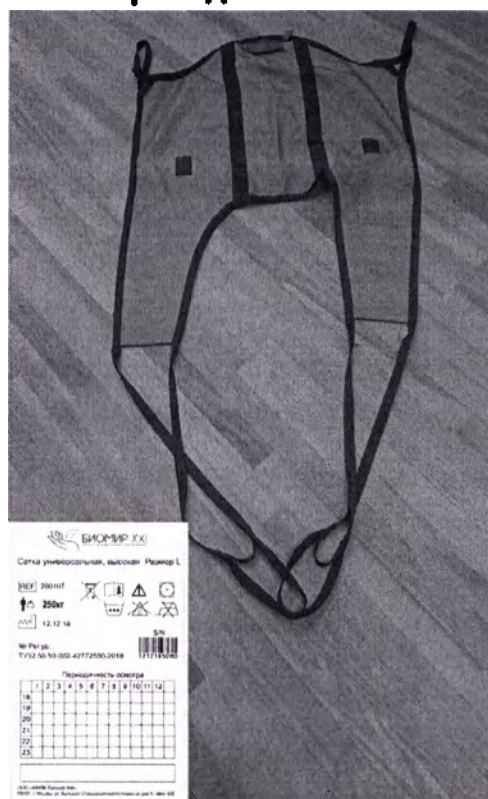

«Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов медицинская по ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями» (далее – СОТ) предназначена для обеспечения смены физиологических положений, подъема, удержания и перемещения пациента в условиях больниц и клиник, а также внутри жилых и общественных помещений.

СОТ включает в себя нежесткую систему опоры тела и жесткую систему опоры тела в соответствии с Приложением А и Приложением Б.

СОТ полностью совместима с «СИСТЕМА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ РЕЛЬСОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПО ТУ 32.50.50-001-42772550-2017 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ: БМ-01, БМ-02, БМ-03» (далее - Система БМ). Номер регистрационного удостоверения РЗН2018/6825 от 13 февраля 2018 года.

СОТ может быть совместима с другими Системами для подъема и перемещения, если эти Системы для подъема и перемещения соответствуют требованиям, указанным в ПРИЛОЖЕНИИ В.

В зависимости от требований и особенностей пациента, СОТ может быть применена как для одноразового, так и для многократного использования в любых учреждениях, общественных местах, а также для домашнего использования, в частности, для:

- перемещения пациента из одного положения в другое (из положения лежа в положение сидя и обратно, из положения лежа в положение стоя и обратно);
- удержания пациента во время его перемещения из одного положения в другое (фиксация в горизонтальном, вертикальном и сидячем положении);
- перемещения пациента с одного места в другое (по комнате, из комнаты в комнату, палату, туалет и иные помещения).

2. Сведения о производителе

Производитель – ООО «МНПК БИОМИР XXI».

Адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 5, офис 302.

Телефон: 8-495-228-13-59 E-mail: info@biomir21.ru. Web: www.biomir21.ru.

3. Технические характеристики

Технические характеристики для СОТ указаны в Приложении А и для Принадлежностей указаны в Приложении Б.

4. Состав СОТ

Количество СОТ, модельный ряд и размеры, а также Принадлежности подбираются исходя из пожеланий заказчика, и необходимого количества в зависимости от условий эксплуатации, в Приложении А для СОТ и Приложении Б для Принадлежностей.

СОТ и Принадлежности поставляемые потребителю указаны в Свидетельстве о приемке.

5. Указания по эксплуатации



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя.

СОТ полностью совместима с «СИСТЕМОЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ РЕЛЬСОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПО ТУ 32.50.50-001-42772550-2017 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ: БМ-01, БМ-02, БМ-03» (далее Система БМ). Номер регистрационного удостоверения РЗН2018/6825 от 13 февраля 2018 года.

СОТ может быть совместима с другими Системами для подъема и перемещения, если эти Системы для подъема и перемещения соответствуют требованиям, указанным в ПРИЛОЖЕНИИ В.

6. Утилизация

Использованные СОТ и Принадлежности могут быть возвращены компании ООО «МНПК БИОМИР XXI» для последующей переработки.

Данный символ (перечеркнутый мусорный бак) означает, что СОТ нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры для бытовых отходов, для нее требуется утилизация путем раздельного сбора.



По окончании срока службы изделия, оно не должно быть утилизировано как бытовой мусор, необходима раздельная утилизация.

Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А, ФЗ РФ от 27 декабря 2002 года. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ФЗ от 24 июня 1998 года. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также иными нормативными актами РФ, Субъектов РФ и органов местного самоуправления РФ, принятых во исполнение вышеуказанных законов. Упаковка нового изделия утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

7. Гарантии производителя

- 7.1. Гарантийное обслуживание производится сервисной службой компании ООО «МНПК БИОМИР XXI» по адресу: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 5, пом. 7; телефон: 8-495-228-13-59.**
- 7.2. Производитель гарантирует соответствие СОР требованиям ТУ32.50.50-002-42772550-2018 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационных документах.**
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи СОР.**
- 7.4. Гарантийный срок хранения – 5 лет с момента выпуска СОР.**
- 7.5. Ожидаемый срок службы СОР при соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.**
- 7.6. Использование СОР с нарушением указаний эксплуатационных документов, а также внесение каких-либо конструктивных изменений без согласования с производителем не разрешается.**
- 7.7. В случае невыполнения вышеуказанных условий, производитель не несет ответственности перед потребителем.**

8. Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству Системы могут быть предъявлены только в течение гарантийного срока эксплуатации.

8.2. В течение гарантийного срока неисправные Системы подлежат возврату, бесплатному ремонту или замене аналогичным товаром надлежащего качества. Решение о возврате, замене или ремонте Системы принимает сервисный центр ООО «МНПК БИОМИР XXI». Система ненадлежащего качества, подлежащее замене, или его составные части, переходят в собственность ООО «МНПК БИОМИР XXI».

8.3. В случае выявленной и установленной необоснованности претензии к качеству Системы, затраты на его диагностику и экспертизу оплачиваются Потребителем.

8.4. Система подлежит сдаче в гарантийный ремонт, замене или возврату при условии полной укомплектованности, предоставленной Изготовителем.

9. Классификация

9.1 В зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования СОР относится к классу В согласно ГОСТ Р 50444-92.

9.2 Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

9.3 Согласно классификации ИСО 9999 СОР относится к группе 12 36 21: Принадлежности подъемников для фиксации (поддержания) тела человека при подъеме.

9.4 В зависимости от воспринимаемых механических воздействий по ГОСТ Р 50444-92, СОР относится к группе 5 - перевозимые; а также постоянно установленные на подвижных медицинских установках, предназначенные для работы при перевозках или на ходу, подвижные медицинские установки;

10. Свидетельство о приёмке

Таблица 1

«Система опоры тела для подъема и перемещения пациентов медицинская по ТУ
32.50.50-002-42772550-2018 с принадлежностями»

№	Наименование	Артикул	Серийный номер	Количество, шт
1	Сетка универсальная, высокая: Размер – L	200107	1212185000	1
2	Сетка универсальная, средняя: Размер – L	200207	1212185100	1
3	Сетка универсальная, низкая: Размер – L	200307	1212185200	1
4	Сетка универсальная, высокая (для ванны): Размер – L	200407	1212185300	1
5	Сетка универсальная, средняя (для ванны): Размер – L	200507	1212185400	1
6	Сетка универсальная, низкая (для ванны): Размер – L	200607	1212185500	1
7	Сетка универсальная, высокая (одноразовая): Размер – L	200707	1212185600	1
8	Сетка универсальная, средняя (одноразовая): Размер – L	200807	1212185700	1
9	Сетка универсальная, низкая (одноразовая): Размер – L	200907	1212185800	1
10	Сетка специальная, высокая: Размер – L	201004	1312186000	1
11	Сетка специальная, высокая (для ванны): Размер – L	201304	1312186100	1
12	Сетка специальная «Н», высокая: Размер – L	201607	1312186200	1
13	Сетка специальная «Н», высокая (для ванны): Размер – L	201907	1312186300	1
14	Сетка для туалета, высокая: Размер – L	202204	1312186400	1
15	Сетка для туалета, средняя: Размер – L	202304	1312186500	1
16	Сетка для ампутов, высокая: Размер – L	202404	1312186600	1
17	Сетка для ампутов, средняя: Размер – L	202414	1312186700	1
18	Сетка для ампутов, высокая (для ванны): Размер – L	202504	1312186800	1
19	Сетка для ампутов, средняя: (для ванны): Размер – M	202513	1312186900	1
20	Сетка многофункциональная «AG»	202611	1412187000	1
21	Сетка многофункциональная «AG» (для ванны)	202612	1412187100	1
22	Сетка многофункциональная	202613	1412187200	1

	«AG» (одноразовая)			
23	Сетка многофункциональная «AL»	203621	1412187300	1
24	Сетка многофункциональная «AL»	203622	1412187400	1
25	Сетка многофункциональная «AL» (одноразовая)	202623	1412187500	1
26	Сетка смены положения «AG2»	202631	1412187600	1
27	Сетка смены положения «AG2» (одноразовая)	202632	1412187700	1
28	Сетка горизонтальная «AG1»	202641	1412187800	1
29	Сетка горизонтальная «AG1» (для ванны)	202642	1412187900	1
30	Сетка горизонтальная «AG1» (одноразовая)	202643	1412188000	1
31	Сетка горизонтальная «BG»	202651	141218100	1
32	Сетка горизонтальная «BG» (для ванны)	202652	141218200	1
33	Сетка горизонтальная «BG» (одноразовая):	202653	1412188300	1
34	Жилет «G»: Размер – XL	204005	1412189000	1
35	Жилет «G» (для ванны): Размер – L	204014	1412189100	1
36	Жилет «H»: Размер – L	204104	1412189200	1
37	Жилет «H» (для ванны): Размер – L	204114	1412189300	1
38	Жилет «H», детский: Размер – J	204201	1412189400	1
39	Лента смены положения, широкая	205311	1512181000	1
40	Лента смены положения, широкая (одноразовая)	205312	1512181100	1
41	Лента смены положения, узкая	205321	1512181200	1
42	Лента смены положения, узкая (одноразовая)	205322	1512181300	1
43	Лента поддерживающая, широкая	205331	1512181400	1
44	Лента поддерживающая, широкая (одноразовая)	205332	1512181500	1
45	Лента поддерживающая, узкая	205341	1512181600	1
46	Лента поддерживающая, узкая (одноразовая)	205342	1512181700	1
47	Лента специальная «А»	205351	1512181800	1
48	Лента специальная «В»	205352	1512181900	1
49	Стул для бассейна «G»	206111	1512182000	1
50	Стул для бассейна «L»	206115	1512182005	1
Принадлежности				
1	Распорка: Размер – L	207103	1512183000	1
2	Распорка для перекида Размер – L	207113	1512183013	1

3	Распорка с четырехточечным креплением: Размер – L	207203	1512183100	1
4	Распорка Х-образная: Размер – М	207301	1512183200	1
5	Распорка Н-образная	207401	1512183300	1
6	Распорка для горизонтального перемещения «А»	207501	1512183400	1
7	Распорка для горизонтального перемещения «В»	207601	1512183500	1
8	Стик	207701	1512183600	1
Документация				
1	Инструкция пользователя			1
2	Паспорт ДНЛА.942819.020-ПС			1

Дата
отпуска: ____ . ____ . ____ г.

Начальник ОТК:

Личная подпись

Расшифровка
подписи

М.П.

Число, месяц, год

11. Свидетельство об упаковывании

11.1. Упаковка СОР должна соответствовать требованиям ТУ 32.50.50-002-42772550-2018 и комплекту конструкторской документации ДНЛА.942819.СОР.

11.2. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

11.3. СОР упаковываются в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с помещенной внутрь этикеткой.

11.4. Изделия из текстильного материала (сетки, жилеты, ленты) должны быть упакованы в индивидуальные прозрачные полиэтиленовые пакеты.

11.5. Крупногабаритные изделия (Стул для бассейна «G», Стул для бассейна «L»), должны быть обмотаны стрейч-пленкой и упакованы в картонные коробки. Допускается применение вкладышей внутри упаковки.

11.6. Принадлежности должны быть упакованы в полиэтиленовую или воздушно-пузырьковую пленку и уложены в индивидуальные картонные коробки.



Личная подпись



М.П.



Расшифровка
подписи


Число, месяц, год


Перечень СОР


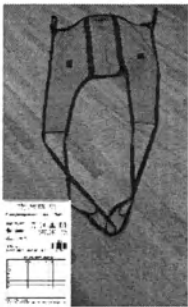
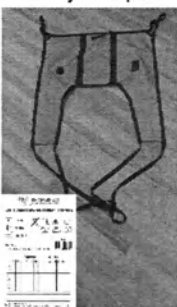
№	СОР	Размер	Артикул	Масса, кг	Габаритные размеры упаковки, см	Размеры СОР, см	Материал	Грузоподъемность
1	Сетка универсальная, высокая 	J	200101	0,7	36x55x5	102x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200102	0,8	36x55x5	107x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200103	0,8	36x55x5	112x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200104	0,9	36x55x5	117x84	Полиэстер 100%	250
		S	200105	1,1	36x55x5	122x88	Полиэстер 100%	250
		M	200106	1,1	36x55x5	127x92	Полиэстер 100%	250
		L	200107	1,1	36x55x5	132x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200108	1,2	36x55x5	137x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200109	1,3	36x55x5	142x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200110	1,4	36x55x5	147x108	Полиэстер 100%	500
2	Сетка универсальная, средняя 	J	200201	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200202	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200203	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200204	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200205	1,1	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200206	1,1	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200207	1,1	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200208	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200209	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200210	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500
3	Сетка универсальная, низкая	J	200301	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250

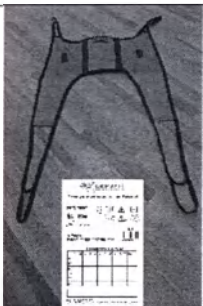
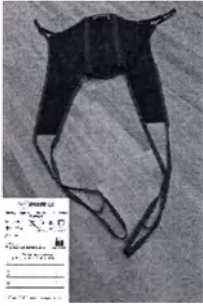
		JS	200302	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200303	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200304	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200305	1,1	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200306	1,1	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200307	1,1	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200308	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200309	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200310	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500
4	Сетка универсальная, высокая (для ванны) 	J	200401	0,7	36x55x5	102x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200402	0,8	36x55x5	107x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200403	0,8	36x55x5	112x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200404	0,9	36x55x5	117x84	Полиэстер 100%	250
		S	200405	0,9	36x55x5	122x88	Полиэстер 100%	250
		M	200406	1,0	36x55x5	127x92	Полиэстер 100%	250
		L	200407	1,0	36x55x5	132x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200408	1,2	36x55x5	137x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200409	1,3	36x55x5	142x104	Полиэстер 100%	250
5	Сетка универсальная, средняя (для ванны) 	XXXL	200410	1,4	36x55x5	147x108	Полиэстер 100%	500
		J	200501	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250
		JS	200502	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200503	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200504	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200505	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200506	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200507	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200508	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
6	Сетка универсальная, низкая (для ванны)	XXL	200509	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200510	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500
		J	200601	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	250

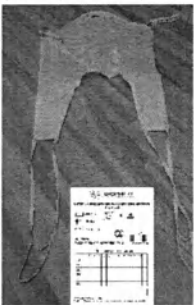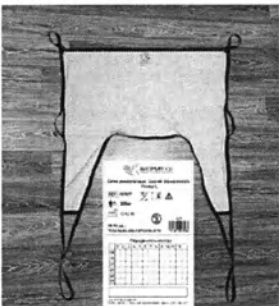	ванны) 	JS	200602	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	250
		JM	200603	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	250
		XS	200604	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	250
		S	200605	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	250
		M	200606	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	250
		L	200607	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	250
		XL	200608	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	200609	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	200610	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	500
7	Сетка универсальная, высокая (одноразовая) 	J	200701	0,7	36x55x5	102x72	Полиэстер 100%	205
		JS	200702	0,8	36x55x5	107x76	Полиэстер 100%	205
		JM	200703	0,8	36x55x5	112x80	Полиэстер 100%	205
		XS	200704	0,9	36x55x5	117x84	Полиэстер 100%	205
		S	200705	0,9	36x55x5	122x88	Полиэстер 100%	205
		M	200706	1,0	36x55x5	127x92	Полиэстер 100%	205
		L	200707	1,0	36x55x5	132x96	Полиэстер 100%	205
		XL	200708	1,2	36x55x5	137x100	Полиэстер 100%	205
		XXL	200709	1,3	36x55x5	142x104	Полиэстер 100%	205
8	Сетка универсальная, средняя (одноразовая) 	XXXL	200710	1,4	36x55x5	147x108	Полиэстер 100%	350
		J	200801	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	205
		JS	200802	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	205
		JM	200803	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	205
		XS	200804	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	205
		S	200805	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	205
		M	200806	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	205
		L	200807	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	205
		XL	200808	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	205
9	Сетка универсальная, низкая	XXL	200809	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	205
		XXXL	200810	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	350
		J	200901	0,7	36x55x5	87x72	Полиэстер 100%	205


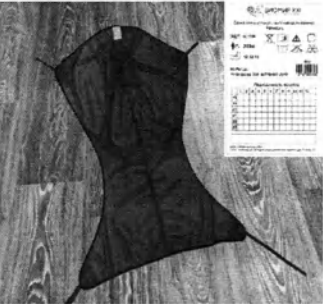
	(одноразовая) 	JS	200902	0,8	36x55x5	92x76	Полиэстер 100%	205
		JM	200903	0,8	36x55x5	97x80	Полиэстер 100%	205
		XS	200904	0,9	36x55x5	102x84	Полиэстер 100%	205
		S	200905	0,9	36x55x5	107x88	Полиэстер 100%	205
		M	200906	1,0	36x55x5	112x92	Полиэстер 100%	205
		L	200907	1,0	36x55x5	117x96	Полиэстер 100%	205
		XL	200908	1,2	36x55x5	122x100	Полиэстер 100%	205
		XXL	200909	1,3	36x55x5	127x104	Полиэстер 100%	205
		XXXL	200910	1,4	36x55x5	132x108	Полиэстер 100%	350
10	Сетка специальная, высокая 	XS	201001	0,9	36x55x5	120x90	Полиэстер 100%	200
		S	201002	0,9	36x55x5	125x93	Полиэстер 100%	200
		M	201003	1,0	36x55x5	130x96	Полиэстер 100%	200
		L	201004	1,0	36x55x5	135x99	Полиэстер 100%	200
		XL	201005	1,2	36x55x5	140x102	Полиэстер 100%	300
		XXL	201006	1,3	36x55x5	145x105	Полиэстер 100%	300
		XXXL	201007	1,4	36x55x5	150x108	Полиэстер 100%	300
11	Сетка специальная, высокая (для ванны) 	XS	201301	0,9	36x55x5	120x90	Полиэстер 100%	200
		S	201302	0,9	36x55x5	125x93	Полиэстер 100%	200
		M	201303	1,0	36x55x5	130x96	Полиэстер 100%	200
		L	201304	1,0	36x55x5	135x99	Полиэстер 100%	200
		XL	201305	1,2	36x55x5	140x102	Полиэстер 100%	300
		XXL	201306	1,3	36x55x5	145x105	Полиэстер 100%	300
		XXXL	201307	1,4	36x55x5	150x108	Полиэстер 100%	300
12	Сетка специальная "Н", высокая	J	201601	0,7	36x55x5	100x60	Полиэстер 100%	250
		JS	201602	0,8	36x55x5	105x65	Полиэстер 100%	250


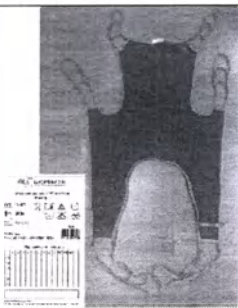
		JM	201603	0,8	36x55x5	110x70	Полиэстер 100%	250
		XS	201604	0,9	36x55x5	115x75	Полиэстер 100%	250
		S	201605	0,9	36x55x5	120x80	Полиэстер 100%	250
		M	201606	1,0	36x55x5	125x85	Полиэстер 100%	250
		L	201607	1,0	36x55x5	130x90	Полиэстер 100%	250
		XL	201608	1,2	36x55x5	135x95	Полиэстер 100%	250
		XXL	201609	1,3	36x55x5	140x110	Полиэстер 100%	250
		XXXL	201610	1,4	36x55x5	145x115	Полиэстер 100%	250
13	Сетка специальная "Н", высокая (для ванны) 	J	201901	0,7	36x55x5	100x60	Полиэстер 100%	250
		JS	201902	0,8	36x55x5	105x65	Полиэстер 100%	250
		JM	201903	0,8	36x55x5	110x70	Полиэстер 100%	250
		XS	201904	0,9	36x55x5	115x75	Полиэстер 100%	250
		S	201905	0,9	36x55x5	120x80	Полиэстер 100%	250
		M	201906	1,0	36x55x5	125x85	Полиэстер 100%	250
		L	201907	1,0	36x55x5	130x90	Полиэстер 100%	250
		XL	201908	1,2	36x55x5	135x95	Полиэстер 100%	250
		XXL	201909	1,3	36x55x5	140x110	Полиэстер 100%	250
		XXXL	201910	1,4	36x55x5	145x115	Полиэстер 100%	250
14	Сетка для туалета, высокая 	XS	202201	0,9	36x55x5	105x84	Полиэстер 100%	200
		S	202202	0,9	36x55x5	110x88	Полиэстер 100%	200
		M	202203	1,0	36x55x5	115x92	Полиэстер 100%	200
		L	202204	1,0	36x55x5	120x96	Полиэстер 100%	200
		XL	202205	1,2	36x55x5	125x100	Полиэстер 100%	200
		XXL	202206	1,3	36x55x5	130x104	Полиэстер 100%	200
		XXXL	202207	1,4	36x55x5	135x108	Полиэстер 100%	300
15	Сетка для туалета, средняя	XS	202301	0,9	36x55x5	105x75	Полиэстер 100%	200
		S	202302	0,9	36x55x5	110x80	Полиэстер 100%	200

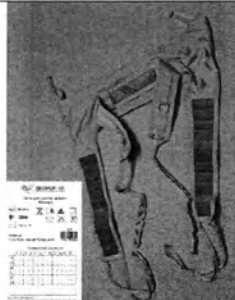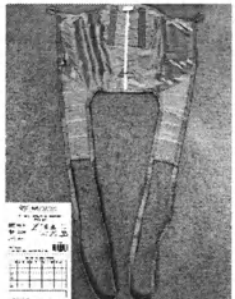
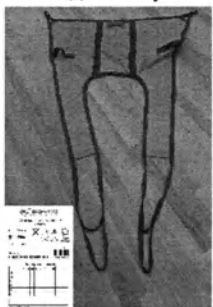
		M	202303	1,0	36x55x5	115x90	Полиэстер 100%	200
		L	202304	1,0	36x55x5	120x95	Полиэстер 100%	200
		XL	202305	1,2	36x55x5	125x100	Полиэстер 100%	200
		XXL	202306	1,3	36x55x5	130x105	Полиэстер 100%	200
		XXXL	202307	1,4	36x55x5	135x110	Полиэстер 100%	300
16	Сетка для ампутантов, высокая 	XS	202401	0,9	36x55x5	119x84	Полиэстер 100%	250
		S	202402	0,9	36x55x5	124x88	Полиэстер 100%	250
		M	202403	1,0	36x55x5	129x92	Полиэстер 100%	250
		L	202404	1,0	36x55x5	131x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202405	1,2	36x55x5	139x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202406	1,3	36x55x5	144x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202407	1,4	36x55x5	149x108	Полиэстер 100%	500
17	Сетка для ампутантов, средняя 	XS	202411	0,9	36x55x5	104x84	Полиэстер 100%	250
		S	202412	0,9	36x55x5	109x88	Полиэстер 100%	250
		M	202413	1,0	36x55x5	114x92	Полиэстер 100%	250
		L	202414	1,0	36x55x5	119x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202415	1,2	36x55x5	124x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202416	1,3	36x55x5	129x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202417	1,4	36x55x5	134x108	Полиэстер 100%	500
18	Сетка для ампутантов, высокая (для ванны)	XS	202501	0,9	36x55x5	119x84	Полиэстер 100%	250
		S	202502	0,9	36x55x5	124x88	Полиэстер 100%	250

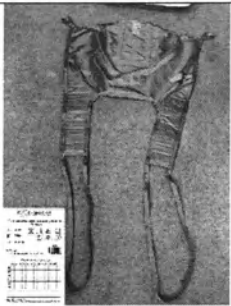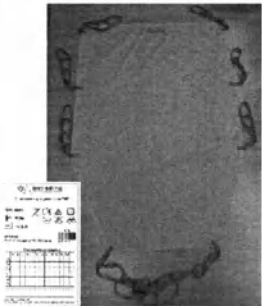		M	202503	1,0	36x55x5	129x92	Полиэстер 100%	250
		L	202504	1,0	36x55x5	131x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202505	1,2	36x55x5	139x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202506	1,3	36x55x5	144x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202507	1,4	36x55x5	149x108	Полиэстер 100%	500
19	Сетка для ампутантов, средняя (для ванны) 	XS	202511	0,9	36x55x5	104x84	Полиэстер 100%	250
		S	202512	0,9	36x55x5	109x88	Полиэстер 100%	250
		M	202513	1,0	36x55x5	114x92	Полиэстер 100%	250
		L	202514	1,0	36x55x5	119x96	Полиэстер 100%	250
		XL	202515	1,2	36x55x5	124x100	Полиэстер 100%	250
		XXL	202516	1,3	36x55x5	129x104	Полиэстер 100%	250
		XXXL	202517	1,4	36x55x5	134x108	Полиэстер 100%	500
20	Сетка многофункциональная "AG" 	-	202611	1,5	36x55x5	202x124	Полиэстер 100%	500


21	Сетка многофункциональная "AG» " (для ванны) 	-	202612	1,2	36x55x5	202x124	Полиэстер 100%	500
22	Сетка многофункциональная "AG" (одноразовая) 	-	202613	0,9	36x55x5	202x124	Полиэстер 100%	500
23	Сетка многофункциональная "AL" 	-	203621	2,2	36x55x5	210x130	Полиэстер 100%	250

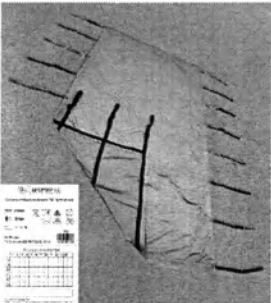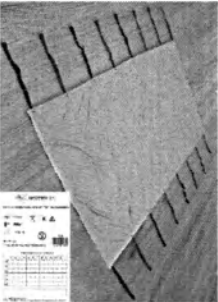
24	Сетка многофункциональная "AL" (для ванны) 	-	203622	1,7	36x55x5	210x130	Полиэстер 100%	250
25	Сетка многофункциональная "AL" (одноразовая) 	-	202623	1,2	36x55x5	210x130	Полиэстер 100%	250
26	Сетка смены положения "AG2" 	-	202631	0,9	36x55x5	210x70	Полиэстер 100%	250


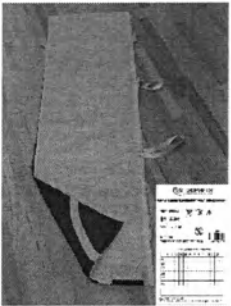
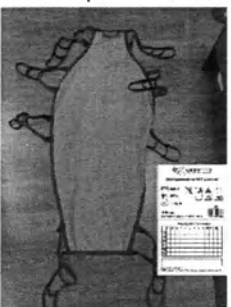
27	Сетка смены положения "AG2" (одноразовая) 	-	202632	0,7	36x55x5	210x70	Полиэстер 100%	250
28	Сетка горизонтальная "AG1" 	-	202641	1,1	36x55x5	178x82	Полиэстер 100%	350
29	Сетка горизонтальная "AG1" (для ванны) 	-	202642	0,9	36x55x5	178x82	Полиэстер 100%	350

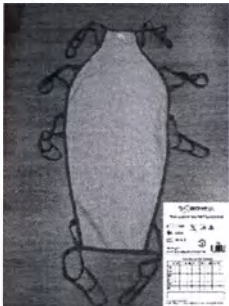
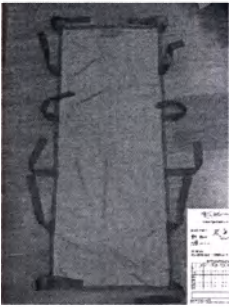
30	Сетка горизонтальная "AG1" (одноразовая) 	-	202643	0,7	36x55x5	178x82	Полиэстер 100%	350
31	Сетка горизонтальная "BG" 	-	202651	1,23	36x55x5	176x72	Полиэстер 100%	250
32	Сетка горизонтальная "BG" (для ванны) 	-	202652	1,0	36x55x5	176x72	Полиэстер 100%	250




33	Сетка горизонтальная "BG" (одноразовая) 	-	202653	0,8	36x55x5	176x72	Полиэстер 100%	250
34	Жилет "G" 	XS	204001	0,9	36x55x5	30x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204002	0,9	36x55x5	35x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204003	1,0	36x55x5	42x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204004	1,0	36x55x5	45x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204005	1,2	36x55x5	48x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204006	1,3	36x55x5	51x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXXL	204007	1,4	36x55x5	54x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250

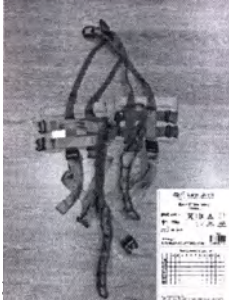
35	Жилет "G" (для ванны) 	XS	204011	0,9	36x55x5	30x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204012	0,9	36x55x5	35x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204013	1,0	36x55x5	42x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204014	1,0	36x55x5	45x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204015	1,2	36x55x5	48x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204016	1,3	36x55x5	51x28	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXXL	204017	1,4	36x55x5	54x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
36	Жилет "H" 	XS	204101	0,9	36x55x5	32x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204102	0,9	36x55x5	37x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204103	1,0	36x55x5	42x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204104	1,0	36x55x5	47x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204105	1,2	36x55x5	52x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204106	1,3	36x55x5	55x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250

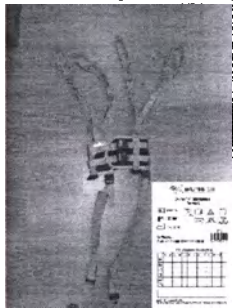		XXXL	204107	1,4	36x55x5	60x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
37	Жилет "Н" (для ванны) 	XS	204111	0,9	36x55x5	32x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		S	204112	0,9	36x55x5	37x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		M	204113	1,0	36x55x5	42x22	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		L	204114	1,0	36x55x5	47x25	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XL	204115	1,2	36x55x5	52x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXL	204116	1,3	36x55x5	55x30	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
		XXXL	204117	1,4	36x55x5	60x35	Полиэстер 100%, Стеклонаполненный нейлон	250
38	Жилет "Н", детский 	J	204201	0,7	36x55x5	65x25	Полиэстер 100%	250
		JS	204202	0,8	36x55x5	70x25	Полиэстер 100%	250
		JM	204203	0,8	36x55x5	75x30	Полиэстер 100%	250
		S	204204	0,9	36x55x5	80x35	Полиэстер 100%	250

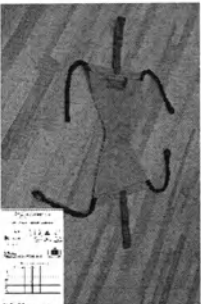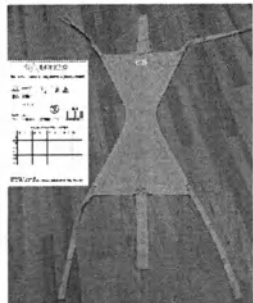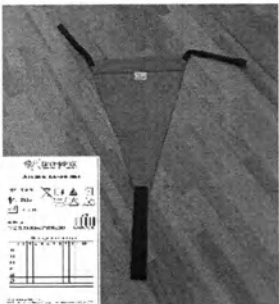
		М	204205	0,9	36x55x5	85x38	Полиэстер 100%	250
39	Лента смены положения, широкая 	-	205311	0,6	36x55x5	60x40	Полиэстер 100%	250
40	Лента смены положения, широкая (одноразовая) 	-	205312	0,4	36x55x5	60x40	Полиэстер 100%	250
41	Лента смены положения, узкая 	-	205321	0,4	36x55x5	60x20	Полиэстер 100%	250

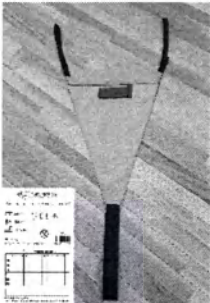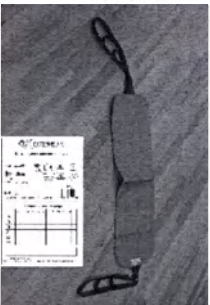
42	Лента смены положения, узкая (одноразовая) 	-	205322	0,3	36x55x5	60x20	Полиэстер 100%	250
43	Лента поддерживающая, широкая 	-	205331	0,6	36x55x5	120x25	Полиэстер 100%	250
44	Лента поддерживающая, широкая (одноразовая) 	-	205332	0,4	36x55x5	120x25	Полиэстер 100%	250

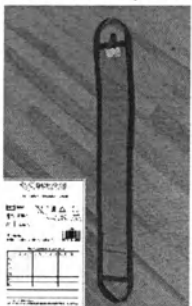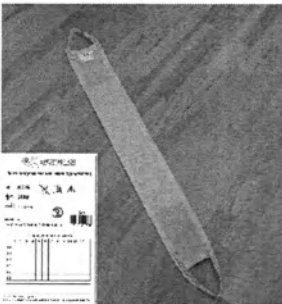
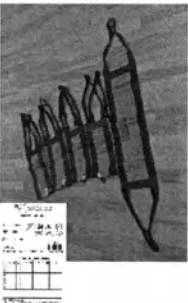
45	Лента поддерживающая, узкая 	-	205341	0,4	36x55x5	120x12	Полиэстер 100%	250
46	Лента поддерживающая, узкая (одноразовая) 	-	205342	0,3	36x55x5	120x12	Полиэстер 100%	250
47	Лента специальная "А" 	-	205351	1,2	36x55x5	57,5x15,5	Полиэстер 100%	250

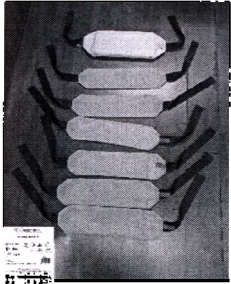48	Лента специальная "B" 	-	205352	1,5	36x55x5	57,5x15,5	Полиэстер 100%	250
49	Стул для бассейна "G" 	-	206111	28	85x65x185	80x60x180	Нержавеющая сталь aisi 304, Пластик ABS, Стеклонаполненный нейлон	250
50	Стул для бассейна "L" 	-	206115	12,4	85x65x185	80x60x180	Нержавеющая сталь aisi 304, Пластик ABS, Стеклонаполненный нейлон	250

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

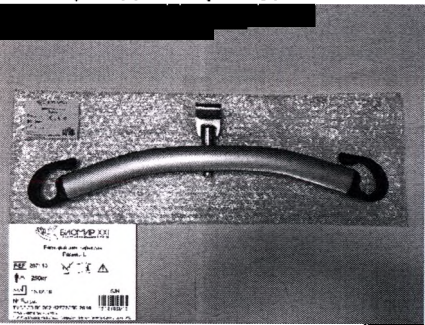№	Наименование	Размер	Артикул	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Материал	Грузоподъемность
1	Распорка 	S	207101	1,35	470x130x120	Алюминий АД31	250
		M	207102	1,6	570x150x120	Алюминий АД31	250
		L	207103	1,8	670x190x120	Алюминий АД31	250
2	Распорка для перекида 	S	207111	1,35	470x130x120	Алюминий АД31	250
		M	207112	1,6	570x150x120	Алюминий АД31	250
		L	207113	1,8	670x190x120	Алюминий АД31	250

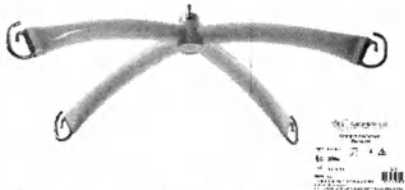3	Распорка с четырехточечным креплением		S	207201	1,5	470x130x120	Нержавею щая сталь aisi 304	350
			M	207202	1,8	570x150x120	Нержавею щая сталь aisi 304	350
			L	207203	2,2	670x190x120	Нержавею щая сталь aisi 304	350
4	Распорка Х-образная		M	207301	6	590x570x220	Нержавею щая сталь aisi 304	250
			L	207302	8,8	930x640x290	Нержавею щая сталь aisi 304	500
5	Распорка Н-образная		-	207401	8	700x700x300	Алюминий АД31	350

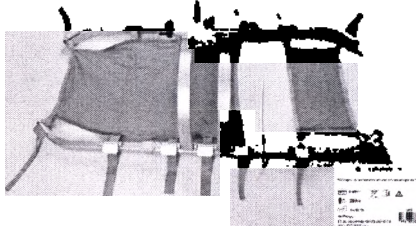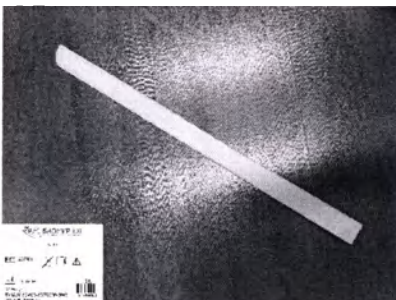6	Распорка для горизонтального перемещения "А" 	-	207501	10,9	1630x930x180	Нержавею щая сталь aisi 304	350
7	Распорка для горизонтального перемещения "В" 	-	207601	11	1645x945x180	Алюминий АД31	350
8	Стик 	-	207701	0,3	50x800x5	Пластик ABS	-

Требования совместимости СОТ и принадлежностей с различными системами для
подъема и перемещения пациентов

№	Требование
1	Распорки используемых Систем для подъема и перемещения совместимы с предоставленными вариантами подвеса выбранных СОТ.
2	Распорки и другие устройства для крепления СОТ имеют надежное крепление для лямок, ремней и других присоединительных элементов СОТ.
3	При согласованном применении СОТ и принадлежностей с различными системами для подъема и перемещения пациентов, максимальная грузоподъемность определяется по наименьшему значению максимальной грузоподъемности применяемых компонентов
4	Система для подъема и перемещения имеет регистрационное удостоверение, сертификат качества или другой документ, подтверждающий качество и надежность.

При документальном соблюдении вышеизложенных пунктов, сотрудники компании «Биомир XXI» обязаны фактически их подтвердить, чтобы обеспечить полностью безопасную комбинацию. Если все требования выполняются, то можно использовать СОТ и Принадлежности с другими Системами для подъема и перемещения после согласования с производителем.

Всего прошито и скреплено печатью

33 (тридцать три) листов

Генеральный директор *Иванов ИВ*

