

Инструкция по применению Перцовый пластырь

Описание

Полоска ткани прямоугольной формы с перфорацией или без перфорации со слоем пластырной массы от желто-бурого до коричневого цвета, своеобразного запаха, покрытая сверху защитным слоем из силиконизированной бумаги следующих размеров:

Ширина, см	Длина, см
4,0±0,2	10,0±0,2
6,0±0,2	10,0±0,2
10,0±0,2	18,0±0,5
12,0±0,3	18,0±0,5

Показания к применению

Явления радикулита, остеохондроза, миозитов и миалгии, напряжение мышц после длительного физического воздействия, суставные боли.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря.

Способ применения

Наружно. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают и протирают насухо. С пластыря снимают защитную пленку, предохраняющую клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают.

Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения. При сильном жжении пластырь снимают и кожу смазывают кремом.

Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Применение при беременности и лактации

Не запрещено применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, жжение в области аппликации.

Форма выпуска

Перцовый пластырь упаковывают в индивидуальную упаковку – контурную безъячейковую упаковку по 1 штуке или в виде ленты от 2 до 200 штук.

Перцовый пластырь в индивидуальной упаковке одного типоразмера с перфорацией или без перфорации помещают по 10-400 штук в *промежуточную упаковку* – пачки складные из картона (шоу-боксы) или пачки складные из картона, или пеналы из пластмассы, или пакеты с клапаном, или в *групповую упаковку* – стопы из бумаги мешочной, на которую склеивают этикетку из бумаги для печати офсетной, или в пленку полиэтиленовую термоусадочную с вложенной этикеткой из бумаги для печати офсетной.

По 10-150 штук перцового пластыря в индивидуальной упаковке оклеивают этикеткой-бандеролью и помещают в пачку из картона.

Перцовый пластырь в индивидуальной упаковке в виде наборов от 2 до 100 шт. одного или различных типоразмеров с перфорацией или без перфорации помещают в пачки складные с европодвесом (или без) или пакеты с клапаном.

Допускается для контроля первого вскрытия заклеивать верхние и нижние клапаны пачки складной с европодвесом самоклеющимися этикетками.

Условия хранения

В сухом месте. Пластырь без индивидуальной упаковки хранить в сухом, защищенном от света месте.

Гарантийный срок годности – 3 года.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ОАО «Новосибхимфарм»

630028, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275

тел. (383) 363-32-44; факс (383) 363-32-55

