

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТОМСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГУП «Томское ПрОП» Минздравсоцразвития России)**

УТВЕРЖДАЮ

**Директор
ФГУП «Томское ПрОП»
Минздравсоцразвития России**

Пеленицын Д.Г.

«16» марта 2011 года

**ПРОТЕЗ ГОЛЕНИ С ГЛУБОКОЙ ПОСАДКОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПНЗ-41
ТУ 9396-093-55220088-2009
Памятка по пользованию
(Руководство по эксплуатации)**

Протез голени с глубокой посадкой деревянный ПНЗ-41 (далее – протез) предназначен для протезирования людей всех половозрастных групп после односторонней или двухсторонней ампутации нижних конечностей. Протез назначается на культю голени конической, цилиндрической или умеренно булавидной формы на уровне верхней, средней или границы средней и нижней трети.

Протез является изделием индивидуального изготовления, выпускается в правом и левом исполнении.

1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Протез состоит из приемной гильзы, изготовленной из древесины ивы белой, щиколотки, искусственной стопы, кожаной гильзы бедра с шинами, пояса с капками и пряжками.

Гильза бедра выполняется из кожи шорно-седельной вида К, внутри выклеена подкладкой из юфти шорно-седельной толщиной 1-1,2мм. Шины стальные с коленным шарниром. Стопа пенополиуретановая. Шнуровка на гильзе бедра располагается по передней поверхности.

2 НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕЗОМ

2.1 На протез надевают чулок или носок, затем обувь, на культю – чехол предохранительный.

2.2 Разместить культю в полости приемной гильзы. Надеть протез в положении сидя и зафиксировать шнуровкой на гильзе бедра

2.3 Проверить в положении стоя удобство размещения культи в приемной полости гильзы и надежность крепления и достаточность удержания протеза креплением. В положении «стоя» осуществить несколько небольших по амплитуде сгибательных и разгибательных движений в коленных шарнирах. Движения в коленных шарнирах должны быть свободны и сопряжены с движениями в коленном суставе.

2.4 Приемная гильза и крепление протеза не должны оказывать болевого воздействия на мягкие ткани и костные выступы культи.

2.5 Проверить при ходьбе в обуви с заданной высотой каблука проверить правильность нагружения культи, ритмичность походки.

3 УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ

3.1 Протез необходимо оберегать от поломок и деформации

3.2 Внутренние полости приемной гильзы голени и гильзы бедра, периодически, не реже одного раза в неделю, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств с последующей просушкой на открытом воздухе..

3.3 После пользования в дождливую погоду в случае если стопа и обувь промокли, необходимо снять обувь, а протез протереть и высушить.

3.4 Не рекомендуется хранить протез вблизи источника тепла, сушить на солнце.

3.3 Элементы крепления следует предохранять от попадания влаги.

4 УХОД ЗА КУЛЬТЕЙ

Ежедневно, после ходьбы на протезе, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов культы и бедра, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан легкий массаж культы снизу вверх для улучшения венозного оттока, гигиеническая гимнастика (сокращение мышц культы имитирующие движения отсутствующей стопы), обработка кожи культы защитными питательными кремами и лосьонами.

5 РЕМОНТ ПРОТЕЗА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение семи месяцев при условии правильной эксплуатации.

5.2 Самостоятельная разборка и ремонт запрещены.

5.3 При возникновении неполадок в протезе (появление люфтов, поломка стопы, элементов крепления и др.) необходимо обратиться в ФГУП «Томское ПрОП», Минздравсоцразвития России по адресу: 634029, г.Томск, пр. Фрунзе, д. 5.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОТЕЗА


В комплект поставки протеза входит:

- протез – 1 шт.;
- чехол трикотажный шерстяной - 4 шт.;
- памятка по пользованию- 1 экз.

Пронумеровано, пронумеровано

3 листа

Директор

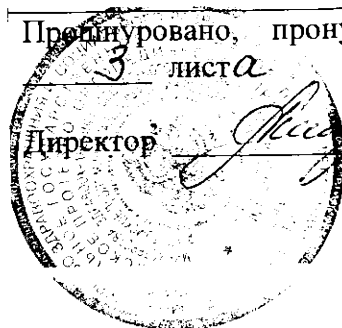

Д.Г. Пеленицын