

Закрытое Акционерное Общество

«Завод Белмединструменты»

225730, Республика Беларусь, Пинский
район, д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31В
УНП 291235525
Тел, факс (0165) 68-09-41, 67-35-05
zbmi@medtehnika.by

BY97BLBB30120291235525001001 в ЦБУ
№406 ОАО «Белинвестбанк»
г. Пинск, ВІС BLBBBY2X
г. Пинск, ул. Первомайская, д. 16



Утверждаю
Директор
Мемех А.К.

05.06.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Набор инструментов ручных дентальных для терапевтической стоматологии»

производства ЗАО «Завод Белмединструменты», Республика Беларусь

Версия 02
июнь
2020 г.

Содержание:

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия.....	3
2. Производитель	7
3. Назначение	7
4. Функциональные характеристики.....	7
5. Показания, противопоказания, побочные эффекты, риски	9
6. Технические характеристики.....	9
7. Принадлежности	63
8. Содержание материалов животного или человеческого происхождения, лекарственных средств	64
9. Ввод изделия в эксплуатацию, порядок работы	64
9.1. Требования к помещениям	64
9.2. Очистка, дезинфекция	64
9.3. Стерилизация	65
10. Инструкция по повторной обработке и стерилизации.....	65
11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту.....	66
12. Условия транспортировки и хранения.....	66
14. Безопасные комбинации с другими медицинскими изделиями.....	67
15.7. Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 ГП-980-9.....	Ошибка! Закладка не определена.
16. Упаковка и маркировка изделия	72
16.2. Маркировка индивидуальной упаковки для РФ	73
16.3. Транспортная упаковка	74
17. Порядок осуществления утилизации и уничтожения	74
18. Международные стандарты	74
19. Гарантийные обязательства	75

1. Наименование медицинского изделия

Медицинское изделие «Набор инструментов ручных дентальных для терапевтической стоматологии».

варианты исполнения:

1. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-1 ЮП, в составе:

- 1.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ТР-4000-1-1 ЮП;
- 1.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ТР-4000-1-2 ЮП;
- 1.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ТР-4000-1-3 ЮП;
- 1.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ТР-4000-1-4 ЮП;
- 1.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.

2. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-2 ЮП, в составе:

- 2.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-СР-4000-2-1 ЮП;
- 2.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-СР-4000-2-2 ЮП;
- 2.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-СР-4000-2-3 ЮП;
- 2.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-СР-4000-2-4 ЮП;
- 2.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.

3. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-3с-ЮП, в составе:

- 3.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ПР-4000-3-1с ЮП;
- 3.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ПР-4000-3-2с ЮП;
- 3.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ПР-4000-3-3с ЮП;
- 3.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ПР-4000-3-4с ЮП;
- 3.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.

4. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-1 ЮП, в составе:

- 4.1. Зонд зубной изогнутый 30-3 МП;
- 4.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой СР-100-2 МП;
- 4.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ТР-4000-1-1 ЮП;
- 4.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ТР-4000-1-2 ЮП;
- 4.5. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ТР-4000-1-3 ЮП;
- 4.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ТР-4000-1-4 ЮП;
- 4.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП;
- 4.8. Экскаватор №2-105-5 МП;
- 4.9. Экскаватор двухсторонний с круглой ручкой №3-105-6 МП;
- 4.10. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.

5. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-2 ЮП, в составе:

- 5.1. Зонд зубной изогнутый СР-9000-2-1 ЮП;
- 5.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой СР-9000-2-2 ЮП;
- 5.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-СР-4000-2-1 ЮП;
- 5.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-СР-4000-2-2 ЮП;
- 5.5. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-СР-4000-2-3 ЮП;
- 5.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-СР-4000-2-4 ЮП;
- 5.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП;
- 5.8. Экскаватор №2-СР-9000-2-3 ЮП;

5.9. Экскаватор двухсторонний №3-СР-9000-2-4 ЮП;

5.10. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.

6. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-3с ЮП, в составе:

6.1. Зонд зубной изогнутый ПР-9000-3-1с ЮП;

6.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой ПР 900-3-2с ЮП;

6.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ПР-4000-3-1с ЮП;

6.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ПР-4000-3-2с ЮП;

6.5. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ПР-4000-3-3с ЮП;

6.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ПР-4000-2-4с ЮП;

6.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП;

6.8. Экскаватор №2-ПР-9000-3-3с ЮП;

6.9. Экскаватор двухсторонний №3-ПР-9000-3-4с ЮП;

6.10. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.

7. Набор инструментов для пломбирования 9000-4 ЮП, в составе:

7.1. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой 100-2 МП;

7.2. Штопфер-гладилка №1-10-5 МП4;

7.3. Штопфер-гладилка №2-10-6 МП;

7.4. Штопфер-гладилка №3-10-7 МП;

7.5. Гладилка с круглой головкой №4-10-3 МП;

7.6. Штопфер-гладилка №5-0-11 МП;

7.7. Гладилка двухсторонняя серповидная-дистальная №6-10-2 МП;

7.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП;

7.9. Шпатель двухсторонний для цемента 102-3 МП;

7.10. Зонд зубной изогнутый 30-3 МП;

7.11. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.

8. Набор инструментов для пломбирования 9000-5 ЮП

8.1. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой СР 9000-2-2 ЮП;

8.2. Штопфер-гладилка №1-СР-9000-5-1 ЮП;

8.3. Штопфер-гладилка №2-СР-9000-5-2 ЮП;

8.4. Штопфер-гладилка №3-СР-9000-5-3 ЮП;

8.5. Гладилка с круглой головкой №4-СР- 9000-5-4 ЮП;

8.6. Штопфер-гладилка №5-СР-9000-5-5 ЮП;

8.7. Гладилка двухсторонняя серповидная дистальная №6-СР- 9000-5-6 ЮП;

8.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП;

8.9. Шпатель двухсторонний для цемента СР-9000-5-7 ЮП;

8.10. Зонд зубной изогнутый СР- 9000-2-1 ЮП;

8.11. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.

9. Набор инструментов для пломбирования 9000-6с ЮП в составе:

9.1. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой ПР 9000-3-2с ЮП;

9.2. Штопфер-гладилка №1- ПР-9000-6-1с ЮП;

9.3. Штопфер-гладилка №2-ПР-9000-6-2с ЮП;

9.4. Штопфер-гладилка №3-ПР-9000-6-3с ЮП;

9.5. Гладилка с круглой головкой №4-ПР-9000-6-4с ЮП;

9.6. Штопфер-гладилка №5-ПР-9000-6-5с ЮП;

9.7. Гладилка двухсторонняя серповидная-дистальная №6-ПР-9000-6-6с ЮП;

9.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП;

9.9. Шпатель двухсторонний для цемента ПР-9000-6-7с ЮП;

- 9.10. Зонд зубной изогнутый ПР-9000-3-1с ЮП;
- 9.11. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.

10. Набор инструментов для моделирования пломб 5000-1 ЛМП, в составе:

- 10.1. Гладилка точного моделирования СР-5000-1-1 ЛМП;
- 10.2. Штопфер точного моделирования СР-5000-1-2 ЛМП;
- 10.3. Зонд закругленный-штопфер конусообразный сверхточного моделирования СР-5000-1-3 ЛМП;
- 10.4. Штопфер для микрополостей СР-5000-1-4 ЛМП;
- 10.5. Инструмент для удаления излишков композита СР-5000-1-5 ЛМП;
- 10.6. Кассета стерилизационная КССМ-4-5001 ЮП;

11. Набор инструментов для моделирования пломб 5000-2с ЮП, в составе:

- 11.1. Гладилка точного моделирования ПР-5000-2-1с ЮП;
- 11.2. Штопфер точного моделирования ПР-5000-2-2с ЮП;
- 11.3. Зонд закругленный-штопфер конусообразный сверхточного моделирования ПР- 5000-2-3с ЮП;
- 11.4. Штопфер для микрополостей ПР-5000-2-4с ЮП;
- 11.5. Инструмент для удаления излишков композита ПР-5000-2-5с ЮП;
- 11.6. Кассета стерилизационная КССМ-4-5001 ЮП

12. Набор для раббердама 200 ЮП, в составе:

- 12.1. Кламмер 2510-9 ПП;
- 12.2. Кламмер 2512-212 ПП;
- 12.3. Кламмер 2513-210 ПП;
- 12.4. Кламмер 2515-0 ПП;
- 12.5. Кламмер 2517-1 ПП;
- 12.6. Кламмер 2520-2А ПП;
- 12.7. Кламмер 2532-7 ПП;
- 12.8. Кламмер 2534-8 ПП
- 12.9. Кламмер 2536-8А ПП;
- 12.10. Кламмер 2540-14 ПП;
- 12.11. Кламмер 2543-14А ПП;
- 12.12. Кламмер 2547-202 ПП,
- 12.13. Кламмер 2548-205 ПП;
- 12.14. Щипцы-пробойник для раббердама 170мм-2502 ПП;
- 12.15. Рамка для раббердама 2500 ПП;
- 12.16. Щипцы для наложения кламмеров 175мм-2507 ПП;
- 12.17. Щипцы для установки пружинных держателей кольца 200-1 ЮП.

13. Набор зеркал стоматологических и ручек к зеркалам 1900 ПП-ЮП, в составе:

- 13.1. Зеркало 1903 ПП,
- 13.2. Зеркало 1905 ПП,
- 13.3. Зеркало 1907 ПП,
- 13.4. Зеркало 1908 ПП,
- 13.5. Зеркало 1909 ПП;
- 13.6. Ручка 100-2 МП,
- 13.7. Ручка 1900 ПП,
- 13.8. Ручка 100-1 СП,
- 13.9. Ручка фиолетовая 1907 ЮП,
- 13.10. Ручка коричневая 1908 ЮП;
- 13.11. Ручка синяя 1909 ЮП;

- 13.12. Ручка черная 1910 ЮП;
- 13.13. Зеркало с ручкой 9008-8-2;
- 13.14. Кассета стерилизационная КСД-10-9010 ЮП.

14. Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП, в составе:

- 14.1. Гладилка двухсторонняя №3-1410 ПП;
- 14.2. Гладилка двухсторонняя №4-425.014 ПП
- 14.3. Гладилка двухсторонняя №5-1412 ПП;
- 14.4. Гладилка двухсторонняя №6-1463-2 ПП;
- 14.5. Гладилка серповидная 10-4 МП;
- 14.6. Гладилка шаровидная 10-1 СП;
- 14.7. Гладилка 10-13 ЮП;
- 14.8. Штопфер-гладилка: №1-10-8 СП;
- 14.9. Штопфер-гладилка №1-10-5 МП;
- 14.10. Штопфер-гладилка №2-10-6 МП;
- 14.11. Штопфер-гладилка №3-10-7 МП;
- 14.12. Штопфер-гладилка №2-10-9 СП;
- 14.13. Штопфер-гладилка №3-10-10 СП;
- 14.14. Штопфер-гладилка №5-10-10 МП;
- 14.15. Штопфер-гладилка 10-12 ЮП;
- 14.16. Зонд изогнутый L= 15-30-1 СП;
- 14.17. Зонд изогнутый L= 20-30-2 СП;
- 14.18. Зонд изогнутый 30-3 МП;
- 14.19. Зонд серповидный 30-4 МП;
- 14.20. Зонд штыковидный 30-5 МП
- 14.21. Зонд диагностический угловой 1480-10 ПП;
- 14.22. Зонд диагностический угловой 1801 ПП;
- 14.23. Зонд периодонтальный с делениями 1497 ПП;
- 14.24. Зонд угловой 1472-2;
- 14.25. Зонд изогнутый 9000-8-1 ЮП
- 14.26. Экскаватор №1-105-1 СП,
- 14.27. Экскаватор №2-105-2 СП,
- 14.28. Экскаватор №3-105-3 СП,
- 14.29. Экскаватор №1-105-4 МП,
- 14.30. Экскаватор №2-105-5 МП,
- 14.31. Экскаватор №3-105-6 МП,
- 14.32. Экскаватор №4-105-7 МП,
- 14.33. Экскаватор для размягченного дентина 0,8 мм-1860 ПП,
- 14.34. Экскаватор для размягченного дентина 0,8 мм-1861 ПП,
- 14.35. Экскаватор для размягченного дентина 1,4 мм-1859 ПП;
- 14.36. Экскаватор для размягченного дентина с силиконом 904.030 ПП;
- 14.37. Пинцет изогнутый с насечкой 80-1 СП;
- 14.38. Пинцет изогнутый с насечкой 150мм-2422 ПП
- 14.39. Матрицедержатель 108 МП;
- 14.40. Экран защитный стоматологический со сменными плитками 1000-1;
- 14.41. Шпатель для языка двухсторонний прямой 103-1 МП;
- 14.42. Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 ГП-980-9.

2. Производитель

Закрытое акционерное общество «Завод Белмединструменты», ЗАО «Завод Белмединструменты», Республика Беларусь, 225730, Брестская область, Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31 В
тел. +375 (0165) 68 09 41
тел./факс+375 (0165) 67-35-05
zbmi@medtehnika.by

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ВладМиВа», ООО «ТД ВладМиВа», 308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, д. 118,
Тел.: (4722) 200-555
Факс: (4722) 31-59-03,
market@vladmiva.ru

3. Назначение

Медицинское изделие предназначено для обследования, лечения и пломбирования зубов.

Потенциальный потребитель:

Подготовленный профессиональный медицинский персонал, обладающий навыками работы со стоматологическими терапевтическими инструментами.

4. Функциональные характеристики

Область применения медицинского изделия: Терапевтическая стоматология

Внимание! Изделие не предназначено для использования в бытовых целях.

Изделие представляет собой наборы инструментов, упакованные в стерилизационные кассеты, стерилизационные коробки или в пластиковые ячейковые поддоны с крышкой.

Наборы состоят из следующих инструментов:

Инструмент для снятия зубных отложений (часто называют «очиститель») представлен следующими типами: серповидный, желобоватый, копьевидный, долотообразный-клиновидный. Эти инструменты имеют острые рабочие части, предназначены для удаления минерализованных зубных отложений.

Пинцет зубной изогнутый состоит из двух пластин, сваренных на одном конце, от которого рабочие ветви (бранши) пинцета расходятся под некоторым углом. Концы браншей (губки) являются рабочей частью; ими захватываются и удерживаются вспомогательные материалы и инструменты. Стоматологический пинцет, рабочая часть которого имеет изогнутую форму и позволяет проводить манипуляции в труднодоступных местах. Также с помощью данного прибора проверяется устойчивость больного зуба.

Экскаваторы это двусторонние стоматологические инструменты, имеющие на концах острые кончики, ложечки, обращенные рабочей поверхностью в разные стороны. В зависимости от формы рабочей части используются для извлечения из кариозной полости зуба пищевых остатков, размягченных слоев дентина, для удаления отложений на зубах, а также для обработки зубодесневых карманов.

Зонд зубной это терапевтический инструмент, который используется для обнаружения кариозных полостей, определения расположения устьев каналов. Выполнен в виде тонкого стержня с ручкой и рабочим концом. Широко применяется в диагностике, обычно используется вместе с зеркалом стоматологическим. Зонд периодонтальный с нанесенными линейными делениями имеет притупленный кончик и используется для обследования патологических зубодесневых карманов. Стоматологический зонд, выполняющий целый ряд функций: выявление

неровностей и других дефектов на поверхности зубов, оценка их состояния (плотности, глубины, размера, степени болезненности).

Зеркало стоматологическое - состоит из круглой, зеркальной поверхности в металлической оправе и стержня, навинчивающегося на ручку. Зеркала в наборах представлены выпуклыми, увеличивающими изображение рассматриваемого объекта, и плоскими, которые дают истинное отображение. С помощью зеркала дополнительно освещают место работы и рассматривают недоступные прямому зрению участки слизистой оболочки или зубы. При осмотре зеркало также служит для отведения и удержания мягких тканей и для проведения интраоральной фотосъемки. Конструкция зеркала включает зеркальное полотно с держателем и ручку.

Штопфер-гладилка – двусторонний инструмент, одна рабочая часть которого представлена в виде штопфера, другая - в виде гладилки. Штопфер служит для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости, гладилка - инструмент для формирования пломб, внесения лекарственных препаратов в кариозные полости

Штопфер для микрополостей предназначен для ретроградного пломбирования корневого канала. **Инструмент для удаления излишков композита** состоит из ручки, обе рабочие части инструмента изогнуты. Удаляет излишки композитов.

Кламмеры, Щипцы-пробойник - Барабан, закрепленный на одной из branшей пробойника, может вращаться вокруг своей оси. На барабане есть 5 сквозных отверстий разного диаметра для формирования в латексном платке перфораций под различные группы зубов,

Рамка для раббердама, Щипцы для наложения кламмеров удобно фиксируются в ладони и надежно удерживают в растянутом положении любой кламмер. Для снижения физической нагрузки в процессе установки кламмеров на изолируемые зубы, на щипцах имеется рамка-фиксатор, свободно передвигающаяся по ручкам щипцов между их изгибом и центральным фиксирующим винтом.

Щипцы для установки пружинных держателей кольца служат для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения.

Матрицедержатель (тип Тоффльмайра) - инструмент для фиксации матрицы на зубе, состоит из винта и щели для вставления матрицы. Матрицедержатель существенно облегчает работу стоматолога во время проведения реставраций пораженных кариесом зубных тканей. Разработка позволяет легко и быстро вставить матрицу в промежутках между зубами. Матрицедержатель совместим с большинством известных матриц, применяемых в стоматологии — металлических и лавсановых, контурных и прямых пластин.

Аппарат работает на основе двух винтов, с помощью которых происходит наложение и закрепление матрицы. Чтобы вставить в матрицедержатель матрицу, необходимо открыть отверстие посредством кручения первого винта, аналогичным образом зафиксировать ее в устройстве, далее подвести к больному зубу и зафиксировать матрицу на нужном участке с помощью второго винта.

Экран защитный стоматологический – применяется для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врачей стоматологов, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением. Основные части изделия — это оправа, обруч для крепления на голове врача и 10 сменных обзорных прозрачных щитков.

Шпатель (двухсторонний для цемента) – состоит из ручки, на обоих концах которой имеются удлиненные прямые лопаточки. С помощью шпателя смешивают, замешивают пломбировочные материалы.

Шпатель для языка двухсторонний прямой - инструмент, используемый для осмотра полости рта и процедур лечебного и профилактического характера

Кассеты стерилизационные предназначены для хранения и стерилизации инструментов, разложенных в ней в ячейковые отсеки из жаростойкого силикона на достаточном для эффективной стерилизации расстоянии друг от друга. Кассеты изготовлены из коррозионностойкой стали и жаропрочного силикона. Простерилизованный в кассетах инструмент должен быть доставлен к месту непосредственно перед применением.

Коробки стерилизационные предназначены для размещения в них и стерилизации в паровом автоклаве стоматологического инструмента.

Перед стерилизацией необходимо крышку коробки закрыть на замки; круговой бандаж передвинуть с помощью ручки так, чтобы вентиляционные отверстия были открыты, и зафиксировать замком. По окончании процесса стерилизации бандаж необходимо передвинуть в положение с закрытыми вентиляционными отверстиями. Коробки обеспечивают стерильное хранение в течение 3 суток

5. Показания, противопоказания, побочные эффекты, риски

Изделие показано в случае необходимости проведения процедур обследования, лечения и пломбирования зубов.

Противопоказания: отсутствуют

Возможные побочные действия: при условии, что соблюдаются все меры предосторожности, нет никаких побочных действий и нежелательных реакций

Риски, меры предосторожности:

Риски, связанные со всеми идентифицированными опасными ситуациями, были рассмотрены. Для каждого фактора риска исходно оцененного как «Условно приемлемый» были определены меры по управлению риском.

Распознанные риски были снижены настолько, что остаточный риск является приемлемым. Действенность мероприятий по снижению рисков доказана проведенными испытаниями и задокументирована (см. Отчет об управлении рисками P-02T-2019 от 10.05.2019), риски находятся в допустимых границах.

Остаточные риски перечислены и указаны, как

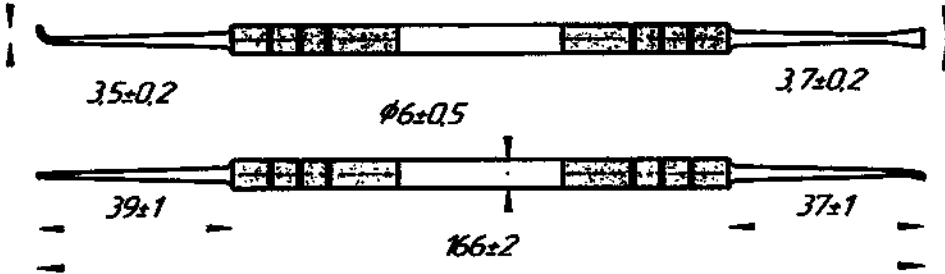
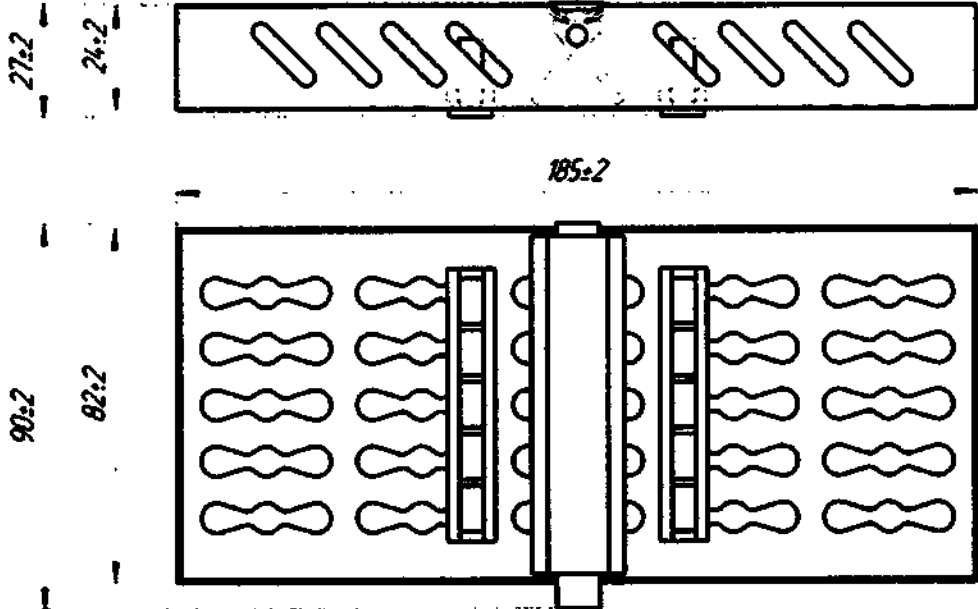
«Меры предосторожности»:

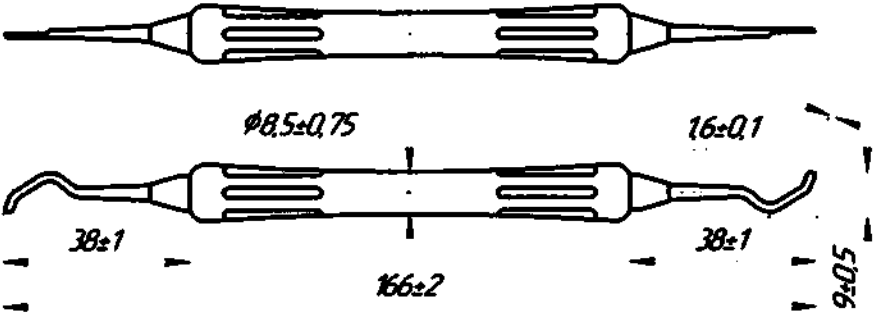
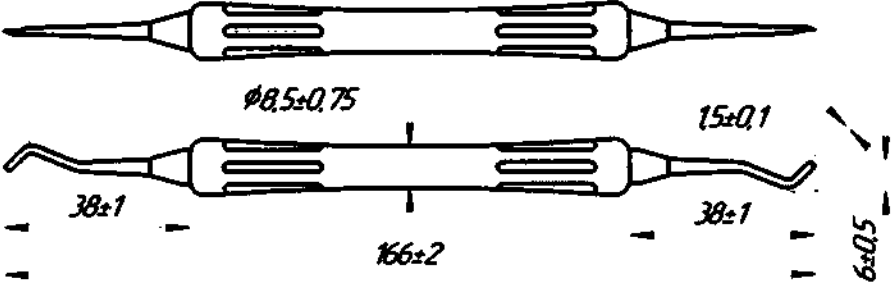
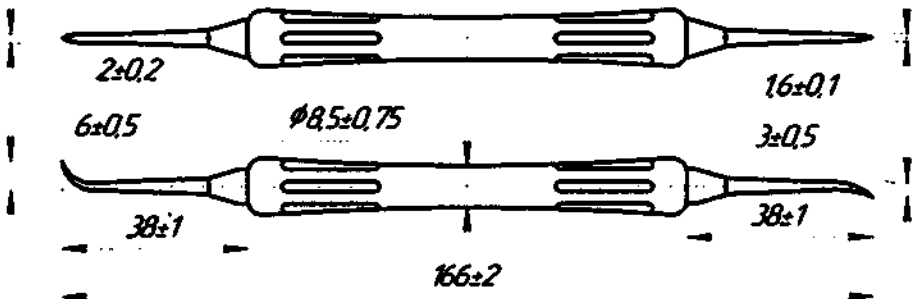
- Перед использованием ознакомьтесь с Инструкцией по применению.
- Инструменты следует применять строго по их назначению только подготовленным профессиональным медицинским персоналом.
- Не рекомендуется растягивать кламмеры более чем на 1,5мм относительно ширины зуба. Приложение чрезмерного усилия при растяжении кламмера может привести к его поломке.
- Изделие поставляется нестерильным. Перед первым применением и после каждого использования требуется процедура очистки, дезинфекции и стерилизации с соблюдением методов и режимов, указанных в разделе «Стерилизация». (За исключением: Экран защитный стоматологический со сменными щитками 1000-1 из набора Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП;
- Перед применением необходимо осмотреть инструменты на предмет отсутствия механических повреждений. (При наличии трещин, вмятин, сколов инструмент подлежит утилизации).

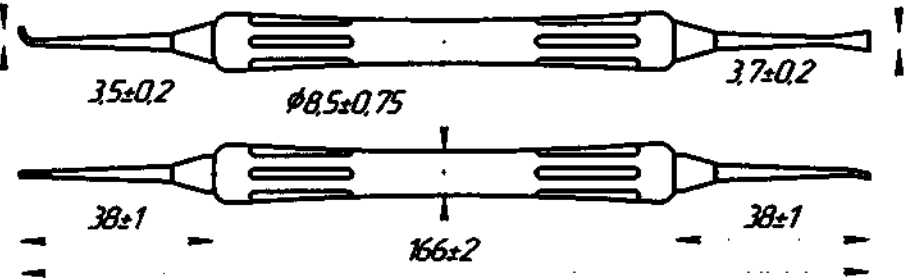
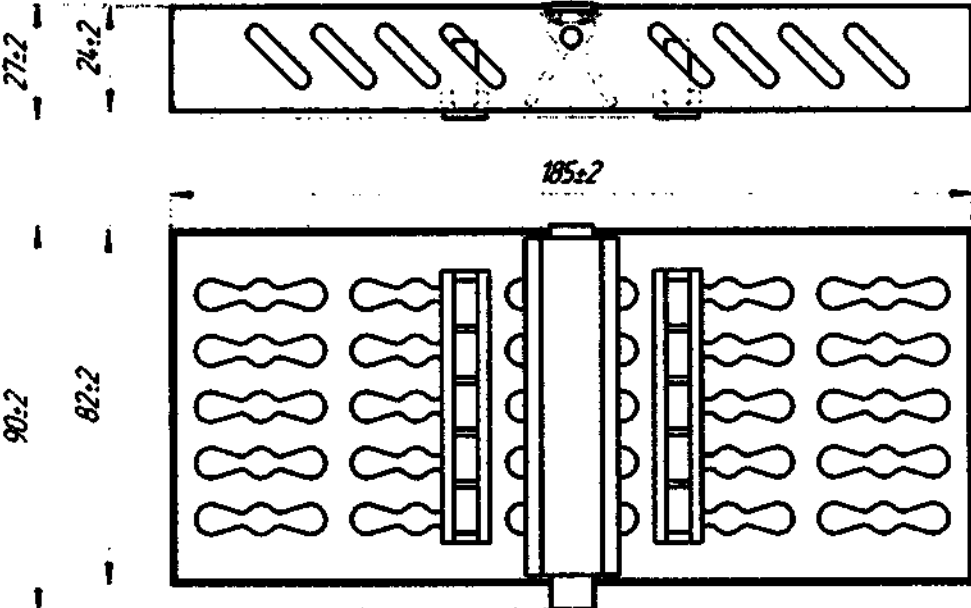
6. Технические характеристики

Таблица 6.1. Технические характеристики медицинского изделия: «Набор инструментов ручных дентальных для терапевтической стоматологии»

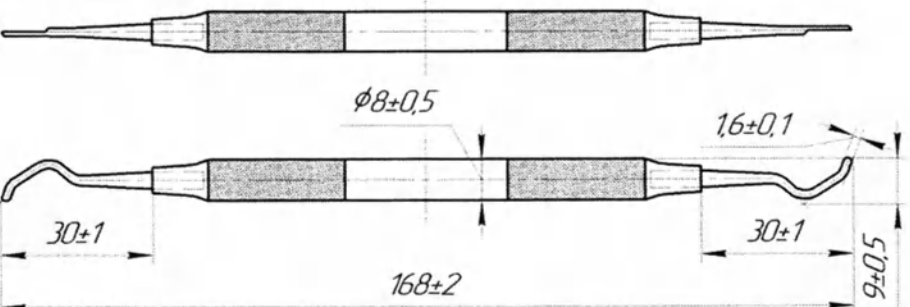
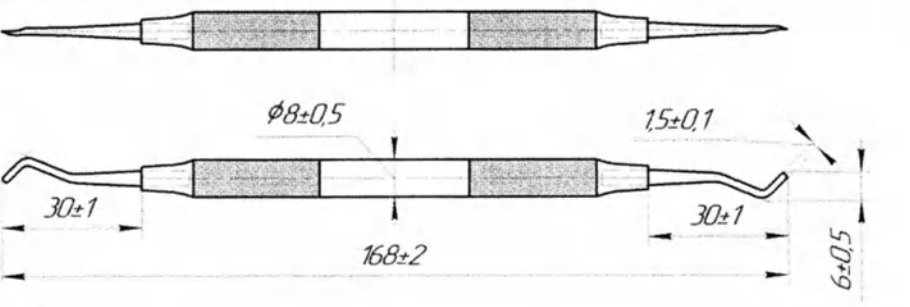
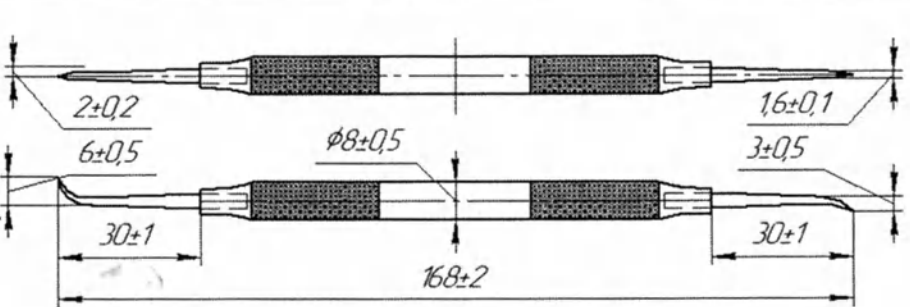
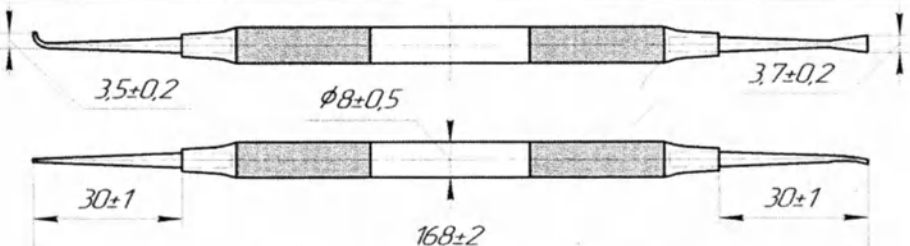
Инструмент	Внешний вид	Габариты (мм)	Масса (не более г)	Твердость HRC
1. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-1 ЮП, в составе:				
1.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ТР-4000-1-1 ЮП;		Общая длина. 168±2 Длина раб. части. 37±1 Ширина кончика раб части 1,6±0,1 Диаметр рукоятки 6±0,5 Длина изогнутого кончика 9±0,5	24,0	42-46
1.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ТР-4000-1-2 ЮП;		Общая длина. 168±2 Длина раб. части 37±1 Ширина кончика раб части 1,5±0,1 Диаметр рукоятки 6±0,5 Длина изогнутого кончика 6±0,5	22,0	42-46
1.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ТР-4000-1-3 ЮП;		Общая длина. 168±2 Длина раб. части 37±1 Ширина кончиков раб частей: 1,6±0,1 2±0,1 Диаметр рукоятки 6±0,5 Длина изогнутых кончиков:	24,0	42-46

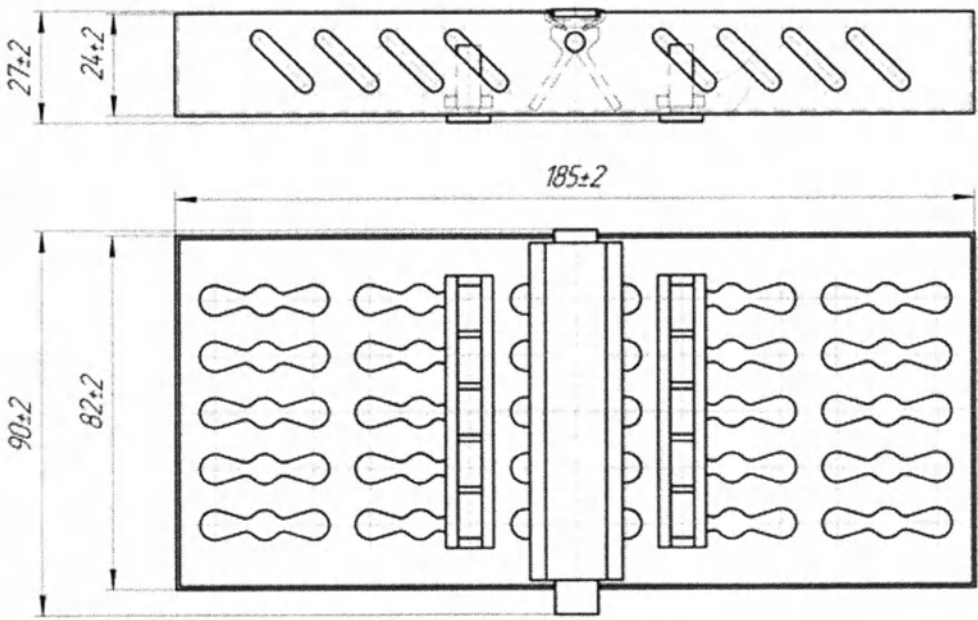
1.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ТР-4000-1-4 ЮП;		3±0,2 6±0,2 Общая длина. 166±2 Длина раб. частей 37±1 39±1 Ширина кончиков раб частей 3,7±0,2 3,5±0,2 Диаметр рукоятки 6±0,5	22,0	42-46
1.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.		Длина. 185±2 Ширина 90±2 Высота 27±2 Высота без силиконовых ставок 24±2 Ширина без замка 82±2	176,0	-
2. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-2 ЮП, в составе				

2.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-CP-4000-2-1 ЮП;		Общая длина. 166±2 Цвет ручки голубой Длина раб. части 38±1 Ширина кончика раб части 1,6±0,1 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75 Длина изогнутых кончиков 9±0,5	18,0	42-46
2.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-CP-4000-2-2 ЮП;		Общая длина 166±2 Цвет ручки синий Длина раб. части 38±1 Ширина кончика раб части 1,5±0,1 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75 Длина изогнутых кончиков 6±0,5	20,0	42-46
2.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-CP-4000-2-3 ЮП;		Общая длина. 166±2 Цвет ручки желтый Длина раб. части 38±1 Ширина кончиков раб частей 1,6±0,1 2±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75 Длина изогнутых кончиков: 3±0,5 6±0,5	20,0	42-46

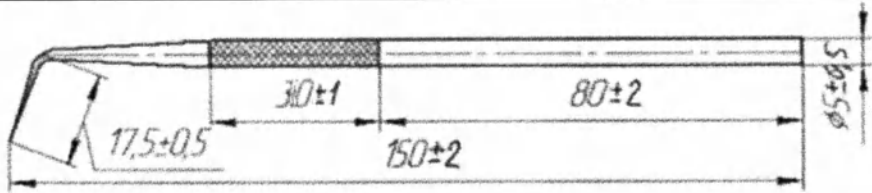
2.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-СР-4000-2-4 ЮП;		Общая длина. 166±2 Цвет ручки зеленый Длина раб. части 38±1 Ширина кончиков раб. частей 3,5 ±0,2 3,7±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	20,0	42-46
2.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.		Длина 185±2 Ширина 90±2 Высота 27±2 Высота без силиконовых стоек 24±2 Ширина без замка 82±2	174,0	-

3. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-3с-ЮП, в составе:

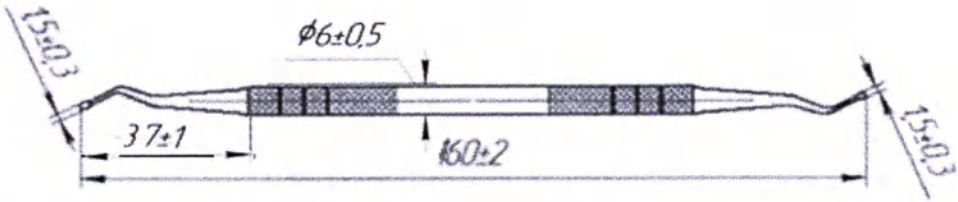
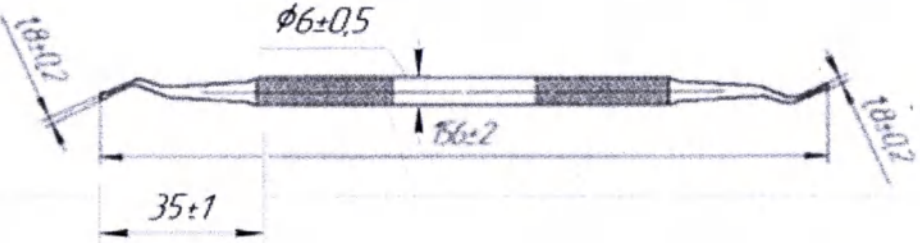
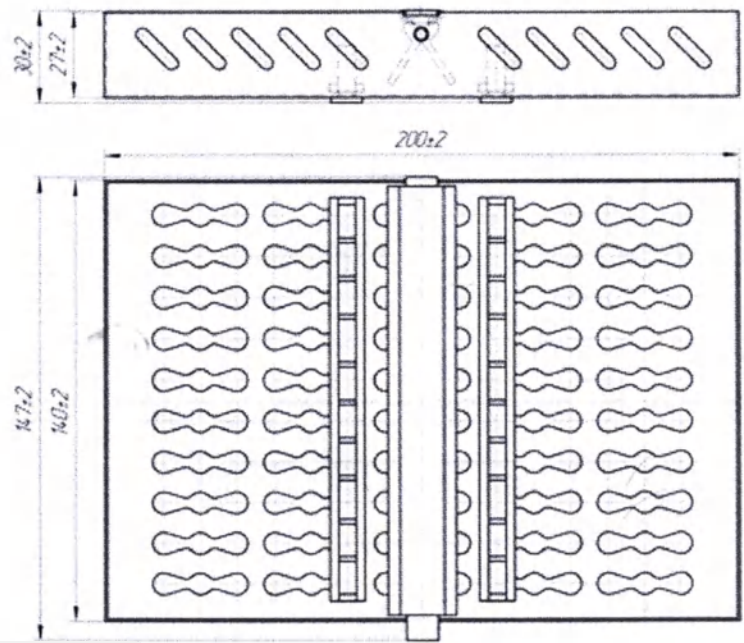
3.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ПР-4000-3-1с ЮП;		Длина 168±2 Цвет ручки красный Длина раб. части 30±1 Ширина кончиков раб частей 1,6±0,1, 1,6±0,1, Диаметр рукоятки 8±0,5 Длина изогнутых кончиков 9±0,5	16,0	42-46
3.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ПР-4000-3-2с ЮП;		Общая длина 168±2 Цвет ручки синий Длина раб. части 30±1 Ширина кончиков раб части 1,5±0,1, 1,5±0,1 Длина изогнутых кончиков 6±0,5 Диаметр рукоятки 8±0,5	16,0	42-46
3.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ПР-4000-3-3с ЮП;		Общая длина 168±2 Цвет ручки голубой Длина раб. части 30±1 Ширина кончиков раб частей 1,6±0,1, 2±0,2 Длина изогнутых кончиков 3±0,5, 6±0,5 Диаметр рукоятки 8±0,5	16,5	42-46
3.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ПР-4000-3-4с		Общая длина 168±2 Цвет ручки зеленый Длина раб. части 30±1 Ширина кончиков раб частей 3,7±0,2, 3,5±0,2	16,5	42-46

ЮП; 3.5. Кассета стерилизационна я КСМ-1-4000 ЮП.		Диаметр рукоятки $8 \pm 0,5$ Длина 185 ± 2 Ширина 90 ± 2 Высота 27 ± 2 Высота без силиконовых ставок 24 ± 2 Ширина без замка 82 ± 2	190,0	-
---	--	---	-------	---

4. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-1 ЮП, в составе:

4.1. Зонд зубной изогнутый 30-3 МП;		Общая длина 150 ± 2 Длина изогнутого кончика $17,5 \pm 0,5$ Длина части рукоятки с насечками 30 ± 1 Длина части рукоятки без насечек 80 ± 2 Ширина рукоятки $5 \pm 0,5$	20,5	42-56
---	---	---	------	-------

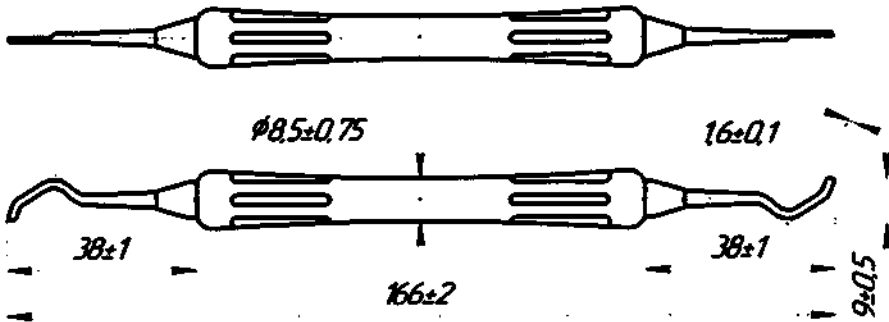
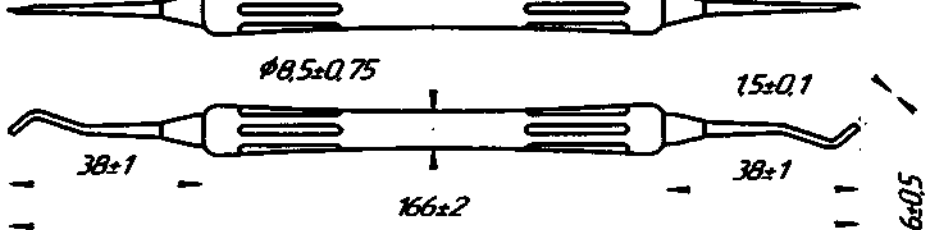
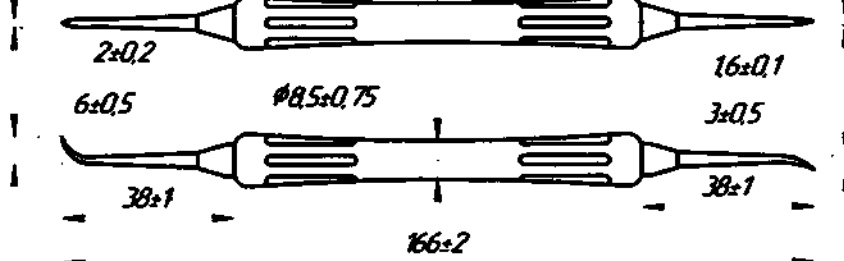
4.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой 100-2 МП;		Общая длина зеркала с ручкой 158 ± 2 Диаметр зеркала 24 ± 2, Плоское, Длина ручки 115 ± 2 Длина зеркала без ручки (48 ± 2), Ширина зеркала 5 ± 1 Диаметр ручки 5 ± 1 Резьба M2-7H	25,0	-
4.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ТР-4000-1-1 ЮП;		Общая длина. 168 ± 2 Длина раб. частей 37 ± 1 Ширина кончиков раб. частей $1,6 \pm 0,1$ $1,6 \pm 0,1$ Диаметр рукоятки $6 \pm 0,5$ Длина изогнутого кончика $9 \pm 0,5$	22,0	42-46
4.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ТР-4000-1-2 ЮП;		Общая длина. 168 ± 2 Длина раб. частей 37 ± 1 Ширина кончика раб. частей $1,5 \pm 0,1$ $1,5 \pm 0,1$ Диаметр рукоятки $6 \pm 0,5$ Длина изогнутого кончика $6 \pm 0,5$	22,0	42-46

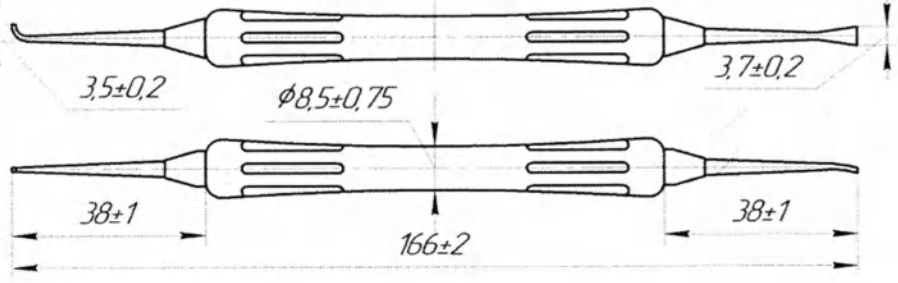
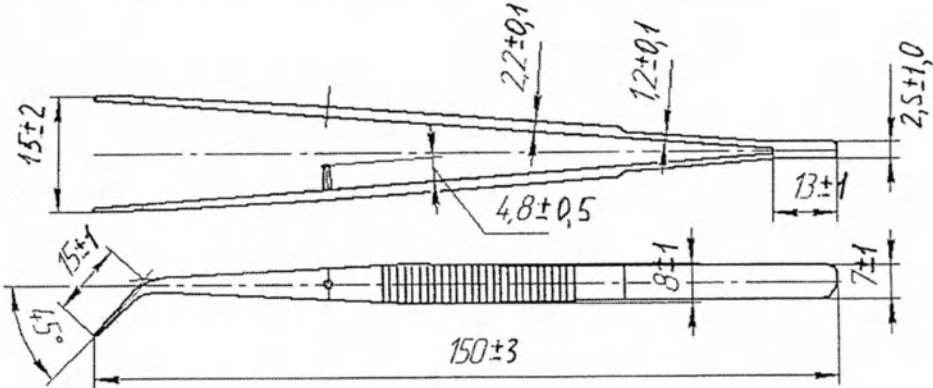
4.8. Экскаватор №2-105-5 МП;		Общая длина. 160±2 Длина раб. частей 37±1 Ширина кончика раб частей 1,5±0,3 1,5±0,3 Диаметр рукоятки 6±0,5	20,5	55-60
4.9. Экскаватор двухсторонний с круглой ручкой №3-105-6 МП;		Общая длина 156±2 Ширина кончика раб частей 1,8±0,2 1,8±0,2 Длина рабочих частей 35±1 Диаметр рукоятки 6±0,5	20,5	55-60
4.10. Кассета стерилизационна я КССС-8-8000 ЮП.		Длина 200±2, Ширина 147±2 Высота 30±2 Высота без силиконовых ставок 27±2 Ширина без замка 140±2	280,0	-

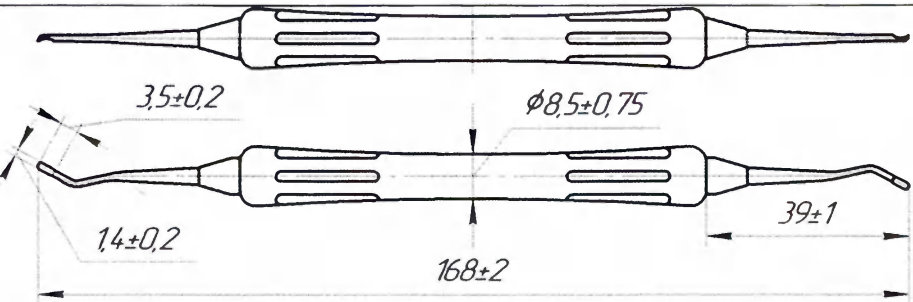
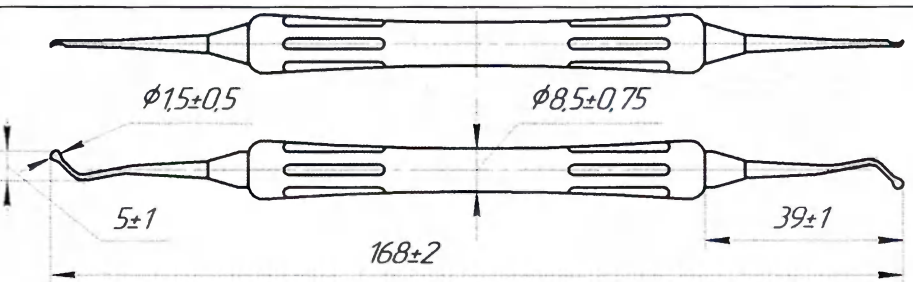
ИЗМЕНЕНО

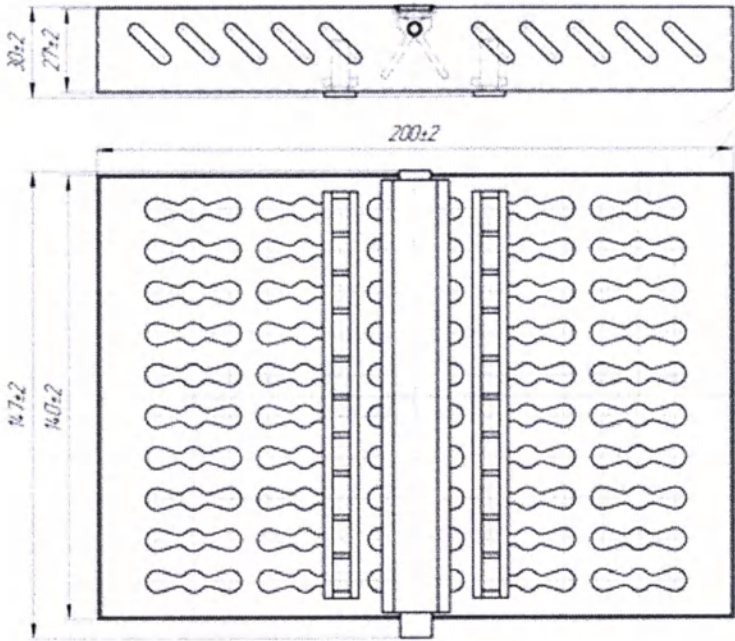
5. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-2 ЮП, в составе:

5.1. Зонд зубной изогнутый СР-9000-2-1 ЮП;		Цвет держателя черный Общая длина 161±2 Длина рабочей части 41±1 Ширина изогнутой части 11±0,5 Длина изогнутой части 8±0,5 Длина кончика ручки 30±1 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	17,0	42-56
5.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой СР-9000-2-2 ЮП;		Общая длина зеркала с ручкой 170 ±2 Длина ручки 129 ±2 Длина кончика ручки 30±1 Диаметр кончика ручки в винтовой части 5 ±0,5 Глубина резьбы в ручке 6±0,5 Диаметр зеркала 24±2 Длина зеркала без ручки 48±2, Ширина зеркала 5 ±1 Плоское, Цвет ручки зеленый Диаметр ручки в средней части 8,5±0,75 Диаметр ручки в резьбовой части 5±0,5 Глубина резьбы в ручке 6±0,5 Резьба М2-7Н	21,5	-

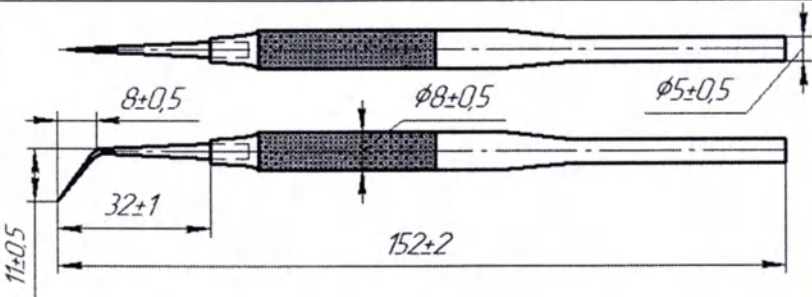
5.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-СР-4000-2-1 ЮП;		Цвет ручки красный Общая длина. 166±2 Длина раб. частей 38±1 Ширина кончика раб. частей 1,6±0,1 1,6±0,1 Ширина изогнутой части 9±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	42-46
5.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-СР-4000-2-2 ЮП;		Цвет ручки темно-синий Общая длина. 166±2 Длина раб. частей 38±1 Ширина кончика раб. частей 1,5±0,1 1,5±0,1 Ширина изогнутой части 6±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	42-46
5.5. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-СР-4000-2-3 ЮП;		Цвет ручки светло-желтый Общая длина. 166±2 Длина раб. частей 38±1 Ширина кончика раб. частей 1,6±0,1 2±0,2 Ширина кончиков изогнутых частей 3±0,5 6±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	42-46

5.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-СР-4000-2-4 ЮП;		Общая длина 166±2 Цвет ручки голубой Длина раб. частей 38±1 Ширина кончика раб частей 3,7±0,2 3,5±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	42-46
5.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП		Длина 150±3 Ширина в месте сварки 7±1 Максимальная ширина 8±1 Толщина в месте сварки 2,5±1,0 Высота кончика в месте сварки 13±1 Угол изгиба 45° Длина изогнутого кончика 15±1,0 Расстояние между браншами в двух измерениях 15±2 и 4,8±0,5, Толщина бранши в толстой части 2,2±0,1 и тонкой части 1,2±0,1,	20,5	42-46

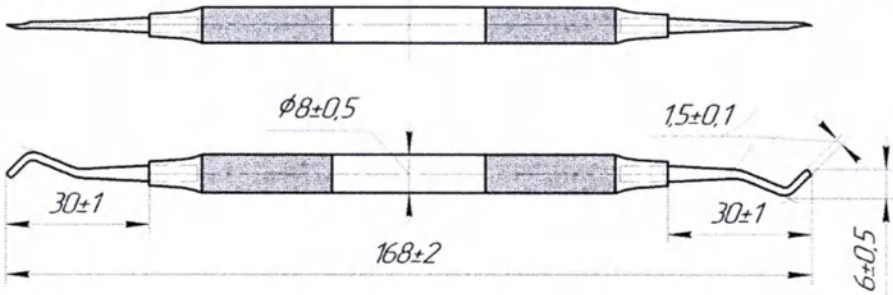
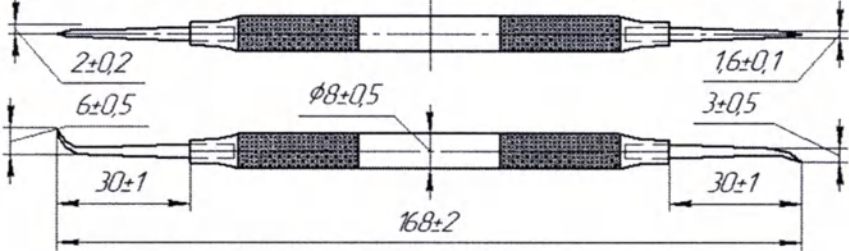
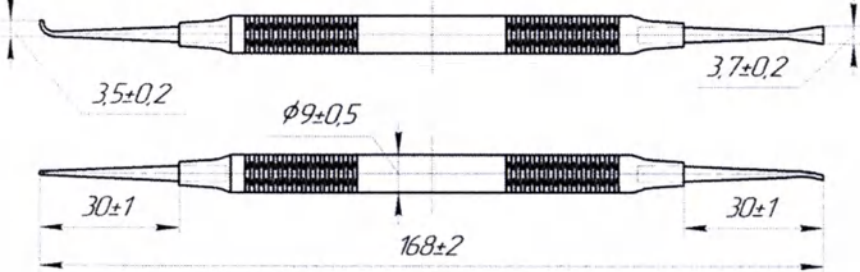
5.8. Экскаватор №2-CP-9000-2-3 ЮП;		Длина 168±2 Цвет ручки серый Длина рабочих частей 39±1 Ширина кончиков рабочих частей 1,4±0,2 1,4±0,2 Длина кончиков раб частей:3,5±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	55-60
5.9. Экскаватор двухсторонний №3-CP-9000-2-4 ЮП;		Длина 168±2 Цвет ручки изумрудный Длина рабочих частей 39±1 Ширина кончика рабочих частей 1,5±0,5 1,5±0,5 Ширина изогнутой части 5±1 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,0	55-60

5.10. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.		Длина 200±2, Ширина 147±2 Высота 30±2 Высота без силиконовых ставок 27±2 Ширина без замка 140±2	290	-
---	--	--	------------	----------

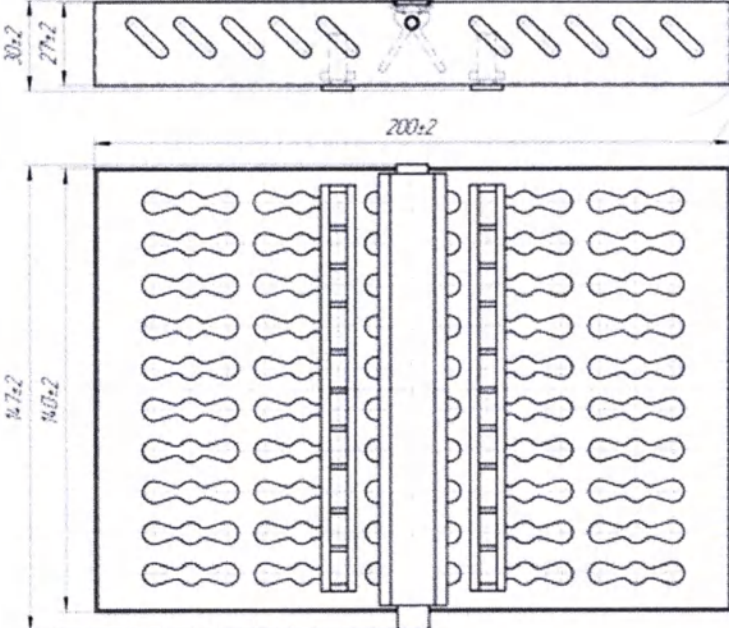
6. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-3с ЮП, в составе:

6.1. Зонд зубной изогнутый ПР- 9000-3-1с ЮП;		Длина 152±2 Цвет ручки черный Длина рабочей части 32±1 Ширина изогнутой части 11±0,5 Длина изогнутой части 8±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5 Диаметр кончика рукоятки 5±0,5 Цвет держателя черный	12,5	42-56
---	--	---	-------------	--------------

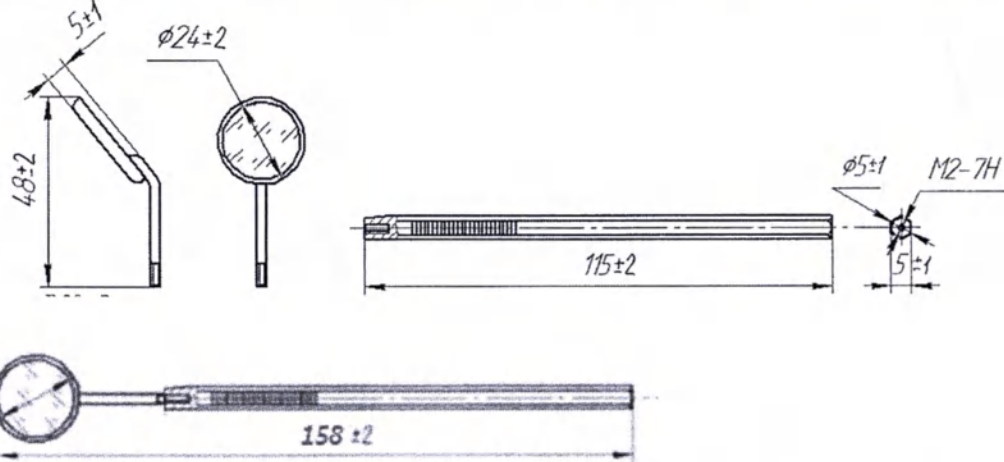
6.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой ПР 900-3-2с ЮП;		Общая длина зеркала с ручкой 161±2 Диаметр зеркала 24±2 Длина зеркала без ручки 48±2, Ширина зеркала 5±1 Плоское, Длина ручки 120±2 Диаметр ручки в средней части 8±0,5 Диаметр кончика ручки 5±0,5 Диаметр кончика ручки в винтовой части 5 ±0,5 Глубина резьбы в ручке 7±0,5 Резьба М2,5-7Н	15,5	-
6.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ПР-4000-3-1с ЮП;		Длина 168±2 Цвет ручки фиолетовый Длина рабочих частей 30±1 Ширина кончика рабочих частей 1,6±0,1 1,6±0,1 Ширина изогнутой части 9±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	15,0	42-46

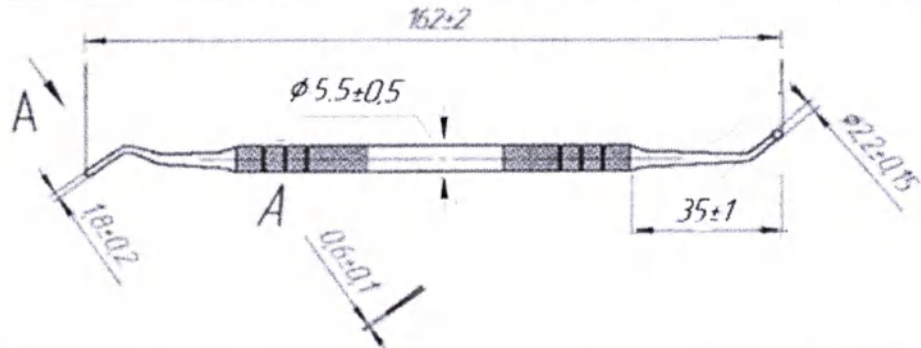
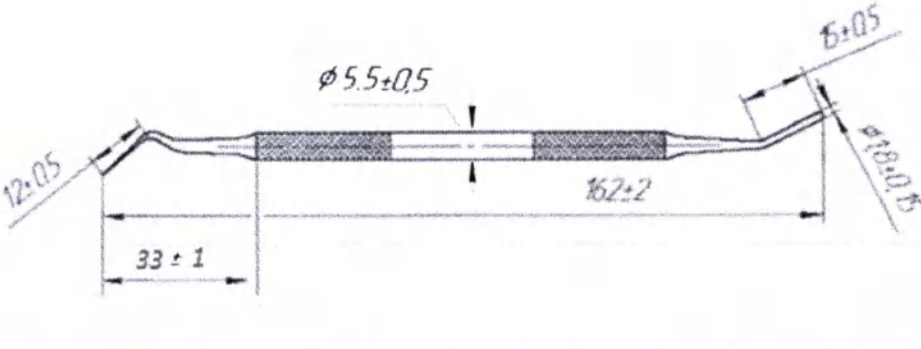
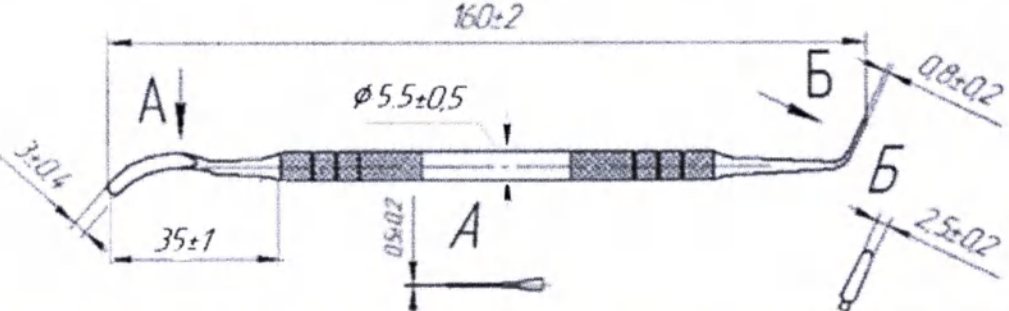
6.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ПР-4000-3-2с ЮП;		Длина 168±2 Цвет ручки изумрудный1 Длина рабочих частей 30±1 Ширина кончиков рабочих частей 1,5±0,1 1,5±0,1 Ширина изогнутой части 6±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	15,0	42-46
6.5. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ПР-4000-3-3с ЮП;		Длина 168±2 Цвет ручки светло-желтый Длина рабочих частей 30±1 Ширина кончиков рабочих частей 1,6±0,1; 2±0,2 Ширина изогнутых частей 3±0,5 6±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	15,0	42-46
6.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ПР-4000-2-4с ЮП;		Длина 168±2 Цвет ручки красный Длина рабочих частей 30±1 Ширина кончика рабочих частей 3,7±0,2 3,5±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 9±0,5	15,0	42-46

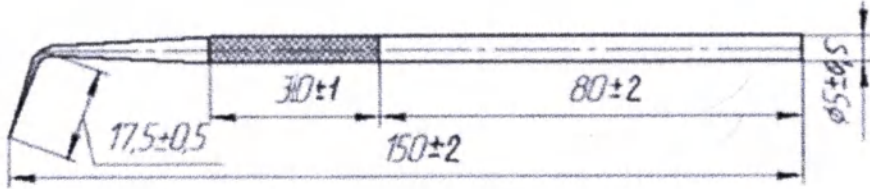
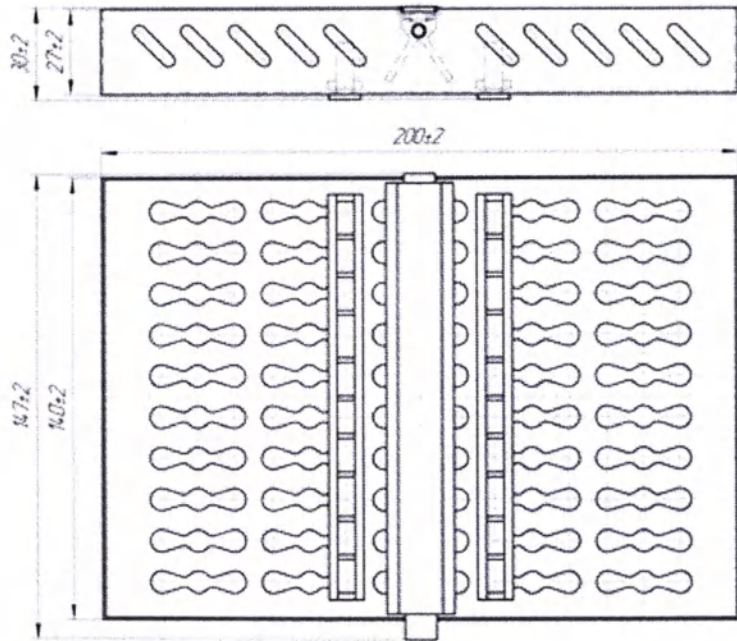
6.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150x0,8-80-2 МП;		Длина 150±3 Ширина в месте сварки 7±1 Максимальная ширина 8±1 Толщина в месте сварки 2,5±1,0 Высота кончика в месте сварки 13±1 Угол изгиба 45° Длина изогнутого кончика 15±1,0 Расстояние между браншами в двух измерениях 15±2 и 4,8±0,5, Толщина бранши в толстой части 2,2±0,1 и тонкой части 1,2±0,1,	20,5	42-46
6.8. Экскаватор №2-ПР-9000-3-3с ЮП;		Длина 170±2 Цвет ручки зеленый Длина рабочих частей 31±1 Ширина кончика рабочих частей 1,4±0,2 1,4±0,2 Длина кончика рабочих частей 3,5±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	15,0	55-60
6.9. Экскаватор двухсторонний №3-ПР-9000-3-4с ЮП;		Длина 170±2 Цвет ручки зеленый Длина рабочих частей 31±1 Ширина кончика рабочих частей 2±0,1 2±0,1 Ширина изогнутой части 6±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	15,0	55-60

6.10. Кассета стерилизационна я КССС-8-8000 ЮП.		Длина 200±2, Ширина 147±2 Высота 30±2 Высота без силиконовых ставок 27±2 Ширина без замка 140±2	270	-
--	--	--	-----	---

7. Набор инструментов для пломбирования 9000-4 ЮП, в составе:

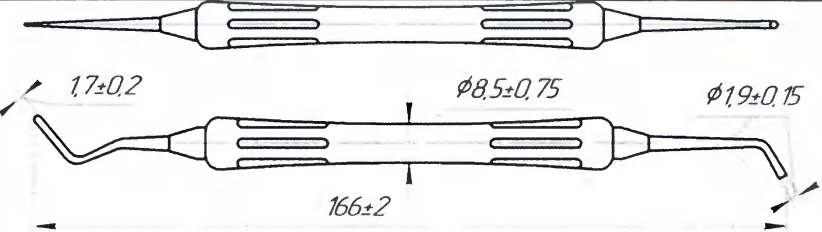
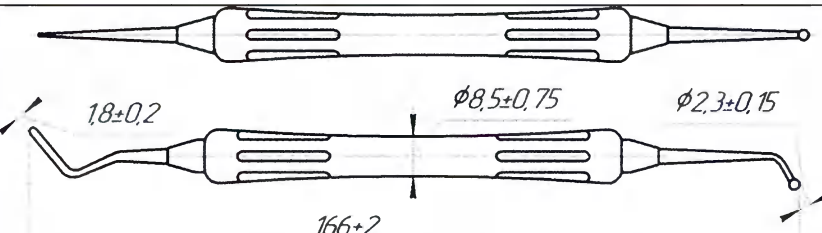
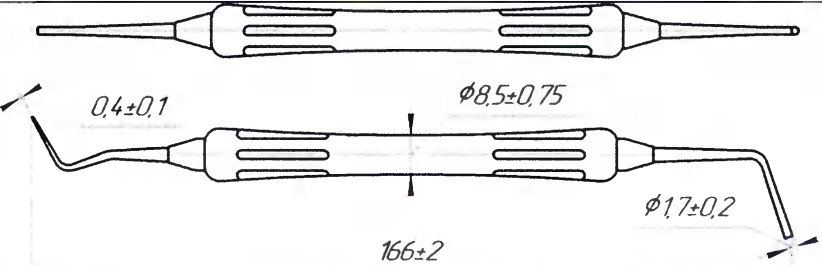
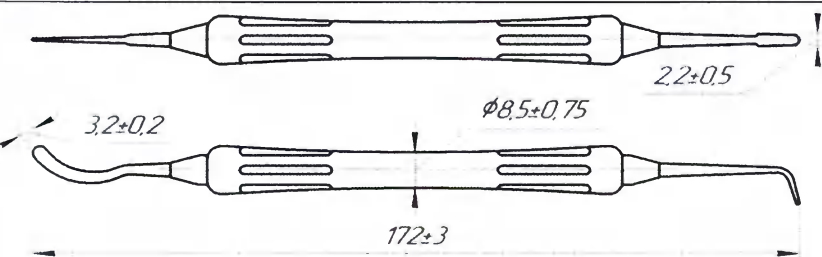
7.1. Зеркало стоматологическ ое 1904 ПП с ручкой 100-2 МП;		Общая длина зеркала с ручкой 158±2 Диаметр зеркала 24±2, Плоское, Длина зеркала без ручки 48±2 Ширина зеркала 5±1 Длина ручки 115±2 Диаметр ручки 5±1 Резьба М2-7Н	25,0	-
7.2. Штопфер- гладилка №1-10- 5 МП4;		Общая длина 162±2 Длина рабочих частей 36±1 Ширина кончиков	21,0	36-56

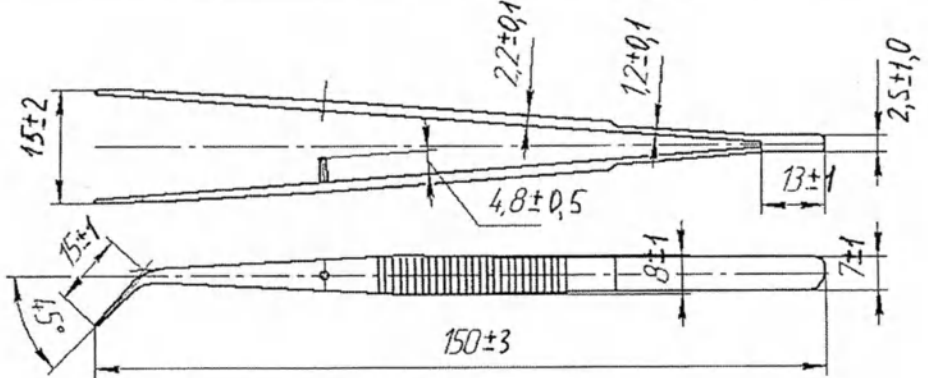
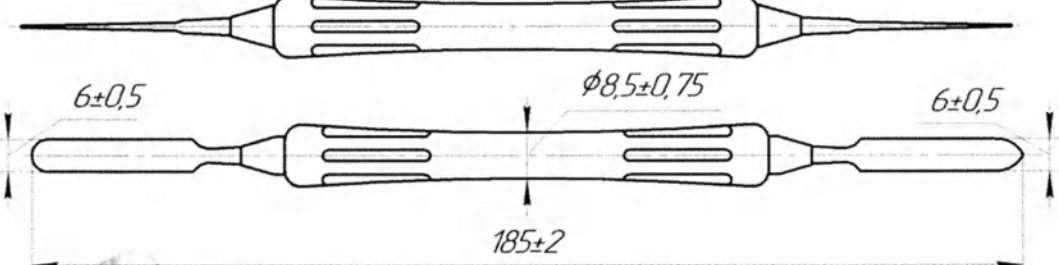
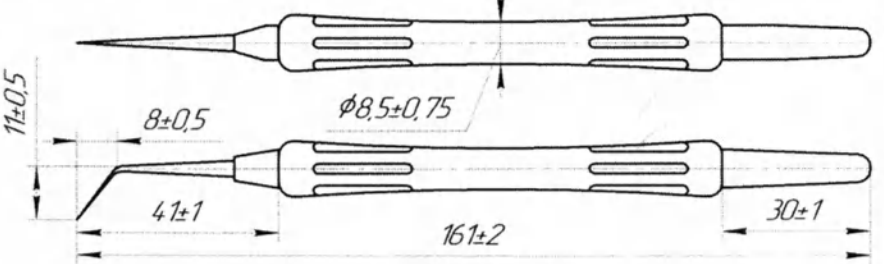
7.5. Гладилка с круглой головкой №4-10-3 МП;		Общая длина 162±2 Длина рабочих частей 35±1 Ширина кончика рабочих частей 2,2±0,15; 1,8±0,2 Толщина кончика 0,6±0,1 Диаметр рукоятки в средней части 5,5±0,5	21,0	36-56
7.6. Штопфер-гладилка №5-0-11 МП;		Общая длина 162±2 Длина рабочих частей 33±1 Ширина кончика рабочей части 1,8±0,15 Длина изогнутого кончика 15±0,5 12±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 5,5±0,5	21,5	36-56
7.7. Гладилка двухсторонняя серповидная-дистальная №6-10-2 МП;		Общая длина 160±2 Длина рабочих частей 35±1 Ширина кончика рабочих частей 3,0±0,4 2,5 ±0,2 Толщина кончиков 0,5±0,2 0,8±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 5,5±0,5	21,5	36-56

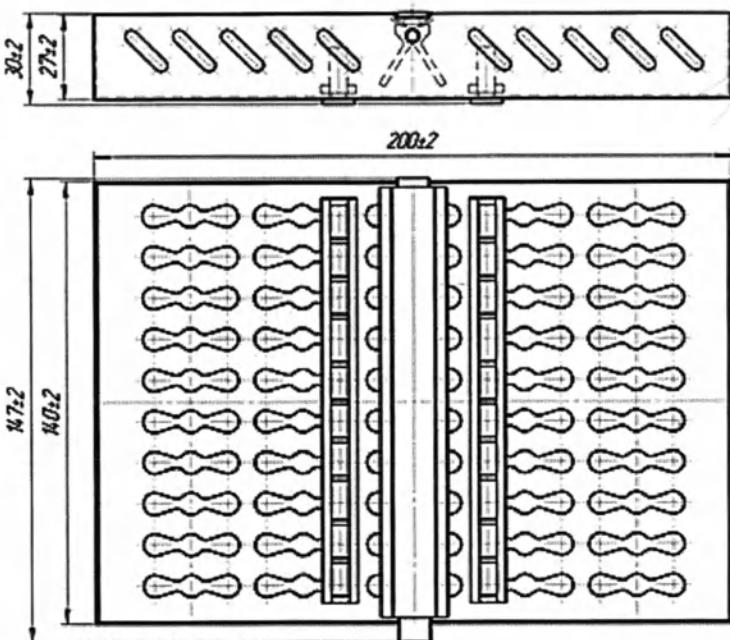
7.10. Зонд зубной изогнутый 30-3 МП;		Общая длина 150±2 Длина изогнутого кончика 17,5 ±0,5 Длина части рукоятки с насечками 30±1 Длина части рукоятки без насечек 80±2 Ширина рукоятки 5±0,5	20,5	42-56
7.11. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.		Длина 200±2, Ширина 147±2 Высота 30±2 Высота без силиконовых ставок 27±2 Ширина без замка 140±2	280,0	-

8. Набор инструментов для пломбирования 9000-5 ЮП

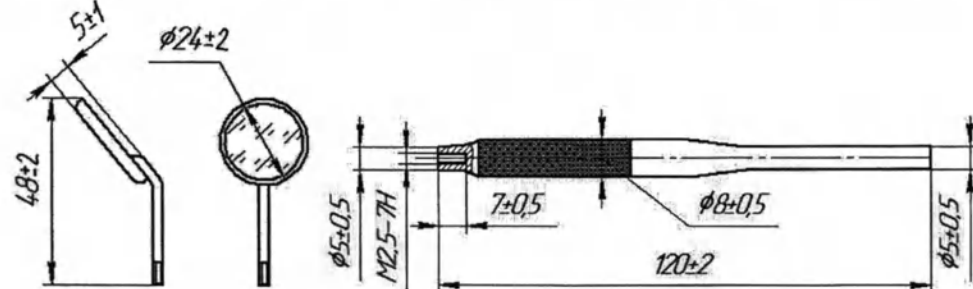
8.1. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой СР-9000-2-2 ЮП;		Общая длина зеркала с ручкой 170 ± 2 Длина ручки 129 ± 2 Длина кончика ручки 30 ± 1 Диаметр кончика ручки в винтовой части $5 \pm 0,5$ Глубина резьбы в ручке $6 \pm 0,5$ Диаметр зеркала 24 ± 2 Длина зеркала без ручки 48 ± 2, Ширина зеркала 5 ± 1 Плоское, Цвет ручки зеленый Диаметр ручки в средней части $8,5 \pm 0,75$ Резьба M2-7H	21,5	-
8.2. Штопфер-гладилка №1-СР-9000-5-1 ЮП;		Общая длина 166 ± 2 Цвет ручки темно-синий Ширина кончиков рабочих частей $1 \pm 0,15$; $1,4 \pm 0,2$, Диаметр ручки в средней части $8,5 \pm 0,75$	18,5	36-56
8.3. Штопфер-гладилка №2-СР-9000-5-2 ЮП;		Общая длина 166 ± 2 Цвет ручки красный Ширина кончика рабочих частей $1,2 \pm 0,15$ $1,5 \pm 0,2$ Диаметр ручки в средней части $8,5 \pm 0,75$	18,5	36-56

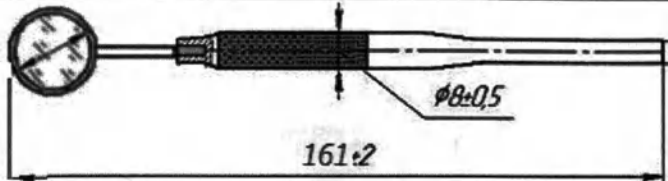
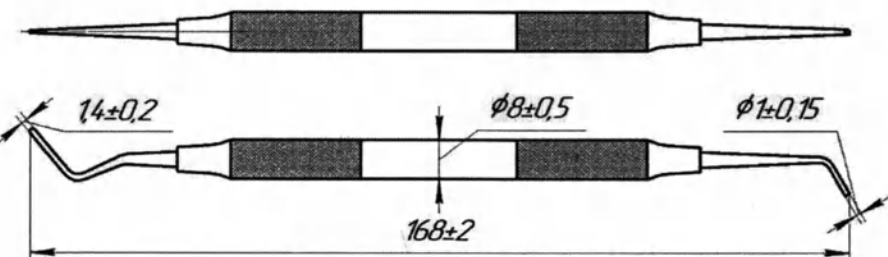
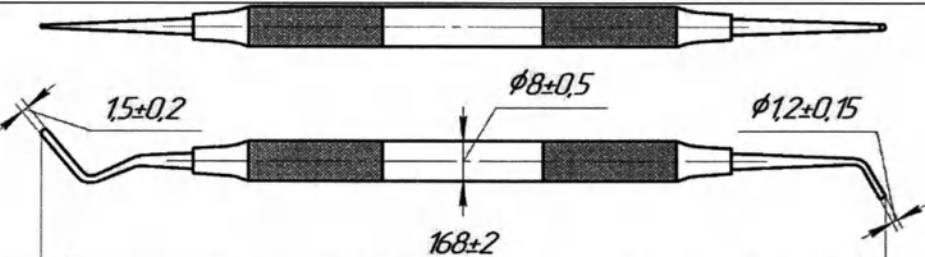
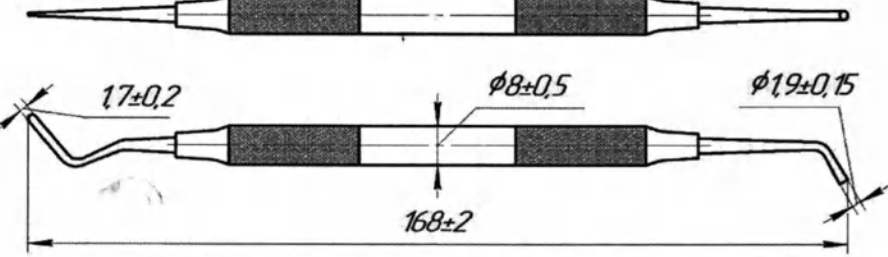
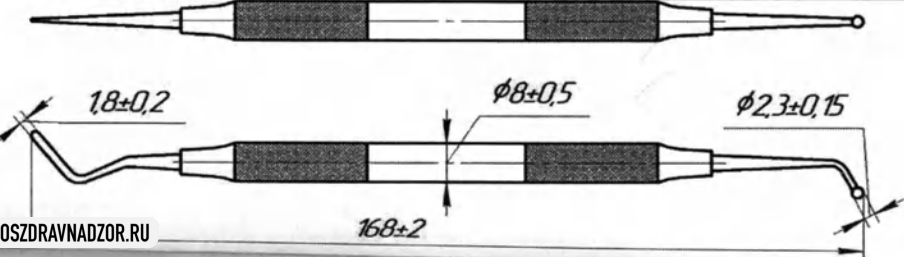
8.4. Штопфер- гладилка №3-СР- 9000-5-3 ЮП;		Общая длина 166±2 Цвет ручки изумрудный Ширина кончика рабочих частей 1,9±0,15 1,7±0,2 Диаметр ручки в средней части 8,5 ±0,75	18,5	36-56
8.5. Гладилка с круглой головкой №4-СР- 9000-5-4 ЮП;		Общая длина 166±2 Цвет ручки голубой Ширина кончика рабочих частей 2,3±0,15 1,8±0,2 Диаметр ручки в средней части 8,5 ±0,75	18,5	36-56
8.6. Штопфер- гладилка №5-СР- 9000-5-5 ЮП;		Общая длина 166±2 Цвет ручки серый Ширина кончиков рабочих части 1,7±0,2 1,7±0,2 Толщина кончика рабочей части 0,4±0,1 Диаметр ручки в средней части 8,5 ±0,75	18,5	36-56
8.7. Гладилка двухсторонняя серповидная дистальная №6- СР- 9000-5-6 ЮП;		Общая длина 172±3 Цвет ручки желтый Ширина кончика рабочих частей 3,2±0,2 2,2±0,5 Диаметр ручки в средней части 8,5 ±0,75	18,5	36-56

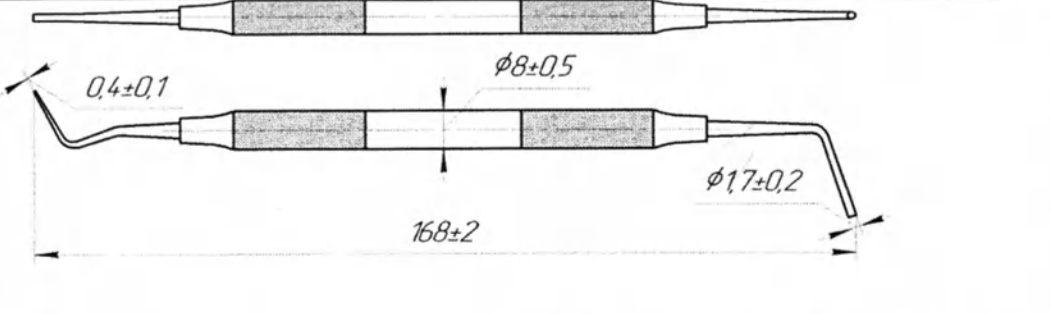
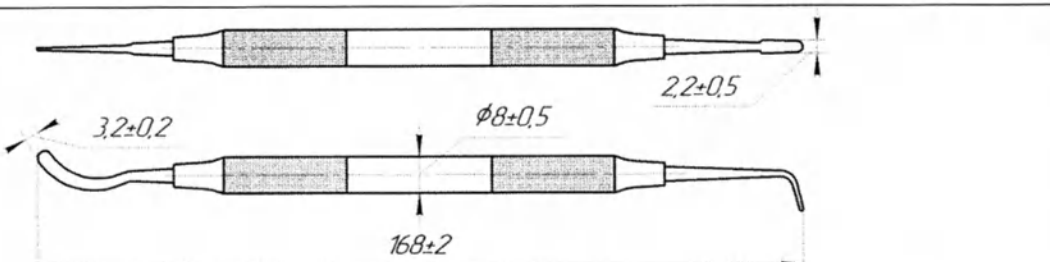
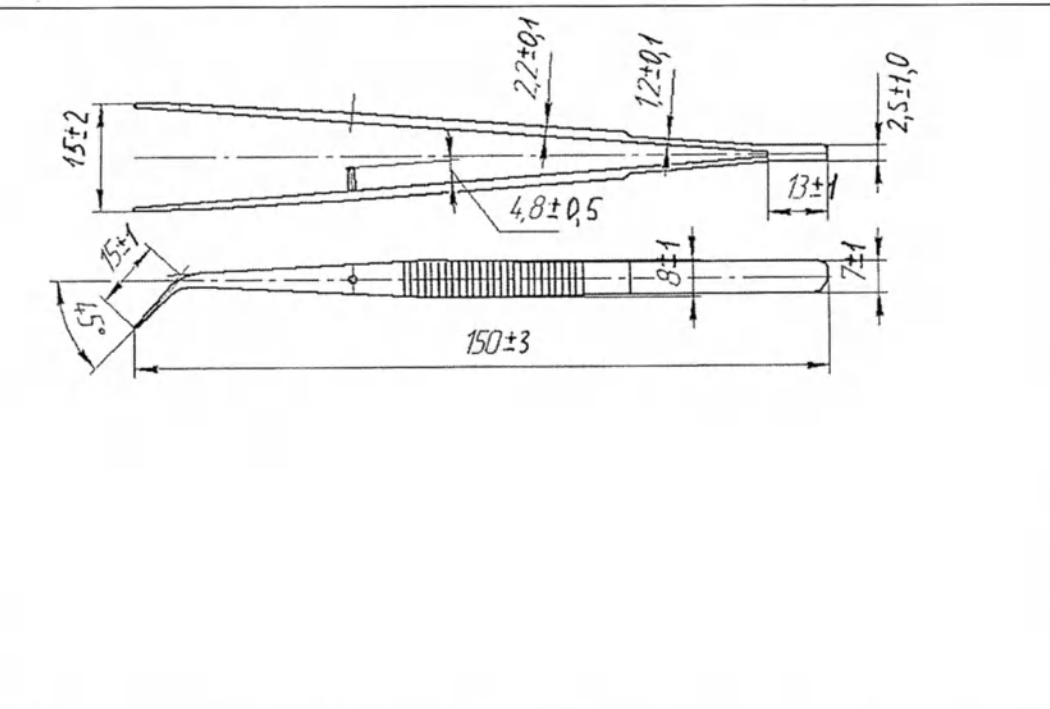
8.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150x0,8-80-2 МП;		Длина 150±3 Ширина в месте сварки 7±1 Максимальная ширина 8±1 Толщина в месте сварки 2,5±1,0 Высота кончика в месте сварки 13±1 Угол изгиба 45° Длина изогнутого кончика 15±1,0 Расстояние между браншами в двух измерениях 15±2 и 4,8±0,5, Высота направляющей 4,8±0,5 Толщина бранши в толстой части 2,2±0,1 и тонкой части 1,2±0,1,	18,5	42-46
8.9. Шпатель двухсторонний для цемента CP-9000-5-7 ЮП;		Общая длина 185±2 Цвет ручки розовый Ширина кончиков рабочих частей 6±0,5 6±0,5, Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	36-53
8.10. Зонд зубной изогнутый CP-9000-2-1 ЮП;		Общая длина 161±2 Цвет ручки черный Длина рабочей части 41±1 Длина кончика ручки 30±1 Ширина изогнутого кончика 11±0,5 Длина изогнутого кончика 8±0,5 Диаметр рукоятки в	18,5	42-56

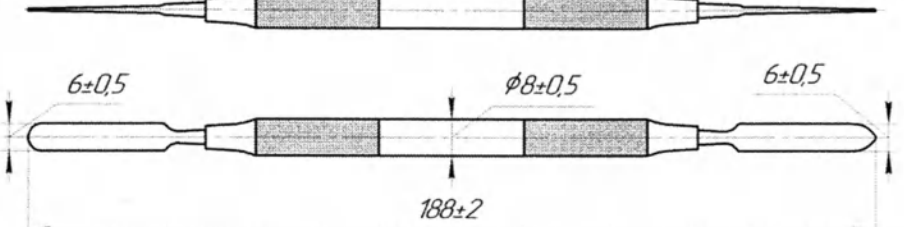
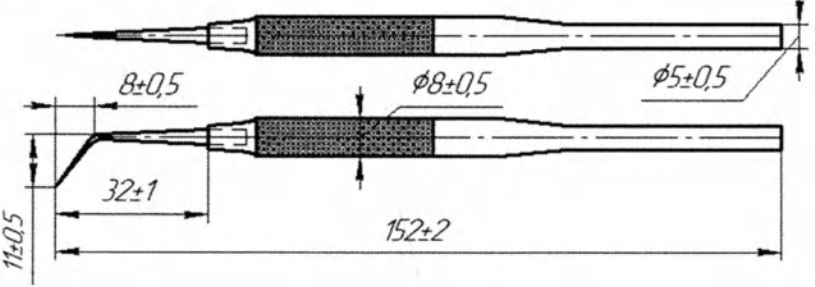
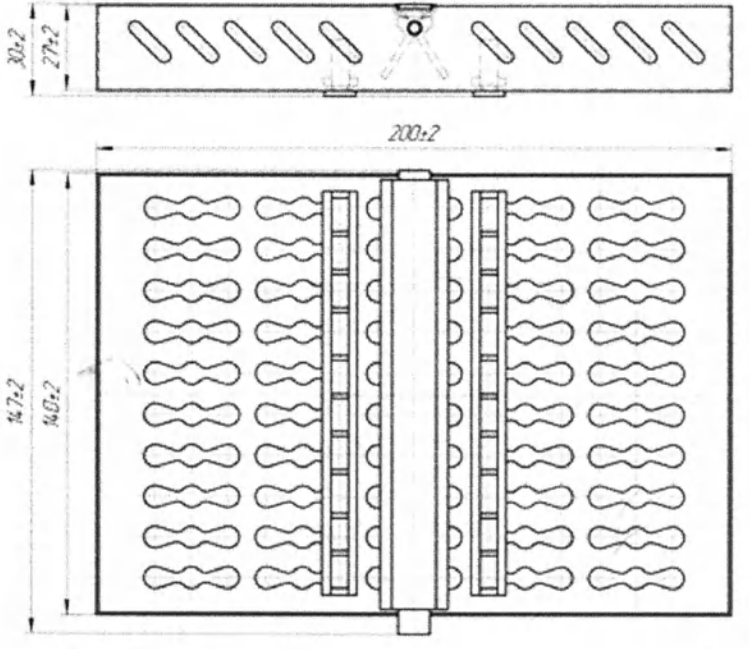
8.11. Кассета стерилизационна я КССС-8-8000 ЮП.		средней части $8,5 \pm 0,75$ Длина 200 ± 2, Ширина 147 ± 2 Высота 30 ± 2 Высота без силиконовых ставок 27 ± 2 Ширина без замка 140 ± 2	300	
--	--	---	------------	--

9. Набор инструментов для пломбирования 9000-6с ЮП в составе:

9.1. Зеркало стоматологическ ое 1904 ПП с ручкой ПР 9000- 3-2с ЮП;		Длина зеркала с ручкой 161 ± 2, Диаметр зеркала 24 ± 2, Длина зеркала без ручки 48 ± 2, Плоское, Длина ручки 120 ± 2 Диаметр рукоятки в средней части $8 \pm 0,5$ Диаметр кончика рукоятки $5 \pm 0,5$ Диаметр ручки в винтовой части $5 \pm 0,5$ Длина резьбы в ручке $7 \pm 0,5$	18,5	-
---	---	---	-------------	----------

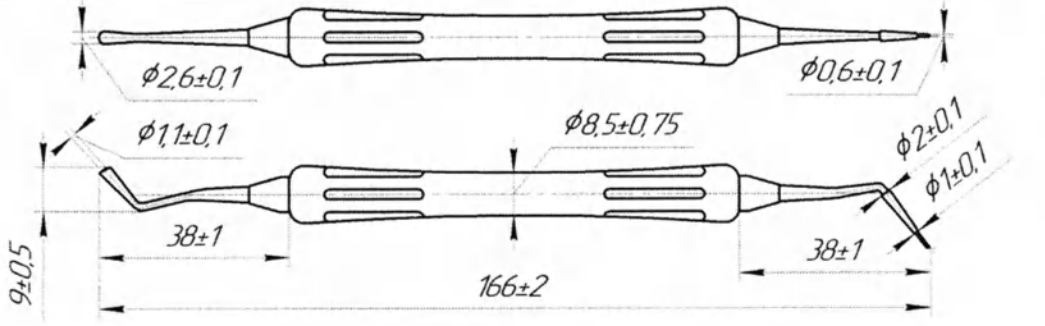
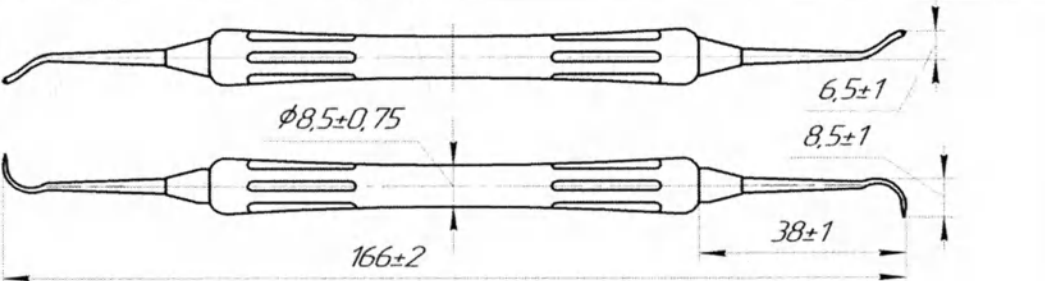
		Резьба М2,5-7Н		
9.2. Штопфер-гладилка №1-ПР-9000-6-1с ЮП;		Общая длина 168±2, Цвет ручки изумрудный Ширина кончика рабочих частей 1±0,15 1,4±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 8,±0,5	16,5	36-56
9.3. Штопфер-гладилка №2-ПР-9000-6-2с ЮП;		Общая длина 168±2, Цвет ручки красный Ширина кончика рабочих частей 1,5±0,2 1,2±0,15 Диаметр рукоятки в средней части 8,±0,5	16,5	36-56
9.4. Штопфер-гладилка №3-ПР-9000-6-3с ЮП;		Общая длина 168±2, Цвет ручки светло-желтый Ширина кончиков рабочих частей 1,7±0,2 1,9±0,15 Диаметр рукоятки в средней части 8,±0,5	16,5	42-46
9.5. Гладилка с круглой головкой №4-ПР-9000-6-4с ЮП;		Общая длина 168±2, Цвет ручки темно-синий Ширина кончиков рабочих частей 1,8±0,2 2,3±0,15 Диаметр рукоятки в средней части 8,±0,5	16,5	36-56

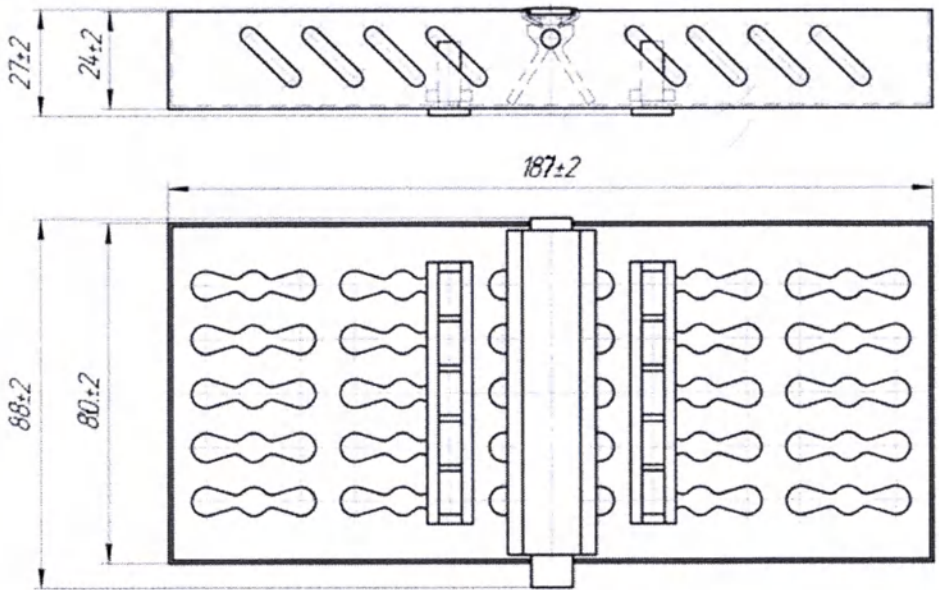
9.6. Штопфер-гладилка №5-ПР-9000-6-5с ЮП;		Общая длина 168±2, Цвет ручки золотисто-желтый Ширина кончика рабочих частей 1,7±0,2, Толщина: кончика рабочей части 0,4±0,1 Диаметр рукоятки в средней части 8,±0,5	16,5	36-56
9.7. Гладилка двухсторонняя серповидная-дистальная №6-ПР-9000-6-6с ЮП;		Общая длина 168±2, Цвет ручки зеленый Ширина кончиков рабочих частей 3,2±0,2 2,2±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8,±0,5	16,5	36-56
9.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП;		Длина 150±3 Ширина в месте сварки 7±1 Максимальная ширина 8±1 Толщина в месте сварки 2,5±1,0 Высота кончика в месте сварки 13±1 Угол изгиба 45° Длина изогнутого кончика 15±1,0 Расстояние между браншами в двух измерениях 15±2 и 4,8±0,5, Высота направляющей 4,8±0,5 Толщина бранши в толстой части 2,2±0,1 и тонкой части 1,2±0,1,	22,5	42-46

9.9. Шпатель двухсторонний для цемента ПР- 9000-6-7с ЮП;		Общая длина 188±2, Цвет ручки фиолетовый Ширина кончиков рабочих частей 6±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8,±0,5	16,5	36-53
9.10. Зонд зубной изогнутый ПР- 9000-3-1с ЮП;		Общая длина 152±2 Цвет ручки черный Длина рабочей части 32±1 Длина изогнутого кончика 8±0,5 Ширина изогнутого кончика 11±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5 Диаметр кончика рукоятки 5,±0,5	12,5	42-56
9.11. Кассета стерилизационна я КССС-8-8000 ЮП.		Длина 200±2, Ширина 147±2 Высота 30±2 Высота без силиконовых ставок 27±2 Ширина без замка 140±2	306	

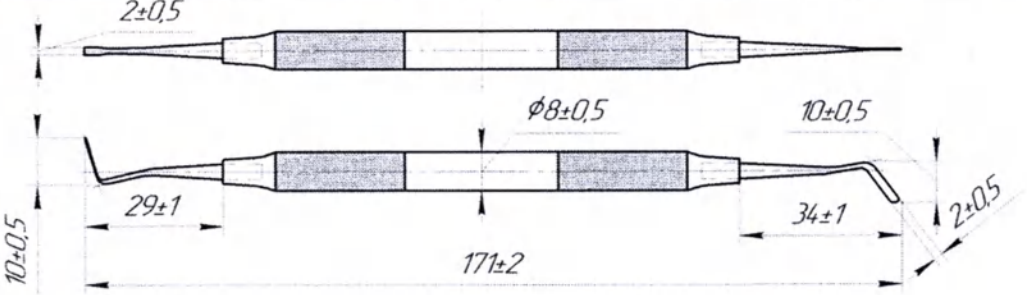
10. Набор инструментов для моделирования пломб 5000-1 ЛМП, в составе:

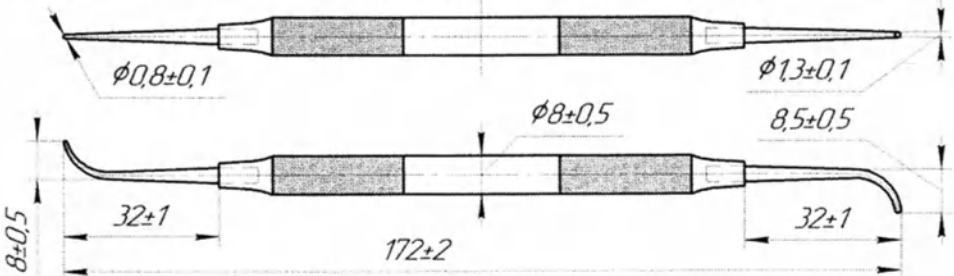
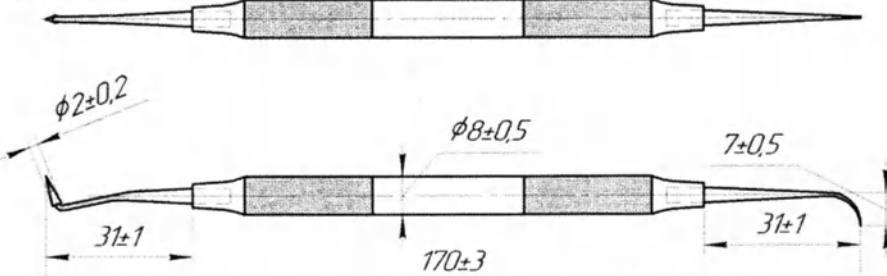
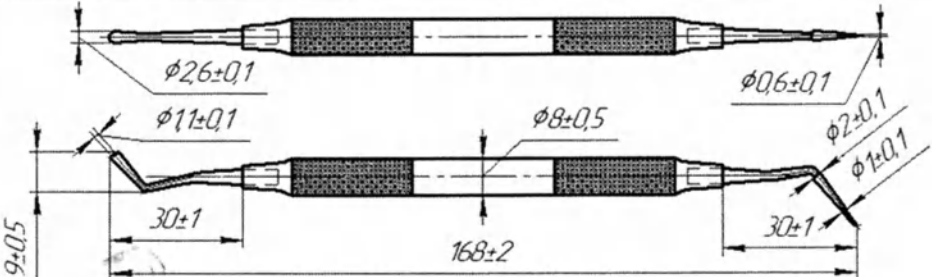
10.1. Гладилка точного моделирования CP-5000-1-1 ЛМП;		Общая длина 169 ± 2 Цвет ручки розовый Длина рабочих частей 39 ± 1 Ширина кончиков рабочих частей $2 \pm 0,5$ $2 \pm 0,5$ Диаметр рукоятки в средней части $8,5 \pm 0,75$ Ширина изогнутых кончиков $10 \pm 0,5$ $10 \pm 0,5$	18,5	36-56
10.2. Штопфер точного моделирования CP-5000-1-2 ЛМП;		Общая длина 168 ± 3 Цвет ручки зеленый Длина рабочих частей 38 ± 1 Ширина кончиков рабочих частей $1,3 \pm 0,1$ $0,8 \pm 0,1$ Ширина изогнутых кончиков $8,5 \pm 0,5$ $8 \pm 0,5$ Диаметр рукоятки в средней части $8,5 \pm 0,75$	18,5	36-56
10.3. Зонд закругленный- штопфер конусообразный сверхточного моделирования CP-5000-1-3 ЛМП;		Общая длина 170 ± 2 Цвет ручки красный Длина рабочих частей 39 ± 1; 41 ± 1 Ширина кончика рабочей части $2 \pm 0,2$ Ширина изогнутого кончика $7 \pm 0,5$ Диаметр рукоятки в средней части $8,5 \pm 0,75$	18,5	36-56

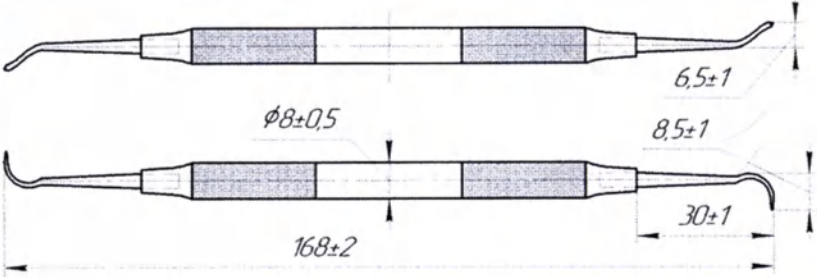
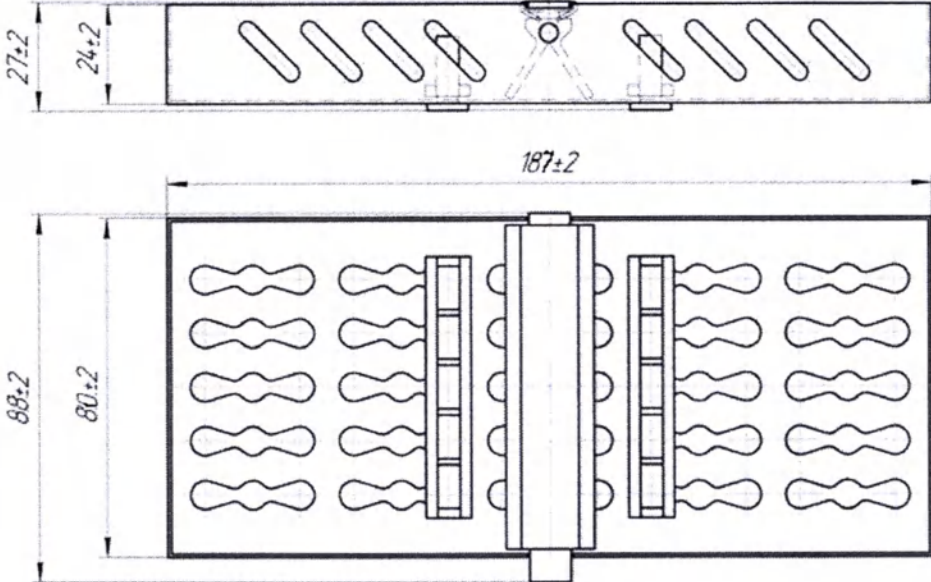
10.4. Штопфер для микрополостей СР-5000-1-4 ЛМП		Общая длина 166±2 Цвет ручки голубой Длина рабочих частей 38±1; Ширина кончиков рабочих частей 2,6±0,1 0,6±0,1 (на самом конце), 1±0,1 (перед конечным сужением) 2±0,1 (в широкой части) Толщина кончика 1,1±0,1 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	36-56
10.5. Инструмент для удаления излишков композита СР-5000-1-5 ЛМП;		Общая длина 166±2 Цвет ручки желтый Длина рабочих частей 38±1; Ширина изогнутых кончиков рабочих частей 8,5±1 6,5±1 Диаметр рукоятки в средней части 8,5±0,75	18,5	36-56

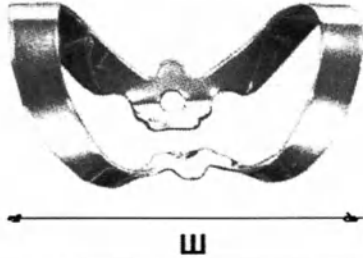
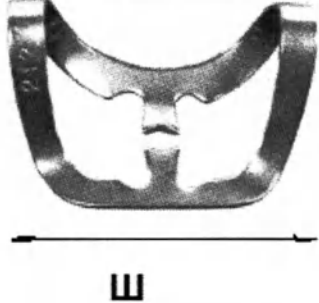
10.6. Кассета стерилизационная КССМ-4-5001 ЮП;		Длина 187±2 Ширина 88 ±2 Высота 27±2 Высота без силиконовых ставок 24±2 Ширина без замка 80±2	171	
---	--	--	------------	--

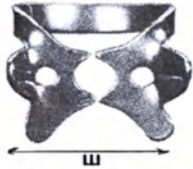
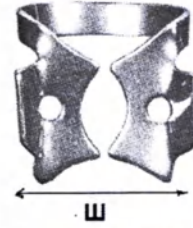
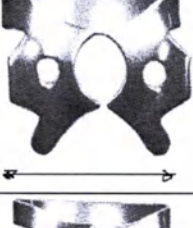
11. Набор инструментов для моделирования пломб 5000-2с ЮП, в составе:

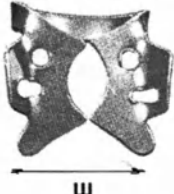
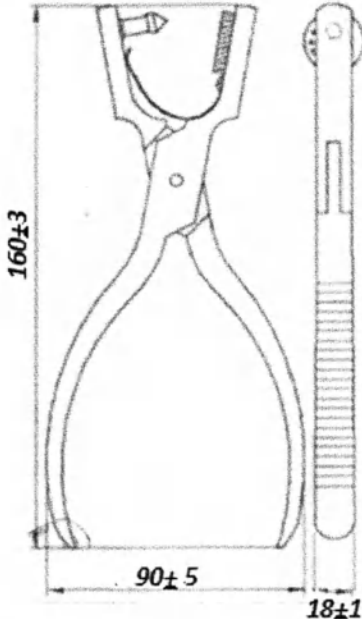
11.1. Гладилка точного моделирования ПР-5000-2-1с ЮП;		Общая длина 171±2 Цвет ручки изумрудный Длина рабочих частей 34±1; 29±1 Ширина кончиков рабочих частей 2±0,5 2±0,5 Ширина изогнутых кончиков 10±0,5 10±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	15,0	36-56
--	---	--	-------------	--------------

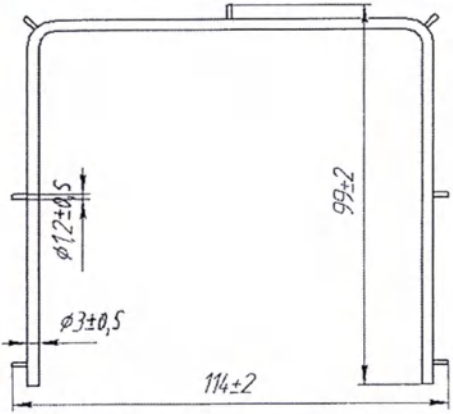
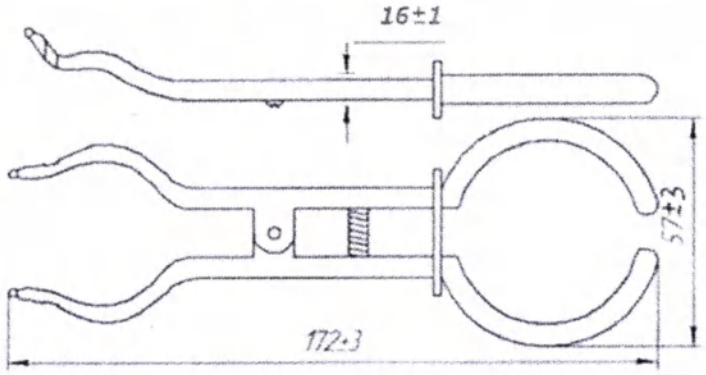
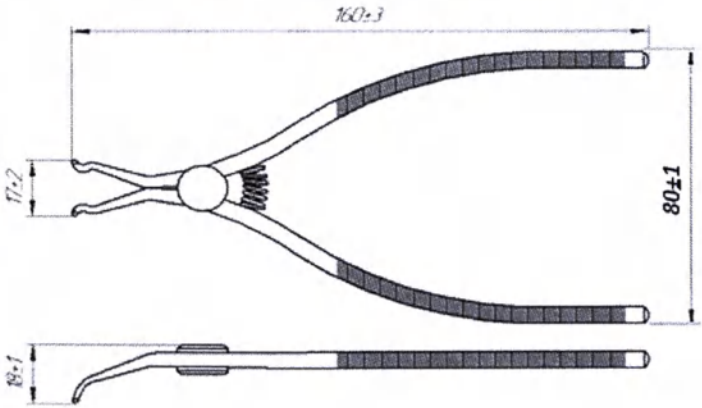
11.2. Штопфер точного моделирования ПР-5000-2-2с ЮП		Общая длина 172 ± 2 Цвет ручки желтый Длина рабочих частей 32 ± 1; Ширина кончиков рабочих частей $0,8 \pm 0,1$ $1,3 \pm 0,1$ Ширина изогнутых кончиков $8 \pm 0,5$ $8,5 \pm 0,5$ Диаметр рукоятки в средней части $8 \pm 0,5$	15,0	42-56
11.3. Зонд закругленный- штопфер конусообразный сверхточного моделирования ПР- 5000-2-3с ЮП;		Общая длина 170 ± 3 Цвет ручки зеленый Длина рабочих частей 31 ± 1; Ширина максимальная кончика рабочей части $2 \pm 0,2$ Ширина закругленного кончика раб части $7 \pm 0,5$, Диаметр рукоятки в средней части $8 \pm 0,5$	15,0	42-56
11.4. Штопфер для микрополостей ПР-5000-2-4с ЮП;		Общая длина 168 ± 2 Цвет ручки красный Длина рабочих частей $30 \pm 0,1$ Ширина кончиков рабочих частей $2,6 \pm 0,1$ $0,6 \pm 0,1$ (на самом конце) $1 \pm 0,1$ перед конечным сужением) $2 \pm 0,1$ (в широкой части) Ширина изогнутого кончика $9 \pm 0,5$ Диаметр рукоятки в средней части $8 \pm 0,5$	15,0	36-56

11.5. Инструмент для удаления излишков композита ПР-5000-2-5с ЮП;		Общая длина 168 ± 2 Цвет ручки темно-синий Длина рабочих частей $30 \pm 0,1$ Ширина изогнутых кончиков раб частей $6,5 \pm 1$ $8,5 \pm 1$ Диаметр рукоятки в средней части $8 \pm 0,5$	15,0	42-46
11.6. Кассета стерилизационная КССМ-4-5001 ЮП.		Длина 187 ± 2 Ширина 88 ± 2 Высота 27 ± 2 Высота без силиконовых ставок 24 ± 2 Ширина без замка 80 ± 2	171	-
12. Набор для раббердама 200 ЮП, в составе:				

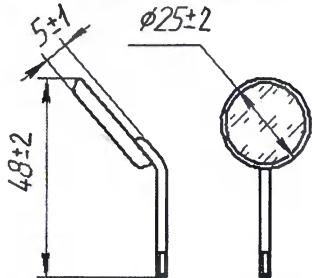
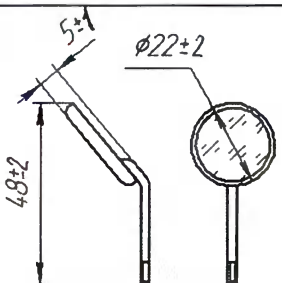
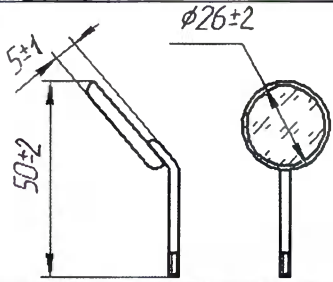
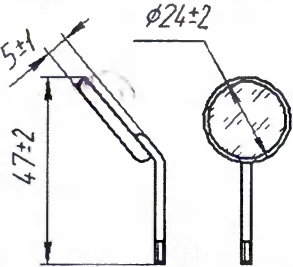
12.1. Кламмер 2510-9 ПП;		Ширина макс. 32±1 мм	1,3	-
12.2. Кламмер 2512-212 ПП;		Ширина макс 30 ±1 мм	1,4	-
12.3. Кламмер 2513-210 ПП;		Ширина макс 32 ±1 мм	1,3	-
12.4. Кламмер 2515-0 ПП;		Ширина макс 16 ±1 мм	1,0	-
12.5. Кламмер 2517-1 ПП;		Ширина макс 16 ±1 мм	1,5	-

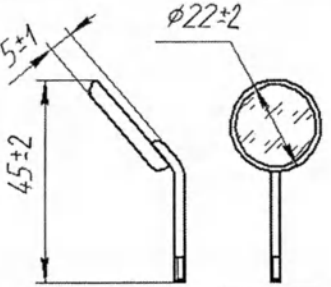
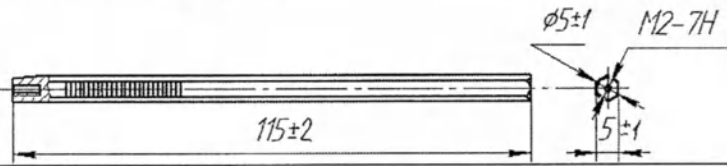
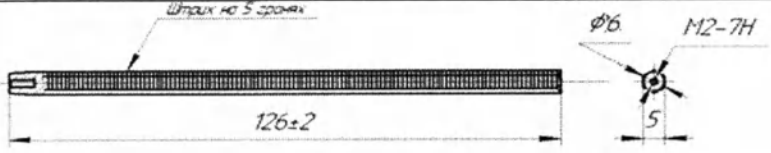
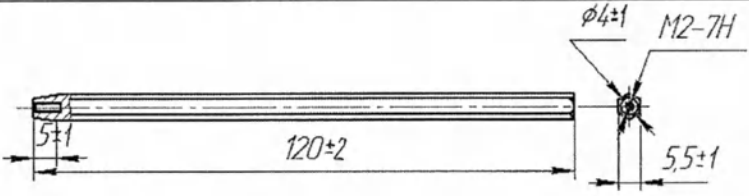
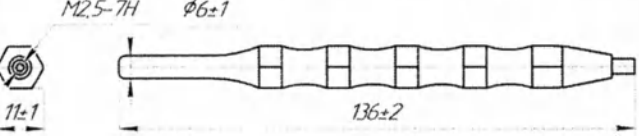
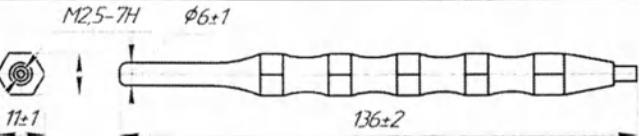
12.6. Кламмер 2520-2А ПП;		Ширина макс 17 ±1 мм	1,3	-
12.7. Кламмер 2532-7 ПП;		Ширина макс 17 ±1 мм	1,5	-
12.8. Кламмер 2534-8 ПП		Ширина макс 18 ±1 мм	1,5	-
12.9. Кламмер 2536-8А ПП;		Ширина макс 19 ±1 мм	1,3	-
12.10. Кламмер 2540-14 ПП;		Ширина макс 19 ±1 мм	1,4	-
12.11. Кламмер 2543-14А ПП;		Ширина макс 19 ±1 мм	1,5	-

12.12. Кламмер 2547-202 ПП,		Ширина макс 17 ± 1 мм	1,6	-
12.13. Кламмер 2548-205 ПП;		Ширина макс 18 ± 1 мм	1,6	-
12.14. Щипцы- пробойник для раббердама 170мм-2502 ПП;		Длина 160 ± 3 мм Ширина ручек в раскрытом состоянии 90 ± 5 Ширина браншей 18 ± 1	166	-

12.15. Рамка для раббердама 2500 ПП;		Ширина 114±2 мм Длина 99±2 мм Толщина 12±0,5 Диаметр выступов 1,2±0,5	16	-
12.16. Щипцы для наложения кламмеров 175мм-2507 ПП;		Длина 172±3 мм Ширина 57±3 Толщина рабочей части в средней части 16±1	81	31-45
12.17. Щипцы для установки пружинных держателей кольца 200-1 ЮП.		Длина 160±3 мм Ширина ручек 80±1 Ширина губок 17±2 Толщина 18±1	58	-

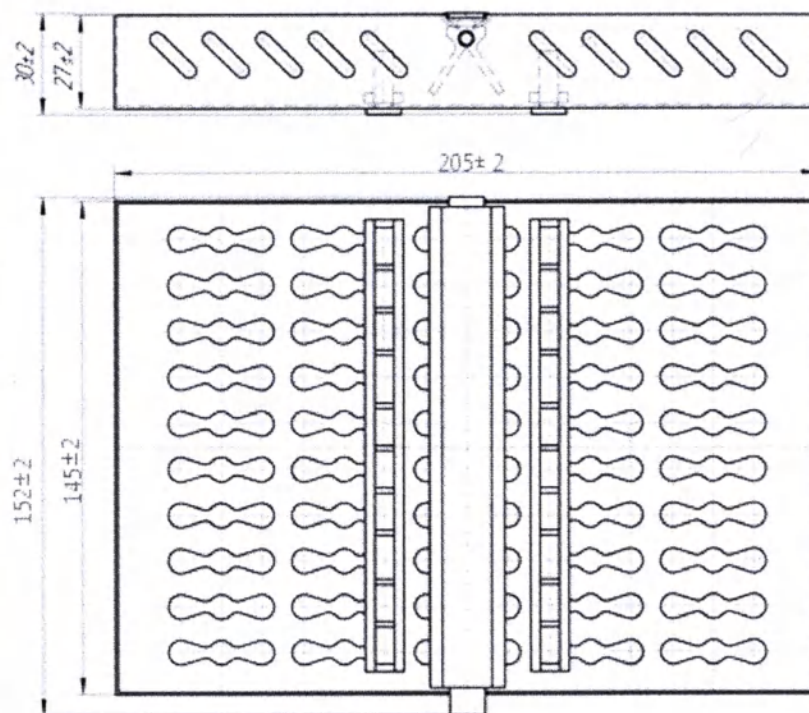
13. Набор зеркал стоматологических и ручек к зеркалам 1900 ПП-ЮП, в составе:

13.1. Зеркало 1903 ПП,		Длина зеркала 48±2 Диаметр зеркала 25±2 Толщина 5±1 Плоское	5,0	
13.2. Зеркало 1905 ПП,		Длина зеркала 48±2 Диаметр зеркала 22±2 Толщина 5±1 Плоское	5,0	
13.3. Зеркало 1907 ПП,		Длина зеркала 50±2 Диаметр зеркала 26±2 Толщина 5±1 Выпуклое	7,0	
13.4. Зеркало 1908 ПП,		Длина зеркала 47±2 Диаметр зеркала 24±2 Толщина 5±1 Выпуклое	5,0	

13.5. Зеркало 1909 ПП;		Длина зеркала 45±2 Диаметр зеркала 22±2 Толщина 5±1 Выпуклое	5,0	
13.6. Ручка 100-2 МП,		Длина 115±2 Диаметр ручки 5±1 Резьба M2-7H	21,0	42-46
13.7. Ручка 1900 ПП,		Длина 126±2 Ширина по ребрам 6±1 Ширина по плоским сторонам 5±1 Штрих на пяти гранях Резьба M2-7H	23,0	42-46
13.8. Ручка 100-1 СП,		Длина 120±2 Ширина по ребрам 5,5±1 Ширина по плоским поверхностям 4±1 Глубина резьбы в ручке 5±1 Резьба M2-7H	25,0	42-46
13.9. Ручка фиолетовая 1907 ЮП,		Длина 136±2 Ручка шестигранник. Ширина по ребрам 11,1±1 Ширина в резьбовой части 6±1 Резьба M2-7H	8,5	-
13.10. Ручка коричневая 1908 ЮП;		Длина 136±2 Ручка шестигранник. Ширина по ребрам 11,1±1 Ширина в резьбовой части 6±1 Резьба M2-7H	7,0	-

13.11. Ручка синяя 1909 ЮП;		Длина 136±2 Ручка шестигранник. Ширина по ребрам 11,1±1 Ширина в резьбовой части 6±1 Резьба М2-7Н	8,5	-
13.12. Ручка черная 1910 ЮП;		Длина 136±2 Ручка шестигранник. Ширина по ребрам 11,1±1 Ширина в резьбовой части 6±1 Резьба М2-7Н	7,0	-
13.13. Зеркало с ручкой 9008-8-2;		Длина 165±5 Диаметр зеркала 22±2 Длина ручки 120±2 Диаметр ручки в средней части 8±0,5 Диаметр кончика ручки 5±0,5	23,0	

13.14. Кассета
стерилизационная
КСД-10-9010
ЮП.

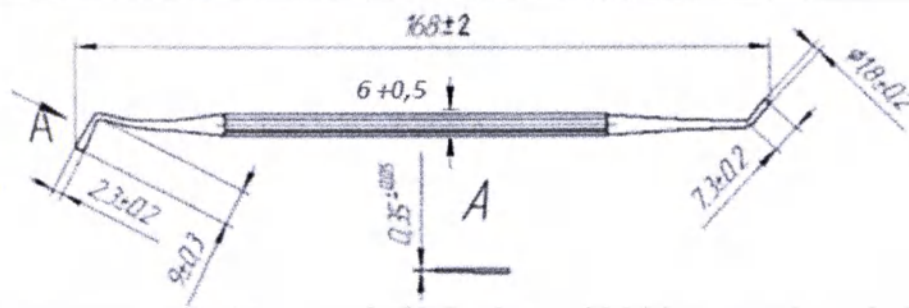


Длина 205±2
Ширина 152±2
Высота 30±2
Высота без силиконовых
вставок 27±2
Ширина без замка 145±2

310

14. Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП, в составе:

14.1. Гладилка
двухсторонняя
№3-1410 ПП;

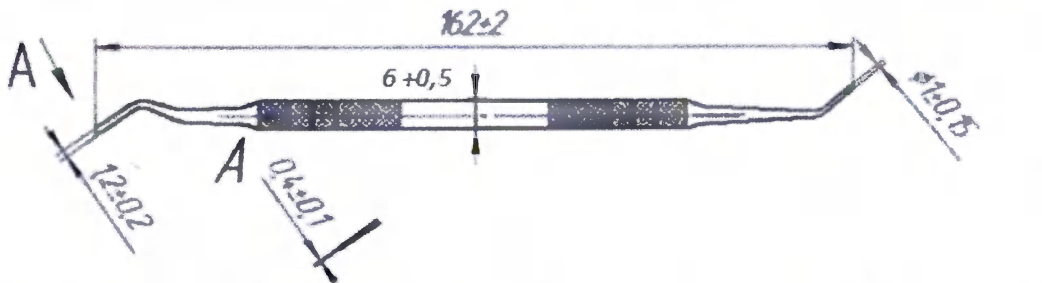
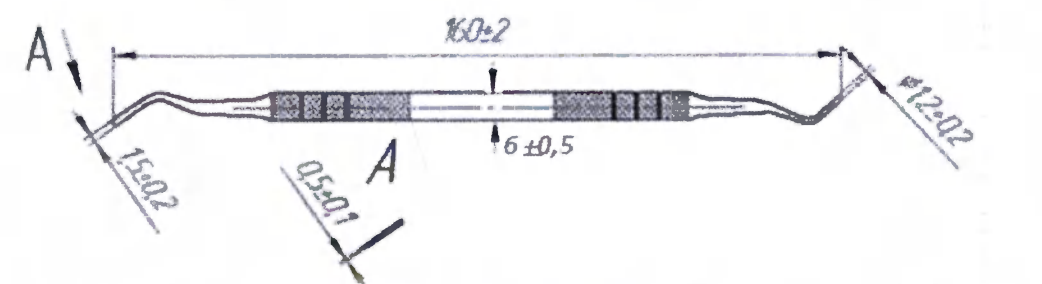
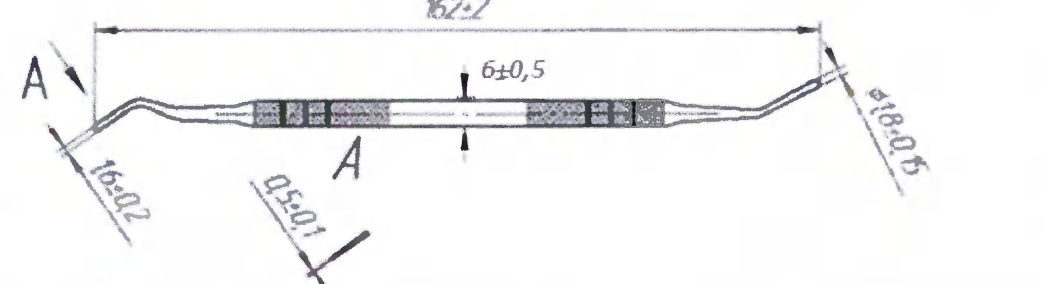
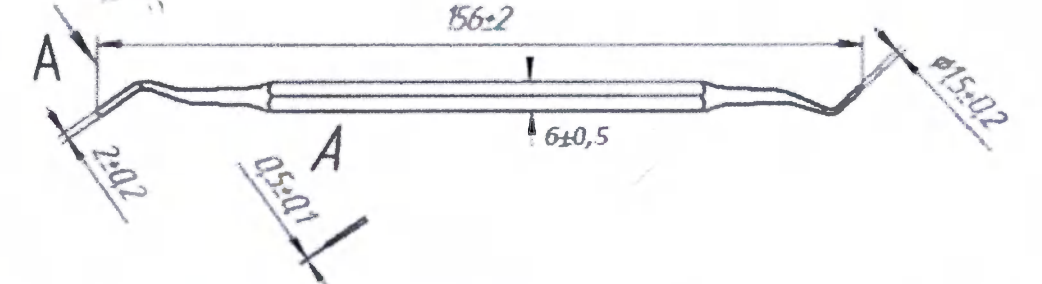


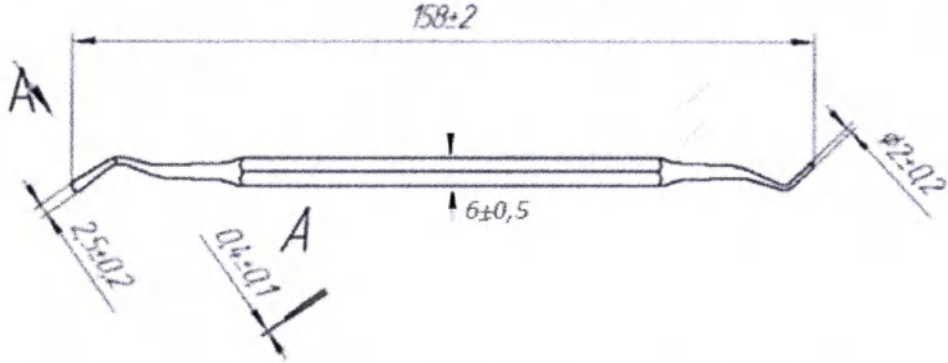
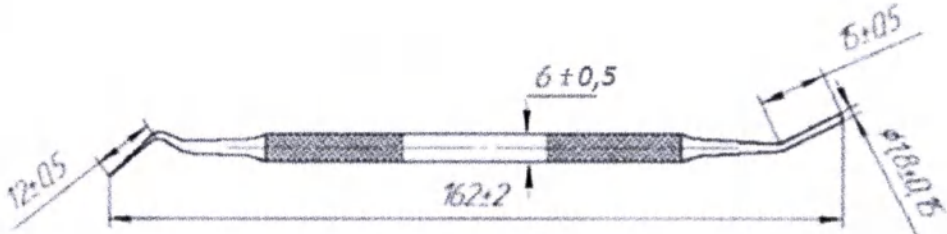
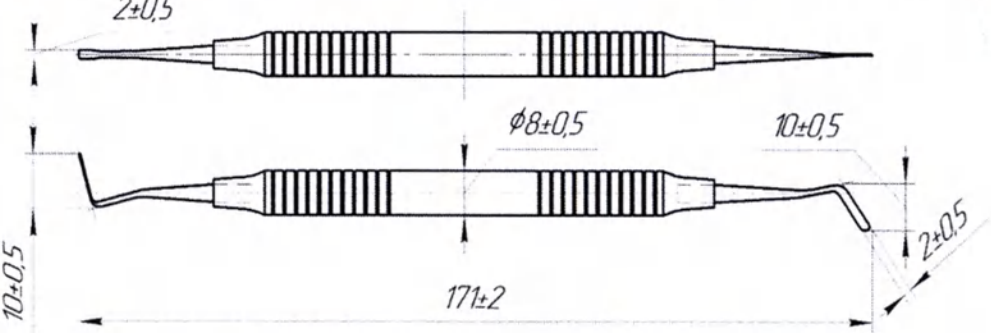
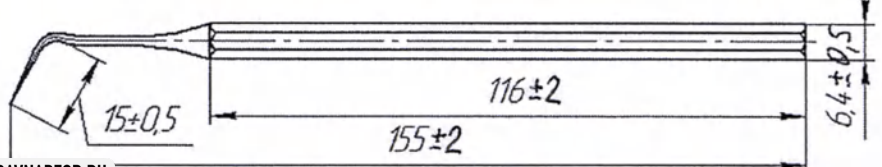
Общая длина 168±2
Ширина кончиков
рабочих частей:
2,3±0,2
1,8±0,2
Толщина кончиков
рабочей части 0,35±0,05
Длина изогнутых
кончиков
9±0,3
7,3±0,2

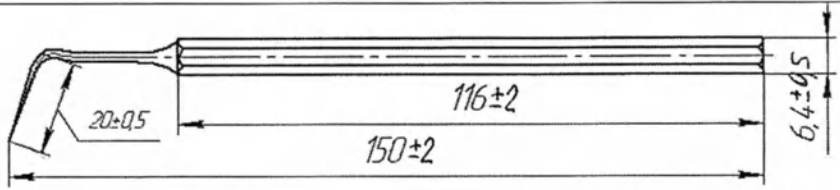
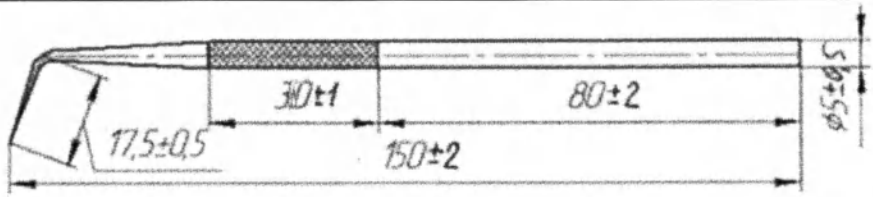
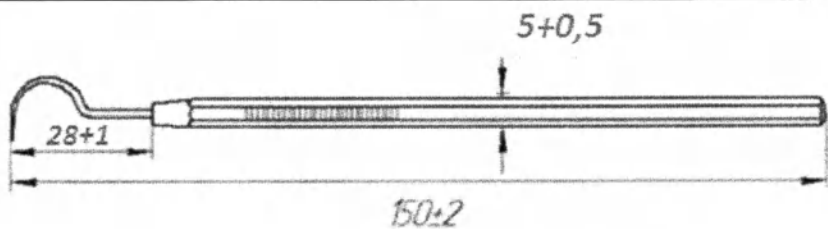
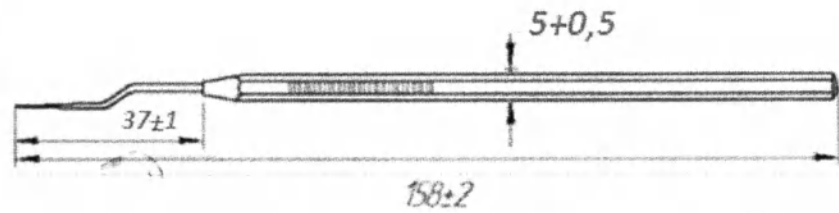
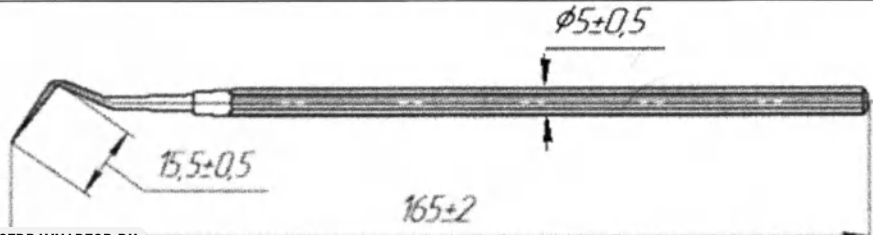
23,0

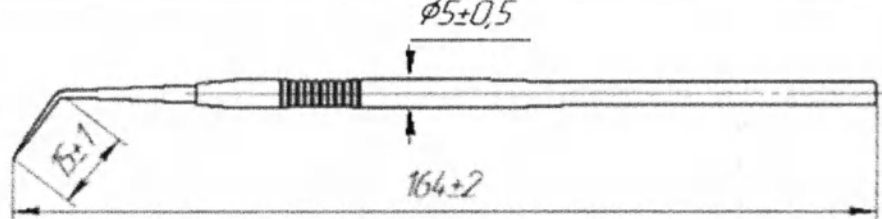
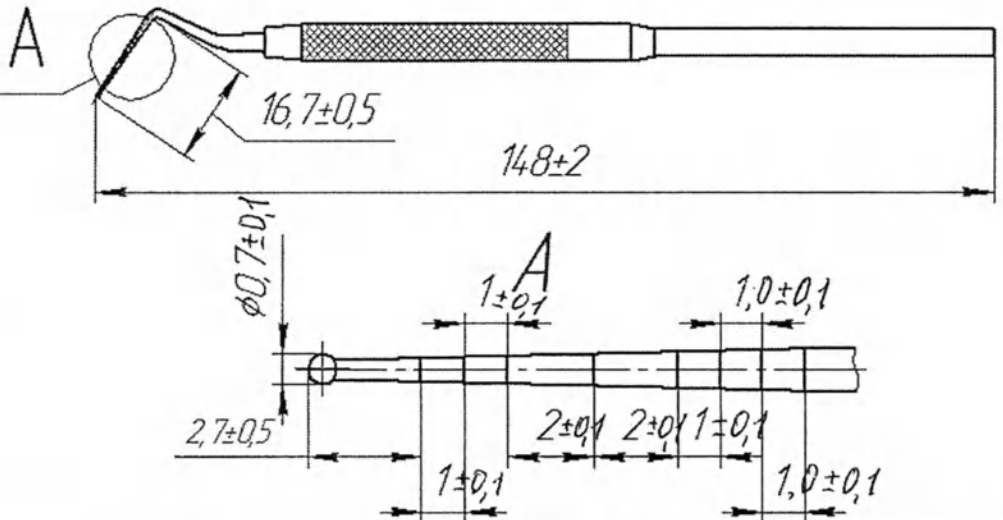
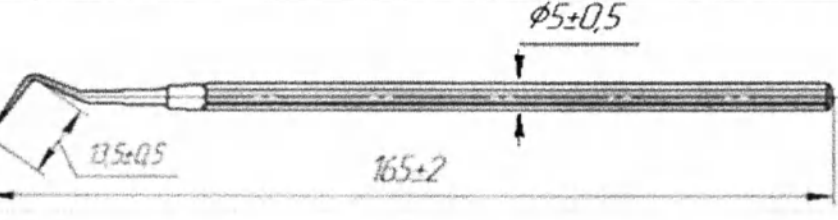
36-56

14.5. Гладилка серповидная 10-4 МП;		Общая длина 158±2 Ширина кончиков рабочих частей 2±0,5 3±0,5 Толщина кончиков рабочей части 0,4±0,2 Ширина рукоятки 6 ±0,5	25,0	36-56
14.6. Гладилка шаровидная 10-1 СП;		Общая длина 158±2 мм Ширина кончиков рабочих частей 2,5±0,15 2,5±0,2 Толщина кончика рабочей части 0,4±0,1 Ширина рукоятки 6 ±0,5	23,0	36-56
14.7. Гладилка 10-13 ЮП;		Общая длина 170±5 Ширина кончиков рабочих частей 2±0,5 2±0,5 Ширина изогнутых кончиков 10±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	19,0	36-56
14.8. Штопфер-гладилка: №1-10-8 СП;		Общая длина 160±2 Ширина кончиков рабочих частей 1,2±0,15 1,5±0,2 Толщина кончика рабочей части 0,4±0,2 Ширина рукоятки 6±0,5	25,0	36-56

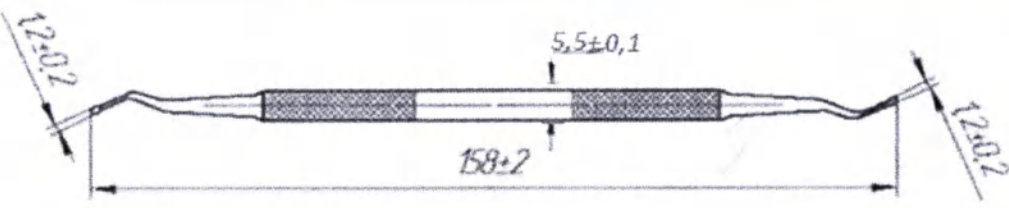
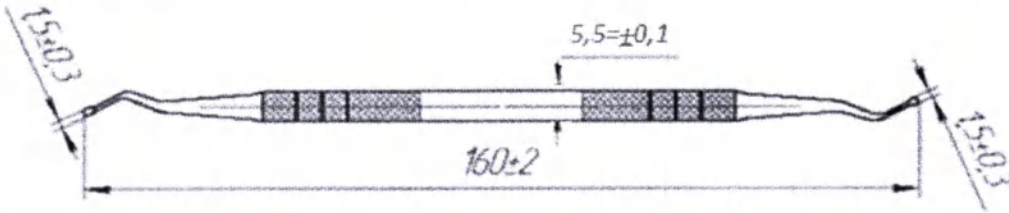
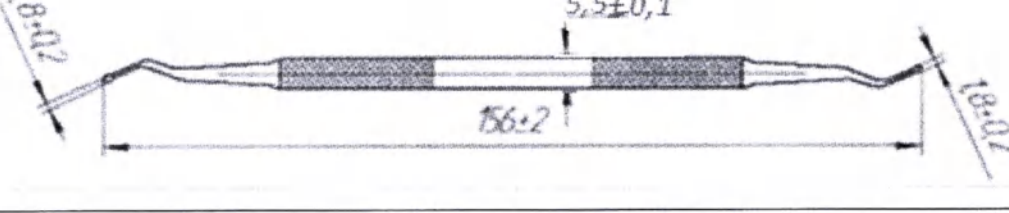
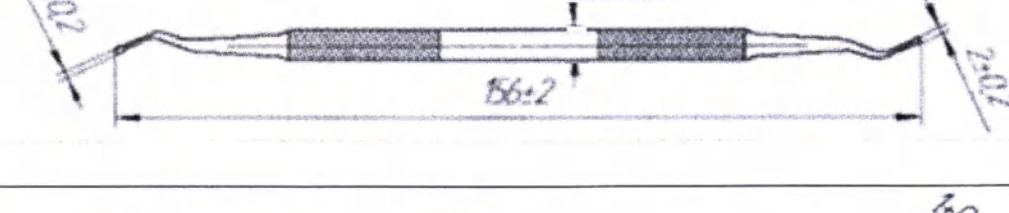
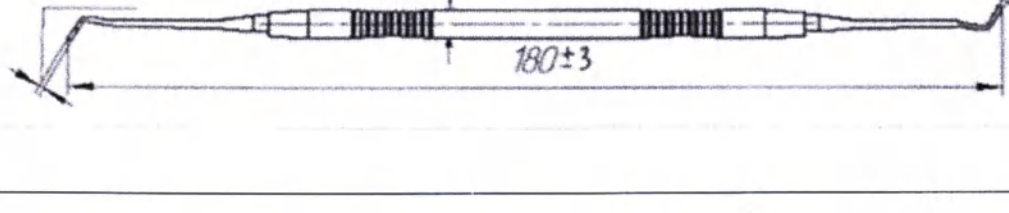
14.9. Штопфер-гладилка №1-10-5 МП;		Общая длина 162 ± 2 Ширина кончиков рабочих частей $1,2 \pm 0,2$ $1 \pm 0,15$ Толщина кончика рабочей части $0,4 \pm 0,2$ Диаметр рукоятки $6 \pm 0,5$	23,0	36-56
14.10. Штопфер-гладилка №2-10-6 МП;		Общая длина 160 ± 2 Ширина кончиков рабочих частей $1,2 \pm 0,2$ $1,5 \pm 0,2$ Толщина кончика рабочей части $0,5 \pm 0,1$ Диаметр рукоятки $6 \pm 0,5$	19,0	36-56
14.11. Штопфер-гладилка №3-10-7 МП;		Общая длина 162 ± 2 Ширина кончиков рабочих частей $1,6 \pm 0,2$ $1,8 \pm 0,15$ Толщина кончика рабочей части $0,5 \pm 0,1$ Диаметр рукоятки $6,0 \pm 0,5$	21,0	36-56
14.12. Штопфер-гладилка №2-10-9 СП;		Общая длина 156 ± 2 Ширина кончиков рабочих частей $2 \pm 0,2$ $1,5 \pm 0,2$ Толщина кончиков рабочей части $0,5 \pm 0,1$ Ширина рукоятки $6,0 \pm 0,5$	24,0	36-56

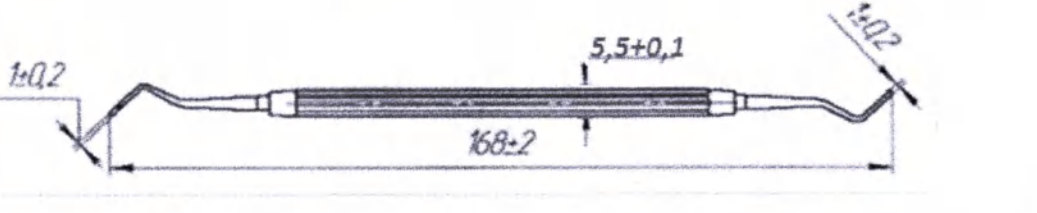
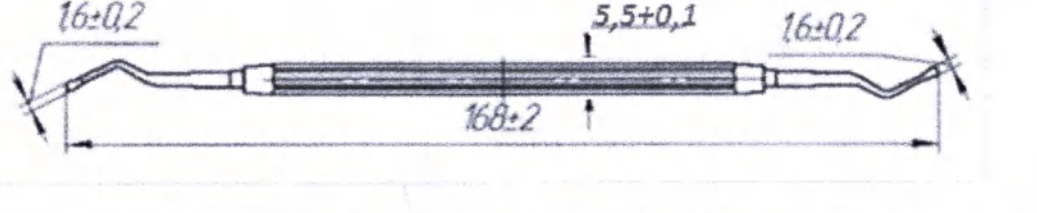
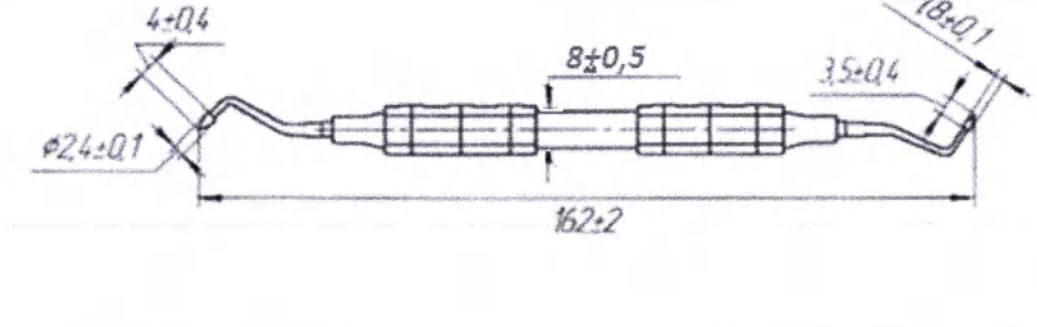
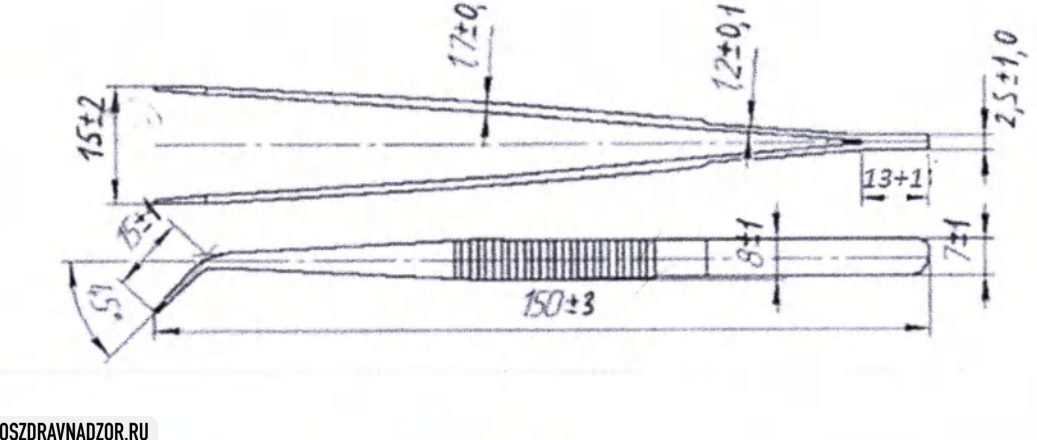
14.13. Штопфер-гладилка №3-10-10 СП;		Общая длина 158±2 Ширина кончиков рабочих частей 2±0,2 2,5±0,2 Толщина кончика рабочей части 0,4±0,1 Ширина рукоятки 6,0±0,5	23,0	36-56
14.14. Штопфер-гладилка №5-10-10 МП;		Общая длина 162±2 Ширина кончиков рабочих частей 1,8±0,15 1,8±0,15 Длина изогнутых кончиков 12±0,5 15±0,5 Диаметр рукоятки 6,0±0,5	23,0	36-56
14.15. Штопфер-гладилка 10-12 ЮП;		Общая длина 171±2 мм Ширина кончиков рабочих частей 2±0,5 2±0,5 Ширина изогнутых кончиков 10±0,5 10±0,5 Диаметр рукоятки 8±0,5	19,0	36-56
14.16. Зонд изогнутый L=15-30-1 СП;		Общая длина 155±2 Длина изогнутого кончика 15±0,5 Длина рукоятки 116±2 Ширина рукоятки	29,0	42-56

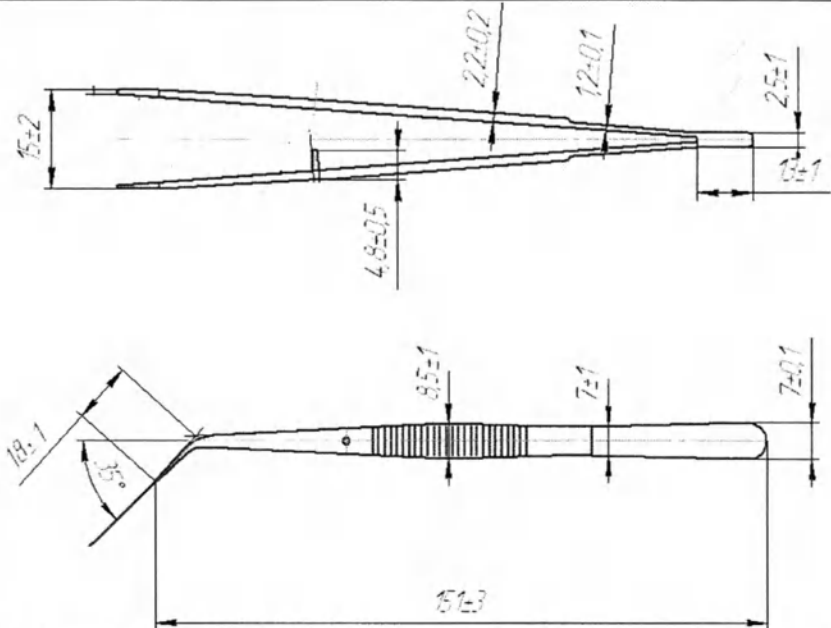
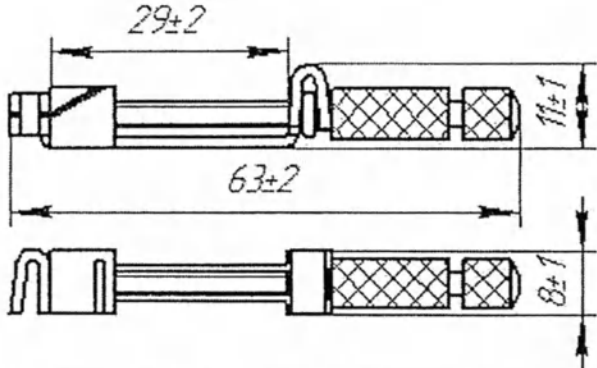
14.17. Зонд изогнутый L=20-30-2 СП;		6,4±0,5 Общая длина 150±2 Длина изогнутого кончика 20±0,5 Длина рукоятки 116±2 Ширина рукоятки 6,4±0,5	29,0	42-56
14.18. Зонд изогнутый 30-3 МП;		Общая длина 150±2 Длина изогнутого кончика 17,5 ±0,5 Длина части рукоятки с насечками 30±1 Длина части рукоятки без насечек 80±2 Ширина рукоятки 5±0,5	25,0	42-56
14.19. Зонд серповидный 30-4 МП;		Общая длина 150±2 Длина рабочей части 28±1 Ширина рукоятки 5±0,5	27,0	42-56
14.20. Зонд штыковидный 30-5 МП		Общая длина 158±2 Длина рабочей части 37±1 Ширина рукоятки 5±0,5	27,0	42-56
14.21. Зонд диагностический угловой 1801 ПП;		Общая длина 165±2 Длина изогнутого кончика 15,5±0,5 Ширина рукоятки 5±0,5	21,0	42-56

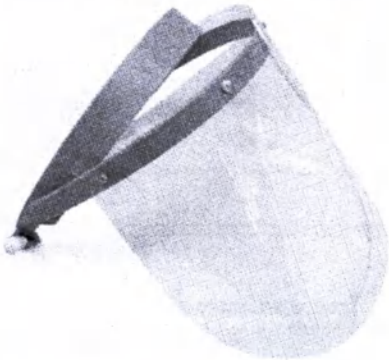
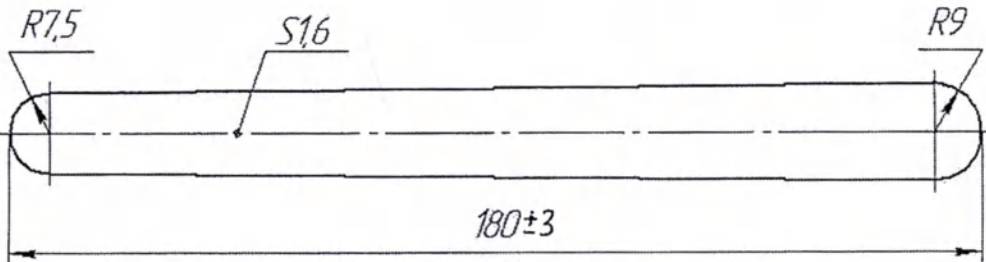
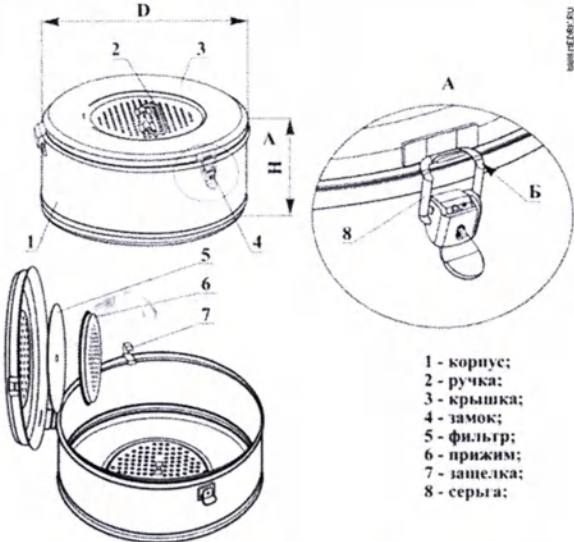
14.22. Зонд диагностический угловой 1480-10 ПП;;		Общая длина 164±2 Длина изогнутого кончика 15±1 Ширина рукоятки максимальная 5±0,5	21,0	42-56
14.23. Зонд периодонтальны й с делениями 1497 ПП;		Общая длина 148±2 Длина изогнутого кончика 16,7±0,5 Диаметр кончика рабочей части 0,7 ±0,1 Расстояния между делениями:. От кончика: 2,7±0,5; 1±0,1; 1±0,1; 2±0,1; 2±0,1; 1±0,1; 1±0,1; 1±0,1;	17,0	42-56
14.24. Зонд угловой 1472-2;		Общая длина 165±2 Длина изогнутого кончика 13,5±0,5 Диаметр рукоятки 5±0,5	25,0	42-56

14.25. Зонд изогнутый 9000-8-1 ЮП		Длина 152±2 мм Длина рабочей части 32±1 Длина изогнутого кончика 8±0,5 Ширина изогнутого кончика 11±0,5 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5 Диаметр кончика рукоятки 5±0,5	13,0	42-56
14.26. Экскаватор №1-105-1 СП,		Общая длина 160±2 Ширина кончика рабочей части 1,0±0,2 1,0±0,2 Ширина рукоятки 6,9±1	23,0	42-46
14.27. Экскаватор №2-105-2 СП,		Общая длина 160±2 Ширина кончика рабочих частей 1,5±0,2 1,5±0,2 Ширина рукоятки 6,9±1	25,0	42-46
14.28. Экскаватор №3-105-3 СП,		Общая длина 160±2 Ширина кончика рабочей части 2±0,2 2±0,2 Ширина рукоятки 6,9±1	25,0	42-46

14.29. Экскаватор №1- 105-4 МП,		Общая длина 158±2 Ширина кончика рабочей части 1,2±0,2 1,2±0,2 Диаметр рукоятки 5,5±0,1	21,0	42-46
14.30. Экскаватор №2- 105-5 МП,		Общая длина 160±2 Ширина кончика рабочей части 1,5±0,3 1,5±0,3 Диаметр рукоятки 5,5±0,1	23,0	42-46
14.31. Экскаватор №3- 105-6 МП,		Общая длина 156±2 Ширина кончиков рабочих частей 1,8±0,2 1,8±0,2 Диаметр рукоятки 5,5±0,1	21,0	42-46
14.32. Экскаватор №4- 105-7 МП,		Общая длина 156±2 Длина рабочей части 33±1 Ширина кончика рабочей части 2±0,2 Диаметр рукоятки 5,5±0,1	17,0	42-46
14.33. Экскаватор для размягченного дентина 0,8 мм- 1860 ПП,		Общая длина 180±3 Ширина кончиков рабочих частей 1±0,2 1±0,2 Диаметр рукоятки в средней части 5,5±0,1	19,0	42-46

14.34. Экскаватор для размягченного дентина 0,8 мм- 1861 ПП,		Общая длина 168±2 Ширина кончиков рабочих частей 1±0,2 1±0,2 Диаметр рукоятки 5,5±0,1	19,0	42-46
14.35. Экскаватор для размягченного дентина 1,4 мм- 1859 ПП,		Общая длина 168±2 Ширина кончиков рабочих частей 1,6±0,2 1,6±0,2 Диаметр рукоятки 5,5±0,1	21,0	42-46
14.36. Экскаватор для размягченного дентина с силиконом 904.030 ПП;		Общая длина 162±2 Ширина кончиков рабочих частей 2,4±0,1 1,8±0,1 Длина кончика рабочих частей 4±0,4 3,5±0,4 Диаметр рукоятки в средней части 8±0,5	17,0	42-46
14.37. Пинцет изогнутый с насечкой 80-1 СП;		Длина 150±3 Ширина в месте сварки 7±1 Максимальная ширина 8±1 Толщина в месте сварки 2,5±1,0 Высота кончика в месте сварки 13±1 Угол изгиба 45° Длина изогнутого кончика 15±1,0 Толщина бранши в толстой части 1,7±1,0 И в тонкой части 1,2±1,0 Максимальное	23,0	42-46

14.38. Пинцет изогнутый с насечкой 150мм- 2422 ПП		расстояние между браншами 15±2 Длина 151±3 Ширина в месте сварки 7±1 Максимальная ширина бранши 8,5±1 Толщина бранши в толстой части 2,2±0,2 и тонкой части 1,2±0,1 Высота кончика в месте сварки 13±1 Толщина в месте сварки 2,5±1,0 Угол изгиба 35° Высота направляющей 4,8±0,5 Длина изогнутого кончика 18 ±1	23,0	42-46
14.39. Матрицедержате ль 108 МП;		Длина 63±2 Ширина 11±1 Длина рабочей части 29±2	13,0	42-46

14.40. Экран защитный стоматологический со сменными щитками 1000-1;		Длина щитка экрана $19,0 \pm 3$ Ширина щитка экрана $28,3 \pm 3$ Толщина щитка экрана $0,2 \pm 0,02$ Длина дуги для фиксации на голове 47 ± 3 Длина дуги для фиксации щитка 39 ± 3	54,0	-
14.41. Шпатель для языка двухсторонний прямой 103-1 МП;		Длина 180 ± 3 Ширина на кончиках рабочих частей 15 ± 1 и 18 ± 1 Радиус кривизны на кончиках рабочих частей $9 \pm 0,5$ $7,5 \pm 0,5$	45,0	42-46
14.42. Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 ГП-980-9.	 1 - корпус; 2 - ручка; 3 - крышка; 4 - замок; 5 - фильтр; 6 - прижим; 7 - накладка; 8 - серьга;	Условный объем 12 л, Диаметр D не более 320 мм, Высота не более 180 мм Диаметр фильтра, 175 мм Количество замков, 2 шт.	1765	-

6.2 Значения шероховатости

Тип поверхности	Шероховатость Ra (мкм) Не более
Наружные блестящие поверхности инструментов	0,16
Наружных электрохимполированные поверхности	0,32
Матовые наружные поверхности	0,63
Внутренние рабочие поверхности (режущие кромки, рифления, острые части (лезвия).	0,63
Внутренние поверхности поверхностей зубцов и нарезок рабочих частей	1,25
Ручки, рукоятки инструментов, внутренних поверхностей замков и углублений ручек	1,25

7. Принадлежности

Принадлежности отсутствуют

8. Содержание материалов животного или человеческого происхождения, лекарственных средств

Изделие не содержит материалов животного или человеческого происхождения. Изделие не содержит лекарственных средств.

9. Ввод изделия в эксплуатацию, порядок работы

9.1. Требования к помещениям

Изделие предназначено для эксплуатации в ЛПУ, имеющих лицензию, в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 65% при температуре + 25°C.

Наборы поставляются нестерильными в стерилизационных кассетах, стерилизационных коробках, набор для раббердама 200 ЮП – в пластиковом ячейковом поддоне к крышкой. Каждый инструмент внутри стерилизационной коробки упакован в пакетик из пузырчатой пленки. Перед первым применением и после каждого использования для каждого варианта исполнения необходима процедура очистки, дезинфекции и стерилизации, за исключением следующих инструментов, которые готовы к применению после извлечения из упаковки:

- Экран защитный стоматологический со сменными щитками 1000-1 из набора Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП, Сменные щитки экрана защитного стоматологического являются одноразовыми, утилизируются после каждого эпизода применения как медицинские отходы класса Б.

9.2. Очистка, дезинфекция

- Извлеките набор из индивидуальной упаковки.
- Удалите упаковку с каждого инструмента (для наборов в стерилизационных коробках).
- Осмотрите инструменты. Убедитесь, что они не повреждены (отсутствуют сколы, трещины, заусенцы),
- Убедитесь, что все подвижные части шарнирных инструментов работают нормально (при сжатии рукояти соблюдается плавный ход).
- Обработка и очистка инструментов должна производиться пользователем в защитной повязке, маске и перчатках.
- Инструмент очищают вручную с помощью щетки и мягкого мыла, споласкивают в проточной воде для удаления следов загрязнения
- Инструмент погружают в емкость с дезинфицирующим раствором:
например, «Средство дезинфицирующее "МЕГАДЕЗ®"» производства АО "ОЭЗ "ВладМиВа" (RU.77.99.88.002.E.000522.02.19 от 08.02.2019 г.) согласно инструкции по применению.
- Повторно ополоснуть инструмент в проточной воде в течение 5 минут, затем в дистиллированной воде.
- Перед стерилизацией инструмент сушат горячим воздухом при температуре (85°±2° C) до полного исчезновения влаги, после этой процедуры раскладывают инструменты в стерилизационные кассеты или коробки.
- Шарнирные соединения (для щипцов из Набора для раббердама 200 ЮП, в составе:) рекомендуется смазать маслом.
Рекомендуемые масла для смазки перед стерилизацией шарнирных инструментов
Средство для обработки, "Стерилит" (STERILIT), производства "Эскулап АГ", Германия,
Масло MILTEX SPRAY LUBE 3-700, производства "Милтекс, Инк.", США.

9.3. Стерилизация

Валидированный метод стерилизации - паровой метод (водяной насыщенный пар под избыточным давлением, автоклав тип В по ГОСТ Р ИСО 17665):

Температура: $132^{\circ}\text{C} \pm 2$,

Давление: $0,2 \pm 0,02$ МПа ($2(\pm 0,2)$ кгс/см²)

Время экспозиции: 20+2 мин.

Цикл стерилизации завершить пост-вакуумной сушкой в течении 10 минут до полного высыхания инструмента.

Наборы, простерилизованные в стерилизационных коробках с фильтром сохраняют стерильность 3 суток.

Стерилизационные кассеты не являются упаковкой для хранения простерилизованных изделий, инструменты должны быть незамедлительно применены для использования.

Наборы выдерживают не более 1000 циклов стерилизации.

10. Инструкция по повторной обработке и стерилизации

Внимание	• Недостаточная очистка может стать причиной плохой стерилизации. • Стерилизации НЕ ПОДЛЕЖАТ: - Экран защитный стоматологический со сменными щитками 1000-1 из набора Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП, (оправа экрана очищается 1 раз в сутки теплой водой с мылом под проточной водой, сменные щитки являются одноразовыми и утилизируются после каждого эпизода применения). • Все процедуры по очистке, дезинфекции, стерилизации а также эксплуатация изделия должна производиться пользователем в защитной повязке, маске и перчатках.
Ограничения при проведении повторной обработки	Наборы выдерживают не более 1000 циклов стерилизации.
ИНСТРУКЦИИ	
Место использования	Нет специальных требований
Защита и транспортирование	Инструмент, простерилизованный в стерилизационных кассетах, доставляется к месту использования непосредственно перед применением.
Подготовка	Нет специальных требований. Разборка не требуется
Очистка ручная	Инструменты очищают вручную с помощью щетки и мягкого мыла, споласкивают в проточной воде для удаления следов загрязнения
Дезинфекция	- Погрузите инструменты в рабочий раствор дезинфицирующего средства, например, «Средство дезинфицирующее "МЕГАДЕЗФ"» производства АО "ОЭЗ "ВладМиВа" (RU.77.99.88.002.E.000522.02.19 от 08.02.2019 г.) согласно инструкции по применению. - Повторно ополоснуть инструмент в проточной воде в течение 5 минут, затем в дистиллированной воде.
Сушка	- Перед стерилизацией инструмент сушат горячим воздухом при температуре ($85^{\circ}\pm 2^{\circ}$ C) до полного исчезновения влаги, после этой процедуры раскладывают инструменты в стерилизационные кассеты или коробки.
Техническое обслуживание	Смазать шарнирные соединения маслом. Произвести визуальный осмотр изделия. Удалить поврежденный инструмент.
Проверка и испытания	Проверить шарнирные соединения на плавность хода (без "игры") шарнира. Весь инструмент должен быть проверен на наличие повреждений и износа..
Упаковка	Наборы стерилизуются в стерилизационных кассетах и коробках, в которых упакованы первоначально. Наборы, изначально упакованные в пластиковые ячейковые поддоны перекладывают в подходящие по размеру стерилизационные коробки.

Стерилизация	Паровой метод (водяной насыщенный пар под избыточным давлением, автоклав тип В: Температура: $132^{\circ}\text{C} \pm 2$, Давление: $0,2 \pm 0,02$ МПа ($2(\pm 0,2$ кгс/см ²) Время экспозиции: 20+2 мин. Цикл стерилизации завершить пост-вакуумной сушкой в течении 10 минут до полного высыхания инструмента.
Хранение	Наборы, простерилизованные в стерилизационных коробках с фильтром сохраняют стерильность до 3 суток. Стерилизационные кассеты не являются упаковкой для хранения простерилизованных изделий, инструменты должны быть незамедлительно применены для использования.
Дополнительная информация	Рекомендуемые масла для смазки перед стерилизацией шарнирных инструментов Средство для обработки, "Стерилит" (STERILIT), производства "Эскулап АГ", Германия, Масло MILTEX SPRAY LUBE 3-700, производства "Милтекс, Инк.", США.
Изготовитель	Закрытое акционерное общество «Завод Белмединструменты (ЗАО «Завод Белмединструменты), Республика Беларусь, 225730, Брестская область, Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31 В, тел. +375 (0165) 68 09 41, тел./факс+375 (0165) 67-35-05, zbmi@medtehnika.by

11. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Техническое обслуживание медицинского изделия заключается в смазке шарнирных инструментов (щипцов из Набора для раббердама 200 ЮП,) рекомендованными средствами, перед каждой стерилизацией изделия. Также перед каждой процедурой стерилизации производится визуальный осмотр изделия.

Поврежденный инструмент не подлежит ремонту, его следует утилизировать в соответствии СанПиН 2.1.7.2790 как класс Б.

12. Условия транспортировки и хранения

Наборы инструментов транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -10 до $+60^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха при температуре 25°C , % не более 98%, атмосферное давление 84-107 кПа.

При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении инструментов должна быть обеспечена их защита от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков

Хранить Наборы инструментов допускается в упакованном виде в крытых, сухих, проветриваемых складских помещениях на поддонах или стеллажах помещении. Условия хранения: при температуре окружающего воздуха от -10 до $+60^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха при температуре 25°C , % не более 98%; атмосферное давление 84-107 кПа.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

При соблюдении условий хранения срок хранения составляет 10 лет.

13. Срок службы

Срок службы Наборов инструментов ограничивается количеством циклов стерилизации. Максимальное количество циклов стерилизации – 1000.

- За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление инструмента невозможно или нецелесообразно по технико-экономическим показателям.

- Непригодность к дальнейшей эксплуатации инструментов определяется изнашиванием или повреждением их рабочих частей: выявление неустранимой коррозии, наличие трещин, вмятин, сколов.

- Для инструментов для снятия зубных отложений, экскаваторов предельное состояние дополнительно определяется притуплением острых частей и невозможностью обеспечения остроты путем переточки.

- За критерий предельного состояния пинцетов принимают наличие бокового смещения рабочей части и неполное смыкание браншей.
 - Перечисленные повреждения определяются визуально перед каждым применением).
 - Полный цикл предельного состояния на износ шипцов из Набора для раббердама 200 ЮП:- количество смыканий и размыканий инструмента - должен быть не менее – 20 000 циклов.
- Срок службы изделий, не подвергающихся стерилизации: Экран защитный стоматологический со сменными щитками из Набора стоматологического терапевтического большого 01 ПП составляет: 1 год – для оправы экрана, сменные щитки для экрана являются одноразовыми.

14. Безопасные комбинации с другими медицинскими изделиями

Наборы инструментов не требуют комбинаций с другими медицинскими изделиями для эксплуатации. За исключением инструмента Матрицедержатель 108 МП; из набора Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП. Этот инструмент используют совместно с матрицами стоматологическими, например, «Стоматологические контурные матрицы Palodent и кольца Palodent BiTine в наборах и отдельных упаковках», "ДЕНТСПЛАЙ Колк", США, (РУ № ФСЗ 2007/00833 от 17.12.2007 г)

15. Материалы изготовления, вступающие в контакт с организмом человека

Наименование изделия/части изделия	Материал изготовления
1. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-1 ЮП, в составе: 1.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ТР-4000-1-1 ЮП; 1.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ТР-4000-1-2 ЮП; 1.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ТР-4000-1-3 ЮП; 1.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ТР-4000-1-4 ЮП; 1.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.	Инструменты: Сталь марки AISI 410 Unidental, Пакистан, Кассета стерилизацияционная: Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан, пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, Япония
2. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-2 ЮП, в составе: 2.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-СР-4000-2-1 ЮП; 2.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-СР-4000-2-2 ЮП; 2.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-СР-4000-2-3 ЮП; 2.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-СР-4000-2-4 ЮП; 2.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.	Рабочие части инструментов: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан, Ручки: пищевой силикон 457SFG, «Шин-Эцу Полимер Ко, Япония. Пигменты: PGY21 «желтый», PGG11 «зеленый», PGDB14 «темно-синий», PGSB64 «небесно-голубой» Hangzhou Fancheng chemicals co Ltd, Китай Кассета стерилизацияционная: Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан, пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, Япония
3. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-3с-ЮП, в составе: 3.1. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ПР-4000-3-1с ЮП; 3.2. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ПР-4000-3-2с ЮП; 3.3. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ПР-4000-3-3с ЮП; 3.4. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ПР-4000-3-4с ЮП; 3.5. Кассета стерилизационная КСМ-1-4000 ЮП.	Рабочие части инструментов: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан, Ручки Алюминиевый сплав АК7 ГОСТ 1583-93, Каменск-Уральский завод технического литья, РФ, анодно-окисное покрытие азокрасители «OSWAL UDHYOG», Индия: -Alumon «Bright green» A3LW - Alumon «Green» ALW - Alumon «Red» A3LW - Alumon «Turq. Blue» A2SG

	Кассета стерилизационная Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан, пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, Япония
4. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-1 ЮП, в составе: 4.1. Зонд зубной изогнутый 30-3 МП; 4.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой 100-2 МП; 4.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ТР-4000-1-1 ЮП; 4.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ТР-4000-1-2 ЮП; 4.5. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-ТР-4000-1-3 ЮП; 4.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ТР-4000-1-4 ЮП; 4.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП; 4.8. Экскаватор №2-105-5 МП; 4.9. Экскаватор двухсторонний с круглой ручкой №3-105-6 МП; 4.10. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.	Инструменты, традиционные ручки, пинцет, ручка и оправа зеркала: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан, Зеркало: Стекло - Model No.: 627, E-TAY INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan Покрытие - LOCTITE 648, Loctite MFG, Великобритания, Кассета стерилизационная Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, Япония
5. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-2 ЮП, в составе: 5.1. Зонд зубной изогнутый СР-9000-2-1 ЮП; 5.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой СР-9000-2-2 ЮП; 5.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-СР-4000-2-1 ЮП; 5.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-СР-4000-2-2 ЮП; 5.5. Инструмент для снятия зубных отложений копьевидный №3-СР-4000-2-3 ЮП; 5.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-СР-4000-2-4 ЮП; 5.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП; 5.8. Экскаватор №2-СР-9000-2-3 ЮП; 5.9. Экскаватор двухсторонний №3-СР-9000-2-4 ЮП; 5.10. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.	Рабочие части инструментов, оправа зеркала, пинцет: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан Зеркало: Стекло - Model No.: 627, E-TAY INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan Покрытие - LOCTITE 648, Loctite MFG, Великобритания, Ручки: пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, Япония, PGY21 - «желтый» PGG11 - «зеленый» PGOB83 - «синий океан» PGR10 - «красный» PGDB14 - «темно-синий» PGB91 - «черный» PGG12 - «серый» PGSB64 - «небесно-голубой» Hangzhou Fancheng chemicals co Ltd, Китай Кассета стерилизационная Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония
6. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-3с ЮП, в составе: 6.1. Зонд зубной изогнутый ПР-9000-3-1с ЮП; 6.2. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой ПР 900-3-2с ЮП; 6.3. Инструмент для снятия зубных отложений серповидный №1-ПР-4000-3-1с ЮП; 6.4. Инструмент для снятия зубных отложений желобоватый №2-ПР-4000-3-2с ЮП; 6.5. Инструмент для снятия зубных отложений	Рабочие части инструментов, оправа зеркала, пинцет: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан Зеркало: Стекло - Model No.: 627, E-TAY INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan Покрытие - LOCTITE 648, Loctite MFG, Великобритания, Ручки Алюминиевый сплав АК7 ГОСТ 1583-93, Каменск-Уральский завод технического литья, РФ,

копьевидный №3-ПР-4000-3-3с ЮП; 6.6. Инструмент для снятия зубных отложений долотообразный-клиновидный №4-ПР-4000-2-4с ЮП; 6.7. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП; 6.8. Экскаватор №2-ПР-9000-3-3с ЮП; 6.9. Экскаватор двухсторонний №3-ПР-9000-3-4с ЮП; 6.10. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.	анодно-окисное покрытие азокрасители «OSWAL UDHYOG», Индия: - Alupon Yellow AGR, - Alupon «Bright green» A3LW - Alupon «Green» ALW, - Alupon Fast Violet A2RL, - Alupon Red A3LW, - Alupon Turq. Blue A2SG, - Alupon Black 3 Кассета стерилизационная Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония
7. Набор инструментов для пломбирования 9000-4 ЮП, в составе: 7.1. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой 100-2 МП; 7.2. Штопфер-гладилка №1-10-5 МП4; 7.3. Штопфер-гладилка №2-10-6 МП; 7.4. Штопфер-гладилка №3-10-7 МП; 7.5. Гладилка с круглой головкой №4-10-3 МП; 7.6. Штопфер-гладилка №5-0-11 МП; 7.7. Гладилка двухсторонняя серповидная-дистальная №6-10-2 МП; 7.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП; 7.9. Шпатель двухсторонний для цемента 102-3 МП; 7.10. Зонд зубной изогнутый 30-3 МП; 7.11. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.	Инструменты, пинцет, стальные ручки инструментов, оправы и ручки зеркала: Сталь марки AISI 410 Зеркало: Стекло - Model No.: 627, E-TAY INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan Покрытие - LOCTITE 648, Loctite MFG, Великобритания, Кассета стерилизационная Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан, Пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония
8. Набор инструментов для пломбирования 9000-5 ЮП 8.1. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой СР-9000-2-2 ЮП; 8.2. Штопфер-гладилка №1-СР-9000-5-1 ЮП; 8.3. Штопфер-гладилка №2-СР-9000-5-2 ЮП; 8.4. Штопфер-гладилка №3-СР-9000-5-3 ЮП; 8.5. Гладилка с круглой головкой №4-СР-9000-5-4 ЮП; 8.6. Штопфер-гладилка №5-СР-9000-5-5 ЮП; 8.7. Гладилка двухсторонняя серповидная дистальная №6-СР-9000-5-6 ЮП; 8.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП; 8.9. Шпатель двухсторонний для цемента СР-9000-5-7 ЮП; 8.10. Зонд зубной изогнутый СР-9000-2-1 ЮП; 8.11. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.	Корпус зеркала, рабочие части инструментов, пинцет: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан, Силиконовые ручки: пищевой силикон - 457SFG, «Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония. Пигменты: - PGY21 - «желтый» - PGG11 - «зеленый» - PGOB83 - «синий океан» - PGR10 - «красный» - PGDB14 - «темно-синий» - PGB91 - «черный» - PGG12 - «серый» - PGSB64 - «небесно-голубой» - PGP72 - «розовый» Hangzhou Fancheng chemicals co Ltd, Китай Кассета стерилизационная: Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан
9. Набор инструментов для пломбирования 9000-6с ЮП в составе: 9.1. Зеркало стоматологическое 1904 ПП с ручкой ПР-9000-3-2с ЮП; 9.2. Штопфер-гладилка №1-ПР-9000-6-1с ЮП; 9.3. Штопфер-гладилка №2-ПР-9000-6-2с ЮП; 9.4. Штопфер-гладилка №3-ПР-9000-6-3с ЮП; 9.5. Гладилка с круглой головкой №4-ПР-9000-6-4с ЮП; 9.6. Штопфер-гладилка №5-ПР-9000-6-5с ЮП; 9.7. Гладилка двухсторонняя серповидная-дистальная	Рабочие части инструментов, оправы зеркала, пинцет: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан Зеркало: Стекло - Model No.: 627, E-TAY INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan, Покрытие - LOCTITE 648, Loctite MFG, Великобритания, Ручки Алюминиевый сплав АК7 ГОСТ 1583-93, Каменск-Уральский завод технического литья, РФ.

№6-ПР-9000-6-6с ЮП; 9.8. Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8-80-2 МП; 9.9. Шпатель двухсторонний для цемента ПР-9000-6-7с ЮП; 9.10. Зонд зубной изогнутый ПР-9000-3-1с ЮП; 9.11. Кассета стерилизационная КССС-8-8000 ЮП.	анодно-окисное покрытие азокрасители «OSWAL UDHYOG», Индия: - Alumon Yellow AGR, - Alumon Yellow A3BL, - Alumon «Green» ALW, - Alumon Blue G, - Alumon Fast Violet A2RL, - Alumon Red A3LW, - Alumon Turq. Blue A2SG, - Alumon Black 3 Кассета стерилизационная Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан, пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония
10. Набор инструментов для моделирования пломб 5000-1 ЛМП, в составе: 10.1. Гладилка точного моделирования CP-5000-1-1 ЛМП; 10.2. Штопфер точного моделирования CP-5000-1-2 ЛМП; 10.3. Зонд закругленный-штопфер конусообразный сверхточного моделирования CP-5000-1-3 ЛМП; 10.4. Штопфер для микрополостей CP-5000-1-4 ЛМП; 10.5. Инструмент для удаления излишков композита CP-5000-1-5 ЛМП; 10.6. Кассета стерилизационная КССМ-4-5001 ЮП;	рабочие части инструментов: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан, Силиконовые ручки: пищевой силикон - 457SFG, «Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония. Пигменты: - PGY21 – «желтый» - PGG11 – «зеленый» - PGR10 – «красный» - PGSB64 – «небесно-голубой» - PGP72 – «розовый» Hangzhou Fancheng chemicals co Ltd, Китай Кассета стерилизационная: Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония
11. Набор инструментов для моделирования пломб 5000-2с ЮП, в составе: 11.1. Гладилка точного моделирования ПР-5000-2-1с ЮП; 11.2. Штопфер точного моделирования ПР-5000-2-2с ЮП; 11.3. Зонд закругленный-штопфер конусообразный сверхточного моделирования ПР- 5000-2-3с ЮП; 11.4. Штопфер для микрополостей ПР-5000-2-4с ЮП; 11.5. Инструмент для удаления излишков композита ПР-5000-2-5с ЮП; 11.6. Кассета стерилизационная КССМ-4-5001 ЮП	Рабочие части: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан Ручки: Алюминиевый сплав АК7 ГОСТ 1583-93, Каменск-Уральский завод технического литья, РФ. анодно-окисное покрытие азокрасители «OSWAL UDHYOG», Индия: - Alumon Yellow AGR, - Alumon «Green» ALW, - Alumon Red A3LW, - Alumon Turq. Blue A2SG, - Alumon Blue G Кассета стерилизационная: Сталь AISI 304, Unidental, Пакистан пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония
12. Набор для раббердама 200 ЮП, в составе: 12.1. Кламмер 2510-9 ПП; 12.2. Кламмер 2512-212 ПП; 12.3. Кламмер 2513-210 ПП; 12.4. Кламмер 2515-0 ПП; 12.5. Кламмер 2517-1 ПП; 12.6. Кламмер 2520-2А ПП; 12.7. Кламмер 2532-7 ПП; 12.8. Кламмер 2534-8 ПП; 12.9. Кламмер 2536-8А ПП; 12.10. Кламмер 2540-14 ПП; 12.11. Кламмер 2543-14А ПП; 12.12. Кламмер 2547-202 ПП; 12.13. Кламмер 2548-205 ПП;	Все инструменты: Сталь марки AISI 410, Unidental, Пакистан

12.14. Щипцы-пробойник для раббердама 170мм-2502 ПП; 12.15. Рамка для раббердама 2500 ПП; 12.16. Щипцы для наложения кламмеров 175мм-2507 ПП; 12.17. Щипцы для установки пружинных держателей кольца 200-1 ЮП.	
13. Набор зеркал стоматологических и ручек к зеркалам 1900 ПП-ЮП, в составе: 13.1. Зеркало 1903 ПП, 13.2. Зеркало 1905 ПП, 13.3. Зеркало 1907 ПП, 13.4. Зеркало 1908 ПП, 13.5. Зеркало 1909 ПП; 13.6. Ручка 100-2 МП, 13.7. Ручка 1900 ПП, 13.8. Ручка 100-1 СП, 13.9. Ручка фиолетовая 1907 ЮП, 13.10. Ручка коричневая 1908 ЮП; 13.11. Ручка синяя 1909 ЮП; 13.12. Ручка черная 1910 ЮП; 13.13. Зеркало с ручкой 9008-8-2; 13.14. Кассета стерилизационная КСД-10-9010 ЮП.	Ручки металлические, оправа зеркала с стержнем и резьбой: - Сталь марки AISI 304, Unidental, Пакистан Ручки цветные: Пищевой силикон - 457SFG, «Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония. Пигменты: - PGR10 – «красный», - PGDB14 – «темно-синий» . - PGY21 – «желтый» и - PGB91 – «черный» - PGDB14 – «темно-синий» PGB91 – «черный» Hangzhou Fancheng chemicals co Ltd, Китай Зеркало: Стекло - Model No.: 627, E-TAY INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan, Покрытие - LOCTITE 648, Loctite MFG, Великобритания, Кассета стерилизационная Сталь AISI 304, Unidental, Пакистан пищевой силикон - 457SFG, Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония:
14. Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП, в составе: 14.1. Гладилка двухсторонняя №3-1410 ПП; 14.2. Гладилка двухсторонняя №4-425.014 ПП 14.3. Гладилка двухсторонняя №5-1412 ПП; 14.4. Гладилка двухсторонняя №6-1463-2 ПП; 14.5. Гладилка серповидная 10-4 МП; 14.6. Гладилка шаровидная 10-1 СП; 14.7. Гладилка 10-13 ЮП; 14.8. Штопфер-гладилка: №1-10-8 СП; 14.9. Штопфер-гладилка №1-10-5 МП; 14.10. Штопфер-гладилка №2-10-6 МП; 14.11. Штопфер-гладилка №3-10-7 МП; 14.12. Штопфер-гладилка №2-10-9 СП; 14.13. Штопфер-гладилка №3-10-10 СП; 14.14. Штопфер-гладилка №5-10-10 МП; 14.15. Штопфер-гладилка 10-12 ЮП; 14.16. Зонд изогнутый L= 15-30-1 СП; 14.17. Зонд изогнутый L= 20-30-2 СП; 14.18. Зонд изогнутый 30-3 МП; 14.19. Зонд серповидный 30-4 МП; 14.20. Зонд штыковидный 30-5 МП 14.21. Зонд диагностический угловой 1480-10 ПП; 14.22. Зонд диагностический угловой 1801 ПП; 14.23. Зонд периодонтальный с делениями 1497 ПП; 14.24. Зонд угловой 1472-2; 14.25. Зонд изогнутый 9000-8-1 ЮП 14.26. Экскаватор №1-105-1 СП, 14.27. Экскаватор №2-105-2 СП, 14.28. Экскаватор №3-105-3 СП, 14.29. Экскаватор №1-105-4 МП, 14.30. Экскаватор №2-105-5 МП, 14.31. Экскаватор №3-105-6 МП, 14.32. Экскаватор №4-105-7 МП, 14.33. Экскаватор для размягченного дентина 0,8 мм-1860	Рабочие части инструментов, металлические ручки: Сталь марки AISI 410. Unidental, Пакистан Цветные ручки инструментов: Алюминиевый сплав АК7 ГОСТ 1583-93, Каменск-Уральский завод технического литья, РФ. анодно-окисное покрытие азокрасителя «OSWAL UDHYOG», Индия: - Alumon Black 3 Силиконовые вставки инструмента Экскаватор для размягченного дентина с силиконом 904.030 ПП пищевой силикон - 457SFG, «Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония. Пигменты: - PGP72 – «розовый», - PGDB14 – «темно-синий» Hangzhou Fancheng chemicals co Ltd, Китай Экран защитный: Оправа: Пищевой силикон - 457SFG, «Шин-Эцу Полимер Ко, ООО Япония. Краситель голубой: - PGSB64 – «небесно-голубой» Щиток: полиэтилентерафталат (ПЭТ-марка Терилен) производитель: Plastic Indestry Association, США. (не контактирует с организмом человека) Коробка стерилизационная: Сталь AISI 304, Unidental, Пакистан

ПП, 14.34. Экскаватор для размягченного дентина 0,8 мм-1861 ПП, 14.35. Экскаватор для размягченного дентина 1,4 мм-1859 ПП, 14.36. Экскаватор для размягченного дентина с силиконом 904.030 ПП; 14.37. Пинцет изогнутый с насечкой 80-1 СП; 14.38. Пинцет изогнутый с насечкой 150мм-2422 ПП 14.39. Матрицедержатель 108 МП; 14.40. Экран защитный стоматологический со сменными щитками 1000-1; 14.41. Шпатель для языка двухсторонний прямой 103-1 МП; 14.42. Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 ГП-980-9.	
--	--

16. Упаковка и маркировка изделия

16.1. Индивидуальная упаковка

Изделия упакованы в индивидуальные упаковки, обеспечивающие их сохранность и исключающие попадание загрязнений из внешней среды.

Каждая единица упакована так, чтобы предотвратить возможное повреждение в результате хранения.

Лазерной установкой на металлический инструмент (если позволяет размер инструмента) нанесена маркировка согласно каталогу завода-изготовителя. Например, инструмент Зонд серповидный 30-4 МП промаркирован «30-4 МП».

1. Наборы инструментов в компактных стерилизационных кассетах упакованы в индивидуальные картонные коробочки типа «пенал», на которых нанесена этикетка изделия. Коробочка типа пенал помещена в полиэтиленовый прозрачный пакет, позволяющий отчетливо различать маркировку.

2. Наборы инструментов в габаритных стерилизационных коробках упакованы в индивидуальные картонные коробки из трехслойного гофрокартона. Этикетка нанесена на коробку. Каждый инструмент внутри стерилизационной коробки упакован в пакетик из пузырчатой пленки.

3. Наборы инструментов, упакованные в пластиковые ячейковые поддоны с прозрачной крышкой, укреплены липкой лентой против случайного открытия при транспортировке.

Индивидуальная упаковка набора является потребительской упаковкой.

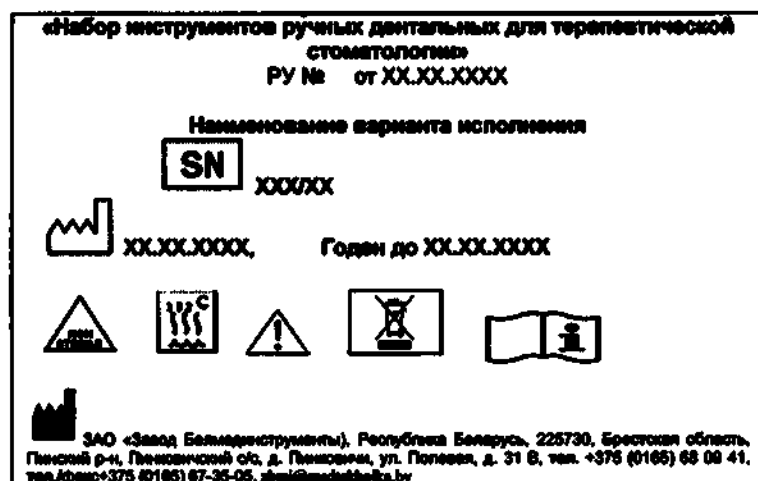
Массы и габариты упаковки, а также массы наборов указаны в таблице ниже.

Наименование набора	Масса нетто (не более), (г)	Масса брутто (г)	Размеры индивидуальной упаковки (см)
1. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-1 ЮП.	270	290	(19,0 x 9,5 x 2,8) ±0,5
2. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-2 ЮП.	250	270	(19,0 x 9,5 x 2,8) ±0,5
3. Набор инструментов для снятия зубных отложений 4000-3с-ЮП, в составе:	250	270	(19,0 x 9,5 x 2,8) ±0,5
4. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-1 ЮП.	480	500	20,5 x 15,0 x 3,0) ±0,5
5. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-2 ЮП.	455	475	20,5 x 15,0 x 3,0) ±0,5
6. Набор инструментов для снятия зубных отложений 9000-3с ЮП.	410	430	20,5 x 15,0 x 3,0) ±0,5
7. Набор инструментов для пломбирования 9000-4 ЮП.	470	490	20,5 x 15,0 x 3,0) ±0,5
8. Набор инструментов для пломбирования 9000-5 ЮП.	490	510	(20,5 x 15,0 x 3,0) ±0,5
9. Набор инструментов для пломбирования 9000-6с ЮП.	460	480	(20,5 x 15,0 x 3,0) ±0,5

10.Набор инструментов для моделирования пломб 5000-1 ЛМП.	270	290	(19,0 x 9,5 x2,8) ±0,5
11. Набор инструментов для моделирования пломб 5000-2с ЮП.	250	270	(19,0 x 9,5 x 2,8) ±0,5
12. Набор для раббердама 200 ЮП.	345	430	(34,5 x 124,5x28,0) ±0,5
13. Набор зеркал стоматологических и ручек к зеркалам 1900 ПП-ЮП.	465	485	(21,0 x 15,5 x 3,0) ±0,5.
14. Набор стоматологический терапевтический большой 01 ПП.	2 900	3 200	(34,0 x 34,0 x 20,0) ±0,5

16.2. Маркировка индивидуальной упаковки для РФ

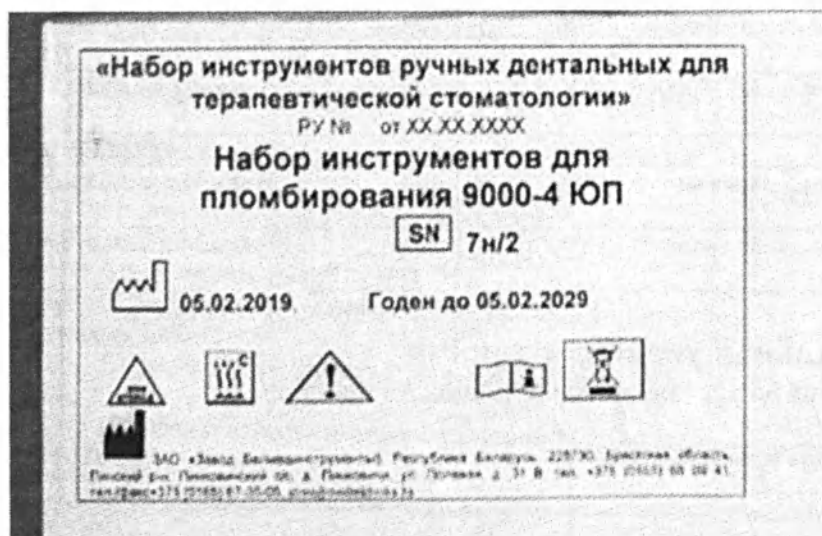
Проект маркировки распространяется на все варианты исполнения наборов.



Символы, содержащиеся на этикетке

	Серийный номер
	Дата производства
	Изделие не стерильно
	Требуется стерилизация при температуре 132°C
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению.
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не утилизировать вместе с бытовыми отходами
	Изготовитель (с указанием адреса).

Фото упаковки набора с маркировкой для РФ



16.3. Транспортная упаковка

Для наборов в габаритных стерилизационных коробках индивидуальная упаковка является транспортной упаковкой.

Наборы инструментов в компактных стерилизационных кассетах упаковываются в транспортную упаковку – коробку из трехслойного гофрокартона размером (28,0 x 28,0 x 24,0) ±0,5 см. Масса транспортной упаковки зависит от количества упакованных наборов и от вариантов исполнения упакованных наборов. Но не должна превышать 6,0 кг.

На транспортной таре указано:

- Наименование грузополучателя;
- Наименование адреса грузополучателя;
- Дата упаковывания и количество изделий в транспортной упаковке.
- Символ "Беречь от влаги" .

17. Порядок осуществления утилизации и уничтожения

В процессе эксплуатации предполагается загрязнение инструмента биологическим материалом (кровь, слюна); перед утилизацией инструмент должен пройти процедуру дезинфекции и должен быть утилизирован в соответствии СанПиН 2.1.7.2790 как класс Б.

Промаркировано символом



. Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.

18. Международные стандарты

Система менеджмента по разработке и производству медицинского изделия соответствует требованиям стандарта ISO 13485:2016.

Изделие соответствует следующим национальным стандартам:

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 19126-2007 Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия.

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий.

Покрyтия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.

ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики,

Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ ISO 13397-1-2011 Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ISO 7492-2011 Зонды стоматологические. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ ISO 9873-2011 Инструменты стоматологические ручные. Зеркала и ручки к ним многократного использования

19. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует исправность изделий при соблюдении условий применения, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения Наборов инструментов составляет 6 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации Наборов инструментов составляет 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Покупатель вправе предъявить претензии в отношении качества товара. Удовлетворение требований потребителя распространяется на медицинские изделия, использующееся только по назначению и в соответствии с Инструкцией по применению изделия.

Использование медицинского изделия не по назначению не предусмотрено.

Производитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований Производителя, указанных в Инструкции по применению.

Претензии по качеству товара на территории Российской Федерации покупатель может направлять в адрес Уполномоченного представителя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ВладМиВа», (ООО «ТД «ВладМиВа»), 308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, д. 118.

Тел.: (4722) 200-555

Факс: (4722) 31-59-03

market@vladmiva.ru

39

Закрытое Акционерное Общество «Завод Белмединструменты»

225730, Республика Беларусь,
д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31В

УНП 291235525

Тел, факс (0165) 68-09-41, 67-35-05
zbmi@medtehnika.by

BY97BLBB30120291235525001001 в ЦБУ

№406 ОАО «Белинвестбанк»

г. Пинск, ВІСBLBBY2X

г. Пинск, ул. Первомайская, д. 16

Для представления в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
Российской Федерации

Настоящим подтверждаю, что содержание документа

Инструкция по применению на медицинское изделие Набор
инструментов ручных дентальных для терапевтической стоматологии
действительно и верно.

ЗАО «Завод Белмединструменты» является оригинальным производителем медицинского
изделия, упомянутого в документе.

Подпись:  / Мемех А.К.

Директор ЗАО «Завод Белмединструменты»

Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус не удостоверяет изложенные в
настоящем документе факты.

Город Пинск, Брестская область, Республика Беларусь. Второе июля две тысячи
двадцатого года.

Я, Марцинкевич Людмила Владимировна, нотариус Брестского нотариального
округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности №29, выданное
Министерством юстиции Республики Беларусь 27 марта 2014 г.), свидетельствую
подлинность подписи директора Закрытого акционерного общества «Завод
Белмединструменты» Мемеха Анатолия Константиновича, подписавшего документ в
моем присутствии.

Личность Мемеха А.К. установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-521

Взыскано нотариального тарифа 13 рублей 50 копеек

Нотариус



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 39 (тридцати девяти)
листах.

Нотариус