

№

1. Н.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Интерген»



..... Готра М. Н.

..... 2010 г.

Микропипетки для экстракорпорального оплодотворения


Инструкции по применению

Микропипетки для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), варианты исполнения, варианты исполнения: инъекционные (Injection pipettes); удерживающие (Holding pipettes); рассекающие (Cutting pipettes); для вспомогательного химического хэтчинга (Drilling pipettes); биопсийные (Biopsy pipettes) представляют собой специализированные инструменты из боросиликатного стекла.


Микропипетки для микроманипуляций с эмбрионом и яйцеклеткой в ходе экстракорпорального оплодотворения, для удержания яйцеклетки и введения сперматозоида в яйцеклетку, при процедуре вспомогательного хэтчинга, при биопсии blastomeres, полярного тельца и клеток трофобластической оболочки.

Указания по применению:

1. Снимите блистерную упаковку.
2. Возьмите в руки футляр с микропипеткой.
3. Мягко нажмите по бокам.

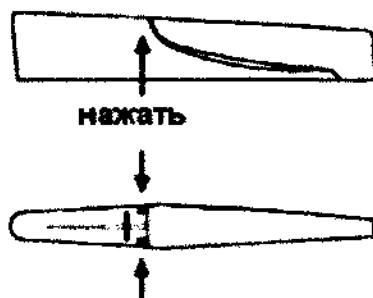

4. Откройте футляр.

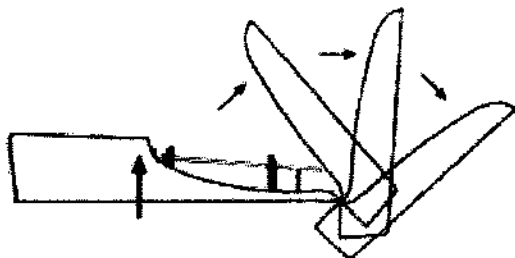

5. Возьмите микропипетку.
6. Визуально под микроскопом убедитесь, что кончик не нарушен.
7. Следуйте индивидуальным рекомендациям для проведения микроманипуляционных процедур.
8. После завершения процедуры, утилизируйте в соответствии с регламентом Вашей лаборатории.

Не использовать в случае обнаружения нарушений в упаковке или на кончике!

Микропипетки являются одноразовым инструментом!

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре и влажности, в сухом помещении, в месте, защищенном от прямого солнечного света.

Срок годности:

Срок годности определен производителем на период 3 года от даты стерилизации.

Производитель:

The Pipette Company Pty. Ltd.,
Unit 13, 22 Ware Street, Thebarton, South Australia 5031, Австралия



THEPIPETTECOMPANY

13/22 Ware St. Thebarton South Australia 5031

T +61 8 8152 0258 F +61 8 8152 0277

tpc@pipetteco.com.au www.pipetteco.com.au