

Справка

об изделии медицинского назначения

1. Наименование изделия. Лупы бинокулярные Exam Vision.

2.1. Лупы бинокулярные Exam Vision, с принадлежностями:

I. Лупы бинокулярные Exam Vision, варианты исполнения: Exam Vision TTL HD (x2,3; x2,8; x3,5; x4,2; x5,0), Exam Vision TTL Lite, Exam Vision Flip Up.

II. Принадлежности:

1. Осветитель Focus LED.
2. Осветитель Basic LED.
3. Осветитель Focus HID.
4. Экран защитный Visionshield.
5. Батарея аккумуляторная для осветителя.
6. Кейс для хранения оптики.
7. Крепление had band.
8. Крепление click on.
9. Крепление connect.
10. Фильтр Curing.
11. Устройство зарядное.
12. Кабель сетевой.

2.2 Назначение медицинского изделия: Лупы бинокулярные Exam Vision с принадлежностями, представляют собой носимые (одеваемые на голову) увеличительные приборы. Применяются для объемного наблюдения двумя глазами вблизи.

Лупы комплектуются светодиодными осветителями. Питание осветителей NiMH аккумуляторов.

Рамка луп изготовлена из титанового сплава, оправы линз – из алюминия.

Лупы имеют мягкие накладки на переносицу, виски и уши для обеспечения комфортно ношения и использования.

Сменные части могут подвергаться стерилизации.

2.3 Основные технические характеристики изделий.

Параметр/характеристика	Значение
<u>Лупа</u> (для варианта исполнения Exam Vision TTL HD) <u>Увеличение</u>	x2,3; x2,8; x3,5; x4,2; x5,0
<u>Осветитель</u> Электропитание Масса узла лампы (без кабеля/с кабелем) Время работы (со стандартным аккумулятором)	4 элемента AA NiMH 2300 мач 18/36 г 7 часов
<u>Зарядное устройство</u> Электропитание Потребляемый ток	110-230 В, 50/60 Гц 1,3 А

3. Описание принципа действия изделия.

- Присоединить узел лампы на лупу и соединить кабель с блоком питания;
- Нажать кнопку вкл/выкл., и лампа включится;
- Если необходимо усилить интенсивность освещения, удерживать 2 сек. Кнопку вкл/выкл., пока не включится индикатор усиленного режима. Данный режим обеспечивает более интенсивное освещение, однако сокращает время работы. Автоматическое переключение в стандартный режим освещения после 15 минут. Удерживать кнопку вкл/выкл. для возвращения в стандартный режим;
- Выключить лампу коротким нажатием кнопки вкл/выкл.

Перезарядка:

Подключить зарядное устройство, поставляемое в комплекте, к сети с помощью сетевого шнура. Время перезарядки примерно 2ч. Необходимо следовать отдельной инструкции к зарядному устройству с предохранительным модулем, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации батарей.

4. Информация о сферах применения изделия.

Применяются в стоматологии, диагностике, в медицинской практике лечебных учреждений Российской Федерации.


Лупы, когда они не используются, следует хранить в защитном контейнере.

Представленное изделие «Лупы бинокулярные Exam Vision с принадлежностями», производства компании «Exam Vision ApS», Дания, соответствует всем требуемым международным стандартам системы контроля качества, охватывающим все процессы, начиная со стадии изготовления продукта до обработки рекламации, полученной от потребителя.

Срок годности: 5 лет.

Изделие поставляется в страны Европы и Азии.

Директор
ООО «Экзам Вижн»

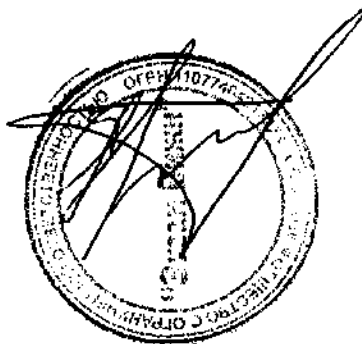

Бочкарев И. В.