

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный
предприниматель



Александров В.Ю.

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Ножниц медицинских стоматологических

производства фирмы:

«devemed GmbH», Германия

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Индивидуальный предприниматель



Александров В.Ю.

1. Назначение.

Ножницы медицинские стоматологические используются в пародонтологии, хирургической стоматологии для рассечения биологических тканей при хирургических вмешательствах, для разрезания мягких тканей на поверхности и в глубине операционной раны, для разрезания шовного материала, а также для удаления швов после наложения лигатуры.

Контейнеры используются в медицинской практике для стерилизации и хранения медицинских инструментов.

Лотки используются в медицинской практике для стерилизации и хранения медицинских инструментов.

2. Подготовка и порядок работы изделия.

Перед каждым применением инструменты должны быть проверены на их функциональную исправность. Инструмент нельзя использовать при наличии повреждений на поверхности, таких как царапины, трещины, зазубрины, насечки и т.д., а также погнутых частей.

Подготовка инструментов к работе должна производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующее образование, который мог бы при необходимости оценить возникновение рисков и их последствия.

При работе и подготовке инструментов, при применении которых возможно контаминирование/инфицирование, необходимо надевать защитные перчатки и/или использовать вспомогательные инструменты (напр. пинцеты).

Удалить с помощью одноразовой салфетки или бумажного полотенца загрязнения с поверхности, наполнительный материал и прочие средства. Повторная подготовка инструмента к работе рекомендована сразу после его применения.

Инструменты, на которых присутствуют остатки наполнительных материалов, рекомендуется дезинфицировать и очищать в ультразвуковой мойке. При этом необходимо учитывать возможность применения ультразвуковой мойки для данного вида инструментов.

Непосредственно после применения можно вручную провести дезинфекцию с целью снижения риска инфицирования врача. Инструменты помещаются при этом в дезинфицирующий раствор. Необходимо обратить внимание на то, чтобы инструменты были полностью погружены в дезинфицирующий раствор, исключая образование воздушных полостей. Необходимо также учитывать рекомендации производителя по применению соответствующих дезинфицирующих средств.

3. Правила хранения и использования.

• Ультразвуковая очистка:

- Используйте ультразвуковой прибор, предназначенный для медицинских целей.
- Перед очисткой ультразвуковая мойка должна быть разогрета до температуры, рекомендованной изготовителями очистительного или очистительно-дезинфицирующего средства.
- Как правило, для эффективной очистки необходима температура от 40°C до 50°C.
- Уложите инструменты в корзину.
- Инструменты укладываются в ультразвуковую мойку с исходным напряжением ок. 40 кГц на 5 мин.

- После ультразвуковой очистки инструменты необходимо промыть под проточной чистой, холодной водой и хорошо просушить.
- Используемые очистительные или очистительно-дезинфицирующие средства должны применяться в соответствии с указаниями производителя.
- Избегайте передозировки очистительных или очистительно-дезинфицирующих средств.

Необходимо также обратить внимание:

- Корзина ультразвукового прибора должна быть достаточно большой и глубокой, чтобы гарантировать полное погружение инструмента.
- Инструменты должны быть полностью погружены в очистительное средство.
- Для очистки можно использовать только такие корзины, которые не могут повлиять на процесс очистки.
- Не укладывайте в корзину слишком много инструментов.
- Избегайте эффекта «звуковой тени».
- Все каналы и полости должны быть заполнены очистительной жидкостью.
- Инструменты с зажимами/защелками необходимо открыть.
- Инструменты с тонкими или хрупкими частями необходимо закрепить так, чтобы их металлические поверхности не могли быть повреждены.
- Вынуть инструменты из ультразвукового прибора.
- Все каналы необходимо продуть воздухом под давлением, чтобы удалить остатки жидкости.
- Очистительное средство в ультразвуковой мойке необходимо менять ежедневно, а при значительных загрязнениях несколько раз в день.

Полоскание

- Очищенные инструменты уложите в лотки с чистой водопроводной водой, при каждом полоскании используйте свежую водопроводную воду.
- Все каналы тщательно прополощите водой.
- Сполосните поверхности инструментов водопроводной водой.
- Выньте инструменты из воды.
- Все каналы продуйте воздухом, чтобы удалить остатки воды.

Ручная дезинфекция:

- Используемые дезинфицирующие средства должны подходить для дезинфекции инструментов из стали. При дезинфекции инструментов из хромированной латуни, анодированного алюминия или пластика необходимо использовать также подходящие для этих материалов средства.
- Очищенные инструменты уложить в лотки с дезинфицирующим средством.
- Все каналы и полости необходимо заполнить дезинфицирующим средством.
- Лоток закрыть крышкой.
- Концентрация и время воздействия дезинфицирующего средства должны соответствовать рекомендациям производителя.
- Инструменты вынимать из дезинфицирующего раствора только в одноразовых перчатках.

Перед стерилизацией инструменты должны быть упакованы в соответствующие пакеты или упаковку для стерилизации (EN 868, часть 1-9 и DIN 58953, часть 7). Тип упаковки для стерилизации зависит от процесса стерилизации, транспортировки и хранения.

Упаковка имеет значительное влияние на результат стерилизации. Упаковку необходимо выбирать таким образом, чтобы ее размер соответствовал ее инструменту. Используйте индикатор стерилизации для упаковки и указывайте дату стерилизации и срок годности.

Стерилизация:	Рекомендуемый метод стерилизации	Паровая стерилизация под давлением с функцией вакуума (DIN EN ISO 17665-1)
	Рекомендуемая температура	134°C
	Рекомендуемое давление	3 бар
	Время стерилизации:	≥ 5 мин.
	Время сушки:	≥ 15 мин.
После стерилизации проверьте стерильную упаковку на наличие повреждений, проверьте маркировку стерилизации.		

Простерилизованные инструменты храните в стерильной упаковке в закрытом шкафу, в защищенном от пыли, влажности и температурных колебаний месте. Инструмент нельзя хранить вместе с химическими веществами.

Внимание: Неупакованный инструмент нестерил!!!

Гарантия

Продукция изготовлена из высококачественного материала и подвергаются контролю качества перед поставкой. В случае выявления брака, необходимо обратиться в наш сервисный центр.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае, если инструмент использовался не по назначению. В данном случае ответственность ложится на потребителя.

Мы не несем ответственности за случайные повреждения и травмы.

Компания devemed GmbH не несет ответственности при нарушении рекомендаций данной инструкции.

Внимание:

В случае применения инструмента при лечении пациента с болезнью Кройтцфельда-Якоба или ВИЧ-инфицированных пациентов мы не несем ответственность за повторное применение инструмента.

