

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРМАДА-ПОЛИМЕР»**

**ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ
СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПО
ТУ 32.50.50-001-42200822-2019**

Руководство по эксплуатации

32.50.50.001.42200822РЭ

**Новосибирск,
2019 г.**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

благодарим Вас за приобретение продукции, изготовленной нашим предприятием!

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации», проверить целостность упаковки и самих изделий, и обеспечить их применение в соответствии с целевым назначением и установленными требованиями.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению технических характеристик и товарного вида Пакетов.

Ваши замечания по улучшению конструкции и удобству использования просим присылать на адрес предприятия-изготовителя.

Наименование изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Полимер» (ООО «Армада-Полимер»)

Адрес:

юридический: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Приграничная, д. 1;

почтовый:

Тел.:+7 (913) 985-70-27, **факс:**

эл. почта: Polimer0609@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения.....	4
2	Назначение и область применения.....	4
3	Состав и описание продукции.....	5
4	Основные меры безопасности.....	8
5	Транспортирование и хранение.....	9
6	Указания по эксплуатации	10
7	Утилизация.....	13
8	Гарантийные обязательства.....	13
9	Свидетельство о приёмке	14
10	Свидетельство об упаковывании	14

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит техническое описание Пакета полиэтиленового одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов (далее по тексту – Пакет, Пакеты); правила и указания для их правильно-

го применения и другие сведения, которые необходимо знать потребителю.

Варианты исполнения пакетов приведены в Приложении 1.

1.2 Настоящее Руководство распространяется на все исполнения и типоразмеры Пакетов, выпускаемых по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019.

При необходимости, для того или иного исполнения Пакетов выпускается Дополнение к настоящему Руководству, отражающее их специфику.

1.3 Пакеты изготавливаются в соответствии с ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, ГОСТ 12302-2013, ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации, утвержденной предприятием – изготовителем в установленном порядке.

1.4 Настоящее Руководство по эксплуатации выполнено с учётом указаний ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ IEC 82079-1-2014 и ГОСТ Р 56018-2014/ISO/IEC Guide 37:2012.

Сертификат (декларация) соответствия №, срок действия с.....по, выдан(а) органом

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Пакет предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов, образующихся при осуществлении медицинской деятельности.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, а также другие учреждения, требующие обязательного использования пакетов, как одним из средств для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов.

Показания к применению: пакет применяется в различных медицинских учреждениях для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм.

Противопоказания к применению и побочные эффекты: не выявлены.

Потенциальные потребители: пакет применяется медицинским персоналом для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов, образующихся при осуществлении медицинской деятельности в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений



Внимание!

Любое другое использование Пакета считается их использованием не по назначению!

2.2 Пакеты в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования относятся к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия - I по ГОСТ 31508-2012 и Приказу МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г. (с изменениями от 25.09.2014 г.).

2.3 Пакеты пригодны для применения в условиях У климата по ГОСТ 15150-69 категории размещения 2, при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С.

Условия эксплуатации в части стойкости к внешним механическим воздействиям – по группе 2 ГОСТ Р 50444-92.

2.4 Пакеты выпускаются одноразовыми и согласно ГОСТ 12302-2013 относятся к типам I-3, I-6 (с прямым дном), а также согласно ГОСТ 32521-2013 типов: I термосваренный с открытым верхом, II термосваренный с открытым верхом с фальцами.

2.5 Типы и конструктивное исполнение Пакетов соответствуют предусмотренным конструкторской документацией и отвечают эксплуатационным требованиям согласно целевому назначению.

3 СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.1 Внешний вид Пакетов и расположение основных мест измерений представлен на рисунках 1-4.

На рисунках 1 и 2 указаны: L – длина развёртки, l – длина пакета, B – ширина развёртки, h – высота пакета.

На рисунках 3 и 4 указаны: a – длина пакета, b – ширина пакета, n – ширина шва, e – ширина фальца.

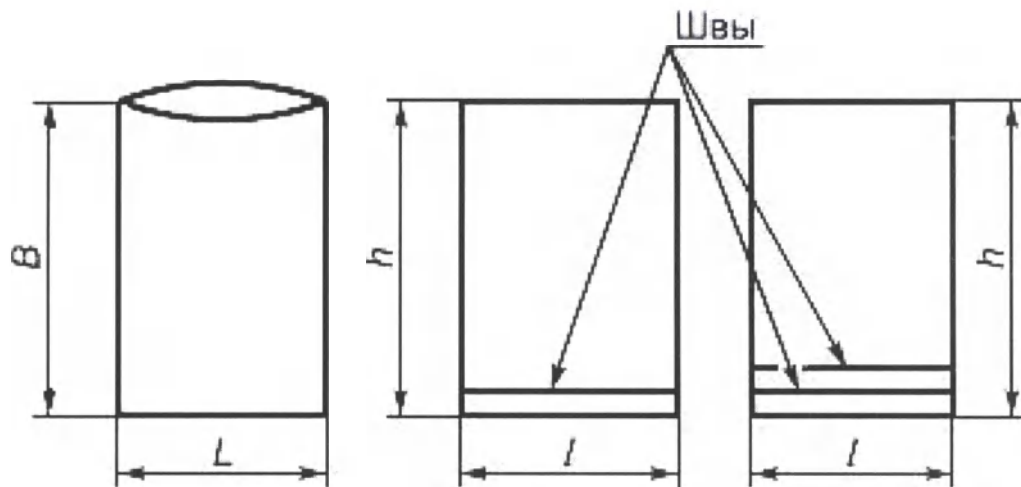


Рис. 1. Тип I-3

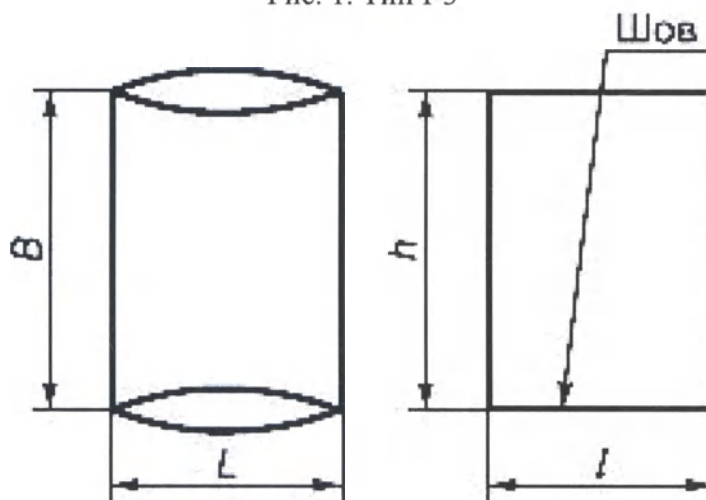


Рис. 2. Тип I-6

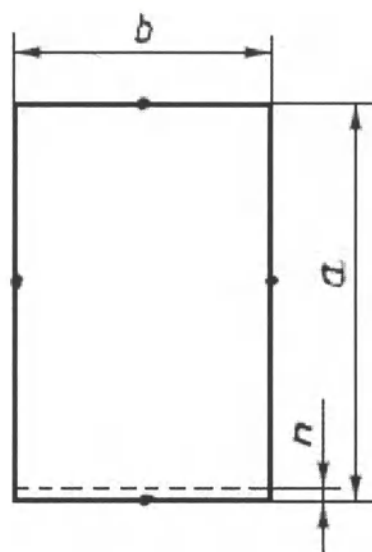


Рис. 3. Тип I

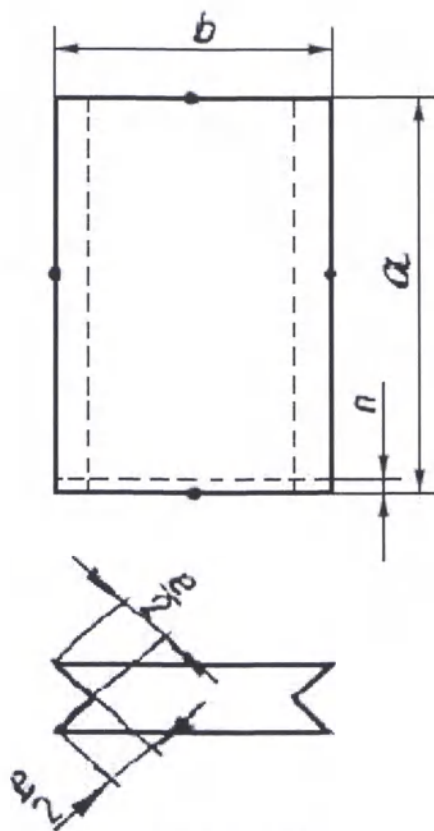


Рис. 4. Тип II

3.2 Пакеты выпускаются окрашенными согласно СанПиН 2.1.7.2790-10:

- для отходов класса А – белого цвета;
- для отходов класса Б – жёлтого цвета;
- для отходов класса В – красного цвета;
- для отходов класса Г – черного цвета.

3.3 Основные параметры и размеры пакетов типов: I-3, I-6 приведены в Таблице 1:

Таблица 1. Основные параметры и размеры

Длина па- кета (дли- на раз- вертки), мм	Высота пакета (высота разверт- ки), мм	Шаг длины, мм	Шаг высо- ты, мм	Масса, г	Шаг мас- сы, г	Толщина материа- ла, мкм	Размеры стяжки, мм	Кол-во в стопе/ в кипе, шт
280	310	1	1	1,33-7,99	1	8-50	2,5x140	10/2000
280	380			1,63-9,79		8-50		10/2000
280	390			1,6-10,0		8-50		10/2000
280	580			2,49-17,90		8-50		10/2000
300	330			1,52-9,11		8-50		10/1000
300	400			1,84-11,04		8-60		10/1000
300	440			2,03-12,14		8-60		10/1000
300	600			2,7-16,56		8-60		10/1000
310	580			2,76-16,54		8-60		10/1000
330	530			2,69-16,09		8-60		10/1000
330	600			3,04-18,22		8-90		10/1000
400	600			3,69-22,08		8-90		10/1000
410	580			3,65-21,88		8-90		10/1000
430	600			3,96-23,74		8-90		10/1000
430	630			4,16-24,92		8-90		10/1000
430	800			6,60-56,97		10-90		10/300
480	580			5,35-46,10		10-90		10/300
500	600			5,76-49,68		10-90		10/300
580	980			10,91-94,13		10-90		10/300
600	700			8,06-69,55		10-90		10/300
600	800			9,22-79,49		10-90		10/300
600	1000			11,52-99,36		10-90		10/300
680	780			10,18-87,83		10-90		10/300
680	980			12,79-110,36		10-90		10/300
680	1080			16,92-121,62		12-90		10/300
700	800			12,90-92,74		12-90		10/300
700	1000			16,13-115,92		12-90		10/300
700	1100			17,74-127,51		12-90		10/300
700	1200			19,35-139,10		12-90		10/300
780	880			15,81-113,67		12-90		10/300
780	1080			19,41-139,50		12-90		10/300
780	1180			21,21-152,42		12-90		10/300
800	900			16,59-119,23		12-90		10/300
800	1100			20,28-145,73		12-90		10/300
800	1200			22,12-158,98		12-90		10/300
880	980			19,87-142,81		12-90		10/300
880	1180			23,92-171,96		12-90		10/300
900	1000			20,74-149,04		12-90		10/300
900	1200			24,88-178,85		12-90		10/300
980	1080			24,39-175,27		12-90		10/300
980	1180			26,64-191,50		12-90		10/300
980	1380			31,16-223,96		12-90		10/300
980	1480			33,42-240,19		12-90		10/300

Продолжение таблицы 1

1000	1100			25,34-182,16		12-90		10/300
------	------	--	--	--------------	--	-------	--	--------

1000	1200			27,65-198,72		12-90		10/300
1000	1400			32,26-231,84		12-90		10/300
1000	1500			34,56-248,40		12-90		10/300

Основные параметры и размеры пакетов типов: I, II приведены в таблице 2:

Таблица 2

Длина пакета (длина развертки), мм	Высота пакета (высота развертки), мм	Шаг длины, мм	Шаг высоты, мм	Масса, г	Шаг массы, г	Толщина материала, мкм	Размеры стяжки, мм	Кол-во в стопе/ в кипе, шт
280	310	1	1	1,33-7,99	1	8-50	2,5x140	10/2000
280	380			1,63-9,79		8-50		10/2000
280	390			1,6-10,0		8-50		10/2000
280	580			2,49-17,90		8-50		10/2000
300	330			1,52-9,11		8-50		10/1000
300	400			1,84-11,04		8-60		10/1000
300	440			2,03-12,14		8-60		10/1000
300	600			2,7-16,56		8-60		10/1000
310	580			2,76-16,54		8-60		10/1000
330	530			2,69-16,09		8-60		10/1000
330	600			3,04-18,22		8-90		10/1000
400	600			3,69-22,08		8-90		10/1000
410	580			3,65-21,88		8-90		10/1000
430	600			3,96-23,74		8-90		10/1000
430	630			4,16-24,92		8-90		10/1000
430	800			6,60-56,97		10-90		10/300
480	580			5,35-46,10		10-90		10/300
500	600			5,76-49,68		10-90		10/300
580	980			10,91-94,13		10-90		10/300
600	700			8,06-69,55		10-90		10/300
600	800			9,22-79,49		10-90		10/300
600	1000			11,52-99,36		10-90		10/300
680	780			10,18-87,83		10-90		10/300
680	980			12,79-110,36		10-90		10/300
680	1080			16,92-121,62		12-90		10/300
700	800			12,90-92,74		12-90		10/300
700	1000			16,13-115,92		12-90		10/300
700	1100			17,74-127,51		12-90		10/300
700	1200			19,35-139,10		12-90		10/300
780	880			15,81-113,67		12-90		10/300
780	1080			19,41-139,50		12-90		10/300
780	1180			21,21-152,42		12-90		10/300
800	900			16,59-119,23		12-90		10/300
800	1100			20,28-145,73		12-90		10/300
800	1200			22,12-158,98		12-90		10/300
880	980			19,87 -142,81		12-90		10/300

Продолжение таблицы 2

880	1180			23,92-171,96		12-90		10/300
900	1000			20,74-149,04		12-90		10/300

900	1200		24,88-178,85	12-90	10/300
980	1080		24,39-175,27	12-90	10/300
980	1180		26,64-191,50	12-90	10/300
980	1380		31,16-223,96	12-90	10/300
980	1480		33,42-240,19	12-90	10/300
1000	1100		25,34-182,16	12-90	10/300
1000	1200		27,65-198,72	12-90	10/300
1000	1400		32,26-231,84	12-90	10/300
1000	1500		34,56-248,40	12-90	10/300

Предельные отклонения по длине и высоте пакетов не должны превышать 2%. Предельное отклонение от номинальной толщины материала не более 1%.

3.4 Масса упаковываемых отходов – не более 15 кг.

3.5 Прочность швов у Пакетов составляет не менее 0,7 от прочности используемой полимерной пленки при растяжении, при этом ширина сварных швов не превышает 10 мм.

Прочность применяемой плёнки при растяжении в продольном направлении принимается не менее 16,1 МПа (165 кгс/см²), в поперечном – не менее 13,7 МПа (140 кгс/см²), относительное удлинение при разрыве в продольном направлении – не менее 150%, в поперечном направлении – не менее 150%.

3.6 Сварные швы Пакетов выполнены герметичными, равномерными по всему контуру, без пропусков, прожогов и пробоин, и располагаться на расстоянии до 10 мм от края.

3.7 При изготовлении пакетов с двухрядными швами расстояние между швами должно быть не более 8 мм.

3.8 Масса пакетов соответствует величине, указанной в рабочих чертежах.

3.9 Пакеты имеют сплошную ровную, гладкую и монолитную поверхность, без не расправляющихся (запрессованных) складок, разрывов, проколов (кроме искусственной перфорации).

Слипание внутренних поверхностей в Пакетах исключается.

3.10 На поверхность пакетов должна быть нанесена цветная печать. Печать должна быть четкой, без искажений, пропусков, текст - легко читаемым

3.11 Печать наносится флексографским способом. Текст и рисунок – чёткие, без перекосов, подтеков краски и непропечаток, и регламентироваться контрольным оттиском. Не допускается искажение рисунка и текста, не совмещение красок.

Отмарывание красок на обратную сторону Пакета не допускается.

3.12 Допуски на совмещение элементов рисунка и рисунка относительно бокового края пакета приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Допуски на совмещение элементов рисунка и рисунка относительно бокового края пакета

Наименование показателя	Значение
Совмещение элементов рисунка в 2-4 цвета: - Продольное, не более	1% от ширины пакета

- Поперечное, не более	2% от ширины пакета
Совмещение рисунка относительно бокового края пакета, не более	1,5 % от ширины пакета

3.13 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

3.13.1 Пакеты изготавливаются из полиэтилена:

- марки 293-285Д, производства ПАО «Казаньоргсинтез», Россия (ТУ 2243-127-00203335-2000);
 - марки PE6148C производства ПАО «Нижнекамскнефтехим», Россия (ТУ 2211-145-05766801-2008);
 - марки PE 4 FE 68 производства ООО «Ставролен», Россия (ТУ 6-11-00206368-25-93);
 - марки FL7000 производства СП ООО «UZ-KORGASCHEMICAL», Узбекистан;
 - марки 10803-020, производства АО «Ангарский завод полимеров», Россия (ГОСТ 16337-77);
 - марки 15803-020, производства ООО «Томскнефтехим», Россия (ГОСТ 16337-77);
- окрашенных красителями-суперконцентрами:
- белый, марки ME 028, производства ООО «БиГ АВ», Россия (ТУ 2243-001-33054488-2015); марки КИГ 004, производства ООО «ТЕХНОКОМ», Украина (ТУ У 20.5-21628777-005:2015); марки ME88700, производства «TOSAF COMPOUNDS LTD.», Израиль; марки W015, производства «GUANGDONGMEILIANNEWMATERIALSTECHNOLOGYCO., LTD.», Китай;
 - желтый, марки 13786-MC, производства «AmpasetBelgiumSprl.», Бельгия; марки ME22220R, производства «TOSAF COMPOUNDS LTD.», Израиль; марки 3053/P, производства «PrayagPolytech (Pvt) Ltd.», Индия;
 - красный, марки 150166, производства «AmpasetBelgiumSprl.», Бельгия; марки ME41862, производства «TOSAF COMPOUNDS LTD.», Израиль; марки 5089, производства «PrayagPolytech (Pvt) Ltd.», Индия; марки 10636-4, производства ООО «ТЕХНОКОМ», Украина (ТУ У 24.1-35207036-004:2008);
 - черный, марки 19836-N, производства «AmpasetBelgiumSprl.», Бельгия; марки LP9400S, производства «TOSAF COMPOUNDS LTD.», Израиль; марки КПГ 902-1, производства ООО «ТЕХНОКОМ», Украина (ТУ У 20.5-21628777-005:2015); марки PE1600, производства «GUANGDONGMEILIANNEWMATERIALSTECHNOLOGYCO., LTD.», Китай.

4 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Прочность стяжки составляет не менее 450 Н.

4.2 Материал пакетов не взрывоопасен, при поднесении открытого огня загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением перечисленных в

п. 2.4 токсичных веществ: формальдегида, оксида углерода, двуокси углерода, ацетальдегида и органических кислот.

4.3 При комнатной температуре базовые марки полиэтилена и композиций на их основе не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При нарушении норм и правил применения Пакетов, установленных в настоящем Руководстве по эксплуатации, предприятие-изготовитель и продавец, независимо от сроков приобретения продукции, не несут какой бы то ни было ответственности за любые последствия, наступившие при применении Пакетов, в том числе повлекшие нанесение ущерба здоровью человека.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение Пакетов при обнаружении дефектов, механических или иных повреждений!

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Перед транспортированием Пакетов убедитесь в отсутствии нарушений в упаковке.

5.2 Транспортирование Пакетов осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте конкретного вида, для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. При перевозке открытым транспортом пакеты защищают от атмосферных осадков.

5.3 Транспортирование полиэтиленовых мешков с упакованными в них пакетами, сформированных в транспортные пакеты — по ГОСТ 26663, ГОСТ 24597 и другим нормативным документам.

5.4 При внутригородских перевозках изделия транспортируют в потребительской таре, в полиэтиленовых мешках, гофрокоробах.

5.5 Размеры и масса брутто транспортного пакета должны соответствовать ГОСТ 26663.

5.6 Погрузка, крепление, транспортирование, разгрузка изделия должны обеспечить ее сохранность и исключить возможность повреждения упаковки.

5.7 Средства скрепления упаковок, упакованной в транспортную тару, в пакетированном виде - по ГОСТ 21650 и другим нормативным документам.

5.8 Пакеты хранят в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при температуре от минус 40°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха 50-85% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

5.9 Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до Пакетов должно быть не менее 0,2 м.

5.10 Высота штабеля не должна превышать 3,0 м.

Расстояние между штабелем и полом склада должно быть не менее 100 мм.

5.7 Не допускается совместное хранение Пакетов с маслами, бензином, керосином и другими веществами, разрушающими полимерные материалы.

5.8 Отправка Пакетов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - согласно ГОСТ 15846-2002.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Пакеты должны применяться в целях, установленных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

6.2 Перед применением необходимо проверить качество упаковки, отсутствие механических и иных повреждений.

6.3 Пакеты следует извлечь из упаковки и путем визуального осмотра убедиться в отсутствии дефектов, влияющих на их пригодность к применению.

6.4 Пакеты после транспортирования в условиях отрицательных температур выдерживают перед применением при температуре плюс $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ не менее 12 часов.

6.5 Пакеты могут применяться для сбора отходов классов А, Б, В и Г по СанПиН 2.1.7.2790-10 и СанПиН 2.1.3.2630-10, за исключением острых (колющих) предметов.

Перечень допустимых к упаковке отходов представлен в таблице 6.1.

Т а б л и ц а 6.1

Класс опасности	Характеристика морфологического состава
1	2
Класс А (эпидемиологически	Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными.

безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО)	Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потертые потребительские свойства. Смет от уборки территории и так далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических.
Класс Б (эпидемиологически опасные отходы)	Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию.
Класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)	Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.
Класс Г (токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности)	Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие.

и **П р и м е ч а н и е** - После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

6.6 Указания по организации и правилам сбора отходов, герметизации, хранению Пакетов и применяемым при этом средствам индивидуальной защиты, а также к персоналу, осу-

ществляющему сбор отходов – по СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1386-03 и «Методическим материалам по обращению с медицинскими отходами» (Письмо Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 27 октября 2011 г. № 09-01/9340).

6.7 Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил и утверждается руководителем организации

6.8 Смешивание отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования недопустимо.

6.9 Не допускается воздействие на поверхность Пакетов острыми и твердыми предметами (резание, царапание и др.), или агрессивными жидкостями (кислотами, щелочами, растворителями и т. п.). Заполнение Пакетов отходами должно быть не более $\frac{3}{4}$ их объема.

Отделение Пакетов с перфорацией должно осуществляться строго по линии перфорации.

6.10 На время заполнения Пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров (баков, урн и т. п.).

6.11 После наполнения Пакета следует вписать шариковой ручкой в пустые поля на информационном окне (или ярлыке) класс опасности отходов, собрать края Пакета и выпустить из него воздух, затем герметизировать при помощи стяжки.

После этого Пакет будет готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения отходов на территории лечебно-профилактического учреждения.



Внимание! Не допускается загружать Пакеты выше их грузоподъемности!

6.12 Использованные Пакеты повторному применению не подлежат!

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Пакеты утилизируются совместно с отходами в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03 и Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

7.2 Для обезвреживания высокоопасного биологического материала может применяться автоклавирование в Пакетах. Оно осуществляется в течение около 40 мин. при температуре 130...135 °С.

7.3 При утилизации отходов должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.1.3.13-86, ГОСТ 17.2.3.02-2014 и ГОСТ 17.2.1.04-77.

7.4 Предельно-допустимые концентрации выбрасываемых в атмосферу, водоёмы и почву веществ не должны превышать значений, установленных МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.5.1315, ГН 2.1.6.1338-03 и «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий».

Сточные воды должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Пакетов требованиям ТУ 32.50.50-001-42200822-2019 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения Пакетов – 6 месяцев со дня изготовления.

Все дефекты изделий, обнаруженные в течение гарантийного срока, влекущие нарушение их характеристик при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

8.3 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений Пакетов при перевозке и хранении;
- ненадлежащего использования изделий;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями, не оговоренными в руководстве по эксплуатации и в настоящем паспорте;
- доработки Пакетов потребителем (изменений конструкции).

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Пакеты одноразовые для сбора и хранения медицинских отходов в вариантах исполнениясоответствуют техническим условиям ТУ 32.50.50-001-42200822-2019 и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

подпись, дата

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБУПАКОВЫВАНИИ

Пакеты одноразовые для сбора и хранения медицинских отходов в вариантах исполнения.....упакованы в соответствии с ГОСТ 12302-2013 и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №769).

(личная подпись)_____
(расшифровка подписи)_____
(год, месяц, число)**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019

Варианты исполнения:

1. Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов тип I-3 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019:

1.1 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса А, тип I-3 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280х310 мм, 280х380 мм, 280х390 мм, 280х580 мм, 300х330 мм, 300х400 мм, 300х440 мм, 300х600 мм, 310х580 мм, 330х530 мм, 330х600 мм, 400х600 мм, 410х580 мм, 430х600 мм, 430х630 мм,

430x800 MM, 480x580 MM, 500x600 MM, 580x980 MM, 600x700 MM, 600x800 MM, 600x1000 MM,
680x780 MM, 680x980 MM, 680x1080 MM, 700x800 MM, 700x1000 MM, 700x1100 MM, 700x1200 MM,
780x880 MM, 780x1080 MM, 780x1180 MM, 800x900 MM, 800x1100 MM, 800x1200 MM, 880x980 MM,
880x1180 MM, 900x1000 MM, 900x1200 MM, 980x1080 MM, 980x1180 MM, 980x1380 MM, 980x1480
MM, 1000x1100 MM, 1000x1200 MM, 1000x1400 MM, 1000x1500 MM.

1.2 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б, тип I-3 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280х310 мм, 280х380 мм, 280х390 мм, 280х580 мм, 300х330 мм, 300х400 мм, 300х440 мм, 300х600 мм, 310х580 мм, 330х530 мм, 330х600 мм, 400х600 мм, 410х580 мм, 430х600 мм, 430х630 мм, 430х800 мм, 480х580 мм, 500х600 мм, 580х980 мм, 600х700 мм, 600х800 мм, 600х1000 мм, 680х780 мм, 680х980 мм, 680х1080 мм, 700х800 мм, 700х1000 мм, 700х1100 мм, 700х1200 мм, 780х880 мм, 780х1080 мм, 780х1180 мм, 800х900 мм, 800х1100 мм, 800х1200 мм, 880х980 мм, 880х1180 мм, 900х1000 мм, 900х1200 мм, 980х1080 мм, 980х1180 мм, 980х1380 мм, 980х1480 мм, 1000х1100 мм, 1000х1200 мм, 1000х1400 мм, 1000х1500 мм.

1.3 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса В, тип I-3 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280x310 мм, 280x380 мм, 280x390 мм, 280x580 мм, 300x330 мм, 300x400 мм, 300x440 мм, 300x600 мм, 310x580 мм, 330x530 мм, 330x600 мм, 400x600 мм, 410x580 мм, 430x600 мм, 430x630 мм, 430x800 мм, 480x580 мм, 500x600 мм, 580x980 мм, 600x700 мм, 600x800 мм, 600x1000 мм, 680x780 мм, 680x980 мм, 680x1080 мм, 700x800 мм, 700x1000 мм, 700x1100 мм, 700x1200 мм, 780x880 мм, 780x1080 мм, 780x1180 мм, 800x900 мм, 800x1100 мм, 800x1200 мм, 880x980 мм, 880x1180 мм, 900x1000 мм, 900x1200 мм, 980x1080 мм, 980x1180 мм, 980x1380 мм, 980x1480 мм, 1000x1100 мм, 1000x1200 мм, 1000x1400 мм, 1000x1500 мм.

1.4 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Г, тип I-3 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280x310 мм, 280x380 мм, 280x390 мм, 280x580 мм, 300x330 мм, 300x400 мм, 300x440 мм, 300x600 мм, 310x580 мм, 330x530 мм, 330x600 мм, 400x600 мм, 410x580 мм, 430x600 мм, 430x630 мм, 430x800 мм, 480x580 мм, 500x600 мм, 580x980 мм, 600x700 мм, 600x800 мм, 600x1000 мм, 680x780 мм, 680x980 мм, 680x1080 мм, 700x800 мм, 700x1000 мм, 700x1100 мм, 700x1200 мм, 780x880 мм, 780x1080 мм, 780x1180 мм, 800x900 мм, 800x1100 мм, 800x1200 мм, 880x980 мм, 880x1180 мм, 900x1000 мм, 900x1200 мм, 980x1080 мм, 980x1180 мм, 980x1380 мм, 980x1480 мм, 1000x1100 мм, 1000x1200 мм, 1000x1400 мм, 1000x1500 мм.

2. Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов тип I-6 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019:

2.1 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса А, тип I-6 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280x310 мм, 280x380 мм, 280x390 мм, 280x580 мм, 300x330 мм, 300x400 мм, 300x440 мм, 300x600 мм, 310x580 мм, 330x530 мм, 330x600 мм, 400x600 мм, 410x580 мм, 430x600 мм, 430x630 мм, 430x800 мм, 480x580 мм, 500x600 мм, 580x980 мм, 600x700 мм, 600x800 мм, 600x1000 мм, 680x780 мм, 680x980 мм, 680x1080 мм, 700x800 мм, 700x1000 мм, 700x1100 мм, 700x1200 мм, 780x880 мм, 780x1080 мм, 780x1180 мм, 800x900 мм, 800x1100 мм, 800x1200 мм, 880x980 мм, 880x1180 мм, 900x1000 мм, 900x1200 мм, 980x1080 мм, 980x1180 мм, 980x1380 мм, 980x1480 мм, 1000x1100 мм, 1000x1200 мм, 1000x1400 мм, 1000x1500 мм.

2.2 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б, тип I-6 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280x310 мм, 280x380 мм, 280x390 мм, 280x580 мм, 300x330 мм, 300x400 мм, 300x440 мм, 300x600 мм, 310x580 мм, 330x530 мм, 330x600 мм, 400x600 мм, 410x580 мм, 430x600 мм, 430x630 мм, 430x800 мм, 480x580 мм, 500x600 мм, 580x980 мм, 600x700 мм, 600x800 мм, 600x1000 мм, 680x780 мм, 680x980 мм, 680x1080 мм, 700x800 мм, 700x1000 мм, 700x1100 мм, 700x1200 мм, 780x880 мм, 780x1080 мм, 780x1180 мм, 800x900 мм, 800x1100 мм, 800x1200 мм, 880x980 мм, 880x1180 мм, 900x1000 мм, 900x1200 мм, 980x1080 мм, 980x1180 мм, 980x1380 мм, 980x1480 мм, 1000x1100 мм, 1000x1200 мм, 1000x1400 мм, 1000x1500 мм.

2.3 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса В, тип I-6 по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280x310

4. Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов тип II по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019:

4.1 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса А, тип II по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280х310 мм, 280х380 мм, 280х390 мм, 280х580 мм, 300х330 мм, 300х400 мм, 300х440 мм, 300х600 мм, 310х580 мм, 330х530 мм, 330х600 мм, 400х600 мм, 410х580 мм, 430х600 мм, 430х630 мм, 430х800 мм, 480х580 мм, 500х600 мм, 580х980 мм, 600х700 мм, 600х800 мм, 600х1000 мм, 680х780 мм, 680х980 мм, 680х1080 мм, 700х800 мм, 700х1000 мм, 700х1100 мм, 700х1200 мм, 780х880 мм, 780х1080 мм, 780х1180 мм, 800х900 мм, 800х1100 мм, 800х1200 мм, 880х980 мм, 880х1180 мм, 900х1000 мм, 900х1200 мм, 980х1080 мм, 980х1180 мм, 980х1380 мм, 980х1480 мм, 1000х1100 мм, 1000х1200 мм, 1000х1400 мм, 1000х1500 мм.

4.2 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б, тип II по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280х310 мм, 280х380 мм, 280х390 мм, 280х580 мм, 300х330 мм, 300х400 мм, 300х440 мм, 300х600 мм, 310х580 мм, 330х530 мм, 330х600 мм, 400х600 мм, 410х580 мм, 430х600 мм, 430х630 мм, 430х800 мм, 480х580 мм, 500х600 мм, 580х980 мм, 600х700 мм, 600х800 мм, 600х1000 мм, 680х780 мм, 680х980 мм, 680х1080 мм, 700х800 мм, 700х1000 мм, 700х1100 мм, 700х1200 мм, 780х880 мм, 780х1080 мм, 780х1180 мм, 800х900 мм, 800х1100 мм, 800х1200 мм, 880х980 мм, 880х1180 мм, 900х1000 мм, 900х1200 мм, 980х1080 мм, 980х1180 мм, 980х1380 мм, 980х1480 мм, 1000х1100 мм, 1000х1200 мм, 1000х1400 мм, 1000х1500 мм.

4.3 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса В, тип II по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280х310 мм, 280х380 мм, 280х390 мм, 280х580 мм, 300х330 мм, 300х400 мм, 300х440 мм, 300х600 мм, 310х580 мм, 330х530 мм, 330х600 мм, 400х600 мм, 410х580 мм, 430х600 мм, 430х630 мм, 430х800 мм, 480х580 мм, 500х600 мм, 580х980 мм, 600х700 мм, 600х800 мм, 600х1000 мм, 680х780 мм, 680х980 мм, 680х1080 мм, 700х800 мм, 700х1000 мм, 700х1100 мм, 700х1200 мм, 780х880 мм, 780х1080 мм, 780х1180 мм, 800х900 мм, 800х1100 мм, 800х1200 мм, 880х980 мм, 880х1180 мм, 900х1000 мм, 900х1200 мм, 980х1080 мм, 980х1180 мм, 980х1380 мм, 980х1480 мм, 1000х1100 мм, 1000х1200 мм, 1000х1400 мм, 1000х1500 мм.

4.4 Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Г, тип II по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, размеры: 280х310 мм, 280х380 мм, 280х390 мм, 280х580 мм, 300х330 мм, 300х400 мм, 300х440 мм, 300х600 мм, 310х580 мм, 330х530 мм, 330х600 мм, 400х600 мм, 410х580 мм, 430х600 мм, 430х630 мм, 430х800 мм, 480х580 мм, 500х600 мм, 580х980 мм, 600х700 мм, 600х800 мм, 600х1000 мм, 680х780 мм, 680х980 мм, 680х1080 мм, 700х800 мм, 700х1000 мм, 700х1100 мм, 700х1200 мм, 780х880 мм, 780х1080 мм, 780х1180 мм, 800х900 мм, 800х1100 мм, 800х1200 мм, 880х980 мм, 880х1180 мм, 900х1000 мм, 900х1200 мм, 980х1080 мм, 980х1180 мм, 980х1380 мм, 980х1480 мм, 1000х1100 мм, 1000х1200 мм, 1000х1400 мм, 1000х1500 мм.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

32.50.50.001.4220822 РЭ

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 21 (двадцать один) листов
Должность Директор
Подпись Миронова ЕВ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРМАДА-ПОЛИМЕР»

**ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ
СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
ПО ТУ 32.50.50-001-42200822-2019**

ПАСПОРТ

32.50.50.001.42200822 ПС

Новосибирск,
2019 г.

Общие указания

1 Перед использованием Пакета полиэтиленового одноразового для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов (далее по тексту – Пакет) необходимо:

- проверить их соответствие маркировочным данным;
- внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации;
- изучить надлежащую информацию по эффективному и безопасному использованию.

2 *За ситуации, сложившиеся при неправильном использовании Пакетов, производитель ответственности не несёт!*

3 В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

4 После подписи необходимо проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (допускается вместо подписи проставлять личный штамп исполнителя).

5 Паспорт выполнен в соответствии с ГОСТ 2.610-2006.

Внимание! Просим обратить внимание на то, что правильное и своевременное заполнение настоящего Паспорта поможет избежать непредвиденных расходов из-за несоблюдения правил применения Пакетов.

6 Для возможности ведения форм и таблиц Паспорта допускается изымать страницу и размножать её в необходимом количестве.

1 Основные сведения об изделии	4
2 Основные технические данные.....	5
3 Комплектность.....	7
4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	8
5 Сведения о рекламациях.....	9
6 Свидетельство о приемке.....	10
7 Свидетельство об упаковывании.....	11

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: *Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019*

Обозначение изделия:

(в соответствии с типом, типоразмером, цветом и классом отходов)

Дата изготовления:

(число, месяц, год)

Наименование изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Полимер» (ООО «Армада-Полимер»)

адрес: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Приграничная, д. 1

почтовый адрес:

тел. +7 (913) 985-70-27, факс

эл. почта: e-mail: Polimer0609@mail.ru

взб страница:

Пакеты изготовлены в соответствии с

ТУ 32.50.50-001-42200822-2019, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 12302-2013 и СанПиН 2.1.7.2790-10.

Сертификат (декларация) соответствия №, срок действия
с..... по..... выдан органом.....

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Назначение – Пакет предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов, образующихся при осуществлении медицинской деятельности.

Внимание! Любое другое использование считается использованием изделий не по назначению!

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, а также другие учреждения, требующие обязательного использования пакетов, как одного из средств сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов.

Показания к применению: пакет применяется в различных медицинских учреждениях для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм.

Противопоказания к применению и побочные эффекты: не выявлены.

Потенциальные потребители: пакет применяется медицинским персоналом для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов, образующихся при осуществлении медицинской деятельности в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений

2.2 Пакет согласно ГОСТ 12302-2013 относится к типам I-3, I-6 (с прямым дном), а также согласно ГОСТ 32521-2013 типов: I термосваренный с открытым верхом, II термосваренный с открытым верхом с фальцами.

2.3 Пакет в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия - 1 по ГОСТ 31508-2012 и Приказу МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г. (с изменениями от 25.09.2014 г.).

2.4 Пакет выпускается окрашенными согласно СанПиН 2.1.7.2790-10:

- для отходов класса А – белого цвета;
- для отходов класса Б – жёлтого цвета;
- для отходов класса В – красного цвета;
- для отходов класса Г – черного цвета.

2.5 Пакет выпускается с размерами по длине и ширине 280х310 мм, 280х380 мм, 280х390 мм, 280х580 мм, 300х330 мм, 300х400 мм, 300х440 мм, 300х600 мм, 310х580 мм, 330х530 мм, 330х600 мм, 400х600 мм, 410х580 мм, 430х600 мм, 430х630 мм, 430х800 мм, 480х580 мм, 500х600 мм, 580х980 мм, 600х700 мм, 600х800 мм, 600х1000 мм, 680х780 мм, 680х980 мм, 680х1080 мм, 700х800 мм, 700х1000 мм, 700х1100 мм, 700х1200 мм, 780х880 мм, 780х1080 мм, 780х1180 мм, 800х900 мм, 800х1100 мм, 800х1200 мм, 880х980 мм, 880х1180 мм, 900х1000 мм, 900х1200 мм, 980х1080 мм, 980х1180 мм, 980х1380 мм, 980х1480 мм, 1000х1100 мм, 1000х1200 мм, 1000х1400 мм, 1000х1500 мм, с допустимым отклонением ± 10 мм.

Толщина стенок – не менее 8 мкм.

2.6 Масса упаковываемых отходов – не более 15 кг.

2.7 Пакет пригоден для применения в условиях У климата по ГОСТ 15150-69 категории размещения 2, при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С.

Условия эксплуатации в части стойкости ко внешним механическим воздействиям – по группе 2 ГОСТ Р 50444-92.

2.8 Прочность швов у Пакета должна составлять не ниже 0,7 единиц от прочности используемой полимерной пленки при растяжении, при этом ширина сварных швов не должна превышать 10 мм.

Прочность применяемой плёнки при растяжении в продольном направлении принимается не менее 16,1 МПа (165 кгс/см²), в поперечном – не менее 13,7 МПа (140 кгс/см²), относительное удлинение при разрыве в продольном направлении – не менее 150%, в поперечном направлении – не менее 150%.

2.9 Сварные швы Пакета должны быть герметичными, равномерными по всему контуру, без пропусков, прожогов и пробоин, и располагаться на расстоянии до 10 мм от края.

2.10 При изготовлении пакета с двухрядными швами расстояние между швами должно быть не более 8 мм.

2.11 Масса пакета соответствует величине, указанной в рабочих чертежах.

2.12 Пакет должны иметь сплошную ровную, гладкую и монолитную поверхность, без не расправляющихся (запрессованных) складок, разрывов, проколов (кроме искусственной перфорации).

Пакет не должен иметь слипания внутренних поверхностей.

2.13 Печать наносится флексографским способом. Текст и рисунок должны быть четкими, без перекосов, подтеков краски и непропечаток и регламентироваться контрольным оттиском. Не допускается искажение рисунка и текста, рассовмещение красок.

2.14 Краски не должны отмарываться на обратную сторону Пакета.

2.15 Допуски на совмещение элементов рисунка и рисунка относительно бокового края:

- совмещение элементов рисунка в 2...4 цвета:

- продольное – не более 1% от ширины Пакета;

- поперечное – не более 2% от ширины Пакета;

- совмещение рисунка относительно бокового края пакета – не более 1,5% от ширины Пакета.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Пакет поставляется в комплекте, обеспечивающем их пригодность для дальнейшего применения.

3.2 В состав партии включается инструкция по применению по ГОСТ 2.601-2013.

3.3 В комплектацию Пакета входят изделия и документация согласно таблице 3.1.

Т а б л и ц а 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер
1 (тип, типоразмер)	Пакет полиэтиленовый од- норазовый для сбора, вре- менного хранения и транс- портировки медицинских отходов		
2 Эксплуатационная докумен- тация в составе:	-	1 (в комплекте)	-
2.1 32.50.50.001.42200822 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-
2.2 32.50.50.001.42200822 ПС	Паспорт	1	-
3 Стяжка, ярлыки	 (наименование изделий)	1 комплект	
<i>П р и м е ч а н и е - Допускается уточнение и изменение комплектации Пакетов в соот- ветствии с условиями поставки.</i>			

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие Пакета установленным требованиям при соблюдении правил транспортирования, хранения и использования.

4.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

4.3 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений Пакета при перевозке и хранении;
- ненадлежащего использования изделий;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями, не оговоренными в руководстве по эксплуатации и в настоящем паспорте;
- доработки Пакета потребителем (изменений конструкции).

5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1 Регистрируются все предъявленные рекламации и их краткое содержание.

5.2 В случае вскрытия дефектов Пакета в период гарантийного срока следует составить технически обоснованные сведения о рекламации по форме таблицы 5.1.

Т а б л и ц а 5.1

Номер рекламаций	Дата	Содержание рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

Примечание - Первые четыре графы заполняет эксплуатирующая организация при обнаружении неисправностей в период гарантийного срока, а последующие графы - завод-изготовитель.

Сведения следует направить предприятию-изготовителю (поставщику) по указанному адресу.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019

(наименование изделия)

.....

.....

(обозначение изделия)

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации и признаны годными для применения.

Директор

(ответственный за выпуск продукции)

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

год, месяц, число

**Ответственный за технический
контроль продукции (ОТК)**

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов по ТУ 32.50.50-001-42200822-2019

.....

(наименование, обозначение изделия)

упакованы в соответствии с ГОСТ 12302-2013 и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №769).

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 11 (оригиналы) листов

Должность Директор

Подпись Григорьев Е.В.

