



ЭМИ

ЗАКАЗНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

C107-2

Техническое
ТУ 9437-001-3

Регистрационный
РЗН РУН



20.11.2019



01380



ООО «Заказный медицинский инструмент»

194100, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мухомова, д. 2, лит. А

7 812 295-07-05
7 812 448-07-40

информация
отсутствует



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Зонд мерный
C107-2

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике.
Извлеките инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ:

- Недопустимо использовать инструмент, впервые расфасованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки:

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение:

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (рефрижератор, климатическая камера, металлические шкафы с климатическим контролем и другие хранилища), расположенные в климатических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента — 2 года.

Производитель не несет ответственности в случае использования медицинского изделия не по назначению.

© ООО «Заказный медицинский инструмент»




Адрес производства медицинского изделия:
194104, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мухомова, д. 2А, лит. А

Все вопросы по характеристикам и порядку обслуживания направляются:

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@zmi.ru

Регистрационное удостоверение
РЗН

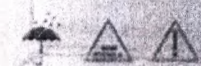



ЭМИ ЭРГОНОМИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

C165-1

Технические условия
ТУ 9437-004-301019

Регистрационный номер
РЗН РУМ



20.11.2019



01380



ООО «Центральный медицинский
инструмент»

194061, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Миланская, д. 2А, лит. А

+7 812 295-07-06
+7 812 448-07-40

info@em-i.ru
www.em-i.ru



ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ вариант исполнения

Штопфер
C165-1

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике. Извлекайте инструмент из упаковки осторожно, не допускайте падения инструмента при вскрытии упаковки. Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Все информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется стерильным.

ВНИМАНИЕ

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий. Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно не отличаются от условий окружающей среды (например, в помещениях хранения металлических изделий, в помещениях хранения изделий).

- Срок службы инструмента — 2 года.
- Производитель не несет ответственности за использование медицинского изделия по назначению.

© «Эргономичный медицинский инструмент»



Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Миланская, д. 2А, лит. А


Все вопросы по гарантийному и текущему обслуживанию принимаются:

Телефоны:
+7 812 295-07-06
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@em-i.ru

Регистрационное удостоверение
РЗН



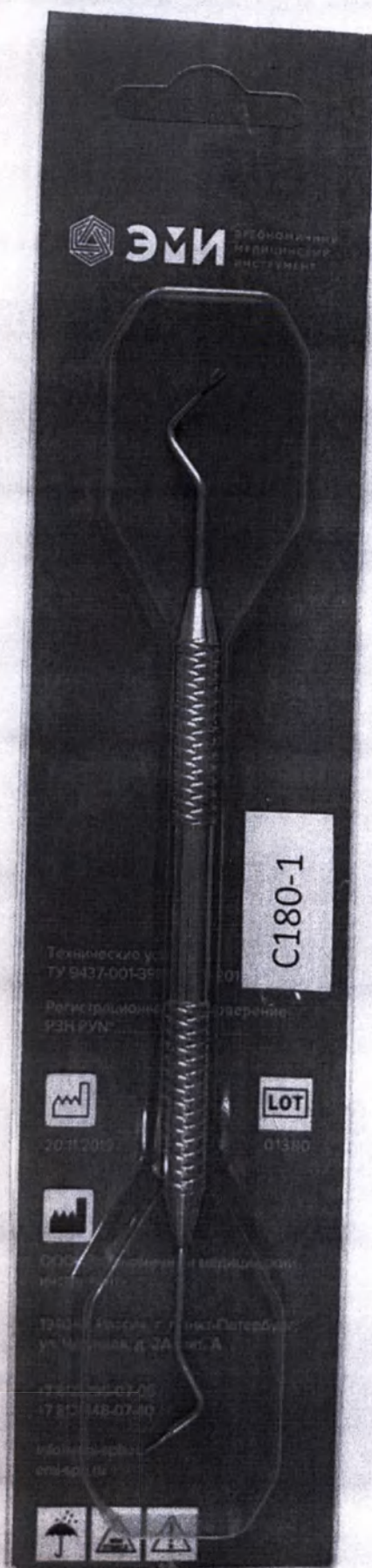

ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Инструмент для формирования контактного пункта C180-1

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической геральпетической практике. Извлеките инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки. Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется стерильным.

ВНИМАНИЕ

- Не допустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Не допустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Не допустимо использование инструмента периодически для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий. Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрывать или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические, стеклопластиковые и другие материалы), расположенные в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента — 2 года.

Производитель не несет ответственности за качество использования медицинского изделия после окончания срока годности.

По КД «Экономический медицинский инструмент»



Адрес производства медицинского изделия:
196444, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Пулковская, д. 2А, лит. А.

Все вопросы по гарантийному и текущему обслуживанию принимаются.

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@emi-ru

Регистрационное удостоверение
Р№





ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

C185-1

ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Штопфер
C185-1

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике. Извлекать инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки. Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется стерильным.

ВНИМАНИЕ

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий. Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие конструкции), расположенные в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента – 2 года.

Производитель не несет ответственности в случаях использования медицинского изделия не по назначению.

ООО «Эргономичный медицинский инструмент»



Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и текущему обслуживанию принимаются

Телефоны:

+7 812 295-07-05

+7 812 448-07-40

E-mail:

info@emi-rb.ru

Регистрационное удостоверение

РПЗН



Технические
ТУ 9437-001-301-2019

Регистрационное
РЗН РПЗН



20.11.2019



01380



ООО «Эргономичный медицинский
инструмент»

194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 2А, лит. А


+7 812 295-07-05

+7 812 448-07-40

info@emi-rb.ru

emi-rb.ru

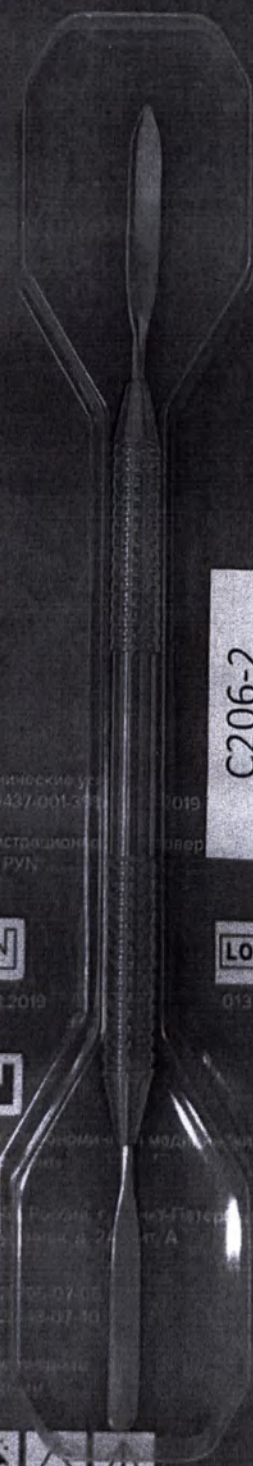

**ЭМИ**ЭКОНОМИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ**C206-2**Технические условия
ТУ 9437-001-379

0019

Регистрационное
свидетельство
РЗН РУН

0019



20.11.2019



01380

ООО «Экономичный медицинский
инструмент»117018, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Тургенева, д. 2А, лит. АТел: +7 (812) 295-07-05
+7 (812) 448-07-60E-mail: info@em-i.ru
info@em-i.ru**ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ**
вариант исполнения**Шпатель
C206-2****ИНСТРУКЦИЯ**

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике.
Извлекайте инструмент из упаковки осторожно, не допускайте падения инструмента при вскрытии упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен проводить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, кафельные, бетонные, металлические, с теплоизоляцией и другие материалы), расположенные в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента – 2 года.

Производитель не несет ответственности в случаях использования медицинского изделия не по назначению.

ООО «Экономичный медицинский инструмент»



Адрес производства медицинского изделия:
117044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Тургенева, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и послугам
обслуживанию направляются:

Телефоны:
+7 (812) 295-07-05
+7 (812) 448-07-60

E-mail:
info@em-i.ru

Регистрационное удостоверение
РЗН





ФГБУ «ВНИИС»
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

C215-1

Технические условия
ТУ 9437-001-35

Регистрационное
свидетельство
РЗН РУН



20.11.2019



01380

ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Шпатель фигурный
C215-1

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической хирургической практике. Извлеките инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки.

Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий. Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Защитите или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от климата воздуха (например, в стерилизационной, в упаковке стерилизационной, в упаковке изделий в стерилизационной, в упаковке изделий в стерилизационной).

Срок службы инструмента – 2 года. Гибельность и ответственность в случаях использования медицинского изделия не по назначению.

© «ЭМИ» – зарегистрированный медицинский инструмент



Изготовитель медицинских изделий
ООО «ЭМИ» г. Санкт-Петербург,
ул. Мухоморова, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и текущему обслуживанию принимаются.

Телефоны
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail
info@emi-spb.ru

Регистрационное удостоверение
РЗН РУН





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУКИ И ТЕХНИКИ
ИНФОРМАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Гладилка
C256-2

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике.
Извлекайте инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ:

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, кладовые, бетонные, металлические и т.п. помещения и другие хранилища), расположенные в умеренно-климатических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента – 2 года.

Производитель не несет ответственности в случаях использования медицинского изделия не по назначению.

Б.О. «Эргономичный медицинский инструмент»



Адрес производства медицинского изделия:
190644, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чкаловская, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и текущему обслуживанию принимаются.

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@emc-kp.ru

Регистрационное удостоверение
Руту



Техническое
ТУ 9437-001-3019

Регистрационное
РЗН РУН



20.11.2019



ООО «Центр медицинской информации»

190644, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чкаловская, д. 2А, лит. А

Тел: 295-07-05
795-07-40

Адрес: 190644, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чкаловская, д. 2А, лит. А



C256-2

LOT

01380

ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Штопфер гладилка
С310-3

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике. Извлекайте инструмент из упаковки осторожно, не допускайте падения инструмента при вскрытии упаковки.

Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий. Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Упаковка

Информация для лиц, контактирующих с естественной средой и/или биологическими жидкостями, регулируемых требованиями к упаковке медицинских изделий, должна быть указана на упаковке. Например, информация о том, что изделие не должно подвергаться воздействию влаги (например, не должно подвергаться воздействию влаги).

Срок службы изделия — 2 года. Производители несут ответственность за качество использования медицинского изделия на протяжении всего срока службы.

ООО «ЭМ» — Эргономичный медицинский инструмент



Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мугуляк, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантии и текущему обслуживанию принимаются:

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

Е-mail:
info@emi-erb.ru

Регистрационное удостоверение
РУП



ЭРГОНОМИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

С310-3

Технические условия
ТУ 9437-001-310-3

Регистрационное удостоверение
РЗН РУП



20.11.2019



01330



ООО «ЭМ» — Эргономичный медицинский инструмент

194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мугуляк, д. 2А, лит. А

+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

info@emi-erb.ru



**ЭМИ**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
ИНСТРУМЕНТЫ**C363-1**Техническое описание
ТУ 9437-001-35Регистрационный
входной документ

20.11.2019



01380

ООО «ЭМИ» - федеральный научный центр
стоматологии194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чабульская д. 2А, лит. АТел: 812 295-07-05
812 448-07-40Информация
о продукции**ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ**
вариант исполнения**Инструмент для укладки
ретракционной нити
C363-1****ИНСТРУКЦИЯ**

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике.
Извлеките инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным

Внимание!

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением инструкций, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должны производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Классификация

Знак «Био» или другой помеченный с естественной биологической без искусственно регулируемых биологических условий, при которых температура и влажность воздуха существенно отличаются от условий окружающей среды (например, влажность, температура, атмосферное давление, состав воздуха и др.).

Срок службы инструмента – 2 года.
Подлежащие замене или утилизации.
В случае использования медицинского изделия по назначению.

СНБ «Федеральный медицинский инструмент»

Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чабульская д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и сервисному обслуживанию направляйте:

Телефоны:
812 295-07-05
812 448-07-40E-mail:
info@emir.ruРегистрационное удостоверение
русс



ЭМИ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

C380-1

Технические условия
ТУ 9437-001-355-2019

Регистрационный номер
РЗН РУН



20.11.2019



01380



ООО «Информационно-медицинский центр»

194044, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Жульникова, д. 1, лит. А

+7 812 295-07-05

+7 812 448-07-40

info@emi-spb.ru

emi-spb.ru



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Зонд
эндодонтический
C380-1

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической практике.
Использовать инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренних инструкций, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Зеркало или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, кафельные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие материалы), расположенный в климатических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента – 2 года.

Гарантирует только на несет ответственности за использование медицинского изделия не по назначению.

ООО «Информационно-медицинский центр»




Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Жульникова, д. 1А, лит. А

Все вопросы по гарантии и техническому обслуживанию направляются:

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@emi-spb.ru

Регистрационное удостоверение
рун

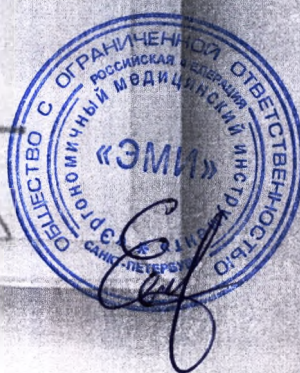



ЭРОНОМИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

C385-4

Техническое
ТУ 6437-001-2019

Регистрационное
ИЗН РУН



20.12.2019



Создан в соответствии
с требованиями
ГОСТ Р ИСО 13485:2016

г. Санкт-Петербург
ул. Невская, д. 2А

Средства связи:
телефон, факс, электронная почта



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Штопфер эндодонтический
C385-4

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике.

Извлеките инструмент из упаковки осторожно, не допускайте падения инструмента при вскрытии упаковки.

Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

– Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.

– Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.

– Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.

Стерилизацию должен проводить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента – 2 года.

Производитель не несет ответственности за нарушение использования медицинского изделия по назначению.

Срок годности медицинского инструмента



Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Невская, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и текущему обслуживанию принимаются:

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@emi-spb.ru

Регистрационное удостоверение
рун:





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУКИ И ТЕХНИКИ
ИНСТРУМЕНТ

C420-2

Техническое
ТУ 9437-001-37019

Регистрационный
РЗН РУН



20.11.2019



01380



ОАО «Федеральный центр
научно-технической информации
в медицине»

194015, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мухоморова, д. 1, лит. А

7 812 395-07-05
7 812 395-07-40

Электронная почта:
info@fctim.ru



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Экскаватор
C420-2

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения
лечебных процессов в стоматологической
терапевтической практике.
Извлекать инструмент из упаковки осторожно,
не допуская падения инструмента при вскрытии
упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной
упаковке. Вся информация нанесена на бумажной
стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

— Не допускается использовать инструмент, впервые
распакованный и не прошедший стерилизацию.
— Не допускается использование инструмента,
не прошедшего стерилизацию перед каждым
применением.
— Не допускается использование инструмента
одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация осуществляется выполнением
внутренней инструкции, утвержденной лечебным
учреждением в установленном порядке для
данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должны производить персонал,
прошедший инструктаж и допущенный к данному
виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго
в соответствии с внутренней инструкцией для
хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрытые или другие помещения с естественной
вентиляцией без искусственно регулируемых
климатических условий, где колебания
температуры и влажности воздуха существенно
меньше, чем на открытых площадях (например,
каменитый, бетонный, кирпичный,
стеклянный, металлический,
деревянный, и т.д.).

Срок хранения инструмента в упаковке
устанавливается в соответствии с
требованиями к сроку хранения стерильных
изделий.

Внимание! При использовании инструмента



ОАО «Федеральный центр
научно-технической информации
в медицине»

194015, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мухоморова, д. 1, лит. А

7 812 395-07-05
7 812 395-07-40

Электронная почта:
info@fctim.ru

Регистрационное удостоверение
0019





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТРУМЕНТА

C455-2

Технический
ТУ 9437-001-3019

Регистрационный
РЗН РУН



20.11.2019



01360



Федеральный центр медицинского
инструмента

Санкт-Петербург, ул. Миллиарда, д. 2А, лит. А

Тел: +7 812 295-07-05

Тел: +7 812 448-07-40

Мобильный
номер



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Нож эмалевый
C455-2

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической перелатической практике. Извлекать инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки.

Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

Внимание

— Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
— Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
— Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренних инструкций, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий. Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрывать или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, извлеченные, ботанические, металлические, с полимеризацией и другие материалы), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента — 2 года.

Производитель не несет ответственности за случаи использования медицинского изделия по назначению.

О «Федеральный медицинский инструмент»




Адрес производства медицинского изделия:
г. Санкт-Петербург, ул. Миллиарда, д. 2А, лит. А.

Вся информация по гарантийному и текущему обслуживанию принимается.

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

Сайт:
fcmi.ru

Регистрационное удостоверение:
РЗН Р

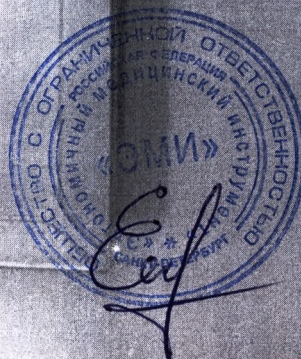



ЭМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
ИМПЛАНТЫ

C480-2

Технические характеристики
ТУ 9437-001-390-2019

Регистрационный номер
РЗН РУН



20.11.2019



01380



ОАО «ЭМИ» - федеральный научный центр стоматологии

194344, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Куликова, д. 2А

Тел: +7 (812) 295-07-05
+7 (812) 448-07-40

Факс: +7 (812) 448-07-40



**ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения**

**Долото эмалевое
C480-2**

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике.
Извлеките инструмент из упаковки осторожно, не допускайте падения инструмента при вскрытии упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ:

- Недопустимо использовать инструмент, впервые распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Недопустимо использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки:

Стерилизация обеспечивается выполнением внутренней инструкции, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен проводить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с внутренней инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение:

Защитные или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебание температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. Изделия должны храниться в герметичной упаковке, с теплоизоляцией и другими хранилищами, расположенными в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента - 2 года.

Производитель не несет ответственности в случаях использования медицинского изделия не по назначению.

ОАО «ЭМИ» - федеральный научный центр стоматологии



Адрес: производитель медицинских изделий
194344, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Куликова, д. 2А, лит. А


Все вопросы по гарантийному и сервисному обслуживанию принимаются

Телефоны:
+7 (812) 295-07-05
+7 (812) 448-07-40

Е-mail:
info@emir.ru

Регистрационное удостоверение
РЗН



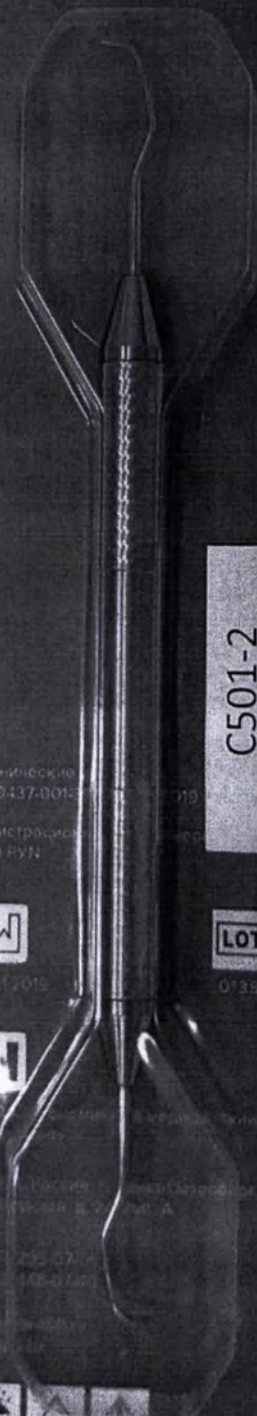

C501-2

Техническое
ТУ 9437-0012

Регистрация
РЭН-РУН



20.11.2012



01350



ООО Цирми

194010, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Нахимова, д. 1, лит. А

7 812 295 07-05
7 812 295 07-40

www.cirmi.ru



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Кюретка Грейси
C501-2

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процессов в стоматологической терапевтической практике.
Использовать инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

- Не допускается использовать инструмент, впервые открытый, и не прошедший стерилизацию.
- Не допускается использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Не допускается использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением в соответствии с инструкцией, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию проводит персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с инструкцией для хранения изделий данного вида.

Характеристики

Информация о материале, из которого изготовлен инструмент, доступна по запросу. Регулируемые характеристики инструмента, обеспечивающие его безопасность и эффективность использования, существенно отличаются от аналогов (например, наличием датчика, позволяющего контролировать температуру в рабочей зоне).

Срок службы инструмента – 2 года.
Гарантия предоставляется на условиях ответственности производителя за качество медицинского изделия.

Одобрение медицинской организации



Адрес производства медицинского изделия:
19-044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Нахимова, д. 2А, лит. А


Наличие в продаже партийного и текущего
сертификата приемки

Телефоны:
7 812 295 07-05
7 812 295 07-40

Сайт:
www.cirmi.ru

Полное наименование изделия

РЭН

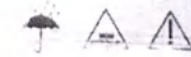

**ЭМИ**ЭКОНОМИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ**C545-1**Техническое устройство
ТУ 9437-001-350-2019Регистрационное удостоверение
РЗН РУН

20.11.2019



01380

ООО «ЭМ-Информ» — медицинский
инструмент194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
Пушкинская д. 2А, лит. А+7 812 295-07-05
+7 812 446-07-40info@eminfo.ru
eminfo.ru**ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ**
вариант исполнения**Скребок
наддесневой
C545-1****ИНСТРУКЦИЯ**

Инструмент предназначен только для проведения лечебных процедур в стоматологической практике. Извлеките инструмент из упаковки осторожно, не допуская падения инструмента при вскрытии упаковки. Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Вся информация нанесена на бумажной стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

- Не допускается использовать инструмент, впервые раскрывшийся, и не прошедший стерилизацию.
- Не допускается использование инструмента, не прошедшего стерилизацию перед каждым применением.
- Не допускается использование инструмента одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением инструкций, утвержденной лечебным учреждением в установленном порядке для данного вида медицинских изделий. Стерилизацию должен производить персонал, прошедший инструктаж и допущенный к данному виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго в соответствии с инструкцией для хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Хранить инструмент в упаковке с естественной влажностью. Не допускать регулировки механических частей, регулировки. Избегать воздействия влаги и пыли. Существенно различия в температуре воздуха (например, хранение в морозильной камере, хранение в морозильной камере, хранение в морозильной камере).

Срок службы инструмента — 2 года.

Полная ответственность за качество использования медицинского изделия несет пользователь.

ГОСТ 19180-2019 «Эксплуатация медицинских инструментов»



ООО «ЭМ-Информ» — медицинский
инструмент
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
Пушкинская д. 2А, лит. А

Вопросы по гарантийному и текущему
обслуживанию принимаются.

Телефон:
+7 812 295-07-05
+7 812 446-07-40

Емкость:
— 1 шт.

Информационное удостоверение
серия



**ЭМИ**ЭРГОНОМИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ**C586-1**Техническое условие
ТУ 0437-001-300019Регистрационное удостоверение
РЭН РУН

20.11.2018



01360

ООО «Эргономичный медицинский
инструмент»194064, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Пушковая, д. 2А, лит. А

Тел: +7 812 295-07-05

Факс: +7 812 448-07-40

E-mail: info@emi-ru.ru
info@emi-ru.ru**ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ**
вариант исполнения**Кюретка
универсальная
Лангера
C586-1****ИНСТРУКЦИЯ**Инструмент предназначен только для проведения
лечебных процессов в стоматологической
терапевтической практике.Извлекайте инструмент из упаковки осторожно,
не допускайте падений инструмента при вскрытии
упаковки.Инструмент поставляется в индивидуальной
упаковке. Вся информация нанесена на бумажной
стороне упаковки.

Инструмент поставляется стерильным.

ВНИМАНИЕ:

- Недопустимо использовать инструмент, впервые
распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента,
не прошедшего стерилизацию перед каждым
применением.
- Недопустимо использование инструмента
одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки:Стерилизация обеспечивается выполнением
внутренней инструкции, утвержденной лечебным
учреждением в установленном порядке для
данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен производить персонал,
прошедший инструктаж и допущенный к данному
виду работ.Хранение инструмента после стерилизации строго
в соответствии с внутренней инструкцией для
хранения стерильных изделий данного вида.**Хранение:**Закрытые или другие помещения с естественной
вентиляцией без искусственно регулируемых
климатических условий, где колебания
температуры и влажности воздуха существенно
меньше, чем на открытом воздухе (например,
каменное, бетонное, металлическое
с теплоизоляцией и другие хранилища,
размещенные в микроклиматических районах
с умеренным и холодным климатом).

Срок службы инструмента – 2 года.

Производитель не несет ответственности
в случаях использования медицинского изделия
не по назначению.

ООО «Эргономичный медицинский инструмент»

Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Пушковая, д. 2А, лит. АВсе вопросы по гарантийному и текущему
обслуживанию принимаютсяТелефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40E-mail:
info@emi-ru.ruРегистрационное удостоверение
РЭН РУН



ЭМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

C610-3

Технический
ТУ 9437-001-2019

Регистрационный
РЗН РЗН



20.11.2019



01350



ООО «Цирми» медицинский
инструмент

194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мухоморова, д. 2А, лит. А

Тел: 812 295-07-05
812 448-07-40

Вед. 812 295-07-05
812 448-07-40



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Кюретажная ложка
C610-3

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения
лечебных процессов в стоматологической
терапевтической практике.
Извлекать инструмент из упаковки осторожно,
не допуская повреждения инструмента при вскрытии
упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной
упаковке. Вся информация нанесена на бумажной
стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

— Не допускается использовать инструмент, впервые
распакованный и не прошедший стерилизацию.
— Не допускается использование инструмента,
не прошедшего стерилизацию перед каждым
применением.
— Не допускается использование инструмента
одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением
внушенной инструкции, утвержденной лечебным
учреждением в установленном порядке для
данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен производить персонал,
прошедший инструктаж и допущенный к данному
виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго
в соответствии с инструкцией для
хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Этикетки или другие обозначения с естественной
информацией должны регулярно
контролироваться и в случае обнаружения
повреждений или изменений в воздухе
мешки, пакеты, коробки (например,
кислотные, щелочные, металлические
или полимерные и другие материалы),
или поврежденные в неблагоприятных районах
или в условиях хранения.

Срок службы инструмента — 2 года
с момента выпуска из ответственности
за качество использования медицинского изделия
или срока годности.

ОК 02 «Эргonomичный медицинский инструмент»



Адрес производства медицинского изделия:
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мухоморова, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и текущему
обслуживанию принимаются:

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@emi-spb.ru

Регистрационное удостоверение
судит





ЭМИ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

C705-1

Технические условия
ТУ 9437-001-99

Регистрационное
свидетельство
РЗН РУН



20.11.2019



01380



ООО «Эргономичный
инструмент»

медицинский

194011, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мугунная, д. 2А, лит. А

г. Санкт-Петербург

Тел: +7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

info@cirmi.ru
info@emi-spb.ru



ИНСТРУМЕНТ
МЕДИЦИНСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
вариант исполнения

Инструмент
ортодонтический
C705-1

ИНСТРУКЦИЯ

Инструмент предназначен только для проведения
лечебных процессов в стоматологической
терапевтической практике.
Извлеките инструмент из упаковки осторожно,
не допускайте падения инструмента при вскрытии
упаковки.
Инструмент поставляется в индивидуальной
упаковке. Вся информация нанесена на бумажной
стороне упаковки.

Инструмент поставляется нестерильным.

ВНИМАНИЕ

- Недопустимо использовать инструмент, впервые
распакованный, и не прошедший стерилизацию.
- Недопустимо использование инструмента,
не прошедшего стерилизацию перед каждым
применением.
- Недопустимо использование инструмента
одновременно для нескольких пациентов.

Методы обработки

Стерилизация обеспечивается выполнением
внутренней инструкции, утвержденной лечебным
учреждением в установленном порядке для
данного вида медицинских изделий.
Стерилизацию должен производить персонал,
прошедший инструктаж и допущенный к данному
виду работ.

Хранение инструмента после стерилизации строго
в соответствии с внутренней инструкцией для
хранения стерильных изделий данного вида.

Хранение

Закрывайте или другие помещения с естественной
вентиляцией без искусственно регулируемых
климатических условий, где колебания
температуры и влажности воздуха существенно
меньше, чем на открытом воздухе (например,
каменные, бетонные, металлические
с теплоизоляцией и другие хранилища),
расположенные в макроклиматических районах
с умеренным и холодным климатом.

Срок службы инструмента – 2 года.

Производитель не несет ответственности
в случаях использования медицинского изделия
не по назначению.

ООО «Эргономичный медицинский инструмент»



Адрес производства медицинского изделия
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Мугунная, д. 2А, лит. А

Все вопросы по гарантийному и текущему
обслуживанию принимаются:

Телефоны:
+7 812 295-07-05
+7 812 448-07-40

E-mail:
info@cirmi-spb.ru

Регистрационное удостоверение
РУН



