

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
(УДОСТОВЕРЕНИЕ) ПОДПИСИ
личности от имени корпорации**

22/20 ת"ס

**אימות חתימתו
של אדם
בשם תאגיד**

Я, нижеподписавшаяся, Зингерман Орли, нотариус, номер лицензии 299856, адрес ул. Жаботинского, 35, г. Рамат Ган, Израиль, настоящим документом подтверждаю, что 30.01.2020, в моем присутствии находилась госпожа Чертков Светлана, личность которой установлена мной в соответствии с предъявленным мне паспортом государства Израиль № 21807002 Выданным 11.09 2014 года в городе Кфар Саба, в Израиле. Я убедилась, что госпожа Чертков Светлана, поняла смысл данного документа и подписала его по собственному желанию, обозначенный буквой «А» от имени корпорации MEDEREN NEOTECH LTD No. 515505329, находящейся в Тель-Авиве, Израиль.



אני החיימ
אורלי זינגרמן, נוטריין
מרחי זיבוטינסקי 35, רמת גן, ישראל
מסי רישיון נוטריוני 299856

(מרת)

אירטקוב סבטלנה
שזעפ"י דרכון ישראלי
מסי 21807002
שהונפלי ביום 11.09.2014
בכפר סבא, ישראל

ושוכנעתי כי הניצב/ת/ים בפני הבינ/ה/ו הבנה
מלאה את משמעות הפעולה
וחתם/מה/ו מרצונו/ם החופשי על המסמך
המצורף בזה ומסון באות "א", בשם חברה
מדרו נאוטע "מ"
שמספרה 515505329

שמיקומה: תל אביב, ישראל

בתולף תפקידו/ה/ם וסמכותו/ה/ם וסמכותו/ה/ם
כמורשה/ת/י
חתימה מטעם ובשם החברה, אני מאשר

Как подтверждение сказанному выше,
госпожа Чертков Светлана подписала
приложенный документ,
обозначенный буквой «А» выданный
от имени корпорации.

В подтверждении этого я,
удостоверяю подпись госпожи

Дата

Печать и подпись нот



כראיה להנחת, להנחת דעתי, לשם הוכחת
רשותו/ה/ם של מל מרת) צירטקוב סבטלנה
לחתום על המסמך הרצ"ב והמסומן באות "א"
תשם החברה הנייל
ולאיה נני מאמת את חתימתו/ה/ם של
החותמים הנ"ל

היום 30.01.2020

שכ"ט נוטריוני 22 ת"ס+מע"מ



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

УТВЕРЖДАЮ

Mederen Neotech Ltd.
Mederen Neotech Ltd.
515505329

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной)
анестезии MEDEREN



2020

1



Оглавление

1 Наименование медицинского изделия	3
2 Сведения о производителе медицинского изделия	40
3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем	40
4 Условия применения	40
5 Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий	40
6 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия	42
7 Указания по применению	89
8 Установка и способ применения	90
9 Техническое обслуживание, текущий ремонт	94
10 Комплектность	95
11 Упаковка	96
12 Маркировка	97
13 Условия эксплуатации	104
14 Транспортирование	104
15 Хранение	104
16 Гарантийные обязательства	105
17 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	105
18 Контактная информация	105

1 Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия – Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии MEDEREN:

1. Набор для спинально – эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16P, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

2. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16PA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт

Игла инъекционная 25G×1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

3. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16PS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц лотери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

4. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16PSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт

Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

5. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16PH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

6. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16PNA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

7. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16PSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

8. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16PSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

9. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16Q, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт



Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

10. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16QA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

11. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16QS, в комплектации		
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт	
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27Gx5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт	
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт	
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт	
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт	
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт	
Фиксатор катетера	1 шт	
Адаптер	1 шт	
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт	
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт	
Игла инъекционная 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт	
Игла инъекционная 25Gx1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт	
Спонж с ручкой	3 шт	
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт	
Постельная нетканая 75x75 см	1 шт	
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт	
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт	
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт	
Салфетка нетканая	5 шт	
Инструкция по применению	1 шт	
Потребительская упаковка	1 шт	

12. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16QSA, в комплектации		
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт	
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт	
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт	
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт	
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт	
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт	
Фиксатор катетера	1 шт	
Адаптер	1 шт	
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт	
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт	
Игла инъекционная 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт	
Игла инъекционная 25Gx1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт	
Спонж с ручкой	3 шт	

Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

13. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16QH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 $\frac{1}{2}$ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

14. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16QHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт

Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

15. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16QSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

16. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P16QSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

17. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TP, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Поинт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт

Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

18. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TPA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

19. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TPS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный atraumatic, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт

Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

20. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TPSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Tump-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт

Потребительская упаковка

1 шт

21. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TPH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

22. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TPHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт

Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

23. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TPSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

24. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TPSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
--	------

Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

25. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TQ, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт

Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

26. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TQA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

27. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TQS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт

Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

28. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref

P18TQSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

29. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref
P18TQH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

30. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TQHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт

Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

31. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TQSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 ¹ / ₂ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

32. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TQSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт

Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

33. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref

P18TEPS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock и торцевым отверстием, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G×1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G×1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт

Потребительская упаковка

1 шт

34. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Ref P18TEPSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock и торцевым отверстием, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

35. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Mini Ref PM16TP, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт

Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

36. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Mini Ref PM16TPA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 16G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 $\frac{1}{2}$ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

37. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Mini Ref PM18TP, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 $\frac{1}{2}$ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт

Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

38. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Mini Ref PM18TPA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер)	1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер)	1 шт
Игла инъекционная 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Игла инъекционная 25Gx1 $\frac{1}{2}$ " (0,5 x 38 мм)	1 шт
Спонж с ручкой	3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см	1 шт
Простыня нетканая 75x75 см	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см	1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см	1 шт
Салфетка нетканая	5 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

39. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16P, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

40. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16PA, в комплектации	
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

41. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16PS, в комплектации	
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

42. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16PSA, в комплектации	
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт

Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

43. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16PH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

44. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16PHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

45. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16PSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм)	1 шт

мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

46. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16PSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

47. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16Q, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

48. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16QA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

49. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16QS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27Gx5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

50. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16QSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

Потребительская упаковка

1 шт

51. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16QH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

52. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16QHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

53. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16QSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт



Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

54. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 16QSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

55. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TP, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

56. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TPA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
--	------

Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

57. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TPS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

58. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TPSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

Потребительская упаковка

1 шт

59. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TPH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

60. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TPHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

61. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TPSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм)	1 шт

мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

62. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TPSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

63. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQ, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 ¹ / ₂ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 ¹ / ₂ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

64. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

65. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

66. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт

Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

67. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Tump-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

68. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Tump-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Люер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

69. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQSH, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

70. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TQSHA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

71. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TEPS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock и торцевым отверстием, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт

Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

72. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TEPSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock и торцевым отверстием, 18G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

74. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TEQS, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock и торцевым отверстием, 18G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

75. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Ref 18TEQSA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-	1 шт
--	------

Lock с торцевым отверстием, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Льер)	1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ	1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра	1 шт
Фиксатор катетера	1 шт
Адаптер	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

76. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Mini Ref M16P, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Льер)	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

77. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Mini Ref M16PA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Льер)	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 1/2 " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

78. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Mini Ref M18TP, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 1/2 " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Льер)	1 шт



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

79. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Mini Ref M18TPA, в комплектации

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3 $\frac{1}{2}$ " (1,34 x 90 мм)	1 шт
Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5 $\frac{1}{2}$ " (0,41 x 135 мм)	1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер)	1 шт
Аспирационная канюля с фильтром 18Gx1 $\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

2 Сведения о производителе медицинского изделия

Mederen Neotech Ltd. (Медерен Неотех Лимитед),
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal code: 6777016,
Corporation number: 515505329, www.mederen.ru, info@mederen.com
(Медерен Неотех Лтд.
ул. Харакевет, 58, Тель-Авив-Яффа, 6777016, Израиль,
Тел.: 515505329, e-mail: info@mederen.com, www.mederen.ru).

3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Используются для введения анестетика в эпидуральное и субарахноидальное пространство при проведении оперативных вмешательств, родовспоможении или с целью обезболивания при тяжелых хронических заболеваниях.


4 Условия применения

Изделие применяется в медицинских учреждениях.

5 Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий

5.1 Показания к применению:

- торакальная хирургия – оперативное вмешательство на грудной клетке и органах грудной полости;
- ортопедия – оперативное вмешательство на нижних конечностях, включая тазобедренные, коленные и тазовые области;

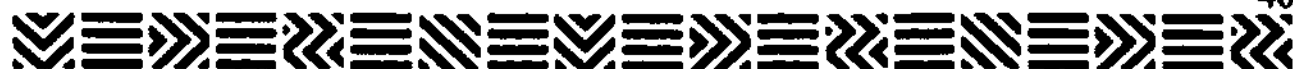

- сосудистая хирургия - оперативное вмешательство на нижних конечностях, ампутация;
- акушерство - кесарево сечение;
- гинекология – оперативное вмешательство в область органов малого таза;
- урология - операции на простате и мочевом пузыре;
- общая хирургия – оперативное вмешательство в брюшной полости, включая аппендэктомию, операции на кишечнике;
- геморроидальные операции;
- хроническая боль в спине, спинальная грыжа, дегенерация или спондилез;
- хроническое лечение грыжи диска, дегенерации и спондилеза;
- спинальный стеноз и артропатия фасет;
- диагностика заболеваний центральной нервной системы;
- обнаружение субарахноидального кровотечения;
- диагностика синдрома Гийена Барре.

5.2 Противопоказания к применению:

5.2.1 Абсолютные противопоказания:

- отказ больного;
- кожные заболевания спины с выраженными гнойничковыми нарывами и образованиями в месте пункции (укола);
- аллергическая реакция на местный анестетик;
- выраженная деформация позвоночного столба (например, болезнь Бехтерева);
- нарушение свертывающей функции крови (коагулопатии);
- клинически значимая гиповолемия (обезвоживание, потеря крови);
- нарушение проводимости сердца (АВ-блокады, синдром слабости синусового узла).

5.2.2 Относительные противопоказания:

- аномалии развития и лёгкая деформация позвоночника;
- психиатрические заболевания;
- низкий уровень интеллекта у больного;
- лечение дезагрегантами и антикоагулянтами – препараты «разжижающие кровь» (клопидогрел и его производные, варфарин и т.д.);
- перенесенные ранее операции на позвоночнике;
- наличие татуировки в месте пункции (укола).

5.3 Возможные побочные действия:

- боли в области манипуляции;

- артериальная гипотензия;
- жжение и зуд в ногах;
- постпункционная головная боль;
- послеоперационная тошнота и рвота;
- воспалительные осложнения в месте манипуляции, в том числе эпидуральный абсцесс;
- церебральная грыжа и кровотечение;
- риск позднего появления эпидермоидных опухолей текального мешка;
- эпидуральная опухоль текального мешка;
- аллергические реакции или побочные действия местных анестетиков;
- кожный зуд;
- транзиторные неврологические осложнения.

6 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия

Все наборы стерильные, одноразовые и предназначены для применения у одного пациента. Состав наборов представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав наборов

Вариант исполнения	ЭИ	ЭИТО	СПП	СК	КЗ	КМЗ	К6	КМ6	Ш	АШ	Ш2-5	ЭФ	ФК	ФФ	А	АК	ИИ G18-G25	ПС	ПЛ	ПН	ПФ 5×50	ПФ 10×20	СМ
Ref №																							
P16P	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16PA	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16PS	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16PSA	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16PH	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16PHA	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16PSH	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16PSHA	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16Q	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16QA	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16QS	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16QSA	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16QH	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16QHA	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16QSH	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P16QSHA	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TP	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TPA	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TPS	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TPSA	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TPH	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Вариант исполнения	ЭИ	ЭИТО	СПП	СК	КЗ	КМЗ	К6	КМ6	Ш	АШ	Ш2-5	ЭФ	ФК	ФФ	А	АК	ИИ G18-G25	ПС	ПЛ	ПН	ПФ 5×50	ПФ 10×20	СМ
Ref №																							
P18TPHA	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TPSH	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TPSHA	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQ	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQA	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQS	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQSA	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQH	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQHA	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQSH	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TQSHA	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TEPS	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P18TEPSA	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PM16TP	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
PM16TPA	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
PM18TP	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
PM18TPA	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
16P	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16PA	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16PS	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16PSA	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16PH	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16PHA	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Вариант исполнения	ЭИ	ЭИТО	СПП	СК	КЗ	КМЗ	К6	КМ6	Ш	АШ	Ш2-5	ЭФ	ФК	ФФ	А	АК	ИИ G18-G25	ПС	ПЛ	ПН	ПФ 5×50	ПФ 10×20	СМ
Ref №																							
16PSH	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16PSHA	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16Q	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16QA	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16QS	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16QSA	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16QH	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16QHA	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16QSH	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
16QSHA	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TP	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TPA	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TPS	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TPSA	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TPH	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TPHA	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TPSH	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TPSHA	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TQ	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TQA	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TQS	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TQSA	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TQH	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Вариант исполнения	ЭИ	ЭИТО	СПП	СК	КЗ	КМЗ	К6	КМ6	Ш	АШ	Ш2-5	ЭФ	ФК	ФФ	А	АК	ИИ G18-G25	ПС	ПЛ	ПН	ПФ 5×50	ПФ 10×20	СМ
Ref №																							
18TQHA	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TQSH	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TQSHA	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TEPS	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TEPSA	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TEQS	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
18TEQSA	-	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
M16P	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
M16PA	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
M18BP	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
M18BPA	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
M18TP	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
M18TPA	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

«+» - входит в состав Набора;

«-» - не входит в состав Набора;

ЭИ - Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи);

ЭИТО –Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с торцевым отверстием;

СПП - Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт);

СК - Игла для спинальной анестезии, Quincke (Квинке);

АК - Аспирационная канюля с фильтром;

КЗ - Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями;

КМЗ - Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями;

Вариант исполнения	ЭИ	ЭИТО	СПП	СК	КЗ	КМЗ	К6	КМ6	Ш	АШ	Ш2-5	ЭФ	ФК	ФФ	А	АК	ИИ G18-G25	ПС	ПЛ	ПН	ПФ 5×50	ПФ 10×20	СМ
Ref №																							
К6 – Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями; КМ6 - Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями; Ш - Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер); ЭФ - Эпидуральный фильтр 0,2 м; ФК - Фиксатор катетера; ФФ - Фиксатор эпидурального фильтра; А – Адаптер с крыльями 33 мм длиной АШ - Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер); Ш2-5 – Шприц 3 мл, Luer (Луер) и Шприц 5 мл, Luer (Луер) ИИ G18- G25 – Игла инъекционная 18G x 1¹/₂ " (1,25 x 38 мм) и Игла инъекционная 25G x 1¹/₂ " (0,5 x 38 мм) ПС – Спонж с ручкой; ПЛ - Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см; ПН - Простыня нетканая 75x75 см; ПФ 5×50 - Пластырь фиксирующий 5x50 см; ПФ 10×20 - Пластырь фиксирующий 10x20 см; СМ - Салфетка нетканая																							

Техническое описание

Игла для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) (далее – игла Туохи), предназначена для проведения спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии. Специальный изогнутый кончик острия обеспечивает точное и атравматичное позиционирование иглы и катетера в эпидуральном пространстве. Павильон имеет стандартный разъем Луер.

Внутри трубки иглы расположен пластиковый стилет, предотвращающий попадание тканей в иглу при проведении пункции. Пластиковый стилет имеет специальное цветовое кодирование, обозначающее размер иглы (наружный диаметр). На трубку иглы нанесена маркировка с шагом 1 см, которая позволяет точно определить глубину ее установки (прокола). Трубка иглы имеет нормальную толщину стенки.

На трубку иглы надевается предохранительный колпачок, изготовленный из бесцветного материала.

Схематическое изображение изделия с указанием составных частей представлен на рисунке 5.

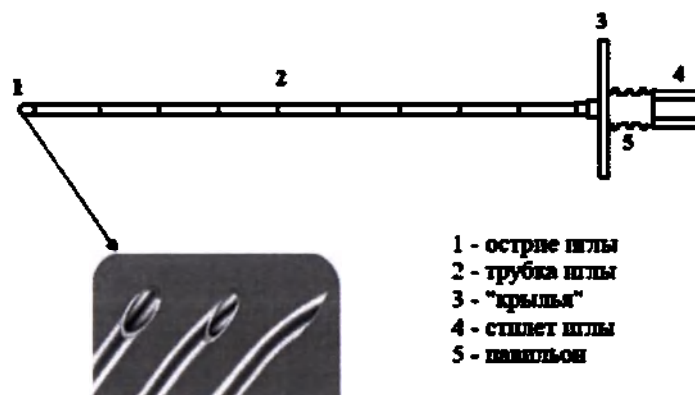


Рисунок 5 – Схематическое изображение изделия с указанием составных частей иглы для эпидуральной анестезии.

Игла Туохи размером 16G x 3¹/₂ " (1,65 x 90 мм) имеет специальные несъемные «крылья» - упоры, предназначенные для захвата и удержания иглы во время ее установки и удаления. Павильон иглы и стилет иглы изготовлен из прозрачного пластика.



Рисунок 6 –Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3¹/₂" (1,65 x 90 мм)

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock (с поворотным замком) (далее игла Туохи, Turn-Lock) имеет павильон, на который нанесена шкала деления с шагом 0,5 мм, предназначенная для определения глубины введения спинальной иглы в спинальное (субарахноидальное) пространство. При проведении комбинированной анестезии, в иглу для эпидуральной анестезии вставляется **игла Пенсил Пойнт, Steps** или **игла Квинке, Steps** при этом поворотный механизм спинальной иглы надевается на павильон эпидуральной иглы. Поворот блокировочного механизма спинальной иглы в направлении стрелки – выступа, фиксирует спинальную иглу на выбранной глубине и предотвращает ее продольное смещение во время присоединения шприца с раствором анестетика.

После фиксации, спинальная игла сохраняет возможность вращения, что позволяет регулировать направление введения анестетика.

Схематическое изображение изделия с указанием составных частей представлен на рисунке 7.

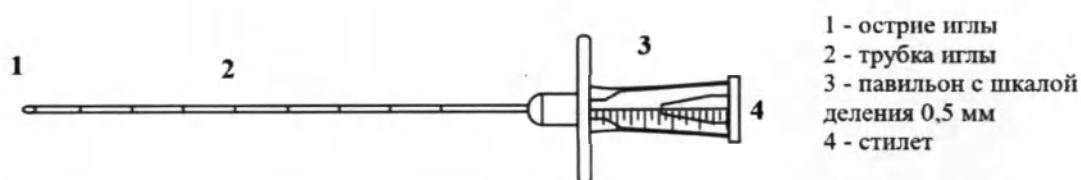


Рисунок 7 – Схематическое изображение с указанием составных частей иглы Туохи, Turn-Lock.

Игла Туохи, Turn-Lock имеет специальные съемные «крылья» - упоры, имеют углубления для кончиков пальцев, предназначенные для захвата и удержания иглы во время ее установки и удаления.

Пример внешнего вида иглы для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3½ " (1,34 x 90 мм) представлен на рисунке 8.

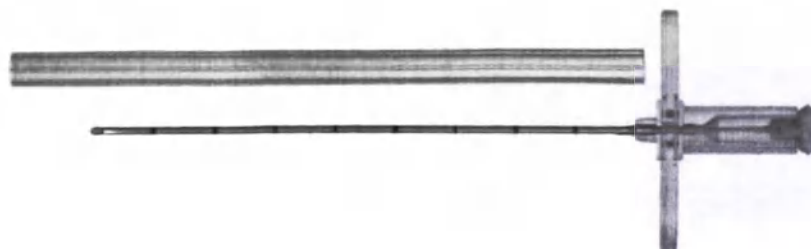


Рисунок 8 –Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock, 18G x 3½ " (1,34 x 90 мм).

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с торцевым отверстием предназначена для проведения спинально-эпидуральной анестезии. Торцевое отверстие в

эпидуральной игле определяет оптимальное положение спинальной иглы в спинальном пространстве.

После пункции эпидурального пространства эпидуральной иглой с торцевым отверстием вводится спинальная игла и пунктируется спинальное (субарахноидальное) пространство, в которое инъецируется раствор местного анестетика. Затем спинальная игла удаляется и в эпидуральном пространстве устанавливается катетер.

Пример внешнего вида иглы для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock и торцевым отверстием, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) представлен на рисунке 12.

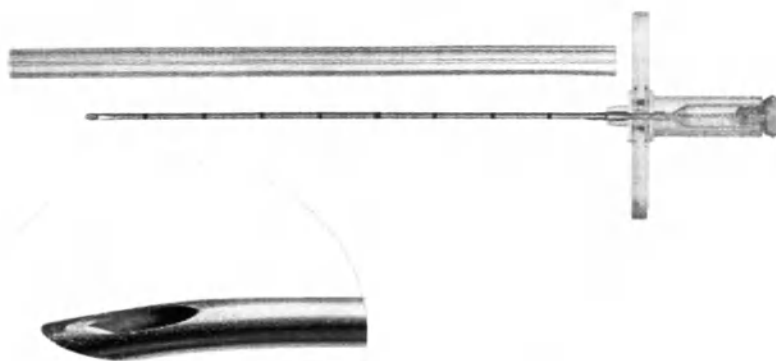


Рисунок 12 – Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock и торцевым отверстием, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм).

Игла для спинальной анестезии Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps / Игла для спинальной анестезии Quincke (Квинке), Safe-Step (далее игла Пенсил Пойнт, Safe-Steps/игла Квинке, Safe-Steps) предназначены для пункции субарахноидального пространства и введения лекарственных препаратов при проведении спинальной анестезии. Павильон игл имеет стандартный разъем Луер. Внутри трубки иглы расположен стальной стилет с пластиковым основанием, предназначенный для предотвращения попадания тканей в иглу при проведении пункции. Пластиковое основание стилета и место соединения иглы имеют специальную цветовую кодировку, обозначающую размер иглы. Размер иглы для спинальной анестезии Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps/Quincke (Квинке), Steps обозначается только цветовой кодировкой стилета, место соединения трубки иглы с павильоном не окрашено.

Цветовая кодировка стилета и/или места соединения трубки иглы с павильоном, в зависимости от размера иглы представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Цветовая кодировка размеров

Тип иглы	Диаметр трубки иглы, мм	Цвет	Сведения о красителе
Игла Туохи	1,65 мм	Прозрачный	-

Игла Туохи, Turn-Lock	1,34 мм	Розовый	марка: Pink 122, производитель: ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
Иглы Пенсил Пойнт, Safe-Steps/Игла Квинке, Safe-Steps	0,41 мм	Серый	марка: Grey 32, производитель: ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
Игла Пенсил Поинт, Steps/Игла Квинке, Steps	0,41 мм	Серый	марка: Grey 35, производитель: ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
Игла инъекционная	1,25 мм	Розовый	марка: Pink 122, производитель: ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	0,5 мм	Оранжевый	марка: Orange 68, производитель: ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
Аспирационная канюля с фильтром	1,25 мм	Розовый	марка: Pink 122, производитель: ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция

На трубку иглы одевается предохранительный колпачок, изготовленный из бесцветного материала. Трубка иглы имеет нормальную толщину стенки.

Игла для спинальной анестезии с типом острия Pencil Point (Пенсил Пойнт) имеет коническую форму острия. Боковое отверстие на кончике иглы обеспечивает направленное введение анестезирующего раствора.

Игла для спинальной анестезии с типом острия Quincke (Квинке) имеет двойную заточку с коротким вторичным срезом.

Схематическое изображение внешнего вида острия игл в зависимости от его типа представлен на рисунке 1.



1а



1б

Рисунок 1 – Внешний вид острия игл в зависимости от типа

1а – тип острия Quincke (Квинке)

1б – тип острия Pencil Point (Пенсил Пойнт)

Схематическое изображение иглы для спинальной анестезии представлен на рисунке 2.

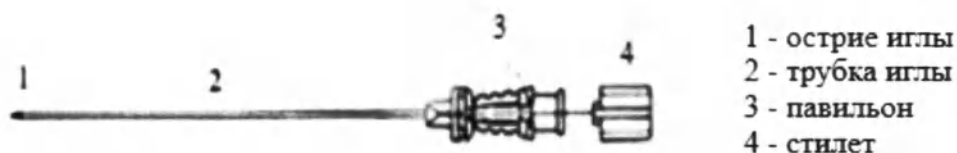


Рисунок 2 – Пример внешнего вида иглы для спинальной анестезии.

Игла для спинальной анестезии Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps / Игла для спинальной анестезии Quincke (Квинке), Safe-Steps (далее игла Пенсил Пойнт, Safe-Steps/ игла Квинке, Safe-Steps) имеет вокруг основания трубки иглы уплотнение из термопластичного эластомера длиной $36,0 \pm 3$ мм. Уплотнение вокруг трубки иглы необходимо для фиксации спинальной иглы в игле для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с системой фиксации Block-Lock.

Пример внешнего вида иглы для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5½" (0,41 x 135 мм) представлен на рисунке 3.

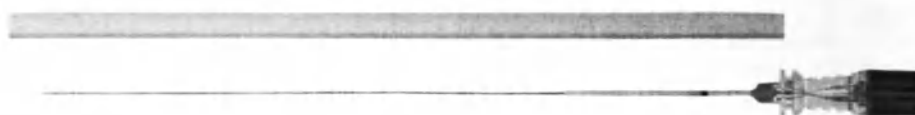


Рисунок 3 – Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Safe-Steps, 27G x 5½" (0,41 x 135 мм).

Игла для спинальной анестезии Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps/Игла для спинальной анестезии Quincke (Квинке), Steps (далее – игла Пенсил Пойнт, Steps/игла Квинке, Steps) имеет специальный павильон с цилиндром, имеющий поворотный блокирующий механизм. В верхней части цилиндра имеется выступ в виде стрелки, показывающий направление вращения для фиксации иглы (по часовой стрелке). Для разблокировки иглы необходимо повернуть цилиндр в направлении, обратном указанию стрелки (против часовой стрелки). Внутренняя полость цилиндра с блокирующим механизмом имеет размеры, соответствующие внешнему диаметру павильона иглы для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с системой фиксации Turn-Lock.

Пример внешнего вида иглы для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5½" (0,41 x 135 мм)/ Игла для спинальной анестезии Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5½" (0,41 x 135 мм) представлен на рисунке 4.



Рисунок 4 –Игла для спинальной анестезии, Pencil Point (Пенсил Пойнт), Steps, 27G x 5½" (0,41 x 135 мм)/ Игла для спинальной анестезии Quincke (Квинке), Steps, 27G x 5½" (0,41 x 135 мм)

Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) разработан специально для облегчения идентификации эпидурального пространства. Цилиндр шприца имеет наконечник типа Луер для соединения с эпидуральной иглой. На цилиндр нанесена шкала объема в мл.

Схематическое изображение изделия с указанием составных частей представлен на рисунке 13.



Рисунок 13 – Схематическое изображение с указанием составных частей шприца потери сопротивления.

Шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер). Предназначен для облегчения идентификации эпидурального пространства. Изделие имеет ограничитель «заднего» хода плунжера и стандартный наконечник Луер. Шприц потери сопротивления, автоматический имеет пружину, которая опускается при попадании наконечника иглы в эпидуральное пространство. Пружина не срабатывает при прохождении наконечника иглы

сквозь ткани, так как создаваемое в шприце давление слишком низкое для того, чтобы выдавить содержащийся в шприце воздух или физиологический раствор в связки. При наборе жидкости или воздуха, поршень выдвигается на необходимое расстояние, соответствующее одному из выемок выступа поршня и поворачивается на 90 градусов по или против часовой стрелки для фиксации поршня и предотвращения срабатывания пружины.

Схематическое изображение внешнего вида изделия с указанием составных частей представлен на рисунке 14.

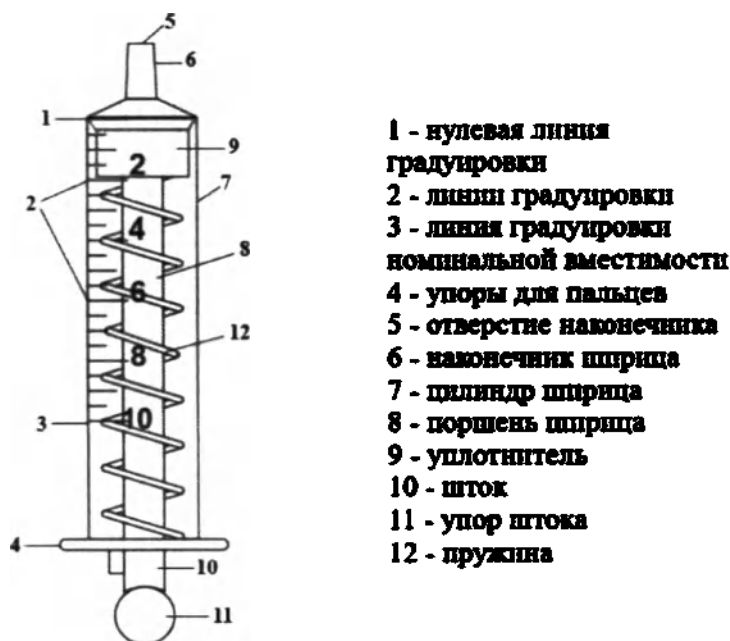


Рисунок 14 – Схематическое изображение с указанием составных частей шприца потери сопротивления, автоматического.

Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями, Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями, Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями, Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями (далее – катетеры эпидуральные) входящие в состав наборов соответствуют следующим требованиям:

- Изделие снабжено по всей длине рентгеноконтрастной линией для проверки установки катетера. Рентгеноконтрастная линия представляет собой композиционный материал, состоящий из связующего полимера (полиамид) и наполнителя (бария сульфат), который хорошо поглощает рентгеновское излучение. Бария сульфат, используемый при производстве катетеров, химически инертен и не является лекарственным

средством. Для лучшей визуализации рентгеноконтрастной линии используется зеленый краситель.

- На изделие нанесена несмываемая рентгеноконтрастная маркировка, нанесенная от 0 до $210 \pm 2,0$ мм. Расстояние от дистального конца (первой метки) до второй метки $50 \pm 5,0$ мм, далее метки расположены на расстоянии 10 мм друг от друга на протяжении 160 ± 15 мм;
- Дистальный конец катетера закруглен и закрыт;
- Проводник катетера соединяется с павильоном иглы и способствует введению катетера;
- Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - имеет три латеральных отверстия диаметром $0,05 \pm 0,01$ мм, на расстоянии $5,0 \pm 10\%$ мм, $9,0 \pm 10\%$ мм и $13,0 \pm 10\%$ мм от дистального конца;

Схематическое изображение представлен на рисунке 15.

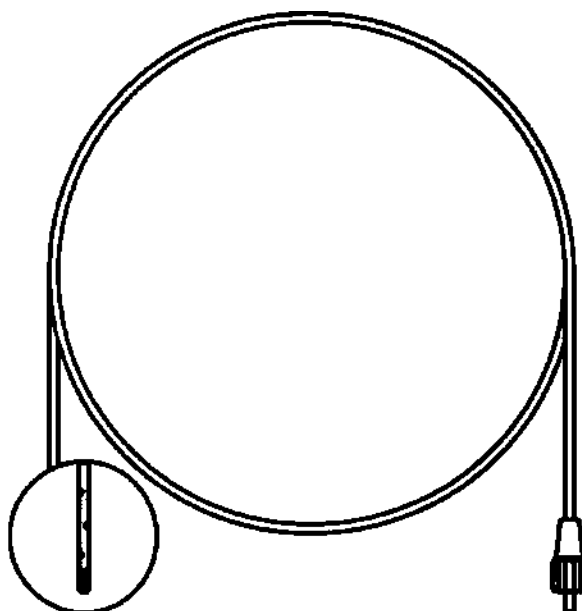


Рисунок 15 – Схематическое изображение катетера эпидурального, с тремя латеральными отверстиями.

- Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями – имеет три латеральных отверстия диаметром $0,05 \pm 0,01$ мм, на расстоянии $8,0 \pm 10\%$ мм, $12,0 \pm 10\%$ мм и $16,0 \pm 10\%$ мм от дистального конца;

Схематическое изображение внешнего вида представлен на рисунке 16.

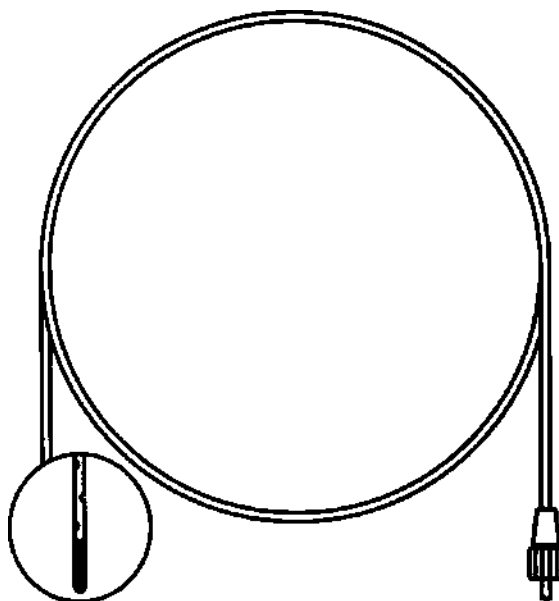


Рисунок 16 – Схематическое изображение катетера эпидурального атравматичного, с мягким кончиком Soft Tip, с тремя латеральными отверстиями.

- Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями, имеет шесть латеральных отверстий диаметром $0,05 \pm 0,01$ мм, на расстоянии $05,0 \pm 10\%$ мм, $6,0 \pm 10\%$ мм, $9,0 \pm 10\%$ мм, $10,0 \pm 10\%$ мм, $13,0 \pm 10\%$ мм и $14,0 \pm 10\%$ мм от дистального конца;

Схематическое изображение внешнего вида представлен на рисунке 17.

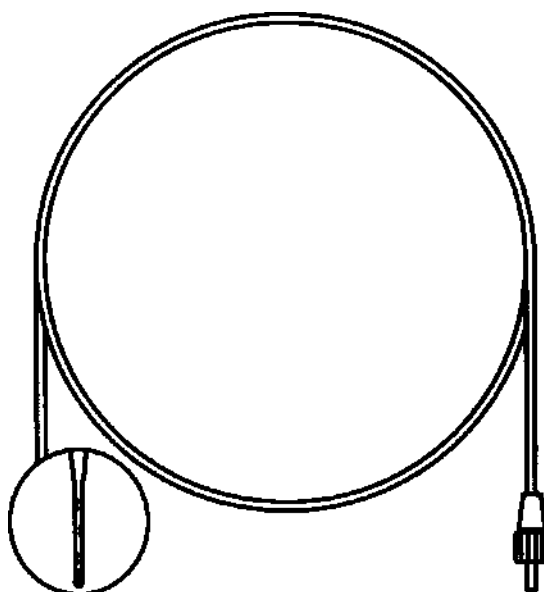


Рисунок 17 – Схематическое изображение катетера эпидурального атравматичного, латерально суженного, с шестью латеральными отверстиями.

- Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями – имеет шесть

боковых отверстий диаметром $0,05 \pm 0,01$ мм, на расстоянии $6,0 \pm 10\%$ мм, $7,0 \pm 10\%$ мм, $10,0 \pm 10\%$ мм, $11,0 \pm 10\%$ мм, $14,0 \pm 10\%$ мм, $15,0 \pm 10\%$ мм от дистального конца;
 Схематическое изображение внешнего вида представлен на рисунке 18.

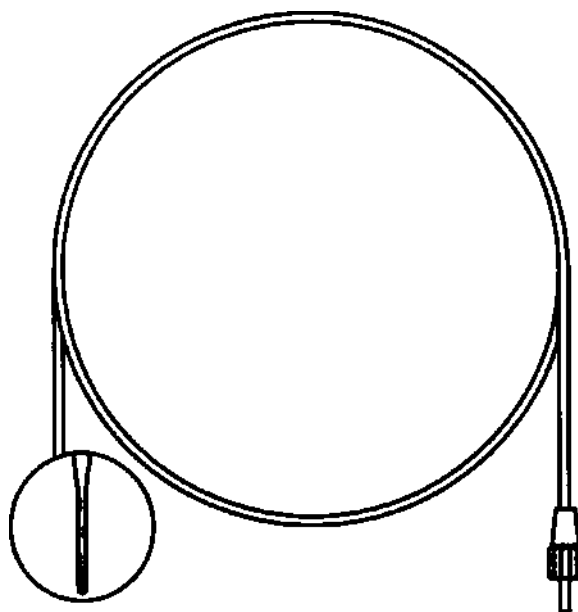


Рисунок 18 – Схематическое изображение катетера эпидурального атравматичного, с мягким кончиком Soft Tip, латерально суженного, с шестью латеральными отверстиями.

- Катетеры эпидуральные имеют рентгеноконтрастную линию по всей длине катетера;
- Минимальная сила разрыва катетеров эпидуральных не менее 19,98 Н;
- Жесткость катетера эпидурального по Шору не более 60А.
- Катетеры эпидуральные имеют идентификационную наклейку размером (длина x ширина) 100,0 x 30,0 мм, которая крепится после установки катетера. На наклейке делаются пометки о времени и дате установки катетера.

Адаптер Туохи-Борст применяется для присоединения катетера к эпидуральному фильтру. Колпачок с резьбой навинчивается на один конец адаптера, в результате чего резиновый уплотнитель обжимает область вокруг катетера и удерживает его на месте, не позволяя ему двигаться. Противоположный конец адаптера имеет разъем Луер-Лок для соединения с эпидуральным фильтром.

Схематическое изображение с указанием составных частей представлен на рисунке 19.

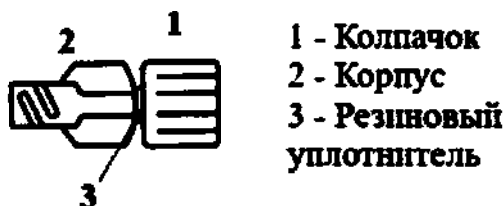


Рисунок 19 – Схематическое изображение с указанием составных частей адаптера Туохи-Борст.

Эпидуральный фильтр предназначен для фильтрации жидкости, которая вводится в эпидуральное пространство и предотвращает попадание мелких частиц (например, микроскопических осколков стекла) во внутреннюю полость человека. Входной конец фильтра имеет разъем Луер для присоединения шприца. Выходной конец фильтра имеет разъем Луер-Лок для присоединения к адаптеру.

Схематическое изображение с указанием составных частей представлен на рисунке 20.

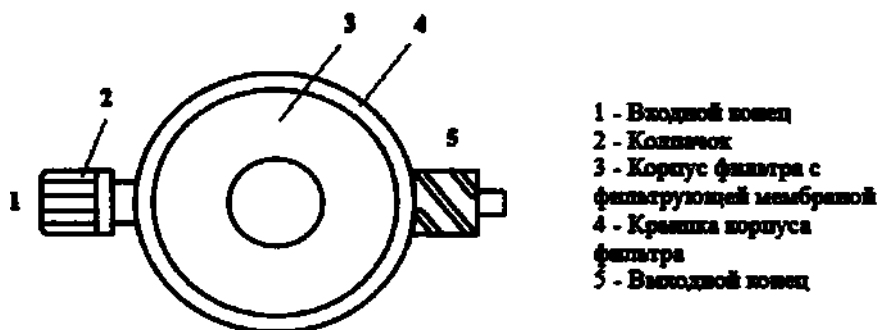


Рисунок 20 – Схематическое изображение с составными частями эпидурального фильтра.

Фиксатор катетера предназначен для закрепления катетера на клеящейся пластине с помощью замка – защелки, предупреждая непреднамеренное смещение и образование перегибов в месте выхода катетера. Используется при длительной катетеризации. Максимальное время фиксации на теле пациента до 30 дней.

Фиксатор эпидурального фильтра состоит из клеящейся пластины и пластикового стержня. Закрепление фильтра происходит при помощи вставки пластикового стержня в отверстие крышки фильтра до характерного щелчка. Используется при длительной катетеризации. Максимальное время фиксации на теле пациента до 30 дней.

Шприц 5 мл, Luer (Луер)/Шприц 3 мл, Luer (Луер) однократного применения, предназначен для введения местного анестетика. Открытый конец цилиндра имеет упоры для пальцев (габаритные размеры $27 \pm 2 \times 18 \pm 2$ мм), обеспечивающие шприцу устойчивость и удерживающие его от скатывания при размещении его шкалой вверх на плоской поверхности.

Аспирационная канюля с фильтром используется для забора жидкого лекарственного средства из многодозных полимерных и стеклянных контейнеров, что обеспечивает сохранение стерильности лекарственного средства.

Простыня нетканая предназначена для одноразового применения, в качестве подстилочного материала для изделий перед началом процедуры.

Пленка, фиксирующаяся с окном для процедурного поля предназначена для изоляции места процедуры. С помощью клейкого слоя, пленка прикрепляется к нижней части спины человека, оставляя область вокруг места проведения процедуры открытой.




Спонж предназначен для обработки места процедуры антисептическими растворами.

Пластырь фиксирующий, размеры 10x20 см и 5x50 см предназначены для фиксации катетера эпидурального на спине пациента при проведении длительной катетеризации.


Технические параметры и характеристики составных частей наборов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические параметры и характеристики составных частей.


Наименование составной части	Технические параметры и характеристики
1 Игла Туохи 16G 	Размер 16G x 3 ¹ / ₂ " (1,65 x 90 мм): - внутренний диаметр трубки иглы 1,100±0,29 мм; - наружный диаметр трубки иглы от 1,600 мм до 1,690 мм; - длина трубки иглы 90 ^{+2,5} / _{-2,5} мм; - масса, не более 3,5 г; - угол скоса острия 9°±1°; - толщина стенки трубки иглы 0,345±0,05 мм - длина предохранительного колпачка 100±3 мм; - диаметр предохранительного колпачка 6,0±0,5 мм - габаритные размеры павильона (длина x ширина x высота) 20,0 x 38,0 x 10,3 с допустимым отклонением 10%; - длина пластикового стилета, не более 115 мм; - габаритные размеры основания пластикового стилета (длина x ширина) 9,0 x 9,0 мм с допустимым отклонением 10%; - диаметр пластикового стилета 1,05±0,01 мм.
2 Игла Туохи, Turn-Lock 	Размер 18G x 3 ¹ / ₂ " (1,34 x 90 мм): - внутренний диаметр трубки иглы 0,790±0,25 мм; - наружный диаметр трубки иглы от 1,200 мм до 1,300 мм; - длина трубки иглы 90 ^{+2,5} / _{-2,5} мм; - масса, не более 3,5 г; - угол скоса острия 9°±1°; - толщина стенки трубки иглы 0,24±0,05 мм; - длина предохранительного колпачка 105,0±3мм; - диаметр предохранительного колпачка 6,0±0,5мм; - габаритные размеры павильона с системой фиксации Turn-Lock (длина x ширина x высота) 25,0 x 41,0 x 16,0 мм с допустимым отклонением 10%. - диаметр основания пластикового стилета,

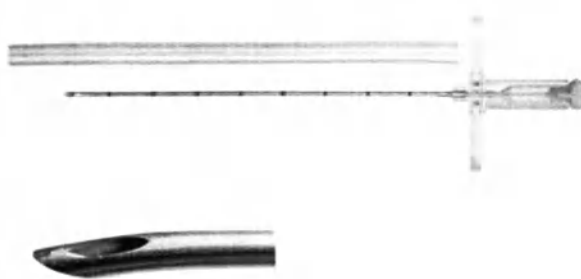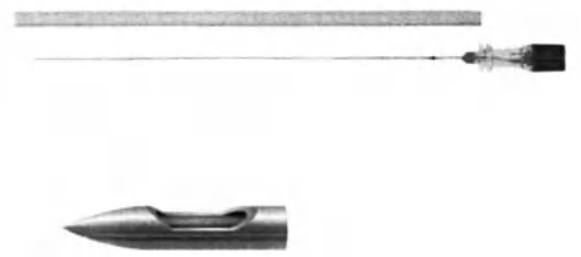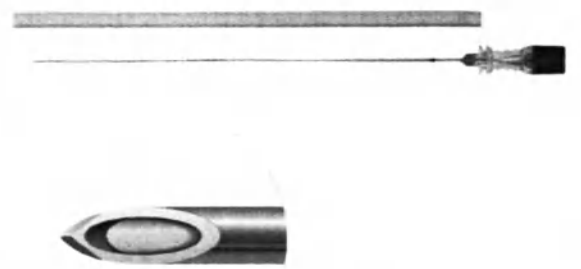	9,8±1,0мм; - длина пластикового стилета, не более 115 мм; - диаметр пластикового стилета 0,91±0,03 мм
3 Игла Туохи, Turn-Lock и торцевым отверстием 	Размер 18G x 3 1/2" (1,34 x 90 мм): - внутренний диаметр трубки иглы 0,790±0,25 мм; - наружный диаметр трубки иглы от 1,200 мм до 1,300 мм; - длина трубки иглы 90^{+2,5}_{-2,5} мм; - масса, не более 3,5 г; - угол скоса острия 10°±1°; - толщина стенки трубки иглы 0,24±0,05 мм; - диаметр торцевого отверстия 0,67±0,1 мм; - длина предохранительного колпачка 100±3мм; - диаметр предохранительного колпачка 6,0±0,5мм; - габаритные размеры павильона с системой фиксации Turn-Lock (длина x ширина x высота) 25,0 x 41,0 x 16,0 мм с допустимым отклонением 10%. - диаметр основания пластикового стилета, 9,8±1,0мм; - длина пластикового стилета, не более 115,0 мм; - диаметр пластикового стилета 0,91±0,01 мм.
4 Игла Пенсил Пойнт, Safe-Steps 	Размер 27G x 5 1/2" (0,41 x 135 мм) - внутренний диаметр трубки иглы 0,184±0,06 мм; - наружный диаметр трубки иглы от 0,400 мм до 0,420 мм; - длина трубки иглы 135^{+2,5}_{-2,5} мм; - масса, не более 3,13 г; - угол скоса острия 17°±1°; - толщина стенки трубки иглы 0,089±0,01 мм; - расстояние от острия иглы до бокового отверстия 0,92±0,01 мм; - длина бокового отверстия 0,72±0,01мм; - ширина бокового отверстия 0,18±0,01 мм; - длина предохранительного колпачка 139±2,0мм; - диаметр предохранительного колпачка 7,0±0,5 мм; - габаритные размеры павильона (длина x ширина x высота) 27,0 x 10,0 x 10,0 мм с допустимым отклонением 10%; - длина металлической части стилета, не более 155 мм; - габаритные размеры пластикового основания стилета (д x ш x в) 12,0 x 10,0 x 10,0 мм с допустимым отклонением 10%. - диаметр стального стилета 0,24±0,01
5 Игла Квинке, Safe-Steps 	Размер 27G x 5 1/2" (0,41 x 135 мм) - внутренний диаметр трубки иглы 0,184±0,06 мм; - наружный диаметр трубки иглы от 0,400 мм до 0,420 мм; - длина трубки иглы 135^{+2,5}_{-2,5} мм; - масса, не более 3,13 г; - угол скоса острия 17°±1°; - толщина стенки трубки иглы 0,089±0,01 мм; - длина предохранительного колпачка 139±2,0мм; - диаметр предохранительного колпачка 7,0±0,5 мм; - габаритные размеры павильона (длина x ширина x


	высота) 27,0 x 10,0 x 10,0 мм с допустимым отклонением 10%; - длина металлической части стилета, не более 155 мм; - габаритные размеры пластикового основания стилета (д x ш x в) 12,0 x 10,0 x 10,0 мм с допустимым отклонением 10%. - диаметр стального стилета 0,24±0,01
6 Игла Пенсил Пойнт, Steps 	Размер 27G x 5¹/₂ " (0,41 x 135 мм) - внутренний диаметр трубки иглы 0,184±0,06 мм; - наружный диаметр трубки иглы от 0,400 мм до 0,420 мм; - длина трубки иглы 135^{+2,5}/_{-2,5} мм; - масса, не более 3,13 г; - угол скоса острия 17°±1°; - толщина стенки трубки иглы 0,089±0,01 мм; - расстояние от острия иглы до бокового отверстия 0,92±0,01 мм; - длина бокового отверстия 0,72±0,01 мм; - ширина бокового отверстия 0,18±0,01 мм; - длина предохранительного колпачка 139±2,0 мм; - диаметр предохранительного колпачка 7,0±0,5 мм; - габаритные размеры павильона с системой фиксации Turn-Lock (длина x ширина x высота) 46,4 x 11,7 x 10,5 с допустимым отклонением 10%; - длина металлической части стилета, не более 155 мм; - габаритные размеры пластикового основания стилета (д x ш x в) 12,0 x 10,0 x 10,0 мм с допустимым отклонением 10%. - диаметр стального стилета 0,24±0,01
7 Игла Квинке, Steps 	Размер 27G x 5¹/₂ " (0,41 x 135 мм) - внутренний диаметр трубки иглы 0,184±0,06 мм; - наружный диаметр трубки иглы от 0,400 мм до 0,420 мм; - длина трубки иглы 135^{+2,5}/_{-2,5} мм; - масса, не более 3,13 г; - угол скоса острия 17°±1°; - толщина стенки трубки иглы 0,089±0,01 мм; - длина предохранительного колпачка 139±2,0 мм; - диаметр предохранительного колпачка 7,0±0,5 мм; - габаритные размеры павильона с системой фиксации Turn-Lock (длина x ширина x высота) 46,4 x 11,7 x 10,5 с допустимым отклонением 10%; - длина металлической части стилета, не более 155 мм; - габаритные размеры пластикового основания стилета (д x ш x в) 12,0 x 10,0 x 10,0 мм с допустимым отклонением 10%. - диаметр стального стилета 0,24±0,01

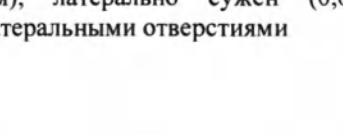8 Аспирационная канюля с фильтром 	Размер 18G x 1¹/₂ " (1,25 x 38 мм) - внутренний диаметр трубки иглы 0,83±0,02 мм; - наружный диаметр трубки иглы 1,28±0,05 мм; - длина трубки иглы 35,0±0,2 мм; - масса, не более 0,94 г; - толщина стенки трубки иглы 0,225±0,02 мм; - угол скоса острия 45°±5°; - размер пор фильтра 0,5±0,01 мкм; - габаритные размеры павильона (длина x ширина x высота) 18,0 x 7,0 x 9,0 с допустимым отклонением 10%; - длина защитного колпачка 54,0±0,1 мм; - диаметр защитного колпачка 6,0±0,1 мм.
9 Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 	- наружный диаметр 0,88±0,02 мм; - внутренний диаметр 0,45±0,02 мм; - длина катетера 1000±5% мм; - масса 1,2 г; - длина рентгеноконтрастной линии 1000±5% мм; - ширина рентгеноконтрастной линии 0,1 мм
10 Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 	- наружный диаметр 0,88±0,02 мм; - внутренний диаметр 0,45±0,02 мм; - длина катетера 1000±5% мм; - масса 1,2 г; - длина рентгеноконтрастной линии 1000±5% мм; - ширина рентгеноконтрастной линии 0,1 мм
11 Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 	- наружный диаметр 0,88±0,02 мм; - внутренний диаметр 0,45±0,02 мм; - диаметр дистального конца 0,6±0,05 мм; - длина катетера 1000±5% мм; - масса 1,2 г; - длина рентгеноконтрастной линии 1000±5% мм; - ширина рентгеноконтрастной линии 0,1 мм.

	
12 Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями. 	- наружный диаметр $0,88 \pm 0,02$ мм; - внутренний диаметр $0,45 \pm 0,02$ мм; - диаметр дистального конца $0,6 \pm 0,05$ мм; - длина $1000 \pm 5\%$ мм; - масса 1,2 г; - длина рентгеноконтрастной линии $1000 \pm 5\%$ мм; - ширина рентгеноконтрастной линии 0,1 мм
13 Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) 	- длина цилиндра $113,64 \pm 9,0$ мм; - диаметр цилиндра $16,0 \pm 1,5$ мм; - наружный диаметр отверстия наконечника $4,13 \pm 0,1$ мм; - масса, не более 16,05 г; - наконечник шприца расположен центрально; - номинальная вместимость не более 10,4 мл
14 Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 	- длина цилиндра $113,64 \pm 9,0$ мм; - диаметр цилиндра $16,0 \pm 1,5$ мм; - наружный диаметр отверстия наконечника $4,13 \pm 0,1$ мм; - масса, не более 16,05 г; - длина пружины $140,0 \pm 7,0$ мм; - наконечник шприца расположен центрально; - номинальная вместимость не более 10,4 мл
15 Эпидуральный фильтр 0,2 м 	- диаметр фильтра $33,0 \pm 0,2$ мм; - расстояние от входного конца до выходного конца $52,0 \text{ мм} \pm 2,0 \text{ мм}$; - толщина $10,8 \pm 1,0$ мм; - размер пор фильтрующей мембраны $0,2 \pm 0,01$ мкм; - скорость потока анальгезирующего раствора не менее 2 мл/мин, при давлении 700 кПа; - масса, не более 8 г; - фильтр устойчив к давлению 7 Бар; - диаметр колпачка на корпусе фильтра $33,0 \pm 0,5$ мм; - диаметр отверстия в крышке корпуса $2,5 \pm 0,5$ мм.

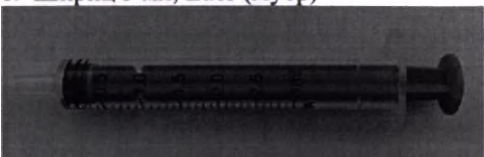16 Фиксатор катетера 	- диаметр $54,0 \pm 0,2$ мм; - диаметр замка – защелки $27,0 \pm 2,0$ мм; - высота замка – защелки $3,0 \pm 0,2$ мм; - масса, не более 2,0 г
17 Фиксатор эпидурального фильтра 	- диаметр $54,0 \pm 0,2$ мм; - высота пластикового стержня $2,4 \pm 0,1$ мм; - диаметр пластикового стержня $2,33 \pm 0,2$ мм; - масса, не более 1,0 г
18 Адаптер с крыльями 33 мм длиной 	- диаметр катетерной части $7,10 \pm 0,2$ мм; - длина катетерной части $16,5 \pm 0,2$ мм; - диаметр ребристой втулки $4,39 \pm 0,3$ мм; - длина адаптера в сборе 33,0 мм; - ширина адаптера 16,0 мм; - масса, не более 2,0 г.
19 Шприц 3 мл, Luer (Луер) 	- длина цилиндра шприца $71,0 \pm 0,5$ мм; - диаметр цилиндра $8,90 \pm 0,5$ мм; - масса $3,60 \pm 1,0$ г; - тип наконечника Luer (Луер); - наконечник шприца расположен центрально; - номинальная вместимость не более 3,15 мл; - наружный диаметр отверстия наконечника $4,01 \pm 0,5$ мм; - внутренний диаметр отверстия наконечника $2,12 \pm 0,5$ мм; - общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, не менее 47 мм; - деление шкалы 0,1 мл (допустимое отклонение $\pm 4\%$); - максимальное усилие, требуемое для приведения шток-поршня в действие, не более 30Н - максимальное «мертвое» пространство шприца 0,075 мл; - длина выступающего штока, не менее 12,5 мм; - боковое усилие при поршневом уплотнении $2,0 \pm 5\%$ Н

20 Шприц 5 мл, Luer (Луер)

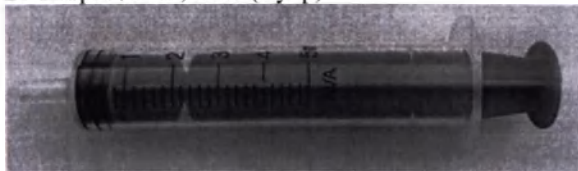



- длина цилиндра шприца $71,0 \pm 0,5$ мм;
- наружный диаметр цилиндра $14,54 \pm 0,5$ мм;
- внутренний диаметр цилиндра $12,50 \pm 0,5$ мм;
- масса $5,3 \pm 1,0$ г;
- тип наконечника Luer (Луер);
- наконечник шприца расположен центрально;
- номинальная вместимость, не более 5,2 мл;
- наружный диаметр отверстия наконечника $4,01 \pm 0,5$ мм;
- внутренний диаметр отверстия наконечника $2,12 \pm 0,5$ мм;
- общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, не менее 40 мм;
- деление шкалы 0,2 мл (допустимое отклонение $\pm 4\%$);
- максимальное усилие, требуемое для приведения шток-поршня в действие, не более 30Н
- номинальная вместимость не более 5,2 мл;
- максимальное «мертвое» пространство шприца 0,075 мл;
- длина выступания штока, не менее 12,5 мм;
- боковое усилие при поршневом уплотнении $2,0 \pm 5\%$ Н

21 Игла инъекционная 18G x $1\frac{1}{2}$ " (1,25 x 38 мм)


- внутренний диаметр трубки иглы $0,79 \pm 0,25$ мм;
- наружный диаметр трубки иглы от 1,2 мм до 1,3 мм;
- длина трубки иглы $38^{+2,5}_{-2,5}$ мм;
- масса 1,02 г;
- угол скоса острия $18^\circ \pm 2^\circ$;
- толщина стенки трубки иглы $0,195 \pm 0,01$ мм;
- длина предохранительного колпачка $54,0 \pm 0,1$ мм;
- диаметр предохранительного колпачка $6,0 \pm 0,1$ мм;
- габаритные размеры павильона (длина x ширина x высота), не более 18,0 x 7,0 x 9,0 мм.

22 Игла инъекционная 25G x $1\frac{1}{2}$ " (0,5 x 38 мм)


- внутренний диаметр трубки иглы $0,232 \pm 0,06$ мм;
- наружный диаметр трубки иглы от 0,500 мм до 0,530 мм;
- длина трубки иглы $38^{+2,5}_{-2,5}$ мм;
- масса 0,85 г;
- угол скоса острия $18^\circ \pm 2^\circ$;
- толщина стенки трубки иглы $0,119 \pm 0,01$ мм;
- длина предохранительного колпачка $54,0 \pm 0,1$ мм;
- диаметр предохранительного колпачка $6,0 \pm 0,1$ мм;
- габаритные размеры павильона (длина x ширина x высота), не более 18,0 x 7,0 x 9,0 мм.

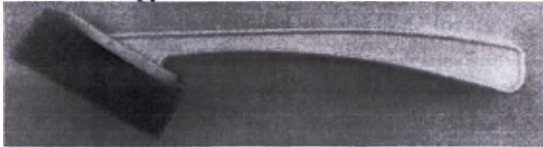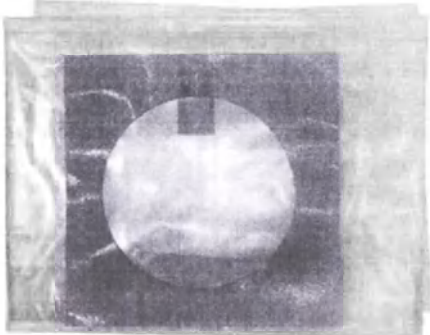23 Спонж с ручкой 	- длина спонжа 39,0±0,5 мм; - ширина спонжа 24,5±0,5 мм; - высота спонжа 14,5±0,5мм; - длина ручки 120,0 ± 0,5 мм; - плотность спонжа 0,015±0,0015 г/см³; - сорбционная емкость 50 г/г; - скорость впитывания 5 см³/с; - масса, не более 5,0 г.
24 Пленка фиксирующая с окном для процедурного поля 70х80 см 	- длина 70,0±3,0 см; - ширина 80,0±3,0 см; - толщина 0,04±0,02 мм; - диаметр окна для процедурного поля 100,0±5,0 мм; - масса, не более 42,43 г; - ширина адгезивного слоя 0,02±0,02 мм; - степень адгезии 20-25 Н/см² - предел прочности при растяжении в поперечном состоянии, не менее 25 МПа; - предел прочности при растяжении в продольном состоянии, не менее 20 МПа; - прочность на разрыв в поперечном состоянии 16,4±0,5 Н/см; - прочность на разрыв в продольном состоянии 14,7±0,5 Н/см.
25 Простыня нетканая 75х75 см 	- длина 75,0±3 см; - ширина 75,0±3 см; - толщина 0,14±0,02 мм; - масса, не более 30,32 г; - поверхностная плотность материала 60 г/м²; - предел прочности при растяжении в поперечном состоянии, не менее 25 МПа; - предел прочности при растяжении в продольном состоянии, не менее 17 МПа; - прочность на разрыв в поперечном состоянии 72,0±5 Н/см; - прочность на разрыв в продольном состоянии 30,0±5 Н/см; - ворсоотделение 4,0 Log₁₀; - водопроницаемость 900 г/м²; - усилие продавливания шариком, не менее 10 Н.
26 Пластырь фиксирующий 5х50 см 	- длина 50,0±2,0 см; - ширина 5,0±0,5 см; - толщина 0,4±0,02 мм; - масса, не более 3,74 г.

27 Пластырь фиксирующий 10x20 см	- длина $20,0 \pm 2,0$ см; - ширина $10,0 \pm 0,5$ см; - толщина $0,28 \pm 0,02$ мм; - масса, не более 3,09 г.
28 Салфетка нетканая	- длина $14,5 \pm 1,5$ см; - ширина $16,0 \pm 1,5$ см; - толщина $0,24 \pm 0,02$ мм; - масса, не более 1,0 г.

Иглы имеют следующие параметры шероховатости:

- для наружных поверхностей – $Ra \leq 0,16$ мкм;
- для поверхности заточки – $Ra \leq 0,63$ мкм.

Иглы имеют твердость рабочих частей от 40 до 44 HRC.

Игла имеют расстояние между жесткой опорой и точкой приложения силы изгиба:

- для иглы $3,0(\pm 0,1)$

Технические характеристики игл представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики

Тип иглы	Диаметр трубки иглы, мм	Усилие прокола полиэтиленовой пленки, Н, не более	Усилие на изгиб трубки, Н, не менее	Прочность соединения павильона и трубки иглы, минимальное усилие, Н
Игла для эпидуральной анестезии	1,65	2,0	22,0	69
	1,34	1,60	20,0	69
Игла инъекционная	1,25	1,60	20,0	69
	0,5	0,8	7,0	22
Игла для спинальной анестезии	0,41	0,670	3,5	22
Аспирационная	1,2	1,60	20,0	69

канюля с фильтром				
----------------------	--	--	--	--

Материалы, используемые для изготовления игл приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Материалы, используемые для изготовления наборов

Наименовани е изделия	Наименование составной части	Материал	Марка	Производитель
1 Игла Туохи/ игла Туохи, Turn-Lock	Трубка иглы	Нержавеющая сталь	AISI 304	Kaneko Medix (Канеко Медикс), Япония
	Павильон иглы	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Адгезив	Locate aa 3972 light cure med. Dev. Adh. 3972 light cure	Henkel (Хенкель), Германия
	Стилет	Полипропилен	PP MH-418	Resinex (Ресинекс), Турция
		Краситель*		ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Предохранительн ый колпачок	Полиэтилен низкой плотности	G03-5	Gültekin Plastik (Гюлтекин Пластик), Турция
2 Игла Пенсил Пойнт, Safe- Steps/ Игла Квинке, Safe- Steps	Трубка иглы	Нержавеющая сталь	AISI 304	Kaneko Medix (Канеко Медикс), Япония
		Термопластичны й эластомер	Pebax 6333 SP 01 White	Arkema (Аркема), Турция
	Павильон иглы	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Адгезив	Locate aa 3972 light cure med. Dev. Adh. 3972 light cure	Henkel (Хенкель), Германия
	Стилет	Полипропилен	PP MH-418	Resinex (Ресинекс), Турция

		Нержавеющая сталь	AISI 304	Kaneko Medix (Канеко Медикс), Япония
		Краситель*		ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Предохранительный колпачок	Полиэтилен низкой плотности	G03-5	Gültekin Plastik (Гюлтекин Пластик), Турция
3 Игла Пенсил Пойнт, Steps/Игла Квинке, Steps	Трубка иглы	Нержавеющая сталь	AISI 304	Kaneko Medix (Канеко Медикс), Япония
	Павильон иглы	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Адгезив	Locate aa 3972 light cure med. Dev. Adh. 3972 light cure	Henkel (Хенкель), Германия
		Краситель	White 6	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
		Чернила	Black ink 2	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Стрелка на павильоне	Термопластичный эластомер	PLS-987	Merit Plastic (Мерит Пластик), Турция
		Краситель	Pink 12	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Стилет	Полипропилен	PP MH-418	Resinex (Ресинекс), Турция
		Нержавеющая сталь	AISI 304	Kaneko Medix (Канеко Медикс), Япония
		Краситель*		ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Предохранительный колпачок	Полиэтилен низкой плотности	G03-5	Gültekin Plastik (Гюлтекин

				Пластик), Турция
4 Катетеры эпидуральные	Трубка катетера	Полиамид	Pebax	VELOX (ВЕЛОКС), Турция
	Рентгеноконтрас тная линия	Полиамид	Pebax	VELOX (ВЕЛОКС), Турция
		Бария сульфат	Blanc Fixe XR HN	Sachtleben (Сахтлебен), Германия
		Краситель	711-8005	Marabu (Марабу), Германия
	Проводник катетера	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
5 Идентификационная наклейка		Ламинированная клеящаяся бумага	Lam 099	Norgeplaster (Норгепластер), Норвегия
		Краситель	Yellow 191	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
		Чернила черные	Black ink 2	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
6 Шприц потери сопротивлени я, 10 мл, Luer (Луер)	Цилиндр	Полипропилен	Moplen RP5007K	LyondellBasell (Лайонделл бээл), США
		Чернила черные	Black ink 2	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Шток, упор штока	Полипропилен	Moplen RP5007K	LyondellBasell (Лайонделл бээл), США
		Краситель	Yellow 66	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Уплотнитель	Термопластичны й эластомер	Elastron G500.A55.N.P A	Elastron (Эластрон), Турция
		Краситель	Green 124	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Смазка	Силиконовое масло	Silicon oil Biesterfeld	Dow Corning (Доу Конинг), США

7 Шприц потери сопротивлени я, автоматическ ий, 10 мл, Luer (Луер)	Цилиндр	Полипропилен	Moplen RP5007K	LyondellBasell (Лайонделл бээл), США
		Чернила черные	Black ink 2	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Шток, упор штока	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Краситель	White 6	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Уплотнитель	Термопластичны й эластомер	Elastron G500.A55.N.P A	Elastron (Эластрон), Турция
		Краситель	Green 124	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Смазка	Силиконовое масло	Silicon oil Biesterfeld	Dow Corning (Доу Конинг), США
	Пружина	Нержавеющая сталь	AISI 302	Kaneko Medix (Канеко Медикс), Япония
8 Эпидуральны й фильтр 0,2 м	Корпус	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
	Крышка	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Краситель	Yellow 191	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Фильтрующий материал	Полиэстер	PES0247100	Sterlitech (Стерлитех), США
	Колпачок корпуса	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Краситель	White 6	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
9 Фиксатор катетера	Замок-защелка	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
	Клеящаяся	Полиуретан	RGN-96	Norgeplaster

	пластина			(Норгепластер), Норвегия
		Клейкий слой	NGR-806	Norgeplaster (Норгепластер), Норвегия
		Краситель	144-85-15	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
10 Фиксатор эпидуральног о фильтра	Стержень	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
	Клеящаяся пластина	Полиуретан	RGN-96	Norgeplaster (Норгепластер), Норвегия
		Клейкий слой	NGR-806	Norgeplaster (Норгепластер), Норвегия
		Краситель	144-85-15	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
11 Адаптер	Корпус	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
	Колпачок	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Краситель	Yellow 191	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Резиновый уплотнитель	Термопластичны й эластомер	PLS-987	Merit Plastic (Мерит Пластик), Турция
12 Шприц 3 мл, Luer (Луер)/ Шприц 5мл, Luer (Луер)	Цилиндр	Полипропилен	PP MH-418	Resinex (Ресинекс), Турция
		Чернила черные	Black ink 2	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Шток, упор штока	Полипропилен	PP MH-419	Resinex (Ресинекс), Турция
		Краситель	Blue 165	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Уплотнитель	Термопластичны й эластомер	Elastron G510.A88.N.P	Elastron (Эластрон),

			A	Турция
	Смазка	Силиконовое масло	Silicon oil Biesterfeld	Dow Corning (Дюу Конинг), США
14 Иглы инъекционные	Трубка иглы	Нержавеющая сталь	AISI 304	Kaneko Medix (Канеко Медикс), Япония
	Павильон иглы	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Адгезив	Locate aa 3972 light cure med. Dev. Adh. 3972 light cure	Henkel (Хенкель), Германия
		Краситель*		ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Предохранительный колпачок	Полиэтилен низкой плотности	G03-5	Gültekin Plastik (Гюлтекин Пластик), Турция
15 Спонж с ручкой	Ручка	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Краситель желтый	Yellow 191	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
	Спонж	Полиуретан	Flexible Polyurethane Sponge	SAFAŞ SAF PLASTİK A.Ş. (САФАС САФ ПЛАСТИК А.С.) Турция
		Клейкий слой	NGR-806	Norgeplaster (Норгепластер), Норвегия
		Краситель	Green 124	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция
16 Пленка фиксирующая с окном для процедурного поля 70x80 см	Пленка	Полиэтилен	PE I-688	Resinex (Ресинекс), Турция
	Бумага	Клейкий слой	NGR-806	Norgeplaster (Норгепластер), Норвегия
		Ламинированная бумага	Lam098	Norgeplaster (Норгепластер),

				Норвегия
17 Простыня нетканая 75x75 см	Нетканый материал	Jatrek 154	Jatrek Teknik Tekstil (Джатрек Техник Текстиль), Турция	
	Пленка	CO-99	Jatrek Teknik Tekstil (Джатрек Техник Текстиль), Турция	
	Клейкий слой	GL-04	Jatrek Teknik Tekstil (Джатрек Техник Текстиль), Турция	
	Краситель	Blue 15	ARG Konsantre (АРГ Консантр), Турция	
18 Пластырь фиксирующий 5x50 см (10x20 см)	Медицинская бумага	Tyvek	Amcor Flexibles (Амкор Флексиблес), Украина	
	Клейкий слой	NGR-806	Norgeplaster (Норгепластер), Норвегия	
	Нетканый материал	Spanless non-woven 98	Jatrek Teknik Tekstil (Джатрек Техник Текстиль), Турция	
19 Салфетка нетканая	Нетканый материал	Spanless non-woven 55	Jatrek Teknik Tekstil (Джатрек Техник Текстиль), Турция	
20 Аспирационная канюля с фильтром	Трубка иглы	Нержавеющая сталь	AISI 304	Канеко Медикс (Канеко Медикс), Япония
	Павильон иглы	АБС-пластик	Resinex 558A	LG Chem (Эл Джи Хем), Турция
		Адгезив	Locate aa 3972 light cure med. Dev. Adh. 3972 light cure	Henkel (Хенкель), Германия

		Краситель	Pink 122	ARG Konsantre (АПГ Консантр), Турция
	Фильтрующий материал	Полиэстер	PES0247100	Sterlitech (Стерлитех), США
	Предохранительный колпачок	Полиэтилен низкой плотности	G03-5	Gültekin Plastik (Гюлтекин Пластик), Турция
Примечание: *- Цвет и марка красителя находится в таблице 2; АБС-пластик – акрилонитрилбутадиенстирол.				

6.1 Методы и условия стерилизации, сроки сохранения стерильности

Наборы стерилизуются газовым методом с применением этиленоксида в концентрации 820 мг/л при температуре 48-55°C, не менее 2-х часов, с последующим «карантином» 72 часа при температуре 30°C, повторной стерилизации не подлежат. Срок сохранения стерильности указан на упаковке и составляет 5 лет.

7 Указания по применению

7.1 Общие положения

7.1.1 Перед работой с набором ознакомьтесь с инструкцией по применению.

7.1.2 Наборы предназначены для использования врачом-специалистом.

7.2 Требования безопасности

7.2.1 Если при проведении катетеризации эпидурального пространства в просвете иглы Туохи или катетера определяется наличие крови или цереброспинальной жидкости (далее - ЦСЖ), это означает, что процедура выполнена некорректно. Немедленно прекратите манипуляцию и действуйте далее в соответствии с принятыми методиками.

7.2.2 Эпидуральные фильтры следует менять каждые 96 часов.

7.2.3 Максимальный рекомендуемый срок постановки катетера до 30 дней.

7.2.4 Уделяйте пристальное внимание соблюдению правил асептики для предупреждения инфекционных осложнений в эпидуральном или субарахноидальном пространстве.

7.2.5 Чрезмерное усилие при фиксации катетера крышкой корпуса обжимной втулки адаптера может вызвать пережатие катетера. Небольшое ослабление хода резьбы восстанавливает проходимость катетера.

8 Установка и способ применения

8.1.1 Подготовка к использованию наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium:

8.1.1.1 Провести гигиеническую антисептику рук. Надеть перчатки.

8.1.1.2 Выберите тип набора, в соответствии с клинической ситуацией.

8.1.1.3 Соблюдая правила асептики и антисептики, вскройте упаковку и разложите набор на простыню нетканую.

8.1.1.4 До начала выполнения процедуры, убедитесь, что катетер проходит через иглу Туохи, а его просвет свободен для прохождения растворов.

8.1.1.5 Перед процедурой проверьте целостность павильона и трубки игл в месте соединения.

8.1.1.6 Придайте пациенту положение, необходимое для проведения процедуры пункции. Обработайте место процедуры антисептическими растворами при помощи спонжа с ручкой. Уберите остатки антисептического раствора при помощи марлевой салфетки.

8.1.2 Способ применения наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium:

Порядок выполнения процедуры полностью соответствует стандартным методическим рекомендациям фундаментальных руководств. При потребности обратитесь к ним для уточнения деталей.

8.1.2.1 Зафиксируйте на спине пациента пленку фиксирующуюся с окном для процедурного поля, оставляя открытое пространство для места процедуры.

8.1.2.2 При помощи шприца и иглы инъекционной введите местный анестетик внутрискожно, подкожно и в подлежащие ткани.

8.1.2.3 Введите иглу Туохи в эпидуральное пространство.

8.1.2.4 Определите эпидуральное пространство в соответствии с принятым медицинскими техниками, отметив глубину залегания эпидурального пространства от кожи с помощью маркировки на игле Туохи.

8.1.2.5 Продвиньте иглу, с постоянным давлением на поршень шприца потери сопротивления, или визуального контроля движения поршня шприца (для наборов с автоматическим шприцом потери сопротивления). Потеря сопротивления в шприце означает, что эпидуральное пространство определено верно.

8.1.2.6 После идентификации эпидурального пространства введите спинальную иглу через павильон иглы Туохи и далее до ощущения потери сопротивления, что указывает на прокол твердой мозговой оболочки.

8.1.2.7 После пункции твердой мозговой оболочки игла должна быть повернута, чтобы скошенный срез иглы или боковое отверстие было не закупорено нервными корешками. Возможно вращение спинальной иглы для оптимального положения бокового глазка. Точечная метка стороны на прозрачном павильоне спинальной иглы соответствует положению глазка на кончике иглы.

8.1.2.8 Вытащите стилет из спинальной иглы и дождитесь появления цереброспинальной жидкости в прозрачном павильоне иглы. Вставьте шприц, содержащий

местный анестетик и аспирируйте немного ЦСЖ с его помощью, и убедитесь, что ЦСЖ свободно вытекает. Если ЦСЖ не появляется в прозрачном павильоне иглы, вставьте стилет и поверните иглу на 90 градусов по часовой стрелке или продвиньте, или подтяните иглу, пока не появится ЦСЖ в шприце.

8.1.2.9 Используйте аспирационную канюлю с фильтром для забора анальгезирующего средства в шприц.

8.1.2.10 Введите местный анестетик и удалите спинальную иглу из эпидуральной иглы Туохи.

8.1.2.11 Введите катетер маркированной частью в иглу Туохи, используя проводник, если это необходимо.

8.1.2.12 Продвиньте катетер на желаемую глубину, ориентируясь на рентгеноконтрастную маркировку катетера и величину глубины нахождения эпидурального пространства от кожи.

8.1.2.13 Осторожно извлеките иглу Туохи, зафиксировав положение катетера. Присоедините к катетеру адаптер, введя катетер в малое отверстие до упора и зафиксируйте, повернув крышку корпуса обжимной втулки вокруг. Осторожно потяните за катетер, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

8.1.2.13 Присоедините фильтр к адаптеру и проведите аспирационный тест для полной уверенности, что катетер не расположен в спинальном пространстве.

8.1.2.14 Зафиксируйте эпидуральный катетер на теле пациента в месте, удобном для введения лекарственных средств при помощи фиксатора катетера.

8.1.2.15 Зафиксируйте эпидуральный фильтр на спине пациента, используя фиксатор эпидурального фильтра.

8.1.2.16 Закрепите свободный конец катетера при помощи пластыря фиксирующего на теле пациента в месте, удобном для введения лекарственных средств.

8.1.2.17 При длительной катетеризации, определите идентификационную наклейку на катетер, указав на ней дату и время установки катетера.

8.1.2.18 При удалении катетера после проведенной эпидуральной анестезии необходимо убедиться в полном его извлечении, обращая внимание на наличие его маркированного кончика.

8.1.2.19 После завершения использования игл, утилизируйте их в соответствии с инструкциями.

8.2.1 Подготовка к использованию наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии:

8.2.1.1 Провести гигиеническую антисептику рук. Надеть перчатки.

8.2.1.2 Выберите тип набора, в соответствии с клинической ситуацией.

8.2.1.3 Соблюдая правила асептики и антисептики, вскройте упаковку.

8.2.1.4 До начала выполнения процедуры, убедитесь, что катетер проходит через иглу Туохи, а его просвет свободен для прохождения растворов.

8.2.1.5 Перед процедурой проверьте целостность павильона и трубки игл в месте соединения.

8.2.1.6 Придайте пациенту положение, необходимое для проведения процедуры пункции. Обработайте место процедуры антисептическими растворами при помощи спонжа с ручкой. Уберите остатки антисептического раствора при помощи марлевой салфетки.

8.2.2 Способ применения наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии:

Порядок выполнения процедуры полностью соответствует стандартным методическим рекомендациям фундаментальных руководств. При необходимости обратитесь к ним для уточнения деталей.

8.2.2.1 Введите местный анестетик внутрикожно, подкожно и в подлежащие ткани.

8.2.2.2 Введите иглу Туохи в эпидуральное пространство.

8.2.2.3 Определите эпидуральное пространство в соответствии с принятыми медицинскими техниками, отметив глубину залегания эпидурального пространства от кожи с помощью маркировки на иглу Туохи.

8.2.2.4 Продвиньте иглу, с постоянным давлением на поршень шприца «потери сопротивления», или визуального контроля движения поршня шприца (для наборов с автоматическим шприцом «потери сопротивления»). Потеря сопротивления в шприце означает, что эпидуральное пространство определено верно.

8.2.2.5 После идентификации эпидурального пространства введите спинальную иглу через павильон эпидуральной иглы Туохи и далее до ощущения потери сопротивления, что указывает на прокол твердой мозговой оболочки.

8.2.2.6 После пункции твердой мозговой оболочки игла должна быть повернута, чтобы скошенный срез или боковое отверстие было не закупорено нервыми корешками. Возможно вращение спинальной иглы для оптимального положения бокового отверстия. Точечная метка стороны на прозрачном павильоне спинальной иглы соответствует положению отверстия на кончике иглы.

8.2.2.7 Вытащите стилет из спинальной иглы и дождитесь появления ЦСЖ в прозрачном павильоне иглы. Вставьте шприц, содержащий местный анестетик и аспирируйте немного ЦСЖ с его помощью, для проверки свободного вытекания ЦСЖ. Если

ЦСЖ не появляется в прозрачном павильоне иглы, вставьте стилет и поверните иглу на 90 градусов по часовой стреле или продвиньте, или подтяните иглу, пока не появится ЦСЖ в шприце.

8.2.2.8 Используйте аспирационную канюлю с фильтром для забора анальгезирующего средства в шприц.

8.2.2.9 Введите местный анестетик и удалите спинальную иглу из эпидуральной иглы Туохи.

8.2.2.10 Поместите катетер в павильон иглы Туохи и проведите маркированный конец катетера через иглу Туохи, используя проводник, если это необходимо.

8.2.2.11 Продвиньте катетер на желаемую глубину, используя рентгеноконтрастную маркировку катетера и величину глубины нахождения эпидурального пространства от кожи.

8.2.2.12 Осторожно извлеките иглу Туохи, зафиксировав положение катетера. Присоедините к катетеру адаптер, введя катетер в малое отверстие до упора и зафиксируйте, повернув крышку корпуса обжимной втулки вокруг. Осторожно потяните за катетер, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

8.2.2.13 Присоедините фильтр к адаптеру и проведите аспирационный тест для полной уверенности, что катетер не расположен в спинальном пространстве.

8.2.2.14 Зафиксируйте эпидуральный катетер на теле пациента в месте, удобном для введения лекарственных средств при помощи фиксирующего пластыря (если он имеется в комплекте по вашему выбору).

8.2.2.15 Зафиксируйте эпидуральный фильтр на спине пациента, используя фиксатор эпидурального фильтра (если он имеется в комплекте по вашему выбору).

8.2.2.16 При длительной катетеризации, определите идентификационную наклейку на катетер, указав на ней дату и время установки катетера.

8.2.2.17 При удалении катетера после проведенной эпидуральной анестезии необходимо убедиться в полном его извлечении, обращая внимание на наличие его маркированного кончика.

8.2.2.18 После завершения использования игл, утилизируйте их в соответствии с инструкциями.

9 Техническое обслуживание, текущий ремонт

Изделие однократного применения, техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

10 Комплектность

Комплект поставки наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность поставки наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии.

Наименование	Количество, шт
Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии MEDEREN, в зависимости от варианта исполнения:	
1. Наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium	
1.1 Игла для эпидуральной анестезии одного исполнения	1
1.2 Игла для спинальной анестезии одного исполнения	1
1.3 Катетер эпидуральный одного исполнения	1
1.4 Шприц потери сопротивления Лусг одного исполнения	1
1.5 Эпидуральный фильтр	1
1.6 Фиксатор эпидурального фильтра	1
1.7 Фиксатор катетера	1
1.8 Адаптер	1
1.9 Шприц	2
1.10 Игла инъекционная	2
1.11 Спонж с ручкой	3
1.12 Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля	1
1.13 Простыня нетканая	1
1.14 Аспирационная канюля с фильтром	1
1.15 Пластырь фиксирующий	2
1.16 Салфетка нетканая	5
1.17 Инструкция по применению	1
1.18 Потребительская упаковка	1
2. Наборов для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium Mini	
2.1 Игла для эпидуральной анестезии одного исполнения	1
2.2 Игла для спинальной анестезии одного исполнения	1
2.3 Шприц потери сопротивления Лусг одного исполнения	1
2.4 Шприц	2
2.5 Игла инъекционная	2
2.6 Спонж с ручкой	3
2.7 Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля	1
2.8 Простыня нетканая	1

2.9 Аспирационная канюля с фильтром	1
2.10 Пластырь фиксирующий	2
2.11 Салфетка нетканая	5
2.12 Инструкция по применению	1
2.13 Потребительская упаковка	1
3. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии	
3.1 Игла для эпидуральной анестезии одного исполнения	1
3.2 Игла для спинальной анестезии одного исполнения	1
3.3 Катетер эпидуральный одного исполнения	1
3.4 Шприц потери сопротивления Luer одного исполнения	1
3.5 Эпидуральный фильтр	1
3.6 Фиксатор эпидурального фильтра	1
3.7 Фиксатор катетера	1
3.8 Адаптер	1
3.9 Аспирационная канюля с фильтром	1
3.10 Инструкция по применению	1
3.11 Потребительская упаковка	1
4. Набор для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Mini	
4.1 Игла для эпидуральной анестезии одного исполнения	1
4.2 Игла для спинальной анестезии одного исполнения	1
4.3 Катетер эпидуральный одного исполнения	1
4.4 Шприц потери сопротивления Luer одного исполнения	1
4.5 Аспирационная канюля с фильтром	1
4.6 Инструкция по применению	1
4.7 Потребительская упаковка	1

11 Упаковка

11.1 Наборы для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии:

Перед включением в набор, катетеры эпидуральные упаковываются в индивидуальную полиэтиленовую упаковку марки PE-58, производства JIXAING U-LIFE MEDICAL DEVICE TECH. CO. (Джиксаинг ю-лайф медикал девайс тех. Ко.), Китай. Габаритные размеры 119,0 x 62,5 x 0,1 мм.

Составные части наборов укладываются в потребительскую упаковку, изготовленную из полиэтилена марки PE Film TRANSPARENT производства JIXAING U-LIFE MEDICAL DEVICE TECH. CO. (Джиксаинг ю-лайф медикал девайс тех. Ко.), Китай и бумаги

медицинской марки TYVEK DuPont TA 5511B, производства Amcor Flexibles (Амкор Флексиблз) Великобритания (блистеры). Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 205×115×20 мм, допустимое отклонение длины и ширины ± 20 мм, высоты ± 3 мм.

Блистеры укладываются в групповую упаковку по 10 шт. в виде коробок из тонкого картона марки Thin Carton K-0321 производитель A&G Printing office (А&Г Принтинг офис), страна производства Турция. Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 217×122×260 мм, допустимое отклонение длины и ширины ± 20 мм, высоты ± 3 мм.

В групповую упаковку вложена инструкция по применению на 10 наборов 1 инструкция.

Наборы, упакованные в групповую упаковку, укладываются по 100 шт. в транспортную упаковку, изготовленную из картона марки Thick Carton K-678 производитель Kutusan, страна производства Турция. Для исключения нарушения целостности транспортной упаковки при транспортировании и хранении ее заклеивают клеевой лентой производства Zhejiang Ninghai DeLi group Co.,Ltd (Чжэцзян Нингай ДеЛи груп Ко. Лтд.), страна производства Китай (ширина ленты 440 мм). Габаритные размеры 450×640×290 мм, допустимое отклонение ± 10 мм, высоты ± 3 мм. Масса не более 8 кг.

11.2 Наборы для спинально-эпидуральной (комбинированной) анестезии Premium:

Перед включением в набор, катетеры эпидуральные упаковываются в индивидуальную полиэтиленовую упаковку марки PE-58, производства JIXAING U-LIFE MEDICAL DEVICE TECH. CO. (Джиксаинг ю-лайф медикал девайс тех. Ко.), Китай. Габаритные размеры 119,0 x 62,5 x 0,1 мм.

Составные части набора кроме, пленки фиксирующей с окном для процедурного поля, простыни нетканой и пластырей фиксирующихся, укладываются в упаковку, представляющую собой полимерный лоток PE-320, производства JIXAING U-LIFE MEDICAL DEVICE TECH. CO. (Джиксаинг ю-лайф медикал девайс тех. Ко.), Китай. Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 270×220×40 мм, допустимое отклонение длины и ширины ± 10 мм.

Лоток, пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля, простыня нетканая и пластыри фиксирующиеся упаковываются в потребительскую упаковку, изготовленную из композита полиэтилена/полипропилена марки PE/PP Composite Film, производства JIXAING U-LIFE MEDICAL DEVICE TECH. CO. (Джиксаинг ю-лайф медикал девайс тех. Ко.), Китай и бумаги медицинской марки Medi ETO/R, производства Mondi(Монди), Австрия. Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 450×300×40 мм, допустимое отклонение длины и ширины ± 10 мм.

Наборы укладываются по 30 шт в транспортную упаковку, изготовленную из картона марки Thick Carton K-678 производитель Kutusan, страна производства Турция. Для исключения нарушения целостности транспортной упаковки при транспортировании и

хранении ее заклеивают клеевой лентой производства Zhejiang Ninghai DeLi group Co.,ltd (Чжэцзян Нингай ДеЛи груп Ко. Лтд.), страна производства Китай (ширина ленты 440 мм). Габаритные размеры 480×430×585 мм, допустимое отклонение длины и ширины ± 15 мм. Масса не более 6,7 кг.

В транспортную упаковку вложена инструкция по применению на 10 наборов 1 инструкция.

12 Маркировка

- 12.1 На трубку иглы Туохи наносится длина иглы с шагом 1 см.
- 12.2 На катетеры эпидуральные нанесена рентгеноконтрастная маркировка.
- 12.3 На шприц потери сопротивления одного исполнения и Шприц 3 мл, Luer (Луер) (Шприц 5 мл, Luer (Луер)) нанесена градуировка шкалы.
- 12.4 На индивидуальную упаковку игл нанесена следующая маркировка:
 - наименование изделия;
 - адрес и наименование производителя (обозначено соответствующим символом);
 - сведения об уполномоченном представителе;
 - код партии (обозначено соответствующим символом);
 - номер по каталогу (обозначено соответствующим символом);
 - размер иглы;
 - дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
 - дата истечения срока годности (обозначено символом «Использовать до ...»);
 - сведения о стерильности и методе стерилизации (обозначено соответствующим символом);
 - предупреждение о запрете повторной стерилизации (обозначено соответствующим символом);
 - предупреждение о запрете на повторное применение (обозначено соответствующим символом);
 - предупреждение о запрете использования при повреждении упаковки (обозначено соответствующим символом);
 - предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
 - сведения о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
 - сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
 - предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);

- сведения о токсичности (обозначено соответствующим символом);
- сведения об отсутствии содержания латекса (обозначено соответствующим символом);
- сведения о апиrogenности (обозначено соответствующим символом);
- сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- информация о соответствии техническому регламенту (обозначено соответствующим символом);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

На групповую упаковку наборов нанесена следующая маркировка:

- наименование изделия;
- адрес и наименование производителя (обозначено соответствующим символом);
- сведения об уполномоченном представителе;
- код партии (обозначено соответствующим символом);
- номер по каталогу (обозначено соответствующим символом);
- размер игл;
- дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
- дата истечения срока годности (обозначено символом «Использовать до ...»);
- сведения о стерильности и методе стерилизации (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о запрете повторной стерилизации (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о запрете на повторное применение (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о запрете использования при повреждении упаковки (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- сведения о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- сведения о токсичности (обозначено соответствующим символом);

- сведения об отсутствии содержания латекса (обозначено соответствующим символом);
- сведения о апиrogenности (обозначено соответствующим символом);
- сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- информация о соответствии техническому регламенту (обозначено соответствующим символом);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

На транспортную упаковку нанесена следующая маркировка:

- наименование изделия;
- адрес и наименование производителя (обозначено соответствующим символом);
- сведения об уполномоченном представителе;
- код партии (обозначено соответствующим символом);
- номер по каталогу (обозначено соответствующим символом);
- размер игл;
- дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
- дата истечения срока годности (обозначено символом «Использовать до ...»);
- сведения о стерильности и методе стерилизации (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о запрете повторной стерилизации (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о запрете на повторное применение (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о запрете использования при повреждении упаковки (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- сведения о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- сведения о токсичности (обозначено соответствующим символом);
- сведения об отсутствии содержания латекса (обозначено соответствующим символом);

- сведения о апиrogenности (обозначено соответствующим символом);
- сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- информация о соответствии техническому регламенту (обозначено соответствующим символом);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

На упаковку нанесены следующие манипуляционные символы:

Символ	Обозначение
	Использовать до ...
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Не стерилизовать повторно
	Сведения о производителе
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки

	Стерилизация оксидом этилена
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон
	Не содержит латекс
	Апирогенно
NON TOXIC	Не токсично
	Особая утилизация



Знак соответствия техническому регламенту

13 Условия эксплуатации

Перед непосредственным использованием, а также после транспортирования наборов при минусовых температурах, следует их распаковывать и использовать только выдержав в транспортной упаковке в течение не менее 72 ч при температуре от +25°C. Не использовать при поврежденной стерильной упаковке.

Наборы применяются в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от плюс 10°C до плюс 35°C;
- относительная влажность воздуха: 35-85%;
- атмосферное давление: (84,0-106,7) кПа (630-800 мм рт. ст.).

Наборы применяются для пациентов с температурой тела от плюс 32°C до 42°C.

14 Транспортирование

Транспортируются наборы всеми видами транспорта в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от минус 5°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха: 25-95%;
- атмосферное давление (84,0-106,7) кПа (630-800 мм рт.ст.).

15 Хранение

Хранение наборов осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от плюс 5°C до плюс 35 °C;
- относительная влажность воздуха: 35-85%;
- атмосферное давление (84,0-106,7) кПа (630-800 мм рт.ст.),

Хранение наборов должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Срок хранения – 5 лет.

16 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие наборов заявленным в документации показателям качества и характеристикам при соблюдении правил транспортирования и хранения в течение всего срока годности.

Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия; не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых повторной обработке или стерилизации, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких наборов.

Срок годности наборов – 5 лет.

17 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

После применения наборов по назначению оно должны быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинском учреждении.

При истечении срока годности и/или нарушении целостности герметичной упаковки наборов должны быть утилизированы как медицинские отходы класса «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам» в соответствии с правилами, действующими в медицинском учреждении.

Утилизация производится в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

18 Контактная информация

В случае возникновения вопросов, связанных с применением наборов, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:

Уполномоченная организация по вопросам качества:

ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

197229, город Санкт-Петербург, Проспект Лахтинский, дом 113, корпус ЛИТЕР А,
офис 2

Тел.: +7 812 627 21 41, e-mail: info@alfamedex.ru

Юридический центр Восстания 6, Бюро переводов
Санкт-Петербург, ул. Восстания, 6.
Тел. +7 812 660 06 06
Факс: +7 812 719 95 71
E-mail: trans@v6.spb.ru

Vosstaniya 6 Legal Centre, Translation Agency
St. Petersburg, Ul. Vosstaniya, 6
Tel. +7 812 660 06 06
Fax: +7 812 719 95 71
E-mail: trans@v6.spb.ru

Перевод с английского языка

22/20

Печать (3):
/НОТАРИУС * ОРЛИ ЗИНГЕРМАН/

«Медерен Неотех Лтд.» (Mederen Neotech Ltd.)
Адрес: ул.. Харакевет, д. 58. Тель-Авив, Яффа, Израиль, почтовый индекс 6777016
Корпорация номер: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

УТВЕРЖДАЮ
Медерен Неотех Лимитед
/подпись/

Штамп: «Медерен Неотех Лтд.» (Mederen Neotech Ltd.) * 515505329

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-----Конец перевода документа-----

Я, дипломированный переводчик Куликова Анастасия Михайловна, владеющая русским и английским языками, подтверждаю, что перевод является правильным, точным и полным.

Переводчик Куликова Анастасия Михайловна

САНКТ-

Петербург

Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Пятнадцатого апреля две тысячи двадцатого года.

Я, Романова Светлана Николаевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, свидетельствую подлинность подписи переводчика Куликовой Анастасии Михайловны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшей документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 10/9-н/78-2020-3-1635.

Взыскано по тарифу: 100 (сто) рублей.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 400 (четыреста) рублей.

С.Н. Романова



Итого в настоящем документе 91 (девятью один) лист
Нотариус: