

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Пелигрин Матен»**


А.М. Прокопеня

«07» августа 2019 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый,
стерильный и нестерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-002-84005787-2008**

2019

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и нестерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-002-84005787-2008 (далее по тексту «комплект», «изделие»).

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

См. Приложение №1 настоящей инструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и нестерильный, «Пелигрин», предназначен для применения взамен хлопчатобумажной медицинской одежды при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, родах, в процедурных и перевязочных кабинетах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплекты могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и быту.

КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекты относятся к изделиям однократного применения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Высший, средний и младший медицинский персонал.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия изготавливаются в стерильном и нестерильном виде.

Стерилизация комплектов в стерильном исполнении осуществляется радиационным способом по ГОСТ ISO 11137-1-2011. Значение поглощенной дозы в продукции при радиационной стерилизации 20 +/- 5кГр.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания к применению медицинского изделия: для применения взамен хлопчатобумажной медицинской одежды при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, родах, в процедурных и перевязочных кабинетах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Провести визуальный осмотр индивидуальной упаковки.
- Освободить изделие от индивидуальной упаковки.
- Проверить целостность изделия, методом визуального осмотра.

Использовать изделие в соответствии с наименованием и функциональным назначением в каждом конкретном случае, исходя из ситуации и необходимости.

Классификация медицинского изделия .

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурой классификацией медицинских изделий: код 330720; 330730

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Изделие кратковременного контакта.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки Комплекта одежды хирурга, из нетканого материала, одноразового, стерильный и нестерильный, «Пелигрин» ТУ 9398-002-84005787-2008 входят:

- Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-002-84005787-2008 в соответствии с вариантом исполнения, представленным в Приложении №1 в индивидуальной упаковке – 1 уп.

- или Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый, нестерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-002-84005787-2008 в соответствии с вариантом исполнения, представленным в Приложении №1 в индивидуальной упаковке – 1 уп.

- Этикетка – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание внешнего вида

- Изделия Комплекта могут выпускаться окрашенными или неокрашенными.
- Халат хирургический должен быть с длинным втачным, одношовным рукавом на трикотажном манжете или собранным на тонкой резинке, или на текстильной застежке типа «Контакт» или на завязках, без воротника. Сзади фиксируются на завязках на уровне талии и текстильной застежки типа «Контакт» в области горловины. Перед халата должен быть цельнокроеным. Низ халата не обработан, горловина обработана кантом.
- Куртка хирургическая должна быть с длинным или коротким втачным рукавом. Перед и спинка должны быть цельнокроеными. Вырез горловины должен быть круглым или прямоугольным, или V-образным. Рукава, вырез горловины и низ куртки не обработаны. По согласованию с заказчиком допускается наличие накладных карманов на передней полочке куртки.
- Брюки хирургические должны быть на уровне талии собраны на эластичной ленте. Низ брюк не обработан.
- Фартук хирургический должен быть фигурным цельнокроеным с двумя завязками на уровне талии и лямкой фиксирующей фартук на шее. Края фартука не обработаны.
- Головной убор типа «Колпак» должен состоять из стенки с донышком круглой или овальной формы и завязок, регулирующих размер колпака (на затылке). Края колпака не обработаны.
- Головной убор типа «Берет» должен быть собран на тонкой резинке, вдоль окружности. Края берета не обработаны.
- Головной убор типа «Шлем» должен состоять из стенки с донышком и завязок, регулирующих размер шлема (под подбородком). Края шлема не обработаны.
- Бахилы для пациента (высокие или низкие) должны быть одношовными, собранными по верхнему краю на тонкой резинке или на завязках. По согласованию с заказчиком допускается изготавливать подошву бахил однослойную или двухслойную, с использованием защитных полиэтиленовых вставок. Края бахил не обработаны.
- Наручники должны быть одношовными с трикотажными манжетами или собраны на тонкой резинке.
- Соединения деталей изделий в Комплекте должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 4103, или ультразвуковой либо термической сваркой. Соединение деталей должно осуществляться нитками хлопчатобумажными по ГОСТ 6309.
- Швы деталей одежды Комплекта должны быть ровными, без пропусков стежков и прочными.
- Поверхности изделий Комплекта не должны иметь внешних дефектов в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

Общий вид изделий

Общий вид изделий, входящих в Комплект представлен в Приложении 2 (рисунки 1 – 9).

Основные линейные размеры

Основные линейные размеры изделий, входящих в Комплект должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах № 1 - № 9.

Таблица 1 (к рисунку 1).

Халат хирургический, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

Длина переда от середины горловины до низа (Н), см	120,0 ± 10,0
Ширина на уровне глубины проймы (C1), см	75,0 ± 5,0
Ширина халата внизу (C2), см	75,0 ± 5,0
Длина рукава от высокой точки оката до низа (L2), см	60,0 ± 5,0
Длина завязок (L3), см	не менее 15,0

Таблица 2 (к рисунку 2).

Куртка хирургическая, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

Длина спинки (H1), см	70,0 ± 5,0
Длина переда от середины горловины до низа (H2), см	60,0 ± 5,0
Ширина переда на уровне глубины проймы (C1), см	80,0 ± 5,0
Ширины спинки (C2), см	75,0 ± 5,0
Ширина внизу (C3), см	72,0 ± 5,0
Длина рукава от высокой точки оката до низа (L), см	27,0 ± 3,0 60,0 ± 5,0
Короткий рукав (L1), см	
Длинный рукав (L2), см	

Таблица 3 (к рисунку 3).

Брюки хирургические, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

Длина по боковому шву (H1), см	115,0 ± 10,0
Длина по шаговому шву (H2), см	80,0 ± 5,0
Ширина в талии при растянутой резинке (C1), см	55,0 ± 5,0
Ширина внизу (C2), см	25,0 ± 2,0

Таблица 4 (к рисунку 4).

Фартук хирургический.

Длина (H), см	130,0 ± 10,0
Ширина на уровне груди (C1), см	27,0 ± 3,0
Ширина снизу (C2), см	90,0 ± 5,0
Длина завязок (L), см	не менее 35,0

Таблица 5 (к рисунку 5).

Головной убор типа «Колпак».

Высота стенки (H), см	15,0 ± 1,5
Длина внутренней окружности (L1), см	55,0 ± 3,0
Длина завязок (L2), см	не менее 15,0
Диаметр донышка (D), см	18,0 ± 2,0

Таблица 6 (к рисунку 6).

Головной убор типа «Берет».

Диаметр при растянутой резинке (L1), см	не менее 50,0
---	---------------

Таблица 7 (к рисунку 7).

Головной убор типа «Шлем».

Высота стенки (H), см	23,0 ± 2,0
Длина внутренней окружности (L1), см	55,0 ± 5,0
Длина завязок (L2), см	не менее 40,0

Таблица 8 (к рисунку 8).

Бахилы хирургические (высокие и низкие).

Высота, см	высокие Н	55,0 ± 3,0
	низкие Н1	15,0 ± 1,0
Ширина, см	высокие С	25,0 ± 2,0
	низкие (при растянутой резинке) С1	не менее 25,0
Длина следа высоких и низких, L и L1, см		35,0 ± 3,0

Таблица 9 (к рисунку 9).

Нарукавники.

Длина (L), см	33,0 ± 3,0
Ширина (C), см	20,0 ± 2,0

Примечание: по требованию заказчика допускается изготавливать изделия, входящие в Комплект, других размеров.

Технические характеристики

Изделия Комплекта должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 10.

Таблица 10.

Наименование изделия.	Поверхностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водоупорность, мм в д. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в машинном направлении	в поперечном направлении	в машинном направлении	в поперечном направлении	
1. Халат хирургический: - неламинированный; - ламинированный.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500,0
2. Куртка хирургическая;	25,0	4,0	2,5	4,0	2,5	—
3. Брюки хирургические;	25,0	4,0	2,5	4,0	2,5	—
4. Фартук хирургический: - неламинированный; - ламинированный.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500,0
5. Головной убор: типа «Колпак»;	25,0	4,0	2,0	4,0	2,0	—
6. Головной убор: типа «Берет»;	17,0	2,0	1,5	2,0	1,5	—
7. Головной убор: типа «Шлем»;	25,0	4,0	2,0	4,0	2,0	—
8. Бахилы хирургические (высокие и низкие): - неламинированные; - ламинированные.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500,0
9. Нарукавники: - неламинированные; - ламинированные.	25,0 40,0	4,5 6,0	2,5 4,0	4,5 6,0	2,5 4,0	— 500,0

Материалы и покупные изделия

• Материалы и покупные изделия, применяемые при изготовлении комплекта - см. приложение 3 настоящей инструкции.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Транспортирование

Комплекты транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение

Хранение Комплектов у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения по группе 1 по ГОСТ 15150.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

Эксплуатация

Комплект изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие качества Комплектов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.
- Гарантийный срок годности стерильных Комплектов 4 года с даты их стерилизации, нестерильных Комплектов 5 лет с даты их изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Использованные изделия относятся к отходам класса А или Б и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).
- Допускается утилизировать изделия, утратившие товарный вид, вместе с бытовым мусором.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Пелигрин Матен» (ООО «Пелигрин Матен»)

Юридический адрес производителя: Россия, 17574, г. Москва, проезд Одоевского, д.3, кор.7., эт.1, пом.II, оф.97. Тел. +7 (495) 785-56-71. E-mail: info@peligrin.ru.

Адреса мест производства:

ООО «Санте», Россия, 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, Каширское шоссе, дом 11.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются в:

Общество с ограниченной ответственностью «Пелигрин Матен» (ООО «Пелигрин Матен»)

Телефон: +7 (495) 785-56-71

Адрес электронной почты: info@peligrin.ru

СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и нестерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-002-84005787-2008

1. Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-002-84005787-2008:

- Комплект №1 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Комплект № 2 стерильный (вид 330720).
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Комплект №3 стерильный (вид 330720).
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Комплект №4 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Комплект № 5 стерильный (вид 330720).
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Комплект №6 стерильный (вид 330720).
- Головной убор типа «Шлем» - не более 10 шт.
- Комплект № 7 стерильный (вид 330720).
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект №8 стерильный (вид 330720).
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект № 9 стерильный (вид 330720).
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар.
- Комплект №10 стерильный (вид 330720).
- Наручники – не более 10 пар.
- Комплект №11 стерильный (вид 330720).
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект № 12 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Комплект № 13 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №14 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект № 15 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Комплект №16 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект №17 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Комплект №18 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.

- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- **Комплект №19 стерильный (вид 330720).**
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- **Комплект №20 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- **Комплект №21 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- **Комплект №22 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- **Комплект №23 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект №24 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт..
- **Комплект №25 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска хирургическая – не более 10 шт.
- **Комплект №26 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска хирургическая – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- **Комплект №27 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска хирургическая – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект №28 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска хирургическая – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- **Комплект №29 стерильный (вид 330720).**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.

- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Маска хирургическая – не более 10 шт
- Комплект № 30 стерильный (вид 330720).
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Маска хирургическая – не более 10 шт.
- Комплект №31 стерильный (вид 330720).
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Фартук хирургический – не более 10 шт
- Комплект №32 стерильный (вид 330720).
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Комплект №33 стерильный (вид 330720).
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №34 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Комплект №35 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Маска медицинская – не более 10 шт
- Комплект №36 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Маска медицинская – не более 10 шт
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект №37 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Маска медицинская – не более 10 шт
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Комплект №38 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт
- Комплект № 39 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Комплект №40 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект №41 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.

- Маска медицинская – не более 10 шт
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- **Комплект №42 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- **Комплект №43 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект №44 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт..
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- **Комплект №45 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- **Комплект №46 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- **Комплект №47 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- **Комплект № 48 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- **Комплект №49 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект №50 стерильный (вид 330720).**
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар

- Комплект №51 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект №52 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Комплект №53 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Комплект №54 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №55 стерильный (вид 330720).
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект №56 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №57 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект №58 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект №59 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №60 стерильный (вид 330720).
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №61 стерильный (вид 330720).
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №62 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект № 63 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект №64 стерильный (вид 330720).
- Фартук хирургический – не более 10 шт.

- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар.
- Комплект №65 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар.
- Нарукавники – не более 10 пар
- Комплект №66 стерильный (вид 330720).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Шлем» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.

II. Комплект одежды хирурга, из нетканых материалов, одноразовый, нестерильный «Пелигрин» по ТУ 9398-002-84005787-2008:

- Комплект №1 нестерильный (вид 330730)
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Комплект №2 нестерильный (вид 330730)
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Комплект №3 нестерильный (вид 330730)
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Комплект №4 нестерильный (вид 330730)
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Комплект №5 нестерильный (вид 330730)
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Комплект №6 нестерильный (вид 330730)
- Головной убор типа «Шлем» - не более 10 шт.
- Комплект №7 нестерильный (вид 330730)
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект №8 нестерильный (вид 330730)
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект №9 нестерильный (вид 330730)
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Комплект №10 нестерильный (вид 330730)
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Комплект №11 нестерильный (вид 330730)
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Комплект №12 нестерильный (вид 330730)
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Комплект № 13 нестерильный (вид 330730)

- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- **Комплект № 14 нестерильный (вид 330730)**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар.
- **Комплект №15 нестерильный (вид 330730)**
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект №16 нестерильный (вид 330730)**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект № 17 нестерильный (вид 330730)**
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- **Комплект №18 нестерильный**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт..
- **Комплект № 19 нестерильный**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- **Комплект №20 нестерильный (вид 330730)**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект №21 нестерильный (вид 330730)**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- **Комплект №22 нестерильный (вид 330730)**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- **Комплект № 23 нестерильный (вид 330730)**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- **Комплект №24 нестерильный (вид 330730)**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- **Комплект №25 нестерильный (вид 330730)**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- **Комплект №26 нестерильный (вид 330730)**
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.

- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект №27 нестерильный (вид 330730)
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Комплект №28 нестерильный (вид 330730)
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Комплект №29 нестерильный (вид 330730)
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар
- Комплект №30 нестерильный (вид 330730)
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Куртка хирургическая – не более 10 шт
- Брюки хирургические – не более 10 шт..
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар
- Комплект №31 нестерильный (вид 330730)
- Нарукавники – не более 10 пар
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Комплект №32 нестерильный (вид 330730)
- Халат хирургический – не более 10 шт
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Комплект №33 нестерильный (вид 330730)
- Бахилы хирургические высокие - не более 10 пар
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Комплект №34 нестерильный (вид 330730)
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар.
- Нарукавники – не более 10 пар.
- Комплект №35 нестерильный (вид 330730).
- Халат хирургический – не более 10 шт.
- Куртка хирургическая – не более 10 шт.
- Брюки хирургические – не более 10 шт.
- Фартук хирургический – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Колпак» – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Берет» – не более 10 шт.
- Головной убор типа «Шлем» – не более 10 шт.
- Бахилы хирургические высокие – не более 10 пар.
- Бахилы хирургические низкие – не более 10 пар.
- Маска медицинская – не более 10 шт.
- Нарукавники – не более 10 пар.

ОБЩИЙ ВИД МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Рисунок 1. Халат хирургический, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

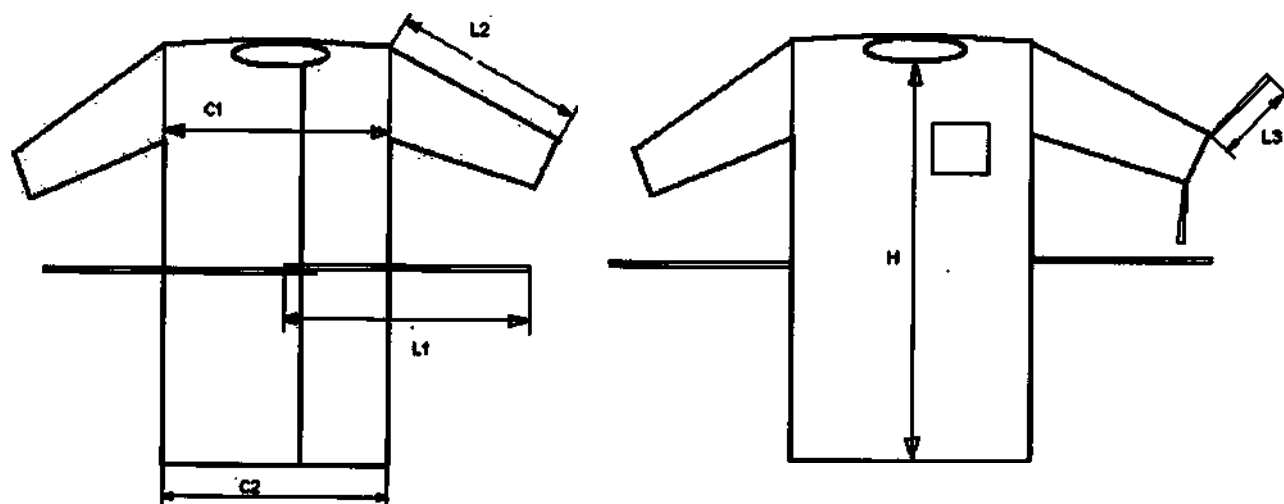


Рисунок 2. Куртка хирургическая, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

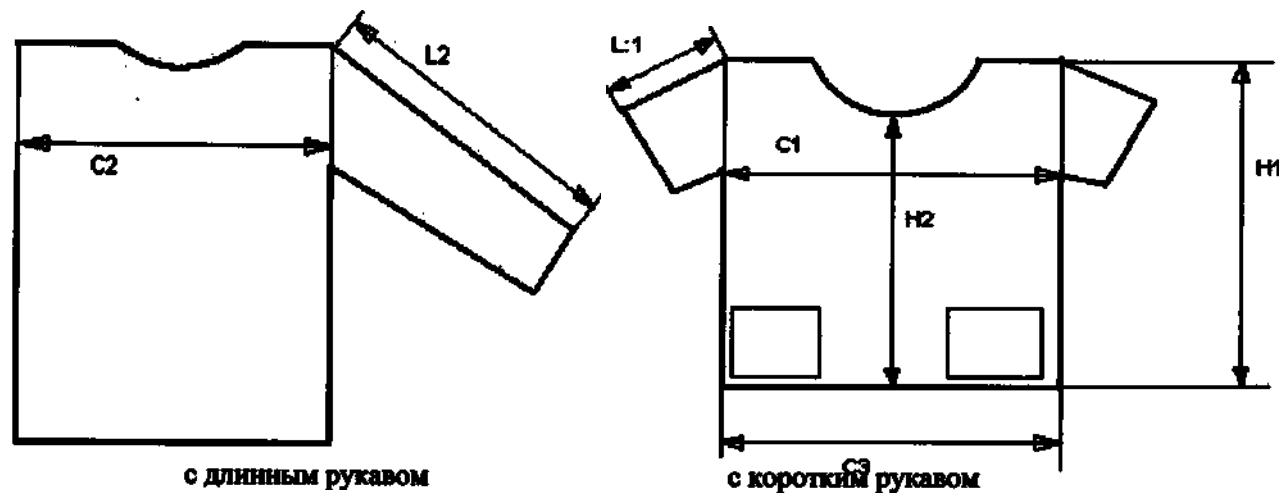


Рисунок 3. Брюки хирургические, размер 48 – 54, рост 170 – 182.

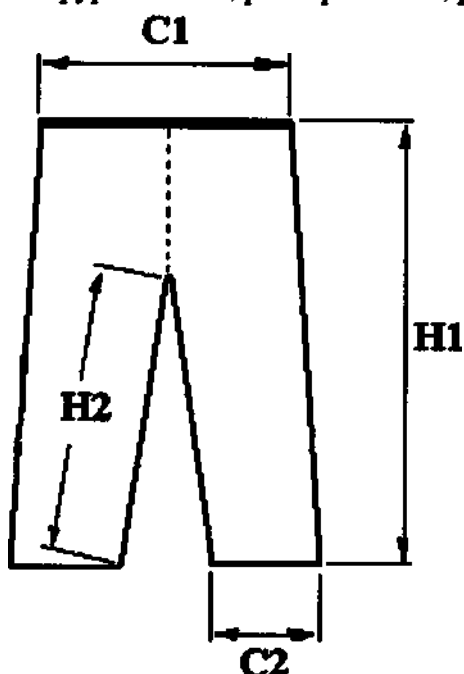


Рисунок 4. Фартук хирургический.

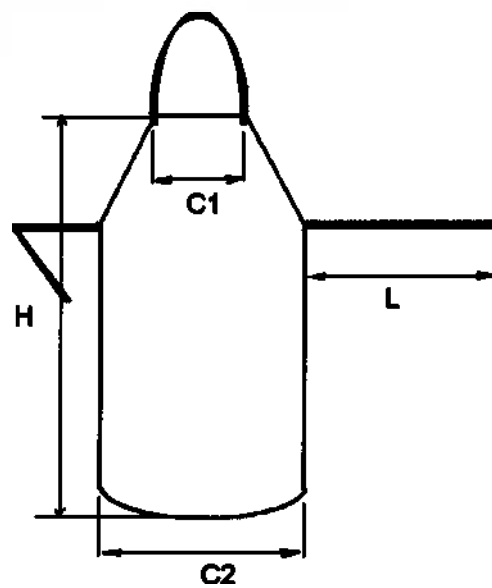


Рисунок 5. Головной убор типа «Колпак».

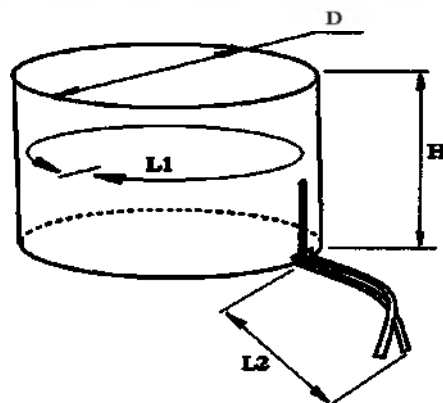


Рисунок 6. Головной убор типа «Берет».

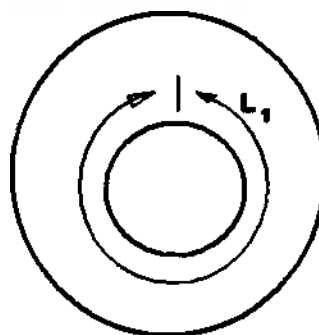


Рисунок 7. Головной убор типа «Шлем».



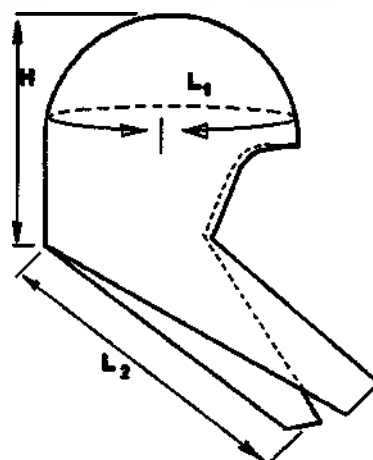


Рисунок 8. Бахилы хирургические (высокие и низкие).

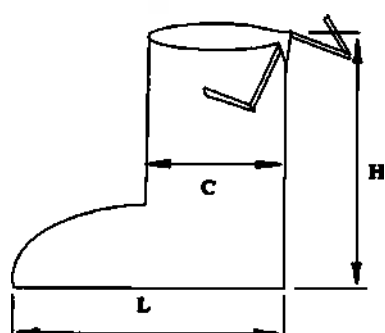


высокие

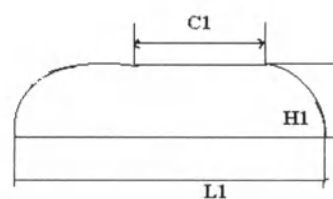

низкие

Рисунок 9. Нарукавники.

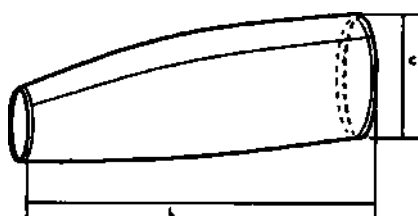

**МАТЕРИАЛЫ И ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ**

Наименование материала	Наименование изделий
Спанбонд (нетканый материал «Медиспан»). Производитель: ООО «Аяском». ТУ 8397-012-51256706-2006.	1. Халат хирургический; 2. Куртка хирургическая; 3. Брюки хирургические; 4. Фартук хирургический; 5. Головной убор (типа «Колпак», «Берет», «Шлем»); 6. Бахилы хирургические высокие и низкие; 7. Нарукавники.
СМС (нетканый материал из волокон полипропилена). Соответствует ГН 2.3.3.972-00. Производство: "PEGAS NONWOVENS s.r.o.", Чехия. или «Медиспан-СМ». Соответствует ГН 2.3.3. 972-00; СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Производство: ООО «Аяском». ТУ 8397-012-51256706-2006.	1. Халат хирургический; 2. Куртка хирургическая; 3. Брюки хирургические; 4. Фартук хирургический; 5. Головной убор (типа «Колпак», «Берет», «Шлем»); 6. Бахилы хирургические высокие и низкие; 7. Нарукавники.
Спанлейс (нетканый материал). Производитель: ООО «Авангард». ТУ 8390-003-56176857-2007.	1. Халат хирургический; 2. Куртка хирургическая; 3. Брюки хирургические; 4. Фартук хирургический; 5. Головной убор (типа «Колпак», «Берет», «Шлем»); 6. Бахилы хирургические высокие и низкие; 7. Нарукавники.
Айрлайд (нетканый материал). Производитель: ООО «Си-Айрлайд». ТУ 8390-001-13429727-2006.	1. Халат хирургический; 2. Куртка хирургическая; 3. Брюки хирургические; 4. Фартук хирургический; 5. Головной убор (типа «Колпак», «Берет», «Шлем»); 6. Бахилы хирургические высокие и низкие; 7. Нарукавники.
Нетканый материал вуденпалл. Производитель: SNA TRADE GROUP LTD, США. Соответствует МУ 1.1.037-95.	1. Халат хирургический; 2. Куртка хирургическая; 3. Брюки хирургические; 4. Фартук хирургический; 5. Головной убор (типа «Колпак», «Берет», «Шлем»); 6. Бахилы хирургические высокие и низкие; 7. Нарукавники.
Нетканая ламинированная пленка. Производитель: "Shaoxing Fuqing Health Products Co.", Китай. СЭЗ №77.01.16.224.П.059367.09.06. или Айрлайд ламинированный. Производитель: ООО «Си-Айрлайд». ТУ 8390-001-13429727-2003.	1. Халат хирургический; 2. Фартук хирургический; 3. Бахилы хирургические высокие и низкие; 4. Нарукавники.
Пленка полиэтиленовая. Производитель: ООО «Пластупаковка». ГОСТ 10354-82.	1. Фартук хирургический; 2. Бахилы хирургические высокие и низкие (подошва).
Покупные изделия:	
Производитель: «Xiantao Fortune Medical Supplies Co., Ltd», Китай.	Маска медицинская.



Строительные
и строительные
материалы
182