

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО "Завод "Оптик"

Т.Ю. Головач

2013 г



Код ОКП -94 8420

Инструкция по применению

Линз очковых с солнцезащитными покрытиями

(для защиты глаз от слепящей яркости видимого излучения и от воздействия ультрафиолетового излучения.)

Соответствует требованиям национальных стандартов: ГОСТ 30808-2002/ГОСТ Р 51044-97, ГОСТ Р 51854-2001, серии ГОСТ ISO 10993 - 2011, ТУ РБ 09429319.010-96 и технической документации производителя.

2013г.

Название изделия медицинского: линзы очковые бесцветные из неорганического стекла однофокальные стигматические с солнцезащитными покрытиями

Состав и описание изделия: линза очковая составных частей не содержит.

Область применения: Линзы очковые с солнцезащитными покрытиями применяются для защиты глаз от слепящей яркости видимого излучения и от воздействия ультрафиолетового излучения. Применяются в офтальмологии для коррекции зрения и предназначены для повседневного пользования.

При эксплуатации линз с покрытиями не требуется дополнительных мер безопасности

Линзы с солнцезащитным покрытием изготавливаются с коэффициентом ослабления света 40-55%.

Способ применения: линзы очковые вставляют в очковые оправы

Пример условного обозначения однофокальной стигматической очковой линзы диаметром 70 мм, II группы, имеющей значение задней вершинной рефракции -3,0 дптр, с солнцезащитным покрытием коричневого цвета с коэффициентом ослабления света 40% в климатическом исполнении У 1.1:

Линза очковая солнцезащитная ОС Ø 70 II-3,0-II-коричневый- 40 У 1.1

Линзы очковые бесцветные из неорганического стекла однофокальные стигматические с солнцезащитным покрытием требуют бережного отношения как ко всем стеклянным изделиям, должны переноситься в конвертах и в коробках. Обслуживающий персонал при выполнении работ по вставке линз очковых в оправы должен иметь квалификацию оптиков – механиков по изготовлению очков.

Перед вставкой линз в очковую оправу следует проверить абсолютное значение номинальной величины задней вершинной рефракции на диоптриметре в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. Вставка линз в очковую оправу производится по технологическому процессу (инструкции) эксплуатирующих организаций (салонов-магазинов, мастерских и др.) и инструкциям по эксплуатации обрабатывающего оборудования.

Технического обслуживания и ремонта линз не требуется.

Условия хранения Хранение линз по группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов, вызывающих порчу покрытия.

Транспортировка и хранение: Ящики с линзами должны транспортироваться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование линз - по группе условий хранения 5 (Ж 2) ГОСТ 15150.

При транспортировании ящики должны быть закреплены так, чтобы исключить возможность их перемещения.

Срок службы: 2 года. За предельное состояние принимается состояние, при котором коэффициент ослабления света более чем на 10 % отличается от номинального значения.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства, контактная информация.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Изделия ОАО «Завод «Оптик» изготавливаются с применением современных передовых технологий с целью обеспечения высокого качества. ОАО «Завод «Оптик» максимально обеспечит Вас необходимой информацией и Вы получите любую консультацию обратившись по адресу:
Республика Беларусь, ОАО «Завод «Оптик»
231300 г. Лида, ул. Машерова, 10
тел. +375(154) 54-54-69; +375(154) 54-57-98,
e-mail: optic@mail.lida.by

Утилизация и уничтожение: Изделие не содержит опасных компонентов. Потерявшие свои потребительские свойства или с истекшим сроком годности изделие считается непригодным к медицинскому применению и подлежит уничтожению субъектом обращения изделия, в распоряжении которого оно находится, в установленном законодательством порядке.

Заместитель директора по
Техническому развитию



А.А.Ермолаев

Главный специалист по
управлению качеством



Е.А.Соколов


Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

3

листов(а)

три листа

Директор

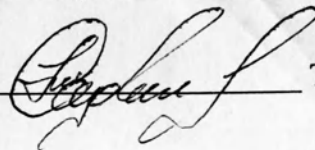

Т.Ю.Головач



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО "Завод "Оптик"

Т.Ю. Головач

2013 г



Код ОКП –94 8420

**Инструкция по применению
Линз очковых с АС-покрытием**

(для снижения утомляемости глаз при работе на компьютере)

Соответствует требованиям национальных стандартов: ГОСТ 30808-2002/ГОСТ Р 51044-97, ГОСТ Р 51854-2001, серии ГОСТ ISO 10993 - 2011, ТУ РБ 09429319.010-96 и технической документации производителя.

2013г.

Название изделия медицинского: линзы очковые бесцветные из неорганического стекла однофокальные стигматические с АС-покрытием – для работы на компьютере

Состав и описание изделия: линза очковая составных частей не содержит.

Область применения: Линзы очковые с АС-покрытием применяются в корригирующих очках для снижения утомляемости глаз при работе на компьютере. Применяются в офтальмологии для коррекции зрения и предназначены для повседневного пользования.

Линзы с АС-покрытием противопоказаны лицам с аномальным восприятием цветового изображения, а также с выраженной степенью астигматизма

При эксплуатации линз с покрытиями не требуется дополнительных мер безопасности

Способ применения: линзы очковые вставляют в очковые оправы.

Линзы с АС-покрытием рекомендуется применять в очковой оправе с шайбами диаметра по высоте не менее 4 см, по ширине не менее 5 см.

Пример условного обозначения:

- однофокальной стигматической очковой линзы диаметром 70 мм, II группы, имеющей значение задней вершинной рефракции + 4,0 дптр, с АС-покрытием в климатическом исполнении У 1.1:

Линза очковая АС ОС Ø 70 II+4,0 У 1.1

Линзы очковые бесцветные из неорганического стекла однофокальные стигматические с АС-покрытием требуют бережного отношения как ко всем стеклянным изделиям, должны переноситься в конвертах и в коробках. Обслуживающий персонал при выполнении работ по вставке линз очковых в оправы должен иметь квалификацию оптиков – механиков по изготовлению очков.

Перед вставкой линз в очковую оправу следует проверить абсолютное значение номинальной величины задней вершинной рефракции на диоптриметре в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. Вставка линз в очковую оправу производится по технологическому процессу (инструкции) эксплуатирующих организаций (салонов-магазинов, мастерских и др.) и инструкциям по эксплуатации обрабатывающего оборудования.

Технического обслуживания и ремонта линз не требуется.

Условия хранения: Хранение линз по группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов, вызывающих порчу покрытия.

Транспортировка и хранение: Ящики с линзами должны транспортироваться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование линз - по группе условий хранения 5 (Ж 2) ГОСТ 15150.

При транспортировании ящики должны быть закреплены так, чтобы исключить возможность их перемещения.

Срок службы линз – не менее 2 лет

Гарантийный срок эксплуатации: – 18 месяцев со дня получения линз потребителем.

Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства, контактная информация.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Изделия ОАО «Завод «Оптик» изготавливаются с применением современных передовых технологий с целью обеспечения высокого качества.

ОАО «Завод «Оптик» максимально обеспечит Вас необходимой информацией и Вы получите любую консультацию обратившись по адресу: Республика Беларусь, ОАО «Завод «Оптик»

231300 г. Гродненская область,

г. Лида, ул. Машерова, 10

тел. +375(154) 54-54-69; +375(154) 54-57-98,

e-mail: optic@mail.lida.by

Утилизация и уничтожение: Изделие не содержит опасных компонентов. Потерявшие свои потребительские свойства или с истекшим сроком годности изделие считается непригодным к медицинскому применению и подлежит уничтожению субъектом обращения изделия, в распоряжении которого оно находится, в установленном законодательством порядке.

Заместитель директора по
техническому развитию



А.А.Ермолаев

Главный специалист по
управлению качеством



Е.А.Соколов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

3

листов(а)

три листа

Директор

Т.Ю.Головач

