

Эксплуатационная документация МИ

Обувь ортопедическая малосложная «LUOMMA»

(ТУ 8820-002-63055870-2013)

Варианты исполнения:

Детская, сандалии с открытым носком, артикулы: LM 100 – 130.

Детская, сандалии с закрытым носком, артикулы: LM 200 – 230.

Детская, ботинки, артикулы: LM 300 – 330.

Мужская, ботинки, артикулы: LM 400 – 430.

Мужская, туфли, артикулы: LM 600 – 630.

Женская, ботинки, артикулы: LM 500 – 530.

Женская, туфли, артикулы: LM 700 – 730.

Мужская и женская, Туфли домашние, артикулы: LM 800 – 830.

Генеральный директор ООО «Экотен»



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "А.Г. Осипов", written over a horizontal line.

А.Г. Осипов

Назначение: для восстановления или компенсации статико-динамической функции детей и взрослых, имеющих умеренно выраженные деформации нижних конечностей. Вид обуви и режим применения обуви (длительность, частота ношения, использования) строго по назначению врача. Материалы изготовления указаны на изделии.

Принцип действия обуви:

- анатомически правильное положение стопы;
- перераспределение нагрузки по стопе;
- поддержка продольного и поперечного сводов стопы;
- уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы, позвоночник.

Показания к применению:

- умеренно выраженные деформации нижних конечностей
- анатомическое плоскостопие
- функциональное плоскостопие
- плоско-вальгусная (х-образная) деформация стоп
- варусная деформация стоп (о-образная)
- при заболеваниях на фоне функциональной недостаточности статических деформаций
- деформирующий артроз, шпора пяточной кости
- при начальных степенях полой деформации стопы
- продольное плоскостопие I, II, III степени

Противопоказания к применению:

- выраженные стойкие деформации стопы
- местные поражения кожи стоп
- периферические ангиопатии II-III ст.

Побочные действия: не выявлено.

Условия применения: домашние условия, улиц, медицинские организации.

Основные особенности:

- жесткий задник с продленным внутренним крылом (не позволяет пятке «заваливаться» внутрь или наружу)
- мягкая стелька-супинатор (небольшая поддержка продольного (внутреннего) свода стопы)
- открытый носок
- Способ фиксации на стопе: Застежка «Велкро»
- полная раскрываемость модели
- мягкий верхний кант задника
- рисунок на ходовой поверхности подошвы (позволяет анализировать динамику деформации стоп)
- каблук THOMAS (каблук имеет внутренний крокуль для профилактики гиперпронации, предохраняет от подворачивания стопы) – на детской обуви.
- подошва из полиуретана обладает противоскользящим эффектом
- основные материалы изготовления обуви: натуральная кожа, войлок, полиуретан.

Способ применения:

- Полностью раскройте застёжки обуви.
- Наденьте обувь на стопы, при необходимости используя обувную ложку, чтобы не поломать пяточную часть обуви.
- Плотнo зафиксируйте обувь на стопе.
- Не снимайте обувь, наступая на задник.

При эксплуатации изделий следует соблюдать условия:

- использовать строго по назначению и в соответствии с размерами стопы. Обувь не должна причинять неприятных ощущений, стопа не должна быть сжата;
- просушивать при комнатной температуре: не допускается сушка на нагревательных поверхностях (обогревательных радиаторах);
- не подвергать воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ.
- не допускается контакт обуви с концентрированными растворами кислот, щелочей, красящими веществами, нефтепродуктами и растворителями;
- обувь необходимо менять по мере роста стопы.
- длительное намокание подошвы обуви может привести к потере ее функциональных свойств, поэтому не рекомендуется длительно использовать обувь во влажных условиях.

Уход за обувью и ее хранение

Обувь необходимо чистить с применением влажной мягкой ткани, соблюдая правила ухода за кожаными изделиями.

Сушка обуви должна производиться при комнатной температуре. Не сушить на нагревательных приборах и в микроволновой печи.

Обувь при хранении должна быть защищена от прямых солнечных лучей, воздействия паров, газов и химических веществ. Обувь должна храниться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Условия хранения в упаковке: -50°C +40°C. Не допускается хранение изделий с маслами, кислотами, щелочами.

Комплект поставки: - обувь - 1 пара; - упаковка (картонная коробка) - 1 шт.; - памятка по пользованию - 1 экз.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 8820-002-63055870-2013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации обуви устанавливается со дня выдачи потребителю или с начала сезона 70 дней со дня приобретения, детской обуви – 45 дней. Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока ООО «Экотен» принимает претензии по качеству обуви и производит ремонт или безвозмездную замену обуви.

Утилизация: Утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Производитель и организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Экотен», адрес: Россия, 197110, г.Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.18, лит.А, пом. 10Н Телефон: +7(812) 325-09-04, адрес электронной почты: info@ecoten.ru

Макет этикетки на потребительской таре

Обувь ортопедическая малосложная "ЛИОММА"					
	<table><tr><td>LM-503.031</td><td>36</td></tr><tr><td colspan="2">полнота 3</td></tr></table>	LM-503.031	36	полнота 3	
LM-503.031	36				
полнота 3					
Цвет	Бежевый-перец				
Материал верха: Натуральная кожа					
Материал подкладки: Натуральная кожа					
Материал подошвы: Полиуретан					
Производитель: Экотен, Россия, 197110, г.Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.18, лит.А, пом.10Н (812)325-09-04; РУ РЗН 2014/1737 от 16.10.2014; ТУ 8820-002-83055870-2013; Гарантийный срок 70 дней, с даты продажи. Срок хранения 24 месяца, с даты изготовления. Срок службы не менее 12 месяцев; Использовать по назначению					
Дата производства: 25.03.2019 www.ecoten.ru	Штрих-код товара				

Пронумеровано и прошито

4 листов

Генеральный директор ООО "Экотен"



Осипов А.Г.

