

Код изделия
Дата выпуска
Код партии
Годен до


Дата выпуска 12.04.2019
Годен до 12.04.2024
Партия № 001 K

ИЗВЕЩЕНИЕ
Адрес: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
ЗАО «Оптимедсервис»
Тел: (347) 233-44-11, 233-44-12
Факс: (347) 233-44-11, 233-44-12
E-mail: info@optimed.ru, optimed@optimed.ru
453104, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145




Инструкция на медицинское изделие «Контейнер для хранения контактных линз»

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Контейнер для хранения контактных линз (далее по тексту - контейнер)
2. РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
3. АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.
4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Предназначен для хранения контактных линз.
5. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
В зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях, медицинское изделие «Контейнер для хранения контактных линз» относится к классу 1, в соответствии с ГОСТ 31508-2012.
6. ОПИСАНИЕ И ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
В каждую ячейку контейнера перед тем, как поместить в нее линзу, наливается раствор (поставляется отдельно), используемый пользователем, отсек контейнера закрывается крышкой и хранится согласно рекомендациям производителя МКЛ и раствора. После того, как линзы будут удалены из контейнера, остатки раствора необходимо слить, контейнер требуется промыть свежим раствором. Хранить в закрытом виде. При сильном загрязнении разрешается промыть моющим средством, например, для мытья посуды и тщательно ополоснуть под струей воды, вытереть насухо.
7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Контейнер для контактных линз применяется в домашних условиях для ежедневного ухода за контактными линзами, а именно, для хранения, когда линзы не используются владельцем.
8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не держать под прямыми солнечными лучами, не использовать для обработки контейнера агрессивные химические средства или абразивные вещества.
9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

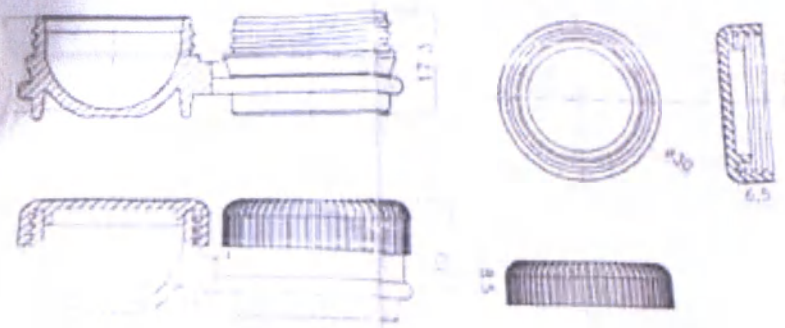

Параметр контейнера	Размер
Высота	17,3 ± 0,8 мм
Диаметр	30,0 ± 1,6 мм
Глубина ячейки	16,0 ± 0,8 мм
Высота крышки	8,5 ± 0,3 мм
Диаметр крышки	30,0 ± 1,6 мм
Глубина резьбы крышки	6,5 ± 0,2 мм
Высота с крышкой	19,0 ± 1,0 мм
Вес	12,2 ± 0,2 г

Общий вид медицинского изделия

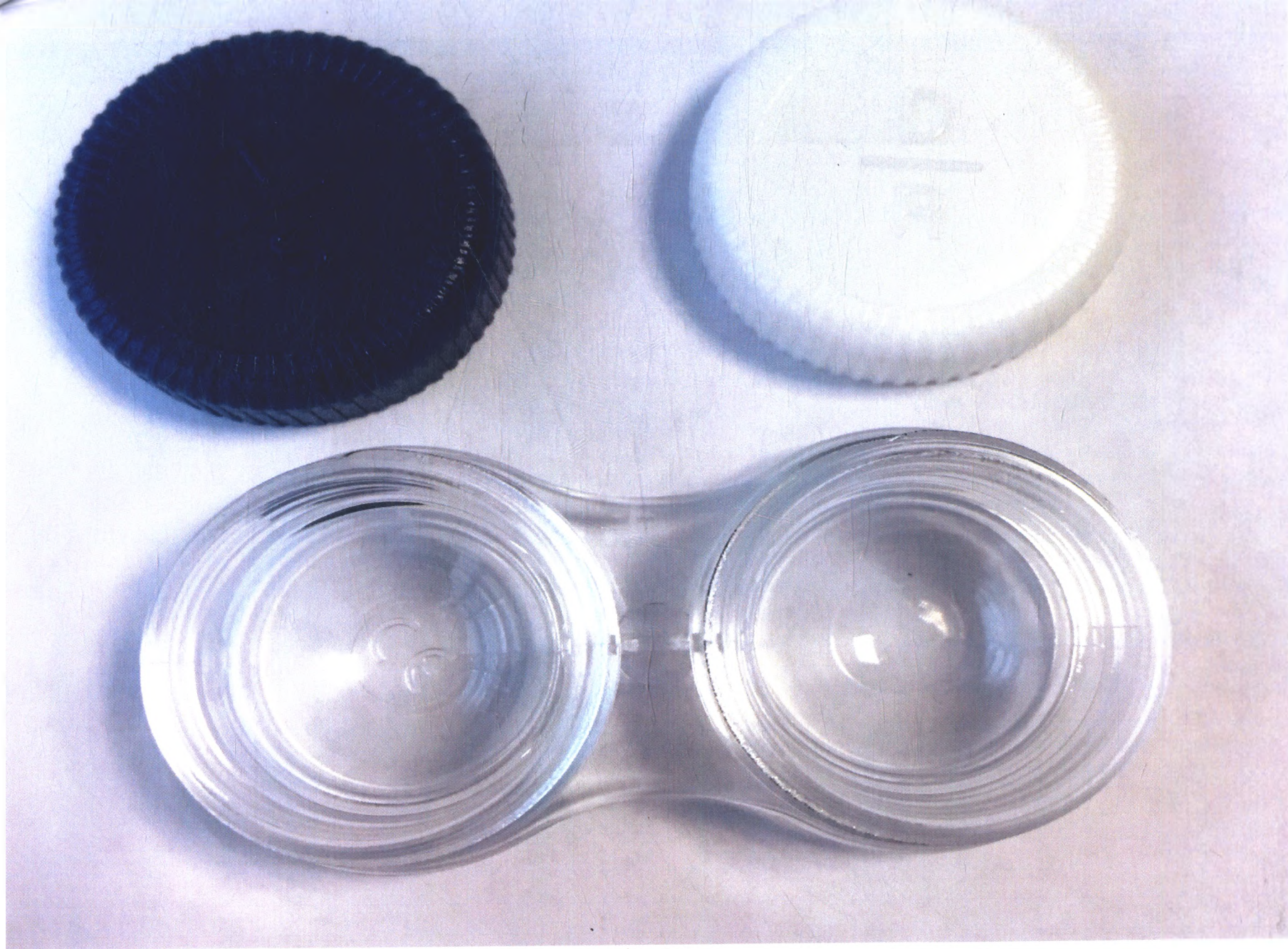

Общий вид медицинского изделия



Упаковка медицинского изделия

ЗАО "ОПТИМЕДСЕРВИС" Россия, РБ, 453128,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 145.

Адрес для корреспонденции: Россия, РБ, 450058,
Уфа, ул. 50 лет СССР, 8.

Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail: market@optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru

Произведено: 453102, РБ, г.Стерлитамак
ул. Воинов-Интернационалистов, 17.



КОНТЕЙНЕР для хранения контактных линз

по ТУ _____ РУ _____ от _____

ПРИМЕНЕНИЕ: Хранение контактных линз. Соблюдайте правила по уходу за контактными линзами, рекомендованные Вашим врачом.

ВНИМАНИЕ: Не использовать по истечении указанного срока годности. Хранить при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности не более 80% при 25°C. Беречь от детей. Не использовать более 1 месяца после вскрытия. Не держать под прямыми солнечными лучами, не использовать для обработки контейнера агрессивные химические средства или абразивные вещества.

Внимательно прочтите прилагаемую инструкцию.

Дата выпуска: 12.04.2019.

Годен до: 12.04.2024.

Партия №: 001 К

Маркировка медицинского изделия

