

Инструкция по применению фильтра ФСУ-МБ.

Фильтр ФСУ-МБ входит в состав комплекта «Костюм защитный противочумный Кварц-1М»

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед направлением изделия в эксплуатацию необходимо:

- убедиться в механической целостности корпуса, отсутствии вмятин на венчике горловины;
- после проверки ФСУ-МБ монтируется в составе средств индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ! Загрязненный воздух должен поступать в ФСУ-МБ через отверстие дна изделия.

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 В процессе эксплуатации ФСУ-МБ запрещается:

- подвергать изделие ударам, броскам, деформации и механическим повреждениям, которые могут привести к нарушению герметичности корпуса, мест соединения.
- Использовать изделие в условиях недостатка свободного кислорода (менее 16%) объемных;
- Применять изделие в комплекте СИЗ при наличии в атмосфере паров вредных веществ, кроме водорода.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 При получении ФСУ-МБ на руки произведите его монтаж со средством индивидуальной защиты в следующей последовательности.

- отвернуть колпачок с прокладкой с горловины фильтра и вынуть резиновую пробку из дна фильтра;
- присоединить ФСУ-МБ верхней горловиной к СИЗ.

ВНИМАНИЕ! Монтаж фильтра с СИЗ производить только в помещении с чистым воздухом.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить фильтры в крытых помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и грунтовых вод. Не допускается хранить фильтры совместно с летучими и агрессивными веществами, вызывающими коррозию деталей.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения фильтров ФСУ-МБ в упаковке предприятия изготовителя – два года.

Дата изготовления-.

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОМПЛЕКТОМ «КВАРЦ-1М»

1. Комплект специальной защитной одежды врача-инфекциониста «КВАРЦ-1М» (противочумный комплект I типа) предназначен для защиты органов дыхания и кожных покровов медперсонала инфекционных служб.
2. В состав изделия входят: комбинезон, шлем-маска в сборе, фильтр, резиновые бахилы, резиновые перчатки.
3. Надевать комплект необходимо в следующей последовательности:
 - надеть брюки комбинезона;
 - надеть рукава комбинезона (запрещается надевать одновременно оба рукава сразу во избежание разрывов комбинезона);
 - надеть бахилы, заправив под них брюки, завязать завязки бахил;
 - привернуть фильтр к шлем-маске и надеть ее (заранее прочитайте инструкцию по применению фильтра);
 - надеть шлем-маску, затянуть и завязать ленту по горловине шлем-маски;
 - заправить пелерину шлем-маски под комбинезон;
 - застегнуть текстильную застежку комбинезона снизу вверх без отверстий и складок;
 - надеть перчатки, заправив под них подрукавники, сверху опустить рукава комбинезона;
 - надеть вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона.
4. После окончания работы руки в перчатках обработать дезинфицирующим раствором и снять комплект, в следующей последовательности:
 - снять верхние перчатки;
 - развязать завязки и снять бахилы;
 - расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне;
 - поднять рукава комбинезона и спустить перчатки с подрукавников;
 - снять защитную оболочку шлема, развязать стягивающую ленту по горловине, снять шлем-маску, отвернуть фильтр;
 - комбинезон, бахилы, шлем без фильтра и перчатки сложить в мешки для обеззараживания;
 - снять перчатки и вымыть руки мыльным или дезинфицирующим раствором.

5. Дезинфекция изделия производится по окончании работ. В зависимости от характера проводимых работ соответственно осуществляйте ту или иную обработку изделия:
 - 5.1 Замочка комплекта изделия (кроме фильтра) в:
 - 3%-ом растворе хлоромина – 2 часа;
 - 6%-ом растворе перекиси водорода с 0,5% добавкой ПАВ – 2 часа;
 - 5.2 Пароформалиновая обработка при температуре $58 \pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 180 минут. После дезобработки изделие следует тщательно прополоскать в водопроводной воде.
 - 5.3 Стирка изделия производится с помощью поверхностно-активных веществ («Лотос» и др.). Шлем стирают ручным способом.
 - 5.4 Сушить изделие следует при температуре $158 \pm 1^{\circ}\text{C}$.
 - 5.4 Деконтаминация фильтра осуществляется:
 - в сушильном шкафу при температуре $160 \pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 4 часов;
 - автоклавированием в сетках при давлении 2 ат в течение 1,5 часа.
 6. Гарантийный срок эксплуатации 10 циклов автоклавирования.
 7. Гарантийный срок хранения комплекта 2 года со дня изготовления.

199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 3-Б

ООО «Д-Медфарм»

Тел./факс: (812) 322-17-32, 305-04-76

Дата изготовления..