


Фотографии медицинского изделия
«Набор реагентов COVID-19 IgM/IgG Ab Test для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу
иммунохроматографическим методом (25 тестов в упаковке).
Серия (партия): 20200406»

Производства компании Core Technology Co., Ltd., Китай

1. Набор реагентов COVID-19 IgM/IgG Ab Test для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу иммунохроматографическим методом (25 тестов в упаковке). Серии (партии): 20200406. Общий вид.



2. Тестовое устройство (тест-полоска) и пипетка в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем – 25 шт

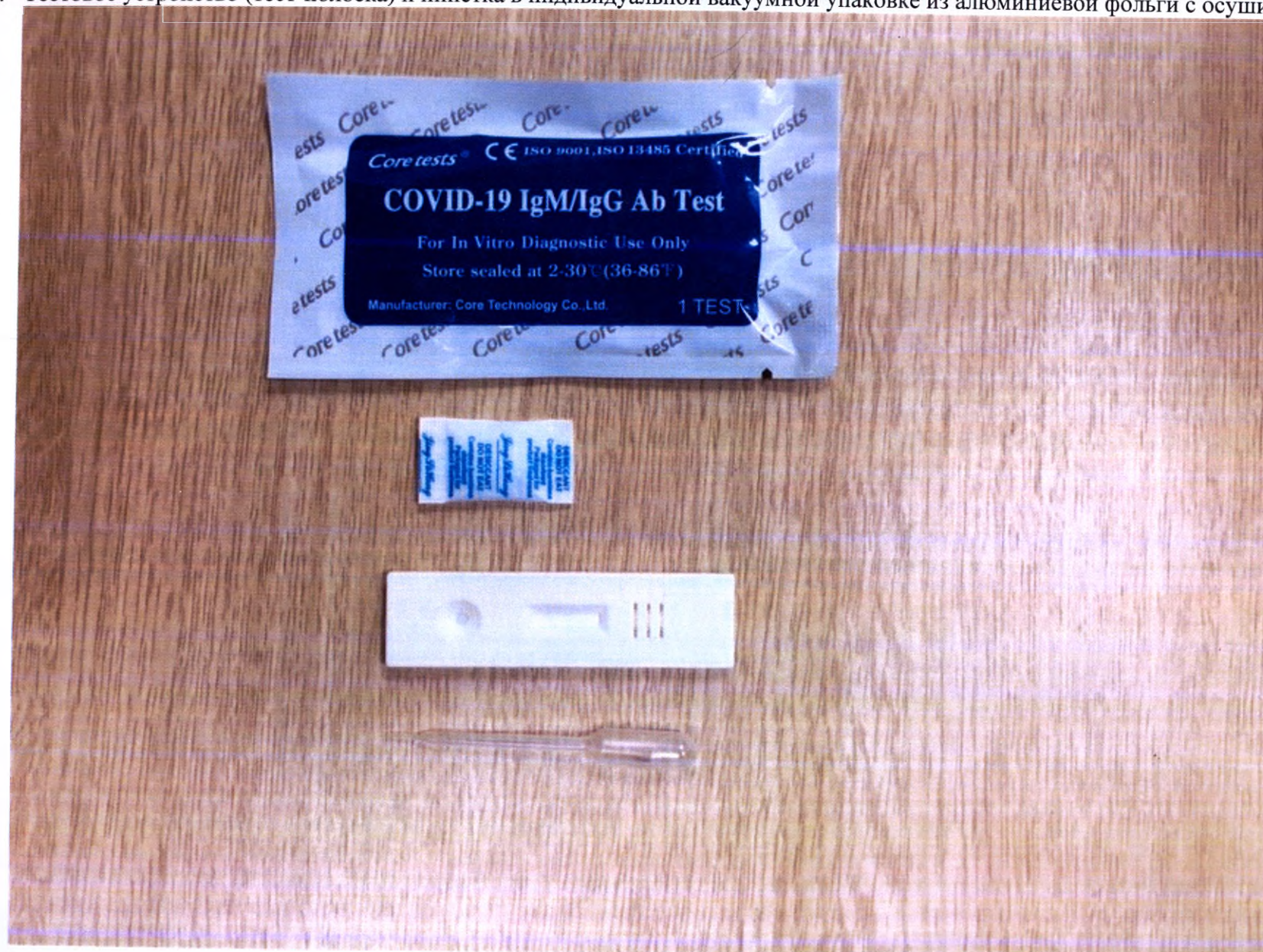


3. Раствор буферный – 1 флакон, объемом 4 мл




HOW TO USE?

a. Lay kit on a flat surface.
b. Add 1 drop of specimen to the sample well.
c. Add 2 drops of buffer to the sample well.

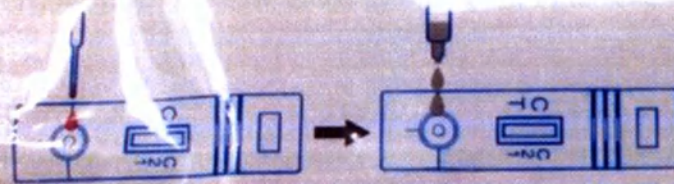

d. Read result within 15 minutes.

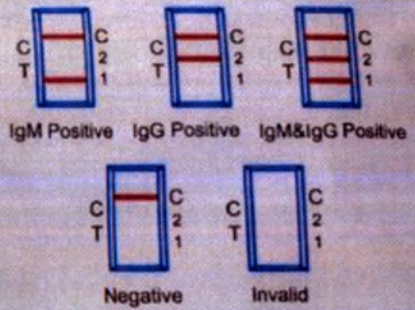

NOTE:

1. For In vitro diagnostic use only.
2. The test kit should remain in the sealed pouch until use.
3. Do not use test kit beyond the expiry date.
4. The test kit should not be reused.
5. Read the leaflet before use.

LOT 20200406

 2021/04/05

5. Маркировка. ЛОТ 20200406. Сторона 2



6. Проект маркировки на русском языке. Серия (партия): 20200406

Набор реагентов COVID-19 IgM/IgG Ab Test для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу иммунохроматографическим методом (25 тестов в упаковке). Серия (партия): 20200406

Состав:

1. Тестовое устройство (тест-полоска) и пипетка в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем – 25 шт
2. Раствор буферный – 1 флакон, объемом 4 мл
3. Инструкция по применению – 1 шт

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXX

Лот, срок годности, дата производства, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель:

Core Technology Co., Ltd.

Адрес: Room 100, C Building, No. 29 Life Park Road, Changping District, Beijing, 102206, China

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

АО «Р-Фарм»

Юр. адрес: 123154, г. Москва, улица Берзарины, дом 19, корпус 1

Почтовый адрес: 119421, Москва, Ленинский проспект, д. 111Б

Тел.: +7 (495) 956-79-37; +7 (495) 956-79-38,

Адрес электронной почты: info@rpharm.ru



Всего прошито, пронумеровано
скреплено печатью 7 листов
Подпись _____

[Handwritten signature]

