

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»



С.М. Хардина С.М. Хардина

«19» *мая* 2020 г.

**Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте
при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов
пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования
УППржд-02-"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-2012**

Руководство по эксплуатации



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 21.20.24.170
ТУ 9437-002-91531720-2012
Рег. уд. № ФСР 2012/14138 от __.__.20__г

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов

УППржд-02-«Медплант»

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942419.001.005 РЭ



*Перед началом работы с укладкой
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

Ver 003

Назначение: Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования УППржд-02-«Медплант» предназначена для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте.

Область применения: железнодорожный транспорт.

Основные технические характеристики набора:

Габаритные размеры: 230×90×190 мм.

Масса укладки с вложениями: 0,4 кг.

Комплект поставки:

1. Набор вложений (согласно Табл. 1);
2. Сумка медицинская универсальная СМУ-04.2;
3. Руководство по эксплуатации.

Описание изделия:

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования УППржд-02-«Медплант» выполнена в соответствии с *приложением 2 приказа МЗ РФ №498н от 5 мая 2012г.* и представляет собой комплект изделий медицинского назначения, позволяющий оказывать первую помощь пострадавшим на железнодорожном транспорте. Набор упакован в сумку медицинскую универсальную СМУ-04.2 (рис. 1).

Сумка СМУ-04.2 изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, передняя часть сделана прозрачной для обзора содержимого. Она имеет простую конструкцию и обеспечивает удобное расположение и быстрый доступ к вложениям. Для удобства переноски сумка снабжена ремешком на руку.

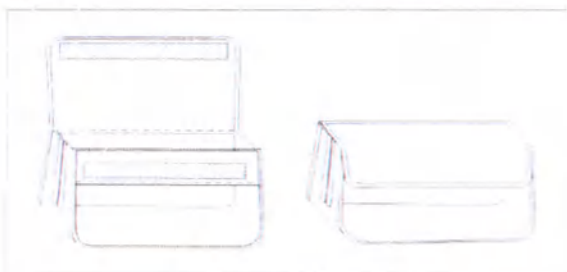


Рис. 1. Сумка СМУ-04.2.

Правила эксплуатации :

- 1) Перед началом работы с укладкой внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в её состав.
- 2) При транспортировке укладки и работе с ней избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению сумки и вложений. Чтобы исключить повреждения укладки не нагружайте её более чем на 1 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевают срок её службы.
- 3) По истечению сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств, и в случае их использования, укладку необходимо пополнить. Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.

- 4) Не допускается использование, в том числе повторное, изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.
- 5) После окончания работы не убирайте загрязнённое имущество обратно в сумку. Для сбора и утилизации отходов, а так же загрязненного имущества, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (п.п. 3.2. Табл. №1) или футляр-контейнер пластиковый (п.п. 3.3. Табл. №1).
- 6) Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения и оказанию первой помощи помогут Вам в работе с укладкой, но тем не менее к работе допускается только персонал, прошедший соответствующую подготовку по оказанию первой медицинской помощи.
- 7) При необходимости дезинфекция сумки СМУ-04.2 производится 2-х кратным протиранием салфеткой, смоченной в 3 %-ном растворе хлорамина, с интервалом 15 мин. и выдержкой после этого 60 мин. (по МУ287-113).

Обработка сумки спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается!!!

Гарантии изготовителя: гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на вложения (перевязочные и расходные материалы, одноразовые медицинские изделия производства сторонних организаций).

Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

ООО «МЕДПЛАНТ», адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт. 2, пом. I, ком. 296-318

телефон: 8 (495) 223-6016;

e-mail: medplant@medplant.ru.

Перечень вложений

п/п	Наименование	Кол-во
1	<i>Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран</i>	
1.1	Жгут кровоостанавливающий резиновый	1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x10 см	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x14 см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x5 см	1 шт.
1.5	Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	1 шт.
1.7	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.8	Салфетки марлевые медицинские стерильные №10 16 см x 14 см	1 уп.
2	<i>Прочие изделия медицинского назначения</i>	

2.1	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размером не менее «М»	2 пар
2.2	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками	2 шт.
2.3	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые 12,5 см x 11,0 см	3 шт.
3	Прочие средства	
3.1	Рекомендации с пиктограммами	1 шт.
3.2	Мешок полиэтиленовый с зажимом размером не менее 20 см x 25 см	1 шт.
3.3	Футляр-контейнер пластиковый	1 шт.
3.4.	Маркер перманентный черного цвета	1 шт.

Свидетельство о приёмке: Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования УППржд-02-«Медплант» в сумке тканевой медицинской универсальной СМУ-04.2 (арт. 1162) соответствует ТУ 9437-002-91531720-2012 и признана годной к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

прописью

_____) ЛИСТОВ

Хардина С.М.

ПОДРИСЬ

