



Diagnostics

e-CHECK[®] (XE)



e-CHECK (XE) –L 4.5мл x 8 фл.

Контрольный материал, низкий уровень

e-CHECK (XE) –N 4.5мл x 8 фл.

Контрольный материал, нормальный уровень

e-CHECK (XE) –H 4.5мл x 8 фл.

Контрольный материал, высокий уровень

Назначение

e-CHECK (XE) – это гематологический контрольный материал, предназначенный главным образом для внутрилабораторного контроля качества автоматических и полуавтоматических систем анализа крови. e-CHECK (XE) может быть использован для внешнего контроля качества. Не используйте e-CHECK (XE) для калибровки анализаторов.

Методология и принцип метода

e-CHECK (XE)- стабилизированный препарат клеток крови и используется в качестве гематологической контрольной крови для контроля качества гематологических анализаторов X-серии. Результаты исследования оцениваются в Quality Control Mode и должны находиться в пределах ожидаемых значений, указанных в прилагаемом листе значений.

Состав

Стабилизированные человеческие эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в физиологическом растворе.

Меры предосторожности

Не глотать!

e-CHECK (XE) был протестирован методами и техникой U.S FDA и является негативным (безопасным) к поверхностному антигену гепатита В, не реактивным к HIV(HIV-1/HIV-2), гепатиту С и сифилису. Поскольку не существует методов, гарантирующих полное отсутствие инфекций, патогенных для человека, этот продукт должен использоваться как потенциально инфицированный, в соответствии с рекомендациями CDC/NIH "Биологическая безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях", уровень 2.

Если результаты тестирования e-CHECK (XE) находятся вне пределов ожидаемых значений, указанных в прилагаемом листе значений, источником ошибок может быть контрольная кровь, реагенты или анализатор.

Выполните следующие мероприятия:

1. Убедитесь, что анализатор не требует технического обслуживания и чистки.
2. Проверьте сроки годности используемых реагентов, отсутствие признаков микробного заражения, убедитесь, что реагенты не были заморожены и т.д.
3. Проверьте сроки годности контрольной крови, убедитесь что она не подвергалась заморозке и правильно хранилась.
4. Исследуйте новый, неоткрытый флакон контрольной крови (срок годности открытого флакона –не более 7 дней)
5. Обратитесь в отдел профессионального сервиса

CE



Diagnostics

e-CHECK[®](XS)

e-CHECK (XS) –L 1.5мл x 4 фл.	Контрольный материал, низкий уровень
e-CHECK (XS) –N 1.5мл x 4 фл.	Контрольный материал, нормальный уровень
e-CHECK (XS) –H 1.5мл x 4 фл.	Контрольный материал, высокий уровень

Назначение

e-CHECK (XS) – это гематологический контрольный материал, предназначенный главным образом для внутрилабораторного контроля качества автоматических и полуавтоматических систем анализа крови. e-CHECK (XS) может быть использован для внешнего контроля качества. Не используйте e-CHECK (XS) для калибровки анализаторов.

Методология и принцип метода

e-CHECK (XS)- стабилизированный препарат клеток крови и используется в качестве гематологической контрольной крови для контроля качества гематологических анализаторов X-серии. Результаты исследования оцениваются в Quality Control Mode и должны находиться в пределах ожидаемых значений, указанных в прилагаемом листе значений.

Состав

Стабилизированные человеческие эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в физиологическом растворе.

Меры предосторожности

Не глотать!

e-CHECK (XS) был протестирован методами и техникой U.S FDA и является негативным (безопасным) к поверхностному антигену гепатита В, не реактивным к HIV(HIV-1/HIV-2), гепатиту С и сифилису. Поскольку не существует методов, гарантирующих полное отсутствие инфекций, патогенных для человека, этот продукт должен использоваться как потенциально инфицированный, в соответствии с рекомендациями CDC/NIH "Биологическая безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях", уровень 2.

Если результаты тестирования e-CHECK (XS) находятся вне пределов ожидаемых значений, указанных в прилагаемом листе значений, источником ошибок может быть контрольная кровь, реагенты или анализатор.

Выполните следующие мероприятия:

1. Убедитесь, что анализатор не требует технического обслуживания и чистки.
2. Проверьте сроки годности используемых реагентов, отсутствие признаков микробного заражения, убедитесь, что реагенты не были заморожены и т.д.
3. Проверьте сроки годности контрольной крови, убедитесь что она не подвергалась заморозке и правильно хранилась.
4. Исследуйте новый, неоткрытый флакон контрольной крови (срок годности открытого флакона –не более 7 дней)
5. Обратитесь в отдел профессионального сервиса



Diagnostics

EIGHTCHECK-3WP-N™

EIGHTCHECK-3WP-L™

EIGHTCHECK-3WP-H™

EIGHTCHECK-3WP-N	(ECN-110B) (ECN-120B)	1.5 mL x 12vials 4.6 mL x 12vials	Контрольный материал, нормальный уровень
EIGHTCHECK-3WP-L	(ECL-110B) (ECL-120B)	1.5 mL x 12vials 4.6 mL x 12vials	Контрольный материал, низкий уровень
EIGHTCHECK-3WP-H	(ECH-110B) (ECH-120B)	1.5 mL x 12vials 4.6 mL x 12vials	Контрольный материал, высокий уровень

Назначение

EIGHTCHECK-3WP – это гематологический контрольный материал, предназначенный главным образом для внутрилабораторного контроля качества автоматических и полуавтоматических систем анализа крови. EIGHTCHECK-3WP может быть использован для внешнего контроля качества. Не используйте EIGHTCHECK-3WP для калибровки анализаторов.

Методология и принцип метода

EIGHTCHECK-3WP - стабилизированный препарат клеток крови и используется в качестве гематологической контрольной крови для контроля качества гематологических анализаторов X-серии. Результаты исследования оцениваются в Quality Control Mode и должны находиться в пределах ожидаемых значений, указанных в прилагаемом листе значений.

Состав

Стабилизированные человеческие эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в физиологическом растворе.

Меры предосторожности


Не глотать!

EIGHTCHECK-3WP был протестирован методами и техникой U.S FDA и является негативным (безопасным) к поверхностному антигену гепатита В, не реактивным к HIV(HIV-1/HIV-2), гепатиту С и сифилису. Поскольку не существует методов, гарантирующих полное отсутствие инфекций, патогенных для человека, этот продукт должен использоваться как потенциально инфицированный, в соответствии с рекомендациями CDC/NIH "Биологическая безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях", уровень 2.

Если результаты тестирования EIGHTCHECK-3WP находятся вне пределов ожидаемых значений, указанных в прилагаемом листе значений, источником ошибок может быть контрольная кровь, реагенты или анализатор.

Выполните следующие мероприятия:

1. Убедитесь, что анализатор не требует технического обслуживания и чистки.
2. Проверьте сроки годности используемых реагентов, отсутствие признаков микробного заражения, убедитесь, что реагенты не были заморожены и т.д.

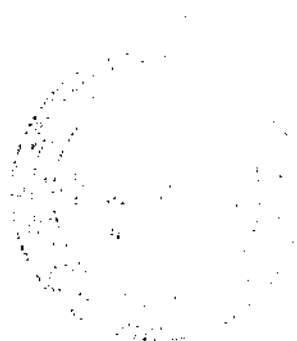

Diagnostics

SCS-1000

SCS-1000 SYSMEX калибратор

Производитель



SYSMEX CORPORATION JAPAN

1-5-1 Wakino-hama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Назначение

SCS-1000 – это гематологический калибровочный материал для гематологических анализаторов Sysmex. Предназначен для калибровки и верификации параметров WBC, RBC, HGB, HCT/MCV и PLT

Состав

Стабилизированные человеческие эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в физиологическом растворе.

Меры предосторожности

Не глотать!

SCS-1000 был протестирован методами и техникой U.S FDA и является негативным (безопасным) к поверхностному антигену гепатита В, не реактивным к HIV(HIV-1/HIV-2), гепатиту С и сифилису.

Поскольку не существует методов, гарантирующих полное отсутствие инфекций, патогенных для человека, этот продукт должен использоваться как потенциально инфицированный, в соответствии с рекомендациями CDC/NIH "Биологическая безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях", уровень 2.

Дополнительные реагенты и оборудование

SCS-1000 предназначен для использования ТОЛЬКО на анализаторах и реагентах Sysmex

Процедура приготовления

1. Выньте SCS-1000 из холодильника и оставьте для согревания при комнатной температуре (18-30 град) на 30 минут

2. Тщательно перемешайте содержимое флакона, путем покручивания его в течении 20 сек (не встряхивайте!)
3. Переверните флакон и снова покрутите 20 сек
4. Завершите перемешивание мягким переворачиванием флакона 12 раз и убедитесь, что содержимое флакона гомогенизировано.



5. Оставьте флакон на 15 сек на плоской поверхности перед анализом для удаления пузырьков воздуха

Хранение и стабильность

SCS-1000 хранится при 2-8 градС. Избегайте замораживания! Сроки годности неиспользованных