

Общество с ограниченной ответственностью
«МедКэр»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МедКэр»

Кузнецов П. А.



**Кровати медицинские функциональные механические
BASIC с принадлежностями**

Руководство по эксплуатации

154

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильной технической эксплуатации изделий кровати медицинские функциональные механические BASIC с принадлежностями (далее – кровати).

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделий, техническом обслуживании, транспортировке, а также условий хранения и сведения об упаковке.

К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие необходимый в условиях размещения изделия инструктаж по безопасной эксплуатации изделия.

Обслуживающий персонал не требует специальной подготовки для обслуживания изделий при эксплуатации. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на кровати медицинские функциональные механические согласно таблице 1.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Кровати медицинские функциональные механические предназначены для осуществления транспортировки и стационарного ухода за пациентом во всех лечебных учреждениях, а также для общего ухода в домашних условиях.

1.1.2. Основные параметры и размеры кроватей представлены в таблице 1

Таблица 1

№ пп	Номенклатурный номер	Кол-во секций, шт	Габаритные размеры	Регулировка угла наклона секции / подъёма ложа (есть/нет)
1	KY401S-52	4	2160x1000x520/780	спинной, ножной / есть
2	KY312S-53	4	2120x1000x520/720	спинной, ножной / есть
3	KY309S-53	4	2160x1000x480/720	спинной, ножной / есть
4	KY308S-32	4	2120x1000x480/625	спинной, ножной / есть
5	KY306S-52	4	2160x1000x520/780	спинной, ножной / есть
6	KY305S-52	4	2160x1000x480/720	спинной, ножной / есть
7	KY305S-32	4	2120x1000x480/720	спинной, ножной / есть
8	KY303S-32	4	2160x1000x480/720	спинной, ножной / есть
9	KY105S-32	4	2120x1000x500	спинной / нет
10	KY218S-32	4	2120x1000x500	спинной, ножной / нет
11	KY219S-53	4	2120x1000x540	спинной, ножной / нет
12	KY217S-52	4	2120x1000x500	спинной, ножной / нет
13	KY212S-32	4	2120x1000x500	спинной, ножной / нет
14	KY211S-32	4	2160x1000x500	спинной, ножной / нет
15	KY210S-12	4	2120x1000x500	спинной, ножной / нет
16	KY209S-32	3	2170x1000x500	спинной, ножной / нет
17	KY208S-31	3	2130x920x500	спинной, ножной / нет
18	KY203S-37	4	2000x920x500	спинной, ножной / нет
19	KY201S-16	4	2050x900x500	спинной, ножной / нет
20	KY302S-26	3	1970x870x580	спинной, ножной / нет

№ пп	Номенклатурный номер	Кол-во секций, шт	Габаритные размеры	Регулировка угла наклона секции / подъёма ложа (есть/нет)
21	KY103S-32	2	2170x1000x500	спинной / нет
22	KY102S-31	2	2050x900x530	спинной / нет
23	KY101S-11	2	2050x900x530	спинной / нет
24	KY016S-32	1	2120x1000x500	нет
25	KY016S-12	2	2120x1000x500	спинной / нет
26	KY015S-16	1	2050x900x500	нет
27	KY013S-31	1	2120x980x500	нет
28	KY013S-11	1	2120x980x500	нет
29	KY012S-11	1	2050x900x500	нет
30	KY011S-11	1	2050x900x500	нет
31	KYG403S-52	4	2160x1000x520/780	спинной, ножной / нет
32	KY301S-16	4	2060x900x520	спинной, ножной / нет
33	KYG201S-12	4	2200x1000x500	спинной, ножной / нет
34	KYQ07S	2	1900x550x740	нет
35	KYQ06S	2	1900x580x420	спинной / нет
36	KYQ01S	1	1950x640x500/900	спинной / есть

1.2 Характеристики (свойства) изделия:

1.2.1 Кровати медицинские функциональные механические выдерживают равномерно распределенную нагрузку массой 250 кг.

1.2.2 Материалы, используемые при изготовлении кроватей:

- каркас кроватей с боковыми ограждениями и без них (материал – стальной профиль);
- спинки (головная и ножная) изготовлены из пластика АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) с декоративными вставками «под дерево»;
- ограждения боковые изготовлены из стального профиля или полипропилена, оснащены рычагами клавишами для подъема-опускания;
- чехол матраца для кроватей из кожзаменителя.

1.2.3 Кровать имеет стационарные ножки или 4 роликовых колеса с индивидуальными тормозами или тормозным механизмом с центральным управлением.

2 Комплектация

Комплект поставки включает:

- кровать;
- принадлежности по согласованию с заказчиком;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.

Примечание: * возможна различная комплектация по требованию заказчика.

3 Устройство и эксплуатация

3.1 Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию. Ложе кровати имеет несколько секций. Кровать оснащена колесами с различными тормозными системами. Кровать имеет отверстие для установки дополнительного оборудования (инфузионной стойки, штанги для

подтягивания и тракционной рамы). В конструкции кровати предусмотрена подставка для судна и крючки для дополнительных приспособлений (дренажный мешок, мочеприемник и тп).

Регулировка положений секций осуществляется с помощью рычагов оборотно-складного типа. В исходном положении они находятся под торцевым ограждением в ножной части кровати.

Для регулировки секций надо выдвинуть рычаг из-под ограждения, сложенную ручку отвести в сторону. Вращая ручку, приведите секцию в необходимое положение.

3.2 Боковые ограждения легко складываются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к пациенту. В ножной части ограждения снизу расположен рычаг-клавиша. Нажав клавишу снизу вверх, ограждение легко опускается вниз, подняв ограждение, оно без усилий зафиксировывается.

3.3 Торцевые ограждения легко снимаются с упоров и вставляются на место. Для снятия с упоров снимите фиксаторы в виде крючков вверх. С внутренней стороны имеются два отверстия для установки дополнительных аксессуаров, таких как инфузионная стойка, устройство для подтягивания и т.п.

4 Техническое обслуживание

4.1 Кровати имеют простую и надежную конструкцию и не требуют специального обслуживания.

Механические части, ручной рычаг чистить и смазывать для продления срока эксплуатации изделия. Поверхности кровати протирайте тканью, слегка смоченной обычным дезинфицирующим раствором.

4.2 К сборке и разборке кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

5 Хранение

Хранение изделий должно обеспечиваться в сухих складских помещениях исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6 Транспортирование

Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50 град. До + 50 град. И относительной влажности 100% при температуре от + 25 град.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) страниц

Генеральный директор ООО «МедКэр»

Кузнецов П.А.

М. П.

» декабря 2012 год

