



пластыри медицинские на полимерной основе LUXPLAST
гемостатически наводяющие, 19x72 мм - 12 шт.

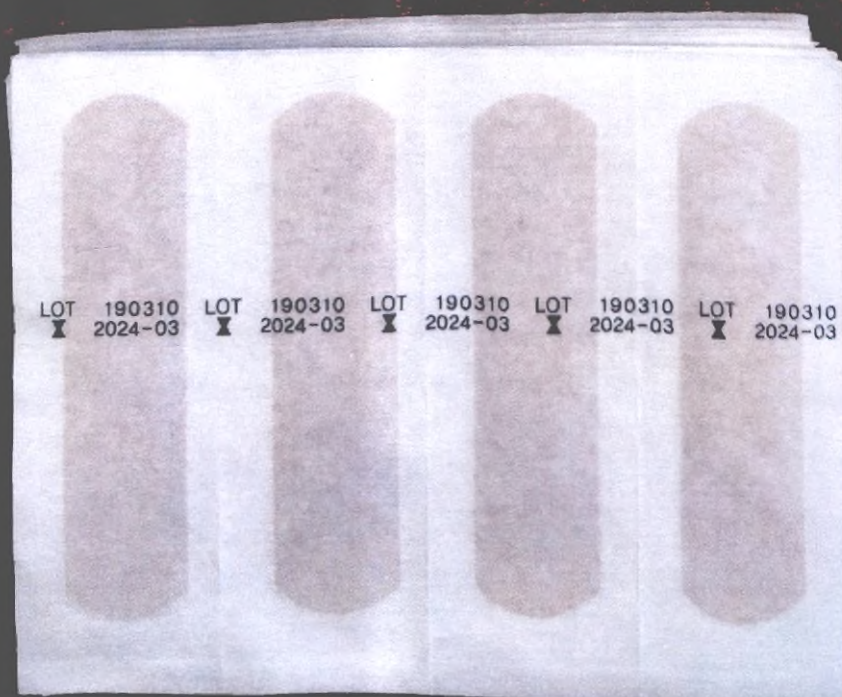

пластыри медицинские на полимерной основе LUXPLAST
кровоостанавливающие, 19 x 72 мм - 12 шт.

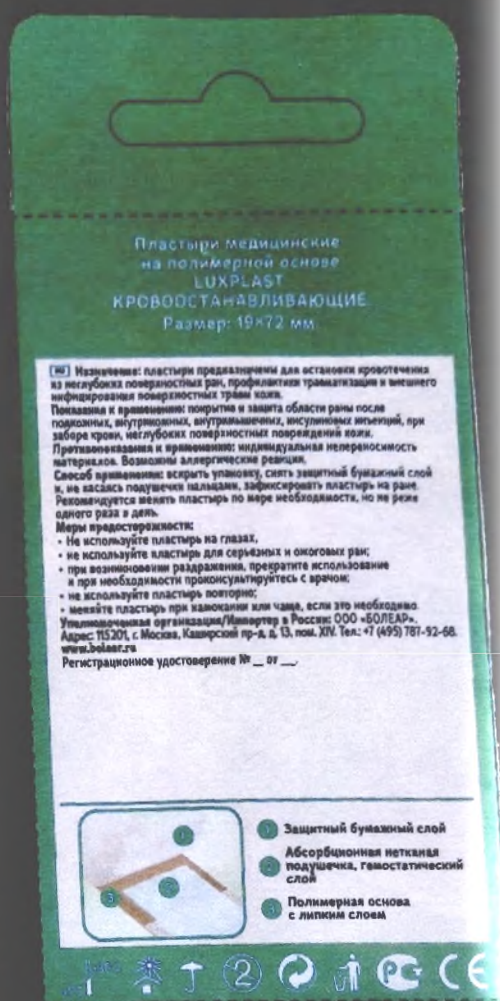

пластыри медицинские на полимерной основе LUXPLAST
кровоостанавливающие, 19x72 мм - 12 шт.

Пластыри медицинские
на полимерной основе
LUXPLAST
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ.
Размер: 19x72 мм.

RU Назначение: пластыри предназначены для остановки кровотечения из неглубоких поверхностных ран, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

Показания к применению: покрытие и защита области раны после подкожных, внутрикожных, внутримышечных, инсулиновых инъекций, при заборе крови, неглубоких поверхностных повреждениях кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов. Возможны аллергические реакции.

Способ применения: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и, не касаясь подушечки пальцами, зафиксировать пластырь на ране. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в день.

Меры предосторожности:


- Не используйте пластырь на глазах;
- не используйте пластырь для серьезных и ожоговых ран;
- при возникновении раздражения, прекратите использование и при необходимости проконсультируйтесь с врачом;
- не используйте пластырь повторно;
- меняйте пластырь при намокании или чаще, если это необходимо.

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Регистрационное удостоверение № __ от __.

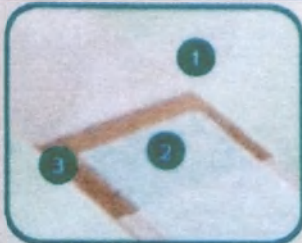

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбционная нетканая подушечка, гемостатический слой
- 3 Полимерная основа с липким слоем



Производитель:
Young Chemical Co., Ltd., 80-93, Golden rook-ro,
Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.



STERILE EO

LUXPLAST®

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"



Е.А. Колобова