

ООО «ЭликСи-мед»

129347 г. Москва ул. Ротерта дом 2

Тел.: (495) 755-11-09

Тел.: (495) 710-73-34

E-mail: eliksee@mail.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Салфетки спиртовые антисептические «ЭликСиСЕПТ»,

Салфетки предназначены для обработки рук медицинского персонала и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи.

Салфетки используются при оказании первой помощи в клинических, поликлинических условиях, в полевых условиях и населения в быту.

Салфетки представляет собой основу из нетканого материала, пропитанную спиртосодержащим раствором.

1. Открыть крышку пластиковой банки или полимерного контейнера
2. Вскрыть защитную пломбу из фольги
3. Открыть клапан на крышке банки или полимерного контейнера
4. Конец первой салфетки из середины рулона протянуть через прорезь в крышке
5. Вытянуть первую салфетку через крышку, оторвать и выбросить
6. Закрыть клапан пластиковой банки или полимерного контейнера
7. После каждого применения салфеток, плотно закрывать клапан на крышке.

Заявитель: ООО «ЭликСи-мед», 129347, г. Москва, ул. Ротерта дом 2,
ИНН 7716711880, тел: (495) 755-11-09, E-mail: eliksee@mail.ru,
ОГРН 1127746196445

Производитель: ЗАО НПО «Химсинтез», 141290, Московская обл.,
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.33, ИНН 5023001257