

КОД ОКП 93 9150



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Алиев А.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ватные валики EURONDA

Соответствует требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2000, ISO 13485:2003

Сертифицировано в соответствии с требованиями директивы 93/42 ЕЕС
и технической документации производителя.

Соответствует требованиям национальных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 11607-2003

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ватные валики EURONDA могут использоваться в стоматологической практике как материал, впитывающий жидкие выделения (слюну, слюножидкость, кровь и пр.).

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ватные валики EURONDA производятся из 100% натурального хлопка без использования химически активных веществ и хлора. Представляют собой пушистую массу волокон, слабо переплетённых между собой в различных направлениях. Имеют высокие показатели белизны (более 72%), капиллярности (85 мм), поглотительной способности (не менее 19 г/г волокна), не содержат сорных примесей, узелков, обладают высокой воздухопроницаемостью и фильтрующей способностью. Благодаря высокой пластичности принимают контур ротовой полости, обеспечивают высокую абсорбцию, сохраняя первичную форму.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Ватные валики EURONDA вводят в раскрытый рот пациента с помощью стоматологического пинцета для уменьшения слюноотделения, для сушки полости рта, для ввода медикаментов. Используются также в челюстной ортопедии, при запечатывании фиссур, при лечении детей, в эстетической реставрации. Перенос и удаление использованных ватных валиков осуществляется также при помощи стоматологического пинцета.

Ватные валики выпускаются разных размеров № 1, № 2, поэтому есть возможность выбора наиболее подходящего размера в каждом клиническом случае.

Ватные валики могут использоваться с дозаторами, которые выпускаются двух размеров: дозатор валиков большой, дозатор валиков малый.


ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ватные валики разрешено стерилизовать путем сухого прожаривания.

Использовать при стерилизации воды и пара не допускается.

Гарантийный срок годности 6 лет со времени изготовления.

Генеральный директор
ЗАО «Протеко»

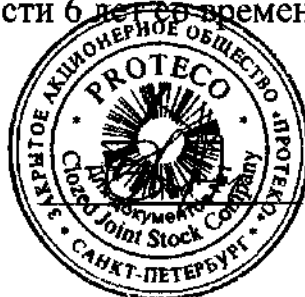

Алиев А.А.