



Версия/Version: №

RU Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство вяжущее стоматологическое для обработки
корневых каналов, при капиллярном кровотечении

«КАПРАМИН»

по ТУ 9391-029-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении «Капрамин» (далее по тексту – жидкость «Капрамин») применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии зубных камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала.

Стоматологическая жидкость «Капрамин» представляет собой готовую к применению жидкость в исполнении:

- на основе хлорида алюминия;
- на основе сульфата железа.

Стоматологическая жидкость «Капрамин» предназначена для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения.

Область применения – стоматология.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- остановка капиллярных кровотечений при повреждении слизистых оболочек, кровотечений из лунки зуба, апикальных кровотечений;
- ретракция десны при лечении пришеечного кариеса и снятии оттисков.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав жидкости.

Не использовать стоматологическую жидкость «Капрамин» на основе сульфата железа с препаратами, содержащими эпинефрин, т.к. их смешивание ведет к образованию темного осадка.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Действие стоматологической жидкости «Капрамин» основано на кровоостанавливающих и вяжущих свойствах основных действующих веществ: хлорида алюминия или сульфата железа.

Стоматологическая жидкость «Капрамин» на основе хлорида алюминия – это водный раствор хлорида алюминия, гемостатическое действие которого многократно усиливает входящий в состав препарата компонент цетримид, обладающий бактерицидными свойствами.

Стоматологическая жидкость «Капрамин» на основе сульфата железа это водный раствор действующего вещества - сульфата железа.

Стоматологическая жидкость «Капрамин» не токсична, проста в применении, легко смывается струей воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Снять крышку с флакона с жидкостью. Надеть на флакон крышку-капельницу (при наличии в комплекте). Смочить жидкостью тампон из стерильной ваты и наложить на кровоточащую поверхность, слегка прижимая, на 1-2 минуты, после чего тщательно промыть обработанный участок водой.

Для ретракции десны несколькими каплями жидкости пропитать нить и ввести в десневую бороздку. После достижения гемостаза (через 3-5 минут) удалить ретракционную нить и тщательно промыть водой препарируемую поверхность до полного удаления гемостатика.

После применения жидкости с флакона снять крышку-капельницу и надеть крышку

Для обработки корневого канала жидкость ввести в канал с помощью пипетки или корневой иглы, оставить на 1 минуту. Затем канал промыть физраствором, просушить струей воздуха и далее проводить дальнейшее лечение.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Жидкость «Капрамин» на основе сульфата железа при использовании может временно изменить цвет ткани десны, который восстанавливается через 1-2 дня.

Побочные воздействия другого вида при правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции отсутствуют.

ФОРМА ВЫПУСКА

- | | |
|---|---------|
| 1) Флакон (из стекла) с жидкостью (30 мл, 50 мл) | - 1 шт. |
| Крышка-капельница | - 1 шт. |
| Инструкция по применению | - 1 шт. |
| Картонная упаковка | - 1 шт. |
| 2) Флакон (из пластика) с жидкостью (30 мл, 50 мл) | - 1 шт. |
| Крышка-капельница | - 1 шт. |
| Инструкция по применению | - 1 шт. |
| Картонная упаковка | - 1 шт. |
| 3) Флакон (из стекла) с жидкостью (70 мл, 80 мл, 90 мл, 100 мл) | - 1 шт. |
| Инструкция по применению | - 1 шт. |
| Картонная упаковка | - 1 шт. |
| 4) Флакон (из пластика) с жидкостью (70 мл, 80 мл, 90 мл, 100 мл) | - 1 шт. |
| Инструкция по применению | - 1 шт. |
| Картонная упаковка | - 1 шт. |
| 5) Флакон (из пластика) с жидкостью (500 мл, 1000 мл) | - 1 шт. |
| Этикетка-инструкция | - 1 шт. |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от 0 до +30°C.

Не замораживать!

Срок годности - 3 года.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности возлагается на пользователя.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции, побочных эффектов или аллергических реакций просим сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки стоматологической жидкости «Капрамин» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06810 от 24.11.2017г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество

“Опытно-экспериментальный завод

“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)

308023, Россия, г. Белгород

ул. Студенческая, 19

тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10

postmaster@vladmiva.ru

Символы/ Symbols



- Внимание/Caution (Attention)



- Производитель/Manufacturer



- Беречь от влаги/Store in a dry place



- Не использовать повторно/Do not reuse



- Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight



- Использовать до/Expiry date

LOT - Код партии/Batch number

 - Температурный диапазон/Temperature limitation

Packer - Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский язык/Spanish, KK – казахский язык/Kazakh, UZ – узбекский язык/Uzbek, UK – украинский язык/Ukrainian, FR – французский язык/French.

- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002

 - Не использовать при повреждении упаковки / Not to be used in case package is damaged



В данном документе
прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью
_____ листов

[Handwritten signature]