




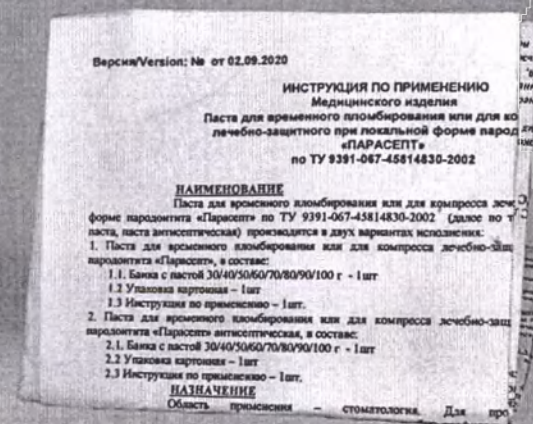
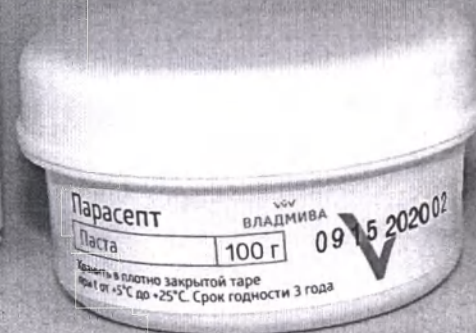
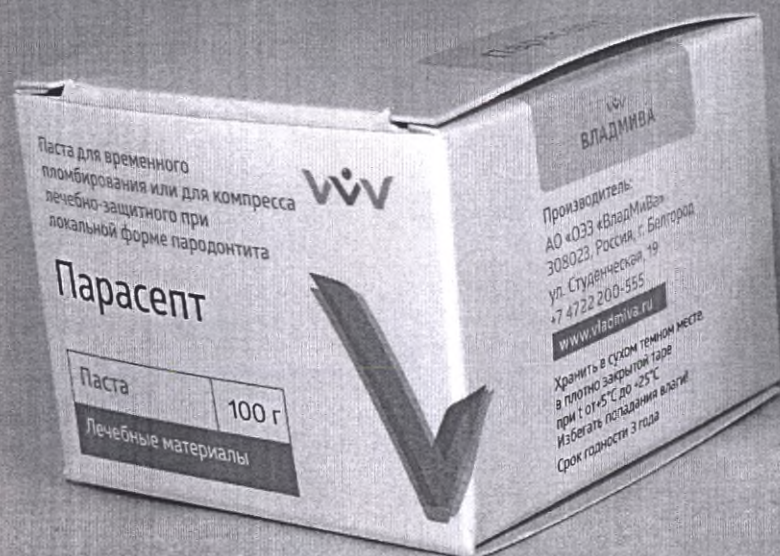
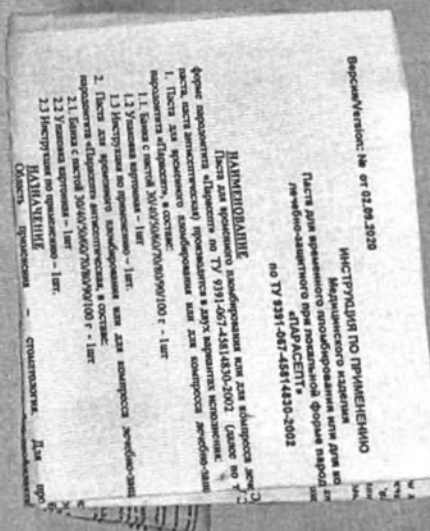
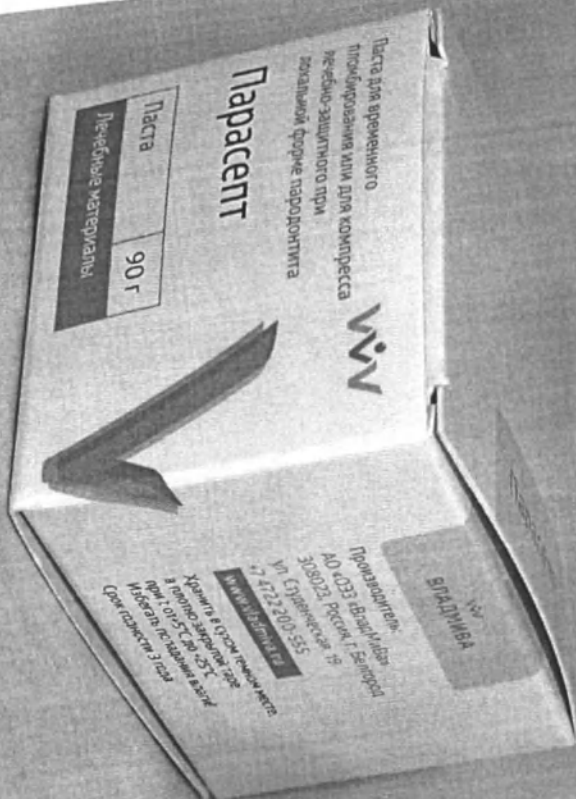
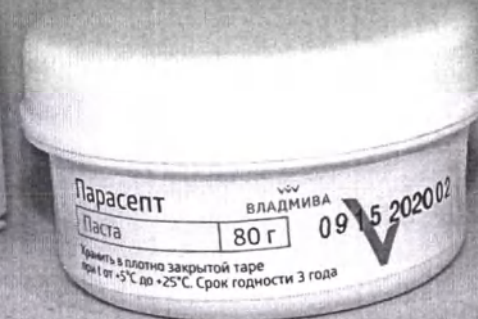
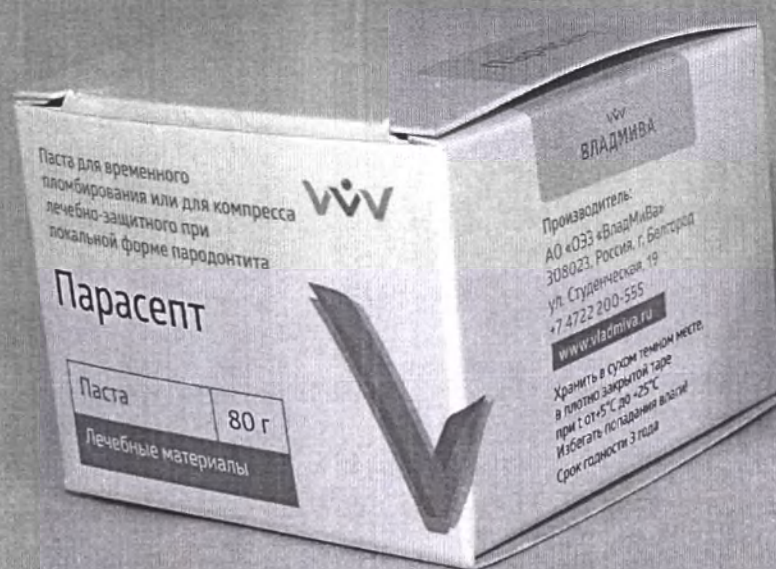




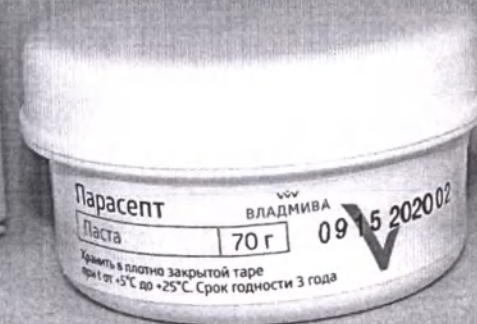




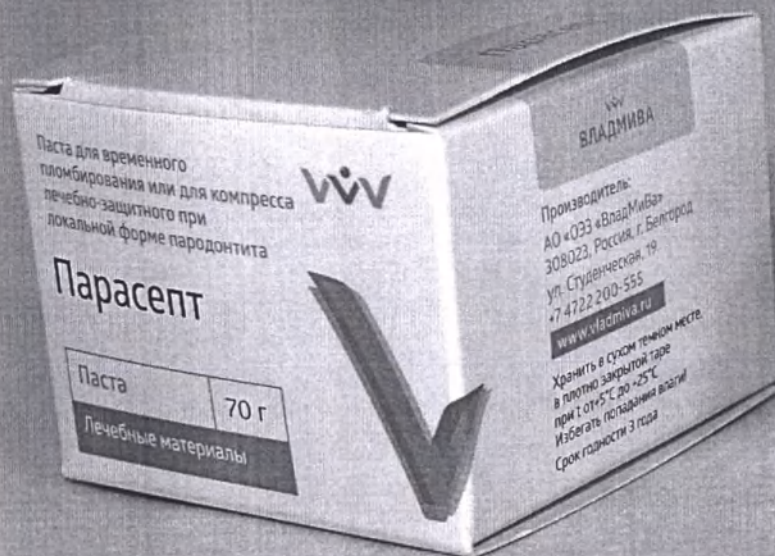


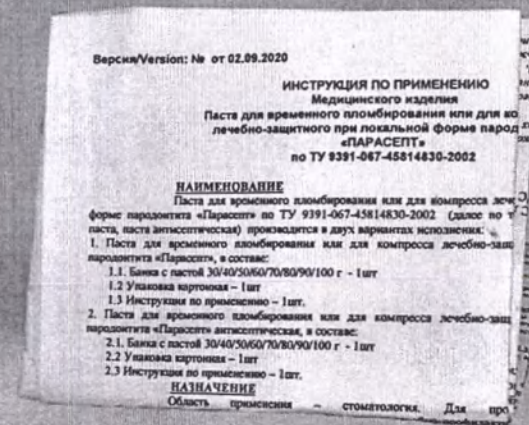


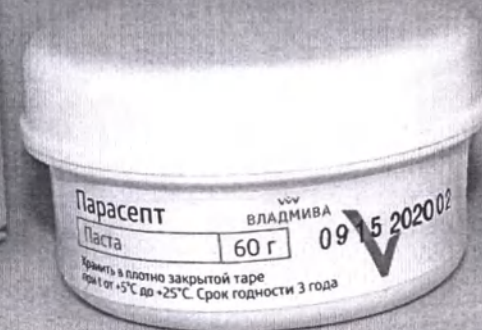

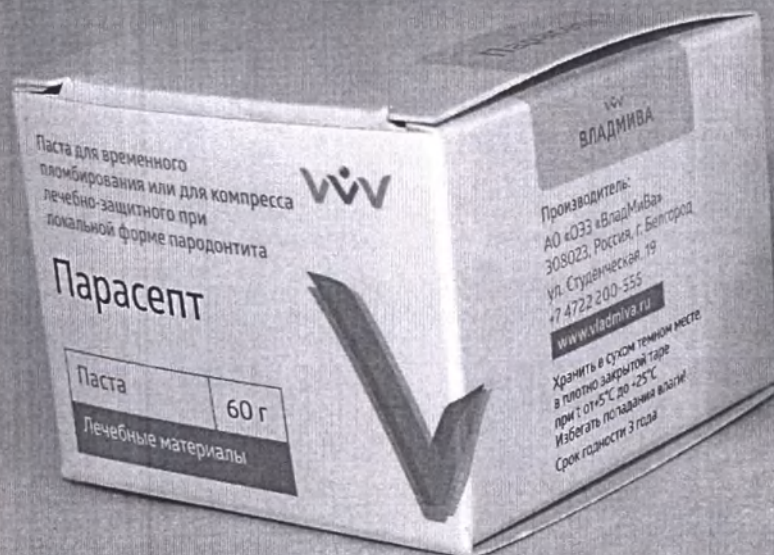

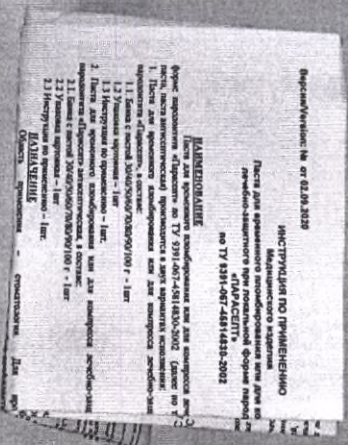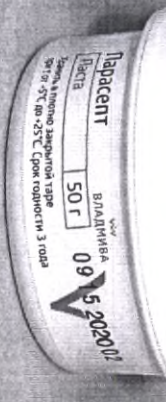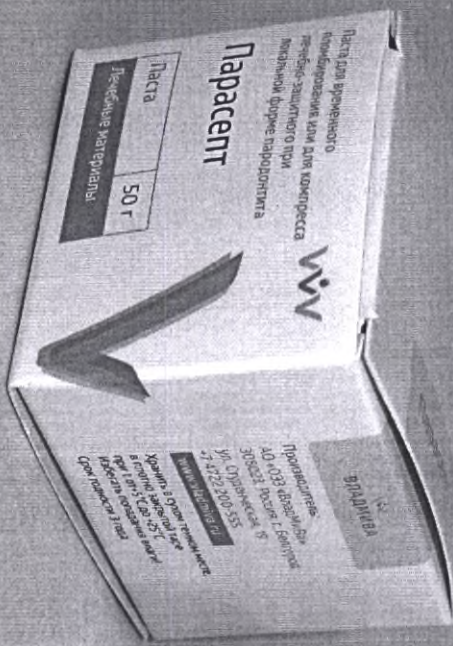

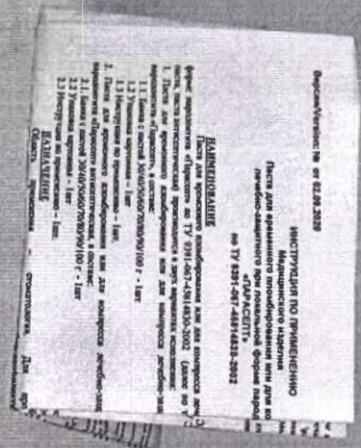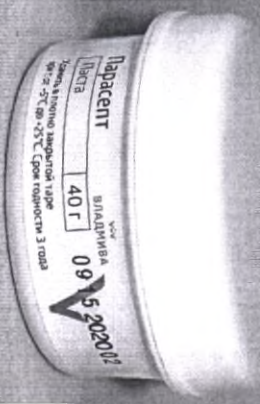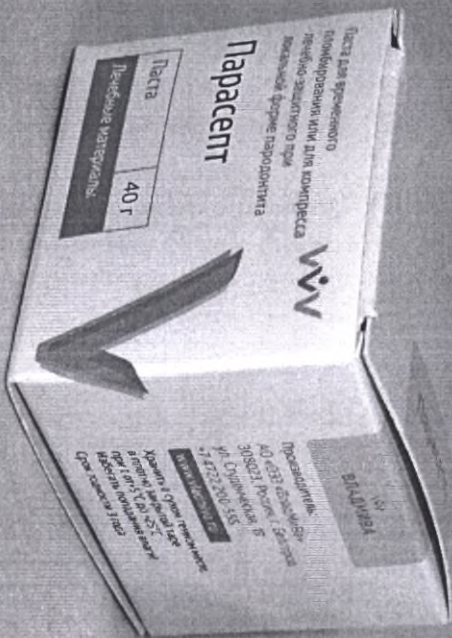

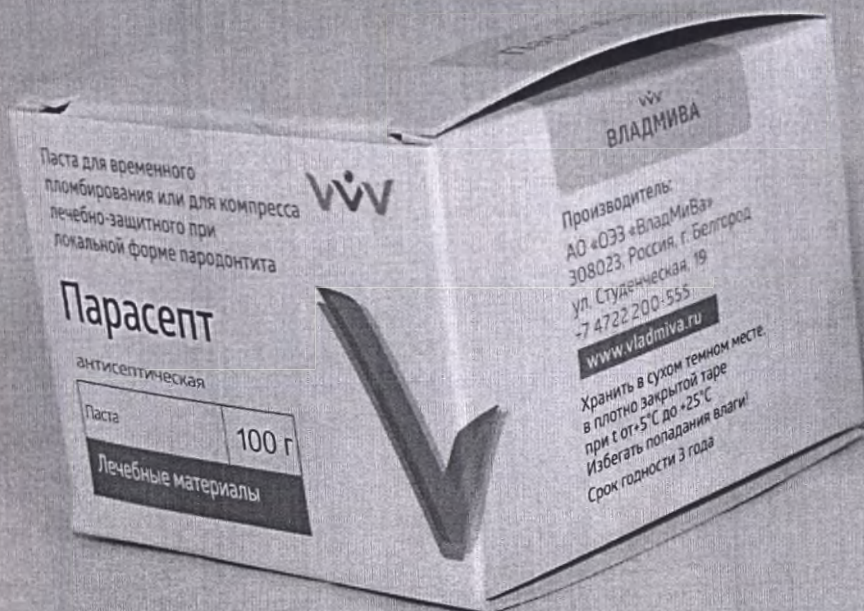

Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия
Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита «ПАРАСЕПТ»
антисептическая
по ТУ 9391-067-45814830-2002

НАИМЕНОВАНИЕ

Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасепт» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал антисептический) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасепт», в составе:

1.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт

1.2. Упаковка картонная - 1 шт



1.3. Инструкция по применению - 1 шт.

2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасепт» антисептическая, в составе:

2.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт

2.2. Упаковка картонная - 1 шт

2.3. Инструкция по применению - 1 шт.

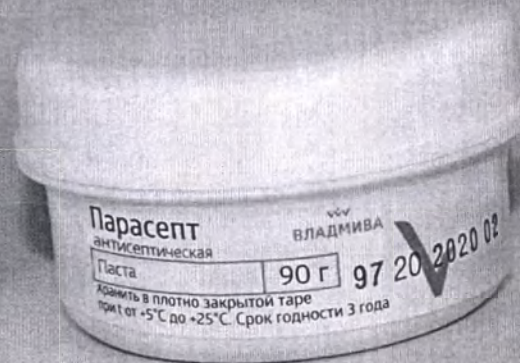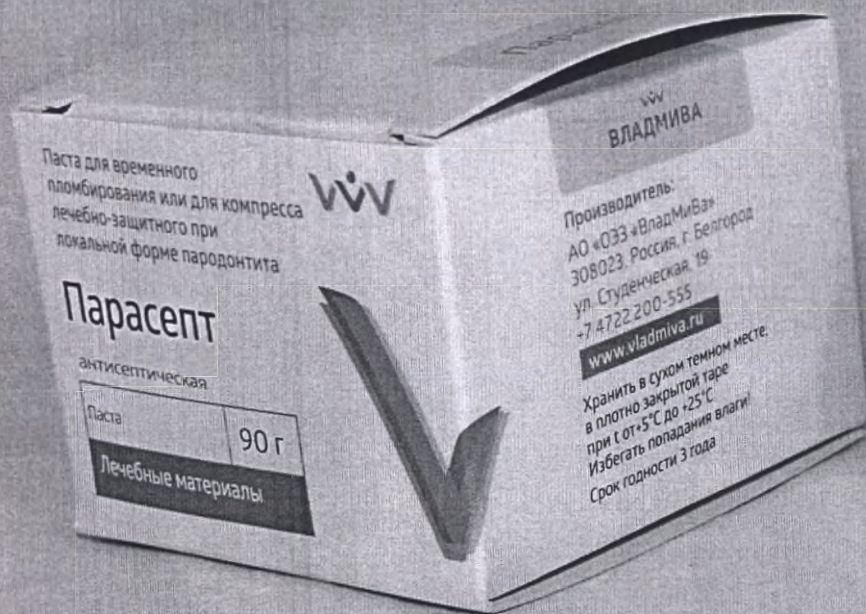

Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия
Паста для временного пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при локальной форме пародонтита
«ПАРАСЕПТ»
антисептическая
по ТУ 9391-067-45814830-2002

НАИМЕНОВАНИЕ


Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал антисептический) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт», в составе:

- 1.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
- 1.2. Упаковка картонная - 1 шт
- 1.3. Инструкция по применению - 1 шт.

2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» антисептическая, в составе:

- 2.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
- 2.2. Упаковка картонная - 1 шт
- 2.3. Инструкция по применению - 1 шт.

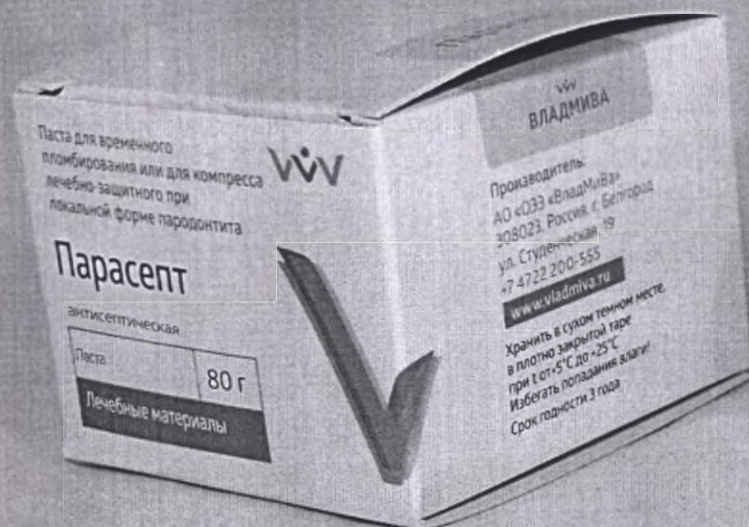

Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита «ПАРАСЕПТ» антисептическая по ТУ 9391-067-45814830-2002

НАИМЕНОВАНИЕ



Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал паста антисептическая) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт», в составе:

- 1.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт.
- 1.2 Упаковка картонная - 1 шт.
- 1.3 Инструкция по применению - 1 шт.

2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» антисептическая, в составе:

- 2.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт.
- 2.2 Упаковка картонная - 1 шт.
- 2.3 Инструкция по применению - 1 шт.

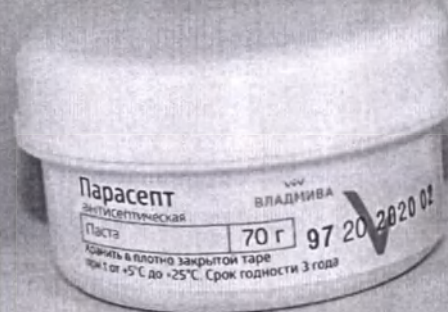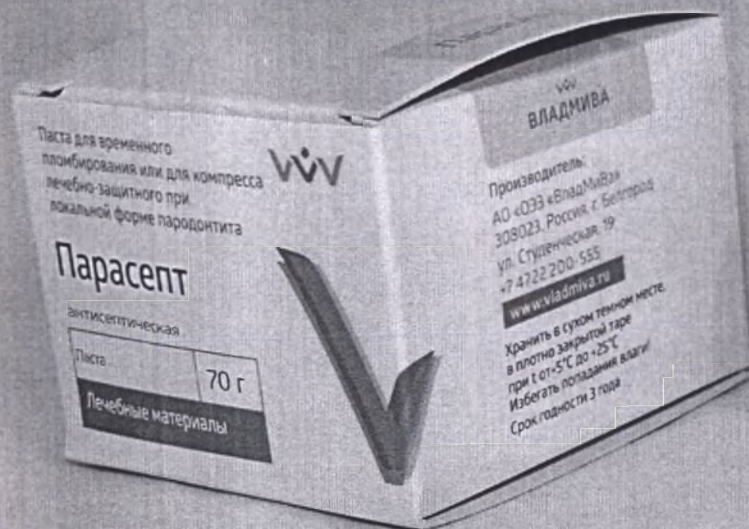

Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия
Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита «ПАРАСЕНТ» антисептическая по ТУ 9391-067-45814830-2002

НАИМЕНОВАНИЕ


Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасент» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал антисептический) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасент», в составе:

- 1.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
- 1.2 Упаковка картонная - 1 шт
- 1.3 Инструкция по применению - 1 шт.

2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасент» антисептическая, в составе:

- 2.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
- 2.2 Упаковка картонная - 1 шт
- 2.3 Инструкция по применению - 1 шт.

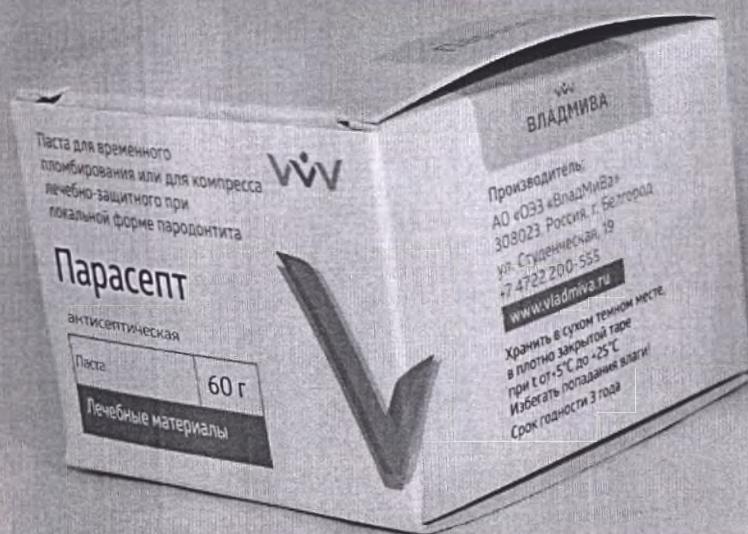

Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия
Паста для временного пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при локальной форме пародонтита
«ПАРАСЕПТ»
антисептическая
 по ТУ 9391-067-45814830-2002

НАИМЕНОВАНИЕ



Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасепт» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал антисептический) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасепт», в составе:

- 1.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
- 1.2. Упаковка картонная - 1 шт
- 1.3. Инструкция по применению - 1 шт.

2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтита «Парасепт» антисептическая, в составе:

- 2.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
- 2.2. Упаковка картонная - 1 шт
- 2.3. Инструкция по применению - 1 шт.

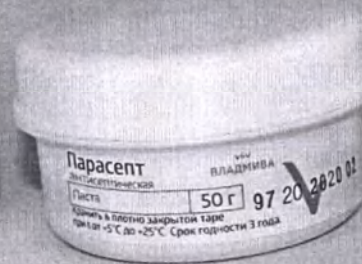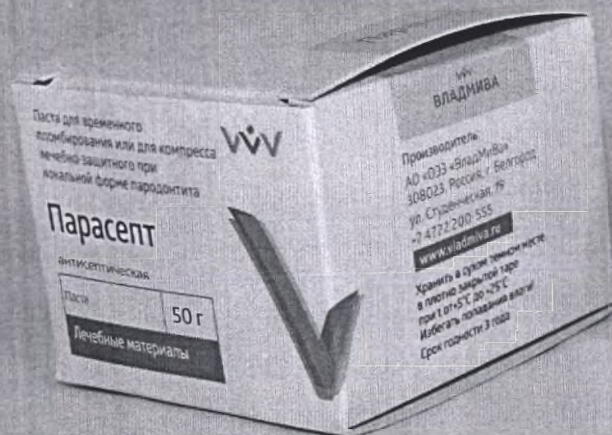

Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия
Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита «ПАРАСЕПТ»
антисептическая
по ТУ 9391-067-45814830-2002



НАИМЕНОВАНИЕ
Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал антисептический) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт», в составе:

- 1.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г – 1 шт
- 1.2 Упаковка картонная – 1 шт
- 1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» антисептическая, в составе:

- 2.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г – 1 шт
- 2.2 Упаковка картонная – 1 шт
- 2.3 Инструкция по применению – 1 шт.

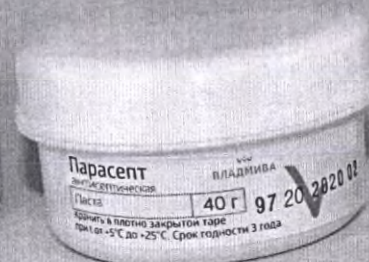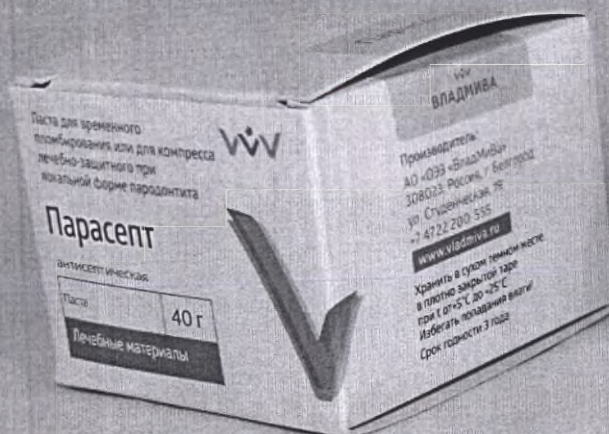


Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Медицинского изделия
 Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита «ПАРАСЕПТ» антисептическая по ТУ 9391-067-45814830-2002

НАИМЕНОВАНИЕ

Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал антисептический) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт», в составе:
 - 1.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
 - 1.2 Упаковка картонная - 1 шт
 - 1.3 Инструкция по применению - 1 шт.
2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасепт» антисептическая, в составе:
 - 2.1 Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
 - 2.2 Упаковка картонная - 1 шт
 - 2.3 Инструкция по применению - 1 шт.

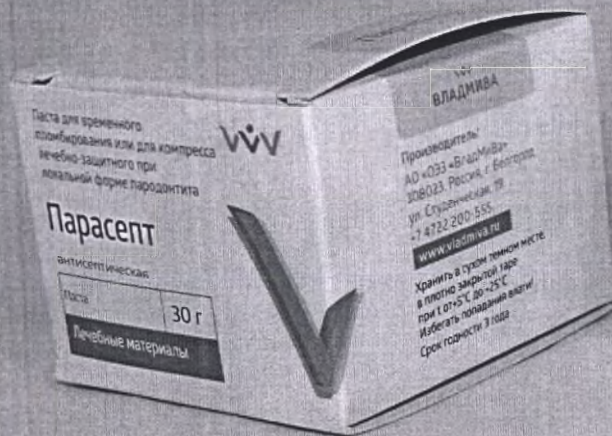

Версия/Version: № от 02.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Медицинского изделия
 Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита «ПАРАСЕПТ»
 антисептическая
 по ТУ 9391-067-45814830-2002

НАИМЕНОВАНИЕ

Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасент» по ТУ 9391-067-45814830-2002 (далее по тексту – материал антисептический) производится в двух вариантах исполнения:

1. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасент», в составе:
 - 1.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
 - 1.2. Упаковка картонная - 1 шт
 - 1.3. Инструкция по применению - 1 шт.
2. Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при пародонтите «Парасент» антисептическая, в составе:
 - 2.1. Банка с пастой 30/40/50/60/70/80/90/100 г - 1 шт
 - 2.2. Упаковка картонная - 1 шт
 - 2.3. Инструкция по применению - 1 шт.

Парасепт
паста антисептическая

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

30 g

Treating materials

VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт
антисептическая

Паста

30 г

Лечебные материалы

ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года

Версия/Version: № 4, 18.09.2020



TU 9391-067-45814830-2002

РУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Парасепт
паста антисептическая

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

40 g

Лечебные материалы

VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5 °C to +25 °C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт
антисептическая

Паста

40 г

Лечебные материалы

ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5 °C до +25 °C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года

Версия/Version: № 4, 18.09.2020



TU 9391-067-45814830-2002
ПУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Парасент
паста антисептическая

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

50 g

Treating materials



VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасент
антисептическая

Паста

50 г

Лечебные материалы



VLADMIVA

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года

Версия/Version: № 4, 18.09.2020



TU 9391-067-4S814630-2002
ПУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Парасепт
паста антисептическая

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

60 g

Лечебные материалы



VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant
Studenetskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт
антисептическая

Паста

60 г

Лечебные материалы



VLADMIVA

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



ТУ 9391-067-45814830-2002
РУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Версия/Version: № 4, 18.09.2020

Паста антисептическая
Parasept

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

70 g

Лечебные материалы



VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life



Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт
антисептическая

Паста

70 г

Лечебные материалы



ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



ТУ 9391-067-45814830-2002
РУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Packer

LOT



Версия/Version: № 4, 18.09.2020

Паста антисептическая
Parasept

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

80 g

Лечебные материалы



VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life



Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт
антисептическая

Паста

80 г

Лечебные материалы



VLADMIVA

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



TU 9391-067-45814830-2002
ПУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Packer

LOT



Версия/Version: № 4, 18.09.2020

Паста антисептическая
Парасепт

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

90 g

Тreating materials



VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life



Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита



VLADMIVA

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

Паста

90 г

Лечебные материалы



TU 9391-067-45814830-2002
ПУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Версия/Version: № 4, 18.09.2020

Парасепт
паста антисептическая

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept
antiseptic

Paste

100 g

Treating materials



VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт
антисептическая

Паста

100 г

Лечебные материалы



VLADMIVA

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



TU 9391-067-45814830-2002
ПУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Packer

LOT



Версия/Version: № 4, 18.09.2020

Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 30 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 40 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 50 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 60 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 60 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 70 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 80 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 90 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года




Парасепт
антисептическая

vvv
ВЛАДМИВА

Паста 100 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



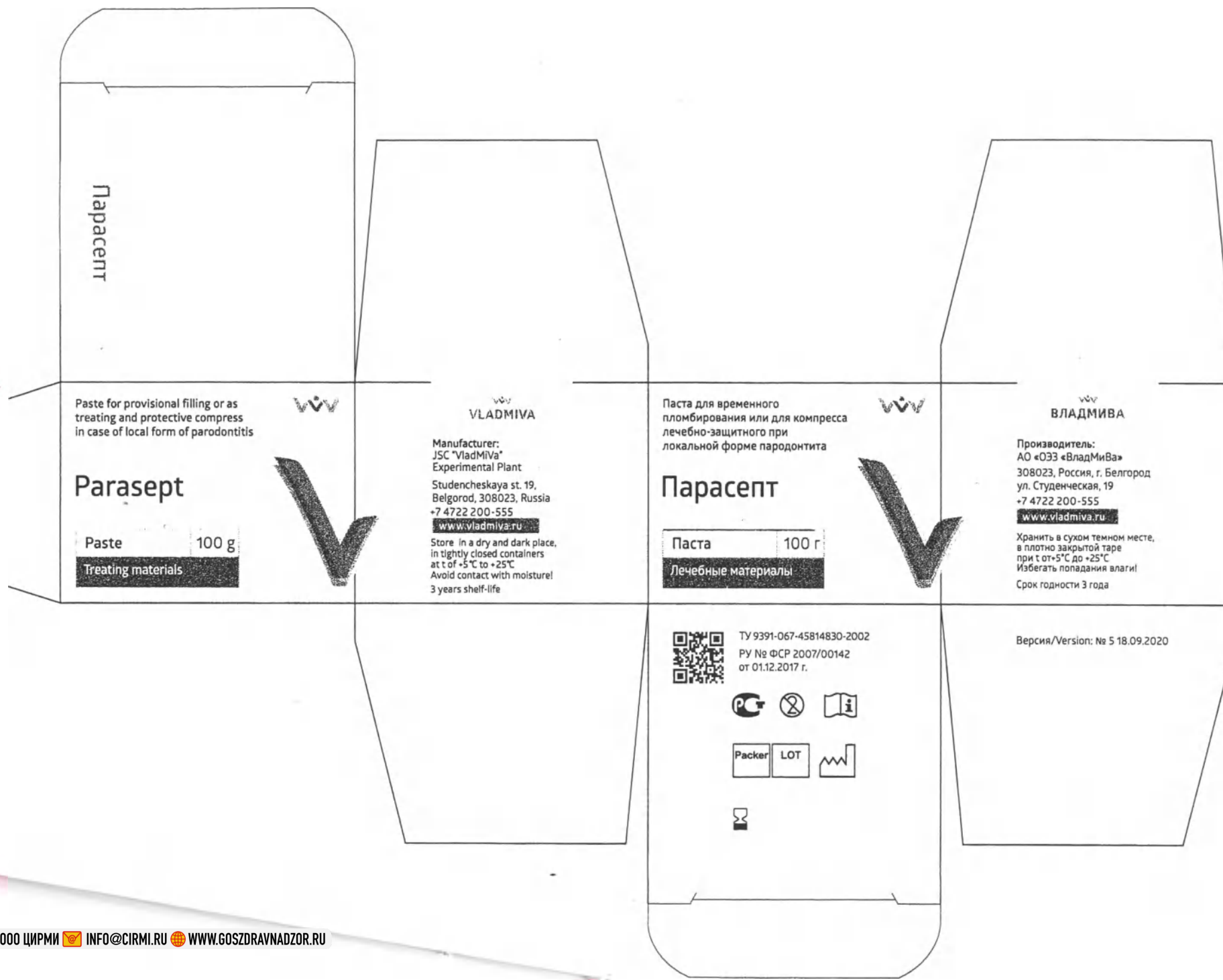

Parasept

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept

Paste 100 g
Treating materials

VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт

Паста 100 г
Лечебные материалы


VLADMIVA

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru


Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



ТУ 9391-067-45814830-2002
ПУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.

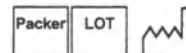

Версия/Version: № 5 18.09.2020

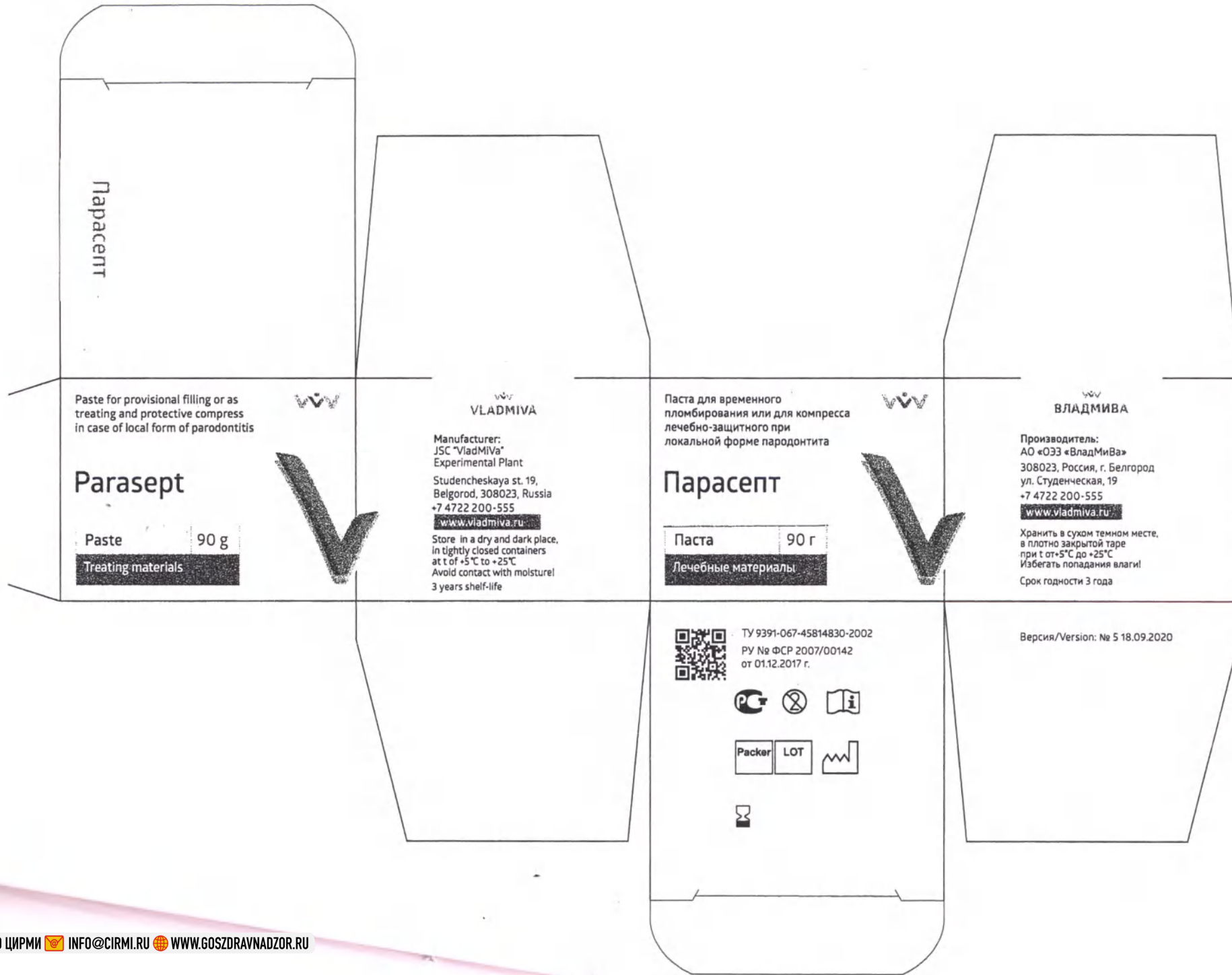

Parasept

Paste for provisional filling or as treating and protective compress in case of local form of parodontitis

Parasept

Paste 90 g
Treating materials

VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru
Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита

Парасепт

Паста 90 г
Лечебные материалы

ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru
Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года




ТУ 9391-067-45814830-2002
РУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Packer LOT



Версия/Version: № 5 18.09.2020

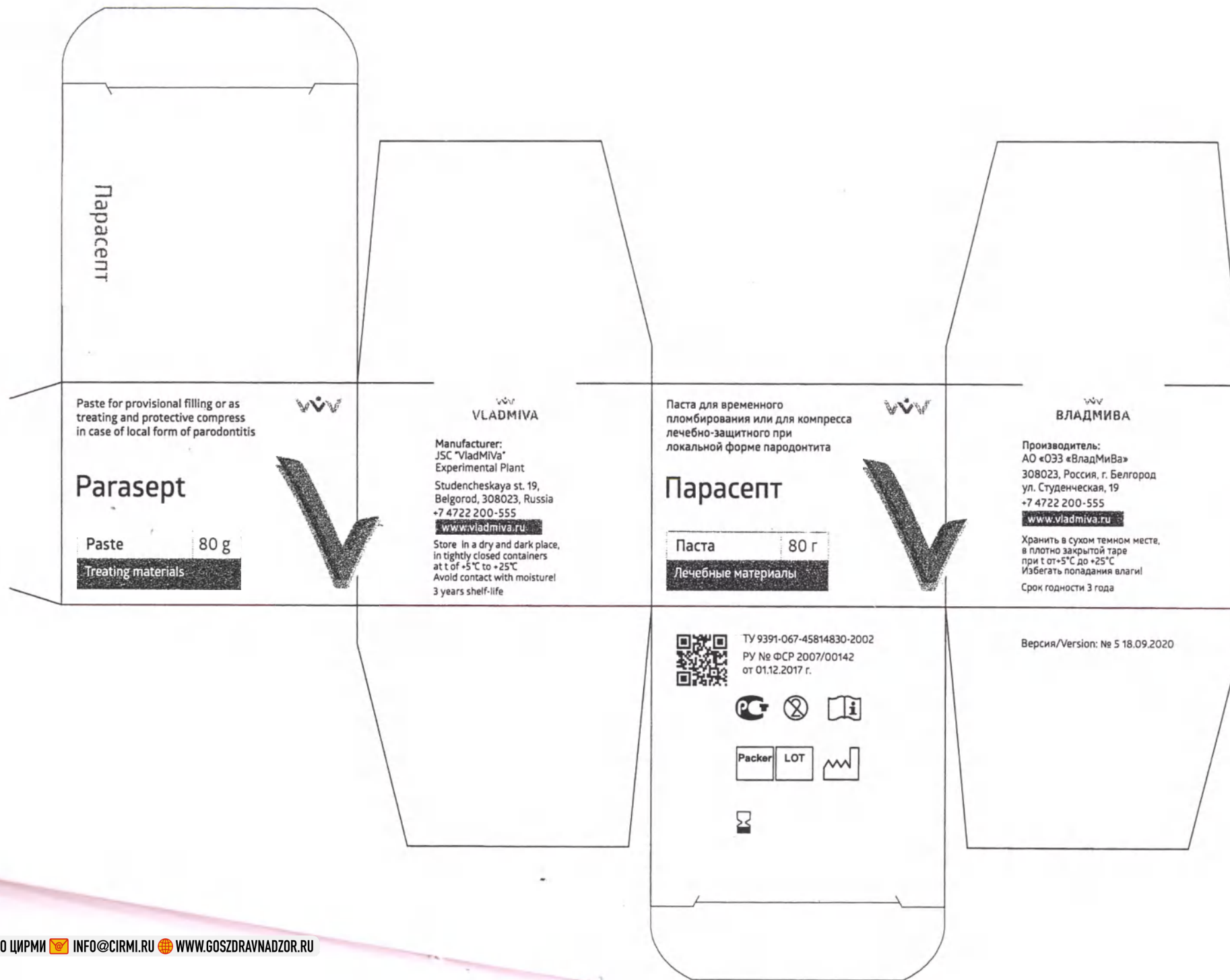

Парасепт

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept

Paste 70 g
Treating materials



ВЛАДМИВА

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store In a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life



Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт

Паста 70 г
Лечебные материалы




ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



ТУ 9391-067-45814830-2002
РУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.

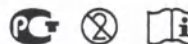

Версия/Version: № 5 18.09.2020

Парасепт

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept

Paste

60 g

Treating materials



VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life



Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт

Паста

60 г

Лечебные материалы



ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru


Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года





ТУ 9391-067-45814830-2002
РУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Версия/Version: № 5 18.09.2020

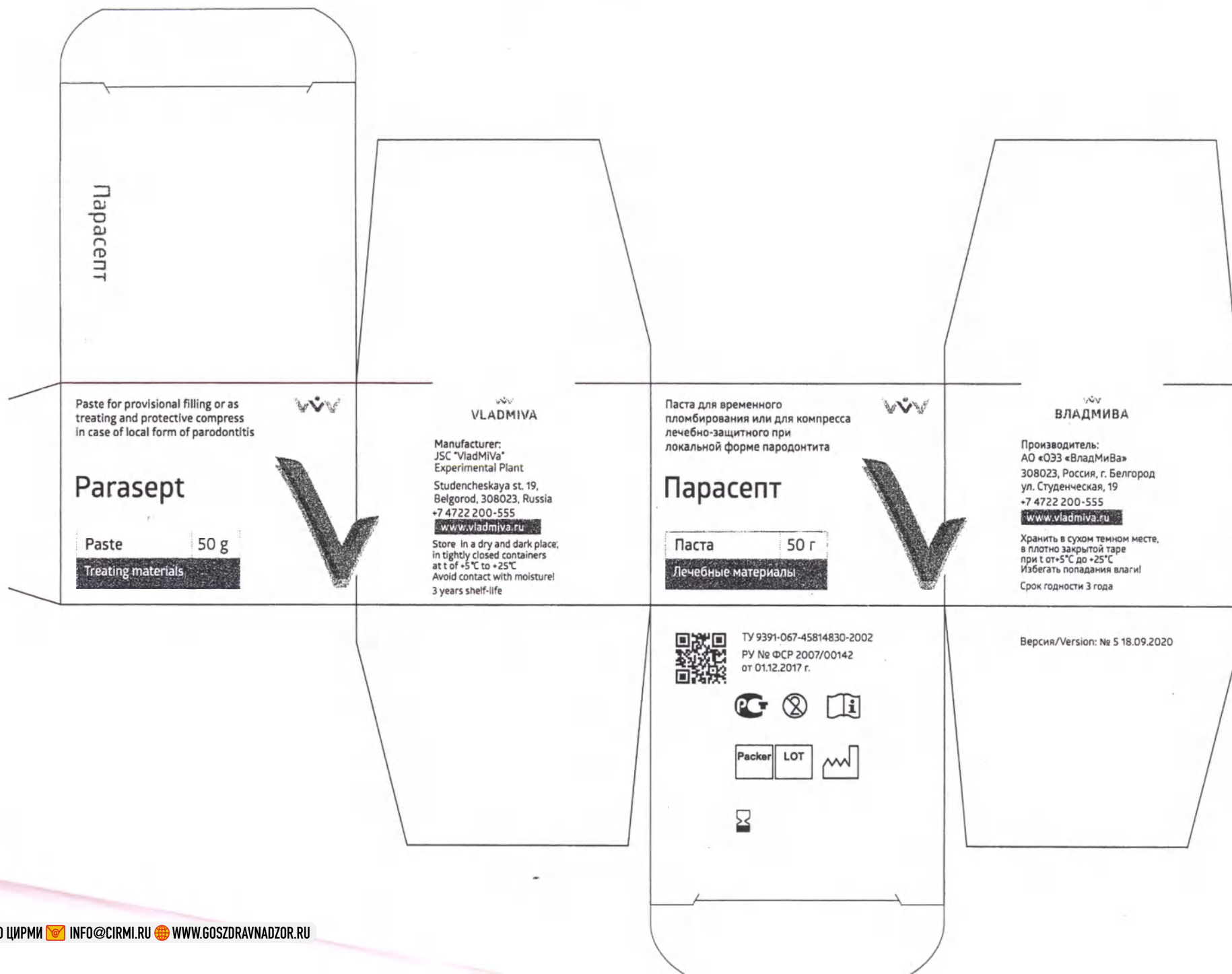

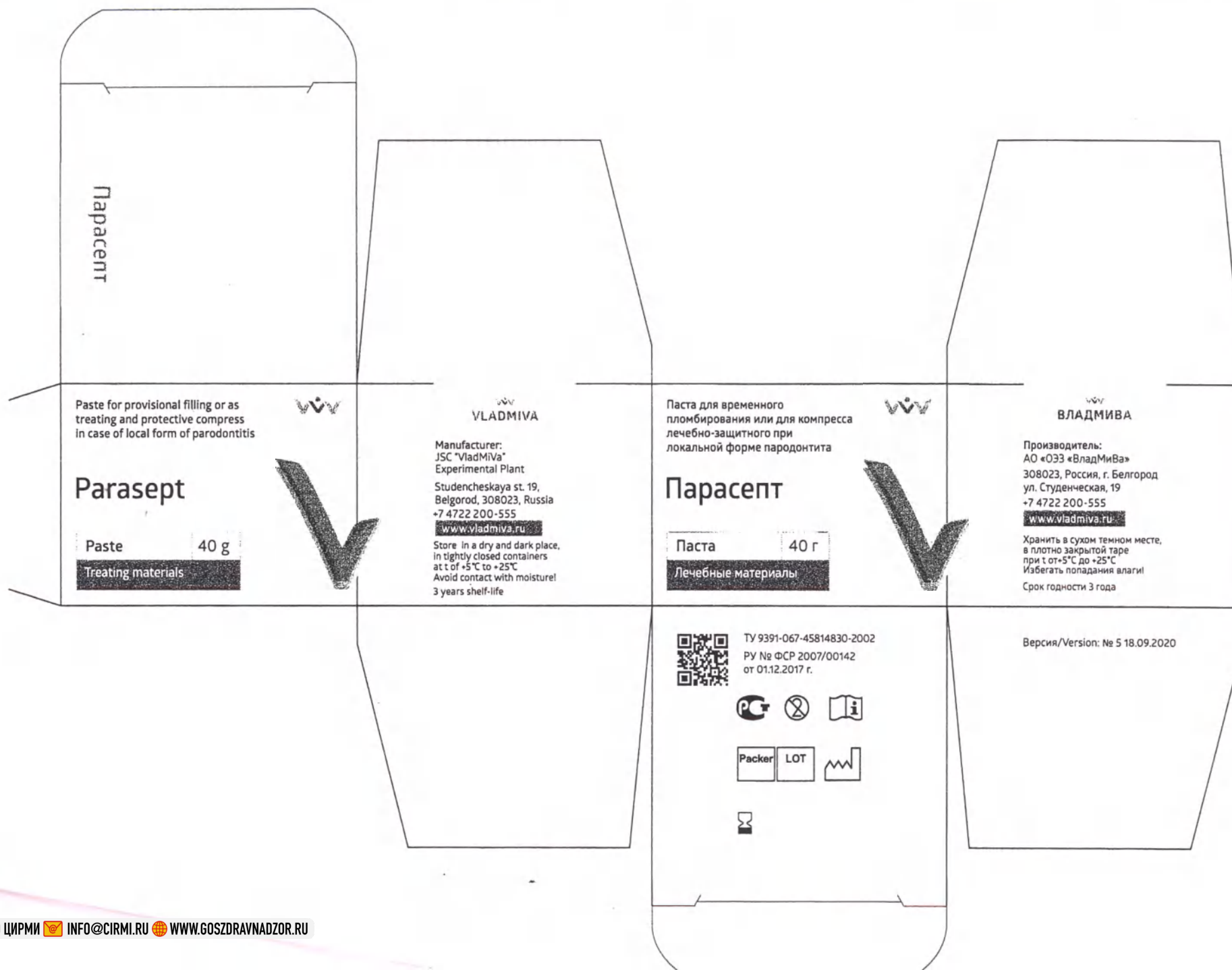

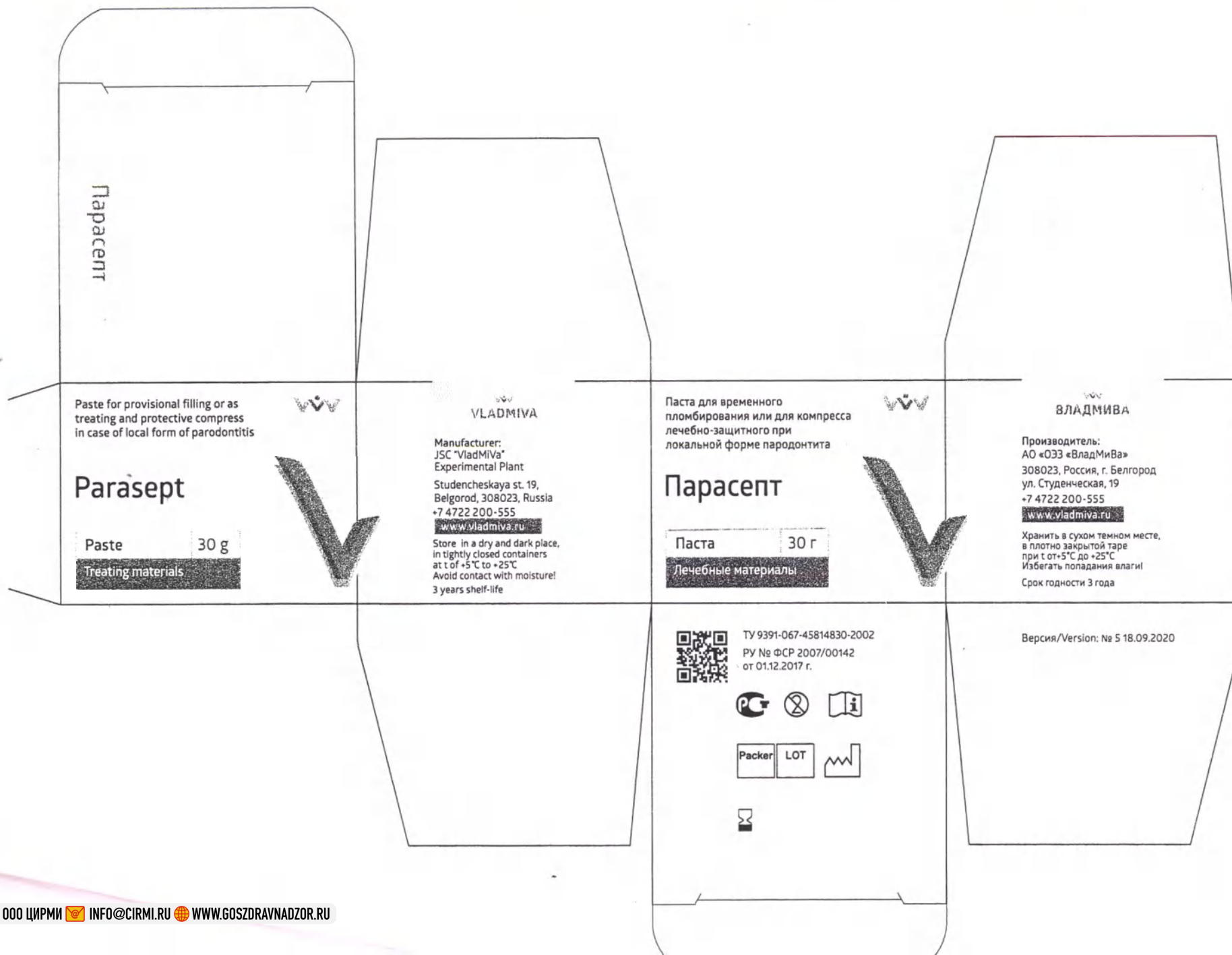

Parasept

Paste for provisional filling or as
treating and protective compress
in case of local form of parodontitis

Parasept

Paste

30 g

Treating materials

ВЛАДМИВА

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place,
in tightly closed containers
at t of +5°C to +25°C
Avoid contact with moisture!
3 years shelf-life

Паста для временного
пломбирования или для компресса
лечебно-защитного при
локальной форме пародонтита

Парасепт

Паста

30 г

Лечебные материалы

ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Избегать попадания влаги!
Срок годности 3 года



ТУ 9391-067-45814830-2002
ПУ № ФСР 2007/00142
от 01.12.2017 г.



Версия/Version: № 5 18.09.2020

Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

30 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

40 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

50 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

60 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

70 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

80 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

90 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года



Парасепт

ВЛАДМИВА

Паста

100 г

Хранить в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года





В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
34 листа(ов)
зам.нач.Т.О. Курсенко З.В.