

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕДКОМ-МП

140055, Московская область, Люберецкий район,
г. Котельники, микрорайон Белая Дача,
Москва

промзона Технопром
тел./факс (495) 363-60-33

ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 40702810000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г.

к/сч. 301018101000000000162
БИК 044579162

Инструкция по применению изделия медицинского назначения Медицинские маски

Производства:

1. «Кимберли-Кларк Корпорэйшн» (Kimberly-Clark Corporation), США

Адрес: 1400 Holcomb Bridge Road, Roswell, GA 30076, United States.

Тел.: +32 (2) 711 2642; www.kimberly-clark.com

2. «Кимберли-Кларк Корпорэйшн» (Kimberly-Clark Corporation) Мексика.

Адрес: KM 4.5 Carretera Presa La, Amistad Ciudad De Acuna, Coahuila, MX-Nota 26200, Mexico.

Тел.: 770-5877835, www.kimberly-clark.com

Медицинские маски, являются средствами индивидуальной защиты и предназначены для защиты пациентов и медицинских работников от взаимного заражения во время проведения медицинских обследований и операций. Маски могут применяться как во время проведения хирургических операций и в местах с повышенным содержанием загрязняющих веществ в атмосфере.

Использование масок должно быть приоритетным действием для обеспечения того, чтобы лица из высоко-рисковой группы контакта с инфекцией имели доступ к доступным средствам защиты. Их ношение обязательно для медицинских работников и ухаживающих лиц, а также другого важного персонала при тесном контакте (примерно 1 метр) с больными пациентами.


1. Перед использованием убедитесь в целостности упаковки
2. Извлеките маску из упаковки
3. Закрепите маску на лице, как показано на рисунке



4. Не используйте маску более одного раза
5. Не используйте маску более 2-х часов подряд
6. После использования маски, ее следует утилизировать безопасным способом, если при её ношении имелись выделения.

Генеральный директор
ООО «Медком-МП»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

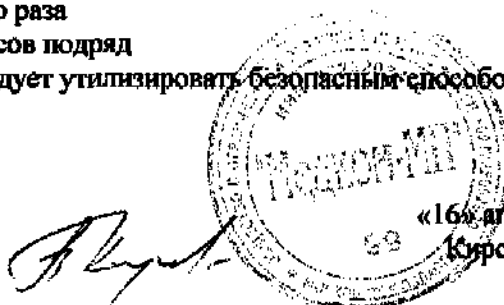

«16» апреля 2010 г.
Курсенко К.В.