

30 секунд - И ВАШ РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК ГОТОВ!



**Химикаты быстрого действия (Kodak Rapid Access)
Для ручной обработки!!!**

**Проявитель быстрого действия
Kodak Rapid Access Dental Developer
В упаковке: 6 бутылок по 0.5 л.**

**Фиксаж быстрого действия
Kodak Rapid Access Dental Fixer
В упаковке: 6 бутылок по 0.5 л.**

1 бутылка (0.5 л) проявителя и 1 бутылка (0.5 л) фиксажа рассчитаны на ручную обработку 100 пленок для внутриротовой рентгенографии Kodak Intraoral D-Speed Film и Insight I.P. - 21 размером 31x41 мм.

Способ применения:

Проявление - 15 сек. при $t = 20^{\circ}\text{C}$

Фиксирование - 15 сек. при t в пределах $16^{\circ}\text{--}25^{\circ}\text{C}$

Промывка в проточной воде - 25 сек. при t в пределах $16^{\circ}\text{--}25^{\circ}\text{C}$

Проявитель и фиксаж быстрого действия используются только друг с другом. Это готовые к употреблению растворы, предназначенные для использования только один раз и не подлежащие обновлению.

Хранение:

Бутылки с растворами необходимо хранить в темном сухом помещении при t в пределах $5^{\circ}\text{--}30^{\circ}\text{C}$.

Срок годности в нераспечатанных бутылках: 18-24 месяца.

Содержимое уже распечатанных бутылок можно использовать: - проявитель в течении 1 недели (при плотно закрытых бутылках).

- фиксаж в течении 1 месяца (при плотно закрытых бутылках).

Официальные дистрибьюторы Kodak Dental в России:

"Юнидент" (Москва)

"Стоматосервис" (Москва)

"Стомат" (Москва)

"Стомат-Сервис" (Санкт-Петербург)

(800) 434-1457, 432-1188
(800) 294-5745, 807-4267
(800) 287-7968, 281-5147
(800) 676-6712, 679-1807

