

ООО "Белла"



Общество с ограниченной ответственностью "Белла" 140301 г. Егорьевск ул. Промышленная 9
тел.: (8-49640) 48370 факс: (8-49640) 49017 ИНН 5011021499 www.bella-tzmo.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Белла»**



**М.К. Ковальчик
«15» июня 2020 г.**

**Набор гинекологический процедурный, стерильный
под товарным знаком matorat**

по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019

Инструкция по применению

2020г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.**
- 8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.**
- 9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**
- 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.**
- 11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.**
- 12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.**
- 13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.**
- 14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.**
- 15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**
- 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.**
- 20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**
- 21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.**
- 22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.**
- 23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 (далее по тексту – «Набор» или «Изделие») представляет собой медицинское изделие, которое, в зависимости от конкретного заказа потребителя, имеет различные варианты исполнения (см. Приложение) и формируется из составляющих, указанных в таблице 1:

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
1	Пеленка	Пеленки имеют следующую конструкцию: верхний покровный слой изготовлен из гидрофильного нетканого материала; внутренний слой изготовлен из распушенной целлюлозы; нижний (защитный) слой изготовлен из водонепроницаемой полиэтиленовой пленки.	Пеленки применяются как впитывающий материал для защиты поля проведения процедуры.
2	Маска	Маски трехслойные Спанбонд/ Мелтблаун/ Спанбонд. Маски имеют крепление на резинках.	Маски применяются как средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.
3	Бахилы на резинке	Изготовлены из нетканого материала. Бахилы на резинке имеют крепление на резинке, Бахилы нетканые высокие имеют крепление на завязках.	Бахилы используются в качестве физического барьера на обувь.
4	Бахилы нетканые высокие		
5	Лоток пластмассовый круглый	Лоток пластмассовый круглый имеет форму круглой ванночки.	Лотки пластмассовые применяются как емкость для жидкостей, используемых во время проведения процедуры (например, дезинфицирующей жидкости) или для сбора отработанного материала во время проведения процедур.
6	Лоток пластмассовый прямоугольный	Лоток пластмассовый имеет прямоугольную форму.	Лоток пластмассовый прямоугольный используется для сбора отработанного материала во время проведения процедур.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
7	Стаканчик мерный	Стаканчик мерный с градуированной мерной шкалой.	Стаканчик мерный применяется для дозирования жидкостей.
8	Перчатки смотровые латексные	Перчатки смотровые латексные изготовлены из натурального латекса. Внутренняя поверхность перчаток может быть неопудренной или малоопудренной.	Перчатки смотровые латексные предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения процедур.
9	Перчатки смотровые нитриловые	Перчатки смотровые нитриловые изготовлены из нитрила. Они не содержат натуральный латекс, и другие белковые составляющие протеинов натурального латекса, что устраняет риск возможных аллергических реакций при наличии таковых на латекс. Поверхность перчаток неопудренная.	Перчатки смотровые нитриловые применяются как смотровые перчатки. Предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения процедур.
10	Зажим Корнцанг	Зажим Корнцанг — это зажимный медицинский инструмент с длинными прямыми браншами и овальной рабочей частью на концах бранш, имеет защелку кремальеру.	Зажим Корнцанг используется для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала.
11	Салфетка медицинская	Салфетки медицинские изготовлены из нетканого материала.	Салфетки медицинские применяются для защиты поля проведения процедуры или как покрывной материал для инструментальных столиков.
12	Ложка Фолькмана	Ложка Фолькмана представляет собой двусторонний ложкообразный зонд, рабочие части которого имеют закругленную форму, но разных размеров.	Инструменты применяются для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи.
13	Шпатель Эйера	Шпатель Эйера представляет собой двусторонний зонд, рабочие части которого выполнены в виде лопаток, отличающиеся по размерам.	

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
14	Цитощетка	Цитощетка в виде конической щетки со спиральным расположением щетинок.	Инструменты предназначены для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала.
15	Цитощетка плюс	Цитощетка плюс в виде конической щетки со спиральным расположением щетинок с атравматическим шариком на конце.	
16	Цитощетка со шпателем	Цитощетка со шпателем имеет две рабочие части на противоположных концах ручки. С одной стороны в виде конической щетки со спиральным расположением щетинок, а с другой – рабочая часть выполнена в виде плоской лопатки с закругленными краями.	
17	Цитощетка с тампоном	Цитощетка с тампоном имеет две рабочие части на противоположных концах ручки. С одной стороны в виде конической щетки со спиральным расположением щетинок, а с другой – в виде тампона.	
18	Цервикальная щетка	Цервикальная щетка образована параллельными ручке зонда эластичными щетинками разной длины.	Инструменты применяются для взятия биологического материала из мочеиспускательного канала у мужчин и женщин.
19	Зонд урогенитальный	Рабочая часть Зонда урогенитального представляет собой оребренный по винтовой линии стержень из пластичного материала.	

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
20	Зонд аспирационный Classic	Зонд состоит из полимерной трубки, внутри которой размещен поршень с возможностью осевого перемещения. На дистальном закругленном конце трубки зондов выполнены отверстия. На проксимальном конце Зонда аспирационного Classic и Зонда аспирационного Profi выполнен стопор, препятствующий извлечению поршня из трубки. На проксимальном конце Зонда аспирационного Classic Combi размещен переходник для присоединения шприца.	Инструменты предназначены для забора материала из полости матки, стенок матки, верхней трети цервикального канала, уретры.
21	Зонд аспирационный Profi		
22	Зонд аспирационный Classic Combi		
23	Пинцет пластмассовый одноразовый	Пинцет пластмассовый одноразовый изготовлен из полистирола. Специальная конструкция позволяет предотвратить перекос рабочих частей бранш, обеспечивая надежное удержание предметов без усилий.	Пинцет пластмассовый одноразовый предназначен для захватывания перевязочных материалов во время проведения процедур.
24	Шапочка типа «Берет»	Шапочка типа «Берет» изготовлена из нетканого материала.	Шапочка типа «Берет» используется как элемент одноразовой одежды для пациента и/или медицинского персонала.
25	Палочка для взятия мазка с пробиркой	Палочка для взятия мазка с пробиркой может иметь хлопковую или вязкую головку в полиэтиленовой пробирке.	Используется для взятия и последующей транспортировки образцов биологических материалов.
26	Палочка для взятия мазка хлопковая	Палочка для взятия мазка хлопковая имеет металлическое основание, а головка сформирована из хлопка.	Используется для взятия образцов биологических материалов.
27	Палочка для взятия мазка вязкая	Палочка для взятия мазка вязкая имеет основание из полипропилена, а головка сформирована из вязкой.	

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
28	Зеркало гинекологическое	Зеркало гинекологическое снабжено центральным винтовым фиксатором.	Зеркало гинекологическое предназначено для раскрытия или расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении процедуры.
		Зеркало гинекологическое снабжено центральным поворотным фиксатором.	
		Зеркало гинекологическое снабжено боковым винтовым фиксатором.	
29	Стекла предметные	Стекла предметные изготовлены из прозрачного силикатного стекла.	Стекла предметные используются для исследования объектов под микроскопом.
30	Тупферы из марлевых отрезков	Тупферы из марлевых отрезков изготовлены из хлопчатобумажной марли, могут иметь следующие формы: шарик, усик, треугольник.	Мелкий перевязочный материал с большой впитываемостью, применяются для остановки кровотечения, осушения и очищения ран.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019, предназначен для использования во время проведения гинекологических процедур.

Область применения: гинекология.

Условия применения: Набор может применяться во всех типах амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 предназначен для использования во время проведения гинекологических процедур.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Медицинское изделие предназначено для однократного применения.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

Не использовать после окончания срока годности.

Не использовать в случае повреждения упаковки.

Не подлежит повторной стерилизации.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Нежелательные явления, которые могут произойти и (или) потребовать вмешательства: аллергическая реакция, ввиду непереносимости пациентом материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 сочетается со всеми видами медицинских изделий, которые применяются при проведении необходимых для пациента процедур.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Специальных исследований применения Изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Исследования о возможном влиянии Изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились, так как Изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Убедитесь, что Изделие не просрочено, а упаковка не повреждена.

Возьмите упаковку за край, плавным движением потяните нижний и верхний слой упаковки до ее полного вскрытия. Направление вскрытия упаковки может быть обозначено графическим символом.

Извлеките содержимое упаковки в необходимой последовательности.

Применение данного Изделия должно полностью соответствовать своему прямому назначению.

После использования по назначению утилизируйте.

Применять в соответствии с данной инструкцией.

11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.

Срок годности указан на упаковке и не должен превышать 5 лет с даты стерилизации.
Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Изделия транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Допускается транспортирование по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 при ограничении нижней температуры в -20°C – не более 48 часов.

Изделия должны храниться в упаковке производителя по условиям хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 с ограничением верхней температуры в +25°C.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров. Изделия нельзя хранить в загрязненных помещениях и помещениях с ядовитыми химикатами.

При складском хранении Изделия должны находиться в условиях, предотвращающих механические повреждения, не допускающие попадание влаги на Изделия, а также в условиях отсутствия действия прямых солнечных лучей.

13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Непригодное к использованию Изделие (неиспользованное Изделие с истекшим сроком годности) относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Использованное Изделие относится к отходам класса Б - эпидемиологически опасные, и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 не взрывоопасен, не способен самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок и т.д.

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла»),
ИНН 5011021499, Российская Федерация,
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
Тел./факс: +7 (49640) 48370 / +7 (49640) 49017
e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

Адрес места производства.

ООО «Белла», Российская Федерация,

140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
Тел./факс: +7 (49640) 48370 / +7 (49640) 49017
e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

В комплект поставки должен входить:

Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком *matopat* по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 одного варианта исполнения, кратно 1 - исходя из конкретного заказа потребителя, упакованный в потребительскую упаковку (упаковку для финишной стерилизации) с маркировкой (с указанием количества штук составляющих); инструкция по применению.

Примечание: в связи с конкретным заказом потребителя и по согласованию с заказчиком допускается изменять количество составляющих в Наборе.

Набор выпускается в стерильном виде: газовая стерилизация оксидом этилена.

Варианты комплектации в соответствии с ТУ 32.50.13-067-11736425-2019.

Варианты комплектации Набора представлены в Приложении к настоящей Инструкции.

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком *matopat* по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 должен соответствовать требованиям ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 и изготавливаться с соблюдением санитарных норм и правил.

При изготовлении составляющих Набора применяют материалы, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

№	Составляющие Набора	Производитель/поставщик, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
1	Пеленка	ООО «Белла», Россия, ТУ 17.22.12-005-11736425-2015 (№РЗН 2017/6220)	Верхний покровный слой: нетканый полипропиленовый материал НЕОТЕКС КОМФОРТ K00012-10-210;
		ООО «Белла», Россия, ТУ 5463-024-11736425-2014 (№РЗН 2015/2475)	Распределительный слой: целлюлозная гигиеническая бумага марки КА 1810-001; Абсорбирующий слой: распушенная целлюлоза (марки: «GT SS PLUS», «STORA ENSO CARE UNTREATED»); Защитный слой: - пленка полиэтиленовая (CAS 9002-88-4; марка «Hyfol PP Plus»); Клей горячего расплава (hot-melt) (марки: Dispomelt Cool 110; NW 1137 ZP)
2	Маска	ООО НПП «Волга Медикал», Россия, ТУ 9398-001-64985111-2010 (№ФСР 2010/08335)	Нетканый материал – СМС; Краситель – 63397-D2-300; Марка резинки – «ГлоблПартнёр»

Продолжение таблицы 2.

№	Составляющие Набора	Производитель/поставщик, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
3	Бахилы на резинках	TZMO SA, Польша (№ФСЗ 2008/01376)	Нетканый материал SMS; Резинка (62% спандекс, 38% латекс)
4	Бахилы нетканые высокие	ООО НПП «Волга Медикал», Россия, ТУ 9398-001-64985111- 2010 (№ФСР 2010/08336)	Нетканый материал – СС; Краситель – LIGHT BLUE (SB)
		ООО «Белла», Россия, ТУ 32.50.50-077-11736425-2020, (№ПЗН2020/9956)	Нетканый материал Спанбонд (цвет: голубой, краситель: LIGHT BLUE Americhem)
5	Лоток пластмассовый круглый	ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 (№РУ Д-РУ.АН03.В.04790/19)	Полипропилен Н030 GP
6	Лоток пластмассовый прямоугольный	ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 (№РУ Д-РУ.АН03.В.04790/19)	Полипропилен Н030 GP
7	Стаканчик мерный	ЗАО «Перинт», Россия, ТУ 9398-002-54287340-2010 (№ФСР 2011/10723)	Полипропилен марка PP Н452 IM/2
8	Перчатки смотровые латексные	TZMO SA, Польша (№ФСЗ 2007/00788)	Natural Rubber Latex (96.4%); Hindered Phenol (0.8%); Zinc Oxide (0.6%); Titanium Dioxide (0.3%); Sulphur (0.6%); Zinc Diethyl Dithiocarbamate (0.4%); Zinc Dibutyl Dithiocarbamate (0.7%); Potassium Hydroxide (0.2%)
		SFM Hospital Products GmbH, Германия (№ФСЗ 2010/07368)	Письмо уполномоченного представителя от 11.12.2019г.
9	Перчатки смотровые нитриловые	TZMO SA, Польша (№ФСЗ 2007/00788)	Арт. МА-144-М000-018
		SFM Hospital Products GmbH, Германия (№ПЗН 2019/8284)	Письмо уполномоченного представителя от 11.12.2019г.
10	Зажим Корнцанг	TZMO SA, Польша (№ФСЗ 2011/09976)	Пластик – Homopolimero PP 30% fibra vidro; Краситель – Corante azul pantone 3005

Продолжение таблицы 2.

№	Составляющие Набора	Производитель/поставщик, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
11	Салфетка медицинская	ООО «Белла», Россия, ТУ 32.50.50-032-11736425-2017 (№ПЗН 2017/6528)	Нетканый композиционный материал из химических волокон т.м. «Breatech Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м ²) код TLN200054, код TLN003054 (PELSAN TEKSTIL URUNLERI SANAYI VE TICARET. A.S.), Турция) или Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 40г/м ²) (ТПФ ООО «Гекса – нетканые материалы», Россия) или Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м ²) (ООО «Завод Эластик», Республика Татарстан) или Материал нетканый ламинированный марки B-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м ²) (ООО «Завод Эластик», Республика Татарстан) или Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 20г/м ²).
12	Ложка Фолькмана	ЗАО «Медицинское предприятие «Симург», Республика Беларусь, ТУ РБ 300046934.008-2002 (ФСЗ 2007/00495)	Полистирол общего назначения ГОСТ 20282; Полистирол ТУ 2214-126-05766801
13	Шпатель Эйера		
14	Зонд аспирационный Classic Combi	ЗАО «Медицинское предприятие «Симург», Республика Беларусь, ТУ ВУ 300046934.014-2009 (№ ФСЗ 2010/07444)	Трубка: полипропилен ТУ 2211-006-93911504; поршень: полистирол ТУ 2214-126-05766801, проволока стальная AISI304, NEVATIA STEEL & ALLOYS PVT.LTD, Индия; крышка адаптера: полистирол ТУ 2214-126-05766801; кольцо уплотнительное: силиконовая резиновая смесь Евросил ТУ 2512-002-15146583; адаптер: полистирол ТУ 2214-126-05766801; крышка: полистирол ТУ 2214-126-05766801; насадка фиксирующая: полистирол ТУ 2214-126-05766801; уплотнение: трубка силиконовая медицинская ТУ 9436-004-18037666.

Продолжение таблицы 2.

№	Составляющие Набора	Производитель/поставщик, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
15	Цитощетка	ЗАО «Медицинское предприятие «Симург», Республика Беларусь, ТУ BY 300046934.013-2008 (№ ФСЗ 2009/04877)	Ручка – полистирол ТУ 2214-126-05766801; стержень - проволока AISI 304, NEVATIA STEEL & ALLOYS PVT. LTD, Индия, щетинки - монопить нейлоновая «Tynex», DuPont Filaments- Europe BV, Нидерланды
16	Цитощетка плюс		Ручка – полистирол ТУ 2214-126-05766801; стержень - проволока AISI 304, NEVATIA STEEL & ALLOYS PVT. LTD, Индия, щетинки - монопить нейлоновая «Tynex», DuPont Filaments- Europe BV, Нидерланды
17	Цитощетка со шпателем		Ручка – полистирол ТУ 2214-126-05766801; шпатель - полиэтилен высокого давления ГОСТ 16337 + полиэтилен низкого давления ТУ 2243-176-00203335
18	Цитощетка с тампоном		Ручка – полистирол ТУ 2214-126-05766801; тампон - пенополиуретан ТУ 2254-111-05790484
19	Цервикальная щетка		Ручка – полистирол ТУ 2214-126-05766801;
20	Зонд урогенитальный		Ручка – полистирол ТУ 2214-126-05766801; рабочая часть - Multiflex G35A1114009, Multibase/Dow Corning, Франция
21	Зонд аспирационный Classic	ЗАО «Медицинское предприятие «Симург», Республика Беларусь, ТУ BY 300046934.014-2009 (№ ФСЗ 2010/07444)	Трубка: полипропилен ТУ 2211-006-93911504; поршень: полистирол ТУ 2214-126-05766801, проволока стальная AISI304, NEVATIA STEEL & ALLOYS PVT.LTD, Индия; уплотнение: трубка силиконовая медицинская ТУ 9436-004-18037666.
22	Зонд аспирационный Profi		Трубка: полипропилен ТУ 2211-006-93911504; поршень: полистирол ТУ 2214-126-05766801, проволока стальная AISI304, NEVATIA STEEL & ALLOYS PVT.LTD, Индия; насадка фиксирующая: полистирол ТУ 2214-126-05766801; уплотнение: трубка силиконовая медицинская ТУ 9436-004-18037666.
23	Пинцет пластмассовый одноразовый	ООО «Юникорнмед», Россия (№ФСЗ 2012/11836)	Пропилен-бутадиен-стироловая смола (ABS); Краситель – АTR-321 диоксид титана рутильной формы
24	Шапочка типа «Берет»	ООО НПП «Волга Медикал», Россия, ТУ 9398-001-64985111-2010 (№ФСЗ 2010/08336)	Нетканый материал СМС-35; Краситель – 63397-D2-300

Продолжение таблицы 2.

№	Составляющие Набора	Производитель/поставщик, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
25	Палочка для взятия мазка с пробиркой	ХайМедия Лабораториз Pvt. Лтд., Индия (№ФСЗ 2009/03610)	Хлопок 100%, Вискоза 100%, Полипропилен
26	Палочка для взятия мазка хлопковая		Хлопок 100%
27	Палочка для взятия мазка вискозная		Вискоза 100 %
28	Зеркало гинекологическое	Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай (№РЗН 2015/3020)	Верхняя часть, нижняя часть, гайка - Polystyrene (PS) Крепление - Polyethylene (PE) Винт - Polycarbonate (PC)
29	Стекла предметные	Лейка Биосистемс Ричмонд, Инк., США (№РЗН 2013/1157)	3808122GCE TWINFROST
30	Тупферы из марлевых отрезков	TZMO SA, Польша (№ФСЗ 2008/01372)	Марля – 100BP17; 601-010333; 601-011478
31	Упаковка для финишной стерилизации	Упаковка «ВОМ»	
		ООО «Белла», Россия, ТУ 32.50.13-030-11736425-2017 (№РЗН 2017/6416)	Пленка - MOR PET/PP BLUE, MOR PET/PP CLEAR Бумага - PROPYR NEUTRE 60 Нетканый материал – Propupel® NW AR Blue 60 gsm Химические индикаторы 1 класса - TISFRC784B.2; TIS784B/858 ACT; TIFGFRG492; TIGFAC564A Чернила - MC-2BK009 MAKE UP
		Блистерная упаковка	
		Firma Handlowo-Produkcyjna PAK (F.H.P. «ПАК»), Польша	Пленка - CPA/CPP 90 µm
		Plastica, Польша	Бумага - 1102
		LA-CO Industries, США	Химический индикатор - Tempilink

Основные линейные размеры составляющих Набора представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры			
1	2	3			
1	Пеленка	Длина, см		Ширина, см	
		60,0 ± 1,5		40,0 ± 1,5	
		60,0 ± 1,5		60,0 ± 1,5	
		60,0 ± 1,5		90,0 ± 1,5	
2	Маска	Длина, см		Ширина, см	
		17,0 ± 2,0		9,0 ± 1,75	
3	Бахилы нетканые высокие	Высота, см		Длина, см	Длина завязок, см
		33,0 ± 2,0		38,0 ± 2,0	40,0 ± 2,0
4	Лоток пластмассовый круглый	Объем, мл		Внешний диаметр, мм	Высота, мм
		250 ± 5%		115,0 ± 5%	43,6 ± 5%
5	Лоток пластмассовый прямоугольный	Объем, мл	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
		125 ± 5%	108 ± 5%	80 ± 5%	30 ± 5%
		500 ± 5%	179,0 ± 5%	132,0 ± 10%	38,0 ± 5%
		750 ± 5%	180 ± 5%	130 ± 5%	48 ± 5%
		1000 ± 5%	180 ± 5%	130 ± 5%	64 ± 5%
6	Стаканчик мерный	Объем, мл			
		50 ± 5%			
		100 ± 5%			
		250 ± 5%			
7	Перчатки смотровые латексные	Размер	Ширина, мм		Длина, мм, не менее
		XS	80,00 ± 10,00		220,00
		S	85,00 ± 10,00		230,00
		M	95,00 ± 10,00		230,00
		L	100,00 ± 10,00		230,00
		XL	110,00 ± 10,00		230,00
8	Перчатки смотровые нитриловые	Размер	Ширина, мм		Длина, мм, не менее
		XS	70,00 ± 10,00		225,00
		S	80,00 ± 10,00		230,00
		M	95,00 ± 10,00		230,00
		L	100,00 ± 10,00		240,00
		XL	не менее 105,00		240,00
9	Зажим Корнцанг	Длина, мм			
		190 ± 5%			
		250 ± 5%			

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры				
1	2	3				
10	Салфетка медицинская	Длина, см		Ширина, см		
		25,0 ± 3,0		22,0 ± 3,0		
		30,0 ± 3,0		30,0 ± 3,0		
		30,0 ± 3,0		40,0 ± 3,0		
		35,0 ± 3,0		50,0 ± 3,0		
		38,0 ± 3,0		45,0 ± 3,0		
		40,0 ± 3,0		40,0 ± 3,0		
		40,0 ± 3,0		45,0 ± 3,0		
		40,0 ± 3,0		60,0 ± 5,0		
		45,0 ± 3,0		45,0 ± 3,0		
		45,0 ± 3,0		75,0 ± 5,0		
		45,0 ± 3,0		80,0 ± 5,0		
		50,0 ± 3,0		50,0 ± 3,0		
		50,0 ± 3,0		60,0 ± 5,0		
		60,0 ± 5,0		80,0 ± 5,0		
		60,0 ± 5,0		90,0 ± 5,0		
		70,0 ± 5,0		40,0 ± 3,0		
		70,0 ± 5,0		70,0 ± 5,0		
		70,0 ± 5,0		80,0 ± 5,0		
		75,0 ± 5,0		75,0 ± 5,0		
		75,0 ± 5,0		90,0 ± 5,0		
		80,0 ± 5,0		90,0 ± 5,0		
		90,0 ± 5,0		90,0 ± 5,0		
11	Ложка Фолькмана	Длина, мм		Ширина рабочей части, мм		Длина рабочих частей, мм
		212,0 ± 5,0		3,8 ± 0,5		6,0 ± 1,0
						8,0 ± 1,0
12	Шпатель Эйера	Длина, мм			Ширина рабочих частей, мм	
		210,0 ± 5,0			18,0 ± 2,0	
					12,0 ± 2,0	
13	Цитощетка	Длина, мм		Длина щетки, мм		Диаметр щетки, мм
		192,0 ± 5,0		22,0 ± 3,0		6,0 ± 1,0
14	Цитощетка плюс	Длина, мм		Длина щетки, мм		Диаметр щетки, мм
		192,0 ± 5,0		22,0 ± 3,0		6,0 ± 1,0
15	Цитощетка со шпателем	Длина, мм	Длина щетки, мм	Диаметр щетки, мм	Ширина шпателя, мм	Длина шпателя, мм
		212,0 ± 5,0	22,0 ± 3,0	6,0 ± 1,0	16,0 ± 2,0	30,0 ± 5,0
16	Цитощетка с тампоном	Длина, мм	Длина щетки, мм	Диаметр щетки, мм	Ширина тампона, мм	Длина тампона, мм
		197,0 ± 5,0	22,0 ± 3,0	6,0 ± 1,0	10,0 ± 5,0	20,0 ± 5,0
17	Цервикальная щетка	Длина, мм		Длина щетки, мм		Ширина щетки, мм
		192,0 ± 5,0		26,0 ± 2,0		19,0 ± 2,0
18	Зонд уrogenитальный	Длина, мм		Длина рабочей части, мм		Диаметр рабочей части, мм
		177,0 ± 5,0		22,0 ± 3,0		2,5 ± 1,0

Продолжение таблицы 3.

№ п/п	Составляющие	Основные размеры			
1	2	3			
19	Зонд аспирационный Classic	Длина, мм	Длина трубки, мм	Диаметр трубки, мм	
		300,0 ± 20,0	240,0 ± 20,0	3,0 ± 0,2	
20	Зонд аспирационный Profi	Длина, мм	Длина трубки, мм	Диаметр трубки, мм	
		250,0 ± 20,0	240,0 ± 20,0	3,0 ± 0,2	
21	Зонд аспирационный Classic Combi	Длина, мм	Длина трубки, мм	Диаметр трубки, мм	
		300,0 ± 20,0	240,0 ± 20,0	3,0 ± 0,2	
22	Пинцет пластмассовый одноразовый	Длина, мм		Расстояние между браншами, мм	
		125,0 ± 5%		22,0 ± 10%	
		150,0 ± 5%		16,0 ± 10%	
23	Палочка для взятия мазка с пробиркой	Длина палочки, мм		Диаметр пробирки, мм	
		150,0 ± 5%		12,0 ± 5%	
24	Палочка для взятия мазка хлопковая	Длина, мм		Диаметр палочки, мм	
		150,0 ± 5%		0,7-1,0	
25	Палочка для взятия мазка вязкая	Длина, мм		Диаметр палочки, мм	
		150,0 ± 5%		2,5 ± 5%	
26	Зеркало гинекологическое:	Размер	Ширина, мм	Длина, мм	Размер смотрового окна, мм
	с центральным винтовым фиксатором	S	21,0 ± 1,0	102,0 ± 1,0	38,0 ± 1,0
		M	27,0 ± 1,0	114,0 ± 1,0	45,0 ± 1,0
		L	33,0 ± 1,0	121,0 ± 1,0	45,0 ± 1,0
	с центральным поворотным фиксатором	S	20,0 ± 1,0	112,0 ± 1,0	45,0 ± 1,0
		M	25,0 ± 1,0	112,0 ± 1,0	45,0 ± 1,0
		L	30,0 ± 1,0	120,0 ± 1,0	45,0 ± 1,0
	с боковым винтовым фиксатором	S	20,0 ± 1,0	104,0 ± 2,0	53,0 ± 3,0
		M	28,0 ± 1,0	110,0 ± 2,0	55,0 ± 3,0
		L	32,0 ± 1,0	120,0 ± 2,0	57,0 ± 3,0
27	Стекла предметные	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	
		26,0 ± 1,0	76,0 ± 1,0	1,0 ± 0,1	
28	Тупферы из марлевых отрезков: формы шарика, усика, треугольника	Ширина, см		Длина, см	
		12,0 ± 1,0		12,0 ± 1,0	
		15,0 ± 1,0		15,0 ± 1,0	
		18,0 ± 1,0		18,0 ± 1,0	
		18,0 ± 1,0		20,0 ± 1,0	
		20,0 ± 1,0		20,0 ± 1,0	
		30,0 ± 1,0		30,0 ± 1,0	
		50,0 ± 1,0		50,0 ± 1,0	

Примечание: ширина и длина указана для материала, из которого складываются Тупферы из марлевых отрезков: формы шарика, усика, треугольника.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие применяется во всех типах амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.

Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Непригодные к использованию изделия (неиспользованные изделия с истекшим сроком годности) относятся к отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к бытовым отходам и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) их в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В процессе производства Изделий в окружающую среду не должны выделяться токсичные вещества, оказывающие раздражающее или сенсibilизирующее действие на организм человека.

В условиях эксплуатации, Изделие должно быть нетоксично и не вызывать местно-раздражающих или аллергических реакций при контакте с кожей.

Все работы по производству Изделия должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по СанПиН 2.2.4.548.96.

Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Общие требования по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91, а также ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При тушении пожара и выполнении мероприятий по спасению людей и материальных ценностей следует использовать средства защиты органов дыхания.

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от

04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция 2007 г. с изменением № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-2008), СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

При производстве Набора, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке. Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Запрещается неорганизованное сжигание бывшего в употреблении Изделия.

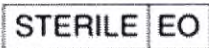
21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла») не имеет уполномоченного представителя.

22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Маркировка Изделия сопровождается графическими символами, которые должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расшифровка графических символов, используемых при маркировке Изделия, представлена в таблице 4.

Таблица 4.

	Стерилизация оксидом этилена
	Апирогенно
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки
	Использовать до
	Код партии (номер партии)
	Изготовитель
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги

	Температурный диапазон
	Символ переработки
	Зарегистрированный товарный знак

23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

Национальные стандарты РФ, регламентирующие требования безопасности, качества и методы контроля соответствия Изделия этим требованиям:

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 №930 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416";
- Постановление Правительства РФ от 17.07.2014 №670 "О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий";
- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №160 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416";
- Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 №633 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 299 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;
- ГОСТ Р 58396-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Маски медицинские. Требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;
- ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»;
- ГОСТ ISO 11607-2-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формования, герметизации и сборки»;
- ГОСТ ISO 11135-2012 «Межгосударственный стандарт. Медицинские изделия. Валидация и текущий контроль стерилизации оксидом этилена»;
- ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р ИСО 14937-2012 «Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий».

- ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
- ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»;
- ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей»;
- ГОСТ 33076-2014 «Перчатки медицинские. Метод определения герметичности»;
- ГОСТ Р 52239-2004 «Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора»;
- ГОСТ EN 455-2-2014 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Методы определения физико-механических свойств»;
- ГОСТ 32337-2013 «Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования»;
- ГОСТ 21241-89 «Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;
- ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»;
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;
- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»;
- ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»;
- МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»;
- МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-биологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»;
- ГФ РФ издание XIV ОФС. 1.2.4.0003.15. Стерильность»;
- ОФС.1.2.4.0006.15 «Общая фармакопейная статья. Пирогенность»;
- МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде»;
- ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида»;
- МУК 4.1.1209-03 «Газохроматографическое определение Е-капролактама в воде»;



- МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение <...> в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»;
- ГОСТ EN 556-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации».



Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019, варианты исполнения:

Набор №1:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см – не более 6 шт.

Ложка Фолькмана – не более 3 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic Combi – не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №2:

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см х 12см или 15см х 15см или 18см х 18см или 18см х 20см или 20см х 20см или 30см х 30см или 50см х 50см - не более 20 шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Зажим Корнцанг: 190 мм или 250 мм - не более 2 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана – не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic - не более 3 шт.

Цитощетка со шпателем - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм – не более 2 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №3:

Маска – не более 4 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL – не более 4 шт.

Зажим Корнцанг: 190 мм или 250 мм - не более 2 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Profi - не более 3 шт.

Шапочка тина «Берет» - не более 4 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая – не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №4:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Стаканчик мерный: 50 мл или 100 мл или 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic Combi – не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Стекла предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №5:

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка вязкозная – не более 3 шт.

Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм – не более 2 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №6:

Маска – не более 4 шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №7:

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см x 12см или 15см x 15см или 18см x 18см или 18см x 20см или 20см x 20см или 30см x 30см или 50см x 50см - не более 20 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Зонд урогенитальный - не более 3 шт.

Цитощетка со шпателем - не более 3 шт.

Шапочка типа «Берет» - не более 4 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм – не более 2 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №8:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic - не более 3 шт.

Цервикальная щетка - не более 3 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка вязкозная – не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №9:

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №10:

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см x 12см или 15см x 15см или 18см x 18см или 18см x 20см или 20см x 20см или 30см x 30см или 50см x 50см - не более 20 шт.

Маска – не более 4 шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic - не более 3 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм – не более 2 шт.

Стекля предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №11:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Стаканчик мерный: 50 мл или 100 мл или 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой – не более 3 шт.

Стекля предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №12:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 10 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Шапочка типа «Берет» - не более 4 шт. .

Шапочка типа «Берет» - не более 4 шт.

Стекля предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №13:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Зонд урогенитальный - не более 3 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Стекла предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №14:

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Шпатель Эйера – не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка вискозная - не более 3 шт.

Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм – не более 2 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №15:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 10 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №16:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Зонд аспирационный Classic – не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic Combi – не более 3 шт.

Шапочка типа «Берет» - не более 4 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Стекла предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №17:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Цитощетка со шпателем - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №18:

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Зонд аспирационный Profi - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм – не более 2 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №19:

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см x 12см или 15см x 15см или 18см x 18см или 18см x 20см или 20см x 20см или 30см x 30см или 50см x 50см – не более 20 шт.

Маска - не более 4 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Зажим Корнцанг: 190 мм или 250 мм - не более 2 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic - не более 3 шт.

Цервикальная щетка - не более 3 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №20:

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Стаканчик мерный: 50 мл или 100 мл или 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Шпатель Эйера – не более 3 шт.

Шапочка типа «Берет» - не более 4 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Стекля предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №21:

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см – не более 5 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – не более 2 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 10 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Profi - не более 3 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм – не более 2 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №22:

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см x 12см или 15см x 15см или 18см x 18см или 18см x 20см или 20см x 20см или 30см x 30см или 50см x 50см – не более 20 шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Стаканчик мерный: 50 мл или 100 мл или 250 мл – не более 2 шт.

Зажим Корнцанг: 190 мм или 250 мм - не более 2 шт.

Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Classic Combi - не более 3 шт.

Цитощетка со шпателем - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Стекля предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №23:

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см x 12см или 15см x 15см или 18см x 18см или 18см x 20см или 20см x 20см или 30см x 30см или 50см x 50см – не более 20 шт.

Маска - не более 4 шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – не более 2 шт.

Бахилы на резинке - не более 10 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Шпатель Эйера – не более 3 шт.

Зонд урогенитальный - не более 3 шт.

Шапочка типа «Берет» - не более 4 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка вязкозная – не более 3 шт.

Стекла предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №24

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см х 12см или 15см х 15см или 18см х 18см или 18см х 20см или 20см х 20см или 30см х 30см или 50см х 50см - не более 20 шт.

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – 1 шт.

Маска - 1 шт.

Лоток пластмассовый круглый: 250 мл – 1шт.

Лоток пластмассовый прямоугольный: 125 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл – 1шт.

Стаканчик мерный: 50 мл или 100 мл или 250 мл – 1 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 2 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 2 шт.

Бахилы на резинке - не более 2 шт.

Бахилы нетканые высокие - не более 2 шт.

Зажим Корцанг: 190 мм или 250 мм - 1 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - 1 шт.

Цитощетка - 1 шт.

Ложка Фолькмана - 1 шт.

Шпатель Эйера - 1 шт.

Цитощетка плюс - 1 шт.

Цитощетка со шпателем - 1 шт.

Цитощетка с тампоном - 1 шт.

Цервикальная щетка - 1 шт.

Зонд урогенитальный - 1 шт.

Зонд аспирационный Classic - 1 шт.

Зонд аспирационный Profi - 1 шт.

Зонд аспирационный Classic Combi - 1 шт.

Шапочка типа «Берет» - 1 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - 2 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - 1 шт.
Палочка для взятия мазка вязкозная - 1 шт.
Стекла предметные - не более 2 шт.
Зеркало гинекологическое: S или M или L - 1 шт.
Пинцет пластмассовый одноразовый: 125 мм или 150 мм - 1 шт.

Набор №25

Тупферы из марлевых отрезков: формы шарик, треугольник, усик: 12см x 12см или 15см x 15см или 18см x 18см или 18см x 20см или 20см x 20см или 30см x 30см или 50см x 50см - не более 20 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 2 шт.
Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - 1 шт.
Шапочка типа «Берет» - 1 шт.
Стекла предметные - не более 2 шт.

Набор №26

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см - не более 5 шт.
Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.
Зеркало гинекологическое: S или M или L - 1 шт.

Набор №27

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.
Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.
Зеркало гинекологическое: S или M или L - 1 шт.

Набор №28

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см x 60 см или 90 см x 60 см или 40см x 60 см - не более 5 шт.
Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.
Шпатель Эйера - не более 3 шт.
Зеркало гинекологическое: S или M или L - 1 шт.

Набор №29

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.
Салфетка медицинская: 25см x 22см или 30см x 30см или 30см x 40см или 35см x 50см или 38см x 45см или 40см x 40см или 40см x 45см или 40см x 60см или 45см x 45см или 45см x 75см или 45см x 80см или 50см x 50см или 50см x 60см или 60см x 80см или 60см x 90см или 70см x 40см или 70см x 70см или 70см x 80см или 75см x 75см или 75см x 90см или 80см x 90см или 90см x 90см - не более 6 шт.
Шпатель Эйера - не более 3 шт.
Зеркало гинекологическое: S или M или L - 1 шт.

Набор №30

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Набор №31

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №32

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №33

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №34

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №35

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №36

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №37

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка со шпателем - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №38

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №39

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №40

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или

45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Набор №41

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №42

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Цитощетка со шпателем - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №43

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №44

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №45

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №46

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №47

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Зонд уrogenитальный - не более 3 шт.

Стекла предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №48

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №49

Пеленка: Seni Soft или Seni Soft Normal или Seni Soft Basic: 60 см х 60 см или 90 см х 60 см или 40см х 60 см – не более 5 шт.

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка хлопковая - не более 3 шт.

Стекла предметные - не более 4 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №50

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зонд аспирационный Profi - не более 3 шт.

Палочка для взятия мазка с пробиркой - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №51

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х

90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №52

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Шпатель Эйера - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №53

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цервикальная щетка - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №54

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №55

Перчатки смотровые нитриловые: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №56

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х

90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №57

Перчатки смотровые латексные: XS или S или M или L или XL - не более 4 шт.

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №58

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №59

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка со шпателем - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №60

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка плюс - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №61

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см
или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или
45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х
90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см
или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Цитощетка - не более 3 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.



Общество с ограниченной ответственностью "Белла" 140300 г. Егорьевск ул. Промышленная 9
тел.: (8-49640) 48370 факс: (8-49640) 49017 ИНН 5011021499 www.bella-tzmo.ru

Цитощетка с тампоном - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.

Набор №62

Салфетка медицинская: 25см х 22см или 30см х 30см или 30см х 40см или 35см х 50см или 38см х 45см или 40см х 40см или 40см х 45см или 40см х 60см или 45см х 45см или 45см х 75см или 45см х 80см или 50см х 50см или 50см х 60см или 60см х 80см или 60см х 90см или 70см х 40см или 70см х 70см или 70см х 80см или 75см х 75см или 75см х 90см или 80см х 90см или 90см х 90см - не более 6 шт.

Ложка Фолькмана - не более 3 шт.

Зеркало гинекологическое: S или M или L – 1 шт.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(*Белла*) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик