

УТВЕРЖДАЮ

Глава Представительства
Публичной

компании «ГамброАксиебулаг»,
Швеция в России



Э.Ю. Таронишвили

23 ноября 2011 г.

М.П.

Руководство по эксплуатации

медицинского изделия

**Картридж серии CleanCart модификаций А и С
для гемодиализного аппарата**


производства

GambroLundia AB / ГамброЛундия АБ, Швеция

2011

Наименование: CleanCartA, CleanCartC.

	CleanCartA	CleanCartC
Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар.и USP)	Безводный карбонат натрия порошок 13 г.	Лимонная кислота порошок 35 г.
Общий вес картриджа	~ 37 г.	~56 г.
Материал	полипропилен	полипропилен
pH	~ 11	~ 2
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления	24 месяца с даты изготовления
Размер	255 x 245 x 80 мм	255 x 245 x 80 мм
Код продукта	101769	101770
Упаковка	Картонная коробка по 30 шт	Картонная коробка по 30 шт

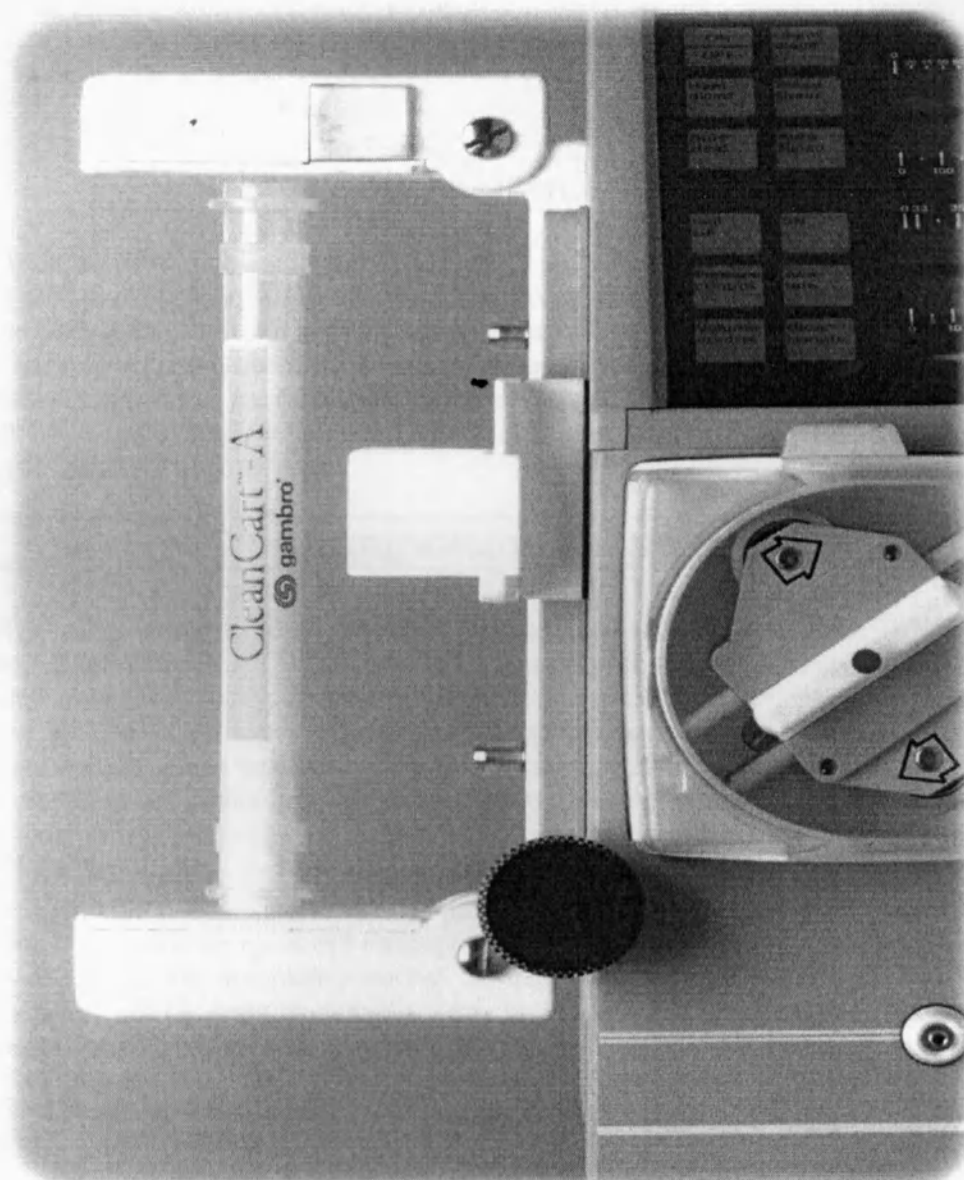

Для проведения дезинфекции, декальцификации и промывки аппаратов “искусственная почка” фирма **Gambro** предлагает использовать картриджи CleanCart. Новые разработки компании, реализованные в создании патронов CleanCart A и CleanCart C, отвечают всем требованиям, предъявляемым к обслуживанию диализных машин. В работе патрона CleanCart, также как и Bi-Cart, используется универсальная идея приготовления раствора в режиме on-line (т.е. в непрерывно-поточном режиме). Но в данном случае для приготовления раствора используется сухая лимонная кислота или карбонат натрия. Нажмите кнопку и поместите патрон CleanCart в держатель. Диализный аппарат автоматически растворяет содержимое патрона и разводит его до необходимой концентрации, проводит горячую дезинфекцию в комбинации с декальцификацией и промывкой всей гидравлической системы.

Простота и эффективность использования патрона CleanCart в сочетании с автоматизацией других важных функций аппарата позволяет значительно сэкономить время, необходимое для обслуживания диализных машин, и сократить интервалы между процедурами гемодиализа.

Вес патрона CleanCart - около 50 г, он удобен и безопасен в использовании. Применение CleanCart освобождает Вас от необходимости манипулировать с опасными растворами и транспортировать тяжелые канистры. Содержимое патронов как CleanCart A, так и CleanCart C, полностью разлагается в окружающей среде. Патрон сделан из медицинского полипропилена, следовательно, он может быть использован для вторичной переработки.

Общее описание

Система CleanCart позволяет выполнить горячую дезинфекцию в сочетании с декальцификацией и промывкой аппарата простым и безопасным способом. Вода автоматически пропускается через патрон CleanCart, вставленный в держатель аппарата “искусственная почка”. Порошок в картридже растворяется и разводится в первую минуту процедуры дезинфекции, после чего готовый для использования раствор проходит через гидравлическую систему машины. При завершении цикла дезинфекции раствор эффективно отмывается и сливается из аппарата. Пустой картридж удаляется.

Содержимое патрона

CleanCart A содержит 13 г порошка безводного карбоната натрия (в соответствии с Европейской Фармакопеей и USP). CleanCart A используется в программе горячей дезинфекции для промывки аппаратов “искусственная почка”.

Полученный 0,5% раствор карбоната натрия удаляет отложения органических веществ, жиры и белки во время циркуляции через гидравлическую систему диализного аппарата.

Использование патрона CleanCart A в комбинации с горячей дезинфекцией, как и применявшийся прежде гипохлорит натрия, позволяет эффективно отмыть аппарат.

CleanCart C содержит 35 г порошка лимонной кислоты (в соответствии с Европейской Фармакопеей и USP). Использование патрона CleanCart C включено в программу горячей дезинфекции, что позволяет провести одновременно не только дезинфекцию и промывку аппарата “искусственная почка”, но декальцификацию.

2% раствор лимонной кислоты, полученный при растворении и разведении содержимого патрона, удаляет преципитированные соли кальция и магния во время циркуляции через гидравлическую систему “искусственной почки”. Низкое значение pH раствора используемой лимонной кислоты увеличивает эффективность горячей дезинфекции.

Сшито и заверено печатью 3

(т. 1) лист а

