



Инструкция по применению

«Пластыри серии COMPEED»

1. Пластыри COMPEED для лечения ран:

Пластырь для порезов и неглубоких ран 3в1

Форма продукта:

Пластыри в картонной упаковке. Каждый пластырь имеет индивидуальную бумажную упаковку.

Назначение продукта:

Разработан для защиты поврежденной кожи от трения, грязи, микробов и инфекции. Облегчает боль, защищая поврежденный участок кожи от внешнего давления. Способствует быстрому заживлению. Плотнo приклеивается к коже и прекрасно держится на месте, тем самым, изолируя поврежденный участок от проникновения грязи и микробов, легко отклеивается при необходимости.

Ингредиенты:

Стироловый-изопреновый сополимер – 15-30%

Углеводородная смола – 25-45%

Диоктил адипат – 4-10%

Диоксид титана – 0-5%

Негидрофобные частицы – 20-55%

Группы населения, для которых предназначен продукт:

Продукт подходит для людей любого возраста. Прекрасно подходит для людей ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом.

Инструкция по применению Пластыря для порезов и неглубоких ран 3в1

В случае диабета проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем начать использовать.

1. Убедитесь, что кожа в месте повреждения чистая, сухая и очищена от кремов или масел.
2. Достаньте пластырь из индивидуальной бумажной упаковки с надписью «Compeed». Удалите белое бумажное покрытие снизу. Не дотрагивайтесь до липкой стороны. Наклейте пластырь на поврежденный участок кожи.
3. Заменяйте свежим пластырем «Compeed» настолько часто, насколько требуется.

*Инструкция по применению наносится на упаковку продукта.

Пластырь для порезов и неглубоких ран жидкий с аппликаторами "Liquid Bandage"

Форма продукта:

Жидкий пластырь в пластиковой бутылочке (40 капель), 10 аппликаторов.

Назначение продукта:

Разработан для обработки неглубоких ран, порезов, разрывов, ссадин, трещин, волдырей на коже и заусенцев. Останавливает кровотечение, облегчает боль. Способствует быстрому заживлению. Образует прозрачное, пластичное покрытие, защищающее поврежденный участок кожи от микробов и не препятствующее кожному дыханию. Водостойкий, не смывается водой. Одно применение рассчитано на 24-48 часов. Особенно удобен для обработки ран на сгибах суставов, в складках кожи и других труднодоступных местах.

Ингредиенты:

2-октилцианоакрилат, содержащий парабен

Группы населения, для которых предназначен продукт:

Продукт подходит для людей любого возраста. Прекрасно подходит для людей ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом.

Инструкция по применению Пластыря для порезов и неглубоких ран жидкого с аппликаторами "Liquid Bandage"

1. Тщательно промойте и высушите поврежденный участок кожи. Не наносите крем или масло.
2. Нанесите 4 капли жидкого пластыря на маленькую губку на аппликаторе. Для достижения наилучшего результата, избегайте соприкосновения бутылочки и аппликатора. Без применения аппликатора жидкий пластырь не будет действовать.
3. Еще раз просушите ранку и сразу же наносите жидкий пластырь при помощи аппликатора. Необходимо обработать только поврежденную область, не дотрагиваясь до окружающей ранку кожи. Повторите при необходимости.
4. Выкиньте аппликатор. Плотнo закройте бутылочку с жидким пластырем.
5. Не дотрагивайтесь до обработанного участка кожи в течение 1 минуты, чтобы дать сформироваться защитному покрытию.
6. Когда рана заживет, защитное покрытие отклеится естественным образом. При необходимости его можно удалить при помощи минерального масла. Нанесите масло на обработанную жидким пластырем поверхность, подождите минуту и смойте при помощи мыла и воды.

Инструкция по применению наносится на упаковку продукта.

Пластырь для порезов и неглубоких ран на пальцах рук "Finger Crack"

Форма продукта:

Пластыри в картонной упаковке. Каждый пластырь имеет индивидуальную бумажную упаковку.

Назначение продукта:

Разработан для защиты небольших порезов на пальцах рук и возле ногтя от грязи, микробов и инфекции. Особенно хорошо подходит при порезах от бумаги, заусенцах, ранках возле ногтей, неглубоких трещинах, вызванных сухостью кожи. Облегчает боль, защищая поврежденный участок кожи от внешнего давления.

Способствует быстрому заживлению. Плотнo приклеивается к коже и прекрасно держится на месте, тем самым, изолируя поврежденный участок от проникновения грязи и микробов, легко отклеивается при необходимости.

Ингредиенты:

Стироловый-изопреновый сополимер – 15-30%

Углеводородная смола – 25-45%

Диоктил адипат – 4-10%

Диоксид титана – 0-5%

Негидрофобные частицы – 20-55%

Группы населения, для которых предназначен продукт:

Продукт подходит для людей любого возраста. Прекрасно подходит для людей с чувствительной кожей, склонной к сухости и появлению трещин.

Инструкция по применению Пластыря для порезов и неглубоких ран на пальцах рук "Finger Crack"

В случае диабета проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем начать использовать.

1. Убедитесь, что кожа в месте повреждения чистая, сухая и очищена от кремов или масел.
2. Достаньте пластырь из индивидуальной бумажной упаковки. Удалите с пластыря верхнее бумажное покрытие с надписью «Compeed». Удалите белое бумажное покрытие снизу. Не дотрагивайтесь до липкой стороны.
3. Наклейте пластырь на поврежденный участок кожи следующим образом: приклейте пластырь на кончик пальца за ногтем точно по центру, затем оберните оба конца пластыря вокруг ногтя поочередно. Пластырь приклеится лучше, если его погреть руками в течение 1 минуты до и после применения.
4. Заменяйте свежим пластырем «Compeed» настолько часто, насколько требуется.

*Инструкция по применению наносится на упаковку продукта.

Пластырь для порезов и неглубоких ран на пальцах рук водоотталкивающий "Finger Wrap"

Форма продукта:

Пластыри в картонной упаковке. Каждый пластырь имеет индивидуальную бумажную упаковку.

Назначение продукта:

Разработан для защиты поврежденной кожи пальцев от воды, грязи, микробов и инфекции. Чрезвычайно тонкий воздухопроницаемый водоотталкивающий пластырь с антисептической подушечкой. Не препятствует кожному дыханию и способствует быстрому заживлению. Плотнo приклеивается к коже и прекрасно держится на месте, даже если возникает частое или продолжительное соприкосновение с водой. Легко отклеивается при необходимости.

Ингредиенты:

Полиуретан/полистрол

65% вискоза

35% полиамид

Группы населения, для которых предназначен продукт:

Продукт подходит для людей любого возраста. Прекрасно подходит для людей ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом, особенно плаванием.

Инструкция по применению Пластыря для порезов и неглубоких ран на пальцах рук водоотталкивающего "Finger Wrap"

1. Убедитесь, что кожа в месте повреждения чистая, сухая и очищена от кремов или масел.
2. Достаньте пластырь из индивидуальной бумажной упаковки с надписью «Compeed». Удалите белое бумажное покрытие снизу. Не дотрагивайтесь до липкой стороны. Наклейте пластырь на поврежденный участок кожи, обернув вокруг пальца.
3. Заменяйте свежим пластырем «Compeed» настолько часто, насколько требуется.

*Инструкция по применению наносится на упаковку продукта.

2. Пластыри COMPEED для лечения поверхностных повреждений кожи:

Пластырь для удаления мозолей на ногах "Active Corn Remover"

Форма продукта:

Пластыри в пластиковой упаковке с картонной вставкой.

Назначение продукта:

Разработан для облегчения и удаления мозолей. Облегчает боль, защищая поврежденный участок кожи от внешнего давления. Не препятствует кожному дыханию, поддерживает необходимый уровень увлажненности кожи. Салициловая кислота размягчает мозоль, способствуя ее постепенному удалению. Плотно приклеивается к коже и прекрасно держится на месте, легко отклеивается при необходимости.

Ингредиенты:

Искусственный эластомер

Клейкая смола

Гидроколлоидные частицы (натрий карбоксиметил целлюлоза)

Пластиксер

Полиуретановое покрытие

Салициловая кислота (40%)

Группы населения, для которых предназначен продукт:

Продукт предназначен для людей:

- любого возраста
- ведущих активный образ жизни
- занимающихся спортом
- проводящих много времени на ногах
- пожилых людей с проблемной кожей ног

Инструкция по применению Пластыря для удаления мозолей на ногах "Active Corn Remover"

1. Для достижения наилучшего результата размягчите мозолистую кожу, разогрев ногу в теплой воде. Удалите затвердевшую кожу, соскабливая ее при помощи ногтя и стирая полотенцем. Не используйте пилочку. Тщательно высушите кожу.
2. Удалите с пластыря верхнее бумажное покрытие с надписью «Compeed». Удалите белое бумажное покрытие снизу. Не дотрагивайтесь до липкой стороны. Поместите пластырь на мозоль. Пластырь приклеится лучше, если его погреть руками в течение 1 минуты до и после применения.
3. Оставьте пластырь на месте, пока он сам не отклеится естественным образом через 3-4 дня. Заменяйте новым пластырем настолько часто, насколько требуется.

Пластырь от натертостей на суставе большого пальца "Bunion"

Форма продукта:

Пластыри в пластиковой упаковке с картонной вставкой.

Назначение продукта:

Разработан для облегчения и удаления натертостей на суставе большого пальца ноги. Облегчает боль, защищая сустав и кожу от внешнего давления и трения. Не препятствует кожному дыханию, поддерживает необходимый уровень увлажненности кожи, способствуя постепенному смягчению и удалению натертостей. Плотнo приклеивается к коже и прекрасно держится на месте, легко отклеивается при необходимости.

Ингредиенты:

Искусственный эластомер

Клейкая смола

Гидроколлоидные частицы (натрий карбоксиметил целлюлоза)

Пластиксер

Полиуретановое покрытие

Группы населения, для которых предназначен продукт:

- Продукт предназначен для людей, страдающих от увеличения сустава на большом пальце ноги (бурсита).

Инструкция по применению Пластыря от натертостей на суставе большого пальца "Bunion"

В случае диабета проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем начать использовать.

1. Убедитесь, что площадь мозоли или шишки на суставе чистая, сухая и очищена от кремов или масел.
2. Удалите с пластыря верхнее бумажное покрытие с надписью «Compeed». Удалите белое бумажное покрытие снизу. Не дотрагивайтесь до липкой стороны. Наклейте пластырь на сустав (шишку). Пластырь приклеится лучше, если его погреть руками в течение 1 минуты до и после применения.
3. Оставьте пластырь на месте, пока он сам не отклеится естественным образом через 3-4 дня. Заменяйте свежим пластырем «Compeed» настолько часто, насколько требуется.

*Инструкция по применению наносится на упаковку продукта.

Пластырь от мозолей и волдырей на ногах, "Blister"

Форма продукта:

Пластыри в пластиковой упаковке с картонной вставкой.

Назначение продукта:

Разработан для облегчения и удаления мозолей и волдырей на ногах. Облегчает боль, защищая поврежденный участок кожи от внешнего давления. Не препятствует кожному дыханию, поддерживает необходимый уровень увлажненности кожи, способствуя постепенному удалению мозоли или волдыря. Плотнo приклеивается к коже и прекрасно держится на месте, препятствуя проникновению микробов и бактерий. Легко отклеивается при необходимости.

Ингредиенты:

Искусственный эластомер

Клейкая смола

Гидроколлоидные частицы (натрий карбоксиметил целлюлоза)

Пластиксер

Полиуретановое покрытие

Группы населения, для которых предназначен продукт:

Продукт предназначен для людей:

- любого возраста
- ведущих активный образ жизни
- занимающихся спортом
- проводящих много времени на ногах
- пожилых людей с проблемной кожей ног

Инструкция по применению Пластыря от мозолей и волдырей на ногах

В случае диабета проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем начать использовать.

1. Убедитесь, что площадь волдыря чистая, сухая и очищена от кремов или масел. Если волдырь уже лопнул, осторожно удалите отслоившуюся кожу.
2. Удалите с пластыря верхнее бумажное покрытие с надписью «Compeed». Удалите белое бумажное покрытие снизу. Не дотрагивайтесь до липкой стороны. Наклейте пластырь на волдырь. Пластырь приклеится лучше, если его погреть руками в течение 1 минуты до и после применения.
3. Оставьте пластырь на месте, пока он сам не отклеится естественным образом через 2-3 дня. Для более легкого удаления слегка потяните «Compeed» за краешек или намочите его в теплой воде.
4. Для достижения наилучшего результата используйте «Compeed» до тех пор, пока кожа полностью не заживет.

*Инструкция по применению наносится на упаковку продукта.

Пластырь от мозолей и трещин на пятках

Форма продукта:

Пластыри в картонной упаковке.

Назначение продукта:

Разработан для удаления мозолей и смягчения трещин на пятке. Облегчает боль, защищая поврежденный участок кожи от внешнего давления. Не препятствует

кожному дыханию, поддерживает необходимый уровень увлажненности кожи, способствуя постепенному удалению мозоли или трещины. Плотнo приклеивается к коже и прекрасно держится на месте, препятствуя проникновению микробов и бактерий. Легко отклеивается при необходимости.

Ингредиенты:

Искусственный эластомер

Клейкая смола

Гидроколлоидные частицы (натрий карбоксиметил целлюлоза)

Пластиксер

Полиуретановое покрытие

Группы населения, для которых предназначен продукт:

Продукт предназначен для людей:

- любого возраста
- ведущих активный образ жизни
- занимающихся спортом
- проводящих много времени на ногах
- пожилых людей с проблемной кожей ног

Инструкция по применению Пластыря от мозолей и трещин на пятках*

В случае диабета проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем начать использовать.

1. Для достижения наилучшего результата размягчите кожу на пятках, разогрев ногу в теплой воде. Удалите затвердевшую кожу, соскабливая ее при помощи ногтя и стирая полотенцем. Не используйте пилочку. Тщательно высушите кожу.
2. Удалите с пластыря верхнее бумажное покрытие с надписью «Compeed». Удалите белое бумажное покрытие снизу. Не дотрагивайтесь до липкой стороны. Поместите пластырь на заднюю и нижнюю стороны пятки. Пластырь приклеится лучше, если его погреть руками в течение 1 минуты до и после применения.
3. Оставьте пластырь на месте, пока он сам не отклеится естественным образом через 3-4 дня. Заменяйте новым пластырем настолько часто, насколько требуется.

*Инструкция по применению наносится на упаковку продукта.