

тактами, который подключается к левой части устройства.

ностью цифровое управление обеспечивает максимальную универсальность для всех режимов работы.

Прикладной точки зрения на каждое ухо могут подаваться два типа сигналов. Первый используется для стимуляции, это периодический сигнал с формой, которая задается математически, второй сигнал представляет собой псевдослучайный шум.

Для каждого сигнала можно настроить специфические параметры, выход для сигнала, и ухо, на которое сигнал будет подаваться.

Тележка

В системе Nemus SYSTEM используется специальная тележка, на которую (в данной конфигурации) устанавливаются все компоненты системы: система сбора и подачи стимулирующих сигналов Nemus, персональный компьютер, монитор, принтер, клавиатура, акустическая система и прочие вспомогательные модули.

Базовый модуль Nemus устанавливается на специальной подставке, которая крепится к тележке.

Благодаря этому модуль может легко использоваться и устанавливаться рядом с пациентом.

Тележка оборудована соответствующим изолирующим модулем, в состав которого входит трансформатор на 500 ВА. Данный модуль позволяет использовать всю систему внутри зоны пациента, в соответствии с стандартами безопасности IEC 601-1 и IEC 601-1-1.



Рисунок 2. Полностью укомплектованная система Nemus

Состав ИМН, включая основные комплектующие и принадлежности:
Система для нейрофизиологических исследований Nemus с принадлежностями