



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ»



О.Е. Макарова

200__г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Протез синовиальной жидкости Hyruan Plus
(торговые названия: LG Hyruan Plus, LG Hyaluronic Acid, LG
HA Plus, Hialux / Гиалюкс)

1. Название изделия:

Протез синовиальной жидкости Hyuguan Plus

(торговые названия: LG Hyuguan Plus, LG Hyaluronic Acid, LG HA Plus, Hialux / Гиалюкс)

2. Заводы-Производители:

- **LG Life Sciences, Ltd., Корея**

LG Twin Towers, 20 Yoido-dong, Youngdungpo-gu, 150-721 Seoul, KOREA

- **LG Life Sciences, Ltd., Корея**


104-1 Munji-dong, Yuseong-gu, 305-380 Daejeon, KOREA

- **LG Life Sciences, Ltd., Корея**

601 Yongjae-dong, Iksan, 570-350 Jeollabuk-do, KOREA

4. Описание изделия:

Протез синовиальной жидкости Hyuguan Plus представляет собой 1% водный раствор гиалуроната натрия для внутрисуставного применения при остеоартрозах коленного сустава для снятия болевого синдрома посредством временного замещения синовиальной жидкости.

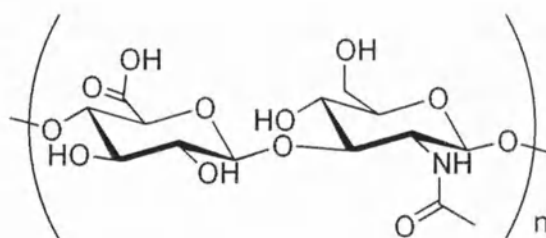

Протез синовиальной жидкости Hyuguan Plus содержится в одноразовом шприц-тюбике по 2 мл., стерилен, готов к применению.

Остеоартроз коленного сустава является распространенной и сложной проблемой. Традиционные нехирургические методы лечения часто не эффективны или не устраняют остаточные симптомы заболевания особенно в далеко зашедших стадиях. Вязкая поддержка - это новый способ лечения пациентов с остеоартрозом, которая включает в себя серию внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты.

Терапевтический эффект Hyuguan Plus связан с повышением упруговязкости синовиальной жидкости, посредством чего улучшается физиологический и

реологический статус тканей пораженного сустава. Это ведет к снижению боли и улучшению функции пораженного сустава, защите суставного хряща от механического и химического повреждения.

Инструкция по применению:

1. Вынуть блистер со шприцом-тюбиком из картонной упаковки.
2. Убедиться в отсутствии повреждений и нарушения целостности блистера.
3. Вскрыть блистер, взяв за «язычок» бумажную пленку.
4. Снять резиновый колпачок адаптера шприца-тюбика и соединить с иглой необходимого калибра (игла должна быть подготовлена заранее с учетом особенностей пациента).
5. Убедиться в прочности соединения игла/адаптер.
6. Ввести препарат согласно стандартной практике внутрисуставных инъекций. Для удобства введения препарата шприц-тюбик оборудован упором для пальцев. Ход поршня ровный, без рывков.
7. **Не использовать изделие с истекшим сроком годности!**
8. **Не использовать изделие с поврежденной упаковкой! Изделие стерильно!**

