


УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Смарт Компресс»

 Евменов А. В.
«15» апреля 2020 г.

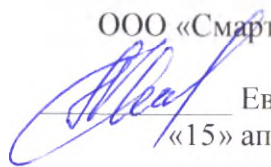

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Бандажи медицинские эластичные
компрессионные поддерживающие
для фиксации суставов «СК»
по ТУ 32.50.22-001-25779800-2019**

Введена впервые

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандажи медицинские эластичные компрессионные поддерживающие для фиксации суставов «СК» по ТУ 32.50.22-001-25779800-2019

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Вид 1 (бандаж на колено) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации коленного сустава (модельный ряд: БК–«СК», БКС–«СК», БКГ–«СК», БКГС–«СК», БКБ–«СК», БКБС–«СК»; типоразмерный ряд: 1,2,3,4,5,6,7,8);
- Вид 2 (бандаж на голеностоп) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации голеностопного сустава (модельный ряд: БГ–«СК», БГГ–«СК», БГБ–«СК»; типоразмерный ряд: 1,2,3,4,5,6);
- Вид 3 (бандаж на локоть) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации локтевого сустава (модельный ряд: БЛ–«СК», БЛС–«СК», БЛГ–«СК», БЛГС–«СК», БЛБ–«СК», БЛБС–«СК»; типоразмерный ряд: 1,2,3,4,5,6);
- Вид 4 (бандаж на запястье) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации лучезапястного сустава (модельный ряд: БЗ–«СК», БЗС–«СК», БЗГ–«СК», БЗГС–«СК», БЗБ – «СК», БЗБС – «СК»; типоразмерный ряд: 1,2,3,4,5,6).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Бандаж одного вида, модели и типоразмера – от 1 до 2 шт;
- Памятка по применению– 1 шт.

4. НАЗНАЧЕНИЕ

для профилактики и лечения: послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома; нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей; острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей; хронических дегенеративных заболеваний; лёгкой нестабильности и излишней подвижности в суставе; атрофии мышечных тканей после снятия гипса; для профилактической меры травматизма, при занятиях спортом.

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бандажи могут быть использованы в стационарных, амбулаторных и домашних условиях.

6. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Люди, которые нуждаются в профилактике и лечении: послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома; нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей; острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей; хронических дегенеративных заболеваний; лёгкой нестабильности и излишней подвижности в суставе; атрофии мышечных тканей после снятия гипса; для профилактической меры травматизма, при занятиях спортом.

7. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

для профилактики и лечения:

- послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома;
- нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей;

- острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей;
- хронических дегенеративных заболеваний сустава;
- лёгкой нестабильности и излишней подвижности в суставе;
- атрофии мышечных тканей в области сустава после снятия гипса;
- для профилактической меры травматизма, при занятиях спортом.

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- открытые раны в области соприкосновения с изделием;
- местные кожные заболевания (дерматиты);
- аллергические реакции на материалы биндажа.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не применять после истечения срока годности;
- Не применять при наличии дефектов изделий при визуальном осмотре (см. п. 12)

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

11. Указания по эксплуатации

- Применять изделие следует согласно рекомендациям Вашего доктора.
- Изделие предназначено только для индивидуального использования.
- Продолжительность использования изделия определяется специалистом.
- При появлении аллергической реакции необходимо обратиться к специалисту.
- Использовать изделие следует только для областей тела, которые указаны в рекомендациях.
- Совместное применение с другими изделиями (например, с компрессионными чулками) должно быть согласовано с Вашим доктором.
- Изделие следует снимать во время длительных перерывов на отдых (например, сон, длительное пребывание в сидячем положении).
- Если Вы заметили любые необычные изменения в процессе эксплуатации изделия, например: усиление Ваших симптомов, неприятные ощущения, следует немедленно снять его и обратиться к доктору.
- Подбирать изделия нужно в соответствии с размерами, указанными в таблице на упаковке (см. таблицу подбора типоразмеров на упаковке).

1) Вид 1 (биндаж на колено):

Условный типоразмер	Обхват ноги в области коленного сустава, см
1	25 - 28
2	28 - 31
3	31 - 34
4	34 - 37
5	37 - 40
6	40 - 43
7	43 - 46
8	46 - 49

2) Вид 2 (биндаж на голеностоп):

Условный типоразмер	Обхват ноги в области голеностопного сустава, см
1	17 - 19
2	19 - 21
3	21 - 23
4	23 - 25
5	25 - 27
6	27 - 29

3) Вид 3 (бандаж на локоть):

Условный типоразмер	Обхват руки в области локтевого сустава, см
1	22 - 24
2	24 - 26
3	26 - 28
4	28 - 30
5	30 - 32
6	32 - 34

4) Вид 4 (бандаж на запястье):


Условный типоразмер	Обхват руки в области лучезапястного сустава, см.
1	14 - 15
2	15 - 16
3	16 - 17
4	17 - 18
5	18 - 19
6	19 - 20

Инструкция по применению:

- Проверить целостность изделия методом визуального осмотра.
- Осуществить гигиенические мероприятия по уходу за кожей рук/ног, снять украшения, которые могут повредить кожу рук/ног и изделие.
- Подбирать изделия нужно в соответствии с размерами, указанными в таблице на упаковке (см. таблицу подбора типоразмеров на упаковке). Если обхват Вашего сустава является пограничным значением в таблице подбора типоразмеров и Вы затрудняетесь с выбором, то Вам следует проконсультироваться со специалистом (врачом), так как использование изделия большего размера обеспечит Вам меньшее сжатие, менее сильную поддержку сустава, возможно небольшое сползание изделия вниз, а использование изделия меньшего размера обеспечит Вам более плотное прилегание к телу, более сильную поддержку сустава, однако может стать причиной местного сдавливания тканей, нижележащих кровеносных сосудов и нервов. Будьте внимательны при выборе изделия.
- Рекомендации по правильному надеванию медицинского изделия:


Бандаж на колено.

1. Надевать изделие нужно так, чтобы более тонкий его участок располагался с тыльной стороны колена, боковой шов должен располагаться сбоку и немного сзади коленного сустава. (1)
2. Выверните верхнюю часть изделия наизнанку. (2)
3. Натяните в этом состоянии бандаж на икру ноги до середины коленной чашечки. (3)
4. Раскатайте ту часть бандажа, которая была наизнанку расправьте изделие по ноге. При необходимости поправьте бандаж. (4)
5. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать коленный сустав слишком сильно. (4)

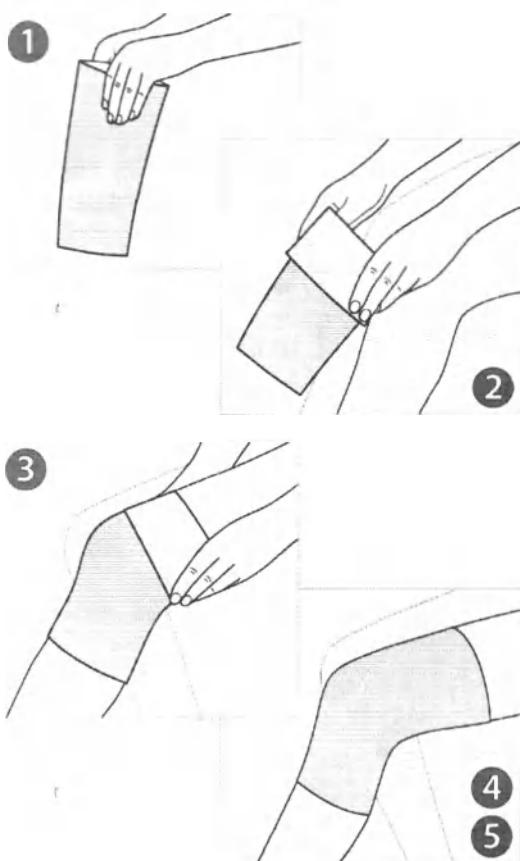


Бандаж на голеностоп.

1. Верхний край изделия обработан на краеобметочной машине (оверлок) с прокладыванием укрепляющей эластичной ленты. Убедитесь в том, что Вы надеваете изделие в нужном направлении. (1)
2. Выверните верхнюю часть изделия наизнанку. (2)
3. Удерживая бандаж за область пятки, равномерно натяните его на стопу. При необходимости поправьте изделие. (3)
4. Раскатайте ту часть бандажа, которая была наизнанку и расправьте его по ноге. (4)
5. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать голеностопный сустав слишком сильно. (4)

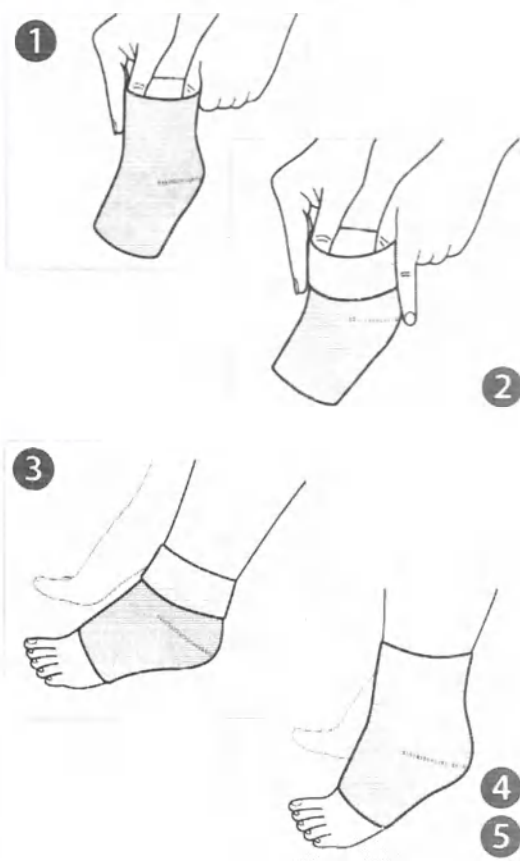

Бандаж на локоть.

1. Выверните верхнюю часть изделия наизнанку. (1)
2. Натяните бандаж в этом состоянии до локтевого сустава. (2, 3)
3. Раскатайте ту часть бандажа, которая была наизнанку и равномерно расправьте изделие по руке. При необходимости поправьте бандаж. (4)
4. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать локтевой сустав слишком сильно. (4)

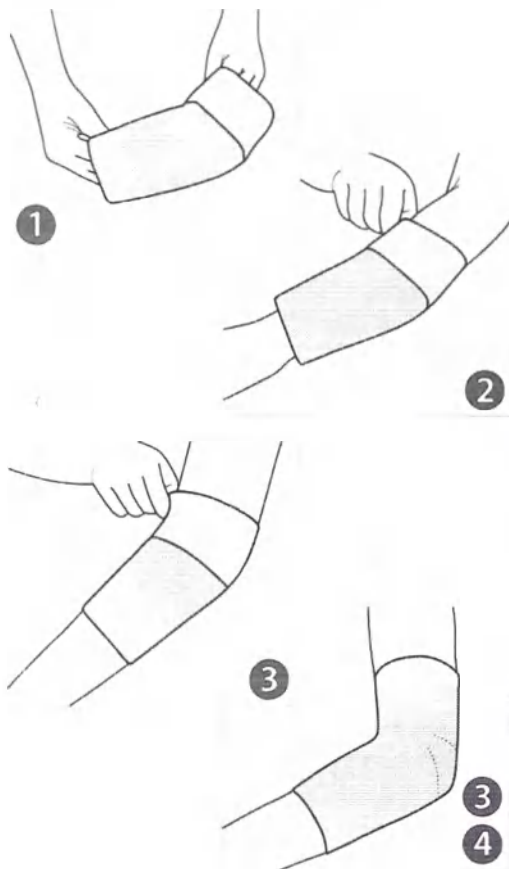

Бандаж на запястье.

1. Убедитесь в том, что перед Вами нужное для Вас изделие (на правую или на левую руку). Стикер с данной информацией размещен на упаковке изделия. (1)
2. Удерживая бандаж за фиксирующую полосу, медленно натяните его на руку. При необходимости поправьте бандаж. (2)
3. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать лучезапястный сустав слишком сильно. (3)



ПРАВИЛА ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Ручная стирка мягкими моющими средствами при температуре, не более 40⁰С.
- Не отжимать;
- Сушить в расправленном виде, вдали от нагревательных приборов и не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- Предохранять изделие от воздействия прямого солнечного света.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ

- Класс компрессии у медицинских эластичных компрессионных поддерживающих бандажей не классифицируется (не определяется, не фиксируется).

• Кратность применения

По режиму эксплуатации бандажи относятся к изделиям многократного пользования.

• **Сырьевой состав бандажей, кроме моделей:** БКБ–«СК», БКБС–«СК», БГБ–«СК», БЛБ–«СК», БЛБС–«СК», БЗБ–«СК», БЗБС–«СК»):

- полиамидная нить 75 % -90%;
- эластомерная нить 10 % - 25%.

• **Сырьевой состав бандажей моделей:** БКБ–«СК», БКБС–«СК», БГБ–«СК», БЛБ–«СК», БЛБС–«СК», БЗБ–«СК», БЗБС–«СК»):

- бамбуковая нить 48 % -63%;
- полиамидная нить 21 % -36%;
- эластомерная нить 10 % -25%.

• **Физико-механические показатели**

Наименование параметра	Показатель
1. Растяжимость до и после стирки, %	Более 80
2. Рабочая растяжимость до и после стирки, %	Не менее 2, но не более 70
3. Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 200
4. Разрывная нагрузка до и после стирки, Н (кгс)	Не менее 196,0 (20)
5. Остаточная деформация до и после стирки, %	Не более 10
6. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %	Не более 20
7. Разрывное удлинение до стирки, %	Не менее 80
8. Разрывное удлинение после стирки, %	Не более 20% от разрывного удлинения до стирки

• **Конструктивные особенности исполнения**

– Вид 1 (бандаж на колено) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации коленного сустава, представляет собой контурное изделие, сшитое плоским швом. Хорошее анатомическое прилегание достигается благодаря конструктивным особенностям и эластичности материала. Верхний и нижний край изделия заработаны. Бандаж универсален, подходит для левой и правой ноги. На изнаночную часть изделия (для моделей: БКС–«СК», БКГС–«СК», БКБС–«СК») нанесен силикон для фиксации бандажа на колене. Бандажи на колено модели БК–«СК», БКС–«СК» выполнены вязкой с «3D эффектом». Бандажи на колено модели БКГ–«СК», БКГС–«СК» выполнены гладкой вязкой. Бандажи на колено модели БКБ–«СК», БКБС–«СК» выполнены гладкой вязкой с узором.

– Вид 2 (бандаж на голеностоп) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации голеностопного сустава представляет собой контурное изделие, сшитое плоским швом. Хорошее анатомическое прилегание достигается благодаря конструктивным особенностям и эластичности материала. Верхний и нижний край изделия заработаны. Бандаж универсален, подходит для левой и правой ноги. Бандажи на голеностоп модели БГ–«СК» выполнены вязкой с «3D эффектом». Бандажи на голеностоп модели БГГ–«СК» выполнены гладкой вязкой. Бандажи на голеностоп модели БГБ–«СК» выполнены гладкой вязкой с узором.

– Вид 3 (бандаж на локоть) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации локтевого сустава представляет собой контурное изделие, сшитое плоским швом. Хорошее анатомическое прилегание достигается благодаря конструктивным особенностям и эластичности материала. Верхний и нижний край изделия заработаны. Бандаж универсален, подходит для левой и правой руки. На изнаночную часть изделия (для моделей: БЛС–«СК», БЛГС–«СК», БЛБС–«СК») нанесен силикон для фиксации бандажа на локте. Бандажи на локоть модели БЛ–«СК», БЛС–«СК» выполнены вязкой с «3D эффектом». Бандажи на локоть модели БЛГ–«СК», БЛГС–«СК» выполнены гладкой вязкой. Бандажи на локоть модели БЛБ–«СК», БЛБС–«СК» выполнены гладкой вязкой с узором.

– Вид 4 (бандаж на запястье) – Бандаж медицинский эластичный компрессионный поддерживающий для фиксации лучезапястного сустава представляет собой контурное изделие, сшитое плоским швом. Хорошее анатомическое прилегание достигается благодаря конструктивным особенностям и эластичности материала. Верхний и нижний край изделия заработаны. Бандаж представлен в двух исполнениях: правый, левый. На лицевую часть

изделия (для моделей: БЗС—«СК», БЗГС—«СК», БЗБС—«СК») нанесен силикон для удобства эксплуатации бандажа. Бандажи на запястье модели БЗ—«СК», БЗС—«СК» выполнены вязкой с «3D эффектом». Бандажи на запястье модели БЗГ—«СК», БЗГС—«СК» выполнены гладкой вязкой. Бандажи на запястье модели БЗБ—«СК», БЗБС—«СК» выполнены гладкой вязкой с узором.

• **Требования к изготовлению**

- Изделия должны быть изготовлены на специальной плосковязальной машине.
- Швы в изделиях должны быть с равномерной частотой строчки, без пропуска стежков, без натяжения полотна и нити в строчке.
- Не допускается выскальзывание эластомерных нитей и пробивка полотна при пошиве изделий. Концы швов должны быть закреплены, свободные нити обрезаны.
- Бандажи должны выпускаться только первым сортом. В изделиях не допускаются пороки: пятна, обрывы нити, спуск петель, дыры.
- На модели с силиконом силиконовые капли должны быть нанесены на связанные, но не сшитые изделия (т.е. полуфабрикаты). В бандажах Вид 1, Вид 3 силикон должен быть нанесен на изнаночную сторону изделия, в бандажах Вид 4 - на лицевую сторону изделия.

13. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Транспортирование бандажей производят в соответствии с ГОСТ 7000 всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.
- Условия хранения бандажей на складах должны соответствовать 1(Л) ГОСТ 15150. Необходимое условие - отсутствие воздействия прямых солнечных лучей на бандажи в первичной упаковке; изделия должны находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.
- Хранить изделие при эксплуатации рекомендуется в упаковке при относительной влажности не более 80% и температуре не ниже +5°C и не выше +40°C на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов;

14. УТИЛИЗАЦИЯ

- Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям ТУ 32.50.22-001-25779800-2019 (Растяжимость до и после стирки, Рабочая растяжимость (центр сустава) до и после стирки, Поверхностная плотность, Разрывная нагрузка до и после стирки, Остаточная деформация до и после стирки, Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, Разрывное удлинение до стирки, Разрывное удлинение после стирки) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Срок годности бандажей 5 лет с даты изготовления.
- Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев с даты продажи, в пределах срока годности.

16. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Бандажи имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

17. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: ООО «Смарт Компресс», Россия, 214030, г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 21а, пом.6. Тел.: 8 (4812) 70-21-40 в Москве: 8(495)786-82-03, www.smart-compress.ru

18. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Компресс» (ООО «Смарт Компресс»)
Адрес: Россия, 214030, г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 21а, пом. 2-22. Тел.: 8 (4812) 70-21-40, в Москве: 8(495)786-82-03

19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014, стандарты серии ГОСТ ISO 10993 (Часть 1, 5,10,12); ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009; ГОСТ Р 52770; ГОСТ 31214.

20. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ НА МАРКИРОВКЕ

Обозначение	Расшифровка	Обозначение	Расшифровка
	Не отбеливать		Хрупкое. Осторожно
	Сушка в тени		Беречь от влаги
	Сухая чистка запрещена		Пределы температуры
	Глажение запрещено		Верх
	Только ручная стирка		Символ утилизации «Выбросить в урну»
	Знак соответствия		

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девятъ) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность Директор Евменков А.М. Ф.И.О.

Подпись _____


« 25 » 06 2020 г.

МП



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Смарт Компресс»

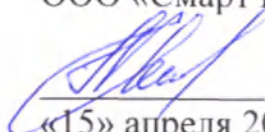 Евменов А. В.
«15» апреля 2020 г.

М.П.



ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНИЮ
медицинского изделия

**Бандажи медицинские эластичные компрессионные
поддерживающие для фиксации суставов «СК»
по ТУ 32.50.22-001-25779800-2019**

Введена впервые

Уважаемый клиент,

спасибо за то, что Вы выбираете продукцию компании «Смарт Компресс».

Предприятие – изготовитель ООО «Смарт Компресс» выпускает высококачественные изделия на передовом оборудовании с применением новейших технологий и инновационных видов нитей. Наши изделия

- изготовлены с использованием революционной технологии вязки, благодаря которой изделия растягиваются сразу в двух направлениях, чем достигается максимально комфортное прилегание материала к телу и надежная фиксация суставов;
- не ограничивают движение в суставе в физиологическом объеме;
- не скользят, устойчивы к растяжению, долго сохраняют свою форму;
- комфортны при длительном использовании, исключают натирание кожи и нарушение микроциркуляции.

Назначение изделий:

для профилактики и лечения: послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей; растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома; нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей; острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей; хронических дегенеративных заболеваний; лёгкой нестабильности и излишней подвижности в суставе; атрофии мышечных тканей после снятия гипса; для профилактической меры травматизма, при занятиях спортом

Показания к применению:

для профилактики и лечения:

- послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов и снятия связанных с ними отеков, воспалений и болевого синдрома;
- нарушения обменных и регенеративных процессов сустава и прилегающих тканей;
- острых и хронических воспалительных заболеваний суставов и окружающих тканей;
- хронических дегенеративных заболеваний сустава;
- лёгкой нестабильности и излишней подвижности в суставе;
- атрофии мышечных тканей в области сустава после снятия гипса;
- для профилактической меры травматизма, при занятиях спортом.

Противопоказания к применению:

- открытые раны в области соприкосновения с изделием;
- местные кожные заболевания (дерматиты);
- аллергические реакции на материалы биндажа.

Меры предосторожности:

- Не применять после истечения срока годности;
- Не применять при наличии дефектов изделий при визуальном осмотре.

Возможные побочные действия:

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

Указания по эксплуатации:

- Применять изделие следует согласно рекомендациям Вашего доктора.
- Изделие предназначено только для индивидуального использования.
- Продолжительность использования изделия определяется специалистом.
- При появлении аллергической реакции необходимо обратиться к специалисту.

- Использовать изделие следует только для областей тела, которые указаны в рекомендациях.
- Совместное применение с другими изделиями (например, с компрессионными чулками) должно быть согласовано с Вашим доктором.
- Изделие следует снимать во время длительных перерывов на отдых (например, сон, длительное пребывание в сидячем положении).
- Если Вы заметили любые необычные изменения в процессе эксплуатации изделия, например: усиление Ваших симптомов, неприятные ощущения, следует немедленно снять его и обратиться к доктору.
- Подбирать изделия нужно в соответствии с размерами, указанными в таблице на упаковке (см. таблицу подбора типоразмеров на упаковке).

Правила по уходу за изделием:

- Ручная стирка мягкими моющими средствами при температуре, не более 40°C.
- Не отжимать;
- Сушить в расправленном виде, вдали от нагревательных приборов и не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- Предохранять изделие от воздействия прямого солнечного света.

Условия хранения

- хранить изделие рекомендуется в упаковке при относительной влажности не более 80% и температуре не ниже +5°C и не выше +40°C на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Гарантия изготовителя


- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям ТУ 32.50.22-001-25779800-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Срок годности бандажей 5 лет с даты изготовления.
- Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев с даты продажи, в пределах срока годности.

Инструкция по применению:

- Проверить целостность изделия методом визуального осмотра.
- Осуществить гигиенические мероприятия по уходу за кожей рук/ног, снять украшения, которые могут повредить кожу рук/ног и изделие.
- Подбирать изделия нужно в соответствии с размерами, указанными в таблице на упаковке (см. таблицу подбора типоразмеров на упаковке). Если обхват Вашего сустава является пограничным значением в таблице подбора типоразмеров и Вы затрудняетесь с выбором, то Вам следует проконсультироваться со специалистом (врачом), так как использование изделия большего размера обеспечит Вам меньшее сжатие, менее сильную поддержку сустава, возможно небольшое сползание изделия вниз, а использование изделия меньшего размера обеспечит Вам более плотное прилегание к телу, более сильную поддержку сустава, однако может стать причиной местного сдавливания тканей, нижележащих кровеносных сосудов и нервов. Будьте внимательны при выборе изделия.
- Рекомендации по правильному надеванию медицинского изделия:


Бандаж на колено.

1. Надевать изделие нужно так, чтобы более тонкий его участок располагался с тыльной стороны колена, боковой шов должен располагаться сбоку и немного сзади коленного сустава. (1)
2. Выверните верхнюю часть изделия наизнанку. (2)
3. Натяните в этом состоянии бандаж на икру ноги до середины коленной чашечки. (3)
4. Раскатайте ту часть бандажа, которая была наизнанку расправьте изделие по ноге. При необходимости поправьте бандаж. (4)
5. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать коленный сустав слишком сильно. (4)

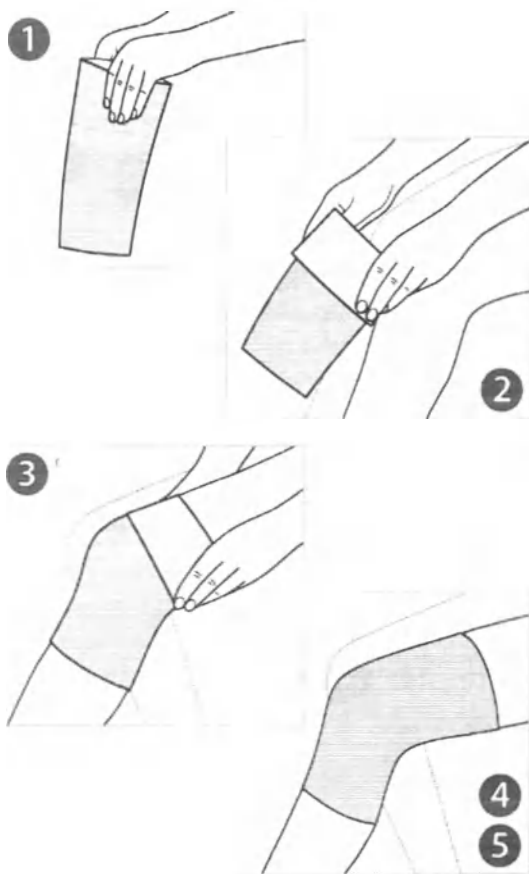


Бандаж на голеностоп.

1. Верхний край изделия обработан на краеобметочной машине (оверлок) с прокладыванием укрепляющей эластичной ленты. Убедитесь в том, что Вы надеваете изделие в нужном направлении. (1)
2. Выверните верхнюю часть изделия наизнанку. (2)
3. Удерживая бандаж за область пятки, равномерно натяните его на стопу. При необходимости поправьте изделие. (3)
4. Раскатайте ту часть бандажа, которая была наизнанку и расправьте его по ноге. (4)
5. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать голеностопный сустав слишком сильно. (4)

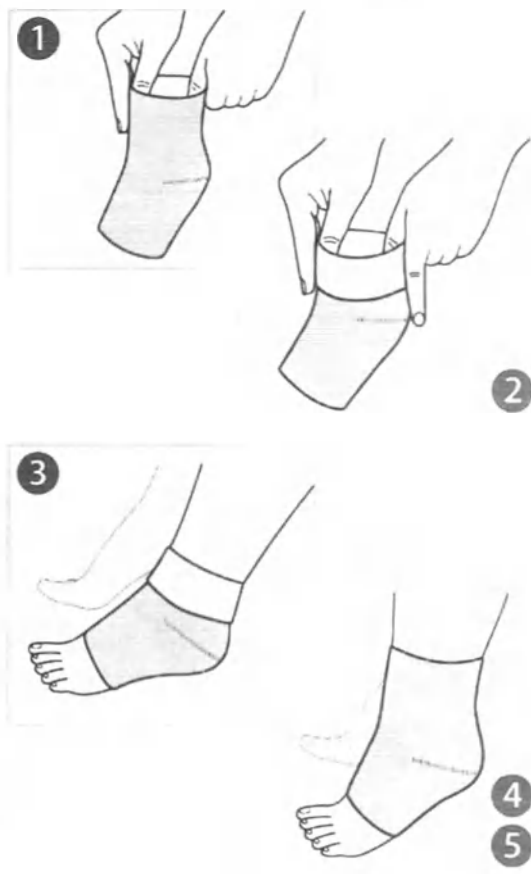

Бандаж на локоть.

1. Выверните верхнюю часть изделия наизнанку. (1)
2. Натяните бандаж в этом состоянии до локтевого сустава. (2, 3)
3. Раскатайте ту часть бандажа, которая была наизнанку и равномерно расправьте изделие по руке. При необходимости поправьте бандаж. (4)
4. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать локтевой сустав слишком сильно. (4)

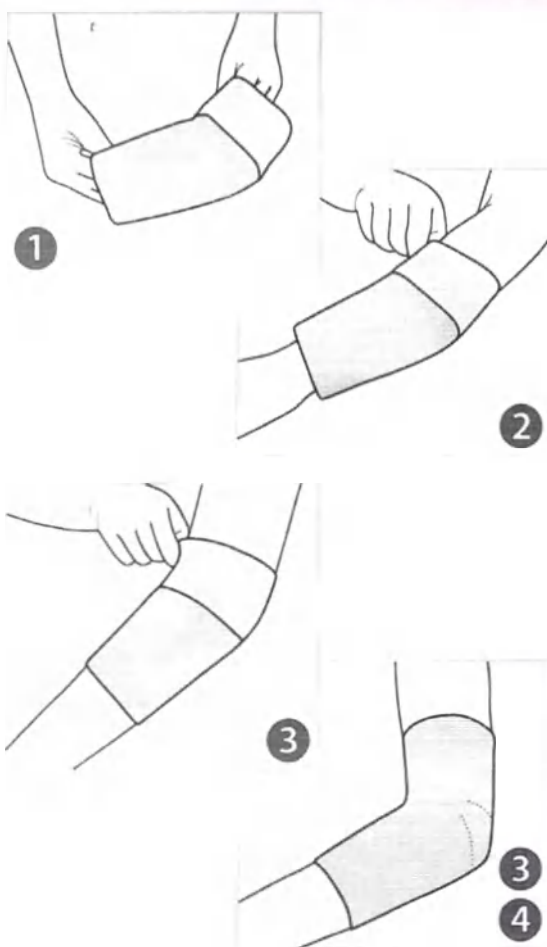

Бандаж на запястье.

1. Убедитесь в том, что перед Вами нужное для Вас изделие (на правую или на левую руку). Стикер с данной информацией размещен на упаковке изделия. (1)
2. Удерживая бандаж за фиксирующую полосу, медленно натяните его на руку. При необходимости поправьте бандаж. (2)
3. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхностью, но не пережимать лучезапястный сустав слишком сильно. (3)



Утилизация

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) листов
цифрами прописью

Должность Директор Евиленов А.В. Ф.И.О.

Подпись _____

« 25 » 06 2020 г.

МП

