

-4-



Президент МБОУИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.



-2-



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

Только для диагностики *in vitro*

ТРИС-НСІ БУФЕР

REF P-8


ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЕМОСТАЗА

МБООИ ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ






Президент МБОУИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

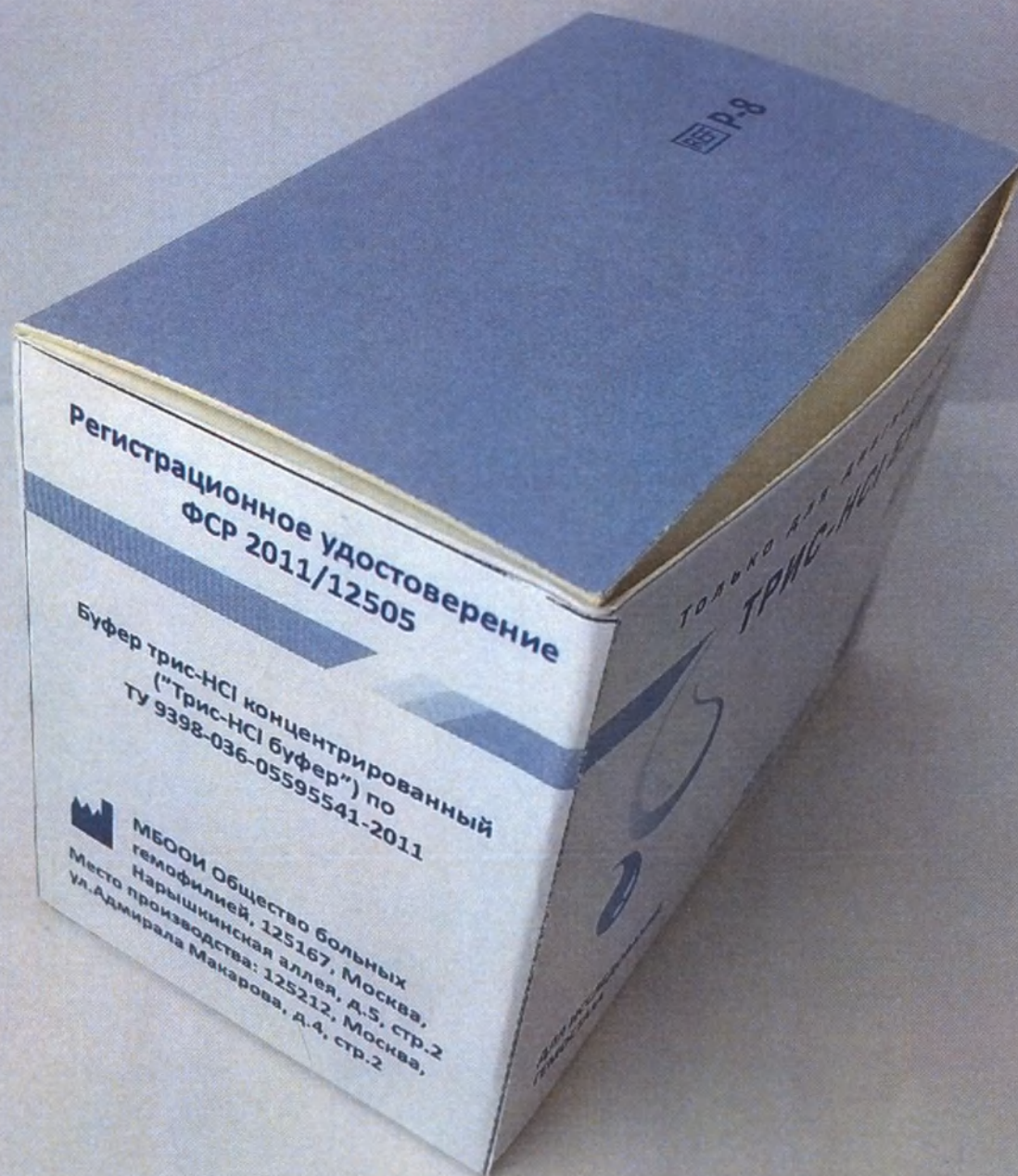



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

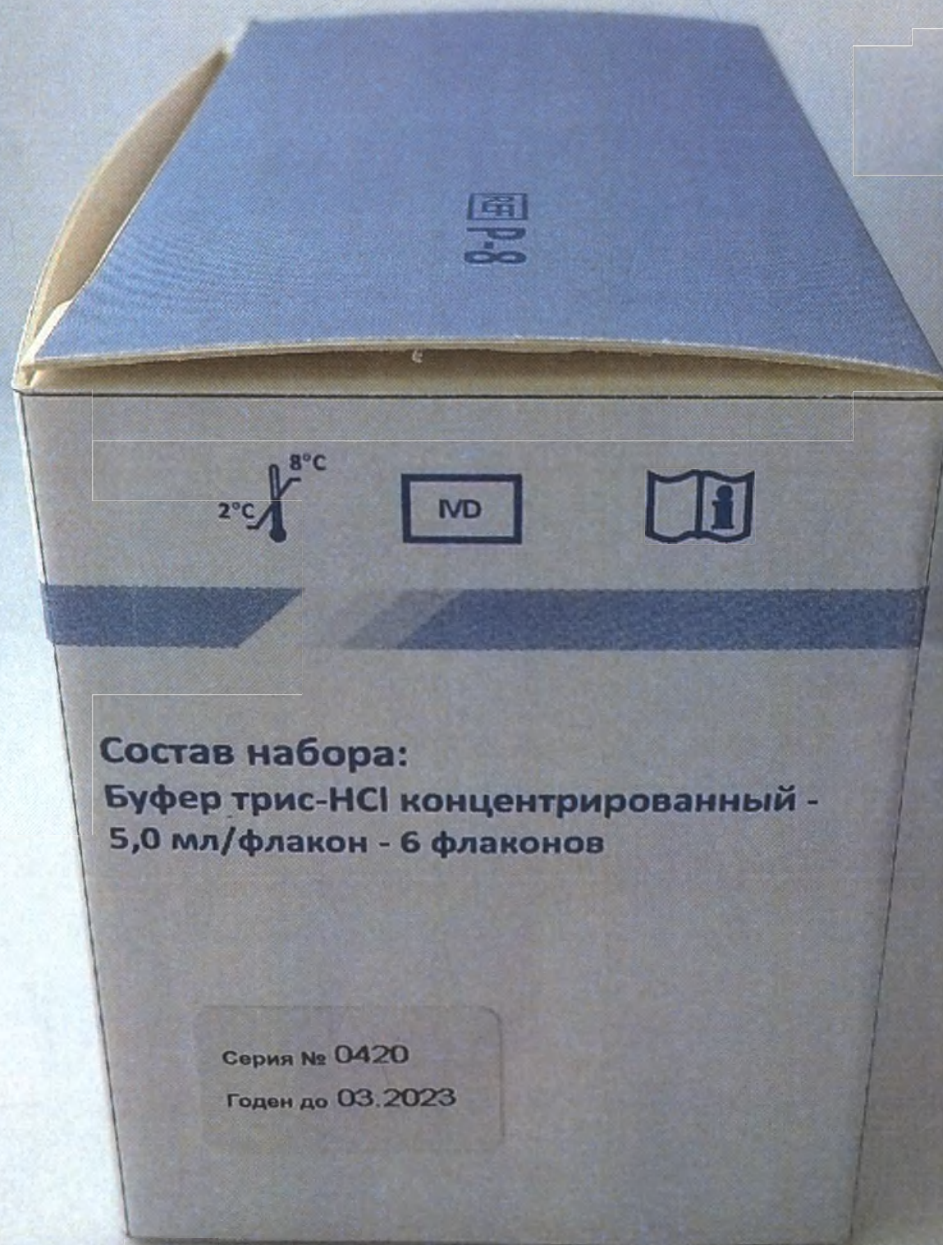



Президент М500И
Общество больных гемофилией
Жулев Ю.А.

Только для диагностики in vitro

ТРИС-НСІ БУФЕР

REF P-8

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЕМОСТАЗА

М500И ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



ТРИС-НСІ БУФЕР

Код Р-8, Р-8/1



ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия для диагностики
in vitro «Буфер трис-НСІ концентрированный
(«Трис-НСІ буфер») по ТУ 9398-036-05595541-2011»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначенное применение. Медицинское изделие для диагностики in vitro «Буфер трис-НСІ концентрированный («Трис-НСІ буфер») по ТУ 9398-036-05595541-2011» (сокращенное наименование – «Трис-НСІ буфер») предназначено для разведения плаз калибраторов, контрольных плазм и исследуемых образцов плазмы крови пациентов при проведении тестов для исследования гемостаза [1, 2].

Предназначенный пользователь. Тесты с использованием реагента Трис-НСІ буфер может проводить врач-лаборант или фельшер-лаборант. Реагент предназначен только для профессионального применения в клинической лабораторной диагностике.

Диагностическая роль. Обеспечение правильности определения различных показателей гемостаза во многих случаях требует разведения плазмы пациента, плазмы-калибратора и контрольной плазмы. Реагент Трис-НСІ буфер позволяет проводить такие разведения [1, 2].

Область применения. Область применения реагента Трис-НСІ буфер - клиническая медицина, клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Состав

Буфер Трис-НСІ концентрированный – 5мл/флакон – 6 флаконов.
Трис-НСІ буфер поставляется в двух вариантах исполнения.

Трис-НСІ буфер расфасован в стеклянные флаконы, укупоренные пробками.

Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов
«Общество больных гемофилией»

Паспорт медицинского изделия №0420 от 03.03.2020

«Буфер трис-НСІ концентрированный («Трис-НСІ буфер») по ТУ 9398-036-05595541-2011»

Сокращенное наименование: «Трис-НСІ буфер»

Номер по каталогу производителя: Р-8

Только для диагностики in vitro

Состав: Буфер трис-НСІ концентрированный – 5,0 мл во флаконе - 6 флаконов.

Серия: 0420

Годен до: 03.2023

Наименование показателя	Требования по ТУ 9398-036-05595541-2011	Результаты контроля (соответствие пунктам ТУ)
Комплектность и состав	п. 1.3	Соответствует варианту исполнения 1
Упаковка	п. 1.4	Соответствует



Президент МБОУ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.





Президент МБОУИ
"Общество больных гемофилией"
Хулев Ю.А.





Президент МБОУ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

Только для диагностики *in vitro*

ТРИС-НСІ БУФЕР

REF P-8/1

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЕМОСТАЗА

МБОУ ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ





Президент МБОУИ
"Общество Больных Гемофилией"
Жуков Ю.А.

Регистрационное удостоверение
ФСР 2011/12505

Буфер Трис-НСI концентрированный
("Трис-НСI буфер") по
ТУ 9398-036-05595541-2011


МБОУИ Общество больных
гемофилией, 125167, Москва,
Нарышкин, 125122, Москва,
Место производства: 125212, Москва,
ул. Армыраза Макарова, д.4, стр.2

ТОЛЬКО ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ТРИС-НСI БУФЕР

-10-

Президент МБОУ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.





Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.

Только для диагностики in vitro

ТРИС-НСІ БУФЕР

REF P-8/1

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЕМОСТАЗА

МБООИ ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



ТРИС-НСІ БУФЕР

Код P-8, P-8/1

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия для диагностики
in vitro «Буфер трис-НСІ концентрированный
(«Трис-НСІ буфер») по ТУ 9398-036-05595541-2011»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначенное применение. Медицинское изделие для диагностики in vitro «Буфер трис-НСІ концентрированный («Трис-НСІ буфер») по ТУ 9398-036-05595541-2011» (сокращенное наименование – «Трис-НСІ буфер») предназначено для разведения плазм калибраторов, контрольных плазм и исследуемых образцов плазм крови пациентов при проведении тестов для исследования гемостаза [1, 2].

Предназначенный пользователь. Тесты с использованием реагента Трис-НСІ буфер может проводить врач-лаборант или фельдшер-лаборант. Реагент предназначен только для профессионального применения в клинической лабораторной диагностике.

Диагностическая роль. Обеспечение правильности определения различных показателей гемостаза во многих случаях требует разведения плазмы пациента, плазмы-калибратора и контрольных плазм. Реагент Трис-НСІ буфер позволяет проводить такие разведения [1, 2].

Область применения. Область применения реагента Трис-НСІ буфер – клиническая медицина, клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Состав

Буфер Трис-НСІ концентрированный – 5мл/флакон – 6 флаконов.

В варианте исполнения 1 Трис-НСІ буфер расфасован в стропы

Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов
«Общество больных гемофилией»

Паспорт медицинского изделия №0420 от 03.03.2020

«Буфер трис-НСІ концентрированный («Трис-НСІ буфер») по ТУ 9398-036-05595541-2011»

Сокращенное наименование: «Трис-НСІ буфер»

Номер по каталогу производителя: P-8/1 ;

Только для диагностики in vitro

Состав: Буфер трис-НСІ концентрированный – 5,0 мл во флаконе – 6 флаконов.

Серия: 0420

Наименование показателя	Требования по ТУ 9398-036-05595541-2011	Годен до: 03.20
Комплектность и состав	п. 1.3	Результаты контроля (соответствие пунктам)
Упаковка	п. 1.4	Соответствует варианту исполнения
Маркировка	п. 1.5	Соответствует варианту исполнения

-27-

Президент МБОУ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.



Пронумеровано
и прошнуровано 12 листов
Президент МБОУ «Общество
больных гемофилией»

Ю.А.Жулёв

