

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.
«18» октября 2010 г.

1. На нетканной основе
2. На полимерной основе
3. На нетканой основе с адгезивной подушкой
4. На полимерной основе гидроизоляционная
5. На полимерной основе с адгезивной подушкой
6. На полимерной основе гидроизоляционная

А. Для фиксации названных предметов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Отделить бумажное защитное покрытие с помощью ногтя или палочки, удерживая за край изделия пальцем.
- Приложить изделие к ране, прижимая пальцами, чтобы оно плотно прилегло к ране.
- Зафиксировать изделие, прижимая пальцами, чтобы оно плотно прилегло к ране.

Повязки раневые стерильные и нестерильные, адгезивные и неадгезивные

Производства Pharmaplast S.A.E., («Фармапласт С.А.Е.»), Египет

Применять край повязки и ленту, прижимая пальцами, чтобы она плотно прилегла к ране. При этом пальцы должны быть чистыми и сухими. Если пальцы не чистые, их следует вымыть с мылом.

Б. Для фиксации на рану.

- Промыть рану и прилегающую к ней область чистой водой или физиологическим раствором. Рана и прилегающая область должны быть сухими.
- Приложить изделие к ране, прижимая пальцами, чтобы оно плотно прилегло к ране. При этом пальцы должны быть чистыми и сухими. Если пальцы не чистые, их следует вымыть с мылом.
- Наложить изделие, прижимая пальцами, чтобы оно плотно прилегло к ране.

Инструкция по применению раневых повязок стерильных и нестерильных, адгезивных и неадгезивных:

Повязки раневые стерильные и нестерильные, адгезивные и неадгезивные:

1. На нетканой основе
2. На полимерной основе
3. На нетканой основе с вязкоэластичной подушечкой
4. На полимерной основе гидроколлоидные
5. На полимерной основе с вязкоэластичной подушечкой
6. На полимерной основе гидрогелевые

А. Для фиксации медицинских приспособлений.

Взять повязку пальцами за специальный выступ для удерживания.

- Отклеить бумажное защитное покрытие с центральной части повязки, удерживая за крылышки повязки
- Наложить повязку сверху медицинского приспособления на место пункции.
- Зафиксировать повязку, прижав и разгладив ладонью для лучшей адгезии, не допуская возникновения складок

Удаление повязки:

Приподнять край повязки и легко потянуть ее. Данный способ снятия повязки путем растяжения является безболезненным и сокращает риск раздражения кожи при частой смене повязки.

Б. Для наложения на рану.


- Промыть рану и прилегающий к ней участок кожи физиологическим раствором. Рана и прилегающий участок кожи должны быть сухими.
- Приготовить повязку – удалить защитное бумажное покрытие с повязки. В загнутом состоянии это покрытие помогает наложить повязку на рану таким образом, чтобы не касаться при этом поверхности повязки, предназначенной для контакта с раной.
- Наложить повязку непосредственно на поверхность раны.

- Чтобы адаптировать размеры повязки к размерам раны, её можно предварительно обрезать с помощью стерильных ножниц.
- Зафиксировать края повязки, не допуская возникновения складок. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки.
- Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и от того, как развивается процесс заживления.

Условия хранения и меры предосторожности.

- Повязки прилипают к хирургическим перчаткам из латекса. В этом случае для того, чтобы облегчить работу рекомендуется смочить перчатки физиологическим раствором.
- При наличии клинических признаков, указывающих на наличие местной инфекции, настоятельно рекомендуется предварительно провести курс лечения с применением тонких антибактериальных повязок.
- При лечении рваных, глубоких ран или ран со сложным рельефом, нужно накладывать повязку таким образом, чтобы её можно было в любой момент осмотреть, и чтобы к ней в любой момент имелся доступ.
- Повязка не подлежит повторной стерилизации.
- Срок хранения: 3 года.

**Генеральный директор
ООО «Медком-МП»**

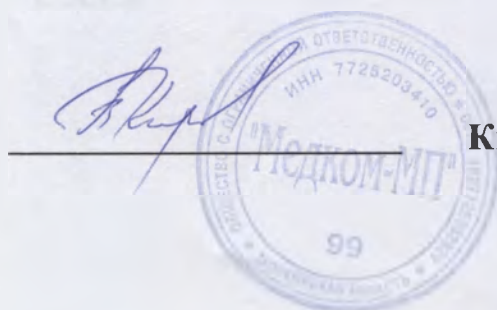

Кирсенко К.В.