



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕДКОМ-МП

140055, Московская область, Люберецкий район,
г.Котельники, микрорайон Белая Дача,
промзона Технопром
тел./факс (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 40702810000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 30101810100000000162
БИК 044579162

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Повязки медицинские фиксирующие рулонные нестерильные адгезивные

Производитель: «Фармапласт С.А.Е.», Египет / Pharmaplast S.A.E., Amria
Free Zone, 23512 Alexandria, Egypt. Тел.: 00203-4500264, факс: 00303-
4500263, e-mail: mamdouh@pharmaplast-online.com.

Инструкция по применению

Повязки медицинские фиксирующие рулонные нестерильные адгезивные:

1. на нетканой основе Silkofix;
2. на полимерной основе Silkofix PU-Roll.

Способ применения:

- Извлечь повязку из картонного блока.
- Взять повязку пальцами и отклеить бумажное защитное покрытие с центральной части повязки.
- Наложить повязку сверху на первичную повязку или на медицинское устройство или на поврежденный участок кожи методом намотки сплошную или отрезать кусок нужного размера.
- Зафиксировать повязку, прижимая и разглаживая при наматывании ладонью для лучшей адгезии, не допуская возникновения складок.

- Отклеить дополнительное полимерное покрытие повязки Silkofix PU-Roll (повязка прозрачная позволяет следить за степенью абсорбции повязки и состоянием медицинских устройств).

Удаление повязки:

Приподнять край повязки и легко потянуть ее. Данный способ снятия повязки путем растяжения является безболезненным и сокращает риск раздражения кожи.

Меры предосторожности и противопоказания

- Повязка является одноразовой, не стерильной.
- Не применяйте повязку при индивидуальной непереносимости материалов. При появлении раздражения прекратите использовать повязку и обратитесь за консультацией к врачу.

Условия хранения

Повязки следует хранить в сухом прохладном темном месте при комнатной температуре.

Срок годности – 5 лет.

Генеральный директор
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.

2м09

