

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕДКОМ-МП

140055, Московская область, Люберецкий район,
г.Котельники, микрорайон Белая Дача,
промзона Технопром
тел./факс (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 40702810000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 30101810100000000162
БИК 044579162

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Повязки медицинские защитные офтальмологические стерильные
адгезивные на нетканой основе Silkofix Ofta B, Silkofix Ofta M**

Производитель: «Фармапласт С.А.Е.», Египет / Pharmaplast S.A.E., Amria
Free Zone, 23512 Alexandria, Egypt. Тел.: 00203-4500264, факс: 00303-
4500263, e-mail: mamdouh@pharmaplast-online.com.

Инструкция по применению

**Повязки медицинские защитные офтальмологические стерильные
адгезивные на нетканой основе Silkofix Ofta B, Silkofix Ofta M.**

Способ применения:

- Извлечь повязку из индивидуальной стерильной упаковки.
- Снять защитные бумажные покрытия и, не прикасаясь к подушечке пальцами, приложить на область глаза.
- Края повязки надежно зафиксировать, не допуская возникновения складок.
- Рекомендуются менять повязку через 1-2 дня или при необходимости.

Удаление повязки:

Приподнять край повязки и легко потянуть ее. Данный способ снятия

повязки путем растяжения является безболезненным и сокращает риск раздражения кожи.

Меры предосторожности и противопоказания

- Повязка является одноразовой, стерильной.
- Повязка упакована в индивидуальный бумажный пакет. Не используйте повязку, если стерильная упаковка повреждена.
- Не применяйте повязку при индивидуальной непереносимости материалов. При появлении раздражения прекратите использовать повязку и обратитесь за консультацией к врачу.

Условия хранения

Повязки следует хранить в сухом прохладном темном месте при комнатной температуре.

Срок годности – 5 лет.

Генеральный директор
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.